

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель Испытательного
Лабораторного Центра
ФГУ «НИИ ФХМ» ФМБА России
Академик РАН, профессор

В.И. Сергиенко

« » 2012 г.

Генеральный директор
ООО «БЕЛЛА ВОСТОК»
Ежи Горковенко



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

Повязка гидрогелевая (аморфный гидрогель) стерильная Medisorb G (Медисорб Г) под товарным знаком matopat

1. НАЗНАЧЕНИЕ:

создает и поддерживает влажную среду в ране, которая благоприятствует процессу лечения и ускоряет его

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Характеристика	
Описание	Гидрогелевое перевязочное средство в тубике
Свойство	- эффективно увлажняет некротическую ткань; - поглощает излишки экссудата вместе с растворённой некротической тканью и остатками фибрина; - процесс очищения относится только к некротическим тканям.
Физико-химические свойства	
Параметр	Значение
pH	5,5-6,5
Вязкость	40000 – 70000 сантипаузов
Абсорбционная способность	
35% -ый гелатин	9,0-14,0%
20%-ый агар	3,0 – 6,0%

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- Не применять у пациентов с аллергией на гель.
- Не применять на ожоговые раны III степени.
- Не применять в случае повреждения или преждевременного открывания упаковки.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ:

Рекомендуется применять повязку Medisorb G под контролем врача или медицинской сестры и придерживаться элементарных основ асептики.

- Перед применением повязки следует сполоснуть рану 0,9% физиологически раствором и осушить окружающую ее кожу.

- Затем следует вынуть тубу из упаковки и стянуть пробку, наконечник протереть салфеткой для дезинфекции.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:

- Сохраняя чистоту наконечника упаковки, следует деликатно выдавить гель на поверхность раны.
- Выдавленный гель должен выступать над мертвыми клетками минимум на высоту 5 мм.
- Затем следует закрыть рану вторичной повязкой.
- Одна повязка предназначена для одного применения для одного лица, не использованную часть следует выкинуть.
- В случае некротических ран Medisorb G следует заменять каждые 24 часа. В случае чистых ран гель может оставаться максимум на срок 3 дня. повязку следует сменить сразу же, если появится протекание геля через вторичную повязку.
- Чтобы удалить гель с раны следует ее промыть 0,9% физиологическим раствором.

Повязка не прилегает к поверхности раны, что минимизирует риск повреждения клеток и делает его замену безболезненной для пациента.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- Изделие одноразового применения.
- Продукт стерилизован радиационным способом.
- Защищать от нагревания (тепла) и от влаги.
- Ограничение температуры от +5°C до +25°C.
- Повторное применение изделия связано с очень высоким риском инфицирования пациента и оно не допускается.
- При отсутствии нарушений изделие используется по назначению.

Генеральный директор
ООО «Цирми»
Екатерина Горюнова
2 листа

