

**ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРНЫЕ
СО ЗВУКОВЫМ СИГНАЛОМ ПЧ-5**

**ПАСПОРТ
НА 35-00-00 ПС**

Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с устройством настольных процедурных часов со звуковым сигналом ПЧ-5 (в дальнейшем часы) и руководства при их эксплуатации.

НЕ ПРИСТУПАТЬ К РАБОТЕ, НЕ ОЗНАКОМИВШИСЬ С ПАСПОРТОМ!

1 НАЗНАЧЕНИЕ

- 1.1 Часы применяются в лечебных учреждениях и предназначены для контроля длительности процедуры в медицинских учреждениях.
- 1.2 Часы предназначены для эксплуатации в следующих условиях:
- температура окружающего воздуха от +10 до +35 °С;
 - относительная влажность окружающего воздуха до 80% при температуре +25 °С.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1 Часы имеют электронный механизм. Погрешность времени проведения процедуры в диапазоне от 1 до 30 минут относительно текущего времени, при температуре окружающего воздуха (+23 ± 5) °С в пределах ± 5 с.
- 2.2 Часы обеспечивают подачу звукового сигнала после отработки любого интервала времени кратного 1 мин в диапазоне от 1 до 30 мин.
- 2.3 Длительность звукового сигнала от 10 до 55 с.
- 2.4 Питание электрического устройства часов осуществляется от сети переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением 220 В при допустимых отклонениях напряжения сети на ± 10% от номинального.
- 2.5 По защите от поражения электрическим током часы выполнены по классу защиты II тип В по ГОСТ Р 50267.0-92.
- 2.6 Мощность, потребляемая часами от сети при включенном зуммере, не более 5 ВА.
- 2.7 Средняя наработка на отказ не менее 2000 ч.
- 2.8 Средний срок службы не менее 5 лет.
- 2.9 Габаритные размеры (без штырьков): (156±2 x 114±2 x 175±2) мм.
- 2.10 Масса часов - не более 0,8 кг.

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Обозначение документа	Количество, шт
1. Часы настольные процедурные со звуковым сигналом ПЧ-5	НА 35-00-00	1
2. Штырек магнитный	НА 35-04-00 – НА 35-04-09	10
<u>Эксплуатационная документация</u>	НА 35-00-00 ПС	
3. Паспорт		1

4 ПОРЯДОК РАБОТЫ

4.1 Если часы длительное время находились в условиях повышенной влажности или температуры, резко отличающейся от рабочей, необходимо выдержать часы в помещении при нормальных условиях в течение 12 часов.

4.2 Для обеспечения отсчета времени при проведении одновременно нескольких процедур, штырки имеют цифровые обозначения. Одновременно может производиться отсчет времени для десяти процедур.

4.3 Начало отсчета каждого получаса начинается со свечения нулевой отметки на циферблате. На циферблате расположены 30 отверстий и 30 светодиодов напротив каждого отверстия. Каждое отверстие кратное 1 минуте.

4.4 От нулевой отметки на циферблате произвести отсчет необходимого для процедуры числа минут. Вынуть штырек магнитный (далее- штырек) из гнезда в верхней части корпуса и вставить его в отверстие на циферблате, в соответствии с длительностью процедуры.

4.5 Вставить вилку сетевого адаптера в розетку сети.

4.6 По истечении установленного времени подается звуковой сигнал, свидетельствующий об окончании процедуры. После этого следует вынуть штырек и установить его в гнездо сверху на корпусе часов.

4.7 Текущее время часов установить на таймере кнопками «часы», «минуты».

4.8 При необходимости установления точного времени начала отсчета процедуры, старт процедуры производить непосредственно в момент перехода минут.

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1 Во избежание прекращения действия гарантии вскрывать заднюю крышку часов не допускается.

5.2 Техническое обслуживание и ремонт часов производится ремонтными предприятиями системы "Медтехника".

5.3 При техническом обслуживании производится проверка работоспособности звуковой сигнализации, суточного хода.

6 ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Наименование неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
По истечении установленного времени не подается звуковой сигнал.	2. Неисправен сетевой адаптер.	2. Замените сетевой адаптер.

Устранение других неисправностей электрических цепей часов производится в специализированных мастерских.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Часы настольные процедурные со звуковым сигналом ПЧ-5, заводской номер _____, соответствуют ТУ 9452-013-34711238-2014 и признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска _____ Контролер ОТК _____

8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие часов требованиям ТУ 9452-013-34711238-2014 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации часов 12 месяцев со дня продажи.

8.3 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует и заменяет часы и их части по предъявлении гарантийного талона.

При механических повреждениях, а также при эксплуатации часов с нарушением правил руководства по эксплуатации, ремонт производится за счет потребителя.

403953, Волгоградская обл., г. Новоаннинский, пер. Красные Баррикады, 32.
Факс: (84447) 3-48-30, 3-46-68. E-mail: nzema@narod.ru WWW.nzema.ru
Телефоны: Директор: 3-48-30, бухгалтерия: 3-50-71, сбфт: 3-48-71.

ТАЛОН

на ремонт в течение гарантийного срока
Часы настольные процедурные со звуковым сигналом ПЧ-5

Заводской номер _____
Дата выпуска _____
Приобретен _____

(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию _____
(дата, подпись)

Владелец и его адрес _____

Выполнены работы по устранению неисправностей: _____

Механик _____ Владелец _____
(подпись) (подпись)

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель ремонтного
предприятия _____
(наименование предприятия)

(Ф.И.О., подпись)
« ____ » _____ 201 ____ г.

М.П.

_____ Линия отреза _____

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1

на ремонт в течение гарантийного срока
Часы настольные процедурные со звуковым сигналом ПЧ-5

Талон изъят « ____ » _____ 201 ____ г.

Руководитель предприятия _____
(Ф.И.О., подпись)

Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 (два) лист 9

Генеральный директор
ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА»

С.А. Тимченко

9 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

9.1 В случае отказа часов в работе или неисправности их в период гарантийного срока, а также обнаружения некомплектности при первичной приемке часов, потребитель должен выслать в адрес завода-изготовителя письменное сообщение со следующими данными:

- тип часов, заводской номер и дата выпуска;
- характер дефекта (или некомплектности);
- адрес, номер телефона.

10 СВЕДЕНИЯ О УПАКОВКЕ И ХРАНЕНИИ

10.1 Часы упакованы в соответствии с требованиями ТУ 9452-013-34711238-2014.

10.2 Часы должны храниться в закрытом помещении при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности до 80% при температуре +25 °С.

10.3 Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.