

УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Ковидиен Евразия»




М.Л. Бокова
2011 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Датчики для церебрального/соматического оксиметра Invos

2011

Присоедините датчики к многократно используемым кабелям датчиков. Следует подключить синие разъемы. (Кабель датчика может быть подключен к датчикам до или после их установки). На одном и том же мониторе не допускается использовать разные датчики системы INVOS (взрослые, дети, грудные дети и новорожденные).

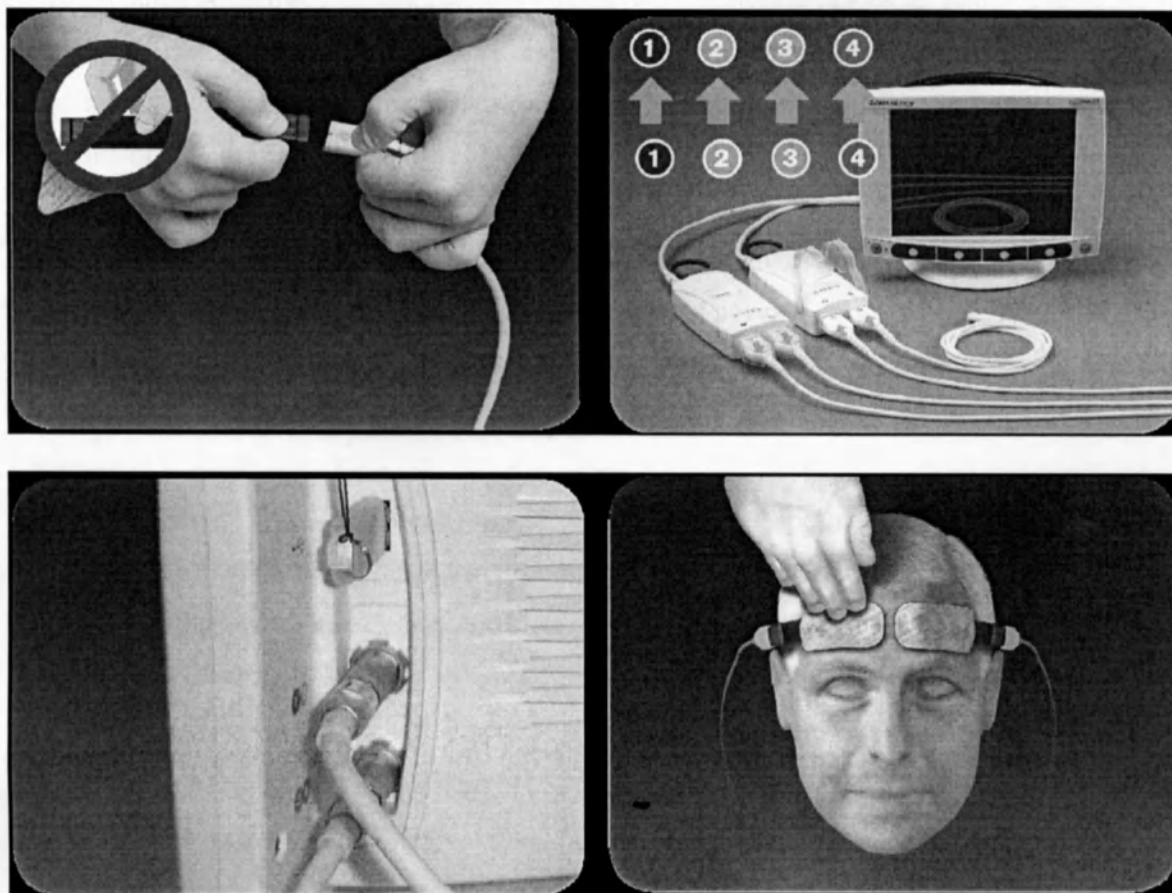

Очистка и дезинфекция:

1. Смочить чистой сухой марлевой тампон чистящим раствором. Протереть этим тампоном все поверхности датчика и кабеля.
2. Смочить другой чистой сухой марлевой тампон стерилизованной или дистиллированной водой. Протереть этим тампоном все поверхности датчика и кабеля.
3. Вытереть насухо все поверхности датчика и кабеля чистым сухим марлевым тампон.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- 10.1. Применять для пациентов согласно инструкции к датчику.
- 10.2. Только для наружного применения в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Запрещается устанавливать датчик датчики на повреждённой или не восстановившейся коже, участках кожи с сильным отёком.

Запрещается стерилизовать облучением, паром или этилен оксидом. Подобная стерилизация может привести к повреждению датчика (многократные)

Неправильная установка датчика может привести к получению неправильных показаний.

Использование датчиков при ярком свете может привести к получению не точных показаний. При наличии яркого света место установки датчика следует накрывать непрозрачным материалом.

Применение внутрисосудистых красителей или наружных красящих веществ, таких как лак для ногтей, может привести к получению не точных показаний.

Перемещение устройств снижает производительность датчика.

Не применяйте фиксирующую липкую ленту для фиксирования датчика на месте, или его фиксирования в закрытом положении, т.к. пульсация вен может привести к неточным показаниям насыщения.

Не применяйте пульсоксиметрические датчики во время магнитно-резонансного сканирования (МРС). Проходящий при этом ток может вызвать ожоги. Кроме того, применение датчиков может повлиять на изображение МРС, а установка МРС может повлиять на точность показаний пульсоксиметра.

УПАКОВКА:

Индивидуальная.

Упаковка – по ГОСТ Р 50444-92.

Датчик уложен в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354-92 и в коробки из гофрированного картона по ГОСТ 9142-90.

11.3 В транспортную тару вложен упаковочный лист по ГОСТ Р 50444-92

МАРКИРОВКА:

Маркировка содержит данные:

ГОСТ Р 50267.0-92.

На индивидуальную упаковку нанесены данные:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
- номер изделия по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- дата выпуска (год, месяц);
- наименование или условное обозначение изделия;
- CE 0123;

- указание веса и возраста пациента;
- не содержит латекса;
- перед применением прочитайте инструкцию;
- не подлежит стерилизации, стерилизация этилен оксидом
- только для однократного применения/для многократного применения
- символы по ГОСТ Р 50267.0-92.

На потребительскую тару наклеен ярлык, на котором указано:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование изделия;
- год и месяц упаковывания.
- CE 0123

Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192-96. На транспортную коробку нанесены манипуляционные знаки, соответствующие значениям: «Верх», «Беречь от влаги».

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Транспортировка может осуществляться любыми видами крытого транспорта

Температура окружающего воздуха: от -34° до 65°C

Относительная влажность воздуха: от 25% до 85%

ГАРАНТИЯ:

Производитель гарантирует качество настоящего оборудования в том случае, если оно используется в соответствии с инструкциями, содержащимися в данном руководстве, в течение 2 лет от даты покупки.

Всего прошито
и сшито
4 меша

