

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**  
**Мешки для хранения и утилизации медицинских отходов**  
**Классов А, Б, В, Г по ТУ 21.20.23-001-16498657-2019**

РУ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Дата: 27.03.2020г.

Подпись: \_\_\_\_\_



## 1. ОПИСАНИЕ

1.1 Мешки предназначены для сбора, хранения и дальнейшей утилизации использованных медицинских материалов, растворов, препаратов, биологических остатков и других медицинских отходов.

1.2 Мешки позволяют обеспечить безопасность медперсонала, занятого утилизацией опасных веществ и предметов; снизить риск внутрибольничных эпидемий; предохранить окружающую среду от распространения болезнетворных микроорганизмов и экологических катастроф.

1.3 В качестве основного материала используется полиэтилен высокой герметичности и плотности.

1.4 Мешки для медицинских отходов имеют двойную спайку на дне и оснащаются специальными замками-стяжками, бирками, которые позволяют быстро и эффективно герметизировать пакеты после их заполнения

1.5 Мешки имеют разные цвета в соответствии с тем классом отходов, для которых предназначены:

- Мешки класса А (белые) применяются для сбора нетоксичных отходов, не имеющих непосредственного контакта с анализами пациентов, инфекционных больных;
- Мешки класса Б (желтые) используют для сбора потенциально-инфицированных отходов;
- Мешки класса В (красные) применяются для сбора материалов, которые контактировали с пациентами, зараженными особо опасными инфекциями;
- Мешки класса Г (черные) используют для сбора просроченных лекарственных средств, остатков лекарственных и диагностических препаратов (в т. ч. химиопрепаратов), дезинфицирующих средств с истекшим сроком годности, ртутьсодержащих препаратов, приборов и оборудования.

1.6 Варианты исполнения мешков: см. Приложение А.

1.7 Плотность мешков варьируется от 8 до 200 мкм.

1.8 Объем мешков варьируется от 6 до 110 л.

1.9 Параметры мешков подбираются в соответствии с его назначением и местом использования.

## 2. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

2.1 Контроль внутрибольничных инфекций.

## 3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

При использовании изделий по назначению и в соответствии с инструкцией по применению противопоказаний и ограничений в применении нет.

## 4. ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Не выявлены.

## 5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

5.1 Перед применением проверить целостность пакета.

### ВНИМАНИЕ !

**Запрещается:**

- осуществлять любые операции с отходами без перчаток или необходимых средств индивидуальной защиты и спецодежды;

- устанавливать мешки на расстоянии менее 1 м от нагревательных приборов;
- применение изделий при наличии внешних повреждений;
- повторное применение изделия;
- использовать мешки для сбора острых, режущих и колющих предметов;
- утрамбовывать отходы;
- пересыпать (перегружать) неупакованные отходы;
- использование мешков с истекшим сроком годности.

## 6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- 6.1 Достаньте нужного вам типоразмера, класса опасности, плотности, объема из упаковки. Мешки в зависимости от класса отходов, для которых они предназначены имеют разные цвета, плотность, объем и размер.
- 6.2 Расправьте пакет и раскройте его по горловине.
- 6.3 Руками придайте ему округлую форму.
- 6.4 Вставьте его в подходящую по размеру тару.
- 6.5 Для фиксации пакета загните его края по краю тары.
- 6.6 Проверьте, касается ли дно пакета дна тары.
- 6.7 Заполните пакет на 3/4 отходами выбранного класса опасности. Избегайте попадания внутрь мешка острых предметов (открытых шприцов и иглоок, скальпелей и т.д.), которые могут повредить целостность пакета.
- 6.8 Соберите края пакета и выпустите из него воздух.
- 6.9 Перекрутите горловину пакета.
- 6.10 Герметизируйте пакет при помощи стяжки, обогнув перекрученную горловину пакета стяжкой и просунув гладкий хвостик стяжки в отверстие на другом ее конце.

## 7. ФОРМА ПОСТАВКИ

- 7.1 Комплект поставки изделий должен включать в себя:
- Мешки - 100 шт.;
  - замки-стяжки (при необходимости) - 100шт.;
  - бирки (при необходимости) – 100 шт.;
  - инструкция по применению.

## 8. МАРКИРОВКА

- 8.1 Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444, ГОСТ Р ИСО 15223-1, ГОСТ 12302 и требованиям настоящих ТУ.
- 8.2 На бирку должна быть нанесена следующая информация:
- сведения об отходах (наименование отходов, место сбора (наименование ЛПУ, подразделение ЛПУ), ответственное лицо, дата сбора).
- 8.3 На мешок должна быть нанесена следующая информация:
- наименование изделия;
  - обозначение настоящих технических условий;
  - наименование предприятия-изготовителя, его юридический адрес и контактные телефоны;
  - класс отходов, для которых предназначен мешок;
  - меры предосторожности (Работать в средствах индивидуальной защиты;
- Руками не утрамбовывать; Не использовать для сбора острого инструмента и жидких отходов пересыпание медицинских отходов из мешков не допускается; Применение мешков, имеющих признаки бракованного изделия (разрывы, посторонние включения в поверхности пакетов) не допускается; После заполнения примерно на 3/4 удалить из мешка воздух и осуществить герметизацию путем завязывания краев мешка узлом или иным способом);
- надписи «Не использовать повторно», «Не использовать при поврежденной упаковке» и/или соответствующие символы по ГОСТ Р ИСО 15223-1;
  - номер регистрационного удостоверения Росздравнадзора;
- 8.4 На групповую упаковку (транспортную упаковку) должна быть нанесена следующая информация:
- наименование предприятия-изготовителя;
  - наименование изделия;
  - геометрические размеры;
  - условия хранения и транспортировки;
  - количество изделий в групповой упаковке;

- номер партии;
- дата изготовления и соответствующий символ по ГОСТ Р ИСО 15223-1;
- гарантийный срок годности;
- номер регистрационного удостоверения Росздравнадзора;

## 9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

9.1 Мешки транспортируют всеми видами транспорта в чистых, сухих крытых транспортных средствах или универсальных контейнерах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

9.2 Условия транспортирования – по условиям хранения 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150.

9.3 Условия хранения изделий, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150.

## 10. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ

10.1 Изделия после использования утилизируются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790, относящимися к медицинским отходам классов А, Б, В, Г.

10.2 Упаковка, изделия с истекшим сроком годности, утилизируются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790, относящимися к медицинским отходам класса А.

## 11. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

–Мешки должны быть нетоксичными и не должны оказывать вредное воздействие на человека при их использовании в нормальных комнатных и атмосферных условиях (температура - от минус 20 °С до плюс 30 °С, давление - 760 мм рт.ст.).

–Запрещается устанавливать мешки на расстоянии менее 1 м от нагревательных приборов.

–Запрещается применение изделий при наличии внешних повреждений.

–Запрещается применение изделия по истечению срока годности.

–Запрещается повторное применение изделия.

## 12. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1 Гарантийный срок годности мешков 12 месяцев при соблюдении условий хранения.

12.2 Изготовитель: ООО «АМИКО», 665831, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 251-й, дом 2/1

Телефон: (3955)54-11-89, 89025660555

E-mail: artcom007@mail.ru

## 13. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ:

| Нормативный документ    | Название нормативного документа                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014 | Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования                                                        |
| ГОСТ Р 50444-92         | Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия                                                                                                                                              |
| ГОСТ 427-75             | Линейки измерительные металлические. Технические условия                                                                                                                                                             |
| ГОСТ 9142-2014          | Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия                                                                                                                                                           |
| ГОСТ 10354-82           | Пленка полиэтиленовая. Технические условия                                                                                                                                                                           |
| ГОСТ 12302- 2013        | Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия                                                                                                                                  |
| ГОСТ 14192-96           | Маркировка грузов                                                                                                                                                                                                    |
| ГОСТ 14236-81           | Пленки полимерные. Метод испытания на растяжение                                                                                                                                                                     |
| ГОСТ 15150-69           | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды |

|               |                                                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОСТ 17811-78 | Мешки полиэтиленовые для химической продукции. Технические условия                                  |
| ГОСТ 19360-74 | Мешки-вкладыши пленочные. Общие технические условия                                                 |
| ГОСТ 20477-86 | Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия                                            |
| ГОСТ 21798-76 | Тара транспортная наполненная. Метод кондиционирования для испытаний                                |
| ГОСТ 26663-85 | Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования |

### 14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Мешки для хранения и утилизации медицинских отходов по ТУ 21.20.23-001-16498657-2019

(наименование изделия, обозначение настоящих технических условий, наименование предприятия-изготовителя, класс отходов, для которых предназначен мешок) изготовлены и приняты в соответствии с требованиями ТУ 21.20.23-001-16498657-2019 и признаны годными к эксплуатации.



*[Handwritten signature]*  
личная подпись  
2022 г.

*[Handwritten signature]*  
расшифровка подписи

**Мешки для хранения и утилизации медицинских отходов Классов А, Б, В, Г по ТУ**

**21.20.23-001- 16498657-2019, варианты исполнения:**

1. Мешки для хранения и утилизации медицинских отходов класса А Ф, в исполнениях:

- 300\*330 мм, толщина: 8 мкм, 10 мкм, 12 мкм, 15 мкм, 20 мкм, 25 мкм,  
30 мкм, 35 мкм, 40 мкм, 45 мкм, 50 мкм, 55 мкм, 60 мкм, 65 мкм, 70 мкм, 75 мкм,  
80 мкм, 85 мкм, 90 мкм, 95 мкм, 100 мкм, 110 мкм, 120 мкм, 130 мкм, 140 мкм, 150 мкм, 160 мкм,  
170 мкм, 180 мкм, 190 мкм, 200 мкм;

- 300\*600 мм, толщина: 8 мкм, 10 мкм, 12 мкм, 15 мкм, 20 мкм, 25 мкм,  
30 мкм, 35 мкм, 40 мкм, 45 мкм, 50 мкм, 55 мкм, 60 мкм, 65 мкм, 70 мкм, 75 мкм,  
80 мкм, 85 мкм, 90 мкм, 95 мкм, 100 мкм, 110 мкм, 120 мкм, 130 мкм, 140 мкм, 150 мкм, 160 мкм,  
170 мкм, 180 мкм, 190 мкм, 200 мкм;

- 500\*600 мм, толщина: 8 мкм, 10 мкм, 12 мкм, 15 мкм, 20 мкм, 25 мкм,  
30 мкм, 35 мкм, 40 мкм, 45 мкм, 50 мкм, 55 мкм, 60 мкм, 65 мкм, 70 мкм, 75 мкм,  
80 мкм, 85 мкм, 90 мкм, 95 мкм, 100 мкм, 110 мкм, 120 мкм, 130 мкм, 140 мкм, 150 мкм, 160 мкм,  
170 мкм, 180 мкм, 190 мкм, 200 мкм;

- 600\*1000 мм, толщина: 8 мкм, 10 мкм, 12 мкм, 15 мкм, 20 мкм, 25 мкм,  
30 мкм, 35 мкм, 40 мкм, 45 мкм, 50 мкм, 55 мкм, 60 мкм, 65 мкм, 70 мкм, 75 мкм,  
80 мкм, 85 мкм, 90 мкм, 95 мкм, 100 мкм, 110 мкм, 120 мкм, 130 мкм, 140 мкм, 150 мкм, 160 мкм,  
170 мкм, 180 мкм, 190 мкм, 200 мкм;

- 700\*800 мм, толщина: 8 мкм, 10 мкм, 12 мкм, 15 мкм, 20 мкм, 25 мкм,  
30 мкм, 35 мкм, 40 мкм, 45 мкм, 50 мкм, 55 мкм, 60 мкм, 65 мкм, 70 мкм, 75 мкм,  
80 мкм, 85 мкм, 90 мкм, 95 мкм, 100 мкм, 110 мкм, 120 мкм, 130 мкм, 140 мкм, 150 мкм, 160 мкм,  
170 мкм, 180 мкм, 190 мкм, 200 мкм;

- 700\*1000 мм, толщина: 8 мкм, 10 мкм, 12 мкм, 15 мкм, 20 мкм, 25 мкм,  
30 мкм, 35 мкм, 40 мкм, 45 мкм, 50 мкм, 55 мкм, 60 мкм, 65 мкм, 70 мкм, 75 мкм,  
80 мкм, 85 мкм, 90 мкм, 95 мкм, 100 мкм, 110 мкм, 120 мкм, 130 мкм, 140 мкм, 150 мкм, 160 мкм,  
170 мкм, 180 мкм, 190 мкм, 200 мкм;

- 700\*1100 мм, толщина: 8 мкм, 10 мкм, 12 мкм, 15 мкм, 20 мкм, 25 мкм,  
30 мкм, 35 мкм, 40 мкм, 45 мкм, 50 мкм, 55 мкм, 60 мкм, 65 мкм, 70 мкм, 75 мкм,  
80 мкм, 85 мкм, 90 мкм, 95 мкм, 100 мкм, 110 мкм, 120 мкм, 130 мкм, 140 мкм, 150 мкм, 160 мкм,  
170 мкм, 180 мкм, 190 мкм, 200 мкм;

- 800\*900 мм, толщина: 8 мкм, 10 мкм, 12 мкм, 15 мкм, 20 мкм, 25 мкм,  
30 мкм, 35 мкм, 40 мкм, 45 мкм, 50 мкм, 55 мкм, 60 мкм, 65 мкм, 70 мкм, 75 мкм,  
80 мкм, 85 мкм, 90 мкм, 95 мкм, 100 мкм, 110 мкм, 120 мкм, 130 мкм, 140 мкм, 150 мкм, 160 мкм,  
170 мкм, 180 мкм, 190 мкм, 200 мкм;

2. Мешки для хранения и утилизации медицинских отходов класса А Ф Зс, в исполнениях:

-300\*330 мм, толщина: 8 мкм, 10 мкм, 12 мкм, 15 мкм, 20 мкм, 25 мкм,  
30 мкм, 35 мкм, 40 мкм, 45 мкм, 50 мкм, 55 мкм, 60 мкм, 65 мкм, 70 мкм, 75 мкм,  
80 мкм, 85 мкм, 90 мкм, 95 мкм, 100 мкм, 110 мкм, 120 мкм, 130 мкм, 140 мкм, 150 мкм, 160 мкм,  
170 мкм, 180 мкм, 190 мкм, 200 мкм;



30 мкм, 35 мкм, 40 мкм, 45 мкм, 50 мкм, 55 мкм, 60 мкм, 65 мкм, 70 мкм, 75 мкм,  
80 мкм, 85 мкм, 90 мкм, 95 мкм, 100 мкм, 110 мкм, 120 мкм, 130 мкм, 140 мкм, 150 мкм, 160 мкм,  
170 мкм, 180 мкм, 190 мкм, 200 мкм;

- 700\*800 мм, толщина: 8 мкм, 10 мкм, 12 мкм, 15 мкм, 20 мкм, 25 мкм, 30 мкм, 35 мкм, 40 мкм, 45 мкм, 50 мкм, 55 мкм, 60 мкм, 65 мкм, 70 мкм, 75 мкм, 80 мкм, 85 мкм, 90 мкм, 95 мкм, 100 мкм, 110 мкм, 120 мкм, 130 мкм, 140 мкм, 150 мкм, 160 мкм, 170 мкм, 180 мкм, 190 мкм, 200 мкм;

- 700\*1000 мм, толщина: 8 мкм, 10 мкм, 12 мкм, 15 мкм, 20 мкм, 25 мкм, 30 мкм, 35 мкм, 40 мкм, 45 мкм, 50 мкм, 55 мкм, 60 мкм, 65 мкм, 70 мкм, 75 мкм, 80 мкм, 85 мкм, 90 мкм, 95 мкм, 100 мкм, 110 мкм, 120 мкм, 130 мкм, 140 мкм, 150 мкм, 160 мкм, 170 мкм, 180 мкм, 190 мкм, 200 мкм;

- 700\*1100 мм, толщина: 8 мкм, 10 мкм, 12 мкм, 15 мкм, 20 мкм, 25 мкм, 30 мкм, 35 мкм, 40 мкм, 45 мкм, 50 мкм, 55 мкм, 60 мкм, 65 мкм, 70 мкм, 75 мкм, 80 мкм, 85 мкм, 90 мкм, 95 мкм, 100 мкм, 110 мкм, 120 мкм, 130 мкм, 140 мкм, 150 мкм, 160 мкм, 170 мкм, 180 мкм, 190 мкм, 200 мкм;

- 800\*900 мм, толщина: 8 мкм, 10 мкм, 12 мкм, 15 мкм, 20 мкм, 25 мкм, 30 мкм, 35 мкм, 40 мкм, 45 мкм, 50 мкм, 55 мкм, 60 мкм, 65 мкм, 70 мкм, 75 мкм, 80 мкм, 85 мкм, 90 мкм, 95 мкм, 100 мкм, 110 мкм, 120 мкм, 130 мкм, 140 мкм, 150 мкм, 160 мкм, 170 мкм, 180 мкм, 190 мкм, 200 мкм;

4. Мешки для хранения и утилизации медицинских отходов класса Б Ф в исполнениях:

- 300\*330 мм, толщина: 8 мкм, 10 мкм, 12 мкм, 15 мкм, 20 мкм, 25 мкм, 30 мкм, 35 мкм, 40 мкм, 45 мкм, 50 мкм, 55 мкм, 60 мкм, 65 мкм, 70 мкм, 75 мкм, 80 мкм, 85 мкм, 90 мкм, 95 мкм, 100 мкм, 110 мкм, 120 мкм, 130 мкм, 140 мкм, 150 мкм, 160 мкм, 170 мкм, 180 мкм, 190 мкм, 200 мкм;

- 300\*600 мм, толщина: 8 мкм, 10 мкм, 12 мкм, 15 мкм, 20 мкм, 25 мкм, 30 мкм, 35 мкм, 40 мкм, 45 мкм, 50 мкм, 55 мкм, 60 мкм, 65 мкм, 70 мкм, 75 мкм, 80 мкм, 85 мкм, 90 мкм, 95 мкм, 100 мкм, 110 мкм, 120 мкм, 130 мкм, 140 мкм, 150 мкм, 160 мкм, 170 мкм, 180 мкм, 190 мкм, 200 мкм;

- 500\*600 мм, толщина: 8 мкм, 10 мкм, 12 мкм, 15 мкм, 20 мкм, 25 мкм, 30 мкм, 35 мкм, 40 мкм, 45 мкм, 50 мкм, 55 мкм, 60 мкм, 65 мкм, 70 мкм, 75 мкм, 80 мкм, 85 мкм, 90 мкм, 95 мкм, 100 мкм, 110 мкм, 120 мкм, 130 мкм, 140 мкм, 150 мкм, 160 мкм, 170 мкм, 180 мкм, 190 мкм, 200 мкм;

- 600\*1000 мм, толщина: 8 мм, 10 мм, 12 мм, 15 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 85 мм, 90 мм, 95 мм, 100 мм, 110 мм, 120 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм, 170 мм, 180 мм, 190 мм, 200 мм;

- 700\*800 мм, толщина: 8 мкм, 10 мкм, 12 мкм, 15 мкм, 20 мкм, 25 мкм, 30 мкм, 35 мкм, 40 мкм, 45 мкм, 50 мкм, 55 мкм, 60 мкм, 65 мкм, 70 мкм, 75 мкм, 80 мкм, 85 мкм, 90 мкм, 95 мкм, 100 мкм, 110 мкм, 120 мкм, 130 мкм, 140 мкм, 150 мкм, 160 мкм, 170 мкм, 180 мкм, 190 мкм, 200 мкм;

- 700\*1000 мм, толщина: 8 мм, 10 мм, 12 мм, 15 мм, 20 мм, 25 мм,

000 ЦРПМ  [INFO@CIRMI.RU](mailto:INFO@CIRMI.RU)  [WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU](http://WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU) 30 мм, 35 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 75 мм,

- 700\*1100 мм, толщина: 8 мкм, 10 мкм, 12 мкм, 15 мкм, 20 мкм, 25 мкм, 30 мкм, 35 мкм, 40 мкм, 45 мкм, 50 мкм, 55 мкм, 60 мкм, 65 мкм, 70 мкм, 75 мкм, 80 мкм, 85 мкм, 90 мкм, 95 мкм, 100 мкм, 110 мкм, 120 мкм, 130 мкм, 140 мкм, 150 мкм, 160 мкм, 170 мкм, 180 мкм, 190 мкм, 200 мкм;

5. Мешки для хранения и утилизации медицинских отходов класса Б Ф Зс, в исполнениях:

- 300\*600 мм, толщина: 8 мкм, 10 мкм, 12 мкм, 15 мкм, 20 мкм, 25 мкм, 30 мкм, 35 мкм, 40 мкм, 45 мкм, 50 мкм, 55 мкм, 60 мкм, 65 мкм, 70 мкм, 75 мкм, 80 мкм, 85 мкм, 90 мкм, 95 мкм, 100 мкм, 110 мкм, 120 мкм, 130 мкм, 140 мкм, 150 мкм, 160 мкм, 170 мкм, 180 мкм, 190 мкм, 200 мкм;

- 600\*1000 мм, толщина: 8 мкм, 10 мкм, 12 мкм, 15 мкм, 20 мкм, 25 мкм, 30 мкм, 35 мкм, 40 мкм, 45 мкм, 50 мкм, 55 мкм, 60 мкм, 65 мкм, 70 мкм, 75 мкм, 80 мкм, 85 мкм, 90 мкм, 95 мкм, 100 мкм, 110 мкм, 120 мкм, 130 мкм, 140 мкм, 150 мкм, 160 мкм, 170 мкм, 180 мкм, 190 мкм, 200 мкм;

- 700\*800 мм, толщина: 8 мкм, 10 мкм, 12 мкм, 15 мкм, 20 мкм, 25 мкм, 30 мкм, 35 мкм, 40 мкм, 45 мкм, 50 мкм, 55 мкм, 60 мкм, 65 мкм, 70 мкм, 75 мкм, 80 мкм, 85 мкм, 90 мкм, 95 мкм, 100 мкм, 110 мкм, 120 мкм, 130 мкм, 140 мкм, 150 мкм, 160 мкм, 170 мкм, 180 мкм, 190 мкм, 200 мкм;

- 700\*1000 мм, толщина: 8 мкм, 10 мкм, 12 мкм, 15 мкм, 20 мкм, 25 мкм, 30 мкм, 35 мкм, 40 мкм, 45 мкм, 50 мкм, 55 мкм, 60 мкм, 65 мкм, 70 мкм, 75 мкм, 80 мкм, 85 мкм, 90 мкм, 95 мкм, 100 мкм, 110 мкм, 120 мкм, 130 мкм, 140 мкм, 150 мкм, 160 мкм, 170 мкм, 180 мкм, 190 мкм, 200 мкм;

- 700\*1100 мм, толщина: 8 мкм, 10 мкм, 12 мкм, 15 мкм, 20 мкм, 25 мкм, 30 мкм, 35 мкм, 40 мкм, 45 мкм, 50 мкм, 55 мкм, 60 мкм, 65 мкм, 70 мкм, 75 мкм, 80 мкм, 85 мкм, 90 мкм, 95 мкм, 100 мкм, 110 мкм, 120 мкм, 130 мкм, 140 мкм, 150 мкм, 160 мкм, 170 мкм, 180 мкм, 190 мкм, 200 мкм;

000 ЦИРМИ  [INFO@CIRMI.RU](mailto:INFO@CIRMI.RU)  [WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU](http://WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU)

80 мкм, 85 мкм, 90 мкм, 95 мкм, 100 мкм, 110 мкм, 120 мкм, 130 мкм, 140 мкм, 150 мкм, 160 мкм, 170 мкм, 180 мкм, 190 мкм, 200 мкм;

6. Мешки для хранения и утилизации медицинских отходов класса Б Ф Зс Бр в исполнениях:

-300\*330 мм, толщина: 8 мм, 10 мм, 12 мм, 15 мм, 20 мм, 25 мм,

30 мкм, 35 мкм, 40 мкм, 45 мкм, 50 мкм, 55 мкм, 60 мкм, 65 мкм, 70 мкм, 75 мкм,

80 мкм, 85 мкм, 90 мкм, 95 мкм, 100 мкм, 110 мкм, 120 мкм, 130 мкм, 140 мкм, 150 мкм, 160 мкм.

170 мкм, 180 мкм, 190 мкм, 200 мкм;

- 300\*600 мм, толщина: 8 мм, 10 мм, 12 мм, 15 мм, 20 мм, 25 мм,

30 мкм, 35 мкм, 40 мкм, 45 мкм, 50 мкм, 55 мкм, 60 мкм, 65 мкм, 70 мкм, 75 мкм,

80 мкм, 85 мкм, 90 мкм, 95 мкм, 100 мкм, 110 мкм, 120 мкм, 130 мкм, 140 мкм, 150 мкм, 160 мкм,

170 мкм, 180 мкм, 190 мкм, 200 мкм:

- 500\*600 мм, толщина: 8 мм, 10 мм, 12 мм, 15 мм, 20 мм, 25 мм,

30 мкм, 35 мкм, 40 мкм, 45 мкм, 50 мкм, 55 мкм, 60 мкм, 65 мкм, 70 мкм, 75 мкм,

80 мкм, 85 мкм, 90 мкм, 95 мкм, 100 мкм, 110 мкм, 120 мкм, 130 мкм, 140 мкм, 150 мкм, 160 мкм.

170 мкм, 180 мкм, 190 мкм, 200 мкм:

- 600\*1000 мм, толщина: 8 мм, 10 мм, 12 мм, 15 мм, 20 мм, 25 мм,

30 мкм, 35 мкм, 40 мкм, 45 мкм, 50 мкм, 55 мкм, 60 мкм, 65 мкм, 70 мкм, 75 мкм.

80 мкм, 85 мкм, 90 мкм, 95 мкм, 100 мкм, 110 мкм, 120 мкм, 130 мкм, 140 мкм, 150 мкм, 160 мкм,

170 мкм, 180 мкм, 190 мкм, 200 мкм;

- 700\*800 мм, толщина: 8 мм, 10 мм, 12 мм, 15 мм, 20 мм, 25 мм,

30 мкм, 35 мкм, 40 мкм, 45 мкм, 50 мкм, 55 мкм, 60 мкм, 65 мкм, 70 мкм, 75 мкм,

80 мкм, 85 мкм, 90 мкм, 95 мкм, 100 мкм, 110 мкм, 120 мкм, 130 мкм, 140 мкм, 150 мкм, 160 мкм.

170 мкм, 180 мкм, 190 мкм, 200 мкм;

- 700\*1000 мм, толщина: 8 мм, 10 мм, 12 мм, 15 мм, 20 мм, 25 мм.

30 мкм, 35 мкм, 40 мкм, 45 мкм, 50 мкм, 55 мкм, 60 мкм, 65 мкм, 70 мкм, 75 мкм,

80 мкм, 85 мкм, 90 мкм, 95 мкм, 100 мкм, 110 мкм, 120 мкм, 130 мкм, 140 мкм, 150 мкм, 160 мкм.

170 мкм, 180 мкм, 190 мкм, 200 мкм:

- 700\*1100 мм, толщина: 8 мм, 10 мм, 12 мм, 15 мм, 20 мм, 25 мм,

30 мкм, 35 мкм, 40 мкм, 45 мкм, 50 мкм, 55 мкм, 60 мкм, 65 мкм, 70 мкм, 75 мкм.

80 мкм, 85 мкм, 90 мкм, 95 мкм, 100 мкм, 110 мкм, 120 мкм, 130 мкм, 140 мкм, 150 мкм, 160 мкм

170 мкм, 180 мкм, 190 мкм, 200 мкм:

- 800\*900 мм, толщина: 8 мм, 10 мм, 12 мм, 15 мм, 20 мм, 25 мм.

30 мкм, 35 мкм, 40 мкм, 45 мкм, 50 мкм, 55 мкм, 60 мкм, 65 мкм, 70 мкм, 75 мкм.

80 мкм, 85 мкм, 90 мкм, 95 мкм, 100 мкм, 110 мкм, 120 мкм, 130 мкм, 140 мкм, 150 мкм, 160 мкм.

170 мкм, 180 мкм, 190 мкм, 200 мкм:

7. Мешки для хранения и утилизации медицинских отходов класса В Ф в исполнениях:

- 300\*330 мм, толщина: 8 мм, 10 мм, 12 мм, 15 мм, 20 мм, 25 мм,

30 мкм, 35 мкм, 40 мкм, 45 мкм, 50 мкм, 55 мкм, 60 мкм, 65 мкм, 70 мкм, 75 мкм.

80 мкм, 85 мкм, 90 мкм, 95 мкм, 100 мкм, 110 мкм, 120 мкм, 130 мкм, 140 мкм, 150 мкм, 160 мкм



- 700\*800 мм, толщина: 8 мкм, 10 мкм, 12 мкм, 15 мкм, 20 мкм, 25 мкм, 30 мкм, 35 мкм, 40 мкм, 45 мкм, 50 мкм, 55 мкм, 60 мкм, 65 мкм, 70 мкм, 75 мкм, 80 мкм, 85 мкм, 90 мкм, 95 мкм, 100 мкм, 110 мкм, 120 мкм, 130 мкм, 140 мкм, 150 мкм, 160 мкм, 170 мкм, 180 мкм, 190 мкм, 200 мкм;

- 700\*1100 мм, толщина: 8 мкм, 10 мкм, 12 мкм, 15 мкм, 20 мкм, 25 мкм, 30 мкм, 35 мкм, 40 мкм, 45 мкм, 50 мкм, 55 мкм, 60 мкм, 65 мкм, 70 мкм, 75 мкм, 80 мкм, 85 мкм, 90 мкм, 95 мкм, 100 мкм, 110 мкм, 120 мкм, 130 мкм, 140 мкм, 150 мкм, 160 мкм, 170 мкм, 180 мкм, 190 мкм, 200 мкм;

9. Мешки для хранения и утилизации медицинских отходов класса В Ф Зс Бр в исполнениях:

- 300\*600 мм, толщина: 8 мкм, 10 мкм, 12 мкм, 15 мкм, 20 мкм, 25 мкм,  
30 мкм, 35 мкм, 40 мкм, 45 мкм, 50 мкм, 55 мкм, 60 мкм, 65 мкм, 70 мкм, 75 мкм,  
80 мкм, 85 мкм, 90 мкм, 95 мкм, 100 мкм, 110 мкм, 120 мкм, 130 мкм, 140 мкм, 150 мкм, 160 мкм,  
170 мкм, 180 мкм, 190 мкм, 200 мкм;

- 600\*1000 мм, толщина: 8 мкм, 10 мкм, 12 мкм, 15 мкм, 20 мкм, 25 мкм, 30 мкм, 35 мкм, 40 мкм, 45 мкм, 50 мкм, 55 мкм, 60 мкм, 65 мкм, 70 мкм, 75 мкм, 80 мкм, 85 мкм, 90 мкм, 95 мкм, 100 мкм, 110 мкм, 120 мкм, 130 мкм, 140 мкм, 150 мкм, 160 мкм, 170 мкм, 180 мкм, 190 мкм, 200 мкм;

000 ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU мкм, 10 мкм, 12 мкм, 15 мкм, 20 мкм, 25 мкм, 30 мкм, 35 мкм, 40 мкм, 45 мкм, 50 мкм, 55 мкм, 60 мкм, 65 мкм, 70 мкм, 75 мкм.

170 мкм, 180 мкм, 190 мкм, 200 мкм;

- 700\*1100 мм, толщина: 8 мкм, 10 мкм, 12 мкм, 15 мкм, 20 мкм, 25 мкм, 30 мкм, 35 мкм, 40 мкм, 45 мкм, 50 мкм, 55 мкм, 60 мкм, 65 мкм, 70 мкм, 75 мкм,

- 800\*900 мм, толщина: 8 мкм, 10 мкм, 12 мкм, 15 мкм, 20 мкм, 25 мкм, 30 мкм, 35 мкм, 40 мкм, 45 мкм, 50 мкм, 55 мкм, 60 мкм, 65 мкм, 70 мкм, 75 мкм,

10. Мешки для хранения и утилизации медицинских отходов класса Г Ф в исполнениях:

-300\*330 мм, толщина: 8 мкм, 10 мкм, 12 мкм, 15 мкм, 20 мкм, 25 мкм, 30 мкм, 35 мкм, 40 мкм, 45 мкм, 50 мкм, 55 мкм, 60 мкм, 65 мкм, 70 мкм, 75 мкм.

- 300\*600 мм, толщина: 8 мкм, 10 мкм, 12 мкм, 15 мкм, 20 мкм, 25 мкм, 30 мкм, 35 мкм, 40 мкм, 45 мкм, 50 мкм, 55 мкм, 60 мкм, 65 мкм, 70 мкм, 75 мкм.

- 500\*600 мм, толщина: 8 мкм, 10 мкм, 12 мкм, 15 мкм, 20 мкм, 25 мкм, 30 мкм, 35 мкм, 40 мкм, 45 мкм, 50 мкм, 55 мкм, 60 мкм, 65 мкм, 70 мкм, 75 мкм.

- 600\*1000 мм, толщина: 8 мкм, 10 мкм, 12 мкм, 15 мкм, 20 мкм, 25 мкм, 30 мкм, 35 мкм, 40 мкм, 45 мкм, 50 мкм, 55 мкм, 60 мкм, 65 мкм, 70 мкм, 75 мкм.

- 700\*800 мм, толщина: 8 мм, 10 мм, 12 мм, 15 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 75 мм.

- 700\*1000 мм, толщина: 8 мкм, 10 мкм, 12 мкм, 15 мкм, 20 мкм, 25 мкм, 30 мкм, 35 мкм, 40 мкм, 45 мкм, 50 мкм, 55 мкм, 60 мкм, 65 мкм, 70 мкм, 75 мкм.

- 700\*1100 мм, толщина: 8 мм, 10 мм, 12 мм, 15 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 75 мм.

- 800\*900 мм, толщина: 8 мм, 10 мм, 12 мм, 15 мм, 20 мм, 25 мм,

80 мкм, 85 мкм, 90 мкм, 95 мкм, 100 мкм, 110 мкм, 120 мкм, 130 мкм, 140 мкм, 150 мкм, 160 мкм, 170 мкм, 180 мкм, 190 мкм, 200 мкм;

11. Мешки для хранения и утилизации медицинских отходов класса Г Ф Зс в исполнениях:

- 300\*330 мм, толщина: 8 мкм, 10 мкм, 12 мкм, 15 мкм, 20 мкм, 25 мкм,  
30 мкм, 35 мкм, 40 мкм, 45 мкм, 50 мкм, 55 мкм, 60 мкм, 65 мкм, 70 мкм, 75 мкм,  
80 мкм, 85 мкм, 90 мкм, 95 мкм, 100 мкм, 110 мкм, 120 мкм, 130 мкм, 140 мкм, 150 мкм, 160 мкм,  
170 мкм, 180 мкм, 190 мкм, 200 мкм;

- 300\*600 мм, толщина: 8 мкм, 10 мкм, 12 мкм, 15 мкм, 20 мкм, 25 мкм, 30 мкм, 35 мкм, 40 мкм, 45 мкм, 50 мкм, 55 мкм, 60 мкм, 65 мкм, 70 мкм, 75 мкм, 80 мкм, 85 мкм, 90 мкм, 95 мкм, 100 мкм, 110 мкм, 120 мкм, 130 мкм, 140 мкм, 150 мкм, 160 мкм, 170 мкм, 180 мкм, 190 мкм, 200 мкм;

- 500\*600 мм, толщина: 8 мкм, 10 мкм, 12 мкм, 15 мкм, 20 мкм, 25 мкм, 30 мкм, 35 мкм, 40 мкм, 45 мкм, 50 мкм, 55 мкм, 60 мкм, 65 мкм, 70 мкм, 75 мкм, 80 мкм, 85 мкм, 90 мкм, 95 мкм, 100 мкм, 110 мкм, 120 мкм, 130 мкм, 140 мкм, 150 мкм, 160 мкм, 170 мкм, 180 мкм, 190 мкм, 200 мкм;

- 600\*1000 мм, толщина: 8 мкм, 10 мкм, 12 мкм, 15 мкм, 20 мкм, 25 мкм, 30 мкм, 35 мкм, 40 мкм, 45 мкм, 50 мкм, 55 мкм, 60 мкм, 65 мкм, 70 мкм, 75 мкм, 80 мкм, 85 мкм, 90 мкм, 95 мкм, 100 мкм, 110 мкм, 120 мкм, 130 мкм, 140 мкм, 150 мкм, 160 мкм, 170 мкм, 180 мкм, 190 мкм, 200 мкм;

- 700\*800 мм, толщина: 8 мм, 10 мм, 12 мм, 15 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 85 мм, 90 мм, 95 мм, 100 мм, 110 мм, 120 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм, 170 мм, 180 мм, 190 мм, 200 мм;

- 700\*1000 мм, толщина: 8 мкм, 10 мкм, 12 мкм, 15 мкм, 20 мкм, 25 мкм, 30 мкм, 35 мкм, 40 мкм, 45 мкм, 50 мкм, 55 мкм, 60 мкм, 65 мкм, 70 мкм, 75 мкм, 80 мкм, 85 мкм, 90 мкм, 95 мкм, 100 мкм, 110 мкм, 120 мкм, 130 мкм, 140 мкм, 150 мкм, 160 мкм, 170 мкм, 180 мкм, 190 мкм, 200 мкм;

- 700\*1100 мм, толщина: 8 мкм, 10 мкм, 12 мкм, 15 мкм, 20 мкм, 25 мкм, 30 мкм, 35 мкм, 40 мкм, 45 мкм, 50 мкм, 55 мкм, 60 мкм, 65 мкм, 70 мкм, 75 мкм, 80 мкм, 85 мкм, 90 мкм, 95 мкм, 100 мкм, 110 мкм, 120 мкм, 130 мкм, 140 мкм, 150 мкм, 160 мкм, 170 мкм, 180 мкм, 190 мкм, 200 мкм;

- 800\*900 мм, толщина: 8 мкм, 10 мкм, 12 мкм, 15 мкм, 20 мкм, 25 мкм, 30 мкм, 35 мкм, 40 мкм, 45 мкм, 50 мкм, 55 мкм, 60 мкм, 65 мкм, 70 мкм, 75 мкм, 80 мкм, 85 мкм, 90 мкм, 95 мкм, 100 мкм, 110 мкм, 120 мкм, 130 мкм, 140 мкм, 150 мкм, 160 мкм, 170 мкм, 180 мкм, 190 мкм, 200 мкм;

12. Мешки для хранения и утилизации медицинских отходов класса Г Ф Зс Бр и исполнениях:

- 300\*330 мм, толщина: 8 мкм, 10 мкм, 12 мкм, 15 мкм, 20 мкм, 25 мкм, 30 мкм, 35 мкм, 40 мкм, 45 мкм, 50 мкм, 55 мкм, 60 мкм, 65 мкм, 70 мкм, 75 мкм,

80 мкм, 85 мкм, 90 мкм, 95 мкм, 100 мкм, 110 мкм, 120 мкм, 130 мкм, 140 мкм, 150 мкм, 160 мкм, 170 мкм, 180 мкм, 190 мкм, 200 мкм;

- 300\*600 мм, толщина: 8 мкм, 10 мкм, 12 мкм, 15 мкм, 20 мкм, 25 мкм, 30 мкм, 35 мкм, 40 мкм, 45 мкм, 50 мкм, 55 мкм, 60 мкм, 65 мкм, 70 мкм, 75 мкм, 80 мкм, 85 мкм, 90 мкм, 95 мкм, 100 мкм, 110 мкм, 120 мкм, 130 мкм, 140 мкм, 150 мкм, 160 мкм, 170 мкм, 180 мкм, 190 мкм, 200 мкм;

- 500\*600 мм, толщина: 8 мкм, 10 мкм, 12 мкм, 15 мкм, 20 мкм, 25 мкм, 30 мкм, 35 мкм, 40 мкм, 45 мкм, 50 мкм, 55 мкм, 60 мкм, 65 мкм, 70 мкм, 75 мкм, 80 мкм, 85 мкм, 90 мкм, 95 мкм, 100 мкм, 110 мкм, 120 мкм, 130 мкм, 140 мкм, 150 мкм, 160 мкм, 170 мкм, 180 мкм, 190 мкм, 200 мкм;

- 600\*1000 мм, толщина: 8 мкм, 10 мкм, 12 мкм, 15 мкм, 20 мкм, 25 мкм, 30 мкм, 35 мкм, 40 мкм, 45 мкм, 50 мкм, 55 мкм, 60 мкм, 65 мкм, 70 мкм, 75 мкм, 80 мкм, 85 мкм, 90 мкм, 95 мкм, 100 мкм, 110 мкм, 120 мкм, 130 мкм, 140 мкм, 150 мкм, 160 мкм, 170 мкм, 180 мкм, 190 мкм, 200 мкм;

- 700\*800 мм, толщина: 8 мкм, 10 мкм, 12 мкм, 15 мкм, 20 мкм, 25 мкм, 30 мкм, 35 мкм, 40 мкм, 45 мкм, 50 мкм, 55 мкм, 60 мкм, 65 мкм, 70 мкм, 75 мкм, 80 мкм, 85 мкм, 90 мкм, 95 мкм, 100 мкм, 110 мкм, 120 мкм, 130 мкм, 140 мкм, 150 мкм, 160 мкм, 170 мкм, 180 мкм, 190 мкм, 200 мкм;

- 700\*1000 мм, толщина: 8 мкм, 10 мкм, 12 мкм, 15 мкм, 20 мкм, 25 мкм, 30 мкм, 35 мкм, 40 мкм, 45 мкм, 50 мкм, 55 мкм, 60 мкм, 65 мкм, 70 мкм, 75 мкм, 80 мкм, 85 мкм, 90 мкм, 95 мкм, 100 мкм, 110 мкм, 120 мкм, 130 мкм, 140 мкм, 150 мкм, 160 мкм, 170 мкм, 180 мкм, 190 мкм, 200 мкм;

- 700\*1100 мм, толщина: 8 мкм, 10 мкм, 12 мкм, 15 мкм, 20 мкм, 25 мкм, 30 мкм, 35 мкм, 40 мкм, 45 мкм, 50 мкм, 55 мкм, 60 мкм, 65 мкм, 70 мкм, 75 мкм, 80 мкм, 85 мкм, 90 мкм, 95 мкм, 100 мкм, 110 мкм, 120 мкм, 130 мкм, 140 мкм, 150 мкм, 160 мкм, 170 мкм, 180 мкм, 190 мкм, 200 мкм;

- 800\*900 мм, толщина: 8 мкм, 10 мкм, 12 мкм, 15 мкм, 20 мкм, 25 мкм, 30 мкм, 35 мкм, 40 мкм, 45 мкм, 50 мкм, 55 мкм, 60 мкм, 65 мкм, 70 мкм, 75 мкм, 80 мкм, 85 мкм, 90 мкм, 95 мкм, 100 мкм, 110 мкм, 120 мкм, 130 мкм, 140 мкм, 150 мкм, 160 мкм, 170 мкм, 180 мкм, 190 мкм, 200 мкм;

## II. Эксплуатационная документация:

- инструкция по применению – 1 шт.

Директор

ООО «АМИКО»

«27» 03 2020 г.



Пронумеровано,  
прошнуровано и  
скреплено печатью  
24 листа

