

ATTESTED BY ME

S. M. H. ZAIDI
NOTARY
Government of India
Mumbai & Thane Dist

01/03/2021



«Утверждаю»

«I certify»

Генеральный директор
General Director
«MRK Healthcare Pvt. Ltd», Индия
г-н Снех Камлеш Шах
Sneh Kamlesh Shah
« 01 » 03 2021

S. No. 153/P, Panch Pippal, Hansapur,
Unjha-Patan Road, Patan 384265,
Gujarat, India

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перчатки хирургические латексные стерильные неопудренные
NULIFE

2021

1. Наименование медицинского изделия

Перчатки хирургические латексные стерильные неопудренные NULIFE

Варианты исполнения:

1. Перчатки хирургические латексные стерильные неопудренные NULIFE без валика, размеры 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9
2. Перчатки хирургические латексные стерильные неопудренные NULIFE с валиком, размеры 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9
3. Перчатки хирургические латексные стерильные неопудренные NULIFE для использования в гинекологии, размеры 6,5, 7,5, 8,5

Далее по тексту – изделия, перчатки, перчатки хирургические.

2. Сведения о производителях медицинского изделия

Производитель и разработчик

«MRK Healthcare Pvt. Ltd», Индия

S. No. 153/P, Panch Pippal, Hansapur, Unjha-Patan Road, Patan 384265, Gujarat, India

Тел. + 91-22-6261 1111 e-mail: info@mrkhealthcare.com

3. Уполномоченный представитель производителя в РФ

Общество с ограниченной ответственностью «НОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ» (ООО «НМК»), 121354, Россия, Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, стр. 1 помещение 209А, Тел. +7 (499) 110-71-53, адрес электронной почты info@nmcport.com

4. Классификация.

Класс риска 2а в соответствии с Директивой MDD/93/42/ЕЕС+2007/47/ЕС
Кратковременный контакт с внутренней средой и тканями организма.

5. Назначение

Перчатки хирургические латексные стерильные неопудренные NULIFE предназначены для использования в качестве двухстороннего барьера для защиты как пациента, так и персонала от различной контаминации во время всех видов оперативных вмешательств или медицинских манипуляций.

6. Информация о потенциальных потребителях медицинского изделия, области применения.

Информация о потенциальных потребителях медицинского изделия.

Медицинские работники.

Область применения.

- Лечебные и лечебно-профилактические учреждения.

7. Показания

Использование при проведении медицинских исследований, различного рода оперативных вмешательств, а также для диагностических, терапевтических и косметических процедур, требующих стерильности, для других санитарных целей.

8. Противопоказания, меры предосторожности, побочные эффекты, связанные с применением медицинского изделия по назначению.

Противопоказания

- Индивидуальная несовместимость с компонентами сырья изделия. При появлении раздражения прекратить использовать изделие и обратиться за консультацией к врачу.

Меры предосторожности

- Перед эксплуатацией ознакомьтесь с инструкцией по применению.
- Не использовать перчатки с истекшим сроком годности.
- Запрещено использование одной и той же пары одноразовых перчаток при проведении медицинских манипуляций нескольким пациентам, а также при выполнении медицинских манипуляций у одного пациента, но в различных анатомических областях, отличающихся по составу микрофлоры.
- Перчатки во время выполнения манипуляций не рекомендуется обрабатывать антисептическими и дезинфицирующими средствами, так как это отрицательно влияет на их герметичность и может привести к усилению проницаемости.
- При загрязнении перчаток выделениями, кровью и т.п. во избежание загрязнения рук в процессе их снятия следует тампоном (салфеткой), смоченной раствором дезинфицирующего средства (или антисептика), убрать видимые загрязнения. Снять перчатки, погрузить их в раствор средства, затем утилизировать. Руки обработать антисептиком.
- Для профилактики сухости и нежелательных явлений на коже рук медицинским работникам рекомендуется всегда использовать профессиональный питательный крем для рук.
- Перчатки должны быть сняты: сразу после того, как повреждены (или есть подозрение на нарушение их целостности), а также, если есть показания для проведения гигиены рук.
- Перед применением перчаток следует провести антисептическую обработку рук в зависимости от предполагаемых манипуляций и процедур.
- Перчатки надевают только после полного высыхания рук.
- После снятия перчаток необходимо вымыть руки и обработать их антисептическим средством!
- Перчатки не гарантируют 100% защиты рук от проколов и порезов.
- Перчатки не предназначены для повторного использования.
- Утилизировать в порядке, установленном для медицинских изделий.

Побочные эффекты

Инструкция по применению на медицинское изделие:

Перчатки хирургические латексные стерильные неопудренные NULIFE

Страница 3 из 14

- Неаллергический контактный дерматит, аллергический контактный дерматит и аллергические реакции немедленного типа - покраснение, крапивница, отечность, жжение, зуд, мокнущие пузырьки и изъязвления в местах поражения
- Латексная аллергия - аллергический ринит, конъюнктивит, бронхиальная астма, отек Квинке (в том числе и отек подвязочного пространства гортани) и анафилактический шок.

9. Описание изделия


Перчатки хирургические изготовлены из латекса натурального каучука, имеют анатомическую форму (разделение на правую и левую руки) и удлиненную манжету без валика или с валиком. Каждая пара перчаток упакована с вывернутыми наружу манжетами в бумажный конверт с маркировкой L (левая перчатка) и R (правая перчатка).

- Манжета с валиком - валик скручен вовнутрь перчатки, что исключает вероятность скапливания элементов с инфекционной опасностью между валиком и наружной поверхностью.
- Манжета без валика для улучшенного охватывания спецодежды и предотвращения скатывания;
- Текстурированная поверхность - микрошероховатая поверхность для улучшения захвата инструмента во время работы;
- Перчатки упакованы в термосвариваемый пакет для облегчения снятия упаковки.

Принцип действия.

- Используются в качестве двустороннего барьера для защиты как пациента, так и персонала от различной контаминации.

Схема изделия Перчатки хирургические латексные стерильные неопудренные NULIFE
(1 – длина, 2 – ширина)

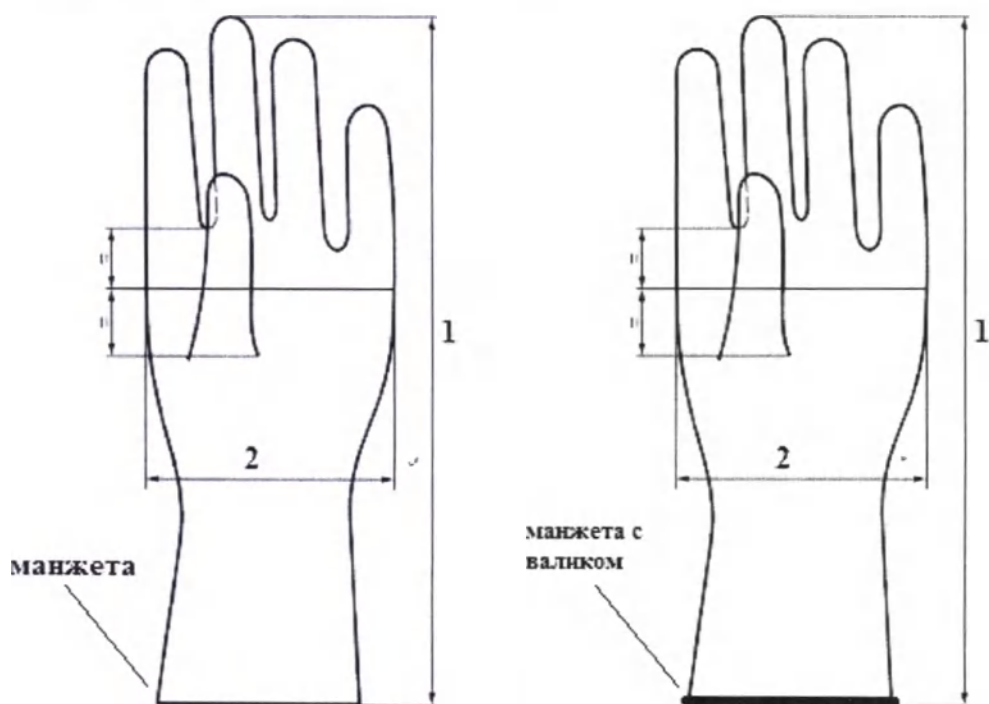

10. Материалы.

Кратковременный контакт внутренней средой и тканями организма.

№№	Материал	Назначение	Состав, %
	Латексная резиновая смесь марки H/LALC1, производства фирмы «MRK Healthcare Pvt. Ltd.» (Индия) следующего состава:		
1.	Натуральный латекс	Сырьевой материал	78,09
2.	Сера	Отверждающий агент	2,99
3.	Диэтилдитиокарбамат цинка	Ускорители	0,01
	Дибутилдитиокарбамат цинка		0,01
4.	Оксид цинка	Активатор	0,16
5.	Натриевая дисульфокислоты соль	Диспергирующий агент	0,01
6.	Калия гидроксид	Стабилизатор	0,03
7.	Кальция нитрат	Коагулянт	9,36
8.	Кальция карбонат	Разделяющая добавка	9,29
9.	Диоксид титана	Отбеливающий агент	0,05
	Итого		100


	Назначение	Марка
Тальк	Исключить прилипание перчаток после снятия их с фарфоровой формы	Тальк марки 86257

Упаковка

	Материал	Марка
Внешний пакет	Полиэтиленовая пленка	Polyolefin
Внешний пакет	Бумага, с одной стороны ламинированная полиэтиленовой пленкой	Propypel Premium Polyolefin
Внутренний пакет	Бумага	Propypel Premium

11. Технические характеристики.

11.1 Перчатки хирургические латексные стерильные неопудренные NULIFE без валика:

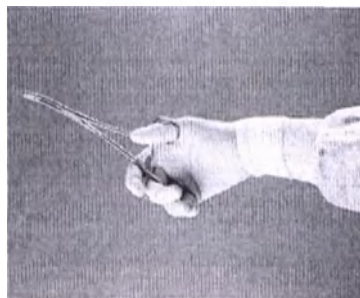

Характеристики:	
Материал:	Натуральный каучуковый латекс

Инструкция по применению на медицинское изделие:

Перчатки хирургические латексные стерильные неопудренные NULIFE

Страница 5 из 14

Цвет:	Кремовый белый
Форма:	Анатомическая
Манжета	Без валика
Текстура	Микрошероватое текстурирование
Содержание талька	< 2 мг на одну перчатку
Уровень экстрагируемого белка:	<50 мкг/дм ² на одну перчатку
Обработка поверхности	Хлоринация
Стерилизация:	Этиленоксид

Размерные характеристики

Размер	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0
Длина ± 10, мм	300							
Ширина ± 6, мм	70	76	83	89	95	102	108	114
Толщина, мм (минимум)								
Манжета	0,20							
Ладонь	0,22							
Пальцы	0,25							

Физические свойства

Показатель	До ускоренного старения	После ускоренного старения, температура (70±2) °С в течение (166±2) ч.
Прочность на растяжение (Мпа)	Не менее 24	Не менее 18
Предельное удлинение (%)	Не менее 750	Не менее 560
Максимальная нагрузка при удлинении 500 % (МПа)	Не более 5,5	н/п
Усилие на разрыв (Н), минимум	12	9

Уровень Контроля (Перед Отправкой)

Характеристика	Уровень Контроля	AQL
Герметичность	G-1	1.0
Визуальные признаки – значительные дефекты	G-1	1.0
Визуальные признаки - незначительные дефекты	G-1	2.5
Физический размеры	S-2 / N=13	4.0
Физические характеристики	S-2	4.0
Усилие на разрыв	N=3	Информация отсутствует
Содержание экстрагируемого белка	N=3	Информация отсутствует
Содержание талька	N=5	Информация отсутствует
Стерильность (для стерильного изделия)	N=5	Информация отсутствует

Инструкция по применению на медицинское изделие:

Перчатки хирургические латексные стерильные неопудренные NULIFE

Страница 6 из 14

11.2 Перчатки хирургические латексные стерильные неопудренные NULIFE с валиком



Характеристики:	
Материал:	Натуральный каучуковый латекс
Цвет:	Кремово белый
Форма:	Анатомическая,
Манжета	С валиком
Текстура	Микрошероховатое текстурирование
Содержание талька	$< 2 \text{ мг / дм}^2$
Уровень экстрагируемого белка	$< 50 \text{ мкг/дм}^2$
Обработка поверхности	Хлоринация
Стерилизация:	Этиленоксид

Размерные характеристики

Размер	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0
Длина ± 10 , мм	300							
Ширина ± 6 , мм	70	76	83	89	95	102	108	114
Толщина, мм (не менее)								
Манжета	0,13							
Ладонь	0,15							
Пальцы	0,19							

Физические свойства

Показатель	До ускоренного старения	После ускоренного старения температура $(70 \pm 2)^\circ\text{C}$ в течение (168 ± 2) ч.
Прочность на растяжение (Мпа)	Не менее 24	Не менее 18
Предельное удлинение (%)	Не менее 750	Не менее 560
Максимальная нагрузка при удлинении 500% (Мпа)	Не более 5,5	н/п
Усилие на разрыв (N) Min.	12	9

Уровень Контроля (Перед Отправкой)

Характеристика	Уровень Контроля	AQL
Герметичность	G-1	1.0
Визуальные атрибуты-Основные дефекты	G-1	1.0


Инструкция по применению на медицинское изделие:

Перчатки хирургические латексные стерильные неопудренные NULIFE

Страница 7 из 14

Визуальные атрибуты-незначительные дефекты	G-1	2.5
физический размер	S-2 / N=13	4.0
физические характеристики	S-2	4.0
Усилие на разрыв	N=3	Информация отсутствует
Содержание Экстрагируемых Протеинов	N=3	Информация отсутствует
Содержание талька	N=5	Информация отсутствует
Стерильность (для стерильных изделий)	N=5	Информация отсутствует

11.3 Перчатки хирургические латексные стерильные неопудренные NULIFE для использования в гинекологии

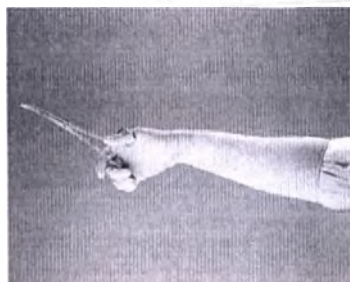

Характеристики:	
Материал:	Натуральный каучуковый латекс
Цвет:	Кремово белый
Форма:	Анатомическая
Манжета	С валиком
Текстура	Микрошероховатое текстурирование
Содержание талька	< 2 мг / дм ²
Уровень экстрагируемого белка:	<50 мкг/дм ²
Обработка поверхности	Хлоринация
Стерилизация:	Этиленоксид

Размерные характеристики

Размер	Малый 6,5	Средний 7,5	Большой 8,5
Длина ± 10, мм, не менее	400	450	480
Ширина ± 6, мм	83	95	108
Толщина, мм (не менее)			
Манжета	0,15		
Ладонь	0,17		
Пальцы	0,18		

Физические свойства

Показатель	До ускоренного	После ускоренного старения температура (70±2) °С в
------------	-------------------	---

Инструкция по применению на медицинское изделие:

Перчатки хирургические латексные стерильные неопудренные NULIFE

Страница 8 из 14

	старения	течение (168±2) ч.
Прочность на растяжение (Мра)	Не менее 24	Не менее 18
Предельное удлинение (%)	Не менее 750	Не менее 560
Максимальная нагрузка при удлинении 500% (Мра)	Не более 5,5	н/п
Усилие на разрыв (N) Min.	12	9

Уровень Контроля (Перед Отправкой)

Характеристика	Уровень Контроля	AQL
Герметичность	G-1	1.0
Визуальные атрибуты- Основные дефекты	G-1	1.0
Визуальные атрибуты- незначительные дефекты	G-1	2.5
физический размер	S-2 / N=13	4.0
физические характеристики	S-2	4.0
Усилие на разрыв	N=3	Информация отсутствует
Содержание Экстрагируемых Протеинов	N=3	Информация отсутствует
Содержание талька	N=5	Информация отсутствует
Стерильность (для стерильных изделий)	N=5	Информация отсутствует

12. Стерильность

Перчатки хирургические латексные стерильные неопудренные NULIFE предназначены для однократного применения, стерилизация этиленоксидом.

13. СПИСОК СОГЛАСОВАННЫХ СТАНДАРТОВ

Хирургические перчатки производятся в соответствии с требованиями GMP с сертифицированной системой управления качеством в соответствии с ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016. Хирургические перчатки отвечают внутренним требованиям, стандартам ASTM, а также гармонизированным стандартам EN 455 - части 1, 2 3 и 4.

Были установлены систематические процедуры в соответствии с соответствующими нормативными требованиями, изложенными в следующих международных стандартах.

ISO 9001:2015	Системы управления качеством - Требования
ISO 13485:2016	Изделия медицинские – Системы менеджмента качества – Требования для целей нормативного регулирования
ISO 14971 : 2012	Медицинские продукты - применение менеджмента риска на медицинские продукты
EN 455-1 : 2000	Медицинские одноразовые перчатки. Часть 1. Требования и определение отсутствия отверстий

Инструкция по применению на медицинское изделие:

Перчатки хирургические латексные стерильные неопудренные NULIFE

Страница 9 из 14

EN 455-2 : 2015	Перчатки медицинские одноразовые. Часть 2. Требования и испытания физических свойств
EN 455-3 : 2015	Перчатки медицинские одноразовые. Часть 3. Требования и испытания для биологической оценки
EN 455-4 : 2009	Перчатки медицинские одноразовые. Часть 4. Требования и испытания для определения срока хранения
EN 1041 : 2013	Изделия медицинские. Информация, предоставляемая изготовителем
ISO 15223-1 : 2016	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Общие требования
ISO 10993-1:2009	Оценка биологическая медицинских изделий. Часть 1. Оценка и испытания в рамках процесса менеджмента риска
ISO 10993-5:2009	Биологическая оценка медицинских изделий. Часть 5. Испытания на цитотоксичность in vitro
ISO 10993-10:2010	Оценка биологическая медицинских изделий. Часть 10. Пробы на раздражение и аллергическую реакцию кожи
ISO 10993-12:2012	Биологическая оценка медицинских изделий. Часть 12. Приготовление проб и стандартные образцы
ISO 11137-1: 2006	Стерилизация медицинской продукции. Радиационная стерилизация. Часть 1. Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских приборов
ISO 21171:2006	Медицинские перчатки. Определение удаляемой присыпки

14. Данные для утилизации или уничтожения медицинского изделия

Медицинские изделия должны утилизироваться в соответствии с медицинскими процедурами, принятыми в медицинских учреждениях, и местными, государственными или федеральными нормативами. Выбор методов безопасной утилизации и уничтожения изделий зависит от мощности и профиля медицинской организации, наличия установок по обеззараживанию/обезвреживанию отходов, способа обезвреживания/уничтожения отходов, принятого на административной территории (сжигание, вывоз на полигоны, утилизация).

Медицинские изделия «Перчатки хирургические латексные стерильные неопудренные NULIFE» в зависимости от степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности относятся к эпидемиологически опасным медицинским отходам: материалы и инструменты, предметы, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями.

Потребительская упаковка, бракованные изделия и неиспользованные изделия с истекшим сроком годности относятся к эпидемиологически безопасным отходам, приближенным по составу к твердым бытовым отходам (ТБО)

15. Сведения о маркировке, упаковке и комплекте поставки

15.1 Упаковка

Медицинские изделия «Перчатки хирургические латексные стерильные неопудренные NULIFE» упакованы в двойную индивидуальную упаковку (внутреннюю и внешнюю), в групповую (потребительскую) упаковку. Материал и конструкция упаковки не оказывают вредного воздействия на содержимое и обеспечивают сохранение изделий при хранении в сухих, чистых и хорошо проветриваемых помещениях, минимальный риск загрязнения содержимого при вскрытии упаковки, а также защиту содержимого при нормальных условиях транспортирования и хранения.

Перчатки хирургические латексные стерильные неопудренные NULIFE без валика

Двойная индивидуальная упаковка	Количество	Размер, не более, см
Внутренний пакет	1 пара	11,0x23,0
Внешний пакет	1 пара	20,0x30,0
Групповая упаковка		
Коробка	40 пар	17,0x31,0x19,0
Транспортная упаковка		
Картонный короб	240 пар (6 коробок)	-

Перчатки хирургические стерильные латексные неопудренные NULIFE с валиком

Двойная индивидуальная упаковка	Количество	Размер, не более, см
Внутренний пакет	1 пара	10,0x19,0
Внешний пакет	1 пара	15,0x30,0
Групповая упаковка		
Коробка	50 пар	24,0x23,0x14,0
Транспортная упаковка		
Картонный короб	500 пар (10 коробок)	-

Перчатки хирургические стерильные латексные неопудренные NULIFE для использования в гинекологии

Двойная индивидуальная упаковка	Количество	Размер, не более, см
Внутренний пакет	1 пара	11,0x26,0
Внешний пакет	1 пара	15,0x45,0
Групповая упаковка		
Коробка	25 пар	15,0x15,0x35,0
Транспортная упаковка		
Картонный короб	300 пар (12 коробок)	-

15.2 Маркировка.

Индивидуальная и групповая (потребительская) упаковка

Внутренняя индивидуальная упаковка

- Размер
- Обозначение «левая» (или L) или «правая» (или R);

Внешняя индивидуальная упаковка и Групповая упаковка

Инструкция по применению на медицинское изделие:

Перчатки хирургические латексные стерильные неопудренные NULIFE


Страница 11 из 14

- Наименование изделия.
- Наименование, торговая марка и адрес изготовителя.
- Наименование и адрес уполномоченного представителя изготовителя.
- Размер.
- Материал.
- Слова «ПРЯМЫЕ ПАЛЬЦЫ» или «ИЗОГНУТЫЕ ПАЛЬЦЫ» или слов, отражающих конструкцию перчаток
- Слова: «текстурированные» или «гладкие», «опудренные» или «неопудренные», «хлоринация»,
- Номер партии.
- Дата изготовления, срок годности (месяц, год (из 4 цифр)).
- Слова «одноразовые»
- Слова «ХИРУРГИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ
- Слова «СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ»;
- Слова "Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию"
- Дата и номер регистрационного удостоверения

Транспортная упаковка

- Наименование и (или) торговое наименование медицинского изделия.
- Производитель, адрес места производства, телефон.
- Количество упаковок в коробке.
- Партия.
- Срок годности.
- Условия хранения.


Расшифровка символов, применяемых в маркировке групповой (потребительской) упаковки:

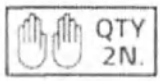Символ	Расшифровка	Символ	Расшифровка
	Дата изготовления		Температурный диапазон
	Использовать до (при необходимости)		Содержит натуральный латекс
	Код партии		Соответствие европейским нормам (при необходимости)
	Количество 2 шт.		Знак соответствия при декларировании соответствия в системе ГОСТ Р (при необходимости)

Инструкция по применению на медицинское изделие:

Перчатки хирургические латексные стерильные неопудренные NULIFE

Страница 12 из 14

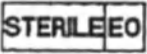Символ	Расшифровка	Символ	Расшифровка
	Стерилизация оксидом этилена		Запрет на повторное применение
	Не стерилизовать повторно		Не использовать, при повреждении упаковки
	Беречь от влаги		Не допускать воздействия солнечного света
	Осторожно! Обратитесь к сопроводительной документации		Изготовитель

16. Условия хранения и транспортирования

Транспортирование перчаток, упакованных в транспортную тару, должно осуществляться всеми видами крытых транспортных средств с соблюдением предосторожностей, указанных на транспортной таре и в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Условия транспортирования:

- температура – от -30 до +50 °С;
- относительная влажность воздуха – до 98 % при температуре 35 °С, но без конденсации влаги
- атмосферное давление: 755±20 мм рт. ст.

Изделия должны храниться в хорошо проветриваемых помещениях вдали от источников тепла, солнечных лучей, прямого воздействия источников света и электрического оборудования. Упаковки необходимо предохранять от загрязнения, запыления, намокания и от разрыва.

Условия хранения:

- температура – до +25 °С;
- относительная влажность воздуха – не более 65 %.
- атмосферное давление: 755±20 мм рт. ст.

При температуре хранения ниже 10 °С может возникнуть конденсация. В случае, если температура хранения ниже 10°С, перчатки перед использованием следует согреть до 25°С, иначе могут возникнуть затруднения вследствие временной потери эластичности.

Не допускать воздействия на перчатки озона (источник в медицинских организациях - ртутные лампы, электродвигатели, флуоресцентные лампы, рентгеновские установки, электрохирургическое и подъемное оборудование). Озон ускоряет старение эластичных

материалов, усиливая в них окислительные процессы. Типичные озоновые повреждения перчаток выглядят как мелкие разрезы и выцветшие участки.

Условия применения медицинского изделия.

Применяются в помещениях при значениях температуры и относительной влажности воздуха:

- температура – от +10 до +35 °С;
- относительная влажность воздуха – до 80 % при температуре воздуха +25 °С.
- атмосферное давление: 755±20 мм рт. ст

17. Гарантийные обязательства и срок годности

Изготовитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик перчаток в течение всего срока годности (5 лет) при условии целостности упаковки, соблюдения условий хранения, транспортировки и эксплуатации в соответствии с инструкцией.

18. Информацию в соответствии с данными государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения о содержащихся в медицинском изделии:

Лекарственные препараты для медицинского применения или фармацевтические субстанции в данном медицинском изделии отсутствуют.

19. Требования к техническому обслуживанию и ремонту медицинского изделия;

Изделия служат для однократного применения. В техническом обслуживании и ремонте не нуждаются.

[Перевод с английского языка на русский язык]

[Штамп: УДОСТОВЕРЕНО МНОЙ /подпись/

С.М.Х. ЗАИДИ (S.M.H. ZAIDI), НОТАРИУС Правительство Индии * Мумбаи и окр. Тхане]

[Печать: НОТАРИУС * ПРАВИТЕЛЬСТВО ИНДИИ * С.М.Х. ЗАИДИ * Мумбаи и окр. Тхане *
Рег. номер 3640]

[Печать: «МРК ХЕЛСКЕА ПВТ. ЛТД.» * МУМБАИ]

01.03.2021

«Утверждаю»

/подпись/

Генеральный директор

«МРК Хелскеа Пвт. Лтд» (MRK Healthcare Pvt. Ltd), Индия

г-н Снех Камлеш Шах (Sneh Kamlesh Shah)

01.03.2021 г.

С. № 153/Р, Панч Пиппал, Хансапур, Унджа-Патан Роуд,
Патан 384265, Гуджарат, Индия

(S. No. 153/P, Panch Pipal, Hansapur,
Unjha-Patan Road, Patan 384265, Gujarat, India)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перчатки хирургические латексные стерильные неопудренные

NULIFE

2021 г.

[Текст документа на русском языке]

[На обороте документа:

*[Печать: «МРК ХЕЛСКЕА ПВТ. ЛТД.» * МУМБАИ]*

Перевод данного текста выполнен переводчиком Сироткиной Марией Олеговной

Сироткина

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать седьмого мая две тысячи двадцать первого года

Я, Ребрина Елена Дмитриевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Акимова Глеба Борисовича, свидетельствую подлинность подписи переводчика Сироткиной Марии Олеговны.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/09 – н/77 – 2021 – *38-960*

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.



Е.Д. Ребрина
Е.Д. Ребрина

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью *16* лист(а-ов).

ВРИО нотариуса:

Е.Д. Ребрина