

Исх. № 478 от « 09 » марта 2009 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ

Очиститель энзимный «Оптимед» для очистки мягких контактных линз

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед применением!

ОПИСАНИЕ

Очиститель энзимный «Оптимед» представляет собой сбалансированный раствор с активным веществом (протеолитический фермент панкреатин), обеспечивает глубокую очистку от протеиновых отложений, способствует комфортному и безопасному ношению контактных линз.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Для еженедельной глубокой очистки мягких контактных линз от всех видов загрязнений, в том числе, белковых. Применяется только в сочетании с универсальным раствором.

При ношении контактных линз на их поверхности образуются различного рода отложения, в том числе, и белковые. Очиститель «Оптимед» разрушает все виды отложений, помогая сохранить линзы чистыми, а ношение – более комфортным.

СОСТАВ

Очиститель «Оптимед» представляет собой сбалансированный раствор, который содержит активный компонент – панкреатин - не менее 0,4 ПЕ/мл, натрий тетраборат 10-водный, пропиленгликоль, глицерин.

Очиститель «Оптимед» выпускают в пластиковых флаконах с дозатором – капельницей и крышкой с контролем вскрытия объемом 3 мл.

ПРИМЕНЕНИЕ

Наполните контейнер чистым универсальным раствором.

Добавьте по одной капле очистителя «Оптимед» в каждое отделение контейнера.

Снимите линзы и промойте их свежим универсальным раствором. Положите каждую линзу в соответствующее отделение контейнера. Закройте контейнер и оставьте на ночь или не менее, чем на 4 часа. По истечении времени очистки достаньте линзы из контейнера, **тщательно промойте их свежим универсальным раствором.** Теперь линзы готовы к применению.

Использованный раствор из контейнера вылейте, ополосните его свежим раствором, просушите. Используйте очистку контактных линз с помощью очистителя «Оптимед» не реже 1 раза в неделю.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не использовать в случае аллергии к одному из компонентов очистителя.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Очиститель «Оптимед» нельзя закапывать в глаза или принимать внутрь!

Обязательно промывать линзы после очистки!

Беречь от детей!

Во избежание загрязнения раствора не допускать соприкосновения наконечника флакона с посторонними предметами.

Использовать раствор более 1 месяца после вскрытия флакона.

Не использовать по истечении указанного срока годности.

Хранить флакон при комнатной температуре плотно закрытым во избежание испарения и загрязнения раствора.

Соблюдать правила ухода за контактными линзами, нарушение этих правил может привести к развитию заболеваний глаз.

ФОРМА ВЫПУСКА

Флаконы с дозатором – капельницей и крышкой с контролем вскрытия по 3 мл.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить флакон в сухом прохладном месте плотно закрытым. Избегать прямого попадания солнечных лучей.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЗАО «Оптимедсервис»

Россия, 453128, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, 145

Тел./факс: (347) 223-44-33, 277-62-62

Тел. в Москве: (495) 781-41-44

www.optomed-ufa.ru, e-mail: office@optimed-ufa.ru