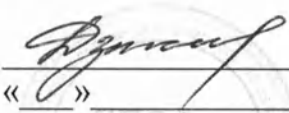


«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель организации-
заявителя

 Ф.И.О.
« » 200 г.
М.п.

ИНСТРУКЦИЯ
по применению

“ Материал стоматологический пломбировочный
прокладочный Life”
производства фирмы Kerr Italia SpA, Италия

Life – твердеющий материал на основе гидроокиси кальция для прямого и непрямого покрытия пульпы, а также использования в качестве прокладки для любых видов пломбировочных материалов.

Свойства

- Сохраняет жизнеспособность пульпы в случае ее вскрытия
- Способствует образованию заместительного дентина
- Изолирует пульпу от температурных воздействий
- Защищает пульпу от поставленной постоянной реставрации
- Быстро твердеет (противостоит нагрузкам при конденсации реставрационного материала)
- Устойчив к кислотному протравливанию
- Не препятствует полимеризации акриловых и композитных материалов
- Рентгеноконтрастен

Инструкции по применению

1. Выдавливajte материал из тюбиков непосредственно перед применением.
2. Выдавите равные количества базовой пасты и катализатора.
3. Не перепутайте колпачки.
4. Протрите носик каждого из тюбиков перед тем, как снова надеть колпачки.
5. Замешайте с помощью маленького шпателя в течение 10 секунд.
6. Сразу же внесите в полость с помощью шарикового аппликатора фирмы Kerr.
7. Рабочее время материала находящегося на блокноте при 75°F и 50% влажности. Life – минимум 6 минут, Life Fast Set – минимум 3 минуты
8. Протрите кончик аппликатора перед повторным погружением в замешанный материал после успешного его внесения в полость.

Химическая реакция между базовой пастой и катализатором материала Life ускоряется в тепле и в присутствии влаги. Небольшое количество жидкости, будто слюна или просто повышенная влажность ускоряет процесс отверждения материала Life. По этой причине при использовании коффердама мы рекомендуем применять материал Life Fast Set. Коффердам препятствует проникновению влаги в отпрепарированную полость, что ведет к медленному отверждению материала.

Меры предосторожности

- высокая температура и влажность ускоряют время отверждения
- храните в прохладном месте (65-75°F)
- очищайте носик тюбика и плотно закрывайте колпачок после использования.

1. Транспортирование.

Транспортировать изделия необходимо в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на наземном либо авиа транспорте.

Размещение и крепление изделий в транспортных средствах должно обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность смещения и ударов транспортной тары друг о друга и о стенки транспортных средств.

Условия транспортирования не должны выходить за пределы климатических условий:

- температуры окружающего воздуха от -50°C до +50°C и относительной влажности не более 100% при t=25°C.

2. Упаковка.

Упаковка изделий представляет собой плоскую коробку из твердого пластика, в которой в индивидуальных ячейках размещены изделия.

3. Хранение.

Изделия в упаковке необходимо хранить в закрытых складских помещениях при условиях: температура окружающего воздуха от -50°C до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 98% при $t=25^{\circ}\text{C}$. Хранить в прохладном месте ($65-75^{\circ}\text{F}$). Срок годности составляет 1 год с даты изготовления. Гарантийный срок хранения – не менее 6 месяцев.

