

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
медицинского изделия
«Аналоги имплантатов стоматологические с принадлежностями»

I, the undersigned, Eric von Platen, Notary Public
in the City of Stockholm, hereby certify that:

Mr Alessandro Rainis

has signed this document.

Stockholm

2021-05-17

Ex officio

Eric von Platen

Eric von Platen



«Утверждаю»/«Approve»

Nobel Biocare AB
Head Regulatory Affairs Regions and Registrations

(должность/position)

Alessandro Rainis

(имя/name)

Alessandro Rainis

подпись/signature



Оглавление

1. Наименование медицинского изделия	3
2. Описание медицинского изделия.	3
3. Назначение/ Показания.	4
4. Область применения.	4
5. Информация о потенциальных потребителях медицинского изделия.	4
6. Инструкция по использованию.	4
7. Противопоказания.	5
8. Предупреждения.	5
9. Меры предосторожности.	5
10. Очистка, дезинфекция, стерилизация.	6
11. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.	6
12. Гарантийные обязательства.	6
13. Основные параметры, характеристики (свойства) медицинского изделия/технические характеристики медицинского изделия.	6
14. Перечень применяемых стандартов.	6
15. Срок службы	10
16. Требования к техническому обслуживанию и ремонту медицинского изделия.	10
17. Порядок и условия утилизации или уничтожения медицинского изделия.	10
18. Комплект поставки	10
19. Наименование и юридический адрес организации-производителя медицинского изделия и уполномоченного представителя производителя.	10
20. Символы, используемые на маркировке изделий.	11

1. Наименование медицинского изделия.

Аналоги имплантатов стоматологические с принадлежностями

Варианты исполнения:

- 1.Аналог имплантата Implant Replica Brånemark System® NP
- 2.Аналог имплантата Implant Replica Brånemark System® RP
- 3.Аналог имплантата Implant Replica Brånemark System® WP
- 4.Аналог имплантата для модели IOS NobelProcera® IOS Model Implant Replica Conical Connection (CC) 3.0
- 5.Аналог имплантата для модели IOS NobelProcera® IOS Model Implant Replica Conical Connection (CC) NP
- 6.Аналог имплантата для модели IOS NobelProcera® IOS Model Implant Replica Conical Connection (CC) RP
- 7.Аналог имплантата для модели IOS NobelProcera® IOS Model Implant Replica Conical Connection (CC) WP
- 8.Аналог имплантата IOS Implant Replica Nobel Biocare N1 TCC NP
- 9.Аналог имплантата IOS Implant Replica Nobel Biocare N1 TCC RP

Принадлежности:

1. Инструмент для установки аналога имплантата NobelProcera® IOS Replica Insertion tool Conical Connection (CC) 3.0– не более 300 шт.
2. Инструмент для установки аналога имплантата NobelProcera® IOS Replica Insertion tool Conical Connection (CC) NP – не более 300 шт.
3. Инструмент для установки аналога имплантата NobelProcera® IOS Replica Insertion tool Conical Connection (CC) RP– не более 300 шт.
4. Инструмент для установки аналога имплантата NobelProcera® IOS Replica Insertion tool Conical Connection (CC) WP– не более 300 шт.
5. Инструмент для установки аналога имплантата Insertion Tool IOS Implant Replica Nobel Biocare N1 NP/RP– не более 300 шт.

(далее – аналоги имплантатов, изделия, инструменты)

2. Описание медицинского изделия.

Аналоги имплантатов Brånemark System® и Nobel Biocare N1 TCC

Аналог имплантата воспроизводит форму, положение и размер платформы имплантата таким образом, чтобы соответствовать изделиям для протезирования, таким как трансферы, временные абатменты, постоянные абатменты и каркасы. Внутриротовой оттиск берется с помощью слепочных трансферов для передачи клинической ситуации на рабочую модель. Апикальная часть аналога имплантата обеспечивает фиксацию в рабочей модели.

После получения оттиска, соответствующий аналог имплантата подсоединяется к оттисковому трансферу. Далее изготавливается рабочая модель со съемной десневой маской. Далее производится изготовление коронки по соответствующей технологии или используется традиционная техника литья.

Аналог имплантата Implant Replica Brånemark System® NP, Аналог имплантата Implant Replica Brånemark System® RP, Аналог имплантата Implant Replica Brånemark System® WP имеют интерфейс внешнего шестигранника. Входят в состав запасных частей для систем Brånemark System MkIII Groovy, Brånemark System MkIII TiUnite, NobelSpeedy Groovy.

Аналог имплантата IOS Implant Replica Nobel Biocare N1 TCC NP и Аналог имплантата IOS Implant Replica Nobel Biocare N1 TCC RP имеют интерфейс три-овального конического соединения. Входят в состав запасных частей для системы Nobel Biocare N1. Данные аналоги имплантатов устанавливаются с помощью инструмента для установки аналога имплантата IOS Insertion Tool IOS Implant Replica Nobel Biocare N1 NP/RP.

Аналоги имплантатов для модели IOS

Аналоги имплантатов для модели IOS воспроизводит форму, положение и размер платформы имплантата таким образом, чтобы соответствовать изделиям для протезирования, таким как трансферы, временные абатменты, постоянные абатменты и каркасы.

Внутриротовое сканирование (IOS) выполняется с использованием позиционных локаторов или сканеров IOS для отображения клинической ситуации в виде цифровой модели. Аналог имплантата IOS вводится и устанавливается с помощью инструмента для введения аналога имплантата IOS в лунку печатной модели соответствующей цифровой модели. Апикальная часть аналога имплантата IOS обеспечивает фиксацию в печатной модели.

Аналог имплантата для модели IOS NobelProcera® IOS Model Implant Replica Conical Connection (CC) 3.0, Аналог имплантата для модели IOS NobelProcera® IOS Model Implant Replica Conical Connection (CC) NP, Аналог имплантата для модели IOS NobelProcera® IOS Model Implant Replica Conical Connection (CC) RP, Аналог имплантата для модели IOS NobelProcera® IOS Model Implant Replica Conical Connection (CC) WP имеют интерфейс конического соединения. Входят в состав запасных частей для систем NobelActive, NobelActive TiUltra, NobelParallel CC, NobelParallel CC TiUltra, NobelReplace CC. Данные аналоги имплантатов устанавливаются с помощью инструментов для установки аналогов имплантатов для модели IOS NobelProcera® IOS Model Insertion tool Conical Connection (CC)

Инструменты для установки аналога имплантата

Инструменты для установки аналога имплантата используются для надежной установки аналогов имплантата в лунку модели.

3. Назначение/ Показания.

Аналоги имплантатов стоматологические с принадлежностями предназначены для использования в зуботехнической лаборатории во время изготовления зубных протезов.

4. Область применения.

Стоматология, стоматологическое протезирование.

5. Информация о потенциальных потребителях медицинского изделия.

Аналоги имплантатов стоматологические с принадлежностями предназначены для использования специалистами в области стоматологии и здравоохранения. Аналоги имплантатов стоматологические с принадлежностями не предназначены для использования на пациентах.

6. Инструкция по использованию.

Аналоги имплантатов Brånemark System® и Nobel Biocare N1 TCC

Аналог имплантата воспроизводит форму, положение и размер платформы имплантата таким образом, чтобы соответствовать изделиям для протезирования, таким как трансферы, временные абатменты, постоянные абатменты и каркасы. Внутриротовой оттиск берется с помощью слепочных трансферов для передачи клинической ситуации на рабочую модель. Апикальная часть аналога имплантата обеспечивает фиксацию в рабочей модели.

После получения оттиска, соответствующий аналог имплантата подсоединяется к оттисковому трансферу. Далее изготавливается рабочая модель со съемной десневой маской. Далее производится изготовление коронки по соответствующей технологии или используется традиционная техника литья.

Аналог имплантата Implant Replica Brånemark System® NP, Аналог имплантата Implant Replica Brånemark System® RP, Аналог имплантата Implant Replica Brånemark System® WP имеют интерфейс внешнего шестигранника. Входят в состав запасных частей для систем Brånemark System MkIII Groovy, Brånemark System MkIII TiUnite, NobelSpeedy Groovy.

Аналог имплантата IOS Implant Replica Nobel Biocare N1 TCC NP и Аналог имплантата IOS Implant Replica Nobel Biocare N1 TCC RP имеют интерфейс три-овального конического соединения. Входят в состав запасных частей для системы Nobel Biocare N1. Данные аналоги имплантатов устанавливаются с помощью инструмента для установки аналога имплантата IOS Insertion Tool IOS Implant Replica Nobel Biocare N1 NP/RP.

Аналоги имплантатов для модели IOS воспроизводит форму, положение и размер платформы имплантата таким образом, чтобы соответствовать изделиям для протезирования, таким как трансферы, временные абатменты, постоянные абатменты и каркасы.

Внутриротовое сканирование (IOS) выполняется с использованием позиционных локаторов или сканеров IOS для отображения клинической ситуации в виде цифровой модели. Аналог имплантата IOS вводится и устанавливается с помощью инструмента для введения аналога имплантата IOS в лунку печатной модели соответствующей цифровой модели. Апикальная часть аналога имплантата IOS обеспечивает фиксацию в печатной модели.

Аналог имплантата для модели IOS NobelProcera® IOS Model Implant Replica Conical Connection (CC) 3.0, Аналог имплантата для модели IOS NobelProcera® IOS Model Implant Replica Conical Connection (CC) NP, Аналог имплантата для модели IOS NobelProcera® IOS Model Implant Replica Conical Connection (CC) RP, Аналог имплантата для модели IOS NobelProcera® IOS Model Implant Replica Conical Connection (CC) WP имеют интерфейс конического соединения. Входят в состав запасных частей для систем NobelActive, NobelActive TiUltra, NobelParallel CC, NobelParallel CC TiUltra, NobelReplace CC. Данные аналоги имплантатов устанавливаются с помощью инструментов для установки аналогов имплантатов для модели IOS NobelProcera® IOS Model Insertion tool Conical Connection (CC)

Инструменты для установки аналога имплантата используются для надежной установки аналогов имплантата в лунку модели.

7. Противопоказания.

Противопоказаний к использованию аналогов имплантатов стоматологических с принадлежностями не выявлено.

8. Предупреждения.

Не используйте аналоги имплантатов стоматологические с принадлежностями, если упаковка повреждена или открывалась ранее.

9. Меры предосторожности.

Общие меры предосторожности

Тесное взаимодействие хирурга, ортопеда или зубного техника крайне важно для успешного лечения с применением имплантатов.

Настоятельно рекомендуется использовать изделия Nobel Biocare только с совместимыми инструментами и компонентами производства компании Nobel Biocare. Использование инструментов или компонентов, которые не предназначены для использования в сочетании с изделиями Nobel Biocare, может привести к несостоятельности или отторжению компонента, повреждению тканей или неудовлетворенным эстетическим результатам.

Рекомендуется, чтобы при первом использовании нового компонента / метода лечения с опытом его применения. Это поможет избежать возможных осложнений. Для этой цели компания Nobel Biocare располагает опытными специалистами, которые могут выступать в роли наставников по всему миру.

Предоперационная подготовка

Все компоненты, инструменты и принадлежности, используемые в ходе хирургического или лабораторного этапа, необходимо содержать в хорошем состоянии и избегать повреждения ими имплантатов или других компонентов.

10. Очистка, дезинфекция, стерилизация.

Аналоги имплантатов стоматологические с принадлежностями поставляются нестерильными. Они предназначены только для использования в зуботехнической лаборатории и не имеют прямого или косвенного контакта с пациентом, поэтому требования по очистке и/или стерилизации для них не предусмотрены.

11. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.

Изделия следует использовать, хранить и транспортировать в оригинальной упаковке при комнатной температуре (15-25°C) в сухих условиях (относительная влажность не более 40%) при атмосферном давлении 84,0 – 106,7 кПа и защищать от воздействия прямых солнечных лучей. Неправильные условия хранения или транспортировки могут повлиять на свойства изделий и привести к их повреждению.

Эксплуатационные требования и ограничения

Для достижения желаемой эксплуатационных характеристик аналоги имплантатов следует использовать только с совместимыми компонентами компании Nobel Biocare. Чтобы подтвердить совместимость компонентов, которые предназначены для использования в сочетании с аналогами имплантатов, необходимо проверить цветовую маркировку, размеры, длину, тип соединения и/или любую маркировку, нанесенную прямым способом, на компоненты или их этикетки.

12. Гарантийные обязательства.

В случае выявления брака товар подлежит обмену. В случае если упаковка не вскрыта и не имеет видимых и механических повреждений, товар может быть принят к возврату или обмену на другой товар. Возврат производится только в течение 30 дней с момента покупки, если с момента покупки прошло более 30 дней, то может быть произведен обмен.

Уполномоченный представитель на территории Российской Федерации:

Общество с ограниченной ответственностью «Нобель Биокер Раша»,

Адрес: 109004 Москва, ул. Станиславского, дом 21, стр.2.

Тел.: +7 495 974 77 55, факс: +7 495 974 77 66

В случае возникновения нежелательных явлений, которые имеют признаки неблагоприятного события (инцидента) необходимо направить сообщение уполномоченному представителю на территории Российской Федерации

13. Основные параметры, характеристики (свойства) медицинского изделия/технические характеристики медицинского изделия.

Аналог имплантата Implant Replica Brånemark System® NP	
Длина	14 ± 0,5 мм
Диаметр основания	3,5 (0; -0,05) мм
Внешний диаметр	2,73 (0; -0,03) мм

Масса	0,76 г ± 0,08 г
Аналог имплантата Implant Replica Brånemark System® RP	
Длина	14 ± 0,5 мм
Диаметр основания	4,1 ± (0;-0,05) мм
Внешний диаметр	3,07 (0;-0,3) мм
Масса	1,02 ± 0,15 г
Аналог имплантата Implant Replica Brånemark System® WP	
Длина	14 ± 0,5 мм
Диаметр основания	5,1 (0;-0,05) мм
Внешний диаметр	3,85 (0;-0,03) мм
Масса	1,71 ± 0,2 г
Аналог имплантата для модели IOS NobelProcera® IOS Model Implant Replica Conical Connection (CC) 3.0	
Длина	9 ± 0,1 мм
Диаметр основания	2,2 ± 0,02 мм
Внешний диаметр	3,04 ± 0,03 мм
Масса	0,12 ± 0,015 г
Аналог имплантата для модели IOS NobelProcera® IOS Model Implant Replica Conical Connection (CC) NP	
Длина	9 ± 0,1 мм
Диаметр основания	2,65 ± 0,02 мм
Внешний диаметр	3,54 ± 0,03 мм
Масса	0,16 ± 0,02 г
Аналог имплантата для модели IOS NobelProcera® IOS Model Implant Replica Conical Connection (CC) RP	
Длина	9 ± 0,1 мм
Диаметр основания	3,12 ± 0,02 мм
Внешний диаметр	3,9 ± 0,03 мм
Масса	0,21 ± 0,03 г
Аналог имплантата для модели IOS NobelProcera® IOS Model Implant Replica Conical Connection (CC) WP	
Длина	9 ± 0,1 мм
Диаметр основания	4,15 ± 0,02 мм
Внешний диаметр	5,1 ± 0,03 мм
Масса	0,37 ± 0,05 г

Аналог имплантата IOS Implant Replica Nobel Biocare N1 TCC NP

Длина	$9 \pm 0,1$ мм
Диаметр основания	$2,65 \pm 0,02$ мм
Внешний диаметр	$3,65 \pm 0,03$ мм
Масса	$0,17 \pm 0,02$ г

Аналог имплантата IOS Implant Replica Nobel Biocare N1 TCC RP

Длина	$9 \pm 0,1$ мм
Диаметр основания	$3,12 \pm 0,02$ мм
Внешний диаметр	$4,2 \pm 0,03$ мм
Масса	$0,23 \pm 0,03$ г

Инструмент для установки аналога имплантата NobelProcera® IOS Model Insertion tool
Conical Connection (CC) 3.0

Длина	$49 \pm 0,15$ мм
Резьба	M 1,4 x 0,3-6g
Диаметр основания	$6,9 \pm 0,1$ мм
Диаметр рабочей части	$2,96 \pm 0,05$ мм
Масса	$5,76 \pm 0,5$ г

Инструмент для установки аналога имплантата NobelProcera® IOS Model Insertion tool
Conical Connection (CC) NP

Длина	$49 \pm 0,15$ мм
Резьба	M 1,6 x 0,35-6g
Диаметр основания	$6,9 \pm 0,1$ мм
Диаметр рабочей части	$3,46 \pm 0,5$ мм
Масса	$5,91 \pm 0,5$ г

Инструмент для установки аналога имплантата NobelProcera® IOS Model Insertion tool
Conical Connection (CC) RP

Длина	$49 \pm 0,15$ мм
Резьба	M 2 x 0,4-6g
Диаметр основания	$6,9 \pm 0,1$ мм
Диаметр рабочей части	$3,82 \pm 0,05$ мм
Масса	$6,09 \pm 0,6$ г

Инструмент для установки аналога имплантата NobelProcera® IOS Model Insertion tool
Conical Connection (CC) WP

Длина	$49 \pm 0,15$ мм
Резьба	M 2 x 0,4-6g
Диаметр основания	$6,9 \pm 0,1$ мм
Диаметр рабочей части	$5,02 \pm 0,05$ мм
Масса	$6,71 \pm 0,6$ г

Инструмент для установки аналога имплантата Insertion Tool IOS Implant Replica Nobel Biocare N1 NP/RP	
Длина	57 мм ± 0.15 мм
Резьба	Для NP: M1.4 x 0.2 мм Для RP: M1.6 x 0.2 мм
Диаметр рабочей части	Для NP: 3,57 ± 0.05 мм Для RP: 4,00 ± 0.05 мм
Масса	4,04 ± 0,5 г

14. Перечень применяемых стандартов

Изделия соответствуют требованиям следующих стандартов:

ISO 13485:2016 и MDD 93/42/ЕЕС, Приложение II (за исключением секции 4), определяющее пределы применимости продукции Nobel Biocare.

Номер документа	Дата выпуска	Название
Директива 93/42/ЕЕС	1993	Директива Совета 93/42/ЕЕС от 14 июня 1993 года по вопросу медицинских изделий
MEDDEV 2.7.1 Rev. 4	2016	Клиническая оценка: руководство для производителей и нотифицированных органов
ISO 13485:2016	2016	Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Требования для целей регулирования
ISO 15223-1:2016	2016	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Общие требования
EN 1041:2008 + A1:2013	2013	Информация, предоставляемая производителем медицинских изделий
ISO 14971	2012	Медицинские изделия - Применение управления рисками к медицинским изделиям
EN 62366	2008	Изделия медицинские. Проектирование медицинских изделий с учетом эксплуатационной пригодности (IEC 62366:2007)
ASTM F899	2012	Стандартная спецификация для кованой нержавеющей стали для хирургических инструментов
ASTM D4169	2016	Стандартная практика проведения транспортировочных тестов контейнеров и систем
ISO 5832-3	1996	Имплантаты для хирургии. Металлические материалы. Часть 3. Деформируемый сплав на основе титана, 6-алюминия и 4-ванадия (с Поправкой)
ASTM F136	2013	Стандарт на титан 6AL-4VELi (Grade 5) для хирургических имплантатов
ASTM A582	2012	Стандартные технические условия на прутки из нержавеющей стали повышенной обрабатываемости
EN 1639	2009	Стоматология. Медицинские стоматологические приборы. Инструменты

ASTM B348	2013	Стандартная спецификация на прутки и заготовки из титана и титановых сплавов
-----------	------	--

15. Срок службы

Гарантийный срок хранения составляет 5 лет.

Изделия проходят проверку перед каждым использованием для обеспечения целостности изделия. Любое изделие с признаками коррозии и (или) повреждения должно быть утилизировано и заменено.

16. Требования к техническому обслуживанию и ремонту медицинского изделия.

Не применимо.

17. Порядок и условия утилизации или уничтожения медицинского изделия.

Необходимо безопасно утилизировать потенциально загрязненные или более не пригодные для использования медицинские изделия в качестве медицинских (клинических) отходов в соответствии с местными руководящими указаниями в области здравоохранения, государственным законодательством и политикой, а также законодательством и политикой страны.

Разделение, переработка или утилизация упаковочного материала должны осуществляться в соответствии с местным законодательством страны и правительственным законодательством об упаковке и отходах упаковки, в соответствующих случаях.

Утилизацию следует осуществлять с соблюдением требований для эпидемиологически безопасных отходов, по составу приближенных к ТКО, класса А, в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3684-21.

18. Комплект поставки

Аналоги имплантатов, упакованные в первичную и вторичную упаковку по 1 шт./уп., поставляются потребителю в транспортной упаковке от 1-24 шт./уп.

Принадлежности, упакованные в первичную упаковку по 1 шт./уп., поставляются потребителю вместе с аналогами имплантатов и/или отдельно от них в транспортной упаковке до 300 шт.

Инструкция по применению изделий предоставляется потребителю при поставке уполномоченным представителем по требованию.

19. Наименование и юридический адрес организации-производителя медицинского изделия и уполномоченного представителя производителя.

Производитель

«Nobel Biocare AB» (Нобель Байокер АБ)

Адрес: Box 5190, 402 26, Västra Hamngatan 1, 411 17 Goteborg, Sweden.

Телефонный номер: +46 31818917

Официальная страница в интернете: <https://www.nobelbiocare.com>

Места производства:

1. Nobel Biocare USA, LLC, 22715 Savi Ranch Parkway, Yorba Linda, California, 92887, USA;

2. Nobel Biocare AB, Produktion, Dimbovägen 2, Karlskoga 691 51, Sweden;

3. La Precision, 16, rue des Horlogers, 74950 Scionzier, France;

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации
 Общество с ограниченной ответственностью «Нобель Биокер Раша»
 Юридический адрес: Москва г, ул. Станиславского, д. 21, стр. 2, 109004;
 Почтовый адрес: Москва г, ул. Станиславского, д.21, стр.3, 109004;
 Контактный телефон: +7 (495) 974-77-55;
 Электронный адрес: olga.kalach@nobelbiocare.com
 Web-сайт: www.nobelbiocare.ru

20. Символы, используемые на маркировке изделий.

	Код партии
	Номер по каталогу
	Изготовитель
	Дата изготовления
	Не использовать при повреждении упаковки
	Запрет на повторное применение
	Не допускать воздействия солнечного света
	Беречь от влаги
	Медицинское изделие
Rx Only	Только для профессионального использования
NOT FOR CLINICAL USE	Не предназначено для клинического использования
	Не стерильно
	Обратитесь к инструкции по применению
	Изделие соответствует основным требованиям директив ЕС



Баркод



Цветовая маркировка
(только для платформ RP (Стандартная), NP (Узкая), WP (Широкая))
пурпурный - платформа NP (Узкая),
желтый - платформа RP (Стандартная),
синий – платформа WP (Широкая)

QTY

Количество

UDI

Уникальный идентификатор медицинского изделия

Made in

Сделано в



Открывать вверх



Лототип компании Nobel Biocare AB

[Перевод с английского языка на русский язык]

[Перевод надписей, печатей и штампа на документе «Инструкция по применению медицинского изделия „Аналоги имплантатов стоматологические с принадлежностями“», представленном на русском языке.]

[На бланке компании «Нобель Байокер»]

«Нобель Байокер АБ»
(Nobel Biocare AB)
А/я 5190, 402 26, Вэстра
Хамнгатан 1, Гётерборг,
411 17, Швеция
(Box 5190, 402 26, Västra
Hamngatan 1, Göteborg,
411 17, Sweden)
www.nobelbiocare.com

[Штамп:

Я, нижеподписавшийся Эрик фон Платен, нотариус
г. Стокгольм, настоящим удостоверяю, что:

г-н Алессандро Райнис

поставил подпись на настоящем документе.

Стокгольм, 17 мая 2021 г.

В силу занимаемой должности:

/подпись/

Эрик фон Платен]

[Печать нотариуса г. Стокгольма Эрика фон Платена]

«Нобель Байокер АБ»
Руководитель по нормативным вопросам регионов и регистраций
Алессандро Райнис
/подпись/

Текст данного документа перевёл переводчик Рахимкулов Эльдар Серкалиевич. Знание иностранного языка подтверждаю. Выполненный перевод является правильным, точным и полным.

Российская Федерация
Город Москва

Первого июня две тысячи двадцать первого года

Я, Точкин Дмитрий Валерьевич, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Рахимкулова Эльдара Серкалиевича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре № 77/2079-н/77-2021- 9-1003

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб.

Д.В. Точкин

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 8 лист(а)(ов)

Нотариус