



Application Gun “MixPac”

Классификация согласно нормативным актам 93/42/ЕЭС: продукция по классу I.

Устройство смешивающее для выдавливания стоматологического материала из картриджа

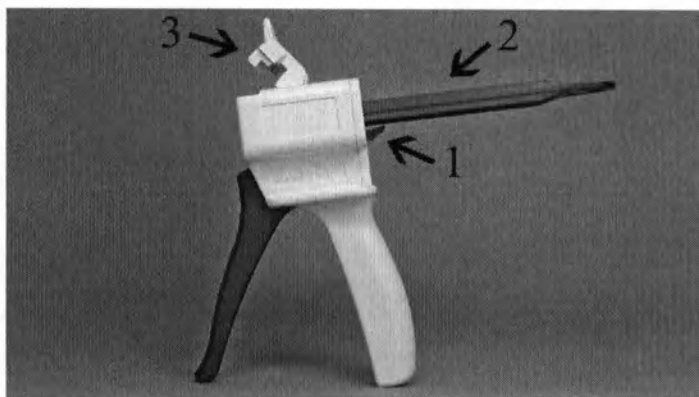

Нажмите на маленький рычаг (1) и вытяните скользящий затвор (2) полностью. Поднимите защелку (3) и вставьте картридж с материалом.

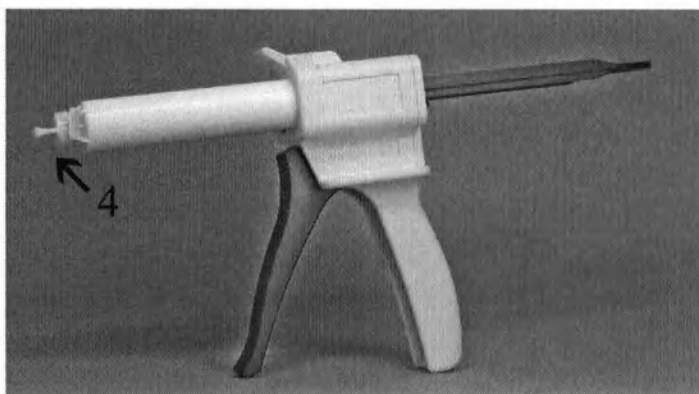

Снимите крышечку картриджа (4) путем поворачивания ее против часовой стрелки на 90° и установите на ее место смешивающую канюлю. До следующего раза применяйте использованную канюлю в качестве крышечки.

Внимание:

Первую порцию материала (размером с горошину) необходимо выбросить. Только в этом случае последующее выдавливание материала образует высококачественную гомогенную массу. Подобным образом поступайте перед каждым использованием материала.