



«Утверждаю»

Генеральный директор
ООО «ТБИ Стома»
Воронцов А.И.

Инструкция по применению

«Материал стоматологический слепочный CoralPress»

производства: “С энд Си Полимер Силикон- унд Композите Специалитетен ГмбХ“,
Германия,

“S&C Polymer, Silicon- und Composite Spezialitaeten GmbH“, Robert-Bosch-Str. 5, D-25335
Elmshorn, Germany

Телефон +49-(0)4121/4 83-0 Факс +49-(0) 4121/4 83-1 84

E-mail scpolymer@t-online.de



CoralPress PUTTY (КоралПресс ПАТТИ)

Гидрофильный слепочный материал для прецизионных слепков (основной слой)

Классификация согласно нормативным актам 93/42/ЕЭС: продукция по классу I.

Данный материал, как и материал **CoralPress LIGHT**, относится к гидрофильным слепочным материалам методом двойного слепка. Он представляет собой вязкую массу на основе силиконов. Её легко смешивать, она не липнет к рукам. Этот материал соответствует нормам стандартизации DIN EN ISO 4823 (2001) тип 0 (вязкая масса).

Применение:

При использовании данного материала можно применять ложки с отверстиями и без них. Для улучшения качества сцепления в ложке, необходимо смазать поверхность ложки тонким слоем силиконового адгезива и дать ему высохнуть через 3 минуты. Одинаковое количество (объём и вес) базисной массы и катализатора необходимо измерить чёрной мерной ложкой для базисной массы и белой - для катализатора. Обе массы следует смешать и соединить в одну массу в течение 30 секунд, чтобы достичь однородного цвета. Затем распределить её по поверхности ложки и не позже, чем через 1,30 мин (при комнатной температуре - около 23 градусов Цельсия) после начала смешивания установить ложку в полость рта, время отверждения составляет 3 минуты.

Слепок рекомендуется хранить при температуре максимально 25 градусов Цельсия.

Литьё:

Через 30 минут после того, как слепок был удалён из полости рта, можно начинать отливать коронку.

Гальванизация:

Все слепки можно гальванизировать серебряной или золотой краской.

Дезинфекция:

Для дезинфекции можно использовать любые дезинфицирующие средства.

Условия хранения:

Хранить материал рекомендуется при температуре не выше 25 градусов Цельсия, после окончания срока годности материал применять не рекомендуется.

Примечание:

Не путать крышку и мерную ложку!

Не использовать вместе со стандартными силиконовыми слепочными материалами.

Не используйте латексные перчатки, т.к. они, загрязнив обрабатываемые поверхности, могут повлиять негативно на реакцию сцепления поливинилсилоксанов.

Внимание!

Материал применяется для использования исключительно в профессиональной стоматологии.

CoralPress PUTTY имеет установленную полную Систему Обеспечения Качества, сертифицированную на соответствие с нормами EN ISO 13485:2003 + AC:2007 через Medcert Zertifizierungs- und Pruefungsgesellschaft fuer die Medizin GmbH, Pilatuspool 2-20355 Hamburg-Deutschland. Изделие получило знак CE соответствия с директивой 93/42/EWC.

Distributor: TBI@Stoma, 6/3 Ostozhenka Str.
RU-119034 Moscow



Manufacturer: S&C Polymer GmbH, Elmshorn,
Germany





CoralPress LIGHT (КоралПресс ЛАЙТ)

Гидрофильный слепочный материал для прецизионных слепков, корректирующий слой

Классификация согласно нормативным актам 93/42/ЕЭС: продукция по классу I.

Данный материал относится к низковязким материалам. Он не текучий и представляет собой слепочный материал для прецизионных слепков на основе винилсиликонов. Поставляется данный материал в картриджах, в которых происходит автоматическое смешивание. Он наносится на зубы или вносится в слепочную ложку, не вызывая при этом образования пузырьков.

CoralPress LIGHT - тиксотропный материал, он не текуч и остаётся в ложке в месте позиционирования. Лёгкое давление может сдвинуть материал с места. Материал обладает также гидрофильными свойствами и легко смачивает поверхности, что приводит к прецизионной передаче контуров субгингивальных участков или других влажных поверхностей. Нормы стандартизации DIN EN ISO 4823 (2001) Тип 3 (слаботекучий).

Подготовка картриджей:

Колпачок на картридже АутоМикс следует удалить и заменить на смешивающую канюлю. Картридж с материалом вставляется в соответствующее устройство для выдавливания материала и сразу же может быть использован. В более щепетильных ситуациях, как, например, при аппликации на зуб, необходимо дополнительно в качестве насадки на канюлю использовать внутриротовую насадку.

Слепок:

Автоматически замешанный материал наносится на слепочную ложку или непосредственно на зубы. Ложку рекомендуется внести в полость рта не позже, чем через 2 минуты (время работы с материалом при 23 градусах Цельсия) и держать в полости рта пациента минимум 3 минуты.

Примечание:

Использованную смешивающую канюлю применять до следующего приёма в качестве крышечки-колпачка. Картридж не рекомендуется закрывать оригинальным колпачком, т.к. не исключено двустороннее загрязнение и непреднамеренное частичное затвердевание материала.

Литьё:

Слепок следует хранить при температуре не выше 25 градусов Цельсия. Литьё можно осуществлять через 30 минут после удаления слепка из полости рта.

Гальванизация:

Все слепки можно гальванизировать медной или серебряной краской.

Дезинфекция:

Для дезинфекции возможно применять любые дезинфицирующие средства.

Условия хранения:

Хранить материал при температуре не выше 25 градусов Цельсия. По окончании срока годности материал применять не рекомендуется.

Примечание:

Не использовать вместе со стандартными силиконовыми слепочными массами.

Не рекомендуется использовать латексные перчатки во избежание двойного загрязнения и ухудшения свойств сцепления поливинилов.

Внимание!

Материал применяется для использования исключительно в профессиональной стоматологии.

CoralPress Light имеет установленную полную Систему Обеспечения Качества, сертифицированную на соответствие с нормами EN ISO 13485:2003 + AC:2007 через Medcert Zertifizierungs- und Pruefungsgesellschaft fuer die Medizin GmbH, Pilatuspool 2-20355 Hamburg-Deutschland.

Изделие получило знак CE соответствия с директивой 93/42/EWC.

Distributor: TBI@Stoma, 6/3 Ostozhenka Str.
RU-119034 Moscow



Manufacturer: S&C Polymer GmbH, Elmshorn, Germany



Прошито и скреплено
печатью ООО «ТБИ Стома»

Б. И. С. Г. О. В.

Генеральный директор
ООО «ТБИ Стома»



А.И.Воронцов