

УТВЕРЖДАЮ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Бахилы медицинские одноразовые
ТУ 32.50.50-001-007055864-2019

РУ _____ от _____

Версия 1.0

1. ОПИСАНИЕ

1. Бахилы представляют собой изделия с эластичной резинкой, предназначенные для использования в качестве физического барьера на обуви для защиты обуви от загрязнения жидкостью.
2. Бахилы применяются с целью поддержания гигиенически-санитарных норм в помещениях с высокой проходимостью (лечебно-профилактические учреждения, музеи, спортивные комплексы и т.д.).
3. В качестве основного материала используется полиэтилен низкого давления (ПНД) по ГОСТ 10354.
4. Бахилы выпускают следующих цветов: голубой, синий, сиреневый, зеленый, желтый.
5. Изделия имеют различную плотность: от 5 до 35 мкм.
6. Вес изделий: от 1 г до 2 г.

2. ПОКАЗАНИЯ

1. Для использования в медицинских учреждениях, общественных местах и дома.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

1. При использовании изделий по назначению и в соответствии с инструкцией по применению противопоказаний и ограничений в применении нет.

4. ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

1. Не выявлены.

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Концентрацию вредных веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений контролируют методами, утвержденными Минздравом Российской Федерации.
2. Параметры микроклимата производственных помещений должны соответствовать СанПиН 2.2.4.548-6.
3. Производственные помещения должны быть оборудованы общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией, а рабочие места местной вентиляцией, обеспечивающими концентрацию вредных веществ в воздухе рабочей зоны, не превышающую предельно допустимую. Система вентиляции производственных складских и вспомогательных помещений - по ГОСТ 12.4.021.
4. По степени пожарной опасности производство изделий относится к категории В.
5. Средства пожаротушения - химическая пена, песок, тонкораспыленная вода.

ВНИМАНИЕ !

запрещается:

- применение изделий в случае если упаковка была открыта или повреждена;
- применение изделия по истечению срока годности;
- повторное применение изделия.

6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Расправить Бахилы .
2. Надеть на ноги поверх обуви или носков.
3. После использования утилизировать с бытовыми отходами.

7. ФОРМА ПОСТАВКИ

1. Комплект поставки изделий должен включать в себя:

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Бахилы в групповой таре в количестве, в соответствии с заказом, упакованные в транспортную тару. Изделия упаковывают в пакеты из полимерных пленок по ГОСТ 12302 по 1-1000 пар. В качестве транспортной упаковки используют ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142. Инструкция по применению.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1 Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

8.2 Изделия хранят в крытых сухих складских помещениях на расстоянии не менее 1,5 м от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред (кислотной, щелочной и др.), а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Изделия должны быть защищены от прямого воздействия солнечного света.

8.3 Хранят изделия в упаковке от 1 до 40 С⁰ при относительной влажности до 80%.

8.4 Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение изделий в районы Крайнего Севера и приравненные к ним районы - по ГОСТ 15846-2002.

9. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ

9.1 Утилизацию отходов осуществляют в соответствии с СП N 3183 или направляют отходы на повторную переработку.

9.2 Охрана окружающей среды - по ГОСТ 17.2.3.01. Выбросы вредных веществ в атмосферу - по ГОСТ 17.2.3.02.

10. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий упаковки, транспортирования и хранения.

10.2 Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня реализации через торговую сеть, но не более 15 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя. Срок годности - не ограничен.

10.3 Бахилы предназначены для одноразового использования.

10.4 Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Крымлек», Россия, 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тополиная аллея, д.10, комната 7..

телефон:

e-mail:

11. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ:

ГОСТ 15150, ГОСТ Р 52770, ГОСТ Р ИСО 15223-1, ГОСТ Р 50444.

Пронумеровано и прошнуровано

2 (два)

лист

Генеральный директор

ООО «Крымлек»

Л.В.Попова

