

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «МедиКрафт»

Юдин А.В.

30 июня 2021 года



Инструкция по применению

медицинского изделия

**Жидкость электродная контактная с высокой электропроводностью
«АКУГЕЛЬ-СПРЕЙ» в полимерной емкости, массой 200 г, 250 г и 1 кг
по ТУ 9398-005-66242897-2015**

производства ООО «МедиКрафт»

Версия 3

Инструкция по применению

Жидкость электродная контактная с высокой электропроводностью
«АКУГЕЛЬ-СПРЕЙ»

в полимерной ёмкости, массой 200г, 250г и 1 кг по ТУ 9398-005-66242897-2015

Жидкость электродная контактная с высокой электропроводностью «АКУГЕЛЬ-СПРЕЙ» предназначена для применения при ЭКГ, дефибриляции, электромиостимуляции, маммосканирования, при использовании метода измерения электросопротивления тканей, других электрофизиологических исследований, а также при проведении процедур аппаратной косметологии при использовании отечественной или импортной аппаратуры..

При наличии соответствующей аппаратной базы, жидкость может использоваться в стационарных, передвижных, переносных условиях, использоваться в медицинских транспортных средствах, а также в полевых условиях.

Жидкость представляет собой однородный раствор голубого цвета, без механических примесей, без запаха или со слабым специфическим запахом.

Жидкость выпускается нестерильной во флаконах с дозирующим устройством и колпачком массой нетто 200 г, во флаконах с дозирующим устройством и колпачком массой нетто 250 г и во флаконах с крышкой массой нетто 1000 г.

Жидкость наносят непосредственно на электрод или кожу пациента для проведения процедуры. После окончания процедуры, жидкость смывается водой или удаляется салфеткой. Остатки жидкости после процедуры не токсичны и не пачкают одежду.



Не допускать попадания на поврежденную кожу или раневую поверхность!

Не использовать жидкость повторно!

Противопоказания: отсутствуют.

Побочные действия: Жидкость нетоксична, возможны индивидуальные аллергические реакции. В случае аллергии, немедленно смыть жидкость водой или убрать салфеткой.

Жидкость хранится в сухом месте, защищенном от попадания прямого солнечного света, при температуре от плюс 5 до плюс 40°C. Условия транспортирования – при температуре от минус 50 до плюс 50°C.

Утилизацию (уничтожение отходов) жидкости осуществлять в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790, как отходы класса А.

Комплект поставки: – жидкость в упаковке – 1 шт.; – инструкция по применению, вложенная или напечатанная на упаковке – 1 шт.

Срок годности - 3 года с даты изготовления. Дата изготовления и номер партии / указаны на упаковке.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «МедиКрафт» (ООО «МедиКрафт»), Россия, 630073, Новосибирская область, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, д. 2, комната 512, тел +7 (383) 213-63-91, 255-65-90, www.medikraft.ru, эл.почта sales@medikraft.ru

Пронумеровано и скреплено
Печатью 2 листов
Директор ООО «МедиКрафт»
Юдин А.В.

