

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «МедиКрафт»

Юдин А.В.

30 июля 2021 года



Инструкция по применению

медицинского изделия

**Гель электродный "АКУГЕЛЬ-Электро"
по ТУ 9398-002-66242897-2011**

производства ООО «МедиКрафт»

Версия 4

Инструкция по применению
Гель электродный "АКУГЕЛЬ-Электро"
по ТУ 9398-002-66242897-2011

Гель электродный АКУГЕЛЬ-Электро (далее по тексту – гель) предназначен для ЭКГ, ЭЭГ, РЭГ, ЭМГ, ЭМС, регистрации вызванных потенциалов (ВП), при холтеровском мониторинговании, велоэргометрии, а также для проведения дефибрилляции, для проведения различных процедур аппаратной косметологии.

Гель выпускается в пластиковых банках, или флаконах, или бутылках, или канистрах массой 100г, 200г, 250г, 500г, 1кг, 3кг, 5кг или по заказу потребителя.

Гель представляет собой однородную бесцветную или желтоватую вязкую жидкость без механических примесей, без запаха или со слабым специфическим запахом. Допускается наличие пузырьков воздуха в геле.

Значение pH: 7.0 ± 2.0 ; Вязкость: 5-20 Па·с; Электропроводность: 0.5-4 См/см.

Плотность, г/см³: $1,04 \pm 0,06$; Масса сухого остатка на 1000 г. геля, г: 36 ± 6 .

Допускается выпуск геля с добавками по заказу потребителя: Алоэ, сухой экстракт; Зелёный чай, сухой экстракт; Женьшень, сухой экстракт; L-Карнитин; Пиридоксина гидрохлорид; Тиамин гидрохлорид; Автолизат дрожжей; Соль природная океаническая; Соль природная РАПАН; Бензалкония хлорид С14; Цетилпиридиния хлорид; Диметилсульфоксид; 3,3'-Дииндолилметан; Индол-3-карбинол.

Гель наносят непосредственно на электрод или кожу пациента для проведения процедуры. После окончания процедуры гель смывается водой или удаляется салфеткой. Остатки геля после исследования не токсичны и не пачкают одежду.



Не допускать попадания на поврежденную кожу или раневую поверхность!

Не использовать гель повторно!

Противопоказания: отсутствуют.

Побочные действия: Гель нетоксичен, возможны индивидуальные аллергические реакции. В случае аллергии немедленно смыть гель водой или убрать салфеткой.

Гель хранят в сухом месте, защищенном от попадания прямого солнечного света, при температуре от плюс 5 до плюс 40°C. Условия транспортирования – при температуре от минус 50 до плюс 50°C.

Утилизацию геля производить как отходы класса А по СанПиН 2.1.7.2790.

Комплект поставки: гель в упаковке – 1 шт.; инструкция по применению – 1 шт.

Срок годности - 3 года с даты изготовления. Дата изготовления и номер партии указаны на упаковке.

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «МедиКрафт» (ООО «МедиКрафт»), Россия, 630073, Новосибирская область, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, д. 2, комната 512, тел +7 (383) 213-63-91, 255-65-90, www.medikraft.ru, эл. почта sales@medikraft.ru

Пронумеровано и скреплено
Печатью 2 листов
Директор ООО «МедиКрафт»
Юдин А.В.

