

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «МедиКрафт»

Юдин А.В.

16 августа 2022 года



Инструкция по применению

медицинского изделия

**Гель для ультразвуковых исследований АКУГЕЛЬ
по ТУ 9398-001-66242897-2010**

производства ООО «МедиКрафт»

Версия 4

Инструкция по применению
Гель для ультразвуковых исследований АКУГЕЛЬ
по ТУ 9398-001-66242897-2010

Гель для ультразвуковых исследований "Акугель" предназначен для ультразвуковых исследований, доплерографии и эхографии.

Гель выпускается в пластиковых банках, или флаконах, или бутылках, или канистрах массой 200г, 250г, 500г, 1кг, 3кг, 5кг или по заказу потребителя.

Гель выпускается в следующих исполнениях:

- низкой вязкости
- средней вязкости
- высокой вязкости

Гель представляет собой однородную вязкую жидкость без механических примесей, без запаха или со слабым специфическим запахом. Допускается наличие пузырьков воздуха в геле.

Информацию о составе геля указана на упаковке. Допускается выпуск геля со следующими пищевыми красителями: индигокармин (E132), синий блестящий (E133), зелёный киви (B10) для придания гелю цвета.

Гель наносят непосредственно на датчик или кожу пациента для проведения процедуры. После окончания процедуры гель смывается водой или удаляется салфеткой. Остатки геля после исследования не токсичны и не пачкают одежду.

Внимание: попадание на поврежденную кожу или раневую поверхность пациента НЕ ДОПУСТИМО! Не использовать гель повторно.

Противопоказания: отсутствуют.

Побочные действия: Гель нетоксичен, возможны индивидуальные аллергические реакции. В случае аллергии немедленно смыть гель водой или убрать салфеткой.

Гель хранят в сухом месте, защищенном от попадания прямого солнечного света, при температуре от плюс 5 до плюс 40°C. Условия транспортирования – при температуре от минус 50 до плюс 50°C.

Утилизацию геля производить как отходы класса А по СанПиН 2.1.7.2790.

Комплект поставки: гель в упаковке – 1шт.; инструкция по применению, вложенная в упаковку или наклеенная на нее – 1шт.

Срок годности - 3 года с даты изготовления.

Дата изготовления и номер партии указаны на упаковке.

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «МедиКрафт» (ООО «МедиКрафт»)

Россия, 630073, Новосибирская область, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, д. 2, комната 512

тел +7 (383) 213-63-91, 255-65-90, адрес электронной почты sales@medikraft.ru, сайт: www.medikraft.ru

Пронумеровано и скреплено
Печатью 2 листов
Директор ООО «МедиКрафт»
Юдин А.В.

