

**Справка**  
**об изделии медицинского назначения**

**Лейкопластырь «Докапласт»**

**1. Описание изделия**

Лейкопластырь предназначен для использования в качестве наружного перевязочного средства

Лейкопластырь представляет собой комбинированное изделие с фиксирующим слоем.

Лейкопластырь выпускается стерильный и нестерильный:

- с лекарственными аппликациями (семь исполнений);
- без лекарственных аппликаций (два исполнения).

Таблица

| Форма изделия                                                                                                             | Линейные размеры, см |            |              |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------|------------|
|                                                                                                                           | Фиксирующей части    |            | Прокладки    |            |
|                                                                                                                           | ширина               | длина      | ширина       | длина      |
| Фиксирующая часть<br>прямоугольной формы<br>(с прямыми или<br>закругленными краями) с<br>прокладкой и с защитным<br>слоем | 0,95 ± 0,2           | 3,8 ± 0,2  | 0,95 ± 0,2   | 1,25 ± 0,2 |
|                                                                                                                           | 1,6 ± 0,2            | 5,7 ± 0,2  | 1,6 ± 0,2    | 2,0 ± 0,2  |
|                                                                                                                           | 1,9 ± 0,2            | 7,2 ± 0,2  | 1,9 ± 0,2    | 3,0 ± 0,2  |
|                                                                                                                           | 1,9 ± 0,2            | 7,2 ± 0,2  | 1,25 ± 0,2   | 3,0 ± 0,2  |
|                                                                                                                           | 2,5 ± 0,2            | 7,2 ± 0,2  | 1,0 ± 0,2    | 3,0 ± 0,2  |
|                                                                                                                           | 2,5 ± 0,2            | 7,2 ± 0,2  | 2,5 ± 0,2    | 3,0 ± 0,2  |
|                                                                                                                           | 3,8 ± 0,2            | 3,8 ± 0,2  | 2,0 ± 0,2    | 2,0 ± 0,2  |
|                                                                                                                           | 4,0 ± 0,2            | 10,0 ± 0,2 | 4,0 ± 0,2    | 5,0 ± 0,2  |
|                                                                                                                           | 5,0 ± 0,2            | 7,0 ± 0,2  | 2,5 ± 0,2    | 4,0 ± 0,2  |
|                                                                                                                           | 6,0 ± 0,2            | 8,0 ± 0,2  | 2,0 ± 0,2    | 2,1 ± 0,2  |
|                                                                                                                           | 6,0 ± 0,2            | 10,0 ± 0,2 | 2,5 ± 0,2    | 7,0 ± 0,2  |
|                                                                                                                           | 6,0 ± 0,2            | 10,0 ± 0,2 | 6,0 ± 0,2    | 5,0 ± 0,2  |
|                                                                                                                           | 6,0 ± 0,2            | 15,0 ± 0,2 | 2,5 ± 0,2    | 10,8 ± 0,2 |
|                                                                                                                           | 8,0 ± 0,2            | 15,0 ± 0,2 | 3,6 ± 0,2    | 10,8 ± 0,2 |
|                                                                                                                           | 8,0 ± 0,2            | 20,0 ± 0,2 | 3,6 ± 0,2    | 15,5 ± 0,2 |
|                                                                                                                           | 10,0 ± 0,2           | 25,0 ± 0,2 | 5,5 ± 0,2    | 30,0 ± 0,2 |
| Фиксирующая часть<br>фигурной формы с<br>прокладкой и с защитным<br>слоем                                                 | 6,0 ± 0,2            | 50,0 ± 0,5 | 3,0 ± 0,2    | 50,0 ± 0,5 |
|                                                                                                                           | 3,8 ± 0,2            | 5,6 ± 0,2  | 2,0 ± 0,2    | 3,0 ± 0,2  |
|                                                                                                                           | 3,8 ± 0,2            | 7,2 ± 0,2  | 2,0 ± 0,2    | 3,0 ± 0,2  |
|                                                                                                                           | 5,1 ± 0,2            | 7,6 ± 0,2  | 3,0 ± 0,2    | 3,5 ± 0,2  |
|                                                                                                                           | Ø2,3 ± 0,1           | -          | 1,25 ± 0,2   | 1,25 ± 0,2 |
|                                                                                                                           | Эл (4,0-5,0)         | 8,5 ± 0,2  | Эл (2,0-3,0) | 4,7 ± 0,2  |
|                                                                                                                           | Эл (3,0-4,0)         | 6,4 ± 0,2  | Эл (1,5-2,3) | 3,6 ± 0,2  |

**2. Описание принципа действия:**

Принцип действия пластыря основан на взаимодействии с раной и проникновения в неё лекарственного средства, которое может быть: бактерицидным, антимикробным, ранозаживляющим и кровоостанавливающим

Бактерицидная и антимикробная лекарственная аппликация подавляет микробную активность раневой поверхности и не даёт последующего воспаления..

Ранозаживляющая лекарственная аппликация даёт возможность чистой ране быстро зажить.

Кровоостанавливающая лекарственная аппликация даёт возможность быстрого свёртывания крови с последующим наложением бактерицидного пластыря на рану.

### 3. Используемые материалы

Фиксирующую часть в виде подложки(ткань хлопчатобумажная)

Эластичный трикотаж; нетканая основа спанлейс, спандбонд или клееная; плёнка поливинилхлоридная, полиуретановая или полиэтиленовая)с прерывистым липким клеевым слоем,а так же с непрерывным липким слоем;

Прокладка из нетканного полотна с атравматическим покрытием с лекарственными аппликациями;

Защитный слой из антнадгезивной бумаги или плёнки

Прокладка должна быть мягкой и не иметь посторонних включений и складок.

Лекарственные аппликации:

1. Хлогексидин биглюканат
2. Мирамистин
3. Прополис
4. Феракрил
5. Бриллиантовый зелёный
6. Протаргол
7. Сангвиритрин

Сфера применения пластырей «Докапласт»

1.Стерильные лейкопластыри применяются в следующих отделениях ЛПУ в послеоперационном. периоде:


Травмотологических  
Хирургических (гнойная и чистая)  
Нейрохирургических  
Кардиологических

2.Стерильные и нестерильные лейкопластыри применяются в Скорой медицинской помощи

- 3 Нестерильные лейкопластыри применяются в амбулаториях и медпунктах при лечении мелких царапин,потёртостей,ссадин,неглубоких порезов,
- 4 Лейкопластыри «Докапласт» могут быть использованы в медицинских транспортных средствах, в различных переносных аптечках,в полевых условиях,а также в мобилизационных запасах.

Генеральный директор

ЗАО «Новые Перевязочные Материалы»

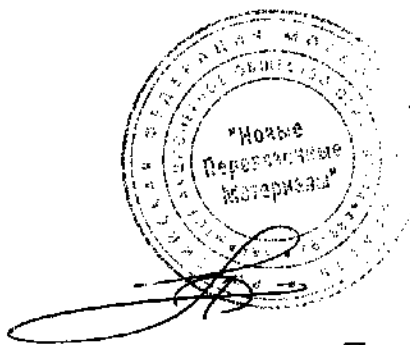

Перминов Д.В.

10.8.2010г

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

2 (два) листов

«10» августа 2010 года

Генеральный директор  
ЗАО «Новые перевязочные средства»

\_\_\_\_\_ Д. В. Перминов