

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО "Завод Эластик"

 А.В. Куркин
«19» апреля 2021 г.

Костюмы хирургические одноразового использования нестерильные
ТУ 14.19.32-026-74582615-2020

Инструкция по применению

Оглавление

1 Наименование медицинского изделия	3
2 Сведения о производителе медицинского изделия	3
3 Назначение медицинского изделия	3
4 Показания к применению	3
5 Противопоказания к применению	3
6 Возможные побочные действия	3
7 Требования безопасности	3
8 Взаимодействие с другими медицинскими изделиями	3
9 Описание, параметры и характеристики медицинского изделия	4
10 Материалы медицинского изделия	5
11 Указания по применению	6
12 Техническое обслуживание, текущий ремонт	6
13 Комплектность	6
14 Упаковка	6
15 Маркировка	7
16 Требования к стерильности, дезинфекции и очистке	7
17 Условия эксплуатации	8
18 Транспортирование и хранение	8
19 Требования охраны окружающей среды	8
20 Гарантийные обязательства	8
21 Порядок осуществления утилизации и уничтожения медицинского изделия	8
22 Перечень нормативных документов	9

1 Наименование медицинского изделия

Наименование медицинского изделия – Костюмы хирургические одноразового использования нестерильные (далее – костюм).

2 Сведения о производителе медицинского изделия

Общество с ограниченной ответственностью «Завод Эластик» (ООО «Завод Эластик»)

423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, территория Промзона

Тел.: 8 (8555) 38-30-90

Адрес эл. почты: info@zavodelastic.com

3 Назначение медицинского изделия

Это нестерильная одежда для одноразового использования, предназначенная для ношения персоналом лечебного учреждения для обеспечения гигиенических условий, в том числе при проведении медицинских процедур, для создания барьера с целью предотвращения перекрестного заражения возбудителями инфекций между персоналом и пациентами.

Потенциальные потребители: медицинский персонал.

4 Показания к применению

Необходимость предотвращения перекрестного заражения возбудителями инфекций между персоналом и пациентами на территории ЛПУ, за исключением применения в чистых помещениях стерильной зоны и при проведении хирургических операций.

5 Противопоказания к применению

Отсутствуют.

6 Возможные побочные действия

Отсутствуют.

7 Требования безопасности

Производство костюмов изолирующих одноразового использования нестерильных осуществляется с соблюдением правил пожаро- и взрывобезопасности по ГОСТ 12.1.004 и ГОСТ 12.1.010.

Костюмы из нетканого материала при комнатной температуре не выделяют в окружающую среду токсичных веществ и не оказывают вредного влияния на организм человека при непосредственном контакте, работа с ними не требует дополнительных мер предосторожности.

Костюмы из нетканого материала относятся к группе горючих материалов по ГОСТ 12.1.044, при контакте с открытым огнем горят коптящим пламенем с образованием расплава и выделением углекислого газа, паров воды, непредельных углеводородов и газообразных продуктов.

В целях предотвращения возгорания костюмов при хранении и эксплуатации следует соблюдать правила пожарной безопасности, не хранить изделия вблизи отопительных приборов, вблизи взрывоопасных и горючих материалов, легковоспламеняющихся жидкостей.

8 Взаимодействие с другими медицинскими изделиями

Костюмы совместимы со всеми медицинскими изделиями.

9 Описание, параметры и характеристики медицинского изделия

9.1 Описание

Применяемые материалы:

1) основной материал - трехслойный материал типа СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд);

2) основной материал - двухслойный материал типа СС (спанбонд-спанбонд);

3) основной материал – ламинированный нетканый материал типа В (двухслойный материал СС (спанбонд-спанбонд), ламинированный тонкой полимерной пленкой из полиэтилена и полипропилена).

Части костюмов имеют следующие цвета в зависимости от материала: белый (без красителя), голубой.

-возможные плотности нетканого материала типа СМС или СС или В:

"Эконом" соответствует (20-25 г/м²);

"Эконом+" соответствует (26-30 г/м²);

"Стандарт" соответствует (31-35 г/м²);

"Стандарт +" соответствует (36-40 г/м²);

"Комфорт" соответствует (41-45 г/м²);

"Комфорт+" соответствует (46-50 г/м²);

"Премиум" соответствует (51-55 г/м²);

"Премиум+" соответствует (56-60 г/м²).

Возможные размеры костюмов: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60.

Костюмы относятся к универсальным (мужские/женские) и соответствуют второй группе полноты по ГОСТ 31399 и ГОСТ 31396.

Костюмы имеют следующую вариативность:

1) с рукавами на манжете;

2) с рукавами на резинке без петли;

3) с рукавами на резинке с петлей.

9.2 Параметры и характеристики

Размеры костюмов соответствуют указанным на рисунке А.1 Приложения А.

Допустимое отклонение ± 2 см.

Костюмы в зависимости от размера соответствуют второй группе полноты по ГОСТ 31399 и ГОСТ 31396 и физиологическим данным человека (мужчина/женщина), указанным в таблице Б.1 Приложения Б.

Масса костюмов соответствует таблицам Б.2-Б.4 Приложения Б.

Классификация стежков, строчек и швов костюмов согласно ГОСТ 12807 соответствует таблице №1.

Таблица №1 - Классификация стежков, строчек и швов костюмов.

	Основной шов костюма, шов крепления манжеты к рукаву	Шов крепления молнии к костюму	Шов крепления резинки к рукаву
Класс стежков	504	300	506
Группы строчек	2	1	2
Класс швов	1.01.02	1.01.01	1.01.04

Внешний вид костюмов не имеет порывов, замятий, края должны быть ровными, части изделия должны плотно соединяться друг с другом.

Прочность ниточного шва не ниже прочности материала.

Костюмы отвечают требованиям согласно таблице №2.

Таблица №2 – Требования к исполнению костюмов

Характеристика	Единица измерения	Показатели		
		СС	СМС	В
Относительное удлинение при разрыве: - в продольном направлении	%	30-60	40-80	40-80
Относительное удлинение при разрыве: - в поперечном направлении	%	30-60	40-80	40-80
Предел прочности при растяжении в продольном направлении	Н/5 см			
«Эконом»		≥35	≥35	≥40
«Эконом+»		≥45	≥40	≥50
«Стандарт»		≥55	≥45	≥60
«Стандарт+»		≥65	≥50	≥70
«Комфорт»		≥75	≥55	≥80
«Комфорт+»		≥80	≥60	≥85
«Премиум»		≥85	≥65	≥90
«Премиум+»		≥90	≥70	≥100
Предел прочности при растяжении в поперечном направлении	Н/5 см			
«Эконом»		≥15	≥15	≥15
«Эконом+»		≥20	≥20	≥20
«Стандарт»		≥25	≥25	≥25
«Стандарт+»		≥30	≥30	≥30
«Комфорт»		≥35	≥35	≥35
«Комфорт+»		≥40	≥35	≥40
«Премиум»		≥45	≥40	≥45
«Премиум+»		≥50	≥40	≥50

Костюмы обладают воздухопроницаемостью в зависимости от поверхностной плотности согласно таблице №3.

Таблица №3 – Воздухопроницаемость костюмов в зависимости от поверхностной плотности нетканого полотна.

Поверхностная плотность	Воздухопроницаемость в мм/с, не менее	
	СС	СМС
«Эконом»	2200	1100
«Эконом+»	2000	1000
«Стандарт»	1700	900
«Стандарт+»	1500	800
«Комфорт»	1100	700
«Комфорт+»	1000	600
«Премиум»	850	500
«Премиум+»	830	400

Воздухопроницаемость костюмов из ламинированного нетканого материала типа В не нормируется.

10 Материалы медицинского изделия

Материалы, применяемые для изготовления костюмов, должны соответствовать требованиям действующих стандартов и технических условий, указанным в комплекте

документации:

1) основа костюма из нетканого полипропиленового полотна типа СМС (100 % полипропилен), производитель ООО "Завод Эластик" по ТУ 8390-010-74582615-2009 (с изм. №1, 2, 3);

2) основа костюма из нетканого полипропиленового полотна типа СС (100% полипропилен), производитель ООО "Завод Эластик" по ТУ 8390-010-74582615-2009 (с изм. №1, 2, 3);

3) основа костюма из ламинированного нетканого материала типа В (нетканое полипропиленовое полотно, ламинированное 60% полипропиленом и 40% полиэтиленом), производитель ООО "Завод Эластик" по ТУ 13.95.10-019-74582615-2017;

4) манжеты для рукавов из трубки трикотажной хлопчатобумажной (80% хлопок, 20% полиэстер), производитель ООО "Алтек" по ТУ 8490-005-68077379-2013;

5) резинка (рукава, лодыжка, пояс, капюшон) из тесьмы эластичной (80% полиэфир, 20% латекс) марки Fly-e4001, производитель Jiangyin Fly Nonwoven Products Co., Ltd. (Китай);

6) нитки из п/э (100% полиэстер) марки Wings 40/2, производитель "KIWI"(Украина);

7) краситель голубого цвета (0,5%) марки PP5FA6051F, производитель ООО «Габриэль-Хеми-Рус-2» по ТУ 2243-001-88481935-2008;

8) молния пластмассовая марки MaxZipper F101, производитель Yiwu City Hualing Zipper Co., Ltd (Китай).

11 Указания по применению

Перед работой с костюмами ознакомьтесь с инструкцией по применению.

Вскройте упаковку.

Извлеките изделия из упаковки.

Используйте изделия по назначению в качестве одежды второго слоя.

После использования утилизируйте изделия согласно настоящей инструкции.

12 Техническое обслуживание, текущий ремонт

Техническое обслуживание не предусмотрено. Не ремонтпригодно. Изделие одноразовое.

13 Комплектность

В комплект поставки костюмов входят изделия, упаковки (потребительские и транспортные) и эксплуатационный документ, в соответствии с таблицей №4.

Таблица №4 - Комплект поставки костюмов.

	Наименование	Количество, шт.
1	Костюм	30
	Инструкция по применению	1
	Упаковка потребительская (пакет из пленки полиэтиленовой по ГОСТ 12302-2013)	30
	Упаковка транспортная (короб картонный по ГОСТ 13511) Транспортные пакеты по ГОСТ 26663 на поддонах по ГОСТ 9078 с обвязкой	1

Количество костюмов (шт.) в транспортной упаковке зависит от поверхностной плотности и размера.

14 Упаковка

Упаковка костюма соответствует требованиям ГОСТ Р 50444 и обеспечивает их сохранность при транспортировании и хранении.

Костюмы, упакованные в пакет, запаиваются термошвом.

Костюм (1 шт.) упакован в форме книжки в потребительскую упаковку.

Упаковка медицинского изделия обеспечивает безопасность и сохранение функциональных и эксплуатационных характеристик медицинского изделия в течение его срока годности и соответствовать требованиям безопасности, установленным техническим регламентом о безопасности упаковки.

Материалы и конструкция упаковки не оказывают вредного воздействия на содержимое и должны гарантировать следующее:

- а) минимальный риск загрязнения содержимого в процессе вскрытия и извлечения из упаковки;
- б) надежную защиту содержимого в процессе нормального применения, транспортирования и хранения;
- в) невозможность повторного запечатывания вскрытой упаковки, факт вскрытия упаковки должен быть очевиден.

Транспортная упаковка должна быть достаточно прочной и надежной, чтобы сохранить содержимое упаковки при транспортировании и хранении.

15 Маркировка

Маркировка соответствует требованиям ГОСТ Р 50444.

На каждую потребительскую тару приклеивается ярлык, обеспечивающий сохранность медицинского изделия, и нанесены:

- товарный знак предприятия-изготовителя (при наличии);
- наименование предприятия-изготовителя и его юридический адрес;
- полное название медицинского изделия или обозначение типа (модель, цвет, вариант плотности);
- размер;
- обозначение технических условий на изделие;
- срок годности медицинского изделия;
- дата изготовления медицинского изделия (год, месяц, день);
- требования к условиям хранения медицинского изделия (при необходимости особые условия обращения с медицинским изделием);
- указание, что данное медицинское изделие предназначено для однократного применения;
- номер серии (партии) медицинского изделия или его серийный номер;
- любые предупреждения и меры предосторожности, которые необходимо исполнять в отношении медицинского изделия.

Дополнительные сведения (номера рабочих телефонов, e-mail, № и дата регистрационного удостоверения (по факту государственной регистрации))

На каждом ящике из картона указаны:

- наименование предприятия-изготовителя;
- полное или условное обозначение медицинского изделия;
- дата изготовления медицинского изделия (год, месяц, день);
- срок годности медицинского изделия (год, месяц включительно);
- количество изделий;
- номер серии (партии) медицинского изделия или его серийный номер;
- указание, что данное медицинское изделие предназначено для однократного применения.

16 Требования к стерильности, дезинфекции и очистке

Медицинское изделие не является стерильным и не подвергается стерилизации, дезинфекции и очистки. Это одежда одноразового использования.

17 Условия эксплуатации

Вид климатического исполнения костюмов – УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 50444.

18 Транспортирование и хранение

Транспортирование.

Костюмы в упакованном виде транспортируются транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки груза, действующими на транспорте каждого вида, при условии обеспечения его сохранности от загрязнений, механических повреждений и атмосферных осадков.

Костюмы транспортируются морским путём в соответствии с «Правилами безопасности перевозки грузов». Вид отправки – контейнеры по ГОСТ 20435 с коэффициентом использования 0,9. Условия транспортирования систем внутри страны и в районы с умеренным климатом должны соответствовать группе 5 ГОСТ 15150.

Хранение.

Условия хранения костюмов в упаковке предприятия-изготовителя – группа 2 по ГОСТ 15150.

Костюмы хранят в закрытых сухих помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре окружающей среды, не превышающей 40° С.

При хранении коробки, костюмы должны быть уложены по высоте, обеспечивающей их целостность.

19 Требования охраны окружающей среды

Отходы производства костюмов не оказывают вредного воздействия на окружающую среду и здоровья человека и не требуют особых условий при утилизации и захоронении.

Отходы производства костюмов не обладают способностью образовывать токсичные соединения в воздушной среде и сточных водах в присутствии других веществ и факторов при температуре окружающей среды, не требуют обезвреживания, подлежат дальнейшей переработке или утилизации.

Основным видом возможного опасного воздействия на окружающую среду является загрязнение атмосферного воздуха населенных мест, почв и вод в результате неорганизованного захоронения отходов материалов при производстве и хранении, а также произвольной свалки их в не предназначенных для этой целей местах.

Отходы костюмов, образующиеся в процессе медицинской деятельности учреждений здравоохранения, оказывают вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду, так как в их состав входят химические, токсические и иные вещества и микроорганизмы.

Использованные по назначению костюмы относятся к отходам класса Б (эпидемиологически опасные отходы), не использованные по назначению костюмы (с истекшим сроком годности, со следами повреждений) относятся к отходам класса А (эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к ТБО); оба класса подлежат утилизации.

Утилизация и уничтожение использованных и не использованных костюмов осуществляются согласно требованиям СанПиН 2.1.7.2790-10.

20 Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения – 24 месяца.

21 Порядок осуществления утилизации и уничтожения медицинского изделия


Утилизация и уничтожение использованных и не использованных (с истекшим сроком годности, со следами повреждений) изделий осуществляются согласно требованиям СанПиН 2.1.7.2790-10. Использованные по назначению костюмы относятся к отходам класса Б (эпидемиологически опасные отходы), не использованные по назначению костюмы относятся к отходам класса А (эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к ТБО).

22 Перечень нормативных документов

Обозначение	Наименование документа
1	2
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ Р 50444-92	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия
ГОСТ 13511-2006	Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов, спичек, табачных изделий и моющих средств. Технические условия
ГОСТ 20435-75	Контейнер универсальный металлический закрытый номинальной массой брутто 3,0 т. Технические условия
ГОСТ 12.1.004-91	Пожарная безопасность. Общие требования.
ГОСТ 12.1.010-76	Взрывобезопасность. Общие требования.
ГОСТ 12.1.044-89	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения
ГОСТ 31399-2009	Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды.
ГОСТ 31396-2009	Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды.
ГОСТ 12807-2003	Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов.
ГОСТ 16337-77	Полиэтилен высокого давления. Технические условия (с Изменениями №1, 2, 3)
ГОСТ 12302-2013	Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия
ГОСТ 26663-85	Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования (с Изменением №1)
Приказ Минздрава №4н от 06.06.2012	Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий
СанПиН 2.1.7.2790-10	Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рисунок А.1 – Чертеж костюма хирургического одноразового использования нестерильного

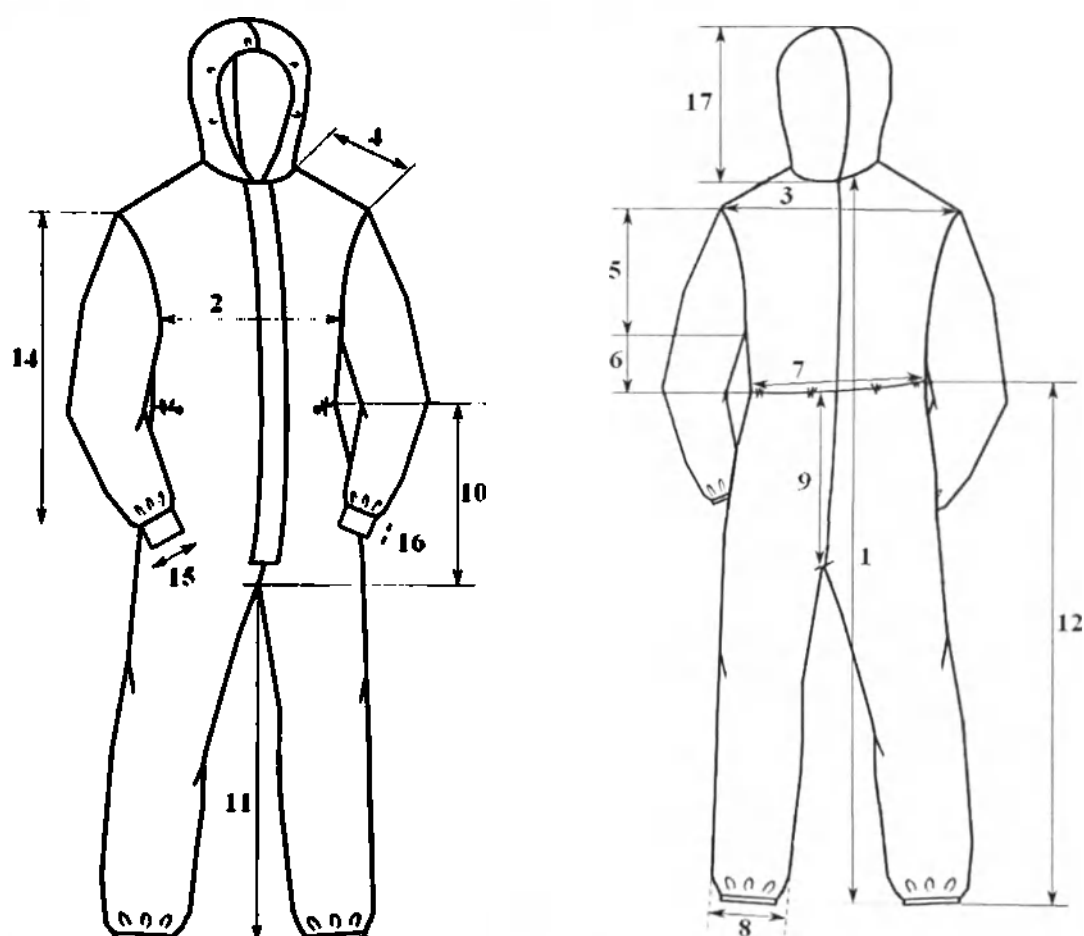

Обозначение	Наименование	Значения по размерам, см							
		46	48	50	52	54	56	58	60
	Размер	46	48	50	52	54	56	58	60
1	Длина изделия, см	160	160	170	170	170	170	175	175
2	Ширина изделия на груди	46	48	50	52	54	56	58	60
3	Ширина изделия по плечам	52	54	56	59	62	65	68	70
4	Длина плечевого ската	13	14	15	16	17	18	19	20
5	Высота проймы	22	23	24	25	26	27	28	29
6	Длина спинки от проймы до низа	25	25	25	26	27	27	27	27
7	Ширина брюк по талии	56	60	64	68	72	76	80	84
8	Ширина брюк внизу	28	28	28	28	28	28	28	28
9	Высота сиденья брюк сзади	39	39	40	41	41	41	42	42
10	Высота сиденья брюк спереди	36	36	37	38	39	39	40	40
11	Длина брюк по шаговому шву	80	80	82	82	84	84	86	86
12	Длина брюк от талии	112	112	116	116	116	116	117	117
14	Длина рукава	63	63	66	66	69	69	72	72
15	Ширина рукава внизу	17	17	19	19	21	21	23	23
16	Ширина манжеты	7	7	7	7	7	7	7	7
17	Высота капюшона	30	30	32	32	34	34	36	36

Допустимое отклонение ± 2 см.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Физиологические данные человека (мужчина/женщина) указаны в таблице Б.1

Таблица №Б.1- Соответствие размеров костюмов (см) группам полноты 2 по ГОСТ 31399 и ГОСТ 31396.

Размер	46	48	50	52	54	56	58	60
Обхват груди	92	96	100	104	108	112	116	120
Обхват талии	76	80	84	88	92	96	100	104
Обхват бедер	98	102	106	110	114	118	122	126
Рост	164-182	164-182	164-182	164-182	164-182	164-182	164-182	164-182

Допустимое отклонение ± 1 см.

Масса костюмов указана в таблицах Б.2-Б.4 в зависимости от размера и поверхностной плотности нетканого материала типа СМС, СС и В.

Таблица №Б.2 - Костюм хирургический одноразового использования нестерильный, с резинкой на талии и лодыжках, капюшоном на резинке, одной грудной молнией, с рукавами на резинке с петлей, из нетканого материала типа СМС, СС и В.

Плотность нетканого материала	Диапазон массы, г
«Эконом»	50-130
«Эконом+»	65-150
«Стандарт»	70-175
«Стандарт+»	85-200
«Комфорт»	100-225
«Комфорт+»	115-250
«Премиум»	130-275
«Премиум+»	145-300

Таблица №Б.3 - Костюм хирургический одноразового использования нестерильный, с резинкой на талии и лодыжках, капюшоном на резинке, одной грудной молнией, с рукавами на резинке без петли, из нетканого материала типа СМС, СС и В.

Плотность нетканого материала	Диапазон массы, г
«Эконом»	50-130
«Эконом+»	65-150
«Стандарт»	70-175
«Стандарт+»	85-200
«Комфорт»	100-225
«Комфорт+»	115-250
«Премиум»	130-275
«Премиум+»	145-300

Таблица № Б.4 - Костюм хирургический одноразового использования нестерильный, с резинкой на талии и лодыжках, капюшоном на резинке, одной грудной молнией, с рукавами на манжете, из нетканого материала типа СМС, СС и В.

Плотность нетканого материала	Диапазон массы, г
«Эконом»	55-140
«Эконом+»	70-160
«Стандарт»	85-185
«Стандарт+»	90-210
«Комфорт»	105-235
«Комфорт+»	120-260
«Премиум»	135-285
«Премиум+»	150-310

Количество костюмов в шт. в транспортной упаковке зависит от поверхностной плотности и размера согласно таблице № Б.5

Таблица №Б.5 - Количество костюмов в транспортной упаковке

Размер	Ед. изм.	Плотность, г/м ²							
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60
46	шт.	50	50	40	40	30	30	35	35
48	шт.	50	50	40	40	30	30	35	35
50	шт.	50	50	40	40	30	30	35	35
52	шт.	50	50	40	40	30	30	35	35
54	шт.	50	50	40	40	30	30	35	35
56	шт.	50	50	40	40	30	30	35	35
58	шт.	50	50	40	40	30	30	35	35
60	шт.	50	50	40	40	30	30	35	35

Все варианты костюмов согласно конструкторской документации приведены в таблице № Б.6.

Таблица № Б.6 - Варианты костюмов

Модель	Расшифровка	Размеры	Цвета	Плотность
Х-1.	Костюм хирургический одноразового использования нестерильный модель К-1, с резинкой на талии и лодыжках, капюшоном на резинке, одной грудной молнией, с рукавами на резинке с петлей, из нетканого материала типа СМС	46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60	белый, голубой	"Эконом", "Эконом+", "Стандарт", "Стандарт+", "Комфорт", "Комфорт+", "Премиум", "Премиум+"
Х-2.	Костюм хирургический одноразового использования нестерильный модель К-2, с резинкой на талии и лодыжках, капюшоном на резинке, одной грудной молнией, с рукавами на резинке без петли, из нетканого материала типа СМС	46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60	белый, голубой	"Эконом", "Эконом+", "Стандарт", "Стандарт+", "Комфорт", "Комфорт+", "Премиум", "Премиум+"
Х-3.	Костюм хирургический одноразового использования	46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60	белый, голубой	"Эконом", "Эконом+",

	нестерильный модель К-3, с резинкой на талии и лодыжках, капюшоном на резинке, одной грудной молнией, с рукавами на манжете, из нетканого материала типа СМС			"Стандарт", "Стандарт+", "Комфорт", "Комфорт+", "Премиум", "Премиум+"
Х-4.	Костюм хирургический одноразового использования нестерильный модель К-4, с резинкой на талии и лодыжках, капюшоном на резинке, одной грудной молнией, с рукавами на резинке с петлей, из нетканого материала типа СС	46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60	белый, голубой	"Эконом", "Эконом+", "Стандарт", "Стандарт+", "Комфорт", "Комфорт+", "Премиум", "Премиум+"
Х-5.	Костюм хирургический одноразового использования нестерильный модель К-5, с резинкой на талии и лодыжках, капюшоном на резинке, одной грудной молнией, с рукавами на резинке без петли, из нетканого материала типа СС	46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60	белый, голубой	"Эконом", "Эконом+", "Стандарт", "Стандарт+", "Комфорт", "Комфорт+", "Премиум", "Премиум+"
Х-6.	Костюм хирургический одноразового использования нестерильный модель К-6, с резинкой на талии и лодыжках, капюшоном на резинке, одной грудной молнией, с рукавами на манжете, из нетканого материала типа СС	46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60	белый, голубой	"Эконом", "Эконом+", "Стандарт", "Стандарт+", "Комфорт", "Комфорт+", "Премиум", "Премиум+"
Х-7.	Костюм хирургический одноразового использования нестерильный модель К-7, с резинкой на талии и лодыжках, капюшоном на резинке, одной грудной молнией, с рукавами на резинке с петлей, из нетканого материала типа В	46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60	белый, голубой	"Эконом", "Эконом+", "Стандарт", "Стандарт+", "Комфорт", "Комфорт+", "Премиум", "Премиум+"
Х-8.	Костюм хирургический одноразового использования нестерильный модель К-8, с резинкой на талии и лодыжках, капюшоном на резинке, одной грудной молнией, с рукавами на резинке без петли, из нетканого материала типа В	46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60	белый, голубой	"Эконом", "Эконом+", "Стандарт", "Стандарт+", "Комфорт", "Комфорт+", "Премиум", "Премиум+"
Х-9.	Костюм хирургический одноразового использования нестерильный модель К-9, с резинкой на талии и лодыжках, капюшоном на резинке, одной грудной молнией, с рукавами на манжете, из нетканого материала типа В	46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60	белый, голубой	"Эконом", "Эконом+", "Стандарт", "Стандарт+", "Комфорт", "Комфорт+", "Премиум", "Премиум+"

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью: 13 (тринадцать) листа (ов)
Генеральный директор А.В. Куркин
ООО «Завод Эластик» А.В.Куркин

