

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «РЕПАРТ»
_____ Дашкин К.К.
«30» августа 2021 г.



Инструкция по применению

**Подгузники медицинские для взрослых
по ТУ 32.50.50-001-16059018-2020,
варианты исполнения**

Настоящая инструкция по применению наносится на потребительскую упаковку изделия и составлена в сокращенном виде в соответствии с требованиями приказа Министерства Здравоохранения РФ 11н от 19 января 2017 г. по отношению к изделиям I класса риска.

Дата составления документа: 30.08.2021

Версия документа: 2.0

Наименование

Подгузники медицинские для взрослых по ТУ 32.50.50-001-16059018-2020, варианты исполнения

Вариант исполнения

Информация наносится в соответствии с приложением А к настоящему документу

Размер

Информация наносится с указанием обхвата талии в соответствии с приложением А к настоящему документу

Влагопоглощение

Информация наносится в соответствии с приложением А к настоящему документу

Назначение

Изделие предназначено для впитывания и удержания мочи, используемое для ухода за больными, страдающими недержанием.

Показания к применению

Информация наносится в соответствии с приложением А к настоящему документу

Потенциальные потребители

Информация наносится в соответствии с приложением А к настоящему документу

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие, заболевания кожи наружных половых органов.

Побочные эффекты

Аллергическая реакция на составляющие материалы

Материалы изготовления

Распушенная целлюлоза, суперабсорбент, полиэтилен, нетканый материал, клеевой расплав

Количество

10 штук в упаковке

Производитель, юридический адрес:

ООО «РЕПАРТ» 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, корп. 4А, 3 этаж, помещение VII, комната № 9

Адрес места производства

171640, Российская Федерация, Тверская область, Кашинский р-н, г.Кашин, территория Льнозавода, д.2а


Условия эксплуатации

Изделие для одноразового использования. Хранить в сухом недоступном для детей месте. При температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности не более 80%. Не использовать после окончания срока годности.

Указания по утилизации

Не бросать в канализацию, утилизировать в урну. В Медицинских учреждениях утилизировать как отходы класса Б по СанПиН 2.1.3684-21.

Способ применения

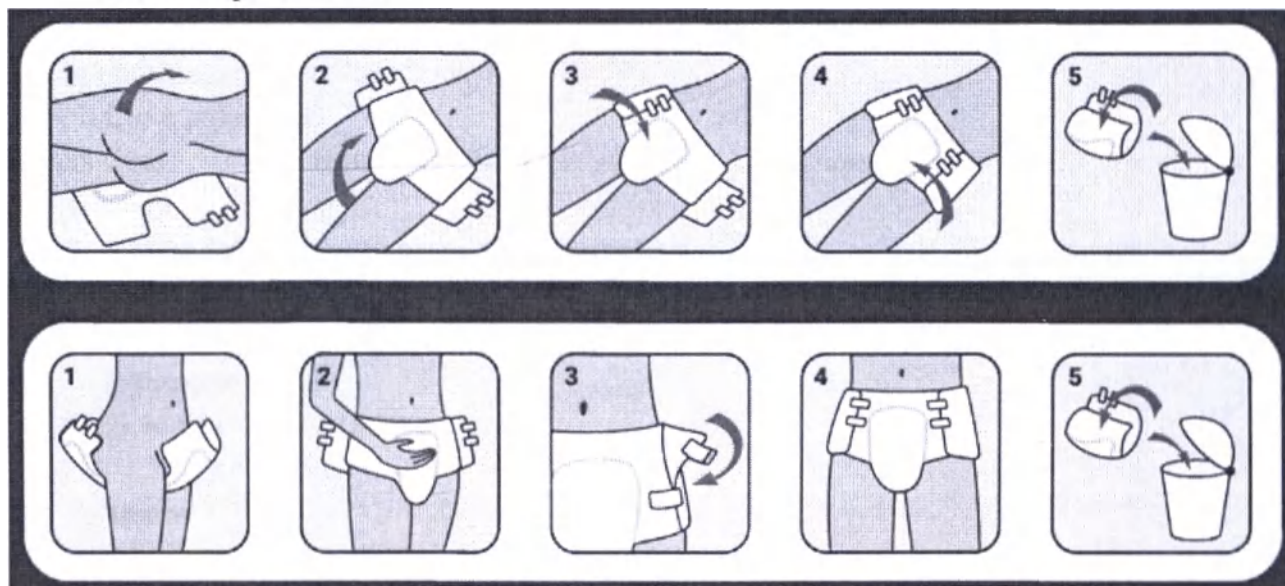

Лежащий больной: Извлеките изделие из упаковки и полностью разверните его, расправьте все сложенные части. Помогите больному принять боковое положение, немного растяните подгузник с задней стороны, затем протяните между ног больного. Убедитесь в том, что подгузник хорошо прилегает к паховой области. Выровняйте переднюю и заднюю части подгузника. Последовательно закрепите фиксаторы-липучки. Закрепите верхние липучки под углом вниз, нижние липучки под углом вверх. Убедитесь в том, что подгузник зафиксирован в удобном для больного положении.

Не лежащий больной: Извлеките изделие из упаковки и полностью разверните его, расправьте все сложенные части. Немного растяните подгузник, затем протяните между ног больного, находящегося в положении стоя. Выровняйте переднюю и заднюю части подгузника. Последовательно закрепите фиксаторы-липучки. Закрепите верхние липучки под углом вниз, нижние липучки под углом вверх. Убедитесь в том, что подгузник зафиксирован в удобном для больного положении. Липучки легко фиксируют изделие, просто слегка надавите на липучку и разгладьте её. Чтобы убедиться в надежной фиксации слегка потяните липучку.

Менять подгузники следует не позднее, чем через 8 часов непрерывного использования (при синдроме полиурии – не более 5 часов) или при полном заполнении (при изменении цвета линии индикатора наполнения с желтого на голубой). Рекомендуется менять изделие сразу после дефекации.

Артикул изделия

Информация наносится в соответствии с приложением А к настоящему документу

Номер партии

Номер партии наносится в формате: А дд мм гг; где А – номер артикула, дд – дата производства, мм – месяц производства, гг – год производства

Дата изготовления:

См в номере партии, где А дд мм гг; где А – номер артикула, дд – дата производства, мм – месяц производства, гг – год производства

Срок годности:

3 года с даты изготовления, указанной на упаковке. См. в номере партии: EXP мм гг, где мм- месяц, гг- год.

Номер Регистрационного удостоверения

Наносится в формате:

РУ № РЗН2021/XXXX от XXXXXX

Обозначение ТУ

ТУ 32.50.50-001-16059018-2020

Знаки

Знак	Значение
	Не использовать повторно
	Беречь от влаги
	Утилизировать в урну
	Не бросать в канализацию

Штриховой код

Приложение А

(Информация, наносимая на потребительскую упаковку в зависимости от варианта исполнения изделия)

Артикул	Вариант исполнения	Размер	Обхват талии, см	Влагопоглощение*	Показания к применению	Потенциальные потребители
1	Подгузники медицинские для взрослых при средней степени недержания, сверхмалые (XS), артикул 1	сверхмалые (XS)	55-60		Недержание мочи средней степени	Взрослые больные, страдающие недержанием мочи средней степени
2	Подгузники медицинские для взрослых при тяжелой степени недержания, сверхмалые (XS), артикул 2	сверхмалые (XS)			Недержание мочи тяжелой степени	Взрослые больные, страдающие недержанием мочи тяжелой степени
3	Подгузники медицинские для взрослых при средней степени недержания, малые (S), артикул 3	малые (S)	60-90		Недержание мочи средней степени	Взрослые больные, страдающие недержанием мочи средней степени
4	Подгузники медицинские для взрослых при тяжелой степени недержания, малые (S), артикул 4	малые (S)			Недержание мочи тяжелой степени	Взрослые больные, страдающие недержанием мочи тяжелой степени
5	Подгузники медицинские для взрослых при средней степени недержания, средние (M), артикул 5	средние (M)	90-120		Недержание мочи средней степени	Взрослые больные, страдающие недержанием мочи средней степени

6	Подгузники медицинские для взрослых при тяжёлой степени недержания, средние (М), артикул 6	средние (М)			Недержание мочи тяжелой степени	Взрослые больные, страдающие недержанием мочи тяжелой степени
7	Подгузники медицинские для взрослых при средней степени недержания, большие (L), артикул 7	большие (L)	120-150		Недержание мочи средней степени	Взрослые больные, страдающие недержанием мочи средней степени
8	Подгузники медицинские для взрослых при тяжелой степени недержания, большие (L), артикул 8	большие (L)			Недержание мочи тяжелой степени	Взрослые больные, страдающие недержанием мочи тяжелой степени
9	Подгузники медицинские для взрослых при средней степени недержания, сверхбольшие (XL), артикул 9	сверхбольшие (XL)	150-175		Недержание мочи средней степени	Взрослые больные, страдающие недержанием мочи средней степени
10	Подгузники медицинские для взрослых при тяжелой степени недержания, сверхбольшие (XL), артикул 10	сверхбольшие (XL)			Недержание мочи тяжелой степени	Взрослые больные, страдающие недержанием мочи тяжелой степени

* Влагопоглощение наносится на потребительскую упаковку в виде графического изображения.

прошнуровано и пронум

6 лист *ab*

Ген. директор

ООО «РЕПАРТ»

Дашкин К.К



[Handwritten signature]