

«УТВЕРЖДАЮ»

T L M s.r.l.
Via per Uboldo, 48 - 21040 GERENZANO (VA)
Codice Fiscale e Partita IVA 00801890120
Tel. 0296480094 Fax 0296480165

Директор

ТЛМ с.р.л.

Клаудио Тести

21.04.2014

ИНСТРУКЦИЯ

по применению «Изделия протезно-ортопедические:

бандажи и принадлежности к бандажам»

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Изделия протезно-ортопедические: бандажи и принадлежности к бандажам производства TLM с.р.л., Италия применяются в лечебно-профилактических учреждениях и в быту и предназначены для ношения на теле человека.

1.1. Бандажи лечебные

Бандаж «UGO» выпускается в следующих исполнениях: 290/A, 290/B, 290/C.

Порядок применения: бандаж «UGO» для стомированных больных применяется в период реабилитации после хирургической операции колостомы, илеостомы, уростомы.

Принцип действия по назначению и медицинский эффект: бандаж поддерживает брюшную стенку и улучшает тонус мышц, обеспечивает правильное соединение краев послеоперационного шва, способствует его быстрому заживлению и подавлению болевого синдрома, препятствует возникновению послеоперационных грыж, создает оптимальные условия для отведения кишечного содержимого или мочи, позволяет осуществить раннюю мобилизацию пациента.

Бандаж «415» выпускается в следующих исполнениях: 415/26, 415/30.

Порядок применения: применяется в период реабилитации после хирургической операции на брюшной полости, кесарева сечения, после родов, при грыже белой линии живота.

Принцип действия по назначению и медицинский эффект: бандаж поддерживает брюшную стенку и улучшает тонус мышц, обеспечивает правильное соединение краев послеоперационного шва, способствует его быстрому заживлению и подавлению болевого синдрома, препятствует возникновению послеоперационных грыж, позволяет осуществить раннюю мобилизацию пациента. При грыже белой линии живота

оказывает локальное давление на область грыжевых образований, предотвращая увеличение грыжи, поддерживает брюшную стенку. После родов бандаж нормализует тонус мышц живота и способствует их физиологическому сокращению, поддерживает брюшную стенку.

Бандаж «ALBERTA» выпускается в следующих исполнениях: ALBERTA/14, ALBERTA/18.

Порядок применения: бандаж применяется в период реабилитации после торакальной хирургической операции и операции на брюшной полости, при пупочной грыже, травмах грудной клетки, миалгии, миозите, межреберной невралгии.

Принцип действия по назначению и медицинский эффект: бандаж поддерживает брюшную стенку или грудную клетку, улучшает тонус мышц, обеспечивает правильное соединение краев послеоперационного шва, способствует его быстрому заживлению и подавлению болевого синдрома, препятствует возникновению послеоперационных грыж, позволяет осуществить раннюю мобилизацию пациента. При пупочной грыже можно использовать совместно с пупочной подушечкой «PRESSOR». Бандаж оказывает локальное давление на область грыжевых образований, предотвращая увеличение грыжи, поддерживает брюшную стенку. При травмах грудной клетки, миалгии, миозите, межреберной невралгии обеспечивает поддержку и оказывает равномерное давление на грудную клетку, снимает болевой синдром.

Бандаж «BERTA» выпускается в следующих исполнениях: BERTA/16, BERTA/24.

Порядок применения: бандаж применяется в период реабилитации после торакальной хирургической операции и операции на брюшной полости, при пупочной грыже, травмах грудной клетки, миалгии, миозите, межреберной невралгии.

Принцип действия по назначению и медицинский эффект: бандаж поддерживает брюшную стенку или грудную клетку, улучшает тонус мышц, обеспечивает правильное соединение краев послеоперационного шва, способствует его быстрому заживлению и подавлению болевого синдрома, препятствует возникновению послеоперационных грыж, позволяет осуществить раннюю мобилизацию пациента. При пупочной грыже можно использовать совместно с пупочной подушкой «PRESSOR». Бандаж оказывает локальное давление на область грыжевых образований, предотвращая увеличение грыжи, поддерживает брюшную стенку. При травмах грудной клетки, миалгии, миозите, межреберной невралгии обеспечивает поддержку и оказывает равномерное давление на грудную клетку, снимает болевой синдром.

Бандаж «BIAGIA» выпускается в одном исполнении.

Порядок применения: предназначен для поддержки мышц и суставов, при разрыве мышц, растяжении связок, посттравматической и послеоперационной реабилитации, активных занятиях спортом.

Принцип действия по назначению и медицинский эффект: бандаж обеспечивает легкую фиксацию и компрессию связок, мышц и суставов, способствует устранению отека и ускорению выздоровления, снимает болевой синдром.

Бандаж «BIANCA» выпускается в следующих исполнениях:
BIANCA/13, BIANCA/24, BIANCA/30.

Порядок применения: бандаж применяется в период реабилитации после торакальной хирургической операции и операции на брюшной полости, при пупочной грыже, травмах грудной клетки, миалгии, миозите, межреберной невралгии.

Принцип действия по назначению и медицинский эффект: бандаж поддерживает брюшную стенку или грудную клетку, улучшает тонус мышц, обеспечивает правильное соединение краев послеоперационного

шва, способствует его быстрому заживлению и подавлению болевого синдрома, препятствует возникновению послеоперационных грыж, позволяет осуществить раннюю мобилизацию пациента. При пупочной грыже оказывает локальное давление на область грыжевых образований, предотвращая увеличение грыжи, поддерживает брюшную стенку. При травмах грудной клетки, миалгии, миозите, межреберной невралгии обеспечивает поддержку и оказывает равномерное давление на грудную клетку, снимает болевой синдром.

Бандаж «CARDIO» выпускается в одном исполнении.

Порядок применения: в период реабилитации после торакальной хирургической операции, операции на сердце, травмах грудной клетки.

Принцип действия по назначению и медицинский эффект: бандаж поддерживает грудную клетку, улучшает тонус мышц, обеспечивает правильное соединение краев послеоперационного шва, способствует его быстрому заживлению и подавлению болевого синдрома, препятствует возникновению послеоперационных грыж, позволяет осуществить раннюю мобилизацию пациента. При травмах грудной клетки обеспечивает поддержку и оказывает равномерное давление на грудную клетку, снимает болевой синдром.

Бандаж «CLELIA» выпускается в одном исполнении.

Порядок применения: бандаж применяется в период реабилитации после операции на брюшной полости при пупочной грыже, при пупочной грыже.

Принцип действия по назначению и медицинский эффект: бандаж поддерживает брюшную стенку, улучшает тонус мышц, обеспечивает правильное соединение краев послеоперационного шва, способствует его быстрому заживлению и подавлению болевого синдрома, препятствует возникновению послеоперационных грыж, позволяет осуществить раннюю мобилизацию пациента. При пупочной грыже можно

использовать совместно с пупочной подушечкой «PRESSOR». Бандаж оказывает локальное давление на область грыжевых образований, предотвращая увеличение грыжи, поддерживает брюшную стенку.

Бандаж «DEBORA» выпускается в одном исполнении.

Порядок применения: бандаж применяется при опущениях и выпадениях внутренних органов, при артрозе, остеопорозе.

Принцип действия по назначению и медицинский эффект: при опущениях и выпадениях внутренних органов бандаж обеспечивает необходимое внутрибрюшное давление, ограничивает подвижность внутренних органов, поддерживает брюшную стенку. При артрозе и остеопорозе удерживает позвоночник в физиологически правильном положении, нормализует мышечный тонус.

Бандаж «ILARIA» выпускается в одном исполнении.

Порядок применения: применяется в период реабилитации после хирургической операции на брюшной полости, кесарева сечения, после родов, при грыже белой линии живота.

Принцип действия по назначению и медицинский эффект: бандаж поддерживает брюшную стенку и улучшает тонус мышц, обеспечивает правильное соединение краев послеоперационного шва, способствует его быстрому заживлению и подавлению болевого синдрома, препятствует возникновению послеоперационных грыж, позволяет осуществить раннюю мобилизацию пациента. При грыже белой линии живота оказывает локальное давление на область грыжевых образований, предотвращая увеличение грыжи, поддерживает брюшную стенку. После родов бандаж нормализует тонус мышц живота и способствует их физиологическому сокращению, поддерживает брюшную стенку.

Бандаж «IRIS» выпускается в одном исполнении.

Порядок применения: применяется в период реабилитации после хирургической операции на брюшной полости, кесарева сечения, после

родов.

Принцип действия по назначению и медицинский эффект: бандаж поддерживает брюшную стенку и улучшает тонус мышц, обеспечивает правильное соединение краев послеоперационного шва, способствует его быстрому заживлению и подавлению болевого синдрома, препятствует возникновению послеоперационных грыж, позволяет осуществить раннюю мобилизацию пациента. После родов бандаж нормализует тонус мышц живота и способствует их физиологическому сокращению, поддерживает брюшную стенку.

Бандаж «PAOLA» выпускается в следующих исполнениях:
PAOLA/25, PAOLA/30.

Порядок применения: применяется в период реабилитации после хирургической операции на брюшной полости, кесарева сечения, после родов, при грыже белой линии живота.

Принцип действия по назначению и медицинский эффект: бандаж поддерживает брюшную стенку и улучшает тонус мышц, обеспечивает правильное соединение краев послеоперационного шва, способствует его быстрому заживлению и подавлению болевого синдрома, препятствует возникновению послеоперационных грыж, позволяет осуществить раннюю мобилизацию пациента. При грыже белой линии живота оказывает локальное давление на область грыжевых образований, предотвращая увеличение грыжи, поддерживает брюшную стенку. После родов бандаж нормализует тонус мышц живота и способствует их физиологическому сокращению, поддерживает брюшную стенку.

Бандаж «SPORT & WORK» выпускается в одном исполнении.

Порядок применения: применяется для профилактики заболеваний поясничного отдела позвоночника, при работе на открытом воздухе, связанной с физической нагрузкой, для водителей и спортсменов, активного образа жизни.

Принцип действия по назначению и медицинский эффект: бандаж

обеспечивает легкую поддержку поясничного отдела позвоночника и брюшной стенки. Оказывает микромассажный эффект.

Бандаж «ТЕХ» выпускается в одном исполнении.

Порядок применения: применяется в период реабилитации после хирургической операции на брюшной полости, кесарева сечения, после родов.

Принцип действия по назначению и медицинский эффект: бандаж поддерживает брюшную стенку и улучшает тонус мышц, обеспечивает правильное соединение краев послеоперационного шва, способствует его быстрому заживлению и подавлению болевого синдрома, препятствует возникновению послеоперационных грыж, позволяет осуществить раннюю мобилизацию пациента. После родов бандаж нормализует тонус мышц живота и способствует их физиологическому сокращению, поддерживает брюшную стенку.

1.2. Бандажи грыжевые

Бандаж «DENVER» выпускается в следующих исполнениях:
DENVER, DENVER DESTRO, DENVER SINISTRO.

Порядок применения: применяется при паховых грыжах, для реабилитации и профилактики рецидивов паховых грыж в послеоперационный период.

Принцип действия по назначению и медицинский эффект: оказывает локальное давление на область грыжевых образований в паху, предотвращая увеличение и ущемление грыжи. Поддерживает паховую область, обеспечивает правильное соединение краев послеоперационного шва, способствует его быстрому заживлению и подавлению болевого синдрома, препятствует возникновению послеоперационных грыж, позволяет осуществить раннюю мобилизацию пациента.

Бандаж «JOLLY» выпускается в одном исполнении.

Порядок применения: применяется при паховых грыжах, для реабилитации и профилактики рецидивов паховых грыж в послеоперационный период.

Принцип действия по назначению и медицинский эффект: оказывает локальное давление на область грыжевых образований в паху, предотвращая увеличение и ущемление грыжи. Поддерживает паховую область, обеспечивает правильное соединение краев послеоперационного дефекта, способствует его быстрому заживлению и подавлению болевого синдрома, препятствует возникновению послеоперационных грыж, позволяет осуществить раннюю мобилизацию пациента.

Бандаж «ROBERTO» выпускается в одном исполнении.

Порядок применения: применяется при большой и гигантской грыже верхней линии живота, при неоперабельных грыжах, для поддержки «фартука».

Принцип действия по назначению и медицинский эффект: бандаж поддерживает брюшную стенку и фартук, уменьшает ощущение тяжести в паховой области, предотвращает дальнейшее обвисание живота и увеличение грыжи.

Бандаж «ROBINSON» выпускается в одном исполнении.

Порядок применения: применяется при большой и гигантской грыже верхней линии живота, при неоперабельных грыжах, для поддержки «фартука».

Принцип действия по назначению и медицинский эффект: бандаж поддерживает брюшную стенку и фартук, уменьшает ощущение тяжести в паховой области, предотвращает дальнейшее обвисание живота и увеличение грыжи.

Бандаж «ROBY» выпускается в одном исполнении.

Порядок применения: применяется при большой и гигантской грыже верхней линии живота, при неоперабельных грыжах, для поддержки «фартука».

Принцип действия по назначению и медицинский эффект: бандаж поддерживает брюшную стенку и фартук, уменьшает ощущение тяжести в нижней области, предотвращает дальнейшее обвисание живота и выпячивание грыжи.

Бандаж «SALUS» выпускается в одном исполнении.

Порядок применения: применяется при большой и гигантской грыже нижней линии живота, при неоперабельных грыжах, для поддержки «фартука».

Принцип действия по назначению и медицинский эффект: бандаж поддерживает брюшную стенку и фартук, уменьшает ощущение тяжести в нижней области, предотвращает дальнейшее обвисание живота и выпячивание грыжи.

1.3. Принадлежности к бандажам

Накладка «COLO» («COLO BAG») выпускается в одном исполнении.

Порядок применения: используется совместно с бандажом «UGO» (290/A, 290/B, 290/C), закрывает и поддерживает кало- или уроприемник.

Принцип действия: накладке поддерживает кало- или уроприемник, обеспечивает его подвижность, что предотвращает отклеивание пластины от веса мешка.

Панель «PANNELLO» выпускается в следующих исполнениях:
PANNELLO 5,5, PANNELLO 7,5, PANNELLO 8,5, PANNELLO 9,5.

Порядок применения: является неотъемлемой частью бандажа «UGO» (290/A, 290/B, 290/C) и используется только совместно с бандажом.

Принцип действия: являясь неотъемлемой частью бандажа, поддерживает брюшную стенку и улучшает тонус мышц, обеспечивает правильное соединение краев послеоперационного шва, способствует его быстрому заживлению и подавлению болевого синдрома, препятствует выпячиванию послеоперационных грыж, создает оптимальные условия для оттока кишечного содержимого или мочи, позволяет осуществить

ую мобилизацию пациента.

Подушечка «POCKET» выпускается в следующих исполнениях:
POCKET DESTRA (правая), POCKET SINISTRA (левая).

Порядок применения: является частью бандажа «JOLLY» и используется совместно с ним. При правосторонней грыже подушечка-пелот вставляется в правый карман, при левосторонней – в левый карман, при двухсторонней – в два кармана.

Принцип действия: являясь частью бандажа «JOLLY», оказывает локальное давление на область грыжевых образований в паху, предотвращая увеличение и ущемление грыжи.

Подушечка «PRESSOR» выпускается в одном исполнении.

Порядок применения: применяется совместно с бандажами «ALBERTA», «BERTA», «CLELIA» при пупочной грыже.

Принцип действия: совместно с бандажами «ALBERTA», «BERTA», «CLELIA» оказывает локальное давление на область грыжевых образований, предотвращая увеличение и ущемление грыжи.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Размеры изделий должны соответствовать параметрам типовых образцов и установлены:

Размеры бандажей

Бандаж UGO, исполнение 290/A

Размер	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125
Длина	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95-105	100-110	105-115	110-120	115-125	125-135	135-150

Бандаж UGO, исполнение 290/B

Размер	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125
Длина	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95-105	100-110	105-115	110-120	115-125	125-135	135-150

Модель UGO, исполнение 290/C

Размер	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
Длина, (см)	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95-105	100-110	105-115	110-120	115-125	125-135	135-150

Модель 415 (415/26, 415/30)

Размер	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
Длина, (см)	65-75	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95-100	100-105	105-110	110-115	115-120	120-125	125-130

Модель ALBERTA (ALBERTA/14, ALBERTA/18)

Размер	70/S	80/M	90/L	100/XL	110/XXL	120/XXXL
Длина, (см)	80-90	90-100	100-110	110-120	120-130	130-140

Модель BERTA (BERTA/16, BERTA/24)

Размер	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
Длина, (см)	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95-100	100-105	105-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-135

Модель BIAGIA

Размер	80	110
Длина, (см)	80	110

Модель BIANCA (BIANCA/13, BIANCA/24, BIANCA/30)

Размер	Универсальный
Длина, (см)	110

Модель CARDIO

Размер	S	M	L	XL
Длина, (см)	75-88	85-98	95-115	115-130

Модель CLELIA

Размер	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
Длина, (см)	72-77	77-82	82-87	87-92	92-97	97-102	102-107	107-112	112-117	117-122	122-127	127-132

Модель DEBORA

Размер	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Длина, (см)	67-71	71-75	75-78	78-82	83-87	88-95	96-104	102-108	106-112	110-116

Модель DENVER (DENVER DESTRO, DENVER SINISTRO)

Размер	80	85	90	95	100	105	110
Длина, (см)	90-95	95-100	100-105	105-110	110-115	115-120	120-125

Модель ILARIA

Размер	60/XS	70/S	80/M	90/L	100/XL	110/XXL
Длина, (см)	60-70	70-85	80-95	90-110	105-125	115-140

Модель IRIS

Размер	70/S	80/M	90/L	100/XL	110/XXL
Длина, (см)	78-88	88-100	98-110	108-120	118-135

Модель JOLLY

Размер	75	80	85	90	95	100	105	110
Длина бедер,	85-90	90-95	95-100	100-105	105-110	110-115	115-120	120-125

Модель PAOLA (PAOLA/25, PAOLA/30)

Размер	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
Длина бедер,	68-73	73-78	78-83	83-88	88-93	93-98	98-103	103-110	108-115	113-120	118-128	123-138	130-150

Модель ROBERTO, ROBINSON

Размер	80	85	90	95	100	105	110	115
Длина бедер,	88-92	93-97	98-102	103-107	108-112	113-117	118-122	123-127

Модель ROBY

Размер	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
Длина бедер,	82-87	87-92	93-98	99-104	105-110	110-115	115-120	121-126	126-131	131-136

Модель SALUS

Размер	85	90	95	100	105	110	115	120
Длина бедер,	94-98	99-103	104-108	109-113	114-118	119-123	124-128	129-133

Модель SPORT & WORK

Размер	S	M	L	XL	XXL
Длина бедер,	60-80	75-95	90-115	100-130	115-160

Модель TEX

Размер	60/XS	70/S	80/M	90/L	100/XL	120/XXL
Длина бедер,	68-78	78-88	88-100	98-110	108-120	118-135

Размеры принадлежностей к бандажам

Накладка COLO

Размер	Универсальный
Диаметр отверстия, (см)	14
Высота изделия, (см)	25

Панель PANNELLO (PANNELLO 5,5, PANNELLO 7,5, PANNELLO 8,5, PANNELLO 9,5)

Размер	PANNELLO 5,5	PANNELLO 7,5	PANNELLO 8,5	PANNELLO 9,5
Диаметр отверстия в канале- или приемник, (см)	5,5	7,5	8,5	9,5

Подушечка POCKET (POCKET DESTRA, POCKET SINISTRA)

Размер	Универсальный
--------	---------------

Подушечка PRESSOR

Размер	Универсальный
Диаметр отверстия, (см)	11,5
Высота изделия, (см)	8,5

Изделия изготовлены кроеным способом из различных материалов (см. таблицы):

Бандажи

Бандаж UGO, исполнение 290/A

Наименование материала	Название материала	Состав материала
Эластичное полотно	B19 "Лисцьо"	Хлопок 60%, полиэстер 24%, резиновая нить 16%
Трикотажное полотно		Хлопок 100%
Поролон		Поролон
Ворсистая часть Велькро		Ворсистая часть Велькро

Дополнительная панель PANNELLO (PANNELLO 5,5, PANNELLO 7,5, PANNELLO 8,5, PANNELLO 9,5)

Наименование материала	Название материала	Состав материала
Трикотажное полотно		Хлопок 100%
Поролон		Поролон
Ворсистая часть Велькро		Ворсистая часть Велькро

Материал UGO, исполнение 290/B

Наименование материала	Название материала	Состав материала
Эластичное полотно	B19 "Лисчо"	Хлопок 60%, полиэстер 24%, резиновая нить 16%
Тик	R11 "Модена"	Хлопок 100%
Трикотажное полотно		Хлопок 100%
Поролон		Поролон
Ворсистая часть Велькро		Ворсистая часть Велькро

Дополнительная панель PANNELLO (PANNELLO 5,5, PANNELLO 7,5, PANNELLO 8,5, PANNELLO 9,5)

Наименование материала	Название материала	Состав материала
Трикотажное полотно		Хлопок 100%
Поролон		Поролон
Ворсистая часть Велькро		Ворсистая часть Велькро

Материал UGO, исполнение 290/C

Наименование материала	Название материала	Состав материала
Эластичное полотно	B18 "Полоска"	Полиамид 60%, хлопок 24%, вискоза 8%, резиновая нить 8%
Трикотажное полотно		Хлопок 100%
Поролон		Поролон
Ворсистая часть Велькро		Ворсистая часть Велькро

Дополнительная панель PANNELLO (PANNELLO 5,5, PANNELLO 7,5, PANNELLO 8,5, PANNELLO 9,5)

Наименование материала	Название материала	Состав материала
Трикотажное полотно		Хлопок 100%
Поролон		Поролон
Ворсистая часть Велькро		Ворсистая часть Велькро

415 (415/26, 415/30)

Наименование материала	Название материала	Состав материала
Сетка	E11 "Лондон"	Полиамид 70%, эластан 30%
Сатин	R19 "Манон"	Хлопок 100%
Тик	R11 "Модена"	Хлопок 100%
Поролон		Поролон
Пластина-спираль	608	Сталь 100%
Велькро		Велькро

ALBERTA (ALBERTA/14, ALBERTA/18), BIANCA (BIANCA/13, BIANCA/24, BIANCA/30)

Наименование материала	Название материала	Состав материала
Эластичное полотно	B21 "Микрогрип"	Полиамид 89%, эластан 11%
Велькро		Велькро

BERTA (BERTA/16, BERTA/24)

Наименование материала	Название материала	Состав материала
Эластичное полотно	B18 "Полоска"	Полиамид 60%, хлопок 24%, вискоза 8%, резиновая нить 8%
Велькро		Велькро

BIAGIA

Наименование материала	Название материала	Состав материала
Эластичное полотно	"Полоска-b"	Полиамид 62%, полиэстер 19%, резиновая нить 19%
Велькро		Велькро

CARDIO

Наименование материала	Название материала	Состав материала
Эластичное полотно	B21 "Микрогрип"	Полиамид 89%, эластан 11%
Эластичное полотно	B12 "Реджиспалле"	Полиэстер 69%, резиновая нить 17%, полиамид 14%
Трикотажное полотно		Хлопок 100%
Поролон		Поролон
Ворсистая часть Велькро		Ворсистая часть Велькро
Велькро		Велькро

модель CLELIA

Наименование материала	Название материала	Состав материала
Сетка	E11 "Лондон"	Полиамид 70%, эластан 30%
Сатин	R19 "Манон"	Хлопок 100%
Тик	R11 "Модена"	Хлопок 100%
Пластина-спираль	608	Сталь 100%
Велькро		Велькро

модель DEBORA

Наименование материала	Название материала	Состав материала
Эластичное кружево	E08 "Диамме"	Полиамид 75%, эластан 25%
Атлас из полиамида	R16 "Капри"	Полиамид 100%
Тик	R11 "Модена"	Хлопок 100%
Пластина-спираль	1304	Сталь 100%
Пластина-спираль	608	Сталь 100%
Велькро		Велькро

модель DENVER (DENVER DESTRO, DENVER SINISTRO)

Наименование материала	Название материала	Состав материала
Плотная эластичная лента	"Ivar"	Хлопок 76%, резиновая нить 14%, вискоза 10%
Кожа оленя		Кожа оленя 100%
Замша оленя		Кожа оленя 100%
Велькро		Велькро

модель ILARIA

Наименование материала	Название материала	Состав материала
Эластичное полотно	B24 "Миллериж"	Полиамид 61%, резиновая нить 24%, хлопок 15%
Трикотажное полотно		Хлопок 100%
Поролон		Поролон
Ворсистая часть Велькро		Ворсистая часть Велькро
Велькро		Велькро

ИЗДЕЛИЯ IRIS, TEX

Наименование материала	Название материала	Состав материала
Эластичное полотно	B31 "Трехполосная"	Хлопок 38%, полиэстер 22%, резиновая нить 21%, полиамид 19%
Трикотажное полотно		Хлопок 100%
Поролон		Поролон
Ворсистая часть Велькро		Ворсистая часть Велькро
Велькро		Велькро

ИЗДЕЛИЯ JOLLY

Наименование материала	Название материала	Состав материала
Сетка	E11 "Лондон"	Полиамид 70%, эластан 30%
Сатин	R19 "Манон"	Хлопок 100%
Тек	R11 "Модена"	Хлопок 100%
Велькро		Велькро

ИЗДЕЛИЯ PAOLA (PAOLA/25, PAOLA/30)

Наименование материала	Название материала	Состав материала
Эластичное полотно	B19 "Лисчьо"	Хлопок 60%, полиэстер 24%, резиновая нить 16%
Трикотажное полотно		Хлопок 100%
Поролон		Поролон
Ворсистая часть Велькро		Ворсистая часть Велькро
Велькро		Велькро

ИЗДЕЛИЯ ROBERTO, ROBINSON

Наименование материала	Название материала	Состав материала
Сатин	R19 "Манон"	Хлопок 100%
Тек	R11 "Модена"	Хлопок 100%
Сетка	E13 "Мадрид"	Полиамид 86%, эластан 14%
Эластичное полотно	B18 "Полоска"	Полиамид 60%, хлопок 24%, вискоза 8%, резиновая нить 8%
Сталь	2005	Сталь 100%, пластик
Сталь-спираль	1110	Сталь 100%
Велькро		Велькро

Бандаж ROBY

Наименование материала	Название материала	Состав материала
Сатин	R19 "Манон"	Хлопок 100%
Тик	R11 "Модена"	Хлопок 100%
Эластичное полотно	B18 "Полоска"	Полиамид 60%, хлопок 24%, вискоза 8%, резиновая нить 8%
Пластина	2005	Сталь 100%, пластик
Пластина-спираль	1110	Сталь 100%
Велькро		Велькро

Бандаж SALUS

Наименование материала	Название материала	Состав материала
Парча из хлопка и вискозы	R05 "Юпитер"	Хлопок 69%, вискоза 31%
Тик	R11 "Модена"	Хлопок 100%
Трикотаж	E04 "Вена"	Хлопок 60%, полиэстер 23%, эластан 17%
Пластина	1304	Сталь 100%, пластик
Пластина-спираль	608	Сталь 100%
Велькро		Велькро

Бандаж SPORT & WORK

Наименование материала	Название материала	Состав материала
Влаговыводящее эластичное полотно «DRY SKIN»	B50 "Сухая кожа"	Хлопок 45%, полиэфирное волокно 45% , эластан 10%
Велькро		Велькро

Принадлежности к бандажам

Бандажка COLO

Наименование материала	Название материала	Состав материала
Тик	R11 "Модена"	Хлопок 100%
Велькро		Велькро

нель PANNELLO (PANNELLO 5,5, PANNELLO 7,5, PANNELLO 8,5, PANNELLO 9,5)

Наименование материала	Название материала	Состав материала
Трикотажное полотно		Хлопок 100%
Поролон		Поролон
Ворсистая часть Велькро		Ворсистая часть Велькро

душечки PRESSOR

Наименование материала	Название материала	Состав материала
Трикотажное полотно		Полиамид 80%, эластан 20%
Ворсистая часть Велькро		Ворсистая часть Велькро
Пластазот		Пластазот

душечка POCKET (POCKET DESTRA, POCKET SINISTRA)

Наименование материала	Название материала	Состав материала
Пластазот		Пластазот

1.3. Ткани в изделиях должны обладать свойствами, указанными в таблицах 1, 2.

Таблица 1

Технические характеристики неэластичных тканей

Название	Ширина, см	Поверхностная плотность, г/м ²	Усадка после стирки при t° = 50 °С, не более (%)	
			Длина	Ширина
R05 "Юпитер"	138-140	310±2%	7	5
R11 "Модена"	138-140	216±2%	7	5
R16 "Капри"	180	175±2%	4	7
R19 "Манон"	138-140	280±2%	7	5

Таблица 2

Технические характеристики эластичных тканей

Название	Ширина, см	Поверхностная плотность	Усадка длины (не более %) после стирки при t° (не более °C)	Растяжимость по длине (%)	Растяжимость по ширине (%)
2	3	4	5	6	7
B12 "Реджиспалле"	6 ±3%	43 ±10% г/пог.м	3 при 30°	75±10%	—
B18 "Полоска" шириной 6 см	6 ±3%	585 ±10% г/м ²	6 при 60°	70±10%	—
B18 "Полоска" шириной 16 см	16 ±3%	585 ±10% г/м ²	6 при 60°	60±10%	—
B18 "Полоска" шириной 24 см	24 +2%	585 ±10% г/м ²	6 при 60°	60±10%	—
B18 "Полоска" шириной 27 см	27 ±2%	585 ±10% г/м ²	6 при 60°	60±10%	—
B18 "Полоска" шириной 32 см	32 ±2%	585 ±10% г/м ²	6 при 60°	50±10%	—
B19 "Лисцьо" шириной 25 см	25	840 ±2% г/м ²	7 при 40°	35±10%	—
B19 "Лисцьо" шириной 30 см	30	840 ±2% г/м ²	7 при 40°	35±10%	—
B21 "Микрогрип" шириной 5 см	5 ±5%	635 ±11% г/м ²	3 при 30°	70±10%	—
B21 "Микрогрип" шириной 13 см	13	635 ±11% г/м ²	3 при 30°	40±10%	—
B21 "Микрогрип" шириной 14 см	14 ±3%	635 ±11% г/м ²	3 при 30°	40±10%	—
B21 "Микрогрип" шириной 18 см	18 ±3%	635 ±11% г/м ²	3 при 30°	38±10%	—
B21 "Микрогрип" шириной 24 см	24	635 ±11% г/м ²	3 при 30°	38±10%	—
B21 "Микрогрип" шириной 30 см	30,5	635 ±11% г/м ²	3 при 30°	38±10%	—
B21 "Микрогрип" шириной 32 см	32±2%	635 ±11% г/м ²	3 при 30°	36±10%	—
B24 "Миллериж"	28	140 ±2% г/пог.м	6 при 60°	45±10%	—
B31 "Трехполосная"	28	196 ±5% г/пог.м	6 при 60°	75±10%	—

2	3	4	5	6	7
B50 "Сухая кожа"	27	520 $\pm$ 5% г/м ²	6 при 60°	60 $\pm$ 10%	—
E04 "Вена"	180	890 $\pm$ 10% г/м ²	3 при 30°	10 $\pm$ 10%	40 $\pm$ 10%
"Полоска-b"	8	43 $\pm$ 5% г/пог.м	3 при 30°	100 $\pm$ 10%	—
"Ivar" шириной 2,7 см	2,7	1040 $\pm$ 2% г/м ²	6 при 60°	60 $\pm$ 10%	—
"Ivar" шириной 5,5 см	5,5	1040 $\pm$ 2% г/м ²	6 при 60°	40 $\pm$ 10%	—
E08 "Диамме"	200 $\pm$ 2%	390 $\pm$ 5% г/м ²	4 при 50°	25 $\pm$ 10%	50 $\pm$ 10%
E11 "Лондон"	200 $\pm$ 2%	440 $\pm$ 5% г/м ²	3 при 50°	45 $\pm$ 10%	75 $\pm$ 10%
E13 "Мадрид"	150 $\pm$ 2%	135 $\pm$ 10% г/м ²	6 при 50°	80 $\pm$ 10%	120 $\pm$ 10%

2.4. Основные параметры изделия «Изделия протезно-ортопедические: бинты и принадлежности к бандажам»:

Поверхностная плотность - не менее 550 г/м²;

Растяжимость (до стирки/после стирки) – не менее 80 %;

Разрывная нагрузка (до стирки/после стирки)- не менее 147,0 Н;

Рабочая растяжимость (до стирки/после стирки) – не менее 2, но не менее 15 %.

2.5. Изделия должны быть устойчивы к санитарно-гигиенической обработке и выдерживать не менее 20 ручных стирок нейтральными средствами моющих средств или раствором детского мыла при температуре, превышающей 40°С и сушке в естественных условиях.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ОТСУТСТВУЮТ.

4. ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ОТСУТСТВУЮТ.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

5.1. Транспортирование изделий может производиться всеми видами транспортных средств в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на данном виде транспорта.

5.2. Изделия транспортируют в картонных коробках.

5.3. При внутригородских перевозках изделие транспортируют в коробках, полиэтиленовых пакетах или потребительской таре.

5.4. Изделия должны храниться при температуре не ниже 5 °C и не выше 40 °C, относительной влажности воздуха 50 – 70 % и быть защищены от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий.

5.5. Изделия должны храниться до реализации на стеллажах или в другом оборудовании в упаковке изготовителя.

6. ПРАВИЛА УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЯМИ

6.1.  Только ручная стирка, не подлежит стирке в стиральной машине. Не тереть, не отжимать. Максимальная температура стирки 40°C.

6.2.  Нельзя отбеливать. При стирке не использовать средства, содержащие отбеливатели (хлор).

6.3.  Не гладить.

6.4.  Не использовать химчистку.

6.5.  Не разрешено отжимать в стиральной машине и высушивать в стиральной машине.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

7.1. Пришедшие в негодность изделия утилизируются с бытовым мусором.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Гарантийный срок службы 6 месяцев с момента продажи при условии соблюдения инструкции и правил эксплуатации изделия. Срок службы зависит от интенсивности использования изделия.

8.2. Адрес производства: TLM с.р.л., ул. Убольдо 48, 21040 Геренцано (ВА), Италия. Телефон: +39 02 96480094, факс +39 02 96480165.
E-mail: tlm@tlm.it.

Адрес представительства в Российской Федерации: ООО фирма «АРМО», 123022, Москва, Звенигородское шоссе д. 3. Телефон: (499)788-60-
E-mail: ooo_armo@mail.ru.

Протокол, протокол и сарпачено пачула
25 (двадесет и пет) листов(а)

Директор

Клаудио Тести



TLM s.r.l.

Via per Uboldo, 48 - 21040 GERENZANO (VA)
Codice Fiscale e Partita IVA 00801890123
Tel. 0296480004 - Fax 0296480165
tlm@tlm.it - www.tlm.it