

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Ковидиен Евразия»



М. Л. Бокова

2012 г.

ИНСТРУКЦИЯ
по применению

**Изделия медицинского назначения
«Воск костный хирургический»**

2012

Это изделие разработано, протестировано и произведено для использования при работе только с одним пациентом. Данное изделие не подлежит повторному использованию, обработке и стерилизации.

Повторное использование и обработка изделия могут привести к его повреждению и, как следствие, к травме пациента. Так же, повторная обработка и/или стерилизация изделия могут стать причиной инфицирования пациента.

Описание:



Bone Wax представляет собой стерильную смесь из пчелиного воска, парафина и изопропилпальмитата, вещества, смягчающего воск. Препарат непрозрачен и имеет восковой запах.

Bone Wax используется для остановки кровотечения из костных тканей.

Принципы действия:

Bone Wax служит для обеспечения местного гемостаза кости, действуя как механический барьер (тампонада). Препарат биохимически неактивен и не абсорбируется.

Противопоказания:

Не следует применять Bone Wax, если требуется быстрая костная регенерация и соединение тканей.

Предупреждения:

- Повторная стерилизация или чрезмерный нагрев Bone Wax запрещены.
- Bone Wax может препятствовать остеогенезу и выступать в качестве физического барьера для восстановительных процессов.
- Не используйте изделие, если упаковка вскрыта или повреждена. Следует уничтожить неиспользованный Bone Wax, если упаковка была вскрыта.

Меры предосторожности:

- Bone Wax используется в небольших количествах. Удаляйте излишки Bone Wax с операционного поля.
- Откройте конверт непосредственно перед использованием препарата, чтобы снизить вероятность заражения пациента и предотвратить чрезмерное высыхание препарата.
- Используйте перчатки для защиты рук.

Побочные реакции:

Известны случаи возникновения слабых воспалительных реакций в тканях, примыкающих к месту применения препарата. Как и любые другие инородные тела, Bone Wax может обострить существующую инфекцию.

Использование:

Bone Wax следует использовать сразу после его извлечения из упаковки. Соблюдая правила асептики, нагрейте Bone Wax до требуемой температуры, разогрев его пальцами или поместив еще не открытый пакет в теплый стерильный раствор.

Наложите размягченный Bone Wax на края костей в соответствии с условиями операции и пожеланиями хирурга.

Хранение:

Рекомендуемые условия хранения: при температуре ниже 25° С, вдали от источников влаги и прямого нагрева.

Прошито и
пронумеровано 3 листов



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Ковидиен Евразия»



ИНСТРУКЦИЯ
по применению


**Изделия медицинского назначения
«Воск костный хирургический»**

2012

Это изделие разработано, протестировано и произведено для использования при работе только с одним пациентом. Данное изделие не подлежит повторному использованию, обработке и стерилизации.

Повторное использование и обработка изделия могут привести к его повреждению и, как следствие, к травме пациента. Так же, повторная обработка и/или стерилизация изделия могут стать причиной инфицирования пациента.

Описание:

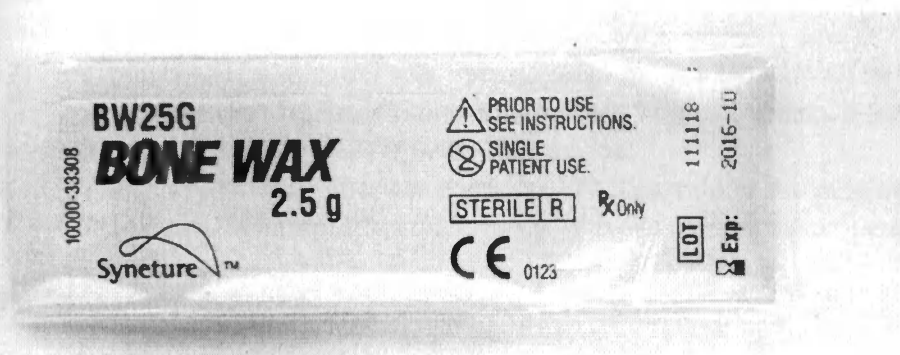

Физические свойства:

Агрегатное состояние	Твердый
Цвет	Белый
Запах	Слабый запах воска
Относительная плотность	0.95
Растворимость в воде	Нерастворим

Химический состав:

Компонент	Концентрация
Изопропил пальмитат	5-20%
Воски (включая парафин)	75-95%

Bone Wax представляет собой стерильную смесь из пчелиного воска, парафина и изопропилпальмитата, вещества, смягчающего воск. Препарат непрозрачен и имеет восковой запах.

Bone Wax используется для остановки кровотечения из костных тканей.

Показания.

Хирургический воск предназначен для остановки кровотечения из рассеченной, просверленной костной ткани или костных фрагментов путем механического заполнения костных каналов, содержащих кровоточащие капилляры.

Принципы действия:

Bone Wax служит для обеспечения местного гемостаза кости, действуя как механический барьер (тампонада). Препарат биохимически неактивен и не абсорбируется.

Противопоказания:

Не рекомендуется применение хирургического воска в местах, где желательны быстрая регенерация и срастание костных тканей.

Предупреждения:

- Повторная стерилизация или чрезмерный нагрев Bone Wax запрещены.
- Bone Wax может препятствовать остеогенезу и выступать в качестве физического барьера для восстановительных процессов.
- Не используйте изделие, если упаковка вскрыта или повреждена. Следует уничтожить неиспользованный Bone Wax, если упаковка была вскрыта.

Меры предосторожности:

- Bone Wax используется в небольших количествах. Удаляйте излишки Bone Wax с операционного поля.
- Откройте конверт непосредственно перед использованием препарата, чтобы снизить вероятность заражения пациента и предотвратить чрезмерное высыхание препарата.
- Используйте перчатки для защиты рук.

Использовать ТОЛЬКО в условиях стационара.

Побочные реакции:

Известны случаи возникновения слабых воспалительных реакций в тканях, примыкающих к месту применения препарата. Как и любые другие инородные тела, Bone Wax может обострить существующую инфекцию.

Использование:

Bone Wax следует использовать сразу после его извлечения из упаковки. Соблюдая правила асептики, нагрейте Bone Wax до требуемой температуры, разогрев его пальцами или поместив еще не открытый пакет в теплый стерильный раствор.

Наложите размягченный Bone Wax на края костей в соответствии с условиями операции и пожеланиями хирурга.

Хранение:

Рекомендуемые условия хранения: при температуре ниже 25° С, вдали от источников влаги и прямого нагрева.

Бюджет
на
лечебные
цели

