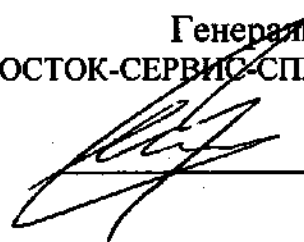


«Утверждаю»

Генеральный директор
ЗАО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ»

 С.И. Ширяев

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Средство увлажняющее офтальмологическое Plum Eye Wash, pH Neutral.

2011 год

Руководство по применению.
Средство увлажняющее офтальмологическое Plum Eye Wash, pH Neutral.

Пожалуйста, подробно прочитайте это руководство по применению перед применением продукта.

1. Описание.

Жидкость бесцветная, прозрачная без парфюмерной отдушки.

Средство Plum Eye Wash состоит из воды (99,1%) и хлорида натрия (0,9%).

Средство pH Neutral состоит: вода (>80%), динатриевый фосфат (1-5%), фосфат калия (<1%)

2. Область применения.

Средство увлажняющее применяется при механических (инородные частицы) и химических (кислоты и щелочи) травмах глаза. Жидкость для промывания глаз Plum идеальна для того, чтобы избавиться от инородных частиц, попавших в глаза.

А раствор pH Neutral используется для нейтрализации кислот и щелочей.

Средство предназначено для промывания глаз.

3. Способ применения.

1. Извлеките флакон из держателя.
2. Поверните колпачок до нарушения герметичности флакона.
3. Запрокиньте голову и начинайте промывание.
4. Если не хотите замочить одежду, можно промывать глаз, наклонив голову вниз.

Внимание: при любых травмах жидкость должна попадать в поврежденный глаз равномерно. Продолжайте промывание вплоть до приема у врача.

Если в оба глаза попала кислота или другое опасное вещество, каждая секунда может стоить дорого. С помощью Duo вы можете промыть оба глаза одновременно. Равномерная струйка жидкости удаляет химикат из глаза. Дизайн колпачка помогает зафиксировать веки в раскрытом положении.


ХАРАКТЕР ТРАВМЫ	СРЕДСТВО ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ	ДАЛЕЙШЕЕ ПРОМЫВАНИЕ	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОМЫВАНИЯ
Инородные тела Пыль, грязь, металлическая и древесная стружка и пр	Plum Eye Wash	Plum Eye Wash	Промывать вплоть до удаления инородного тела
Кислоты	pH Neutral	Plum Eye Wash	Промывать pH Neutral до опустошения флакона, а затем раствором 0,9% NaCl вплоть до посещения врача.
Щелочи	pH Neutral	Plum Eye Wash	Промывать pH Neutral до опустошения флакона, а затем раствором 0,9% NaCl вплоть до посещения врача.
Другие химикаты (напр., растворители и масла)	Plum Eye Wash	Plum Eye Wash	Промывать до преодоления дискомфорта и продолжать до посещения врача.
Травмы кожи (кислоты, щелочи и др. химикаты)	pH Neutral	Plum Eye Wash	Промывать pH Neutral до опустошения флакона, а затем раствором 0,9% NaCl вплоть до посещения врача.

4. Хранение и срок годности.

Рекомендуемая температура хранения 5-35°C.

Срок годности – 3 года.

Генеральный директор

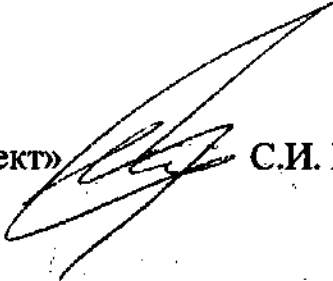ЗАО «Восток-Сервис-Снецкомплект»  С.И. Ширяев

«___» _____ 2011 года