

«УТВЕРЖДАЮ»



ИНСТРУКЦИЯ
по применению изделия медицинского назначения:

**Игла для взятия венозной крови одноразовая BD Vacutainer
Eclipse Signal**

Производства:

Бектон Дикинсон энд Компани, Великобритания / Becton Dickinson and Company, Belliver
Industrial Estate, Plymouth, Devon, PL6 7BP, the United Kingdom.

2012

Организация-изготовитель:

Becton Dickinson and Company, Belliver Industrial Estate, Plymouth, PL6 7BP, UK / Бектон Дикинсон энд Компани, Соединенное Королевство

Назначение.

Иглы одноразовые BD Vacutainer Eclipse Signal производства компании "Becton Dickinson and Company" предназначены для безопасного забора образцов венозной крови с целью проведения лабораторных анализов *in vitro*. Данные иголки имеют регулируемый кожух-щиток безопасности из полипропилена, снижающий риск случайного повреждения кожи и возможного инфицирования медицинского персонала, осуществляющего манипуляцию. Также каждая игла имеет информационную камеру (прозрачный участок), позволяющую пользователю быть уверенным в успешности венозного доступа. Доступны модификации игл со встроенным держателем пробирок. Иглы предназначены для использования средним и старшим медицинским персоналом.

Область применения:

Общая клиническая медицина – для забора венозной крови для исследований

Предупреждение при использовании:

Не используйте изделие, если упаковка пакета открыта или повреждена. Внимание: перед использованием прочтите все предупреждения и инструкции. Неправильное применение может повлечь за собой травму пациента или подвергнуть его, или медицинского работника, выполняющего процедуру, риску инфицирования.

Изделие предназначено для однократного применения. Не использовать повторно. Не заменять, не переустанавливать и не использовать другие элементы изделия.

Применение:

- Обработка рук персонала перед проведением инъекции – согласно принятому в клинике протоколу
- Обработка мест стыковки изделий – с применением дезинфицирующих растворов, применяющихся в клинике
- После применения – обязательная утилизация, аналогично шприцам однократного применения и катетерам внутривенным.


Противопоказания к использованию: Отсутствуют.

Внимание: Для снижения уровня риска заражением ВИЧ или другими инфекционными заболеваниями медицинский персонал должен соблюдать все меры предосторожности и предписания при работе с кровью или продуктами крови со всеми пациентами.

Краткое руководство пользователя

1. Извлеките иглу из стерильной упаковки, не прикасаясь к адаптеру.
2. Соединение иглу с держателем для пробирки (существуют модификации игл с интегрированным держателем). Отведите назад защитный кожух-щиток, освободив колпачок иглы.

3. Одной рукой зафиксируйте держатель пробирок для сбора крови. Свободной рукой снимите защитный колпачок с иглы.
4. Выполните венепункцию согласно существующему общепринятому протоколу. Произведите забор венозной крови.
5. При успешном попадании в сосуд, информационная визуализационная камера заполнится кровью пациента. Защитный кожух должен быть отведен вверх. Не рекомендуется выполнять пункцию вены в одном и том же месте несколько раз подряд.
6. Извлеките иглу, закройте её защитным кожухом-щитком.
7. Нажатием на заднюю часть кожуха снимите иглу с держателя и сбросьте в дезинфицирующий раствор, не прикасаясь к контаминированной части.

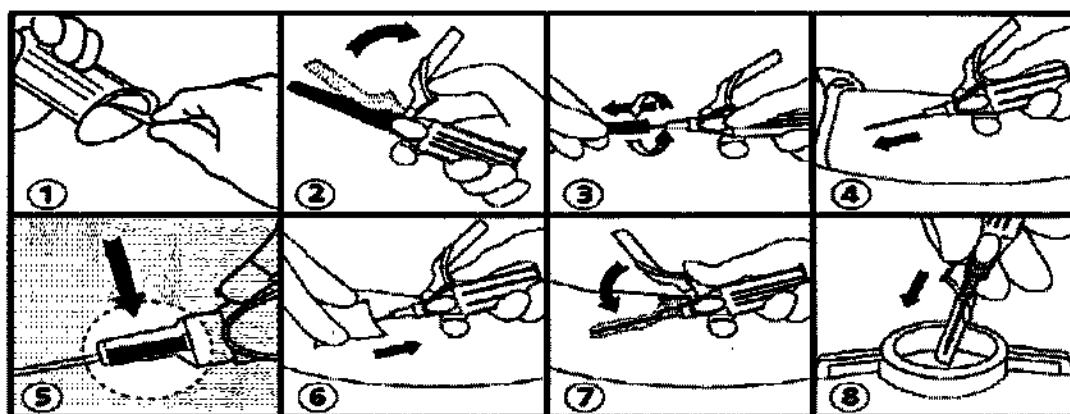

Техника венепункции

Для венепункции могут быть использованы любые вены, однако наиболее удобны крупные подкожные вены локтевого сгиба и тыльной поверхности кисти, а у детей раннего возраста — височная или лобная вена. Руку больного в положении максимального разгибания в локтевом суставе уложите на твердую подушку или сложенное в несколько раз полотенце. Кожу обработайте спиртом и на плечо наложите резиновый жгут, создающий венозный застой при полной артериальной проходимости. Зафиксируйте вену пальцами левой руки. Захватите иглу и держатель пробирки пальцами правой руки срезом вверх под острым углом к поверхности кожи и параллельно ходу вены. Быстрым движением сделайте прокол вены по току крови.

По окончании процедуры иглу необходимо извлечь, место прокола смазать спиртом (или настойкой йода) и закрыть стерильной салфеткой.



Пригодная для функционирования температура окружающей среды 0 до +45 С.

Упаковка, стерилизация и хранение:

Иглы BD Eclipse Signal выпускаются в индивидуальной упаковке (полиэтилен, ламинированная бумага), стерилизованы этилен-оксидом по стандарту EN ISO 11137. Срок хранения 3 года. Рекомендовано хранить в сухом месте при температуре от -20°C до +45°C и относительной влажности воздуха до 80%; не подвергать воздействию прямых солнечных лучей!

Не применять после истечения срока годности!

Гарантии производителя

Производитель не несет ответственности за повреждения или несчастные случаи, вызванные неправильной эксплуатацией изделия, по вине пользователей или внешних непредвиденных ситуаций.

Прошито и
пронумеровано 9 листов

