



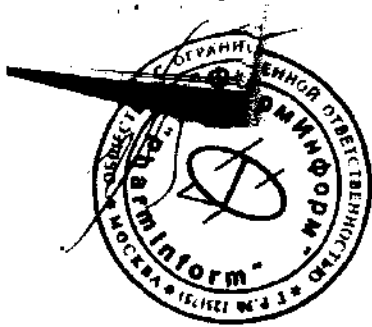

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «ФармИнформ»

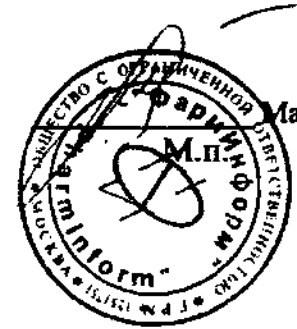

Макарова О.Е.

ИНСТРУКЦИЯ
по применению изделия медицинского назначения:

Наборы для забора артериальной крови,
производства
Becton Dickinson and Company, United Kingdom

Назначение медицинского изделия

Наборы для забора артериальной крови предназначены для взятия артериальной крови аспирационным методом.

Область применения:

Общая клиническая медицина – для забора крови для проведения лабораторных исследований.

Показания для применения:

Применяются в случаях, когда для исследований необходимо использовать артериальную кровь - в диагностике пациентов, находящихся в критических состояниях, определение показателей кислотно-основного состояния (КОС или КЩС), газов крови и электролитов.

Применение:

- Обработка рук персонала перед проведением инъекции – согласно принятому в клинике протоколу
- Обработка мест стыковки изделий – с применением дезинфицирующих растворов, применяющихся в клинике
- После применения – обязательная утилизация, аналогично шприцам однократного применения и катетерам внутривенным.

Наборы BD A-Line разработан для забора артериальной крови аспирационным методом, BD Preset™ - специально разработан для самозаполнения, но при необходимости возможно заполнение аспирационным методом.

Наборы готовы к использованию, что дает значительную экономию времени при проведении экспресс анализа.

Различные объемы и типы шприцев BD – возможность использования различных методик взятия необходимого объема артериальной крови.

Во время заполнения шприца BD Preset™ кровью остаточный воздух (может являться причиной ошибочных результатов) удаляется через самовыводящую мембрану в поршне шприца, которая автоматически закрывается после получения нужного объема.

Есть приспособления для защиты полученной пробы от контакта с воздухом, что позволяет определять истинную концентрацию исследуемых показателей в образце.

Шприцы с иглами BD Eclipse, снабженными защитным колпачком, повышают безопасность медицинского персонала.

Забор материала из шприцев BD Preset™ и в анализатор может происходить двумя способами, в зависимости от вида анализатора:

- Аспирация. При размещении шприца в анализаторе забор происходит с помощью специальной иглы непосредственно из шприца.
- Инъекция. Перенос пробы происходит вручную путем подключения шприца к креплению Luer, встроенному в анализатор.

Данные системы забора являются универсальными для всех анализаторов.

Упаковка:

Наборы для забора артериальной крови упаковываются в первичную стерильную индивидуальную упаковку (полиэтилен), вторичную упаковку - картонную коробку.

Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость компонентов

Стерилизация:

Стерилизация этилен оксидом.

Утилизация:


Согласно принятому в клинике протоколу утилизации средств однократного применения, контаминированных биологическими материалами.

Срок годности:

5 лет.

Внимание: Для снижения уровня риска заражением ВИЧ или другими инфекционными заболеваниями медицинский персонал должен соблюдать все меры предосторожности при работе с кровью или продуктами крови со всеми пациентами.

Наборы для забора артериальной крови, производства Becton Dickinson and Company, United Kingdom

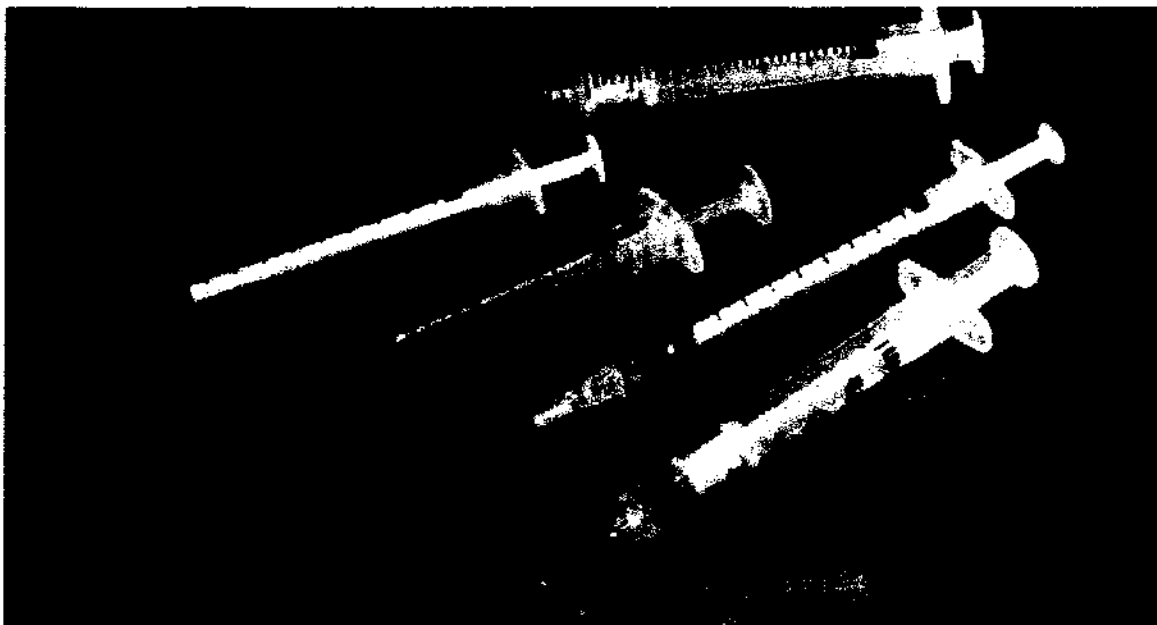

В диагностике пациентов, находящихся в критических состояниях, значительную роль играет определение показателей кислотно-основного состояния (КОС или КЩС), газов крови и электролитов. Для исследования этих параметров рекомендуется использовать артериальную кровь, так как она имеет одинаковый состав во всем теле, в то время как концентрация показателей в венозной крови отличается в разных органах вследствие метаболизма.

Наборы для забора артериальной крови предназначены для взятия артериальной крови аспирационным методом.

Шприцы имеют напыление сухим гепарином лития, сбалансированным по кальцию, что повышает качество и стабильность пробы.