


«Утверждаю»

Генеральный директор
ЗАО «Восток-Сервис-Спецкомплект»

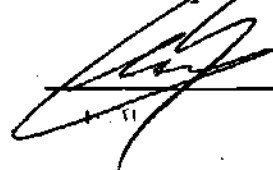

С.И. Ширяев

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Лейкопластыри Plum QuickFix: Water resistant, Detectable, Mini Elastic с
боксом для хранения**

2011 год

Руководство по применению.

Лейкопластыри Plum QuickFix: Water resistant, Detectable, Mini Elastic с боксом для хранения

Пожалуйста, подробно прочитайте это руководство по применению перед применением продукта.

1.Описание:

1. Лейкопластыри Plum QuickFix Water resistant - водостойкий пластырь размером 72х25 мм. предназначен для применения в условиях повышенной влажности. Пластыри выполнены из специального полиэтилена, позволяющего коже дышать.
2. Лейкопластыри Plum QuickFix Elastic - эластичный пластырь на текстильной основе размером 72х25мм. является наиболее комфортным, так как не стягивает кожу и позволяет ей свободно дышать.
3. Лейкопластыри Plum QuickFix Detectable - пластырь броского ярко-синего цвета со встроенным металлическим элементом, который легко обнаруживается металлодетектором. Пластыри выполнены на текстильной основе размером 72х25мм., позволяющего коже дышать.
4. Лейкопластыри Plum QuickFix Mini Elastic - маленькая практичная упаковка будет у вас всегда под рукой. Ее можно носить в кармане, сумке, ящике с инструментами, аптечке, брать с собой в машину. В комплект QuickFix Mini входит 30 эластичных пластырей размером 72х25мм.

2. Область применения.

Накожно, на поврежденный участок кожи или для закрепления повязок.

3.Способ применения.

- 1.Открыть бумажный пакет.
2. Вынуть пластырь.
- 3.Снять с его поверхности защитную пленку, не прикасаясь пальцами к бинтовой части пластыря, приложить ее на рану.
- 4.Липкую часть пластыря приклеить к сухой чистой коже, слегка прижав пальцем

4.Хранение и срок годности.

Хранить в сухом, защищенном от солнца месте. Срок годности 3 года с момента изготовления

**Генеральный директор
ЗАО «Восток – Сервис – Спецкомплект»**

Ширяев С.И.