

**СОГЛАСОВАНО**

Генеральный директор  
ООО «Медицина-Айрлайд»



**УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор  
ООО «УГМК-Здоровье»



М.С. Склад  
2016 г.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**«КОМПЛЕКТЫ ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ»  
ПО ТУ 9398 – 002 – 51474515 – 2016**

наименование медицинского изделия

## **1 НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

«Комплекты общехирургические одноразовые стерильные» по ТУ 9398 – 002 – 51474515 – 2016 (далее – «комплекты», «изделия»).

## **2 СОСТАВ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

См. Приложение №1 настоящей инструкции.

## **3 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Хирургические отделения медицинских учреждений.

## **4 ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Для применения взамен многоразовых предметов одежды и покровного материала, во время проведения хирургических манипуляций и процедур, медицинским персоналом пациентам.

## **5 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Запрещается использовать изделия, если:

- истек срок годности;
- изделия имеют внешние дефекты в виде разрывов, вмятин и другие механические повреждения;
- индивидуальная несовместимость с компонентами сырья медицинских изделий;
- упаковка находится во влажном состоянии.

## **6 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ (БЕЗОПАСНОСТИ) ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Не допускается:

- подвергать изделия повторной стерилизации перед применением;
- повторное использование изделий.

## **7 ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Возможны аллергические реакции при наличии индивидуальной непереносимости используемых материалов.

## **8 ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

В течение времени выполнения хирургических манипуляций/процедур или раньше до загрязнения.

## **9 ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ**

9.1 Перед использованием по назначению комплекты освобождают от транспортной (защитной) упаковки и проводят визуальный контроль каждой потребительской упаковки.

9.2 При отсутствии нарушений (п.5 настоящей инструкции), потребительскую упаковку вскрывают для дальнейшего применения.

9.3 Комплекты следует применять исходя из назначения и области применения.

9.4 *Халаты хирургические: тип А («Стандарт»), тип В («Евростандарт»), тип С («Комбинированный»)* предназначены для ношения поверх одежды;

9.5 *Шапочки: тип А («Берет»), тип В («Шарлотта»), тип С («Колпак-Стандарт»), тип D («Колпак-Евростандарт»), тип Е («Шапочка на завязках»)* предназначены для покрытия головы;

9.6 *Бахилы хирургические: тип А (высокие (с двойной подошвой)), тип В (низкие),* предназначены для ношения поверх обуви, с целью создания физического барьера между обувью и окружающей средой.

9.7 *Бахилы хирургические: тип С («Леггинсы»)* предназначены для фиксации на голени или предплечье, с целью изоляции хирургического разреза или операционного поля.

9.8 Сорочка хирургическая, рубашка хирургическая предназначены для применения взамен одежды.

9.9 Карман-приемник предназначен для защиты медицинского оборудования и инвентаря от загрязнения, путем фиксации к рабочей поверхности стола или простыни;

9.10 Фиксирующая лента предназначена для фиксации элементов одежды, покровного материала друг к другу или к рабочим поверхностям;

9.11 Маска хирургическая (на резинках) предназначена для использования в качестве индивидуального средства защиты органов дыхания, путем фиксации на лице;

9.12 Чехол для эндоскопической камеры предназначен для покрытия оборудования и его защиты от загрязнения;

9.13 Чехол для инструментального стола предназначен для покрытия инструментального стола и его защиты от загрязнения;

9.14 Простыня большая операционная, простыня малая операционная, конверт хирургический предназначены для применения взамен белья, с целью защиты операционного стола, медицинской кровати и т.п. от загрязнения;

9.15 Простыня большая операционная с липким краем; простыня большая операционная с карманом; простыня большая операционная с вырезом: тип А (с липким краем), тип В (с липким краем, с перинеальным покрытием); простыня большая операционная с отверстием: тип А (с липким краем), тип В (с липким краем, со сборным карманом), тип С (с липким краем, со сборным карманом, со встроенным покрытием для ног), тип D (с липким краем, со встроенным экраном), тип E (с липким краем, с боковыми карманами, со встроенным покрытием для ног), тип F (с липким краем, с боковыми карманами, со встроенным экраном), тип G (с липким краем, со встроенным покрытием для ног), тип H (с липким краем, со встроенным покрытием для ног, со встроенным экраном), тип K (с липким краем, с боковыми вырезами), тип L (с липким краем, с прозрачной вставкой); простыня большая операционная с эластичным отверстием; простыня большая операционная с эластичным отверстием, со сборным карманом предназначены для применения взамен белья, с целью изоляции места хирургического разреза, операционного поля.

## **10 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЯЕМЫХ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ПО ПРИМЕНИМОСТИ)**

10.1 Изделия по внешнему виду и технологии изготовления должны соответствовать требованиям технической документации, образцу-эталону, техническому описанию на модель, разработанному и утвержденному в установленном порядке.

10.1.1 Халат хирургический: тип А («Стандарт») представляет собой изделие свободного покроя, фиксирующийся сзади на 2-е завязки в области талии. Тип горловины: круглый вырез, без воротника, окантованный лентой, переходящей в завязки. Тип рукава: длинный, собранный на вязаные трикотажные манжеты. Низ халата не обработан.

10.1.2 Халат хирургический: тип В («Евростандарт») представляет собой изделие свободного покроя, с глубоким запахом на спине, фиксирующийся на 4-е завязки в области талии (сбоку). Тип горловины: круглый вырез, без воротника, окантованный лентой, фиксирующийся на ленту типа «Контакт». Тип рукава: длинный, собранный на вязаные трикотажные манжеты. Низ халата не обработан.

10.1.3 Халат хирургический: тип С («Комбинированный») представляет собой изделие свободного покроя, с глубоким запахом на спине, фиксирующийся на 4-е завязки в области талии (сбоку). Тип горловины: круглый вырез, окантованный, без воротника, фиксирующийся на ленту типа «Контакт». Тип рукава: длинный, собранный на вязаные трикотажные манжеты. Передняя часть халата и его рукава (с лицевой стороны) дополнительно усилены ламинированным материалом. Низ халата не обработан.

10.1.4 Шапочки: тип А («Берет»), тип В («Шарлотта») представляют собой изделия, собранные на резинку по краю вдоль окружности.

10.1.5 Шапочка: тип С («Колпак-Стандарт») представляет собой изделие цилиндрической формы, без отворота, состоящее из стенки и донышка. Колпак фиксируется на затылке при помощи завязок, регулирующих размер изделия.

10.1.6 Шапочка: тип D («Колпак-Евростандарт») представляет собой изделие цилиндрической формы, с подворотом, состоящего из стенки и донышка. Колпак фиксируется на затылке при помощи завязок, регулирующих размер изделия. Дополнительно колпак оснащен потопоглощающей полосой.

- 10.1.7 *Шапочка: тип Е («Шапочка на завязках»)* представляет собой изделие, состоящее из 2-х частей: стенки и доньшка. Способ фиксации: завязки.
- 10.1.8 *Бахилы хирургические: тип А (высокие (с двойной подошвой))* представляют собой чехлы с двойной подошвой, фиксирующиеся при помощи завязок/резинок.
- 10.1.9 *Бахилы хирургические: тип В (низкие)* представляют собой чехлы, фиксирующиеся по верхнему краю изделия на резинку. Верхние срезы бахил не обработаны.
- 10.1.10 *Бахилы хирургические: тип С («Леггинсы»)* представляют собой изделия прямоугольной формы. Верхний срез бахил не обработан.
- 10.1.11 *Сорочка хирургическая* представляет собой изделие свободного покроя, расширенного к низу силуэта, без рукавов. Вырез горловины круглый. Края не обработаны.
- 10.1.12 *Рубашка хирургическая* представляет собой изделие свободного покроя, с цельнокроеными рукавами. Вырез горловины круглый, может быть обработан кантом, переходящим в завязки.
- 10.1.13 *Маска хирургическая (на резинках)* представляет собой 3-хслойное изделие прямоугольной формы. Способ фиксации: при помощи резинок. Дополнительно маска оснащена гибким носовым фиксатором, обеспечивающим лучшее прилегание изделия к лицу.
- 10.1.14 *Конверт хирургический* представляет собой изделие прямоугольной формы. Тип застежки: завязки. Края могут быть не обработаны.
- 10.1.15 *Чехол для эндоскопической камеры* представляет собой изделие прямоугольной формы, фиксирующееся при помощи завязок. Края могут быть не обработаны.
- 10.1.16 *Чехол для инструментального стола* представляет собой изделие прямоугольной формы, с впитывающей зоной (вставкой). Края могут быть не обработаны.
- 10.1.17 *Простыня малая операционная* представляет собой изделие прямоугольной формы, цельнокроенное, с необработанными, неосыпающимися краями.
- 10.1.18 *Простыня большая операционная* представляет собой изделие прямоугольной формы, с необработанными, неосыпающимися краями.
- 10.1.19 *Простыня большая операционная с липким краем* представляет собой изделие прямоугольной формы, с необработанными, неосыпающимися краями. Дополнительно простыня оснащена адгезивным (липким) краем.
- 10.1.20 *Простыня большая операционная с карманом* представляет собой изделие прямоугольной формы, с необработанными, неосыпающимися краями. Дополнительно простыня оснащена карманом.
- 10.1.21 *Простыня большая операционная с вырезом: тип А (с липким краем)* представляет собой изделие прямоугольной формы, с необработанными, неосыпающимися краями. Дополнительно простыня снабжена вырезом с адгезивной (липкой) лентой по краю.
- 10.1.22 *Простыня большая операционная с вырезом: тип В (с липким краем, с перинеальным покрытием)* представляет собой изделие сложной формы, с необработанными, неосыпающимися краями. Простыня снабжена вырезом с адгезивной (липкой) лентой по краю и встроенным перинеальным покрытием.
- 10.1.23 *Простыня большая операционная с отверстием: тип А (с липким краем)* представляет собой изделие прямоугольной формы, с необработанными, неосыпающимися краями. Дополнительно простыня снабжена отверстием с адгезивным (липким) слоем по краю.
- 10.1.24 *Простыня большая операционная с отверстием: тип В (с липким краем, со сборным карманом)* представляет собой изделие прямоугольной формы, с необработанными, неосыпающимися краями. Простыня снабжена отверстием с адгезивным (липким) слоем по краю и сборным карманом.
- 10.1.25 *Простыня большая операционная с отверстием: тип С (с липким краем, со сборным карманом, со встроенным покрытием для ног)* представляет собой изделие сложной формы, с необработанными, неосыпающимися краями. Простыня снабжена отверстием с адгезивной (липкой) лентой по краю, сборным карманом, встроенным покрытием для ног.
- 10.1.26 *Простыня большая операционная с отверстием: тип D (с липким краем, со встроенным экраном)* представляет собой изделие сложной формы, с необработанными, неосыпающимися краями. Простыня снабжена отверстием с адгезивной (липкой) лентой по краю и встроенным экраном.
- 10.1.27 *Простыня большая операционная с отверстием: тип Е (с липким краем, с боковыми карманами, со встроенным покрытием для ног)* представляет собой изделие сложной формы, с необработанными, неосыпающимися краями. Простыня снабжена отверстием с адгезивной (липкой) лентой по краю, боковыми карманами, встроенным покрытием для ног.

10.1.28 *Простыня большая операционная с отверстием: тип F (с липким краем, с боковыми карманами, со встроеным экраном)* представляет собой изделие сложной формы, с необработанными, неосыпающимися краями. Простыня снабжена отверстием с адгезивной (липкой) лентой по краю, боковыми карманами, встроенным экраном.

10.1.29 *Простыня большая операционная с отверстием: тип G (с липким краем, со встроенным покрытием для ног)* представляет собой изделие сложной формы, с необработанными, неосыпающимися краями. Простыня снабжена отверстием с адгезивной (липкой) лентой по краю, встроенным покрытием для ног.

10.1.30 *Простыня большая операционная с отверстием: тип H (с липким краем, со встроенным покрытием для ног, со встроенным экраном)* представляет собой изделие сложной формы, с необработанными, неосыпающимися краями. Простыня снабжена отверстием с адгезивной (липкой) лентой по краю, встроенным покрытием для ног, встроенным экраном.

10.1.31 *Простыня большая операционная с отверстием: тип K (с липким краем, с боковыми вырезами)* представляет собой изделие сложной формы, с необработанными, неосыпающимися краями. Простыня снабжена отверстием с адгезивной (липкой) лентой по краю, боковыми вырезами.

10.1.32 *Простыня большая операционная с отверстием: тип L (с липким краем, с прозрачной вставкой)* представляет собой изделие прямоугольной формы, с необработанными, неосыпающимися краями. Простыня снабжена отверстием с адгезивным (липким) слоем по краю и прозрачной вставкой.

10.1.33 *Простыня большая операционная с эластичным отверстием* представляет собой изделие прямоугольной формы, с необработанными, неосыпающимися краями. Дополнительно простыня снабжена эластичным отверстием.

10.1.34 *Простыня большая операционная с эластичным отверстием, со сборным карманом* представляет собой изделие прямоугольной формы, с необработанными, неосыпающимися краями. Дополнительно простыня снабжена эластичным отверстием и сборным карманом.

10.1.35 *Карман-приемник (с липким краем)* представляет собой изделие прямоугольной формы, с необработанными краями, фиксирующееся при помощи адгезивного (липкого) края.

10.1.36 *Фиксирующая лента* представляет собой изделие прямоугольной формы, цельнокроеное, с необработанными краями. С одной стороны ленты нанесен адгезивный (липкий) слой.

10.2 Основные линейные размеры изделий, входящие в состав комплектов, приведены в Приложении №1 настоящей инструкции.

10.3 Общий вид изделий, входящих в состав комплектов, приведен в Приложении №2 настоящей инструкции.

10.4 Материалы, применяемые при изготовлении медицинского изделия, приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование материалов                                                  | Наименование изделий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1. Нетканый материал HiGown (Вуидениалп)                                 | 1. Шапочки: тип А («Берет»), тип В («Шарлотта»), тип С («Колпак-Стандарт»), тип D («Колпак-Евростандарт»), тип Е («Шапочка на завязках»)<br>2. Рубашка хирургическая                                                                                                                                                                          |
| 2. СМС (полимерное нетканое полотно типа «спанбонд-мельтблаун-спанбонд») | <i>Аналогично п. 1 и</i><br>1. Халаты хирургические: тип А («Стандарт»), тип В («Евростандарт»), тип С («Комбинированный»)<br>2. Сорочка хирургическая<br>3. Чехол для эндоскопической камеры;<br>4. Чехол для инструментального стола<br>5. Маска медицинская (на резинках)<br>6. Карман – приемник (с липким краем)<br>7. Фиксирующая лента |

| 1                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        | 8. Все простыни большие операционные<br>9. Простыня малая операционная<br>10. Бахилы хирургические: тип А (высокие (с двойной подошвой))                                                                                                                                                                                                     |
| 3. Спанлейс (материал нетканый Спанлейс)                                               | 1. Рубашка хирургическая;<br>2. Шапочка: тип Е («Шапочка на завязках»)                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4. Айрлайд (материал нетканый Айрлайд)                                                 | 1. Шапочки: тип D («Колпак-Евростандарт»), тип Е («Шапочка на завязках»)<br>2. Сорочка хирургическая<br>3. Рубашка хирургическая<br>4. Конверт хирургический                                                                                                                                                                                 |
| 5. Акваспан (материал нетканый Акваспан)                                               | 1. Бахилы хирургические: тип А (высокие (с двойной подошвой)), тип В (низкие), тип С («Леггинсы»)<br>2. Сорочка хирургическая<br>3. Рубашка хирургическая<br>4. Шапочки: тип С («Колпак-Стандарт»), тип D («Колпак-Евростандарт»)                                                                                                            |
| 6. Ламинированный Спанбонд (полимерное нетканое полотно типа Спанбонд, ламинированное) | 1. Халаты хирургические: тип А («Стандарт»), тип В («Евростандарт»), тип С («Комбинированный»)<br>2. Бахилы хирургические: тип А (высокие (с двойной подошвой)), тип В (низкие), тип С («Леггинсы»)<br>3. Чехол для эндоскопической камеры<br>4. Фиксирующая лента<br>5. Все простыни большие операционные<br>6. Простыня малая операционная |
| 7. Спанбонд (полимерное нетканое полотно типа Спанбонд)                                | <i>Аналогично п.1 и</i><br>1. Маска хирургическая (на резинках)<br>2. Сорочка хирургическая<br>3. Конверт хирургический<br>4. Бахилы хирургические: тип А (высокие (с двойной подошвой))                                                                                                                                                     |
| 8. Медикейс (нетканый материал Медикейс)                                               | 1.Бахилы хирургические: тип А (высокие (с двойной подошвой)), тип В (низкие), тип С («Леггинсы»)<br>2.Фиксирующая лента                                                                                                                                                                                                                      |
| 9. Пленка из полиэтилена высокого давления                                             | 1. Чехол для эндоскопической камеры<br>2. Карман – приемник (с липким краем)<br>3. Все простыни большие операционные, в состав которых входит сборный карман, прозрачные вставки<br>4. Халат хирургический: тип С («Комбинированный»)                                                                                                        |
| 10.Пленка из полиэтилена низкого давления                                              | 1.Бахилы хирургические: тип В (низкие)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11.Самоклеющаяся лента                                                                 | 1. Фиксирующая лента<br>2. Карман – приемник (с липким краем)<br>3. Все простыни большие операционные с липким краем                                                                                                                                                                                                                         |
| 12.Эластичная пленка                                                                   | 1. Простыня большая операционная: тип А (с эластичным отверстием), тип Б (с эластичным отверстием, со сборным карманом)                                                                                                                                                                                                                      |
| 13.Резинка вязаная                                                                     | <i>Фиксирующий элемент (резинка):</i><br>1.Шапочки: тип А («Берет»), тип В («Шарлотта»)<br>2.Бахилы хирургические: тип А (высокие (с двойной подошвой)), тип В (низкие)                                                                                                                                                                      |

окончание таблицы 1

| 1                                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | 3. Маска хирургическая (на резинках)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14. Полотно трикотажное вязаное         | Фиксирующий элемент (манжет):<br>1. Халаты хирургические: тип А («Стандарт»), тип В («Евростандарт»), тип С («Комбинированный»)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15. Застежка текстильная типа «Контакт» | Фиксирующий элемент (липучка):<br>1. Халаты хирургические: тип В «Евростандарт»), тип С («Комбинированный»)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16. Нитки швейные синтетические         | 1. Сорочка хирургическая<br>2. Рубашка хирургическая<br>3. Халаты хирургические: тип А («Стандарт»), тип В «Евростандарт»), тип С («Комбинированный»)<br>4. Шапочки: тип А («Берет»), тип В («Шарлотта»), тип С («Колпак-Стандарт»), тип D («Колпак-Евростандарт»), тип E («Шапочка на завязках»)<br>5. Бахилы хирургические: тип А (высокие (с двойной подошвой)), тип В (низкие), тип С («Леггинсы»)<br>6. Конверт хирургический<br>Чехол для эндоскопической камеры<br>8. Чехол для инструментального стола<br>9. Карман-приемник |
| 17. Клип-лента                          | Носовой фиксатор (наносник):<br>1. Маска хирургическая (на резинках)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

10.5 Требования к материалам, применяемых при производстве изделий, должны соответствовать параметрам таблицы 2

Таблица 2

| Наименование материала                                                             | Поверх-<br>ностная<br>плотность<br>г/м <sup>2</sup> /мкм,<br>не менее | Разрывная нагрузка, Н (кгс) не менее |                             |                             |                             | Водоупор<br>ность мм<br>вд.ст. не<br>менее |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                    |                                                                       | В сухом состоянии                    |                             | Во влажном состоянии        |                             |                                            |
|                                                                                    |                                                                       | В продольном<br>направлении          | В поперечном<br>направлении | В продольном<br>направлении | В поперечном<br>направлении |                                            |
| 1                                                                                  | 2                                                                     | 3                                    | 4                           | 5                           | 6                           | 7                                          |
| 1. Нетканый материал<br>HiGown (Вунденпалп)                                        | 50,0                                                                  | 58,8 (6,0)                           | 44,1 (4,5)                  | 53,9 (5,5)                  | 39,2 (4,0)                  | -                                          |
|                                                                                    | 65,0                                                                  | 58,8 (6,0)                           | 44,1 (4,5)                  | 53,9 (5,5)                  | 39,2 (4,0)                  | -                                          |
|                                                                                    | 75,0                                                                  | 58,8 (6,0)                           | 44,1 (4,5)                  | 53,9 (5,5)                  | 39,2 (4,0)                  | -                                          |
| 2. Неламинированный<br>нетканый материал<br>(Спанбонд, СМС,<br>Спанлейс, Акваспан) | 17,0                                                                  | 19,6 (2,0)                           | 14,7 (1,5)                  | 17,6 (1,8)                  | 11,8 (1,2)                  | -                                          |
|                                                                                    | 20,0                                                                  | 29,4 (3,0)                           | 19,6 (2,0)                  | 24,5 (2,5)                  | 17,6 (1,8)                  | -                                          |
|                                                                                    | 25,0                                                                  | 34,3 (3,5)                           | 19,6 (2,0)                  | 29,4 (3,0)                  | 17,6 (1,8)                  | -                                          |
|                                                                                    | 30,0                                                                  | 39,2 (4,0)                           | 24,5 (2,5)                  | 34,3 (3,5)                  | 19,6 (2,0)                  | -                                          |
|                                                                                    | 35,0                                                                  | 39,2 (4,0)                           | 24,5 (2,5)                  | 34,3 (3,5)                  | 19,6 (2,0)                  | -                                          |
|                                                                                    | 40,0                                                                  | 44,1 (4,5)                           | 29,4 (3,0)                  | 39,2 (4,0)                  | 24,5 (2,5)                  | -                                          |
|                                                                                    | 45,0                                                                  | 44,1 (4,5)                           | 29,4 (3,0)                  | 39,2 (4,0)                  | 24,5 (2,5)                  | -                                          |
|                                                                                    | 50,0                                                                  | 49,0 (5,0)                           | 34,3 (3,5)                  | 44,1 (4,5)                  | 29,4 (3,0)                  | -                                          |
|                                                                                    | 55,0                                                                  | 49,0 (5,0)                           | 34,3 (3,5)                  | 44,1 (4,5)                  | 29,4 (3,0)                  | -                                          |
|                                                                                    | 60,0                                                                  | 53,9 (5,5)                           | 39,2 (4,0)                  | 49,0 (5,0)                  | 34,3 (3,5)                  | -                                          |
|                                                                                    | 70,0                                                                  | 53,9 (5,5)                           | 39,2 (4,0)                  | 49,0 (5,0)                  | 34,3 (3,5)                  | -                                          |



краем, с боковыми карманами, со встроенным экраном), тип G (с липким краем, со встроенным покрытием для ног), тип H (с липким краем, со встроенным покрытием для ног, со встроенным экраном), тип K (с липким краем, с боковыми вырезами), тип L (с липким краем, с прозрачной вставкой); простыня большая операционная с эластичным отверстием; простыня большая операционная с эластичным отверстием, со сборным карманом) должен обеспечивать:

- уровень микробной проницаемости в сухом состоянии не более 300 CFU менее критической зоны изделия (наименее критической зоны изделия, вовлечённой в процесс переноса возбудителей инфекционных заболеваний в рану или оттуда);
- уровень микробной проницаемости во влажном состоянии  $\geq 2,8$  ВІ для критической зоны изделия (области изделия, с наибольшей вероятностью вовлекаемой в перенос возбудителей инфекционных заболеваний в рану или из раны);
- микробную чистоту не более 300 CFU/дм<sup>2</sup> как для критической зоны изделия, так и для менее критической зоны;
- чистоту в части инородных частиц  $< 3,5$  IPM как для критической зоны изделия, так и для менее критической зоны;
- прочность на растяжение в сухом состоянии  $> 15$  Н;
- прочность на растяжение во влажном состоянии  $\geq 15$  Н.

## **11 ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Изделия имеют полностью законченную конструкцию и не требуют в процессе эксплуатации каких-либо вмешательств по техническому обслуживанию и ремонту.

## **12 ТРЕБОВАНИЯ К СТЕРИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Изделия выпускаются стерильными. Способы стерилизации:

- радиационный;
- газовый (оксидом этилена).

## **13 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ**

13.1 Условия транспортирования - по условиям хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.

13.2 Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей, при температуре от  $+5^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$ .

13.3 Хранить отдельно от веществ, выделяющих пары с резким запахом и неприятным вкусом, или в таре, защищенной от этих паров.

13.4 Хранить в местах недоступных для детей.

## **14 ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

14.1 Использованные изделия относятся к отходам класса Б по СанПиН 2.1.7.2790.

14.2 Использованные изделия утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

14.3 Изделия, неиспользованные по прямому назначению по причине окончания срока годности или других причин, относятся к классу А по СанПиН 2.1.7.2790 и утилизируются как бытовые отходы.

## **15 СРОК СЛУЖБЫ (ГОДНОСТИ) И УКАЗАНИЕ НА ЗАПРЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА СЛУЖБЫ (ГОДНОСТИ)**

15.1 Гарантийный срок годности изделия – 5 лет с даты стерилизации.

15.2 Использовать изделия после окончания срока годности – запрещено.

## **16 ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Изделия имеют полностью законченную конструкцию и не требуют в процессе эксплуатации каких-либо вмешательств по техническому обслуживанию и ремонту.

## **17 ОРГАНИЗАЦИЯ-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, ГАРАНТИИ**

17.1 Производитель: ООО «Медицина – Айрлайд», Россия, 456578, Челябинская область, Еманжелинский р-н, рп Зауральский, ул.Нефтебазы, д.3а (адрес места производства: Россия, 456578, Челябинская обл, Еманжелинский р-н, рп Зауральский, ул Труда, 1 а).

17.2 Производитель гарантирует соответствие медицинского изделия требованиям ТУ 9398–002–51474515–2016 (технические характеристики, линейные размеры, стерильность), в течение всего срока годности медицинского изделия, при соблюдений условий хранения и транспортирования.

17.3 Уполномоченный представитель организации-производителя – отсутствует.

17.4 Претензии по поводу качества медицинского изделия направляются в ООО «Медицина-Айрлайд», Россия, 456578, Челябинская область, Еманжелинский р-н, рп Зауральский, ул.Нефтебазы, д.3а. Телефон/факс: +7 (351) 211-03-00. Адрес электронной почты: [airlaid\\_medica@mail.ru](mailto:airlaid_medica@mail.ru).

**«Комплекты общехирургические одноразовые стерильные», в составе:****I. Комплект общехирургический одноразовый стерильный №1:**

1. Халат хирургический: тип А («Стандарт») (размеры: 44, 48, 52, 56) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия
2. Халат хирургический: тип В («Евростандарт») (размеры: 44, 48, 52, 56) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия
3. Халат хирургический: тип С («Комбинированный») (размеры: 44, 48, 52, 56) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия
4. Шапочка: тип А («Берет») (диаметр не менее 50 см) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия
5. Шапочка: тип В («Шарлотта») (диаметр не менее 50 см) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия
6. Шапочка: тип С («Колпак-Стандарт») (высота х длина тульи, см: 16х58, 20х58, 26х58) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия
7. Шапочка: тип D («Колпак-Евростандарт») (высота х длина тульи, см: 16х58, 20х58, 26х58) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия
8. Шапочка: тип Е («Шапочка на завязках») (высота х длина окружности, см: 12х21) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия
9. Бахилы хирургические: тип А (высокие (с двойной подошвой)) (высота х длина ступни, см: 25х25, 40х31, 50х38, 50х40) – 1 пара, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия
10. Бахилы хирургические: тип В (низкие) (высота х длина ступни, см: 10х13, 13х36, 15х39, 16х39, 20х40, 25х40) – 1 пара, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия
11. Бахилы хирургические: тип С («Леггинсы») (высота х ширина, см: 90х35, 100х80, 110х50, 120х35, 120х50) – 1 пара, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия
12. Сорочка хирургическая (размеры: 44, 48, 52, 56) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия
13. Рубашка хирургическая (размеры: 18, 19) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия
14. Карман-приемник (с липким краем) (длина х ширина, см: 30х40, 30х50, 40х60 см) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия
15. Фиксирующая лента (длина х ширина, см: 50х5, 50х10, 100х5, 100х10) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия
16. Маска хирургическая (на резинках) (длина х ширина, см: 17,5х10,0) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия
17. Конверт хирургический (длина х ширина, см: 50х30, 60х40, 80х60) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия
18. Чехол для эндоскопической камеры (длина х ширина, см: 100х10, 150х13, 200х13, 200х15, 250х20) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия
19. Чехол для инструментального стола (длина х ширина, см: 140х80, 145х80) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия
20. Простыня малая операционная (длина х ширина, см: 20х20, 33х33, 40х30, 60х40, 60х60, 90х60, 90х90, 100х70) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия
21. Простыня большая операционная (ширина х длина, см: 70х100, 80х140, 180х180, 150х190, 140х200, 180х240) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия
22. Простыня большая операционная с липким краем (ширина х длина, см: 70х100, 80х140, 180х180, 150х190, 140х200, 180х240) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия
23. Простыня большая операционная с карманом (длина х ширина, см: 100х70, 140х80, 180х180, 190х150, 200х140, 240х180) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия
24. Простыня большая операционная с вырезом: тип А (с липким краем) (длина х ширина, см: 140х110, 180х150, 240х150, 240х180, 240х240, 250х200, 260х200, 270х260, 360х230) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

25. Простыня большая операционная с вырезом: тип В (с липким краем, с перинеальным покрытием) (длина х ширина, см: 140х110, 180х150, 240х150, 240х180, 240х240, 250х200, 260х200, 270х260, 360х230) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

26. Простыня большая операционная с отверстием: тип А (с липким краем) (длина х ширина, см: 210х140, 240х150, 240х200, 240х240, 300х140, 300х180, 310х260, 320х260, 330х235) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

27. Простыня большая операционная с отверстием: тип В (с липким краем, со сборным карманом) (длина х ширина, см: 210х140, 240х150, 240х200, 240х240, 300х140, 300х180, 310х260, 320х260, 330х235) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

28. Простыня большая операционная с отверстием: тип С (с липким краем, со сборным карманом, со встроенным покрытием для ног) (длина х ширина, см: 210х140, 240х150, 240х200, 240х240, 300х140, 300х180, 310х260, 320х260, 330х235) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

29. Простыня большая операционная с отверстием: тип D (с липким краем, со встроенным экраном) (длина х ширина, см: 210х140, 240х150, 240х200, 240х240, 300х140, 300х180, 310х260, 320х260, 330х235) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

30. Простыня большая операционная с отверстием: тип Е (с липким краем, с боковыми карманами, со встроенным покрытием для ног) (длина х ширина, см: 320х200, 340х200) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

31. Простыня большая операционная с отверстием: тип F (с липким краем, с боковыми карманами, со встроенным экраном) (длина х ширина, см: 320х200, 340х200) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

32. Простыня большая операционная с отверстием: тип G (с липким краем, со встроенным покрытием для ног) (длина х ширина, см: 210х140, 240х150, 240х200, 240х240, 300х140, 300х180, 310х260, 320х260, 330х235) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

33. Простыня большая операционная с отверстием: тип H (с липким краем, со встроенным покрытием для ног, со встроенным экраном) (длина х ширина, см: 210х140, 240х150, 240х200, 240х240, 300х140, 300х180, 310х260, 320х260, 330х235) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

34. Простыня большая операционная с отверстием: тип К (с липким краем, с боковыми вырезами) (длина х ширина, см: 140х75, 180х75, 190х150, 200х70, 240х180) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

35. Простыня большая операционная с отверстием: тип L (с липким краем, с прозрачной вставкой) (длина х ширина, см: 190х150, 300х180, 340х180, 380х210, 400х190, 420х230) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

36. Простыня большая операционная с эластичным отверстием (длина х ширина, см: 200х150, 240х240, 280х230, 300х240, 320х230, 350х230, 360х270) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

37. Простыня большая операционная с эластичным отверстием, со сборным карманом (длина х ширина, см: 200х150, 240х240, 280х230, 300х240, 320х230, 350х230, 360х270) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

## **II. Комплект общехирургический одноразовый стерильный №2:**

1. Простыня большая операционная с отверстием: тип В (с липким краем, со сборным карманом) (длина х ширина, см: 210х140, 240х150, 240х200, 240х240, 300х140, 300х180, 310х260, 320х260, 330х235) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

2. Чехол для инструментального стола (длина х ширина, см: 140х80, 145х80) – не более 2 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

3. Простыня большая операционная (ширина х длина, см: 70х100, 80х140, 180х180, 150х190, 140х200, 180х240) – не более 2 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

4. Простыня малая операционная (длина х ширина, см: 20х20, 33х33, 40х30, 60х40, 60х60, 90х60, 90х90, 100х70) – не более 10 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

5. Фиксирующая лента (длина х ширина, см: 50х5, 50х10, 100х5, 100х10) – не более 4 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

### **III. Комплект общехирургический одноразовый стерильный №3:**

1. Шапочка: тип А («Берет») (диаметр не менее 50 см) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия
2. Сорочка хирургическая (размеры: 44, 48, 52, 56) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия
3. Бахилы хирургические: тип В (низкие) (высота х длина ступни, см: 10х13, 13х36, 15х39, 16х39, 20х40, 25х40) – 1 пара, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия
4. Простыня большая операционная (ширина х длина, см: 70х100, 80х140, 180х180, 150х190, 140х200, 180х240) – не более 3 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия
5. Простыня малая операционная (длина х ширина, см: 20х20, 33х33, 40х30, 60х40, 60х60, 90х60, 90х90, 100х70) – не более 10 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

### **IV. Комплект общехирургический одноразовый стерильный №4, в составе:**

1. Конверт хирургический (длина х ширина, см: 50х30, 60х40, 80х60) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия
2. Бахилы хирургические: тип В (низкие) (высота х длина ступни, см: 10х13, 13х36, 15х39, 16х39, 20х40, 25х40) – 1 пара, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия
3. Шапочка: тип Е («Шапочка на завязках») (высота х длина окружности, см: 12х21) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия
4. Рубашка хирургическая (размеры: 18, 19) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия
5. Простыня большая операционная (ширина х длина, см: 70х100, 80х140, 180х180, 150х190, 140х200, 180х240) – не более 2 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия
6. Простыня малая операционная (длина х ширина, см: 20х20, 33х33, 40х30, 60х40, 60х60, 90х60, 90х90, 100х70) – не более 10 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

### **V. Комплект общехирургический одноразовый стерильный №5:**

1. Сорочка хирургическая (размеры: 44, 48, 52, 56) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия
2. Шапочка: тип В («Шарлотта») (диаметр не менее 50 см) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия
3. Бахилы хирургические: тип А (высокие (с двойной подошвой)) (высота х длина ступни, см: 25х25, 40х31, 50х38, 50х40) – 1 пара, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия
4. Простыня большая операционная (ширина х длина, см: 70х100, 80х140, 180х180, 150х190, 140х200, 180х240) – не более 2 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия
5. Простыня малая операционная (длина х ширина, см: 20х20, 33х33, 40х30, 60х40, 60х60, 90х60, 90х90, 100х70) – не более 10 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия
6. Простыня большая операционная с карманом (длина х ширина, см: 100х70, 140х80, 180х180, 190х150, 200х140, 240х180) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

### **VI. Комплект общехирургический одноразовый стерильный №6:**

1. Чехол для инструментального стола (длина х ширина, см: 140х80, 145х80) – не более 2 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия
2. Простыня большая операционная (ширина х длина, см: 70х100, 80х140, 180х180, 150х190, 140х200, 180х240) – не более 2 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия
3. Простыня большая операционная с липким краем (ширина х длина, см: 70х100, 80х140, 180х180, 150х190, 140х200, 180х240) – не более 4 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия
4. Простыня малая операционная (длина х ширина, см: 20х20, 33х33, 40х30, 60х40, 60х60, 90х60, 90х90, 100х70) – не более 10 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия
5. Фиксирующая лента (длина х ширина, см: 50х5, 50х10, 100х5, 100х10) – не более 4 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

### **VII. Комплект общехирургический одноразовый стерильный №7:**

1. Чехол для инструментального стола (длина х ширина, см: 140х80, 145х80) – не более 2 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия
2. Карман-приемник (с липким краем) (длина х ширина, см: 30х40, 30х50, 40х60 см) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

### **VIII.Комплект общехирургический одноразовый стерильный №8:**

1. Чехол для инструментального стола (длина х ширина, см: 140х80, 145х80) – не более 2 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия
2. Простыня большая операционная (ширина х длина, см: 70х100, 80х140, 180х180, 150х190, 140х200, 180х240) – не более 2 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия
3. Простыня большая операционная с отверстием: тип D (с липким краем, со встроенным экраном) (длина х ширина, см: 210х140, 240х150, 240х200, 240х240, 300х140, 300х180, 310х260, 320х260, 330х235) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия
4. Фиксирующая лента (длина х ширина, см: 50х5, 50х10, 100х5, 100х10) – не более 4 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия
5. Простыня малая операционная (длина х ширина, см: 20х20, 33х33, 40х30, 60х40, 60х60, 90х60, 90х90, 100х70) – не более 10 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

### **IX. Комплект общехирургический одноразовый стерильный №9:**

1. Простыня большая операционная с отверстием: тип E (с липким краем, с боковыми карманами, со встроенным покрытием для ног) (длина х ширина, см: 320х200, 340х200) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия
2. Чехол для инструментального стола (длина х ширина, см: 140х80, 145х80) – не более 2 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия
3. Простыня большая операционная (ширина х длина, см: 70х100, 80х140, 180х180, 150х190, 140х200, 180х240) – не более 2 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия
4. Простыня малая операционная (длина х ширина, см: 20х20, 33х33, 40х30, 60х40, 60х60, 90х60, 90х90, 100х70) – не более 4 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

### **X. Комплект общехирургический одноразовый стерильный №10:**

1. Простыня большая операционная с отверстием: тип A (с липким краем) (длина х ширина, см: 210х140, 240х150, 240х200, 240х240, 300х140, 300х180, 310х260, 320х260, 330х235) - 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия
2. Простыня большая операционная с липким краем (ширина х длина, см: 70х100, 80х140, 180х180, 150х190, 140х200, 180х240) – не более 2 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

3. Простыня большая операционная (ширина х длина, см: 70х100, 80х140, 180х180, 150х190, 140х200, 180х240) – не более 3 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

### **XI. Комплект общехирургический одноразовый стерильный №11:**

1. Простыня большая операционная (ширина х длина, см: 70х100, 80х140, 180х180, 150х190, 140х200, 180х240) – не более 2 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия
2. Чехол для инструментального стола (длина х ширина, см: 140х80, 145х80) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия
3. Простыня большая операционная с отверстием: тип H (с липким краем, со встроенным покрытием для ног, со встроенным экраном) (длина х ширина, см: 210х140, 240х150, 240х200, 240х240, 300х140, 300х180, 310х260, 320х260, 330х235) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

4. Фиксирующая лента (длина х ширина, см: 50х5, 50х10, 100х5, 100х10) – не более 2 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

5. Простыня малая операционная (длина х ширина, см: 20х20, 33х33, 40х30, 60х40, 60х60, 90х60, 90х90, 100х70) – не более 10 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

### **XII.Комплект общехирургический одноразовый стерильный №12:**

1. Простыня большая операционная с отверстием: тип A (с липким краем) (длина х ширина, см: 210х140, 240х150, 240х200, 240х240, 300х140, 300х180, 310х260, 320х260, 330х235) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

2. Простыня большая операционная с липким краем (ширина х длина, см: 70х100, 80х140, 180х180, 150х190, 140х200, 180х240) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

3. Простыня большая операционная (ширина х длина, см: 70х100, 80х140, 180х180, 150х190, 140х200, 180х240) – не более 2 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

4. Простыня малая операционная (длина х ширина, см: 20х20, 33х33, 40х30, 60х40, 60х60, 90х60, 90х90, 100х70) – не более 10 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

### **XIII.Комплект общехирургический одноразовый стерильный №13:**

1. Простыня малая операционная (длина х ширина, см: 20х20, 33х33, 40х30, 60х40, 60х60, 90х60, 90х90, 100х70) – не более 10 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия
2. Маска хирургическая (на резинках) (длина х ширина, см: 17,5х10,0) – не более 3 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

### **XIV.Комплект общехирургический одноразовый стерильный №14:**

1. Простыня малая операционная (длина х ширина, см: 20х20, 33х33, 40х30, 60х40, 60х60, 90х60, 90х90, 100х70) – не более 6 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия
2. Простыня большая операционная (ширина х длина, см: 70х100, 80х140, 180х180, 150х190, 140х200, 180х240) - 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия
3. Простыня большая операционная с липким краем (ширина х длина, см: 70х100, 80х140, 180х180, 150х190, 140х200, 180х240) - 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия
4. Простыня большая операционная с вырезом: тип А (с липким краем) (длина х ширина, см: 140х110, 180х150, 240х150, 240х180, 240х240, 250х200, 260х200, 270х260, 360х230) - 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

### **XV.Комплект общехирургический одноразовый стерильный №15:**

1. Простыня большая операционная с отверстием: тип В (с липким краем, со сборным карманом) (длина х ширина, см: 210х140, 240х150, 240х200, 240х240, 300х140, 300х180, 310х260, 320х260, 330х235) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия
2. Простыня большая операционная (ширина х длина, см: 70х100, 80х140, 180х180, 150х190, 140х200, 180х240) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

### **XVI.Комплект общехирургический одноразовый стерильный №16:**

1. Простыня большая операционная (ширина х длина, см: 70х100, 80х140, 180х180, 150х190, 140х200, 180х240) – не более 2 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия
2. Чехол для инструментального стола (длина х ширина, см: 140х80, 145х80) – не более 2 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия
3. Простыня большая операционная с отверстием: тип С (с липким краем, со сборным карманом, со встроенным покрытием для ног) (длина х ширина, см: 210х140, 240х150, 240х200, 240х240, 300х140, 300х180, 310х260, 320х260, 330х235) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия
4. Простыня большая операционная с липким краем (ширина х длина, см: 70х100, 80х140, 180х180, 150х190, 140х200, 180х240) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия
5. Фиксирующая лента (длина х ширина, см: 50х5, 50х10, 100х5, 100х10) – не более 4 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия
6. Простыня малая операционная (длина х ширина, см: 20х20, 33х33, 40х30, 60х40, 60х60, 90х60, 90х90, 100х70) – не более 10 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

### **XVII. Комплект общехирургический одноразовый стерильный №17:**

1. Простыня малая операционная (длина х ширина, см: 20х20, 33х33, 40х30, 60х40, 60х60, 90х60, 90х90, 100х70) – не более 4 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия
2. Простыня большая операционная (ширина х длина, см: 70х100, 80х140, 180х180, 150х190, 140х200, 180х240) – не более 2 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия
3. Простыня большая операционная с отверстием: тип К (с липким краем, с боковыми вырезами) (длина х ширина, см: 140х75, 180х75, 190х150, 200х70, 240х180) - 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия
4. Бахилы хирургические: тип С («Леггинсы») (высота х ширина, см: 90х35, 100х80, 110х50, 120х35, 120х50) – 1 пара, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия
5. Чехол для инструментального стола (длина х ширина, см: 140х80, 145х80) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

### **XVIII. Комплект общехирургический одноразовый стерильный №18:**

1. Простыня большая операционная (ширина х длина, см: 70х100, 80х140, 180х180, 150х190, 140х200, 180х240) – не более 2 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия
2. Простыня большая операционная с отверстием: тип G (с липким краем, со встроенным покрытием для ног) (длина х ширина, см: 210х140, 240х150, 240х200, 240х240, 300х140, 300х180, 310х260, 320х260, 330х235) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

3. Чехол для эндоскопической камеры (длина х ширина, см: 100х10, 150х13, 200х13, 200х15, 250х20) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

4. Чехол для инструментального стола (длина х ширина, см: 140х80, 145х80) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

5. Простыня малая операционная (длина х ширина, см: 20х20, 33х33, 40х30, 60х40, 60х60, 90х60, 90х90, 100х70) – не более 4 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

**XIX.Комплект общехирургический одноразовый стерильный №19:**

1. Простыня большая операционная (ширина х длина, см: 70х100, 80х140, 180х180, 150х190, 140х200, 180х240) – не более 2 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

2. Чехол для инструментального стола (длина х ширина, см: 140х80, 145х80) – не более 2 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

3. Простыня большая операционная с отверстием: тип С (с липким краем, со сборным карманом, со встроенным покрытием для ног) (длина х ширина, см: 210х140, 240х150, 240х200, 240х240, 300х140, 300х180, 310х260, 320х260, 330х235) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

4. Простыня малая операционная (длина х ширина, см: 20х20, 33х33, 40х30, 60х40, 60х60, 90х60, 90х90, 100х70) – не более 10 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

**XX.Комплект общехирургический одноразовый стерильный №20:**

1. Простыня большая операционная с отверстием: тип В (с липким краем, со сборным карманом) (длина х ширина, см: 210х140, 240х150, 240х200, 240х240, 300х140, 300х180, 310х260, 320х260, 330х235) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

2. Бахилы хирургические: тип С («Леггинсы») (высота х ширина, см: 90х35, 100х80, 110х50, 120х35, 120х50) – 1 пара, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

3. Простыня большая операционная (ширина х длина, см: 70х100, 80х140, 180х180, 150х190, 140х200, 180х240) – не более 2 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

**XXI. Комплект общехирургический одноразовый стерильный №21:**

1. Простыня большая операционная с отверстием: тип L (с липким краем, с прозрачной вставкой) (длина х ширина, см: 190х150, 300х180, 340х180, 380х210, 400х190, 420х230) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

2. Простыня большая операционная (ширина х длина, см: 70х100, 80х140, 180х180, 150х190, 140х200, 180х240) – не более 2 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

3. Простыня малая операционная (длина х ширина, см: 20х20, 33х33, 40х30, 60х40, 60х60, 90х60, 90х90, 100х70) – не более 6 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

**XXII. Комплект общехирургический одноразовый стерильный №22:**

1. Бахилы хирургические: тип А (высокие (с двойной подошвой)) (высота х длина ступни, см: 25х25, 40х31, 50х38, 50х40) – 1 пара, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

2. Простыня большая операционная (ширина х длина, см: 70х100, 80х140, 180х180, 150х190, 140х200, 180х240) – не более 2 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

3. Простыня большая операционная с вырезом: тип В (с липким краем, с перинеальным покрытием) (длина х ширина, см: 140х110, 180х150, 240х150, 240х180, 240х240, 250х200, 260х200, 270х260, 360х230) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

4. Простыня большая операционная с отверстием: тип F (с липким краем, с боковыми карманами, со встроенным экраном) (длина х ширина, см: 320х200, 340х200) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

5. Фиксирующая лента (длина х ширина, см: 50х5, 50х10, 100х5, 100х10) – не более 4 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

6. Чехол для инструментального стола (длина х ширина, см: 140х80, 145х80) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

7. Простыня малая операционная (длина х ширина, см: 20х20, 33х33, 40х30, 60х40, 60х60, 90х60, 90х90, 100х70) – не более 10 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

**XXIII. Комплект общехирургический одноразовый стерильный №23:**

1. Чехол для инструментального стола (длина х ширина, см: 140х80, 145х80) – не более 2 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

2. Простыня большая операционная (ширина х длина, см: 70х100, 80х140, 180х180, 150х190, 140х200, 180х240) – не более 2 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

3. Простыня большая операционная с эластичным отверстием (длина х ширина, см: 200х150, 240х240, 280х230, 300х240, 320х230, 350х230, 360х270) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

4. Бахилы хпругические: тип С («Леггинсы») (высота х ширина, см: 90х35, 100х80, 110х50, 120х35, 120х50) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

5. Фиксирующая лента (длина х ширина, см: 50х5, 50х10, 100х5, 100х10) – не более 4 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

6. Простыня малая операционная (длина х ширина, см: 20х20, 33х33, 40х30, 60х40, 60х60, 90х60, 90х90, 100х70) – не более 10 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

#### **XXIV. Комплект общехирургический одноразовый стерильный №24:**

1. Простыня большая операционная (ширина х длина, см: 70х100, 80х140, 180х180, 150х190, 140х200, 180х240) – не более 2 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

2. Чехол для инструментального стола (длина х ширина, см: 140х80, 145х80) – не более 2 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

3. Простыня большая операционная с эластичным отверстием, со сборным карманом (длина х ширина, см: 200х150, 240х240, 280х230, 300х240, 320х230, 350х230, 360х270) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

4. Фиксирующая лента (длина х ширина, см: 50х5, 50х10, 100х5, 100х10) – не более 3 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

5. Бахилы хпругические: тип С («Леггинсы») (высота х ширина, см: 90х35, 100х80, 110х50, 120х35, 120х50) – 1 пара, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

6. Простыня малая операционная (длина х ширина, см: 20х20, 33х33, 40х30, 60х40, 60х60, 90х60, 90х90, 100х70) – не более 10 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

7. Чехол для эндоскопической камеры (длина х ширина, см: 100х10, 150х13, 200х13, 200х15, 250х20) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

#### **XXV. Комплект общехирургический одноразовый стерильный №25:**

1. Простыня большая операционная (ширина х длина, см: 70х100, 80х140, 180х180, 150х190, 140х200, 180х240) – не более 4 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

2. Чехол для инструментального стола (длина х ширина, см: 140х80, 145х80) – не более 2 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

3. Простыня большая операционная с липким краем (ширина х длина, см: 70х100, 80х140, 180х180, 150х190, 140х200, 180х240) – не более 2 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

4. Простыня большая операционная с вырезом: тип А (с липким краем) (длина х ширина, см: 140х110, 180х150, 240х150, 240х180, 240х240, 250х200, 260х200, 270х260, 360х230) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

5. Бахилы хирургические: тип С («Леггинсы») (высота х ширина, см: 90х35, 100х80, 110х50, 120х35, 120х50) – 1 пара, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

6. Фиксирующая лента (длина х ширина, см: 50х5, 50х10, 100х5, 100х10) – не более 3 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

7. Простыня малая операционная (длина х ширина, см: 20х20, 33х33, 40х30, 60х40, 60х60, 90х60, 90х90, 100х70) – не более 10 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

#### **XXVI. Комплект общехирургический одноразовый стерильный №26:**

1. Простыня большая операционная (ширина х длина, см: 70х100, 80х140, 180х180, 150х190, 140х200, 180х240) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

2. Простыня малая операционная (длина х ширина, см: 20х20, 33х33, 40х30, 60х40, 60х60, 90х60, 90х90, 100х70) – не более 10 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

3. Простыня большая операционная с отверстием: тип А (с липким краем) (длина х ширина, см: 210х140, 240х150, 240х200, 240х240, 300х140, 300х180, 310х260, 320х260, 330х235) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

4. Чехол для инструментального стола (длина х ширина, см: 140х80, 145х80) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

#### **XXVII. Комплект общехирургический одноразовый стерильный №27:**

1. Простыня большая операционная (ширина х длина, см: 70х100, 80х140, 180х180, 150х190, 140х200, 180х240) – не более 2 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайд», Россия

2. Чехол для инструментального стола (длина х ширина, см: 140х80, 145х80) – не более 2 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайн», Россия

3. Простыня большая операционная с липким краем (ширина х длина, см: 70х100, 80х140, 180х180, 150х190, 140х200, 180х240) – не более 4 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайн», Россия

4. Простыня большая операционная с отверстием: тип В (с липким краем, со сборным карманом) (длина х ширина, см: 210х140, 240х150, 240х200, 240х240, 300х140, 300х180, 310х260, 320х260, 330х235) – 1 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайн», Россия

5. Фиксирующая лента (длина х ширина, см: 50х5, 50х10, 100х5, 100х10) – не более 6 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайн», Россия

6. Простыня малая операционная (длина х ширина, см: 20х20, 33х33, 40х30, 60х40, 60х60, 90х60, 90х90, 100х70) – не более 10 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайн», Россия

**XXVIII. Комплект общехирургический одноразовый стерильный №28, в составе:**

1. Халат хирургический: тип А («Стандарт») (размеры 44, 48, 52, 56) – не более 10 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайн», Россия

2. Простыня малая операционная (длина х ширина, см: 20х20, 33х33, 40х30, 60х40, 60х60, 90х60, 90х90, 100х70) – не более 10 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайн», Россия

**XXIX. Комплект общехирургический одноразовый стерильный №29:**

1. Маска хирургическая (на резинках) (длина х ширина, см: 17,5х10,0) – не более 10 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайн», Россия

2. Бахилы хирургические: тип А (высокие (с двойной подошвой)) (высота х длина ступни, см: 25х25, 40х31, 50х38, 50х40) – не более 10 пар, производства ООО «Медицина-Айрлайн», Россия

3. Халат хирургический: тип А («Стандарт») (размеры 44, 48, 52, 56) – не более 10 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайн», Россия

4. Шапочка: тип С («Колпак-Стандарт») (высота х длина тульи, см: 16х58, 20х58, 26х58) – не более 10 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайн», Россия

**XXX. Комплект общехирургический одноразовый стерильный №30:**

1. Халат хирургический: тип В («Евростандарт») (размеры 44, 48, 52, 56) – не более 10 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайн», Россия

2. Простыня малая операционная (длина х ширина, см: 20х20, 33х33, 40х30, 60х40, 60х60, 90х60, 90х90, 100х70) – не более 10 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайн», Россия.

**XXXI. Комплект общехирургический одноразовый стерильный №31:**

1. Халат хирургический: тип С («Комбинированный») (размеры 44, 48, 52, 56) – не более 10 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайн», Россия

2. Простыня малая операционная (длина х ширина, см: 20х20, 33х33, 40х30, 60х40, 60х60, 90х60, 90х90, 100х70) – не более 10 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайн», Россия

**XXXII. Комплект общехирургический одноразовый стерильный №32:**


1. Маска хирургическая (на резинках) (длина х ширина, см: 17,5х10,0) – не более 20 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайн», Россия

2. Бахилы хирургические: тип А (высокие (с двойной подошвой)) (высота х длина ступни, см: 25х25, 40х31, 50х38, 50х40) – не более 10 пар, производства ООО «Медицина-Айрлайн», Россия


3. Халат хирургический: тип А («Евростандарт») (размеры 44, 48, 52, 56) – не более 10 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайн», Россия

4. Шапочка: тип D («Колпак-Евростандарт») (высота х длина тульи, см: 16х58, 20х58, 26х58) – не более 10 шт, производства ООО «Медицина-Айрлайн», Россия

Общий вид изделий, входящих в состав комплектов

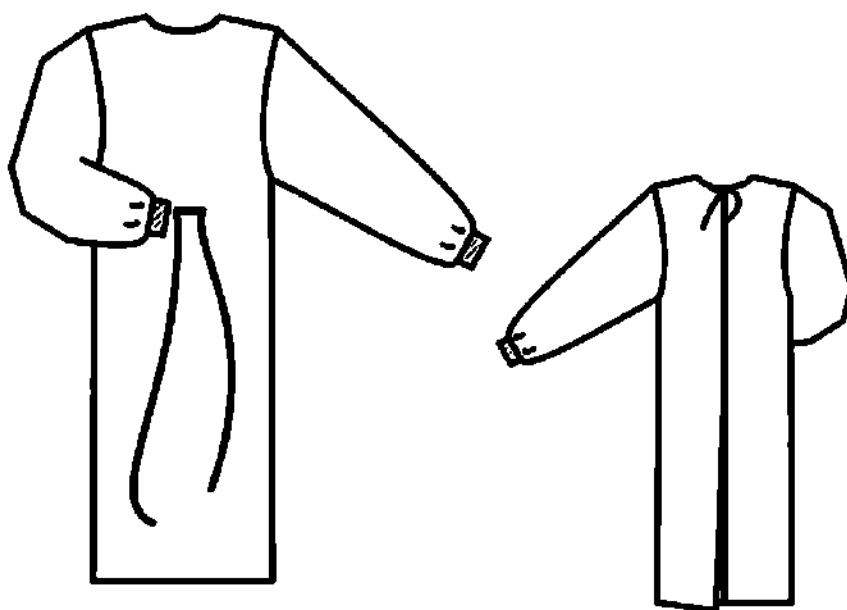

**Рисунок 1 - Халат хирургический: тип А («Стандарт»)**

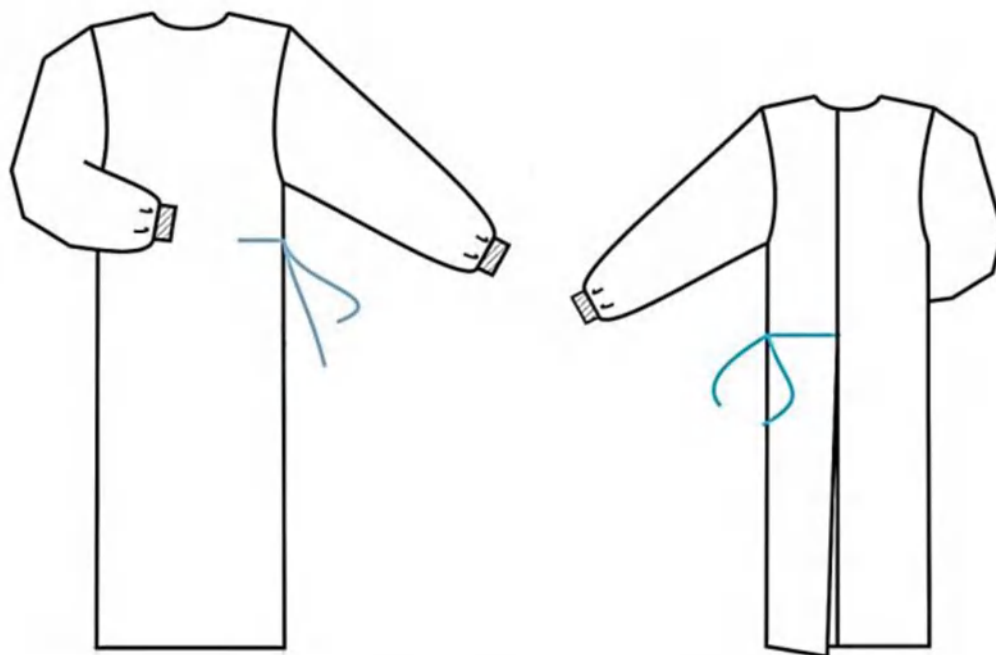

**Рисунок 2 - Халат хирургический: тип В («Евростандарт»)**

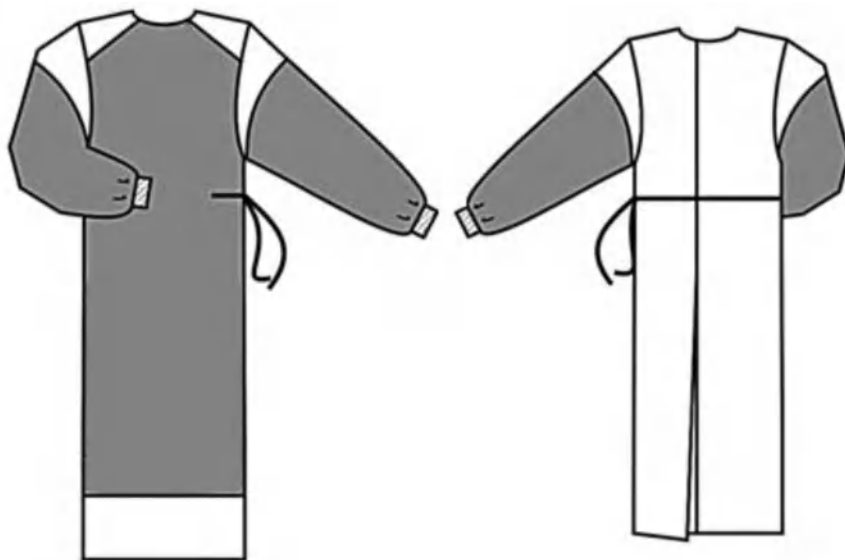


Рисунок 3- Халат хирургический: тип С («Комбинированный»)



Рисунок 4 – Шапочка: тип А («Берет»)



Рисунок 5 – Шапочка: тип В («Шарлотта»)

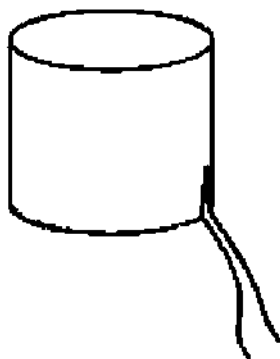


Рисунок 6 – Шапочка: тип С («Колпак-Стандарт»)

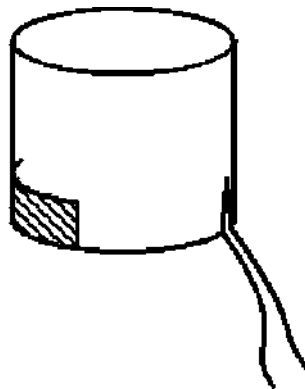


Рисунок 7 – Шапочка: тип D («Колпак-Евростандарт»)



Рисунок 8 – Шапочка: тип E («Шапочка на завязках»)

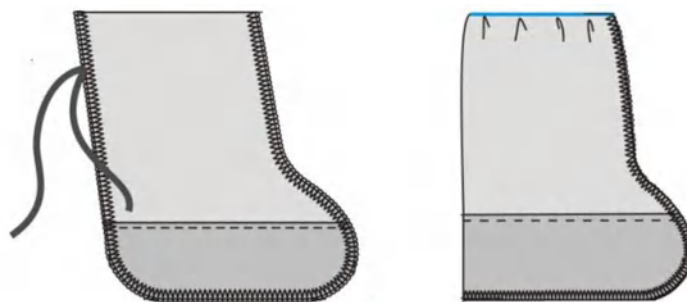


Рисунок 9 - Бахилы хирургические: тип A (высокие (с двойной подошвой))

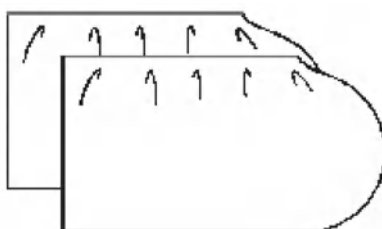


Рисунок 10 - Бахилы хирургические: тип B (низкие)

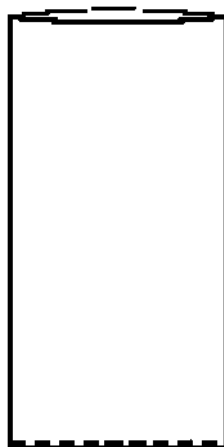


Рисунок 11 – Бахилы хирургические: тип С («Леггинсы»)

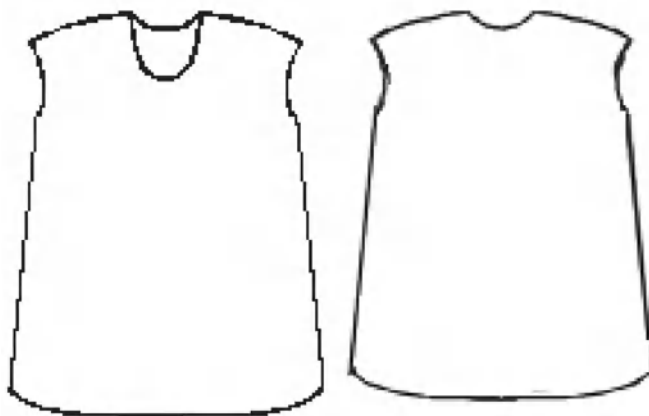


Рисунок 12 - Сорочка хирургическая

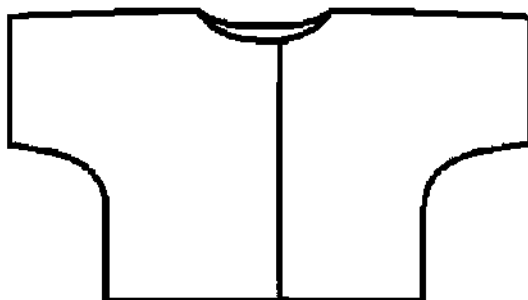


Рисунок 13 - Рубашка хирургическая

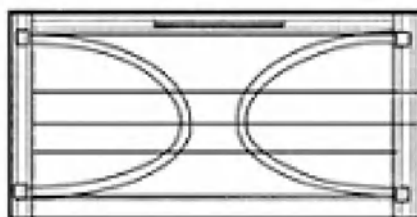


Рисунок 14 - Маска хирургическая (на резинках)



Рисунок 15 – Конверт хирургический

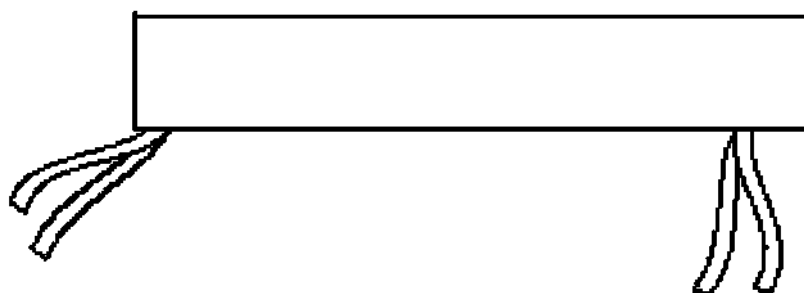


Рисунок 16 – Чехол для эндоскопической камеры

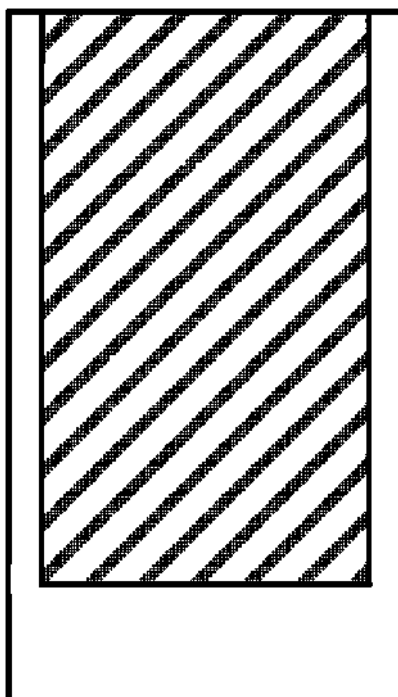


Рисунок 17 – Чехол для инструментального стола

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


Рисунок 18 - Простыня малая операционная



Рисунок 19 - Простыня большая операционная

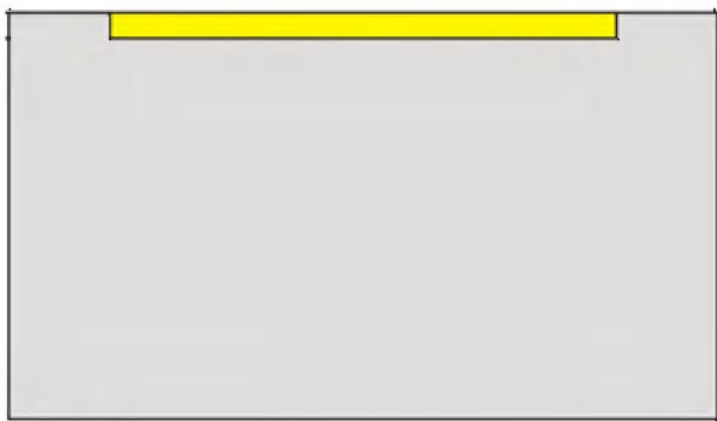


Рисунок 20 - Простыня большая операционная с липким краем

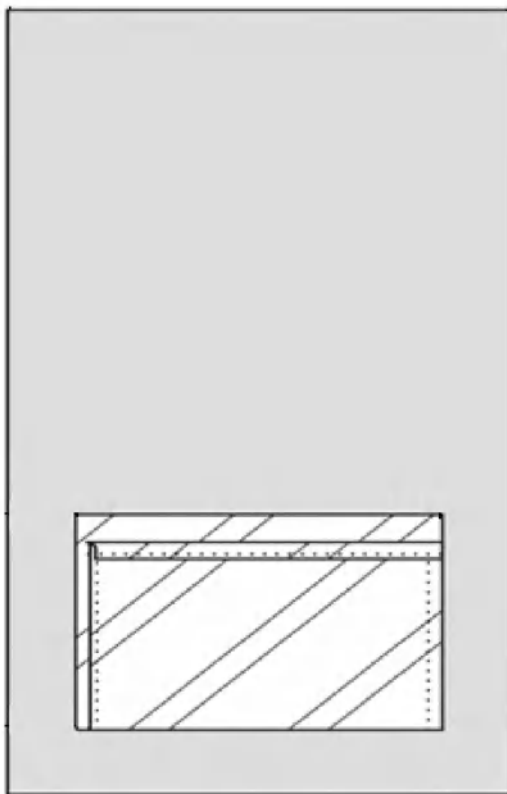


Рисунок 21 - Простыня большая операционная с карманом



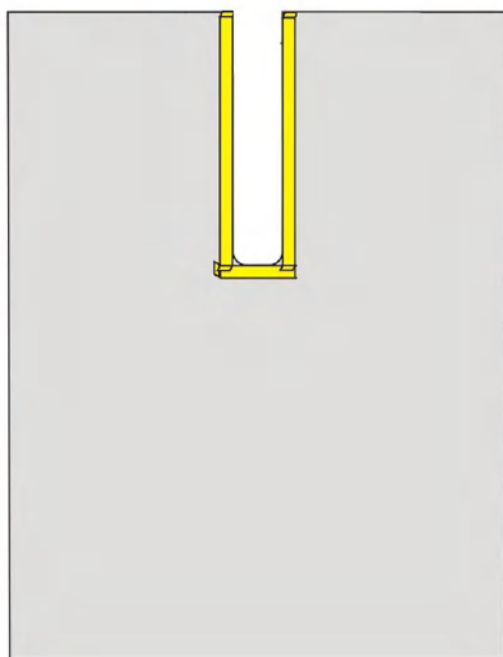


Рисунок 22 - Простыня большая операционная с вырезом: тип А (с липким краем)

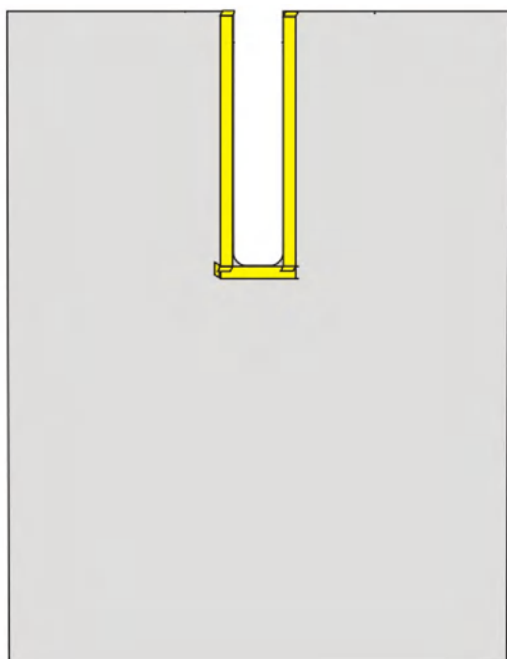

Вид снизу

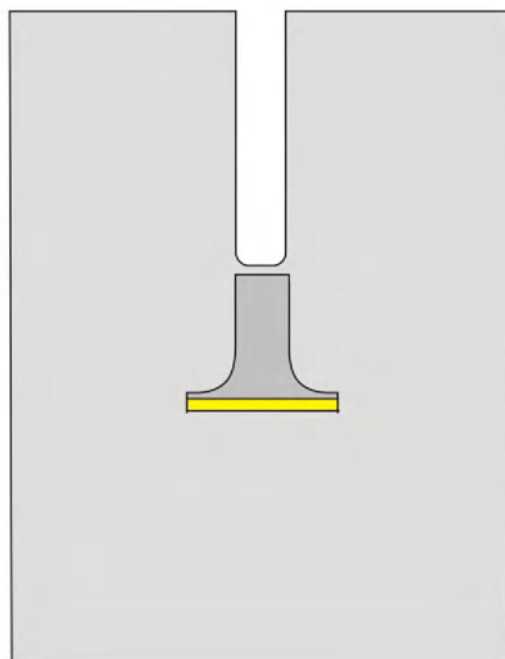

Вид сверху

Рисунок 23 - Простыня большая операционная с вырезом: тип В (с липким краем, с перинеальным покрытием)



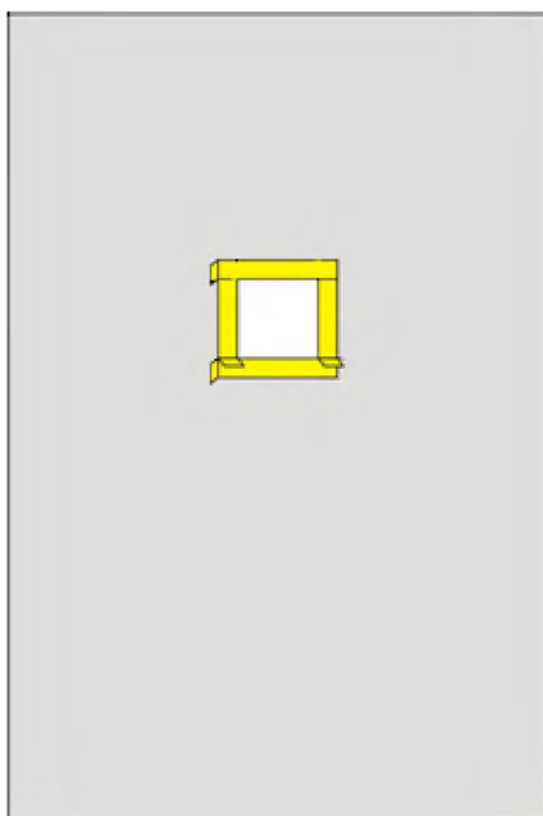


Рисунок 24 - Простыня большая операционная с отверстием: тип А (с липким краем)

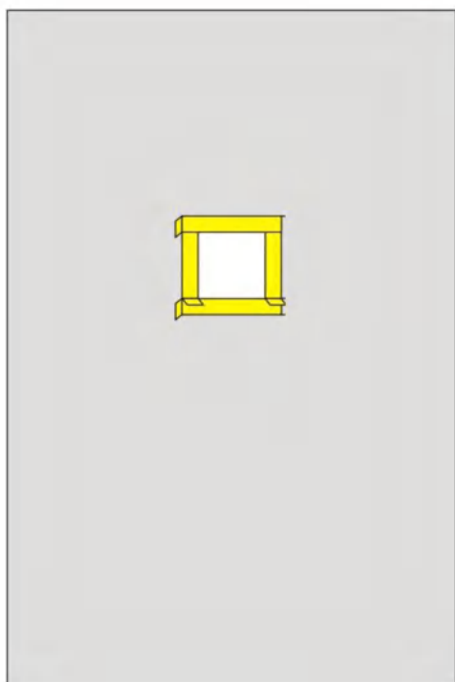


Вид снизу

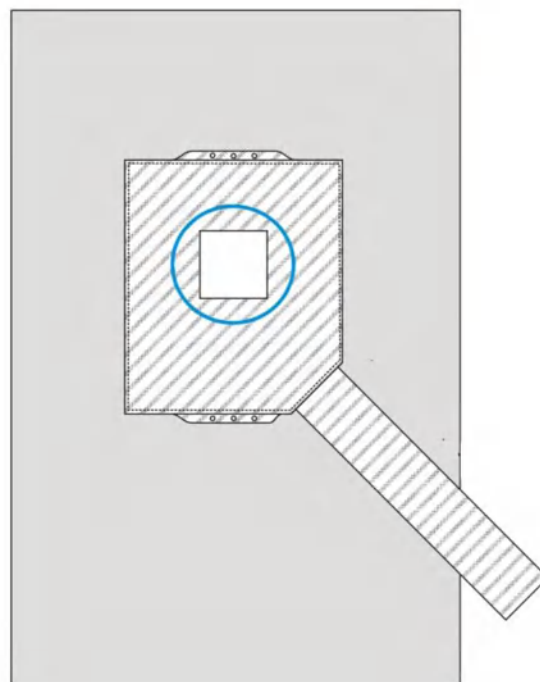


Вид сверху

Рисунок 25 - Простыня большая операционная с отверстием: тип В (с липким краем, со сборным карманом)

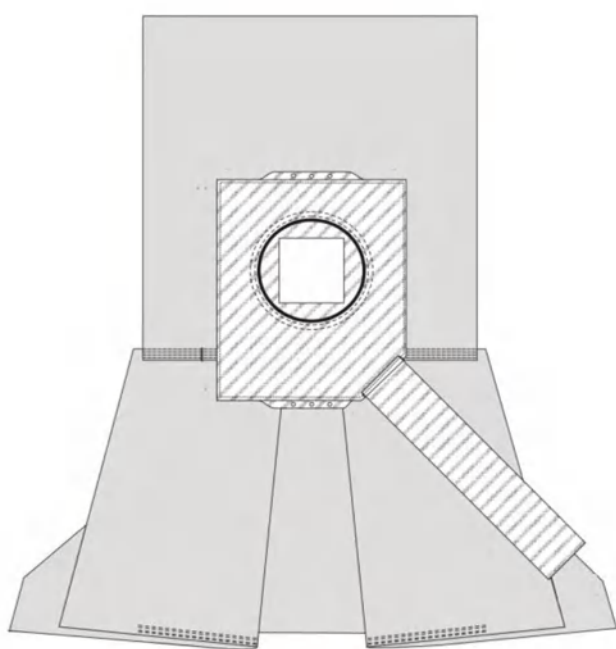

Вид снизу

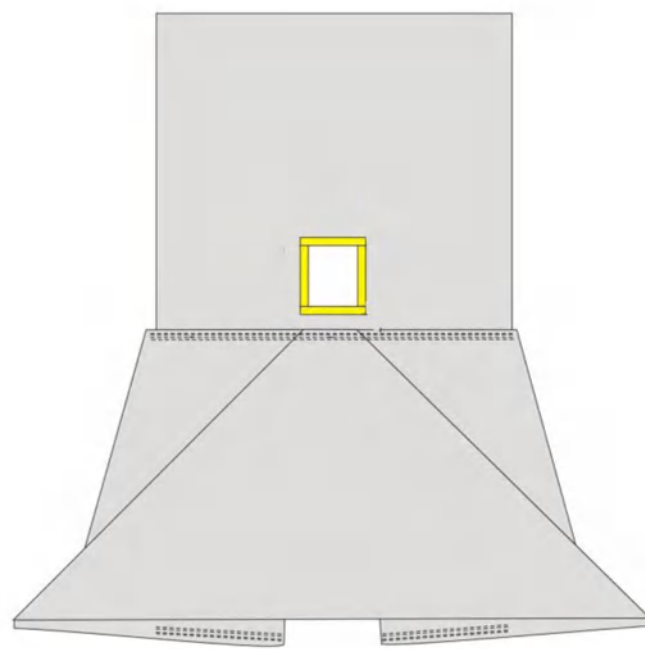

Вид сверху

Рисунок 26 - Простыня большая операционная с отверстием: тип С (с липким краем, со сборным карманом, со встроенным покрытием для ног)


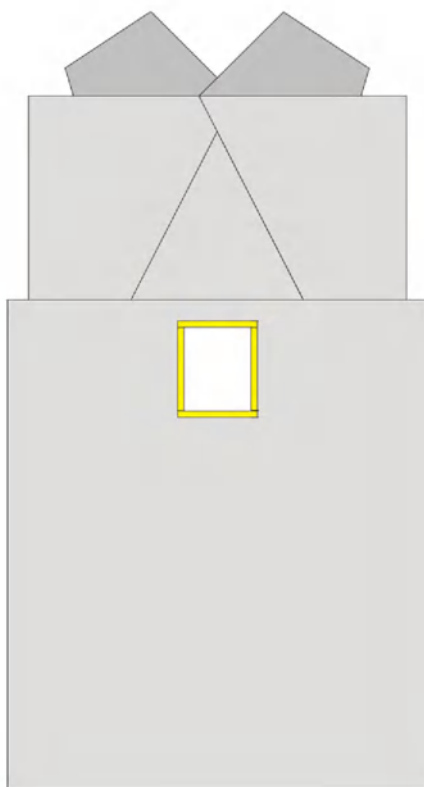


Рисунок 27 - Простыня большая операционная с отверстием: тип D (с липким краем, со встроенным экраном)

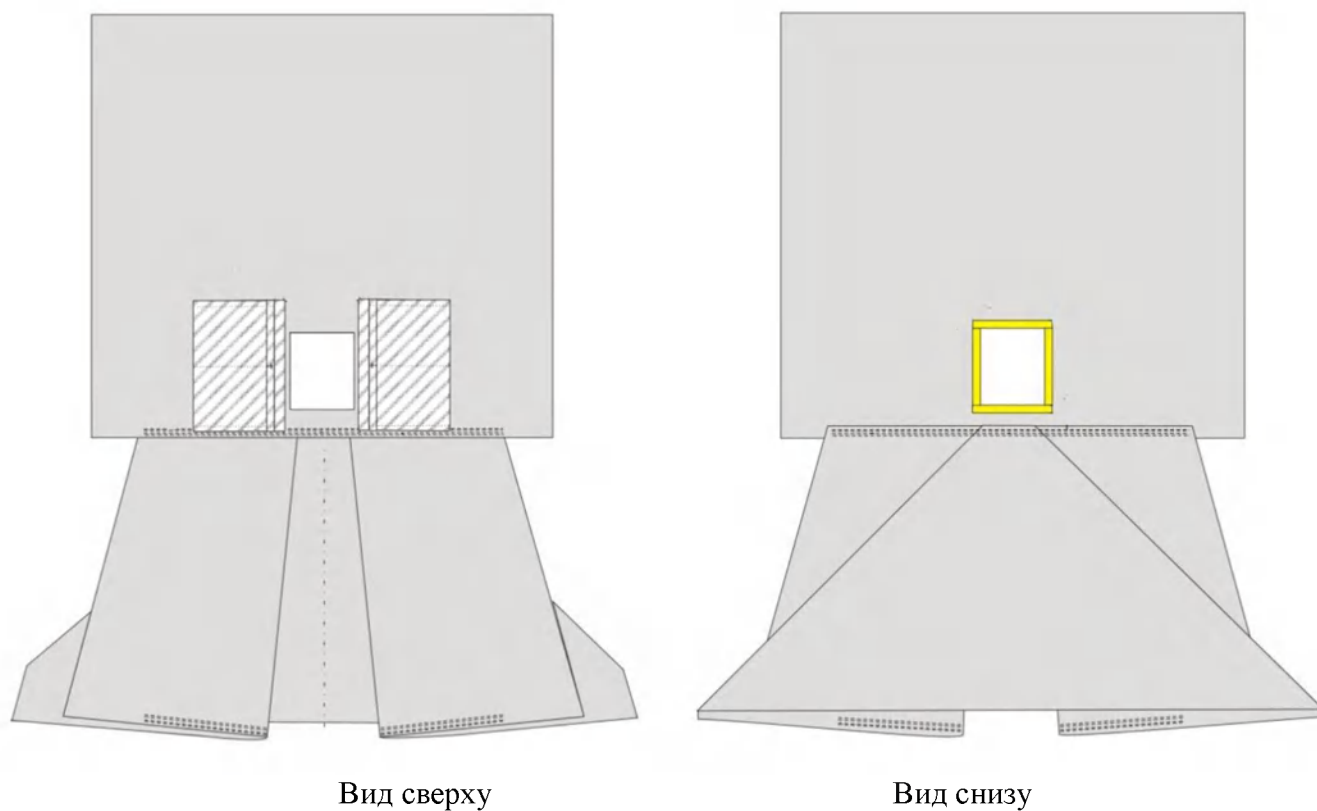

Вид сверху

Вид снизу

Рисунок 28 - Простыня большая операционная с отверстием: тип E (с липким краем, с боковыми карманами, со встроенным покрытием для ног)

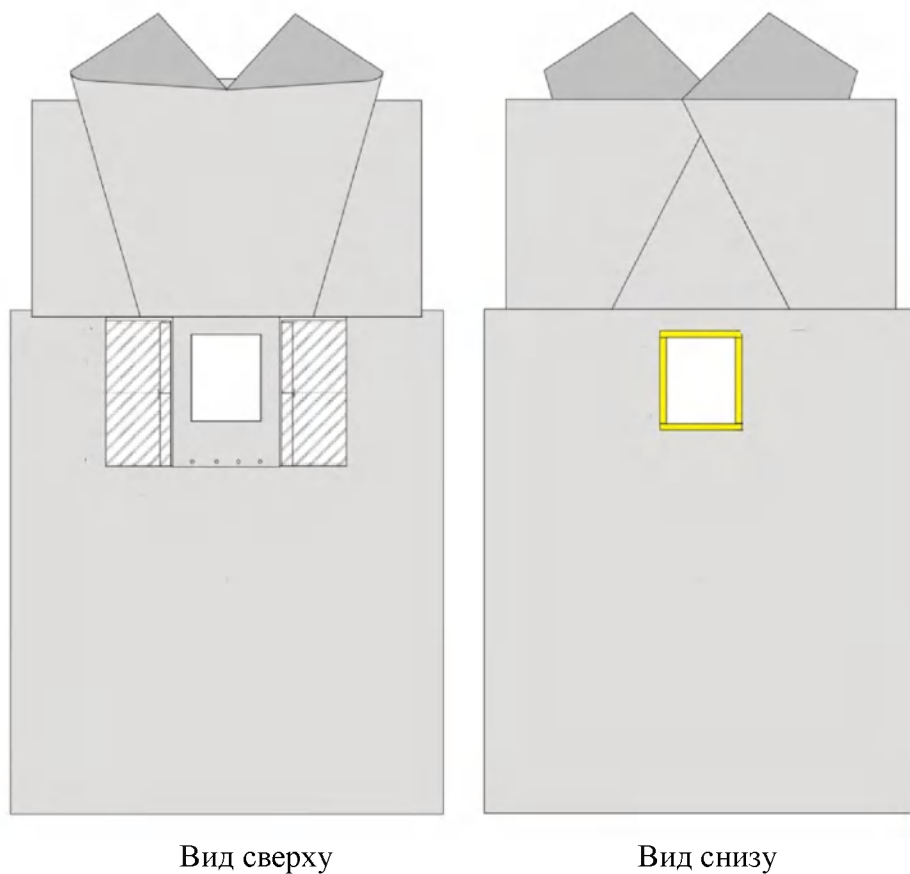


Рисунок 29 - Простыня большая операционная с отверстием: тип F(с липким краем, с боковыми карманами, со встроенным экраном)

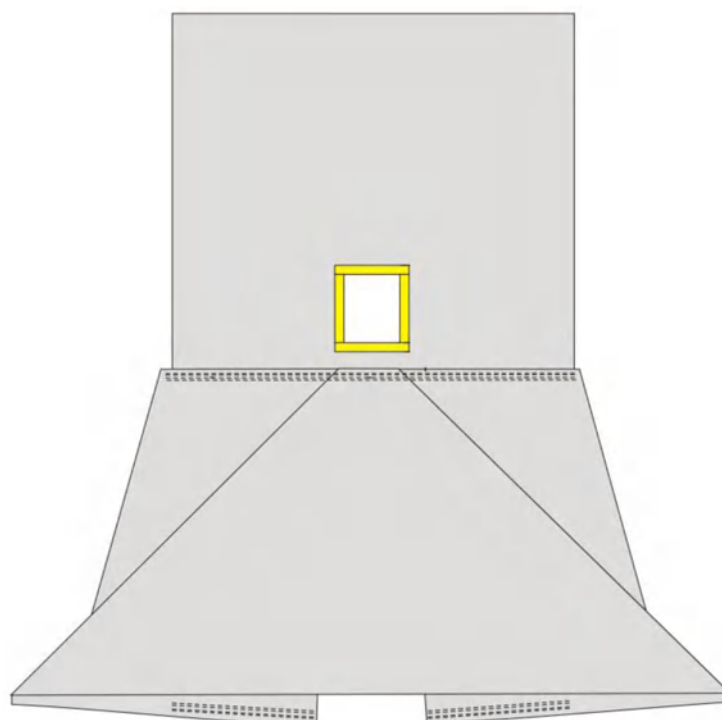


Рисунок 30 – Простыня большая операционная с отверстием: тип G (с липким краем, со встроенным покрытием для ног)

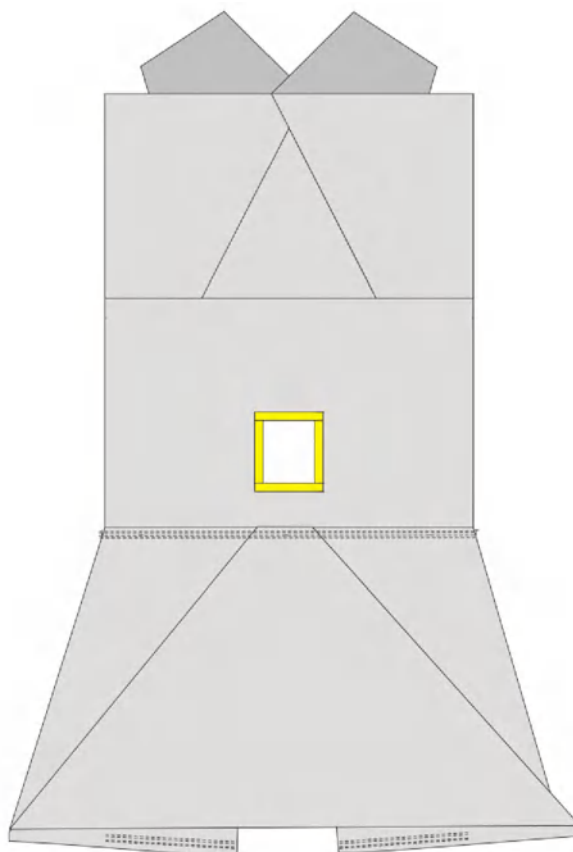


Рисунок 31 – Простыня большая операционная с отверстием: тип Н (с липким краем, со встроенным покрытием для ног, со встроенным краном)

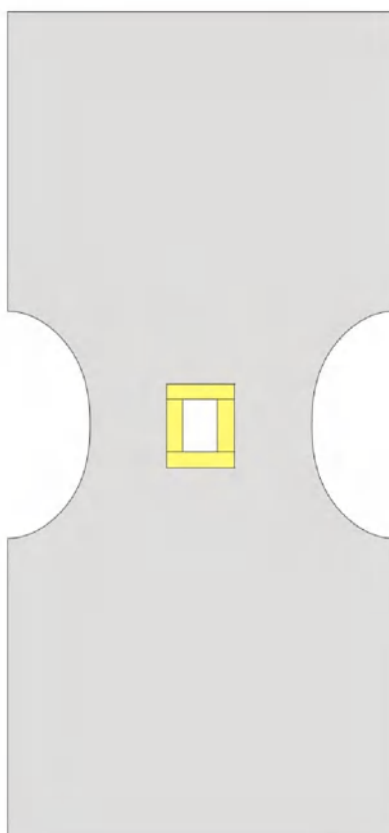


Рисунок 32 - Простыня большая операционная с отверстием: тип К (с липким краем, с боковыми вырезами)

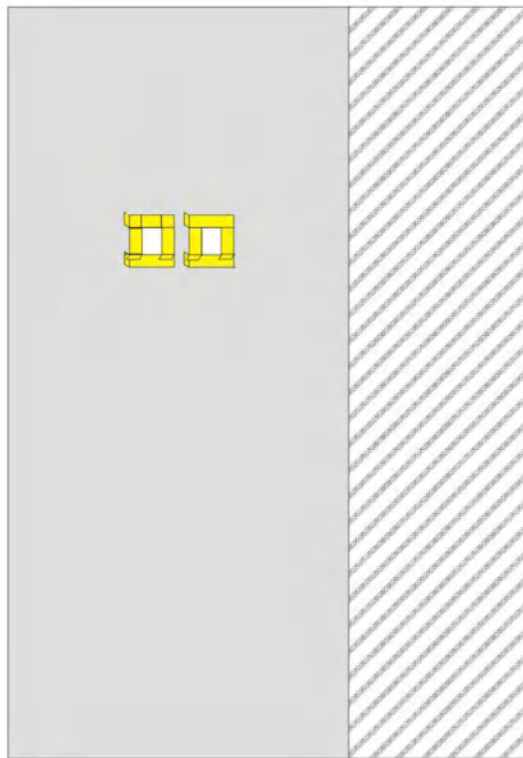


Рисунок 33 - Простыня большая операционная с отверстием: тип L (с липким краем, с прозрачной вставкой)

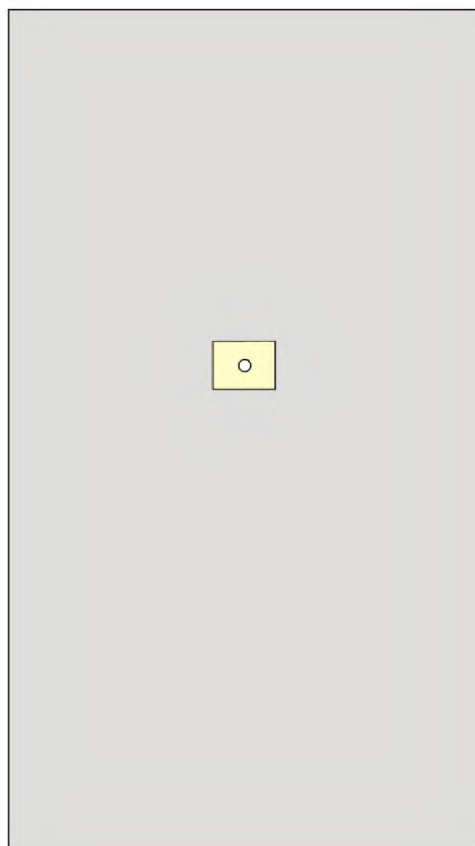


Рисунок 34 – Простыня большая операционная с эластичным отверстием

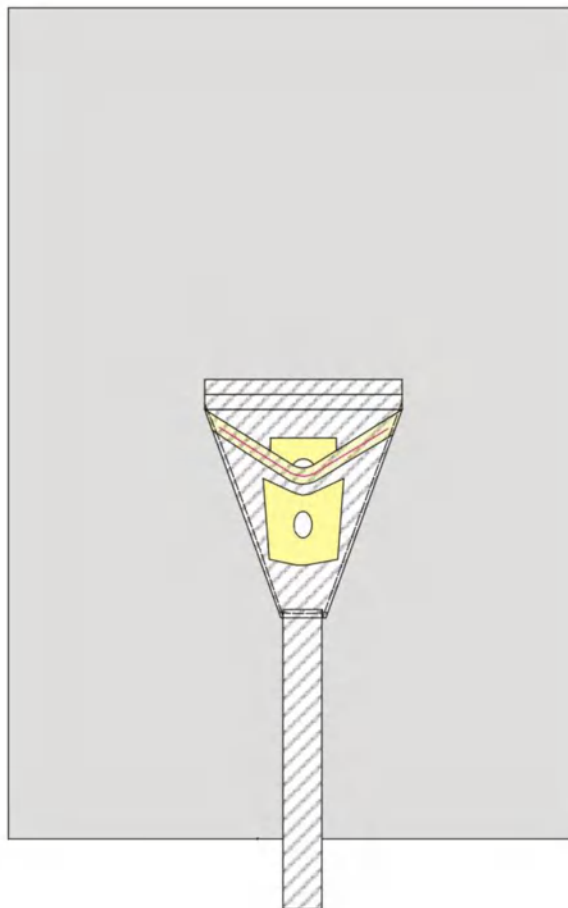


Рисунок 35 – Простыня большая операционная с эластичным отверстием, со сборным карманом

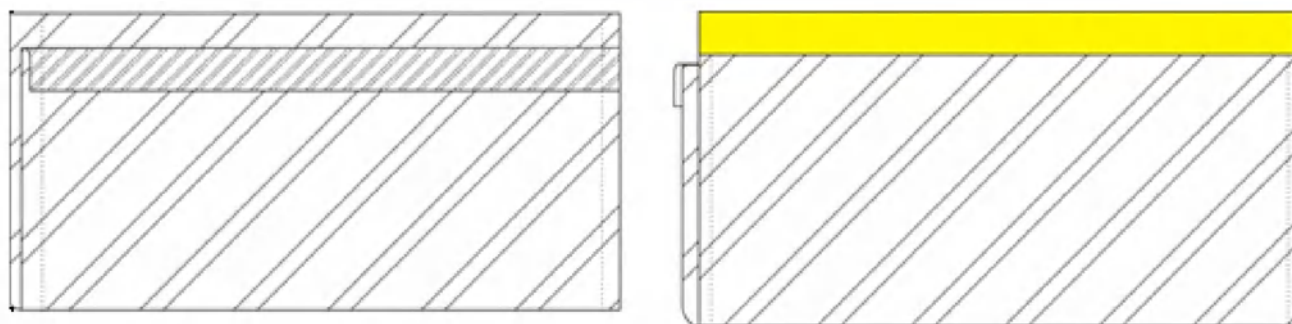


Рисунок 36 – Карман-приемник



Рисунок 37 – Фиксирующая лента

Прошнуровано и пронумеровано  
на -32- листах

Генеральный директор  
ООО «Медицина-Айрлайд»

/А.Н. Наумов



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
32 ( тридцать две ) листов,

Директор по общим вопросам Воробьев А.В.