

Эксплуатационная документация на медицинское изделие
«Бинт медицинский эластичный, ленточный, перфорированный «ЛЕОНАРДА»[®]
по ТУ 21.20.24-008-75606424-2019»
(макет этикетки и инструкция)

Макет этикетки бинта медицинского эластичного, ленточного, перфорированного, средней растяжимости «ЛЕОНАРДА»®. (версия 2 от 01.09.2020)

БИНТ ЛЕОНАРДА®

медицинский эластичный

ЛЕНТОЧНЫЙ, ПЕРФОРИРОВАННЫЙ «ЛЕОНАРДА»

по ТУ 21.20.24-008-75606424-2019

Лечение и профилактика
в комплексной терапии заболеваний:
- варикозное расширение вен,
- фиксации мягких тканей, суставов и связок.

СМОТРИТЕ ИНСТРУКЦИЮ НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ

Состав: хлопок - 70%, латекс 17%,
полиэфир - 13%

Производитель: ООО «ЛЕОНАРДА-СЕРВИС», тел. 8 (495) 772 92 81
Россия 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 20, стр. 3
Место производства медицинского изделия:
Россия, 123458, г. Москва, ул. Твардовского, д. 8

Изготовлено в соответствии ТУ 21.20.24-008-75606424-2019

Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/9401
от 19 декабря 2019 г.
Срок хранения бинта - 5 лет с даты изготовления



СРЕДНЕЙ
РАСТЯЖИМОСТИ
1,5м x 8см




4 610004 311949

КОЛИЧЕСТВО ИЗДЕЛИЙ В УПАКОВКЕ - 1 ШТ.

WWW.LEONARDA.RF



ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: _____

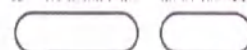

БИНТ ЛЕОНАРДА®

медицинский эластичный

ЛЕНТОЧНЫЙ, ПЕРФОРИРОВАННЫЙ «ЛЕОНАРДА»

по ТУ 21.20.24-008-75606424-2019

Лечение и профилактика
в комплексной терапии заболеваний:
- варикозное расширение вен,
- фиксации мягких тканей, суставов и связок.

СМОТРИТЕ ИНСТРУКЦИЮ НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ

Состав: хлопок - 70%, латекс 17%,
полиэфир - 13%

Производитель: ООО «ЛЕОНАРДА-СЕРВИС», тел. 8 (495) 772 92 81
Россия 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 20, стр. 3
Место производства медицинского изделия:
Россия, 123458, г. Москва, ул. Твардовского, д. 8

Изготовлено в соответствии ТУ 21.20.24-008-75606424-2019

Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/9401
от 19 декабря 2019 г.
Срок хранения бинта - 5 лет с даты изготовления




СРЕДНЕЙ
РАСТЯЖИМОСТИ
2,0м x 8см




4 610004 311956

КОЛИЧЕСТВО ИЗДЕЛИЙ В УПАКОВКЕ - 2 ШТ.

WWW.LEONARDA.RF

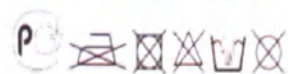

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: _____

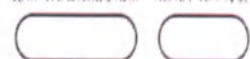

Макет этикетки бинта медицинского эластичного, ленточного, перфорированного, высокой растяжимости «ЛЕОНАРДА»®. (версия 2 от 01.09.2020)

БИНТ ЛЕОНАРДА®

медицинский эластичный

Лечение и профилактика
в комплексной терапии заболеваний:
- варикозное расширение вен,
- фиксации мягких тканей, суставов и связок.

СМОТРИТЕ ИНСТРУКЦИЮ НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ

ЛЕНТОЧНЫЙ, ПЕРФОРИРОВАННЫЙ «ЛЕОНАРДА»
по ТУ 21.20.24-008-75606424-2019

Состав: хлопок - 70%, латекс 17%,
полиэфир - 13%



ВЫСОКОЙ
РАСТЯЖИМОСТИ
1,5м x 10см



4 610004 312021

КОЛИЧЕСТВО ИЗДЕЛИЙ В УПАКОВКЕ - 1 ШТ.

Производитель: ООО «ЛЕОНАРДА-СЕРВИС», тел. 8 (495) 772 92 81
Россия 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.20, стр.3
Место производства медицинского изделия:
Россия, 123458, г. Москва, ул. Твардовского, д.8

Изготовлено в соответствии ТУ 21.20.24-008-75606424-2019

Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/9401
от 19 декабря 2019 г.
Срок хранения бинта - 5 лет с даты изготовления

WWW.LEONARDA.RF



БИНТ ЛЕОНАРДА®

медицинский эластичный

Лечение и профилактика
в комплексной терапии заболеваний:
- варикозное расширение вен,
- фиксации мягких тканей, суставов и связок.

СМОТРИТЕ ИНСТРУКЦИЮ НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ

ЛЕНТОЧНЫЙ, ПЕРФОРИРОВАННЫЙ «ЛЕОНАРДА»
по ТУ 21.20.24-008-75606424-2019

Состав: хлопок - 70%, латекс 17%,
полиэфир - 13%



ВЫСОКОЙ
РАСТЯЖИМОСТИ
2,5м x 10см



4 610004 312045


КОЛИЧЕСТВО ИЗДЕЛИЙ В УПАКОВКЕ - 2 ШТ.

Производитель: ООО «ЛЕОНАРДА-СЕРВИС», тел. 8 (495) 772 92 81
Россия 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.20, стр.3
Место производства медицинского изделия:
Россия, 123458, г. Москва, ул. Твардовского, д.8

Изготовлено в соответствии ТУ 21.20.24-008-75606424-2019

Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/9401
от 19 декабря 2019 г.
Срок хранения бинта - 5 лет с даты изготовления

WWW.LEONARDA.RF

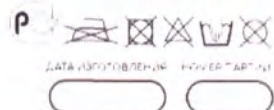

ИНСТРУКЦИЯ

по применению бинта медицинского эластичного, ленточного, перфорированного, средней растяжимости «ЛЕОНАРДА»®.

Бинт медицинский эластичный, ленточный, перфорированный «ЛЕОНАРДА»® по ТУ 21.20.24-008-75606424-2019 (далее по тексту бинт) предназначен для медицинских целей (перевязки и фиксации мягких тканей, суставов и связок, профилактики и лечения варикозного расширения вен).

Показания к применению: Фиксация суставов после травм и растяжений. Лечение варикозного расширения вен, проблем питания тканей.

Противопоказания к применению: Индивидуальная непереносимость к компонентам изделия, открытые раны, трофические язвы, местные заболевания кожи.

Возможные побочные действия: побочные действия не выявлены.

Технические характеристики бинта:

Длина, м	Ширина, см	Растяжимость, %	Поверхностная плотность, г/м ²	Разрывная нагрузка, Н (кгс)
0, 6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 5,0	6; 8; 10	Не менее 100, но не более 150	Не менее 120, но не более 500	Не менее 88, 2 (9)

допускаемые предельные отклонения по ширине $\pm 0,5$ см., по длине $\pm 0,1$ м.

Материалы используемые для изготовления бинта:

- Хлопчатобумажная пряжа, производства "Туркмена-батская хлоп-копрядильная фабрика" (Туркме-нистан) – не менее 60%;
- Нить полиэфирная, марки С (ТУ ВУ 400031289.190-2006), произ-водства ОАО «СветлогорскХим-волокно» (Республика Беларусь) – не менее 10%;
- Нить латексная, марки Latex thread C42, производства фирмы «H.V Fila Co., Ltd» (Таиланд)– остальное.

Условия применения: бинт может применяться как в домашних условиях, так и в лечебных учреждениях с обязательным соблюдением указаний по эксплуатации и требований по уходу, указанных в данной инструкции.

Указания по эксплуатации:

Пользователь должен соблюдать указания, изложенные в эксплуатационной документации (инструкции) Проконсультироваться с врачом по вопросам использования и техники наложения бинта. Время использования бинта определяет врач.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Появление онемения, болей, ощущения пульсации конечностей говорит о необходимости перебинтования или снятия бинта. В случае повторных проявлений, необходимо обратиться к лечащему врачу.

Требования по уходу:

Стирать бинт следует вручную мыльным раствором, по мере загрязнения, в воде при температуре до 40 °С без использования средств, содержащих отбеливатели.

Аккуратное отжимание без выкручивания, сушка в расправленном виде на горизонтальной поверхности.

Внимание!: Запрещено глажение. Не применять чистку с химическими препаратами. Не сушить на батарее.

Подготовка к работе изделия: подобрать бинт по длине, вскрыть упаковку, достать бинт, наложить на больную конечность и зафиксировать, в соответствии с рекомендациями врача.

Транспортирование и хранение:

- хранятся бинты должны в сухих, проветриваемых помещениях на стеллажах на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов при условии хранения 2 по ГОСТ 15150-69 (температура от -50°С до +40 °С, относительная влажность до 98% при 25 °С)
- транспортировка бинтов производится всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69 при условии хранения 5 (температура от -50°С до +50 °С, относительная влажность до 100% при 25 °С)

Бинт должен утилизироваться:

- в домашних условиях, как твердые отходы;
- в медицинских учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок службы бинта 3 месяца со дня приобретения.
Срок хранения 60 месяцев

Бинт соответствует требованиям: ТУ 21.20.24-008-75606424-2019, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011.

По всем дополнительным вопросам просим обращаться в ООО «ЛЕОНАРДА-СЕРВИС» (129226, г. Москва, Сельскохозяйственная улица, дом 20, стр.3): тел. +7(495) 772-92-81, email: Leonarda-Shop@mail.ru

ИНСТРУКЦИЯ

по применению бинта медицинского эластичного, ленточного, перфорированного, высокой растяжимости «ЛЕОНАРДА»®.

Бинт медицинский эластичный, ленточный, перфорированный «ЛЕОНАРДА»® по ТУ 21.20.24-008-75606424-2019 (далее по тексту бинт) предназначен для медицинских целей (перевязки и фиксации мягких тканей, суставов и связок, профилактики и лечения варикозного расширения вен).

Показания к применению: Поддержка суставов в покое после травм. Предотвращение кровотечений и гематом после операций на венах и суставах. Лечение начальных форм варикозного расширения вен.

Противопоказания к применению: Индивидуальная непереносимость к компонентам изделия, открытые раны, трофические язвы, местные заболевания кожи.

Возможные побочные действия: побочные действия не выявлены.

Технические характеристики бинта:

Длина, м	Ширина, см	Растяжимость, %	Поверхностная плотность, г/м ²	Разрывная нагрузка, Н (кгс)
0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 5,0	6; 8; 10	Не менее 150	Не менее 120, но не более 500	Не менее 78,4 (8)

допускаемые предельные отклонения по ширине $\pm 0,5$ см., по длине $\pm 0,1$ м.

Материалы используемые для изготовления бинта:

- Хлопчатобумажная пряжа, производства "Туркмена-батская хлоп-копрядельная фабрика" (Туркменистан) – не менее 50%;
- Нить полиэфирная, марки С (ТУ ВУ 400031289.190-2006), производства ОАО «СветлогорскХим-волокно» (Республика Беларусь) – не менее 13%;
- Нить латексная, марки Latex thread C42, производства фирмы «H.V Fila Co., Ltd» (Таиланд) – остальное.

Условия применения: бинт может применяться как в домашних условиях, так и в лечебных учреждениях с обязательным соблюдением указаний по эксплуатации и требований по уходу, указанных в данной инструкции.

Указания по эксплуатации:

Пользователь должен соблюдать указания, изложенные в эксплуатационной документации (инструкции)

Проконсультироваться с врачом по вопросам использования и техники наложения бинта.

Время использования бинта определяет врач.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Появление онемения, болей, ощущения пульсации конечностей говорит о необходимости перебинтования или снятия бинта. В случае повторных проявлений, необходимо обратиться к лечащему врачу.

Требования по уходу:

Стирать бинт следует вручную мыльным раствором, по мере загрязнения, в воде при температуре до 40 °С без использования средств, содержащих отбеливатели.

Аккуратное отжимание без выкручивания, сушка в расправленном виде на горизонтальной поверхности.

Внимание!: Запрещено глажение. Не применять чистку с химическими препаратами. Не сушить на батарее.

Подготовка к работе изделия: подобрать бинт по длине, вскрыть упаковку, достать бинт, наложить на большую конечность и зафиксировать в соответствии с рекомендациями врача..

Транспортирование и хранение:

– хранятся бинты должны в сухих, проветриваемых помещениях на стеллажах на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов при условии хранения 2 по ГОСТ 15150-69 (температура от -50°С до +40 °С, относительная влажность до 98% при 25 °С)

-транспортировка бинтов производится всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69 при условии хранения 5 (температура от -50°С до +50 °С, относительная влажность до 100% при 25 °С)

Бинт должен утилизироваться:

- в домашних условиях, как твердые отходы;

- в медицинских учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок службы бинта 3 месяца со дня приобретения.

Срок хранения 60 месяцев

Бинт соответствует требованиям: ТУ 21.20.24-008-75606424-2019, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011.

По всем дополнительным вопросам просим обращаться в ООО «ЛЕОНАРДА-СЕРВИС» (129226, г. Москва, Сельскохозяйственная улица, дом 20, стр.3): тел. +7(495) 772-92-81, email: Leonarda-Shop@mail.ru

Дата последнео пересмотра инструкции: 01.09.2020

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью (5) листов.

ООО "ЛЕОНАРДА-СЕРВИС"
Генеральный директор



А.В. Резвов