

УТВЕРЖДАЮ

**Главный государственный
санитарный врач**

Российской Федерации

« 25 »

№

01-П/150-00



Онищенко

2009 г.

**ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«ДС-ИФА-АНТИ-SARS-CoV»
Тест-система иммуноферментная
для выявления антител к коронавирусу,
ассоциированному с атипичной пневмонией**

Набор включает в себя следующие реагенты:

иммуносорбент – полистироловые 96-луночные разборные планшеты, в лунках которых сорбирована смесь рекомбинантных антигенов: ASARS 101, ASARS 102, ASARS 103, ASARS 104;

конъюгат (концентрат x 21), жидкий – моноклональные антитела мыши против иммуноглобулинов А, G и M человека, конъюгированные с пероксидазой хрена;

K+ (контрольный положительный образец), жидкий – суррогатный белок, полученный методом химической «сшивки» с помощью глутаральдегида Fc фрагментов молекул иммуноглобулинов человека класса G из нормальной донорской сыворотки (инактивированной) и Fab 2 фрагментов молекул антител сыворотки крови животных (козы), иммунизированных рекомбинантными белками;

K- (контрольный отрицательный образец), жидкий – сыворотка крови человека в разведении 1:10, не содержащая специфические антитела к коронавирусу, ассоциированному с атипичной пневмонией, не содержащая HBsAg, антиген p24 ВИЧ-1, антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита C; инактивированный;

БР (блок-раствор) - для разведения исследуемых образцов;

Взамен инструкции от 20.07.2004 г.

«28» _____ А.А. Мовсисянц
2009г.

