

ООО «НПФ «Медтехника»

ИНН/КПП 7819315479/781901001, 198516 Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Фабричная, 1
телефон\ факс (812) 612-06-71



Этикетка

«Матрасы иммобилизационные вакуумные «НПФ-Медтехника»

(модели МИВ-1, МИВ-2, МИВ-3, МИВ-4).

ТУ 9438 – 004-38140643-2012

1. Назначение:

1.1 Матрас иммобилизационный вакуумный «НПФ-Медтехника» (в дальнейшем матрас вакуумный) применяется при политравмах для иммобилизации позвоночного отдела, костей таза и нижних конечностей на время транспортирования с места получения травмы до лечебного учреждения.

Матрас вакуумный предназначен для оказания медицинской помощи.

2. Области применения:

- В подразделениях МО и МВД.
- В формированиях МЧС и гражданской обороны.
- В службах медицины катастроф.
- В машинах скорой и неотложной помощи.
- На крупных производственных и добывающих предприятиях.
- В спортивных обществах и спортивных комплексах.

3. Технические данные и характеристика изделия:

3.1 Матрас вакуумный может эксплуатироваться и храниться при температуре окружающего воздуха от минус 50°C до плюс 50°C.

3.2 Масса матраса вакуумного МИВ-1 - не более 9кг, МИВ-2, МИВ-4- не более 7кг; МИВ-3 не более 4,5кг

3.3 Допускаемая нагрузка на матрасы МИВ-1, МИВ-2, МИВ-4- не более 200кг, а на матрас МИВ-3 не более 150кг (детский).

4 Комплектность:

- Матрас вакуумный – 1 шт.
- Откачивающее устройство (ручной вакуумный насос) – 1 шт.
- Транспортная сумка – 1 шт.
- Этикетка – 1 шт.
- Ремни фиксирующие (для МИВ-1 – 9шт.; для МИВ-2, МИВ-4 - 3шт.; для МИВ-3 – 2 шт.)

5 Указания мер безопасности:

5.1 При укладке матраса вакуумного в транспортную сумку не допускайте резких изломов трубки вакуумного насоса и трубки матраса.

5.2 Не подвергайте воздействию острых режущих и колющих предметов.

5.3 Не подвергайте вакуумный матрас воздействию горячих предметов и агрессивных жидкостей.

6 Возможные неисправности.

Характер неисправности	Вероятная причина	Способ устранения
Из вакуумного матраса не откачивается воздух	Закрит запирающий клапан	Открыть запирающий клапан
Вакуумный матрас не фиксируется при откачивании воздуха.	Течь в сварных швах вакуумного матраса	Ремонт в условиях предприятия изготовителя

7 Порядок работы

7.1 Извлечь вакуумный матрас из транспортной сумки.

7.2 Расположить его на ровной поверхности.

7.3 Открыть клапан матраса. Для матрасов с samozапирающимся металлическим клапаном наружное кольцо должно находиться в верхнем положении для чего необходимо нажать на втулку в отверстии клапана любым предметом диаметром менее 7мм (например авторучкой).

7.4 Равномерно расправить внутреннее содержимое матраса.

7.5 Уложить травмированного пациента на матрас.

7.6 Завернуть борта матраса на тело пациента.

Для МИВ-1 - закрепить пострадавшего ремнями матраса и фиксирующими ремнями.

Для МИВ-2, МИВ-3, МИВ-4 провести иммобилизацию пострадавшего с помощью дополнительных фиксирующих ремней.

7.7 Достать откачивающее устройство и подсоединить его к клапану матраса, вставив штуцер насоса в отверстие samozапирающегося клапана до упора с ощущением фиксации штуцера и провести откачку.

7.8 Удерживая загнутые борта матраса - откачать воздух из матраса для создания необходимой степени фиксации пострадавшего.

7.9 Проверить полноту и адекватность иммобилизации пострадавшего.

7.10 Закрыть клапан матраса и отсоединить накачивающее устройство (для samozапирающегося клапана необходимо сдвинуть наружное кольцо с рифлением вниз, придерживая одновременно патрубков матраса).

7.11 Убрать откачивающее устройство в транспортную сумку.

7.12 По окончании транспортировки снять фиксирующие ремни; открыть (п.7.3) клапан для снятия разряжения и переместить пострадавшего на штатное оборудование медицинского учреждения.

8. Рекомендации по дезинфекции

8.1 После каждого применения поверхность вакуумного матраса должна подвергаться соответствующей санитарной обработке.

8.2 При видимых обильных загрязнениях матраса необходимо смыть их под струей проточной воды.

8.3 Матрас дезинфицируется 4% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос».

8.4 После экспозиционной выдержки дезинфицирующий раствор вымывается с поверхности матраса и матрас просушивается.

9. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие параметров и характеристик вакуумного матраса требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации матраса 12 месяцев от даты продажи, но не более 18 месяцев от даты изготовления.

10. Изготовитель

ООО «НПФ «Медтехника», 198516, г. Санкт-Петербург, Петергоф, ул. Фабричная, д.1
телефон\ факс (812) 612-06-71

Прошито и пронумеровано

96а
(2)

лист.

Генеральный директор
ООО ЦИРМИ «Медтехника»

А.Ц. Борода

