

11. Свидетельство о приемке

Шкаф медицинский для документов ШМЛ-01-«ЕЛАТ» изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.101 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Код 820

№ партии _____

Штамп ОТК

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»


Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,

Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13


E-mail: lpu@elamed.com

Caŭm: lpu.elamed.com

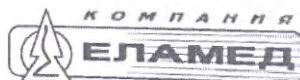

Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/09377 от 21.12.2017 г.

КОПИЯ
ВЕРНА

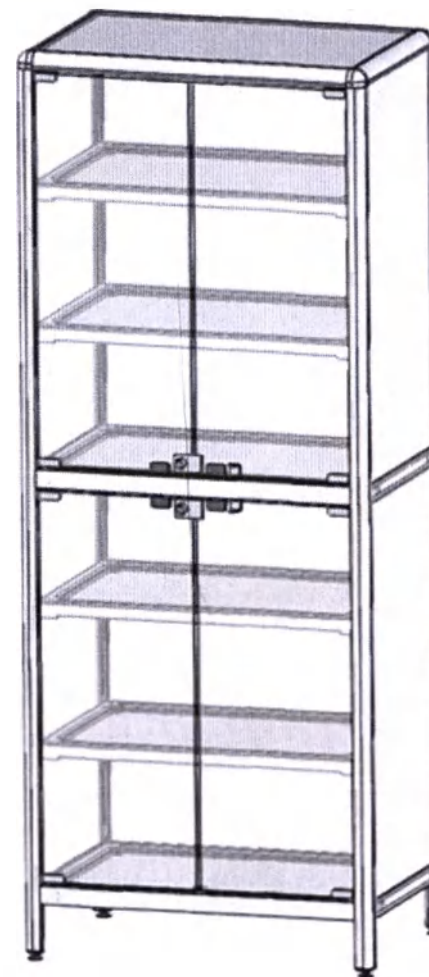

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ НМП-01-“ЕЛАТ” по ГИКС.942810.101 ТУ

**ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ
ЛАБОРАТОРНЫЙ
ШМЛ-01-«ЕЛАТ»**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Шкаф медицинский лабораторный ШМЛ-01-«ЕЛАТ» (в дальнейшем шкаф), предназначен для применения в специальном медицинском помещении (процедурном кабинете, операционной, лабораториях и т.д.) для размещения медицинских изделий, фармпрепаратов, для проведения медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека, и подвергается дезинфекционной обработке.

Показания к применению: Шкаф устанавливается в процедурном кабинете или лаборатории для проведения медицинских исследований.

Противопоказания: не имеет.

Меры предосторожности:

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ облакачиваться на шкаф и надавливать на верхние грани открытых дверей!

1. Основные параметры и размеры

1.1. Масса изделия не более 70 кг.

1.2. Габаритные размеры не более 1050x500x1950 мм.

2. Характеристики

2.1. Средний срок службы не менее 5 лет.

2.5. На дверях установлены замки (для запирания дверей с помощью ключа).

2.6. Нагрузочные характеристики шкафа при равномерном распределении нагрузки:

- на полку полимерную - 6 ± 1 кг.

2.7. При эксплуатации шкаф устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-92 для исполнения УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150-69 (от +10 °C до +35 °C).

3. Комплектность

Шкаф медицинский лабораторный ШМЛ-01-«ЕЛАТ» – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

4. Транспортирование и хранение

4.1. Шкаф транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2. Шкаф транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50 °C до +50 °C, относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25 °C).

4.3. Условия хранения шкафа в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50 °C до +40 °C и относительная влажность не более 98% при +25 °C).

5. Дезинфекция

5.1. Поверхности шкафа устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

Примечание:

1. Допускается использование при дезинфекции наружных поверхностей шкафа и его составных частей растворов всех разрешенных в медицинской практике средств.

5.2. Наружные поверхности стенок, дверок и полок устойчивы к протиранию ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильной работе изделия, при повреждении составных частей изделия обратитесь к предпри-

ООО Цирми INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии

8 800 350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО

6.1. Подготовка к работе:

6.1.1. После хранения шкафа или перевозки его в упаковке при температуре ниже +10 °C изделию необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

ВНИМАНИЕ! Для введения в эксплуатацию шкафа, освободите его от транспортной упаковки. Произведите сборку изделия согласно инструкции по сборке.

6.1.2. После сборки шкафа проверьте следующее:

- закрывание и открывание дверей обеспечивается без усилий, отсутствие перекосов как относительно друг друга, так и относительно стенок шкафа;

- устройства, предотвращающие самопроизвольное открывание дверей под действием неровности пола, выполняют свое функциональное назначение.

6.2. Ограничения в процессе эксплуатации шкафа:

6.2.1. Во избежание преждевременного выхода из строя шкафа не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.6;

- скапливания жидкости на поверхностях шкафа, в том числе и во время дезинфекции;

- подвергать поверхности шкафа воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности;

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ облакачиваться на шкаф и надавливать на верхние грани открытых дверей.

7. Гарантия изготовителя

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при условии соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. Гарантийный срок хранения 18 месяцев со дня изготовления в транспортной упаковке предприятия-изготовителя.

7.3. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня отгрузки или продажи через розничную торговую сеть.

8. Техническое обслуживание

8.1. Техническое обслуживание шкафа включает в себя:

- поддержание технического состояния шкафа в виде:

а) визуального осмотра всей конструкции изделия не реже одного раза в месяц;

б) протяжки винтов дверных ручек не реже одного раза в месяц;

в) протяжки всей крепежной фурнитуры конструкции не реже одного раза в 6 месяцев;

- очистки от загрязнений внешних и внутренних поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);

- дезинфекции поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещено изделие.

9. Ремонт

9.1. Ремонт шкафа включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют функции устройства, обеспечивающих полную функциональность шкафа.

10. Утилизация

10.1. Шкаф, потерявший потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовался шкаф по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

**Код 875**

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,

Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25


Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13

E-mail: ipu@elamed.com

Cajm: lpu.elamed.com

Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/09377 от 21.12.2017 г.

КОПИЯ
ВЕРНА

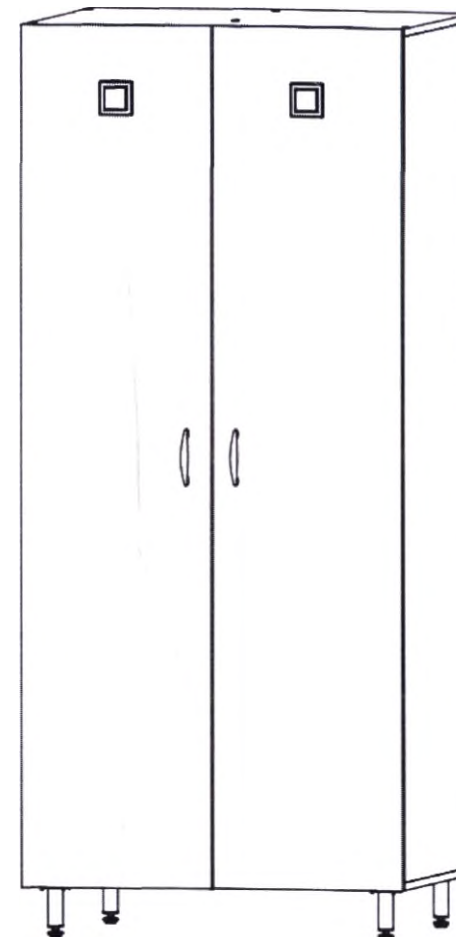

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ -01НМП-01-“ЕЛАТ” по ГИКС.942810.101 ТУ

**ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ
ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ
ШМСО-01-«ЕЛАТ»**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Шкаф медицинский для специальной одежды ШМСО-01-«ЕЛАТ» (в дальнейшем шкаф), предназначен для применения в специальном медицинском помещении (процедурном кабинете, операционной, лабораториях и т.д.) для размещения медицинских изделий, фармпрепаратов, для проведения медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека, и подвергается дезинфекционной обработке.

Показания к применению: Шкаф устанавливается в предоперационном помещении для размещения стерильной медицинской одежды.

Противопоказания: **не имеет.**

Меры предосторожности:

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ облакачиваться и надавливать на верхние грани открытых дверей!

1. Основные параметры и размеры

1.1. Масса изделия не более 65 кг.

1.2. Габаритные размеры не более 1000x650x1900 мм.

2. Характеристики

2.1. Средний срок службы не менее 5 лет.

2.2. Нагрузочные характеристики шкафа при равномерном распределении нагрузки:

- на полку из плиты ламинированной древесноволокнистой – (25 ± 1) кг.

2.3. При эксплуатации шкаф устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-92 для исполнения УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150-69 (от $+10^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$).

3. Комплектность

Шкаф медицинский для специальной одежды ШМСО-01-«ЕЛАТ» - 1 шт.;

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

4. Транспортирование и хранение

4.1. Шкаф транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2. Шкаф транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$, относительной влажности воздуха до 100% при температуре $+25^{\circ}\text{C}$).

4.3. Условия хранения шкафа в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительная влажность не более 98% при $+25^{\circ}\text{C}$).

5. Дезинфекция

5.1. Поверхности шкафа устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

Примечание:

1. Допускается использование при дезинфекции наружных поверхностей шкафа и его составных частей растворов всех разрешенных в медицинской практике средств.

5.2. Наружные поверхности стенок, дверок и полок устойчивы к протиранию ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства.

6. Правила эксплуатации

6.1. Подготовка к работе:

6.1.1. После хранения шкафа или перевозки его в упаковке при температуре ниже $+10^{\circ}\text{C}$ изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

Внимательно проверьте комплектацию изделия в исправности или правильной работе изделия, при обнаружении неисправностей частей изделия обратитесь к предпри-

тию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО

6.1.2. После сборки шкафа проверьте следующее:

- закрывание и открывание дверей обеспечивается без усилий, отсутствие перекосов как относительно друг друга, так и относительно стенок шкафа;

- устройства, предотвращающие самопроизвольное открывание дверей под действием неровности пола, выполняют свое функциональное назначение.

6.2. Ограничения в процессе эксплуатации шкафа:

6.2.1. Во избежание преждевременного выхода из строя шкафа не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;

- скапливания жидкости на поверхностях шкафа, в том числе и во время дезинфекции;

- подвергать поверхности шкафа воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности.

7. Гарантия изготовителя

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при условии соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. Гарантийный срок хранения 18 месяцев со дня изготовления в транспортной упаковке предприятия-изготовителя.

7.3. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня отгрузки или продажи через розничную торговую сеть.

8. Техническое обслуживание

8.1. Техническое обслуживание шкафа включает в себя:

- поддержание технического состояния шкафа в виде:

а) визуального осмотра всей конструкции изделия не реже одного раза в месяц;

б) протяжки винтов дверных ручек не реже одного раза в месяц;

в) протяжки всей крепежной фурнитуры конструкции не реже одного раза в 6 месяцев;

- очистки от загрязнений внешних и внутренних поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);

- дезинфекцию поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещено изделие.

9. Ремонт

9.1. Ремонт шкафа включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют функции устройства, обеспечивающих полную функциональность шкафа.

10. Утилизация

10.1. Шкаф, потерявший потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовался шкаф по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

10. Утилизация

10.1. Столик, потерявший потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовался столик по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Свидетельство о приемке

Столик медицинский пеленальный СМП-01-«ЕЛАТ» изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.101 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Код 821

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:



АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,
Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13

E-mail: ipu@elamed.com

Сайт: ipu.elamed.com

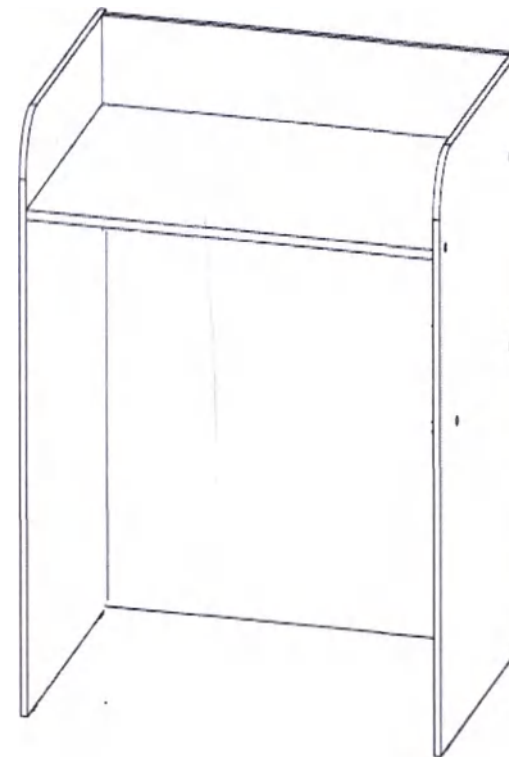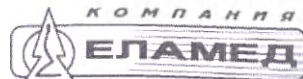

Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/09377 от 21.12.2017



С.В. Сидоров



**НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ
МАТЕРИАЛОВ НМП-01-«ЕЛАТ» по ГИКС.942810.101 ТУ**

**СТОЛИК МЕДИЦИНСКИЙ
ПЕЛЕНАЛЬНЫЙ
СМП-01-«ЕЛАТ»**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Столик медицинский пеленальный СМП-01-«ЕЛАТ» (в дальнейшем стол), предназначен для применения в специальном медицинском помещении (процедурном кабинете, операционной, лабораториях и т.д.) для размещения медицинских изделий, фармпрепаратов, для проведения медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека, и подвергается дезинфекционной обработке.

Показания к применению: Столик устанавливается в процедурном, смотровом кабинетах для проведения медицинских процедур и осмотров.

Противопоказания: не имеет.

Меры предосторожности:

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2!

1. Основные параметры и размеры

1.1. Масса изделия не более 20 кг.

1.2. Габаритные размеры не более 1000x850x700 мм.

2. Характеристики

2.1. Средний срок службы не менее 5 лет.

2.2. Нагрузочные характеристики стола при равномерном распределении нагрузки: - на столешницу – (25±1) кг.

2.3. При эксплуатации стол устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-92 для исполнения УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150-69 (от +10 °С до +35 °С).

3. Комплектность и инструкция по сборке

Столик медицинский для медицинской сестры СМП-01-«ЕЛАТ» - 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

4. Транспортирование и хранение

4.1. Столик транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2. Столик транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50 °С до +50 °С, относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25 °С).

4.3. Условия хранения столика в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50 °С до +40 °С и относительная влажность не более 98% при +25 °С).

5. Дезинфекция

5.1. Поверхности стола устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 3% раствором перекиси водорода ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

Примечание:

1. Допускается использование при дезинфекции наружных поверхностей стола и его составных частей растворов всех разрешенных в медицинской практике средств.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильной работе изделия, при повреждении составных частей изделия обратитесь к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 350-06-13.

6.1.1. После хранения столика или перевозки его в упаковке при температуре ниже +10 °С изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

ВНИМАНИЕ! Для введения в эксплуатацию стола, освободите его от транспортной упаковки. Произведите сборку изделия согласно инструкции по сборке.

6.1.2. После сборки столика проверьте следующее:

- закрывание и открывание двери, выдвижение ящиков обеспечивается без усилий, отсутствие перекосов относительно стенок столика;

- устройства, предотвращающие самопроизвольное открывание двери под действием неровности пола и выпадение ящиков из корпуса при их выдвижении, выполняют свое функциональное назначение.

6.2. Ограничения в процессе эксплуатации стола:

6.2.1. Во избежание преждевременного выхода из строя столика не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;

- скапливания жидкости на поверхностях стола, в том числе и во время дезинфекции;

- подвергать поверхности столика воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности.

7. Гарантия изготовителя

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при условии соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. Гарантийный срок хранения 18 месяцев со дня изготовления в транспортной упаковке предприятия-изготовителя.

7.3. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня отгрузки или продажи через розничную торговую сеть.

8. Техническое обслуживание

8.1. Техническое обслуживание стола включает в себя:

- поддержание технического состояния стола в виде:

а) визуального осмотра всей конструкции изделия не реже одного раза в месяц;

б) протяжки винтов дверной ручки и ручек ящиков не реже одного раза в месяц;

в) протяжки всей крепежной фурнитуры конструкции не реже одного раза в 6 месяцев;

- очистки от загрязнений внешних и внутренних поверхностей стола путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);

- дезинфекции поверхностей столика путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещено изделие.

9. Ремонт

9.1. Ремонт стола включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют функции устройства, обеспечивающих полную функциональность стола.

Шкаф, потерявший потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к

твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовался шкаф по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Свидетельство о приемке

Шкаф медицинский для фармпрепаратов ШМФ-01-«ЕЛАТ» изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.101 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Код 7150

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,
Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25


Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13

E-mail: lpz@elamed.com

Сайт: lpz.elamed.com



Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/09377 от 21.12.2017 г.

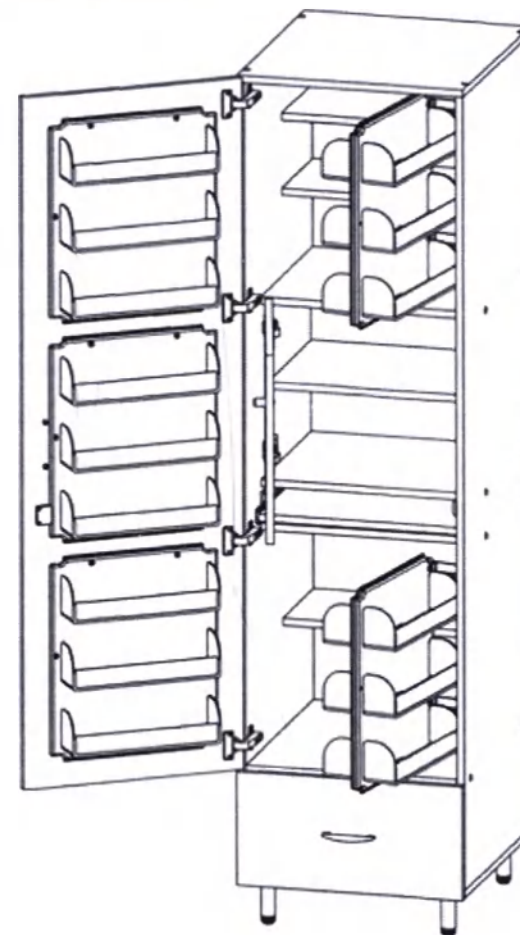

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ
МАТЕРИАЛОВ НМП-01-«ЕЛАТ» по ГИКС.942810.101 ТУ

**ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ
ДЛЯ ФАРМПРЕПАРАТОВ
ШМФ-01-«ЕЛАТ»**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Шкаф медицинский для фармпрепаратов ШМФ-01-«ЕЛАТ» (в дальнейшем шкаф), предназначен для применения в специальном медицинском помещении (процедурном кабинете, операционной, лабораториях и т.д.) для размещения медицинских изделий, фармпрепаратов, для проведения медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека, и подвергается дезинфекционной обработке.

Показания к применению: Шкаф используется в процедурном, смотровом кабинетах, аптеках для хранения фармпрепаратов.

Противопоказания: не имеет.

Меры предосторожности:

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ нагружать рабочие поверхности полок выше норм, установленных в п. 2.2!

1. Основные параметры и размеры

1.1. Масса изделия не более 110 кг.

1.2. Габаритные размеры не более 1020x620x1950 мм.

2. Характеристики

2.1. Средний срок службы не менее 5 лет.

2.2. Нагрузочные характеристики шкафа при равномерном распределении нагрузки:

- на дверь с полками – не менее 7 кг;
- на дно ящика из плиты ламинированной древесноволокнистой – (10 ± 1) кг;
- на полку из плиты ламинированной древесноволокнистой – (25 ± 1) кг;
- на выдвижную полку – (10 ± 1) кг.

2.3. При эксплуатации шкаф устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-92 для исполнения УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150-69 (от +10 °C до +35 °C).

3. Комплектность

- Шкаф медицинский для фармпрепаратов ШМФ-01-«ЕЛАТ» - 1 шт.;

- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

4. Транспортирование и хранение

4.1. Шкаф транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2. Шкаф транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50 °C до +50 °C, относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25 °C).

4.3. Условия хранения шкафа в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50 °C до +40 °C и относительная влажность не более 98% при +25 °C).

5. Дезинфекция

5.1. Поверхности шкафа устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

Примечание:

1. Допускается использование при дезинфекции наружных поверхностей шкафа и его составных частей растворов всех разрешенных в медицинской практике средств.

5.2. Наружные поверхности стенок, дверок, ящиков и полок устойчивы к протиранию ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства.

6. Правила эксплуатации

При эксплуатации шкафа в исправности или правильной работе изделия, при поврежденных составных частях изделия обратитесь к предприя-

тию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО

6.1. Подготовка к работе:

6.1.1. После хранения шкафа или перевозки его в упаковке при температуре ниже +10 °C изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

ВНИМАНИЕ! Для введения в эксплуатацию шкафа, освободите его от транспортной упаковки. Произведите сборку изделия согласно инструкции по сборке.

6.1.2. После сборки шкафа проверьте следующее:

- закрывание и открывание дверей, выдвижение ящиков обеспечивается без усилий, отсутствие перекосов как относительно друг друга, так и относительно стенок шкафа;

- устройства, предотвращающие самопроизвольное открывание дверей под действием неровности пола и выпадение ящиков из корпуса при их выдвижении, выполняют свое функциональное назначение.

6.2. Ограничения в процессе эксплуатации шкафа:

6.2.1. Во избежание преждевременного выхода из строя шкафа не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;

- скапливания жидкости на поверхностях шкафа, в том числе и во время дезинфекции;

- подвергать поверхности шкафа воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности.

7. Гарантия изготовителя

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при условии соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. Гарантийный срок хранения 18 месяцев со дня изготовления в транспортной упаковке предприятия-изготовителя.

7.3. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня отгрузки или продажи через розничную торговую сеть.

8. Техническое обслуживание

8.1. Техническое обслуживание шкафа включает в себя:

- поддержание технического состояния шкафа в виде:

- а) визуального осмотра всей конструкции изделия не реже одного раза в месяц;
- б) протяжки винтов дверных ручек и ручек ящиков не реже одного раза в месяц;
- в) протяжки всей крепежной фурнитуры конструкции не реже одного раза в 6 месяцев;

- очистки от загрязнений внешних и внутренних поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);

- дезинфекцию поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещено изделие.

9. Ремонт

9.1. Ремонт шкафа включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют функции устройства, обеспечивающих полную функциональность шкафа.

10. Утилизация

9. Ремонт

9.1. Ремонт тумбочки включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют функции устройства, обеспечивающих полную функциональность тумбочки.

10. Утилизация

10.1. Тумбочка, потерявший потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовалась тумбочка по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Свидетельство о приемке

Тумбочка медицинская кабинетная ТМК-01-«ЕЛАТ» изготовлена и принята в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.101 ТУ и признана годной для эксплуатации.

Код 828

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»


Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,
Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13

E-mail: lpu@elamed.com

Сайт: lpu.elamed.com

Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/09377 от 21.12.2017

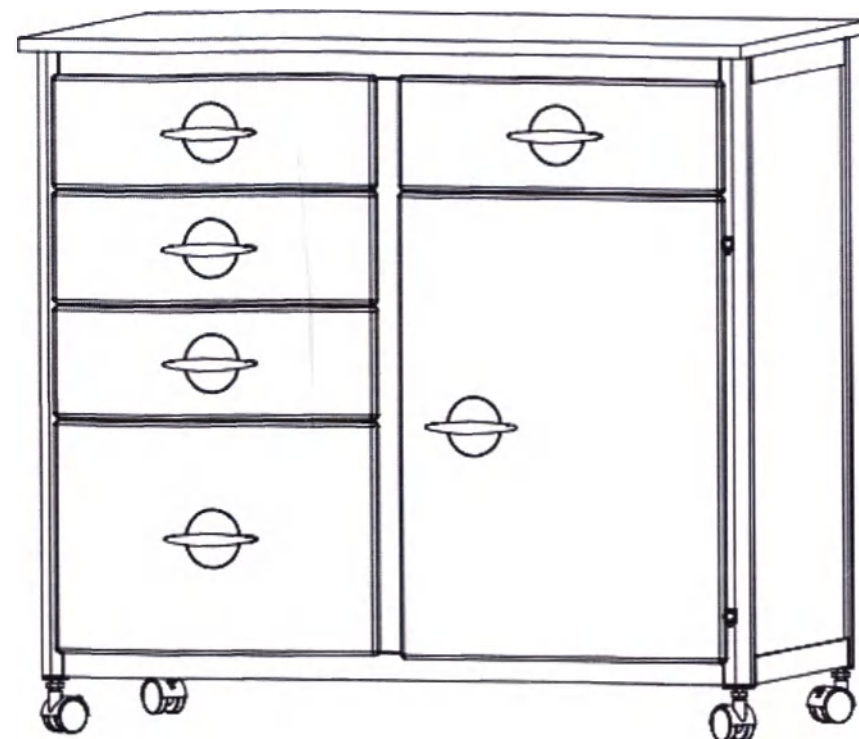

**НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ
МАТЕРИАЛОВ НМП-01-«ЕЛАТ» по ГИКС.942810.101 ТУ**

**ТУМБОЧКА
МЕДИЦИНСКАЯ КАБИНЕТНАЯ
ТМК-01-«ЕЛАТ»**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тумбочка медицинская кабинетная ТМК-01-«ЕЛАТ» (в дальнейшем тумбочка), предназначена для применения в специальном медицинском помещении (процедурном кабинете, операционной, лабораториях и т.д.) для размещения медицинских изделий, фармпрепаратов, для проведения медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека, и подвергается дезинфекционной обработке.

Показания к применению: Тумбочка устанавливается в смотровом, процедурном кабинетах или кабинете врача по профилю для размещения и хранения медицинских изделий.

Противопоказания: не имеет.

Меры предосторожности:

! При значительной загрузке ящика не следует выдвигать ящик полностью, необходимо придерживать ящик снизу для предупреждения опрокидывания тумбочки!

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ облакачиваться и надавливать на верхние грани выдвинутого ящика и открытых дверей!

1. Основные параметры и размеры

- 1.1. Масса изделия не более 50 кг.
- 1.2. Габаритные размеры не более 900x500x870 мм.

2. Характеристики

- 2.1. Средний срок службы не менее 5 лет.
- 2.2. Нагрузочные характеристики тумбочки при равномерном распределении нагрузки:

- на столешницу – (25±1) кг;
- на полку полимерную – (6±1) кг;
- на дно ящика полимерного – (10±1) кг.

2.3. При эксплуатации тумбочка устойчива к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-92 для исполнения УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150-69 (от +10 °С до +35 °С).

3. Комплектность

Тумбочка медицинская кабинетная ТМК-01-«ЕЛАТ» - 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

4. Транспортирование и хранение

4.1. Тумбочка транспортируется в частично собранном виде в транспортной упаковке.

4.2. Тумбочка транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50 °С до +50 °С, относительная влажность воздуха до 100% при температуре +25 °С).

4.3. Условия хранения тумбочки в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50 °С до +40 °С и относительная влажность не более 98% при +25 °С).

5. Дезинфекция

5.1. Поверхности тумбочки устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

Примечание:

1. Допускается использование при дезинфекции наружных поверхностей тумбочки средств ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU с разрешенных в медицинской практике средств.

5.2. Наружные поверхности стенок, дверки, ящиков и полки устойчивы к протира-

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильной работе изделия, при поврежденных составных частях изделия обратитесь к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО

6.1. Подготовка к работе:

6.1.1. После хранения тумбочки или перевозки её в упаковке при температуре ниже +10 °С изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

ВНИМАНИЕ! Для введения в эксплуатацию тумбочки, освободите её от транспортной упаковки. Открутите четыре болта, удерживающие тумбочку на деревянной раме, снимите тумбочку с рамы и произведите сборку изделия согласно инструкции по сборке.

6.1.2. После сборки тумбочки проверьте следующее:

- закрывание и открывание двери, выдвижение ящиков обеспечивается без усилий, отсутствие перекосов относительно стенок тумбочки;
- устройства, предотвращающие самопроизвольное открывание двери под действием неровности пола и выпадение ящиков из корпуса при их выдвижении, выполняют свое функциональное назначение.

6.2. Ограничения в процессе эксплуатации тумбочки:

- 6.2.1. Во избежание преждевременного выхода из строя тумбочки не допускается:
 - нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;
 - скапливания жидкости на поверхностях тумбочки, в том числе и во время дезинфекции;
 - подвергать поверхности тумбочки воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности.

7. Гарантия изготовителя

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при условии соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. Гарантийный срок хранения 18 месяцев со дня изготовления в транспортной упаковке предприятия-изготовителя.

7.3. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня отгрузки или продажи через розничную торговую сеть.

8. Техническое обслуживание

8.1. Техническое обслуживание тумбочки включает в себя:

- поддержание технического состояния тумбочки в виде:
 - а) визуального осмотра всей конструкции изделия не реже одного раза в месяц;
 - б) протяжки винтов дверной ручки и ручек ящиков не реже одного раза в месяц;
 - в) контроля фиксации колёс не реже одного раза в месяц, как устройств обеспечивающих передвижения тумбочки;
 - г) протяжки всей крепёжной фурнитуры конструкции не реже одного раза в 6 месяцев;
 - очистки от загрязнений внешних и внутренних поверхностей тумбочки путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);
 - дезинфекции поверхностей тумбочки путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещено изделие.

10.1. Тумбочка, потерявшая потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологических безопасных отходов, приближенные по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами принятой в организации, где использовалась тумбочка по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Свидетельство о приемке

Тумбочка медицинская прикроватная ТМП-01-«ЕЛАТ» изготовлена и принята в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.101 ТУ и признана годной для эксплуатации.

Код 852

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:


АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,
Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13

E-mail: lpu@elamed.com

Сайт: lpu.elamed.com

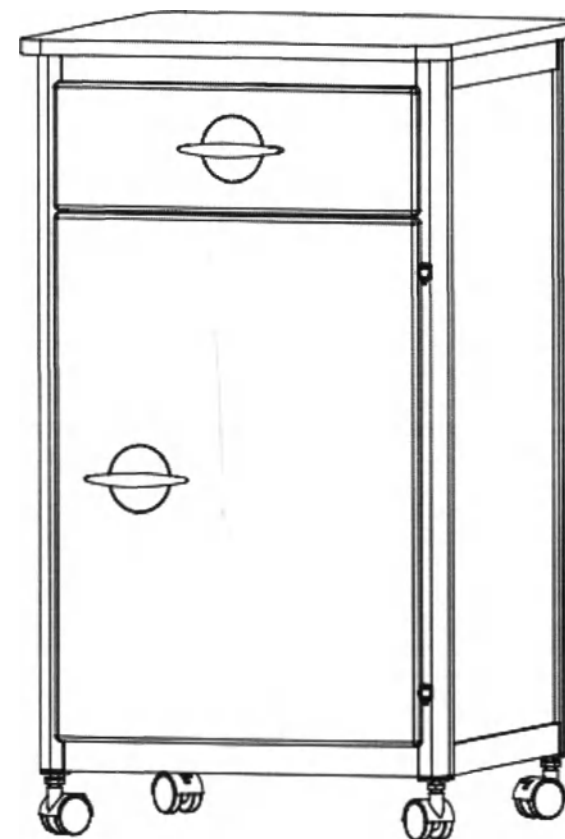

Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/09377 от 21.12.2017



НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ
МАТЕРИАЛОВ НМП-01-«ЕЛАТ» по ГИКС.942810.101 ТУ

**ТУМБОЧКА
МЕДИЦИНСКАЯ ПРИКРОВАТНАЯ
ТМП-01-«ЕЛАТ»**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тумбочка медицинская прикроватная ТМП-01-«ЕЛАТ» (в дальнейшем тумбочка), предназначена для применения в специальном медицинском помещении (процедурном кабинете, операционной, лабораториях и т.д.) для размещения медицинских изделий, фармпрепаратов, для проведения медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека, и подвергается дезинфекционной обработке

Показания к применению: Тумбочка предназначена для установки в медицинском учреждении для размещения медицинских изделий.

Противопоказания: не имеет.

Меры предосторожности:

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ облакачиваться и надавливать на верхние грани открытой двери и выдвинутого ящика!

1. Основные параметры и размеры

- 1.1. Масса изделия не более 20 кг.
- 1.2. Габаритные размеры не более 500x450x870 мм.

2. Характеристики

- 2.1. Средний срок службы не менее 5 лет.
- 2.2. Нагрузочные характеристики тумбочки при равномерном распределении нагрузки:

- на столешницу – (25±1) кг;
- на полку полимерную – (6±1) кг;
- на дно ящика полимерного – (10±1) кг.

2.3. При эксплуатации тумбочка устойчива к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-92 для исполнения УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150-69 (от +10 °C до +35 °C).

3. Комплектность

- Тумбочка медицинская прикроватная ТМП-01-«ЕЛАТ» - 1 шт.;
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

4. Транспортирование и хранение

- 4.1. Тумбочка транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.
- 4.2. Тумбочка транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50 °C до +50 °C, относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25 °C).

4.3. Условия хранения тумбочки в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50 °C до +40 °C и относительная влажность не более 98% при +25 °C).

5. Дезинфекция

5.1. Поверхности тумбочки устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003

Примечание:

1. Допускается использование при дезинфекции наружных поверхностей тумбочки и её составных частей растворов всех разрешенных в медицинской практике средств.

5.2. Наружные поверхности стенок, дверки, ящика и полок устойчивы к протиранию ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства.

6. Правила эксплуатации

В случае возникновения неисправности или неправильной работы изделия, при повреждении составных частей изделия обратитесь к предприя-

тию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО

6.1. Подготовка к работе:

6.1.1. После хранения тумбочки или перевозки её в упаковке при температуре ниже +10 °C изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

ВНИМАНИЕ! Для введения в эксплуатацию тумбочки, освободите её от транспортной упаковки. Произведите сборку изделия согласно инструкции по сборке.

6.1.2. После сборки тумбочки проверьте следующее:

- закрывание и открывание двери, выдвижение ящика обеспечивается без усилий, отсутствие перекосов относительно стенок тумбочки;
- устройства, предотвращающие самопроизвольное открывание двери под действием неровности пола и выпадение ящика из корпуса при его выдвижении, выполняют свое функциональное назначение.

6.2. Ограничения в процессе эксплуатации тумбочки:

- 6.2.1. Во избежание преждевременного выхода из строя тумбочки не допускается:
 - нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;
 - скапливания жидкости на поверхностях тумбочки, в том числе и во время дезинфекции;
 - подвергать поверхности тумбочки воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности.

7. Гарантия изготовителя

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при условии соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. Гарантийный срок хранения 18 месяцев со дня изготовления в транспортной упаковке предприятия-изготовителя.

7.3. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня отгрузки или продажи через розничную торговую сеть.

8. Техническое обслуживание

8.1. Техническое обслуживание тумбочки включает в себя:

- поддержание технического состояния тумбочки в виде:
 - а) визуального осмотра всей конструкции изделия не реже одного раза в месяц;
 - б) протяжки винтов дверной ручки и ручки ящика не реже одного раза в месяц;
 - в) контроля фиксации колёс не реже одного раза в месяц, как устройств обеспечивающих передвижения тумбочки;
 - г) протяжки всей крепёжной фурнитуры конструкции не реже одного раза в 6 месяцев;
- очистки от загрязнений внешних и внутренних поверхностей тумбочки путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);
- дезинфекции поверхностей тумбочки путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещено изделие.

9. Ремонт

9.1. Ремонт тумбочки включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют функции устройства, обеспечивающих полную функциональность тумбочки.

10. Утилизация

утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещено изделие.

9. Ремонт

9.1. Ремонт стола включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют функции устройства, обеспечивающих полную функциональность стола.

10. Утилизация

10.1. Стол-тумба, потерявший потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовался стол-тумба по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Свидетельство о приемке

Стол-тумба медицинский лабораторный СТМЛ-01-«ЕЛАТ» изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.101 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Код **5885**

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:


АО «Елатомский приборный завод»

**Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,
Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25**

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13

E-mail: ipu@elamed.com

Сайт: ipu.elamed.com

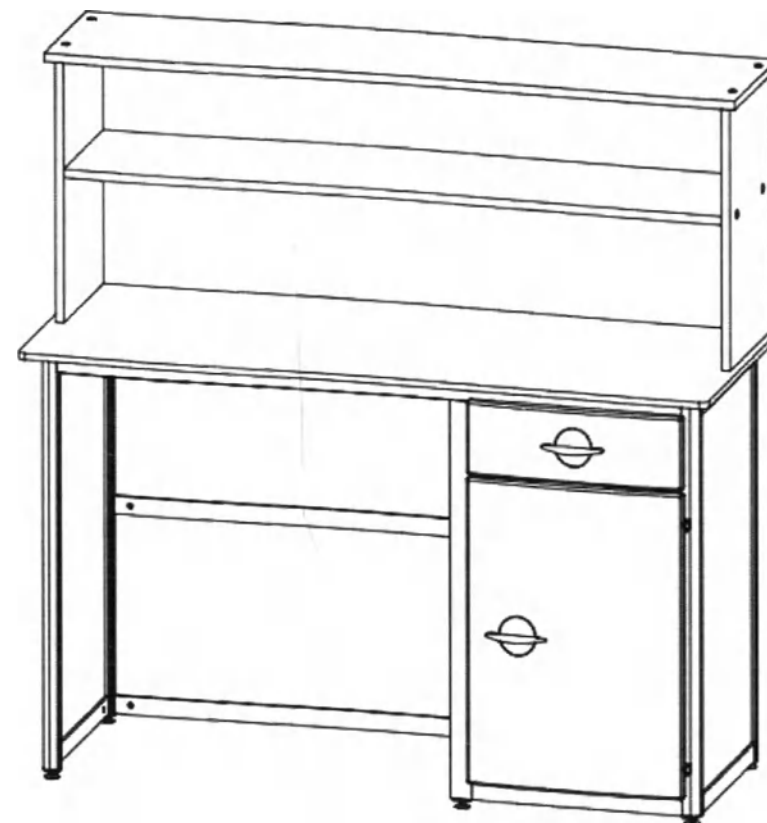

Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/09377 от 21.12.2017



Степанов В. А.
24.12.2021

**НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ
МАТЕРИАЛОВ НМП-01-«ЕЛАТ» по ГИКС.942810.101 ТУ**

**СТОЛ-ТУМБА МЕДИЦИНСКИЙ
ЛАБОРАТОРНЫЙ
СТМЛ-01-«ЕЛАТ»**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Стол-тумба медицинский лабораторный СТМЛ-01-«ЕЛАТ» (в дальнейшем стол-тумба), предназначен для применения в специальном медицинском помещении (процедурном кабинете, операционной, лабораториях и т.д.) для размещения медицинских изделий, фармпрепаратов, для проведения медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека, и подвергается дезинфекционной обработке.

Показания к применению: Стол-тумба устанавливается в процедурном кабинете или лаборатории для проведения медицинских исследований.

Противопоказания: не имеет.

Меры предосторожности:

!Перед использованием стола проверьте его устойчивость!

!При значительной загрузке ящика не следует выдвигать ящик полностью, необходимо придерживать ящик снизу для предупреждения опрокидывания стола!

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ облакачиваться и надавливать на верхние грани выдвинутого ящика!

1. Основные параметры и размеры

1.1. Масса изделия не более 45 кг.

1.2. Габаритные размеры не более 1300x800x1300 мм.

2. Характеристики

2.1. Средний срок службы не менее 5 лет.

2.2. Нагрузочные характеристики стола-тумбы при равномерном распределении нагрузок:

- на столешницу – (25±1) кг;

- на полку из плиты ламинированной древесноволокнистой – (25±1) кг;

- на полимерную полку – (6±1) кг;

- на дно ящика полимерного – (10±1) кг.

2.3. При эксплуатации стола-тумбы устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-92 для исполнения УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150-69 (от +10 °С до +35 °С).

3. Комплектность

Стол-тумба медицинский лабораторный СТМЛ-01-«ЕЛАТ» - 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

4. Транспортирование и хранение

4.1. Стол-тумба транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2. Стол-тумба транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50 °С до +50 °С, относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25 °С).

4.3. Условия хранения стола-тумбы в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50 °С до +40 °С и относительная влажность не более 98% при +25 °С).

5. Дезинфекция

5.1. Поверхности стола-тумбы устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

Примечание:

1. Допускается использование при дезинфекции наружных поверхностей стола-тумбы средств, разрешенных в медицинской практике.

5.2. Наружные поверхности стенок, дверки, ящика и полок устойчивы к протираанию ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильной работе изделия, при повреждении составных частей изделия обратитесь к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии

8 800 350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО

6.1. Подготовка к работе:

6.1.1. После хранения стола-тумбы или перевозки ее в упаковке при температуре ниже +10 °С изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

ВНИМАНИЕ! Для введения в эксплуатацию стола-тумбы, освободите его от транспортной упаковки. Произведите сборку изделия согласно инструкции по сборке.

6.1.2. После сборки стола-тумбы проверьте следующее:

- закрывание и открывание двери, выдвижение ящика обеспечивается без усилий, отсутствие перекосов относительно стенок стола-тумбы;

- устройства, предотвращающие самопроизвольное открывание двери под действием неровности пола и выпадение ящика из корпуса при его выдвижении, выполняют свое функциональное назначение.

6.2. Ограничения в процессе эксплуатации стола-тумбы:

6.2.1. Во избежание преждевременного выхода из строя стола-тумбы не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;

- скапливания жидкости на поверхностях стола-тумбы, в том числе и во время дезинфекции;

- подвергать поверхности стола-тумбы воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности.

7. Гарантия изготовителя

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при условии соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. Гарантийный срок хранения 18 месяцев со дня изготовления в транспортной упаковке предприятия-изготовителя.

7.3. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня отгрузки или продажи через розничную торговую сеть.

8. Техническое обслуживание

8.1. Техническое обслуживание стола включает в себя:

- поддержание технического состояния стола в виде:

а) визуального осмотра всей конструкции изделия не реже одного раза в месяц;

б) протяжки винтов дверной ручки и ручки ящика не реже одного раза в месяц;

в) протяжки всей крепежной фурнитуры конструкции не реже одного раза в 6 месяцев;

- очистки от загрязнений внешних и внутренних поверхностей стола путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);

- дезинфекции поверхностей стола-тумбы путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной