

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «ПАКС-ТРЕЙД»
Зыкова Е.В.
«28» января 2022 г.



ПАСПОРТ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
Тумбы медицинские подкатные ПАКС металл
по ТУ 32.50.30-003-96303248-2021
(ВЕРСИЯ 1.1)

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Перед началом сборки обязательно ознакомьтесь с инструкцией.
Вы, также, можете ознакомиться с подробной видео-инструкцией на нашем сайте
paksnet.ru

СТАРЫЙ ДРУГ ПУШЕ

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ WWW.PAKSNET.RU

ПАКС
МЕБЕЛЬ

ООО «ПАКС-ТРЕЙД»
г. Химки



Тумба медицинская подкатная ПАКС металл ТП-1



Тумба медицинская подкатная ПАКС металл ТП-2



Тумба медицинская подкатная ПАКС металл ТП-3



Тумба медицинская подкатная ПАКС металл ТП-4

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Согласно руководству по эксплуатации.

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура: от +5 до +40 °С.

Влажность: до 80%.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Основные параметры и размеры

3.1.1 Основные параметры и размеры представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
Тумба медицинская подкатная ПАКС металл ТП-1	890х550х120	15,6	16,5
Тумба медицинская подкатная ПАКС металл ТП-2	423х492х655/716*	890х550х120	14,6
Тумба медицинская подкатная ПАКС металл ТП-3	423х492х655/716*	890х550х120	15,8
Тумба медицинская подкатная ПАКС металл ТП-4	423х492х655/716*	890х550х130	17,1

3.2 Характеристики

Тумбы представляют собой разборные конструкции основными частями являются: боковые и задние стенки, корпус, дно, ручки, саморезы, четыре самоориентирующихся пластиковых поворотных колеса, вращающихся вокруг вертикальной оси, без тормоза, магнитные защелки, дверь и подвесные элементы (полки), корпуса ящиков, лицевая и торцевая панели ящиков, комплект направляющих. В зависимости варианта исполнения делятся:

- **Тумба медицинская подкатная ПАКС металл ТП-1:** один выдвижной ящик, одна распашная дверь;
- **Тумба медицинская подкатная ПАКС металл ТП-2:** одна полка, одна распашная дверь;
- **Тумба медицинская подкатная ПАКС металл ТП-3:** один выдвижной ящик, одна распашная дверь, одна полка;
- **Тумба медицинская подкатная ПАКС металл ТП-4:** три выдвижных ящика.

3.2.1 Ящики тумбы оснащены мебельными ручками. Дверцы тумбы оснащены мебельными ручками с магнитной системой закрывания.

3.2.2 Зазоры между дверью и корпусом тумб должны быть равномерными. Зазоры в проемах не должны превышать:

- для дверей – 2 мм;
- для наружных ящиков с передними стенками, входящими в проем – 1,5 мм;
- конструкция мебели должна обеспечивать удобство уборки тумб и помещения;
- двери должны открываться на угол не менее 100°

3.2.3 Эксплуатационная нагрузка на полку тумбы должна быть не более 25 кг, эксплуатационная нагрузка на основание тумбы должна быть не более 25 кг.

3.2.4 Предельные отклонения от габаритных размеров изделий не должны превышать следующих: до 2000 мм предельное отклонение ± 4 мм;

Покоробленность щитовых деталей шириной 300-600 мм не должна превышать 0,2 мм.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1 В комплект поставки входит:

- тумба в одном варианте исполнения
- паспорт
- руководство по эксплуатации

4.2 Комплект поставки мебели медицинской, должен соответствовать указанному в

Таблице 2.

Таблица 2

Вариант исполнения	Обозначение детали	Кол-во, шт.
Тумба медицинская подкатная ПАКС металл ТП-1	Дно	1
	Боковая стенка правая	1
	Боковая стенка левая	1
	Стенка задняя	1
	Крыша	1
	Дверь	1
	Полка средняя	1
	Полка	1
	Корпус ящика	1
	Лицевая панель ящика	1
	Торцевая панель ящика	2
	Комплект направляющих	1
	Ось с пластиковым наконечником	1
	Ось с металлическим наконечником	2
	Ручка	2
	Саморез 4.5x13	18
	Колесо	4
	Магнитная защелка	1
Тумба медицинская подкатная ПАКС металл ТП-2	Дно	1
	Боковая стенка правая	1
	Боковая стенка левая	1
	Стенка задняя	1
	Крыша	1
	Дверь	1
	Полка средняя	1
	Полка	1
	Ось с пластиковым наконечником	1
	Ось с металлическим наконечником	2
	Ручка	1
	Саморез 4.5x13	6
	Колесо	4
	Магнитная защелка	1
	Дно	1
Тумба медицинская подкатная ПАКС металл ТП-3	Боковая стенка правая	1
	Боковая стенка левая	1
	Стенка задняя	1
	Крыша	1
	Дверь	1
	Полка средняя	1
	Полка нижняя	1
	Корпус ящика	1
	Лицевая панель ящика	1
	Торцевая панель ящика	2
	Комплект направляющих	1

	Ось с пластиковым наконечником	1
	Ось с металлическим наконечником	2
	Ручка	2
	Саморез 4.5x13	20
	Колесо	4
	Магнитная защелка	1
	Дно	1
Тумба медицинская подкатная ПАКС металл ТП-4	Боковая стенка правая	1
	Боковая стенка левая	1
	Стенка задняя	1
	Крыша	1
	Корпус ящика	3
	Лицевая панель ящика	3
	Торцевая панель ящика	6
	Комплект направляющих	3
	Ручка	3
	Саморез 4.5x13	40
	Колесо	4

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 К эксплуатации допускаются лица, внимательно изучившие настоящий паспорт и конструкцию изделия.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 После транспортирования в условиях отрицательных температур, перед распаковкой выдержать в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.

6.2 Распаковать и проверить целостность покрытия.

6.3 Проверить комплектность.


6.4 Произвести дезинфекцию. Поверхности обрабатывают дезинфицирующим средством в соответствии с методическим документом по применению конкретного средства.

7. ПОРЯДОК СБОРКИ


Инструкция по сборке

Пример сборки на варианте исполнения Тумба медицинская подкатная ПАКС МЕТАЛЛ ТП-1:


7.1 Установка боковых стенок: установить дно на плоскую ровную горизонтальную поверхность. Установить правую боковую стенку, сначала вставив ее переднюю часть в соответствующий паз дна, а затем надвинув заднюю часть на дно. Аналогичным образом установить левую боковую стенку.

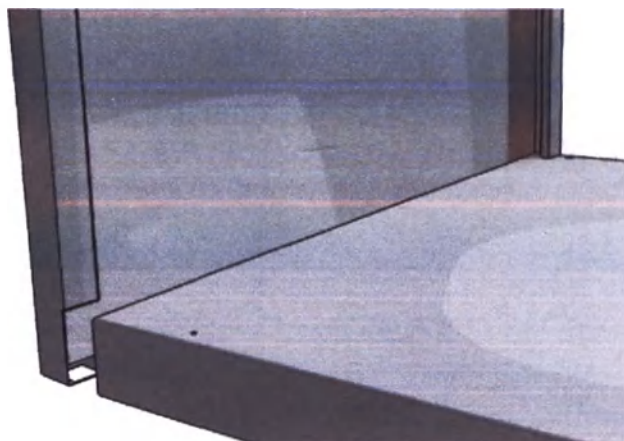


7.2 Установка задних стенок: установить заднюю стенку, вставив ее в соответствующие пазы боковых стенок. Нижнюю часть стенки задвинуть до упора в паз боковой стенки, а верхнюю – не доводя до конца миллиметров на двадцать.

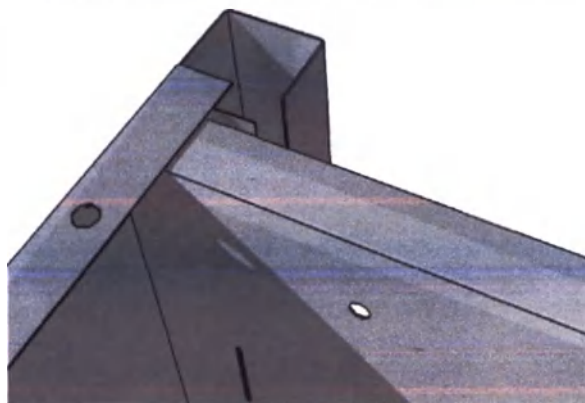


Прикрепить стенку к дну с помощью двух саморезов.

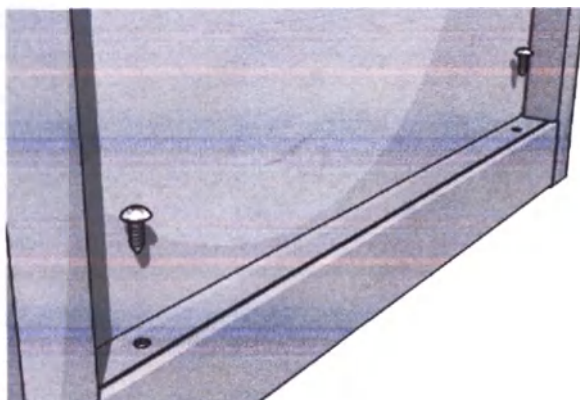


7.3 Установка крыши: вставить нижний отгиб в передней части крыши в соответствующие пазы в передней части боковых стенок. Задвинуть крышу назад до упора и опустить заднюю часть. Задвинуть до конца верхнюю часть задней стенки в пазы боковых стенок. Прикрепить крышу к задней стенке с помощью саморезов.

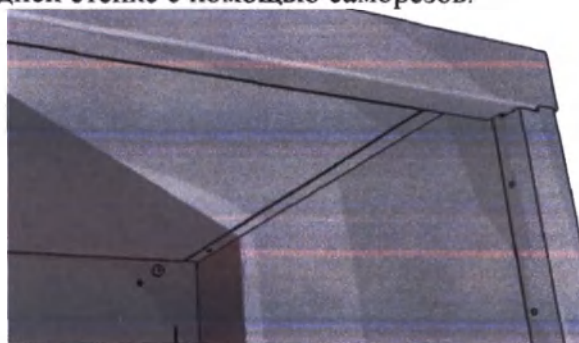


7.4 Установка средней полки: завести полку внутрь тумбы и, слегка приподняв заднюю часть, вставить ее в соответствующие пазы в боковых стенках.

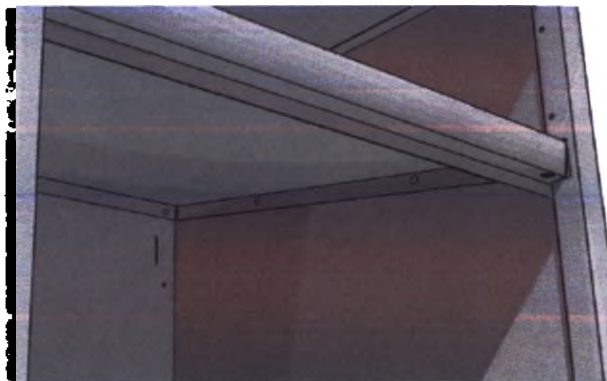


Прикрепить среднюю полку к задней стенке с помощью саморезов.

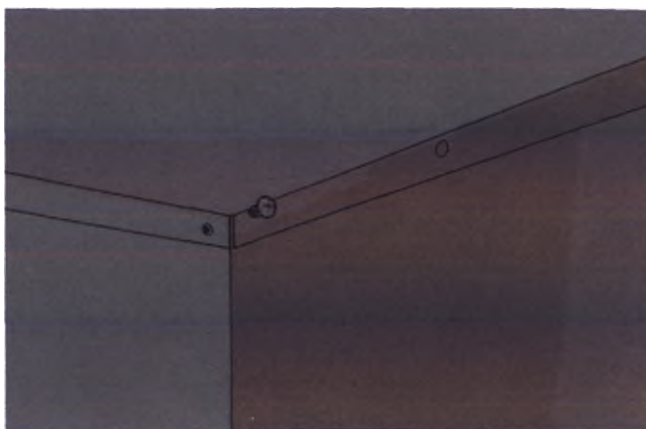


На дно тумбы установить магнитные защелки, прикрепив их с помощью саморезов.

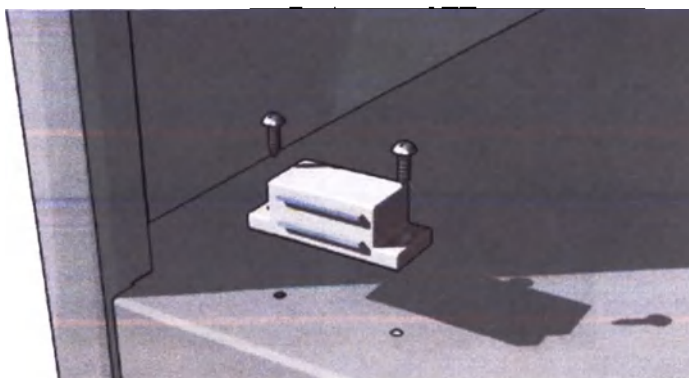


7.5 Установка колес: перевернуть тумбу дном вверх и ввинтить колеса в соответствующие резьбовые отверстия.

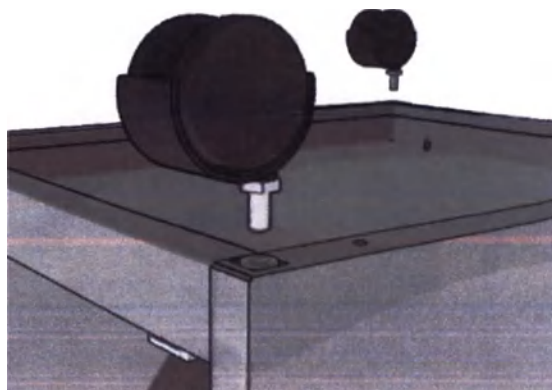


7.6 Установка полок: установить полку, надев ее на соответствующие крючки на боковых стенках.

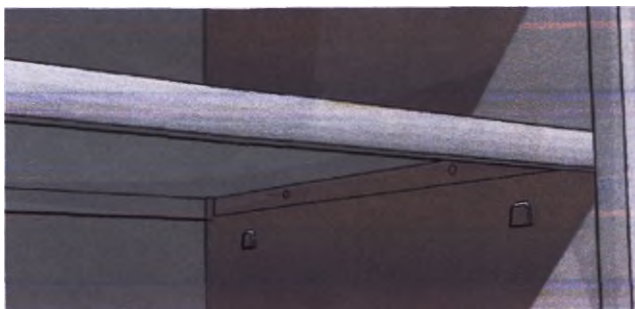


7.7 Установка дверей: вставить ось с металлическим наконечником в соответствующее отверстие дна. Вставить ось с пластиковым наконечником в соответствующее отверстие средней полки. Надеть дверь соответствующим отверстием на верхнюю ось.

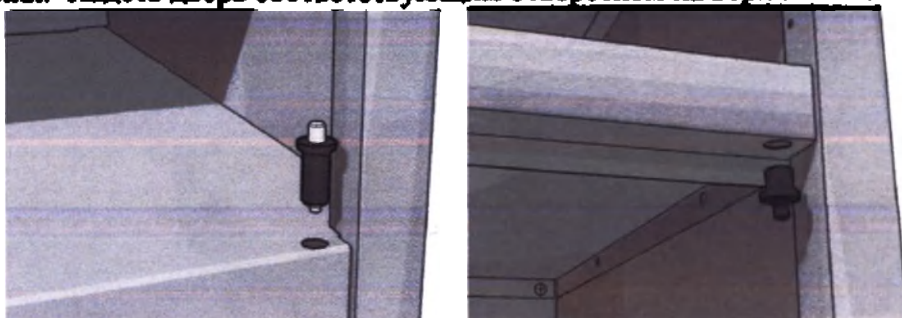

Надеть дверь соответствующим отверстием на верхнюю ось.

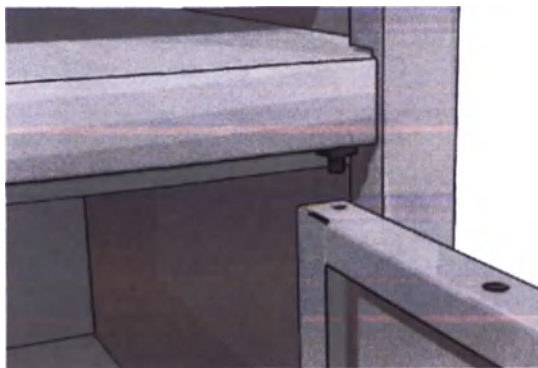


«Утопив» подпружиненный металлический наконечник нижней оси, разместить дверь над нижней осью и совместить соответствующее отверстие в двери с осью до выщелкивания наконечника.

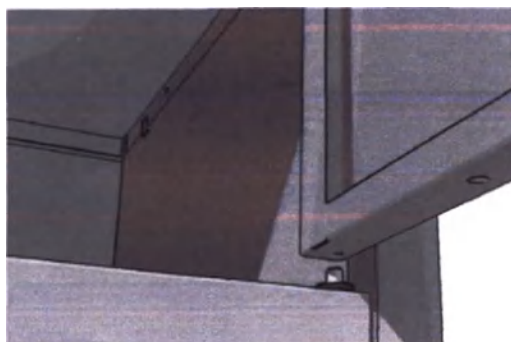


Установить ручку, прикрепив ее к двери с помощью двух винтов.




7.8 Установка ящиков: отогнуть по линиям перфорации боковые стенки корпуса ящика. Присоединить к корпусу ящика торцевую стенку с помощью саморезов.

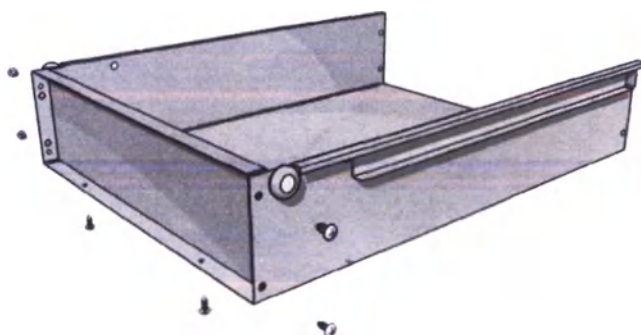


На лицевую панель ящика установить ручку, прикрепив ее с помощью двух винтов.

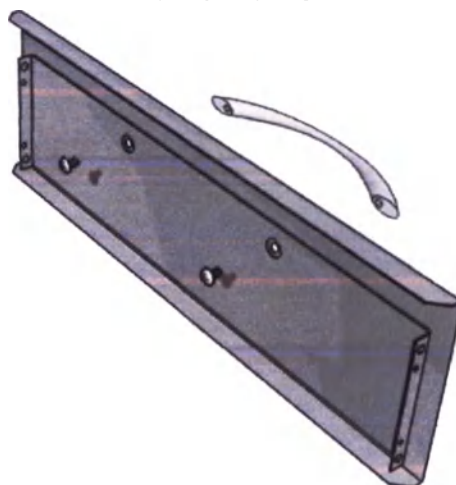


Присоединить лицевую панель к корпусу ящика, на кронштейн лицевой панели надвинуть торцевую панель и закрепить полученную сборку с помощью саморезов.

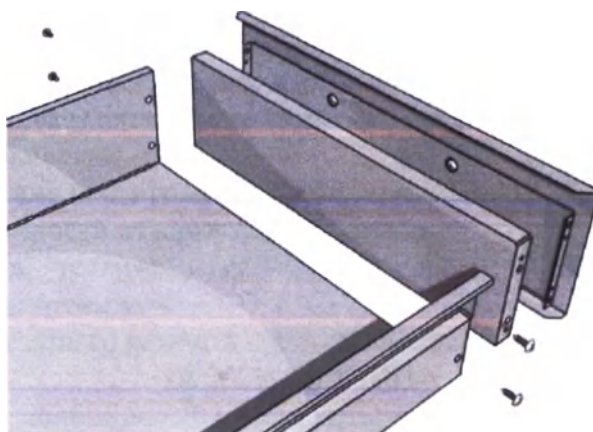

Установить направляющие, вставив их в соответствующие пазы в задней стенке и закрепив в передней части саморезами.

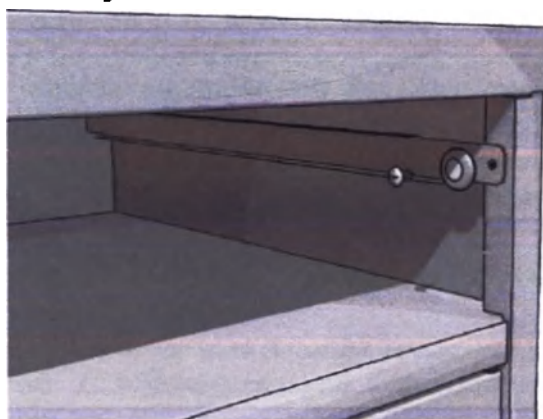

Установить ящик на направляющие. Вставить заглушки в соответствующие отверстия.

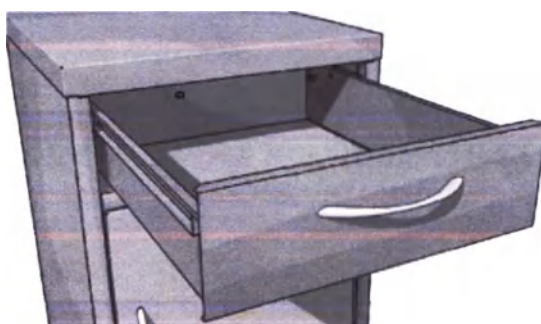

Изделие готово к эксплуатации!

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации (проводится один раз в полгода) заключается в проверке и подтяжке всех видов резьбовых соединений, замене, при необходимости, годными деталями поломанных или изношенных, промывке моющими растворами и санитарной обработке мебели медицинской.

8.2 Проверка технического состояния, с целью установления возможности дальнейшего использования мебели медицинской, проводится на соответствие технических характеристик и комплектности настоящего паспорта, при этом проверяется отсутствие погнутых и изношенных деталей, вмятин, коррозии металла, надежность всех видов соединений и креплений.

8.3 Критерием предельного состояния является состояние изделий, при которых дальнейшая эксплуатация недопустима и нецелесообразна по условиям экономичности.

9. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

9.1 Общие положения:

9.2 Текущий ремонт производится специалистами предприятия-изготовителя.

9.3 Текущий ремонт включает следующие этапы:

- 1) обнаружение неисправностей;
- 2) отыскание и исправление неисправностей или замена частей;
- 3) проверка работоспособности изделия после ремонта.

9.4 Текущий ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации производится специалистами завода-изготовителя.

9.5 После выполнения текущего ремонта проводится проверка технического состояния.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

10.1 Утилизация мебели медицинской осуществляется в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684 для отходов класса А.

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

11.1 Мебель медицинская транспортируется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

11.2 Транспортирование мебели медицинской морским транспортом производится в соответствии с "Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов". Вид отправки - контейнерами, мелкая малотоннажная, повагонная отправка.

11.3 Условия при транспортировке мебели медицинской соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

11.4 Условия хранения мебели медицинской - по группе условий хранения 2 (С) по ГОСТ Р 50444.

11.5 В упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от +10 до +40° С и относительной влажности от 45% до 80%. Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Мебель следует предохранять от загрязнений и механических повреждений.

11.6 Упакованные изделия должны транспортироваться и храниться в положении, указанном предупредительными знаками.

12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие мебели медицинской требованиям технических условий (устойчивость к дезинфекции, отсутствуют: расхождения полос облицовки, нахлестки, отслоения, пузыри под облицовкой, клеевые пятна, шлифовка, потертость, загрязнение поверхности, вырывы, вмятины, царапины, трещины, пятна, потеки клея, заусенцы и морщины) при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации мебели медицинской - не менее 12 месяцев со дня ввода её в эксплуатацию.

12.3 Гарантийный срок хранения мебели медицинской в упакованном виде 12 месяцев.

12.4 Средний срок службы мебели медицинской 10 лет.

12.5 В течение гарантийного срока изготовитель, осуществляющее гарантийное обслуживание, безвозмездно ремонтирует или заменяет мебель медицинскую или его составные части, пришедшие в негодность по вине изготовителя по предъявлении гарантийного талона, дефектной ведомости, составленной комиссией, с заявкой на ремонт.

13. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

13.1 В случае отказа изделий или неисправности их в период гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке владелец должен

направить в адрес предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, следующие документы: паспорт изделия, гарантийный талон.

Срок подготовки ответа от предприятия – изготовителя или от предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание владельцу составляет 30 календарных дней

13.2 Претензии по поводу качества направляются в Общество с ограниченной ответственностью «ПАКС-ТРЕЙД» (ООО «ПАКС-ТРЕЙД»), Адрес: Россия, 141420, Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, ул. Горная, д.21 А, офис 13, телефон: +7(495)574-21-85, +7 (495) 574-05-83, e-mail: info@paksmet.ru

13.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Свидетельство о приёмке:		
_____ Наименование и обозначение		
Изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации		
Начальник ОТК		
_____ Подпись		МП
_____ Расшифровка	_____ Дата	

14.ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН на ремонт (замену)

в течение гарантийного срока медицинского изделия

(наименование)	
Номер и дата выпуска _____ (заполняется заводом-изготовителем)	
Приобретен _____ (дата, подпись и штамп торгующей организации)	
Введен в эксплуатацию _____ (должность) (подпись) (Ф.И.О.)	« ____ » _____ 20 ____ г.

15.ПРАВИЛА ОТГРУЗКИ ТОВАРА СО СКЛАДА ООО «ПАКС-ТРЕЙД»

15. 1 Отгрузка товара

15.1.1Отгрузка товара осуществляется:

- Юридическим лицам – при наличии доверенности, паспорта и печати организации;
- Физическим лицам – при наличии паспорта.

15.1.2. Отгрузка товара на условиях самовывоза осуществляется со склада ООО «ПАКС-ТРЕЙД» представителю транспортной компании по заявке ООО «ПАКС-ТРЕЙД» или представителю транспортной компании по заявке Покупателя.

Адрес, режим работы склада и карту проезда вы можете посмотреть на нашем сайте paksmet.ru в разделе «Контакты».

15.1.3. Подача груза осуществляется только на борт автотранспортного средства.

Распределение, установка, закрепление груза в кузове осуществляется силами производителя.

15.1.4. Отгрузка товара наёмным транспортом:

- Дату и время доставки Покупатель согласовывает с отделом сбыта;
- Доставка осуществляется до подъезда на адрес, указанный при оформлении заказа.

Приём-передача товара осуществляется у автотранспорта Перевозчика. Выгрузка, подъём на этаж, сборка и прочее – не входит в услугу доставки и осуществляется силами и за счёт покупателя;

15.2. Приёмка товара покупателем

При приёмке товара Покупатель должен проверить соответствие маркировки и количество получаемого товара по накладной, а также осмотреть целостность упаковки Товара. В случае нарушения упаковки проверить целостность товара и составить коммерческий акт о повреждении груза в присутствии представителя транспортной компании.

Специально
предназначено
14 мая 2022



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «ПАКС-трейд»

Зыкова Е.В.

«28» января 2022 г.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Тумбы медицинские подкатные ПАКС металл
по ТУ 32.50.30-003-96303248-2021
(ВЕРСИЯ 01)

1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Тумбы медицинские подкатные ПАКС металл по ТУ 32.50.30-003-96303248-2021

2. ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

1. Тумба медицинская подкатная ПАКС металл ТП-1;
2. Тумба медицинская подкатная ПАКС металл ТП-2;
3. Тумба медицинская подкатная ПАКС металл ТП-3;
4. Тумба медицинская подкатная ПАКС металл ТП-4

3. НАЗНАЧЕНИЕ

применяются в специальных медицинских помещениях (в процедурном кабинете, операционной) для разделения пространства на отсеки для пациентов и рабочие зоны для персонала, для хранения медицинским персоналом расходных материалов, предназначенных для профилактики, диагностики, лечения заболеваний, для хранения лекарственных препаратов.

4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

лечебно-профилактические учреждения.

5. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

пациенты, медицинский персонал.

6. ПОКАЗАНИЯ

применяются в специальных медицинских помещениях (в процедурном кабинете, операционной) для разделения пространства на отсеки для пациентов и рабочие зоны для персонала, для хранения медицинским персоналом расходных материалов, предназначенных для профилактики, диагностики, лечения заболеваний, для хранения лекарственных препаратов.

7. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Отсутствуют.

8. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

8.1 Мебель должна соответствовать основным габаритным размерам, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
Тумба медицинская подкатная ПАКС металл ТП-1	423х492х655/716*	890х550х120	15,6	16,5
Тумба медицинская подкатная ПАКС металл ТП-2	423х492х655/716*	890х550х120	14,6	15,4
Тумба медицинская подкатная ПАКС металл ТП-3	423х492х655/716*	890х550х120	15,8	16,7

Тумба медицинская подкатная ПАКС металл ТП-4	423x492x655/716*	890x550x130	17,1	18
Примечание: 1) Допустимое отклонение от габаритных размеров $\pm 10\%$ 2) Допустимое отклонение от веса $\pm 10\%$ * высота с перекатными колесами.				

8.2 Функциональные характеристики

Тумбы представляют собой разборные конструкции основными частями являются: боковые и задние стенки, корпус, дно, ручки, саморезы, четыре самоориентирующихся пластиковых поворотных колеса, вращающихся вокруг вертикальной оси, без тормоза, магнитные защелки, дверь и подвесные элементы (полки), корпуса ящиков, лицевая и торцевая панели ящиков, комплект направляющих. В зависимости варианта исполнения делятся:

- **Тумба медицинская подкатная ПАКС металл ТП-1:** один выдвижной ящик, одна распашная дверь;
- **Тумба медицинская подкатная ПАКС металл ТП-2:** одна полка, одна распашная дверь;
- **Тумба медицинская подкатная ПАКС металл ТП-3:** один выдвижной ящик, одна распашная дверь, одна полка;
- **Тумба медицинская подкатная ПАКС металл ТП-4:** три выдвижных ящика.

8.3 Ящики тумбы оснащены мебельными ручками. Дверцы тумбы оснащены мебельными ручками с магнитной системой закрывания.

8.4 Зазоры между дверью и корпусом тумб должны быть равномерными. Зазоры в проемах не должны превышать:

- для дверей – 2 мм;
- для наружных ящиков с передними стенками, входящими в проем – 1,5 мм;
- конструкция мебели должна обеспечивать удобство уборки тумб и помещения;
- двери должны открываться на угол не менее 100° ;

8.5 Эксплуатационная нагрузка на полку тумбы должна быть не более 25 кг, эксплуатационная нагрузка на основание тумбы должна быть не более 25 кг.

8.6 Предельные отклонения от габаритных размеров изделий не должны превышать следующих: до 2000 мм предельное отклонение ± 4 мм.

Покоробленность щитовых деталей шириной 300-600 мм не должна превышать 0,2 мм.

8.7 На видимой поверхности мебели не допускаются: расхождения полос облицовки, нахлестки, отслоения, пузыри под облицовкой, клеевые пятна, шлифовка, потертость, загрязнение поверхности, вырывы, вмятины, царапины, трещины, пятна, заусенцы и морщины

8.8 Отдельные части мебели должны быть надежно скреплены между собой с помощью системы крепления (специальные пазы, саморезы, болты, винты).

8.9 Фурнитура, выходящая на поверхность мебели, не должна иметь заусенцев; ребра торцов погонажных деталей должны быть притуплены.

8.10 Двери изделий должны иметь петли/магнитную систему, предотвращающие их самопроизвольное открывание.

8.11 Детали и сборочные элементы должны обеспечивать неоднократную сборку и разборку изделий без дополнительной подгонки.

8.12 Запирающий механизм дверей (замок) должен быть прочно и неподвижно закреплен на поверхности мебели, работать плавно и без заеданий.

- 8.13 Трансформируемые, выдвижные, раздвижные элементы мебели медицинской должны иметь свободный ход без заеданий и перекосов.
- 8.14 Усилие, необходимое для перемещения тумбы должно не более 20 Н.
- 8.15 Угол вращения колес 360 °.
- 8.16 Все металлические детали мебели медицинской должны иметь защитно-декоративное покрытие краской порошковой, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к средствам дезинфекционной обработки способом протирания.
- 8.17 Металлические и неметаллические неорганические покрытия должны соответствовать условиям эксплуатации 1 по ГОСТ 9.303. Металлические поверхности мебели должны иметь защитно-декоративное покрытие в виде порошковой краски (лакокрасочного покрытия).
- 8.18 Лакокрасочное покрытие мебели в виде порошковой краски должно быть IV класса по ГОСТ 9.032 и допускать влажную уборку поверхностей с применением моющих средств.
- 8.19 Лакокрасочные покрытия по ГОСТ 9.032 должны быть устойчивы при группе условий эксплуатации УХЛ 4 по ГОСТ 9.104.
- 8.20 Мебель сборно-разборной сварной конструкции должна подвергаться сварке по ГОСТ 14771, «сварочная проволока СВ-08Г2С в защитном газе-углекислота ГОСТ 8050», и комплектоваться пластиковыми заглушками.
- 8.21 Колеса мебели (при наличии) должны быть самоориентирующимися.
- 8.22 Мебель, упакованная в транспортную тару, должна сохранять работоспособность после механических воздействий по ГОСТ Р 50444. Мебель медицинская при эксплуатации должна быть устойчива к механическим воздействиям по ГОСТ Р 50444 для группы 2.
- 8.23 Металлические и неметаллические неорганические покрытия должны соответствовать условиям эксплуатации 1 по ГОСТ 9.303.
- 8.24 Мебель при эксплуатации должна быть устойчива к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2.
- 8.25 Мебель медицинская при транспортировании должна быть устойчива к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для условий хранения 5.
- 8.26 Средний срок службы медицинской мебели до списания должен быть не менее 10 лет.
- 8.27 Мебель медицинская является ремонтнопригодными изделиями. За предельное состояние принимают такое состояние мебели медицинской, при котором стоимость ремонта для восстановления её работоспособности экономически нецелесообразна.
- 8.28 При эксплуатации мебели не должны выделяться химические вещества, относящиеся к первому классу опасности, а содержание остальных веществ не должно превышать допустимые уровни. При выделении из мебели нескольких вредных химических веществ, обладающих суммацией действия, сумма отношений концентрации к их предельно допустимой концентрации не должна превышать единицу по ГОСТ 12.1.007. Мебельная продукция не должна создавать в помещении специфического запаха не более 2 баллов.
- 8.29 Поверхность мебели медицинской должна быть устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2 МУ 287-113.
- 8.30 Контролируемые механические показатели мебели их значения, обеспечивающие требования безопасности при эксплуатации, должны соответствовать значениям таблицы 2.

Таблица 2

Наименование показателя	Значение показателя
1. Корпусная мебель	
Прочность и деформируемость корпуса:	
- циклы нагружения	600
- деформация, мм, не более	3,0
- прочность основания, циклы нагружения	500
- прогиб свободнолежащих полок в расчете на 1м длины, мм, не более	5
Расчетная нагрузка по ГОСТ 19882	
- прочность полкодержателей, циклы нагружения	10
- прочность верхних и нижних щитов под действием нагрузки по ГОСТ 19882, ч, без разрушения	24
Долговечность опор качения, циклы прокатывания:	
- при длине хода (500±50) мм	5000
- при длине хода (250±25) мм	10000
2. Двери с вертикальной осью вращения	
Жесткость крепления дверей, характеризующаяся остаточной деформацией, мм не более:	
- вкладных	1,0
- накладных	2,0
- прочность крепления дверей, циклы нагружения	10
Долговечность крепления дверей:	
- Циклы нагружения	40000
Остаточная деформация, мм, не более:	
- вкладных	1,5
- накладных	2,5

9. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

9.1 В комплект поставки входит:

- тумба в одном варианте исполнения
- паспорт
- руководство по эксплуатации

9.2 Комплект поставки мебели медицинской, должен соответствовать указанному в Таблице 3.

Таблица 3

Вариант исполнения	Обозначение детали	Кол-во, шт.
Тумба медицинская подкатная ПАКС металл ТП-1	Дно	1
	Боковая стенка правая	1
	Боковая стенка левая	1
	Стенка задняя	1
	Крыша	1
	Дверь	1
	Полка средняя	1
	Полка	1
	Корпус ящика	1
	Лицевая панель ящика	1
	Торцевая панель ящика	2
	Комплект направляющих	1
	Ось с пластиковым наконечником	1
	Ось с металлическим наконечником	2
	Ручка	2

	Саморез 4.5x13	18
	Колесо	4
	Магнитная защелка	1
Тумба медицинская подкатная ПАКС металл ТП-2	Дно	1
	Боковая стенка правая	1
	Боковая стенка левая	1
	Стенка задняя	1
	Крыша	1
	Дверь	1
	Полка средняя	1
	Полка	1
	Ось с пластиковым наконечником	1
	Ось с металлическим наконечником	2
	Ручка	1
	Саморез 4.5x13	6
	Колесо	4
	Магнитная защелка	1
	Дно	1
Тумба медицинская подкатная ПАКС металл ТП-3	Боковая стенка правая	1
	Боковая стенка левая	1
	Стенка задняя	1
	Крыша	1
	Дверь	1
	Полка средняя	1
	Полка нижняя	1
	Корпус ящика	1
	Лицевая панель ящика	1
	Торцевая панель ящика	2
	Комплект направляющих	1
	Ось с пластиковым наконечником	1
	Ось с металлическим наконечником	2
	Ручка	2
	Саморез 4.5x13	20
	Колесо	4
	Магнитная защелка	1
	Дно	1
Тумба медицинская подкатная ПАКС металл ТП-4	Боковая стенка правая	1
	Боковая стенка левая	1
	Стенка задняя	1
	Крыша	1
	Корпус ящика	3
	Лицевая панель ящика	3
	Торцевая панель ящика	6
	Комплект направляющих	3
	Ручка	3
	Саморез 4.5x13	40
	Колесо	4

10. МАРКИРОВКА

10.1 Маркировка мебели должна быть выполнена типографическим или печатным способом на бумажном ярлыке, и нанесена на поверхности, невидимых при эксплуатации. Маркировка должна быть четкой и содержать:

- наименование предприятия-изготовителя и его местонахождение (юридический адрес, включая страну, и, при несовпадении с юридическим адресом, адрес(а) производств(а)), включая сайт;
- наименование изделия и варианта исполнения;
- дату изготовления (месяц, год);
- обозначение настоящих технических условий;
- номер серии;
- номер регистрационного удостоверения и дата выдачи;
- товарный знак;
- гарантийный срок;
- материал изготовления;
- цвет;
- срок службы;
- знак соответствия (при наличии);
- штрих-код;
- условия хранения;
- масса брутто;
- манипуляционные знаки, имеющие значение «Обратитесь к инструкции по применению», «Верх», «Бережь от влаги», «Предел по количеству ярусов в штабеле» по ГОСТ 14192.

10.2 Маркировка должна наноситься: – на верхний левый угол задней стенки мебели, предназначенной для размещения у стены. Не допускается нанесение маркировки на поверхность ящиков, переставных полок и т.п. деталей и комплектующих мебели, которые могут быть заменены.

11.УПАКОВКА

11.1 Упаковка мебели должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371.

11.2 При реализации изделия в разобранном виде узлы мебели медицинской формируются в гофрокартон по ГОСТ Р 52901 или ящики по ГОСТ 2991, фиксируются скотчем по ГОСТ 20477.

11.3 Мебель разборной конструкции упаковывается в разобранном виде комплексным пакетом с прокладками из бумаги между деталями. Детали мебели должны быть упакованы таким образом, чтобы было невозможно их смещение и повреждение.

11.4 Съёмная фурнитура мебели упаковывается в пакет по ГОСТ 16337 и прикрепляется к одному из узлов мебели медицинской.

11.5 Уголки из гофрокартона по ГОСТ Р 52901 и пенопласта по ГОСТ 15588 - предназначены для защиты углов мебели.

11.6 Двери и ящики мебели для предотвращения открывания и выдвижения при транспортировании должны быть заперты на замок.

11.7 Мебель в собранном виде упаковывается в пленку термоусадочную по ГОСТ 25951 и гофрокартон по ГОСТ Р 52901.

11.8 При перевозке мебели в собранном виде не допускается упаковка одного изделия в другое.

12. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура: от +5 до +40 С°.

Влажность: до 80%.

13. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

13.1 Извлечь изделия из транспортной тары.

13.2 Проверить комплектность поставки.

13.3 Проверить целостность покрытия.

13.4 После транспортирования в условиях отрицательных температур, выдерживают изделие при комнатной температуре в течении 2 ч.

13.5 Произвести сборку (при необходимости), согласно паспорту.

14. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

14.1 Мебель медицинская транспортируется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

14.2 Транспортирование мебели медицинской морским транспортом производится в соответствии с "Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов". Вид отправки - контейнерами, мелкая малотоннажная, повагонная отправка.

14.3 Условия при транспортировке мебели медицинской соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

15.4 Условия хранения мебели медицинской - по группе условий хранения 2 (С) по ГОСТ Р 50444.

14.5 В упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от +10 до +40° С и относительной влажности от 45% до 80%. Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Мебель следует предохранять от загрязнений и механических повреждений.

14.6 Упакованные изделия должны транспортироваться и храниться в положении, указанном предупредительными знаками.

15. УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация мебели медицинской осуществляется в порядке, предусмотренном СанПиНом 2.1.3684 для отходов класса А.

16. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

16.1 Изготовитель гарантирует соответствие мебели медицинской требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

16.2 Гарантийный срок эксплуатации мебели медицинской - не менее 12 месяцев со дня ввода её в эксплуатацию.

16.3 Гарантийный срок хранения мебели медицинской в упакованном виде 12 месяцев.

16.4 Средний срок службы мебели медицинской 10 лет.

16.5 В течение гарантийного срока изготовитель, осуществляющее гарантийное обслуживание, безвозмездно ремонтирует или заменяет мебель медицинскую или его составные части, пришедшие в негодность по вине изготовителя по предъявлении гарантийного талона, дефектной ведомости, составленной комиссией, с заявкой на ремонт.

17. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

17.1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации (проводится один раз в полгода) заключается в проверке и подтяжке всех видов резьбовых соединений, замене, при необходимости, годными деталями поломанных или изношенных, промывке моющими растворами и санитарной обработке мебели медицинской.

Проверка технического состояния, с целью установления возможности дальнейшего использования мебели медицинской, проводится на соответствие технических характеристик и комплектности настоящего паспорта, при этом проверяется отсутствие погнутых и изношенных деталей, вмятин, коррозии металла, надежность всех видов соединений и креплений.

Критерием предельного состояния является состояние изделий, при которых дальнейшая эксплуатация недопустима и нецелесообразна по условиям экономичности.

17.2 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае отказа изделий или неисправности их в период гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке владелец должен направить в адрес предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, следующие документы:

- паспорт изделия;
- гарантийный талон.

Срок подготовки ответа от предприятия – изготовителя или от предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание владельцу составляет 30 календарных дней.

17.3 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Общие положения:

Текущий ремонт производится специалистами предприятия-изготовителя.

Содержание текущего ремонта:

Текущий ремонт включает следующие этапы:

- 1) обнаружение неисправностей;
- 2) отыскание и исправление неисправностей или замена частей;
- 3) проверка работоспособности изделия после ремонта.

Текущий ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации производится специалистами завода-изготовителя.

После выполнения текущего ремонта проводится проверка технического состояния.

18. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПАКС-ТРЕЙД» (ООО «ПАКС-ТРЕЙД»),

Адрес: Россия, 141420, Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, ул. Горная, д.21А, офис 13.

Тел.: +7(495)574-21-85, +7 (495) 574-05-83

E-mail: info@paksmet.ru

19. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

19.1 В случае отказа изделий или неисправности их в период гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке владелец должен направить в адрес предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, следующие документы: паспорт изделия, гарантийный талон.

Срок подготовки ответа от предприятия – изготовителя или от предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание владельцу составляет 30 календарных дней.

19.2 Претензии по поводу качества направляются в Общество с ограниченной ответственностью «ПАКС-ТРЕЙД» (ООО «ПАКС-ТРЕЙД»), Россия, 141420, Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, ул. Горная, д.21А, офис 13.

Тел.: +7(495)574-21-85, +7 (495) 574-05-83

E-mail: info@paksmet.ru

20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

1) ГОСТ Р 50444-2020. «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования»;


2) ГОСТ 31214-2016. «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, предоставляемым на токсикологические, санитарно-химические испытания, испытания на стерильность и пирогенность»;

3) ГОСТ Р 52770-2016. «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

4) ГОСТ ISO 10993-1-2011. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»;

- 5) ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 2. Требования к обращению с животными»;
- 6) ГОСТ ISO 10993-5-2011. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследование на цитотоксичность: методы in vitro»;
- 7) ГОСТ ISO 10993-10-2011. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;
- 8) ГОСТ ISO 10993-12-2015. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12. Приготовление проб и контрольные образцы»;
- 9) ГОСТ 16371-2014. «Мебель. Общие технические условия».

21. СИМВОЛЫ

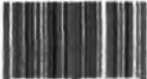Символ	Описание
	Предел по количеству ярусов в штабеле
	Беречь от влаги
	Верх
	Штрих-код
	Обратитесь к инструкции по применению



Внесено

в рецензию