

(инструкция по эксплуатации)

**КРЕСЛО ХИРУРГА AAST 2000
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ**

ЗАО "ВАРТАМАНА ИНТЕРНЭШНЛ ТРЕДЕРС"

119334 - МОСКВА

ул. Косыгина, д. 15, офис 726

тел./факс 939-81-91, 939-85-16

E-mail: vioptiq@orc.ru

www.varthamana.com

Конструктивные особенности кресла:

- . Педальная регулировка высоты
- . Патентованная опора для рук, позволяющая принимать различные положения
- . Регулируемый уровень диапазона подстройки высоты, 150 мм.
- . Легкая перемещаемость с использованием специальной ручки.
- . Одновременная блокировка задних колес.
- . Ручные регулировки высоты.
- . Двигатель постоянного тока, 24 вольта, 5 ампер.
- . Подстраиваемая опора для ног.
- . Эргономичное сиденье с наполнителем из эластичного пенопласта.
- . Фиксируемое или вращаемое сиденье с электроприводом, перемещаемое минимум на 550 мм и максимум на 700 мм.
- . Пять сдвоенных поворотных колес с блокировкой.
- . Электропитание 110/220 вольт переменного тока (50/60 Гц).
- . Весоподъемность до 200 кг.
- . Перемещение по высоте 150 мм.

Рабочие инструкции:

- 1) Убедитесь, что к устройству подано электропитание и оно включено "ON".
- 2) Педальные переключатели ВВЕРХ и ВНИЗ при нажатии перемещают кресло вверх или вниз, соответственно. Таким образом регулируется высота кресла по желанию хирурга.
- 3) При необходимости задние колеса могут быть заблокированы, в том случае когда необходимо избегать резких перемещений.
- 4) Опора для спинки может регулироваться с использованием храпового механизма, специально предусмотренного для этой цели.
- 5) Ручки могут регулироваться нажатием рычага, расположенного сбоку кресла.

Данное кресло хирурга с электроприводом является эргономичным, регулируемым устройством, обеспечивающим удобную работу хирурга. На рисунке показано кресло хирурга:

1- Опора для головы; 2- Опора для руки; 3- Переключатель перемещения вниз;
4- Переключатель перемещения вверх