

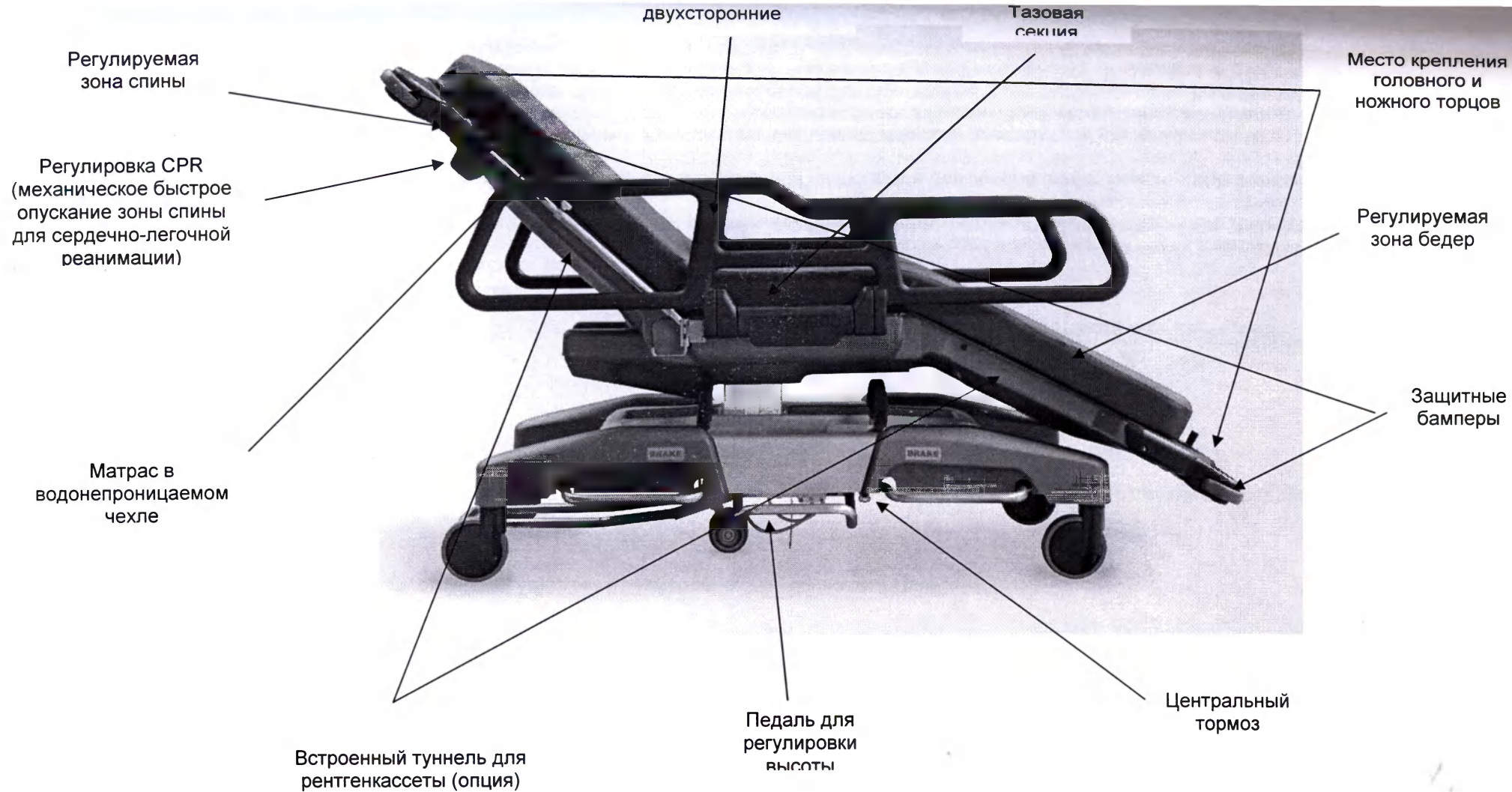


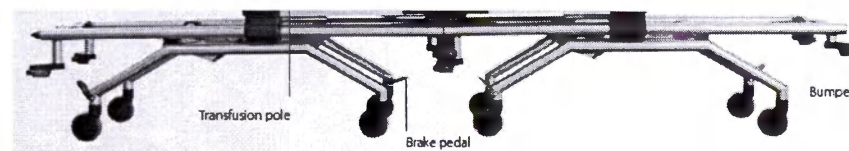

Для обеспечения максимальной гибкости, компания производитель предлагает широкий ассортимент легко устанавливаемых принадлежностей. Каталки оснащены устройствами для крепления дополнительных принадлежностей, например, штатив для вливаний, держатель мочеприемника, держатель судна, держатель кислородного баллона, держатель дренажных мешков, опора для принадлежностей, упоры для рук, дуга для подъема пациента, держатель рентгенкассеты. На каталке предусмотрены с обеих сторон крепежные блоки для принадлежностей, на которые можно установить держатель ремня, держатель бутылок, крючок многофункциональный. Дополнительные принадлежности фиксируются к каталке с помощью крепежного зажима.

Каталка может комплектоваться матрасом в чехле, полкой вспомогательной, подставкой для приема пищи, ложем из рентгенопрозрачного пластика,

Каталка может комплектоваться дополнительным колесным основанием для транспортировки, которое позволяет транспортировать пациента в операционный и реанимационный блоки без нарушения стерильности. Две колесные основы соединяются между собой в жесткую сцепку и ложе каталки, по встроенным направляющим, перемещается на другую колесную основу.

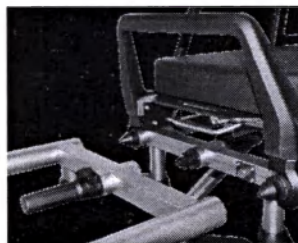

Подробную информацию о принадлежностях см. в наших текущих информационных брошюрах. Наши сотрудники предоставят информацию об имеющихся принадлежностях для вашей каталки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Использование матрасов, не соответствующих указанным размерам, может привести к травмам!

Использование систем фиксации

Системы фиксации, такие как ремни, могут использоваться только после того, как производитель этих систем предоставит точные данные о них. При использовании систем фиксации следует убедиться, что боковые ограждения полностью подняты.



ОПАСНОСТЬ

Следует обязательно соблюдать руководство пользователя для систем фиксации, которые входят в объем поставки.

Во время фиксации **запрещается** регулировать опорную поверхность, ее следует установить в самое нижнее положение.

Во время фиксирования следует блокировать функции регулировки опорной поверхности.

УКАЗАНИЕ каталка предназначена для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10°C до +40°C, относительной влажности 30-75%.

Визуальный контроль

Перед каждым использованием необходимо проверить:

1. отсутствие внешних повреждений каталки
2. не превышен ли интервал проверки (см. проверочный значок)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Разрешается использовать только неповрежденные каталки, интервал проверки которых соблюден.

Проверка функций

Перед каждым использованием необходимо проверить функции:

1. Необходимо проверить функционирование всех боковых ограждений.
2. Необходимо проверить функцию торможения каталки.

После успешной проверки всех функций каталка готова к использованию.

Обработка | Чистка и дезинфекция 1/2

Дезинфекция средствами для протирания и распыления

Для дезинфекции посредством протирания и распыления используются средства для дезинфекции, разрешенные к использованию в РФ в соответствующей концентрации. Следует использовать пропорции разбавления, рекомендованные производителем в соответствующем руководстве пользователя.

УКАЗАНИЕ Запрещается использовать растворители. Запрещается использовать абразивные материалы, жесткие губки и прочие материалы, повреждающие поверхность. Запрещается использовать органические растворители, такие как галогенизированные/ароматизированные углеводороды и кетоны.

В зависимости от степени загрязнения рекомендуется для чистки каталки использовать влажную тряпку.

При использовании средств для чистки и дезинфекции необходимо соблюдать следующие указания:

- Следует использовать свежеприготовленные растворы
- Необходимо точно соблюдать указанные в списке концентрации. Запрещается использовать так называемый метод впрыска. Пользователю запрещается по своему усмотрению добавлять в средство для дезинфекции чистящее средство, например, мыло или моющие средства (недостатки мыла).
- При использовании спиртосодержащих распыляемых средств для дезинфекции на большой площади возникает опасность взрыва и возгорания.
- Они не должны содержать вызывающих коррозию или агрессивных частиц.
- Они не должны содержать вещества, которые изменяют структуру поверхности или характеристики присоединения материалов.

Смазочные материалы не должны оказывать разрушающее воздействие.

Фактор pH воды должен составлять 6-8.

Совокупная жесткость воды должна составлять 0,9 ммоль/л (до 5°).

(Запрещается использовать полностью обессоленную воду).

Они не освобождают пользователя от собственных проверок и испытаний, т.к. условия (например, жесткость воды) на местах могут различаться. Это не дает юридически обязывающей гарантии определенных свойств.

При использовании неподходящих средств для чистки и дезинфекции, при неверном соотношении ингредиентов смеси и при недостаточном уходе за каталкой могут возникнуть дефекты покрытия поверхности, ответственность за которые компания производитель не несет.

Запрещается использовать для чистки и дезинфекции распылительные трубки устройств очистки высокого давления, а также линии автоматической мойки.

Длина матрасного ложа	2252 мм
Ширина матрасного ложа	760 мм
Тренделенбург	14°
Антитренделенбург	14°
Угол подъема спинной секции	70°
Диапазон регулировки высоты	618 - 845 мм
Количество секций	3
Боковые ограждения	наличие
Грузоподъемность	250 кг
Ложe каталки	Рентгенпрозрачный пластик
Рабочий диапазон температур	+10 - +40 °С
Относительная влажность воздуха	30% - 75%
Диапазон атмосферного давления	700 ГПа

Приложение | Гарантия производителя/Срок службы/Утилизация/

Гарантия производителя – 12 месяцев
Расчетный срок службы каталки составляет около 10 лет. Чтобы обеспечить безопасную для окружающей среды утилизацию после вывода из эксплуатации, обратитесь к компетентным сотрудникам нашего представительства.

Прошнуровано, пронумеровано,
скреплено печатью
19 ЛИСТОВ

ЗАО "Компания "Интермедсервис"
Руководитель отдела
сертификации и лицензирования
Чекова Е.С.

