


ИНСТРУКЦИЯ по применению
Изделия протезно-ортопедические: стельки, полустельки,
приспособления вкладные корригирующие

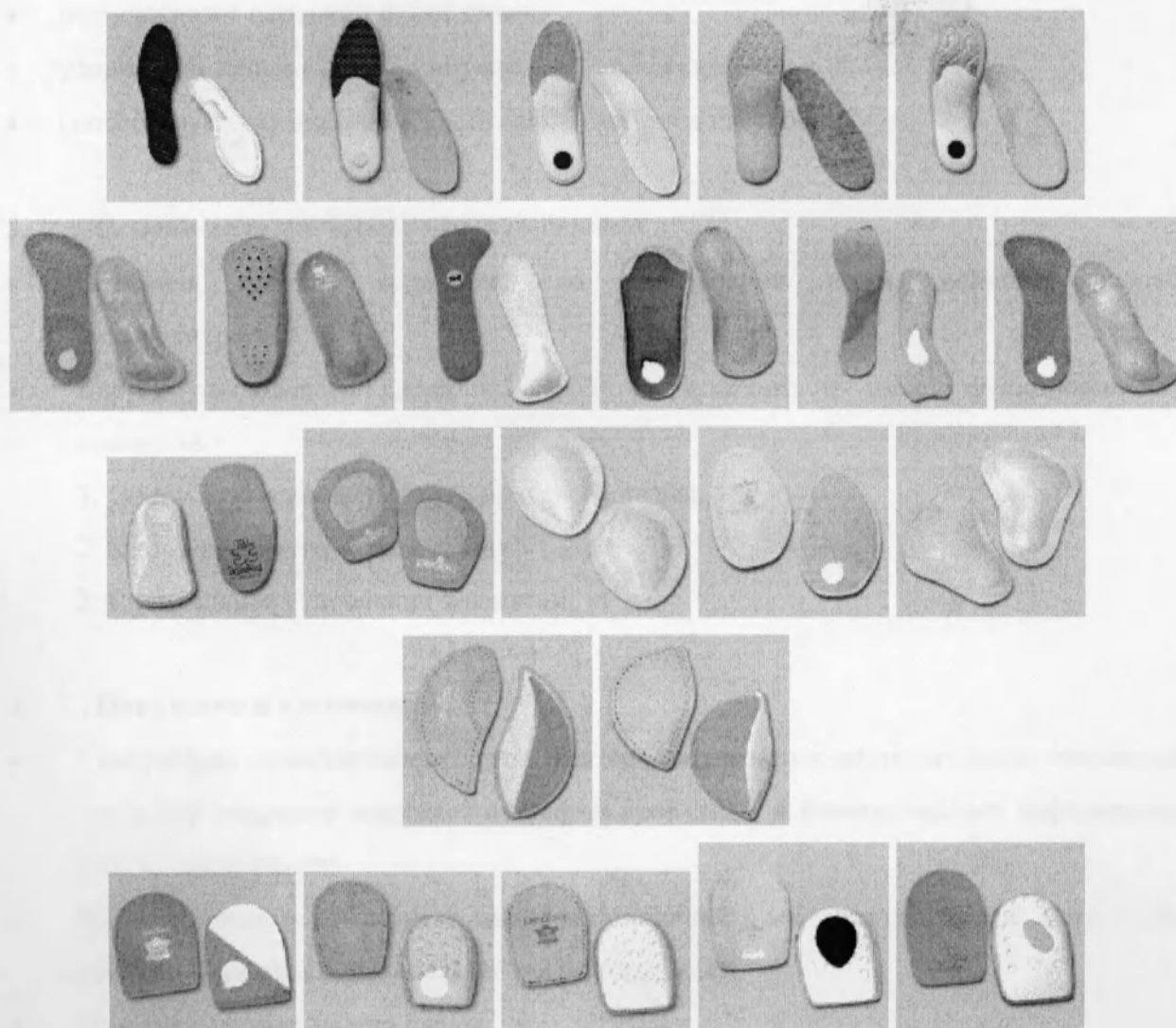

1. Назначение.

Использование стелек, полустелек и вкладных корректирующих приспособлений (пелоты, подпяточники) в повседневной жизни:

- обеспечивает комфорт, равновесие и устойчивость;
- снимает болевые ощущения при ходьбе;
- снимает ударную нагрузку на суставы ног и позвоночник;
- повышает устойчивость при ходьбе;
- предупреждает утомляемость;
- массирует стопы;
- удерживает пятку в нормальном положении;
- поддерживает передний отдел стопы;
- удерживает пальцы стопы в нормальном положении при ходьбе;
- способствует улучшению общего самочувствия и настроения.

2. Основные технические характеристики

- Основная стелька выполнена из натуральной кожи, войлока, хлопка, пенополиуретана;
- Каркас продольного свода выполнен из пластика и имеет функциональные элементы:
 1. Опору внутреннего продольного свода стопы.
 2. Опору переднего отдела стопы.
 3. Специальное углубление для пятки.

3. Показания к назначению.

- Статическая недостаточность стоп, как без выраженных анатомических изменений, так и при умеренно выраженных нефиксированных и фиксированных деформациях (обувь стандартная).
- Недостаточная выносливость мышечно-связочного аппарата стопы при длительном стоянии и длительной ходьбе (обувь стандартная).
- Вальгус среднего отдела стопы.
- Плоско-вальгусные стопы (плоскостопие).
- Распластанность переднего отдела первой, второй степени (обувь стандартная).
- При вальгусе пятки менее 5-7 градусов у детей до 3х лет (обувь стандартная).

- Изолированное уплощение сводов у детей от 3х до 5и лет (обувь стандартная).

4. Противопоказания к назначению.

- Все деформации и дефекты стопы, требующие изготовления многослойного межстелечного слоя и снабжения ортопедической обувью.
- при открытых повреждениях мягких тканей стопы, таких как раны, язвы, трещины.

5. Применение.

Вкладывается в стандартную обувь с закрытой пяткой и с каблуком высотой не более 40 мм, исключая подгибание передней, мягкой части стелек вниз.

Размер изделий подбирается по размеру стопы.

6. Правила хранения и использования

Кожаные поверхности изделия протирают мягкой салфеткой, слегка смоченной слабоспиртовым раствором, и сушат вдали от нагревательных приборов.

Поверхности из вспененного полимерного материала протирается мягкой салфеткой, слегка смоченной бытовым моющим средством, и сушат вдали от нагревательных приборов.

7. Гарантия производителя.

6 месяцев при соблюдении правил эксплуатации.

Производитель.

«Rehard Technologies GmbH», Germany («Рехард Технолоджис ГмбХ», Германия).

04316 Leipzig, Hermann-Sander-Straße 27, Germany (04316 Лейпциг, Херманн-Зендер-Штрассе 27, Германия).

Дистрибьютор в Российской Федерации.

ООО «Орто Медикл Групп», 127124, г. Москва, Бумажный проезд, д.14, стр.1, РФ.

Тел./факс: 8 (499)-257-48-75.

Генеральный директор,
ООО "Орто Медикал Групп"
Загорский В.Ю.



Всего в настоящем документе
прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 3 листов.