



Technical Documentation

Instruction for Use
Access SARS-CoV-2 IgM Quality Controls

As responsible official of Beckman Coulter, Inc., I hereby certify that document attached to this cover letter is a true copy of the original document.

Authorized Signatory:





A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document, to which this certificate is attached and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California)

ss

County of Orange)


On Friday, March 26, 2021 before me, Xochitl Meraz, Notary Public, personally appeared Nanette Canepa who proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person whose name is subscribed to the within instrument and acknowledged to me that she executed the same in her authorized capacity, and that by her signatures on the instrument the person, or the entity upon behalf of which the person acted, executed the instrument.

I certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the State of California that the foregoing paragraph is true and correct.

WITNESS my hand and official seal.

Notary Public



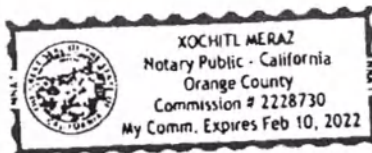

Beckman Coulter, Inc.
250 S. Kraemer Boulevard
Brea, CA 92821

Mailing Address:
250 S. Kraemer Boulevard
P.O. Box 8000
Brea, CA 92822-8000

Telephone: (714) 993-5321
Facsimile: (714) 961-4234
Internet: www.beckmancoulter.com



ACCESS
Immunoassay Systems



Инструкции по применению

© 2020 Beckman Coulter, Inc. All rights reserved.

ACCESS SARS-CoV-2 IgM QC SARS-CoV-2 IgM

REF C58959

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Применять только для диагностики *in vitro*

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА СИСТЕМАХ ИММУНОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА СЕМЕЙСТВА ACCESS

ЕЖЕГОДНАЯ ПРОВЕРКА

Проверено	Дата	Проверено	Дата

ПРИНЦИП

НАЗНАЧЕНИЕ

Контроль качества Access SARS-CoV-2 IgM предназначен для отслеживания функциональных характеристик системы исследования Access SARS-CoV-2 IgM.

Контроль качества Access SARS-CoV-2 IgM предназначен для использования только в системах иммунохимического анализа семейства Access.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Материалы контроля качества имитируют характеристики образцов пациентов и имеют важнейшее значение для контроля характеристик системы иммунохимического анализа Access SARS-CoV-2 IgM. Кроме того, они являются неотъемлемой частью надлежащей лабораторной практики. При выполнении исследований с использованием реагентов Access для определения SARS-CoV-2 IgM добавляйте контрольные материалы, чтобы подтвердить чистоту исследований. При правильной работе тест-системы исследуемые значения должны находиться в допустимом диапазоне.

ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ

Анализируемое вещество в контроле качества Access SARS-CoV-2 IgM прослеживается до рабочих калибраторов производителя. Соответствие стандартам измерений основано на стандарте EN ISO 17511. Установленные значения были получены при анализе репрезентативных проб данной партии контроля качества и являются специфическими для методик исследования реагентов Access. Значения, установленные с помощью других методик, могут отличаться. Эти различия могут быть обусловлены отклонениями, вызванными отличиями методов.

РЕАГЕНТЫ

СОДЕРЖАНИЕ

Материал контроля качества Access SARS-CoV-2 IgM

Ссылочный номер C58959: QC1–QC2, 4 мл/флакон, 3 флакона для каждого уровня

- Поставляется готовым к использованию.
- Храните в вертикальном положении в холодильнике при 2-10°C.
- Перемешайте содержимое перед использованием, осторожно переворачивая флакон. Избегайте образования пузырьков.
- Стабилен до истечения срока годности, указанного на этикетке, при хранении в не вскрытой упаковке при 2-10°C.
- Флакон стабилен при 2-10°C в течение 30 дней после первоначального использования.
- Признаком возможного разрушения является выход контрольных значений за пределы установленного диапазона.
- Средние значения и стандартные отклонения (SD) смотрите в карте контрольных значений.

QC1:	Отрицательный: буфер TRIS, дефибринированная плазма человека с отрицательным результатом анализа на антитела к SARS-CoV-2, сурфактант, белок (бычий), <0,1% азида натрия и 0,5% ProClin* 300.
QC2:	Положительный: буфер TRIS, дефибринированная человеческая плазма, IgM человека в конъюгированной с антителами к SARS-CoV-2 форме, сурфактант, белок (бычий), <0,1% азида натрия и 0,5% ProClin 300.
Карта значений контрольного материала:	1

*ProClin™ является торговым знаком компании Dow Chemical Company («Dow») или дочерней компании Dow.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Для диагностики *in vitro*.
- При соблюдении описанной процедуры риск работы с пробам и препаратами крови минимален. Однако с этими продуктами необходимо обращаться как с потенциально инфекционно-опасными, соблюдая универсальные меры предосторожности и правила надлежащей лабораторной практики¹ вне зависимости от их происхождения, обработки и предшествующей сертификации. Для дезинфекции используйте соответствующее дезинфицирующее средство. Храните и утилизируйте данные материалы и контейнеры из-под них в соответствии с местными предписаниями и руководствами.
- Антитела, используемые для приготовления реагента, получают из человеческой плазмы. Всегда рассматривайте эти продукты как потенциально инфекционные. Вне зависимости от их происхождения, обработки и предшествующей сертификации, обращайтесь с ними, соблюдая универсальные меры предосторожности и правила надлежащей лабораторной практики. Для дезинфекции используйте соответствующее дезинфицирующее средство. Храните и утилизируйте данные материалы и контейнеры из-под них в соответствии с местными предписаниями и руководствами.²
- Сведения об опасности, представляемой продуктом, см. в следующих разделах: «АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ» и «КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ ПО СИСТЕМЕ GHS».

ИНГРЕДИЕНТЫ, ОБЛАДАЮЩИЕ РЕАКЦИОННОЙ СПОСОБНОСТЬЮ

ВНИМАНИЕ!

Консервант с содержанием азиды натрия может образовывать взрывоопасные соединения в металлической водопроводной арматуре. См. бюллетень Национального института по охране труда и промышленной гигиене (NIOSH) «Взрывоопасные азиды (16.08.76)».

Во избежание накопления азидных соединений промыть сливные трубы водой после сброса неразбавленного реагента. Утилизацию азиды натрия следует проводить в соответствии с соответствующими местными нормами.

КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ ПО СИСТЕМЕ СГС

SARS-CoV-2 IgM QC1

ОСТОРОЖНО!



H317

Может вызывать аллергическую кожную реакцию.

H412

Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

P273

Не допускать попадания в окружающую среду.

P280

Надевать защитные перчатки, защитную одежду, средства защиты органов зрения / лица.

P333+P313

При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться к врачу.

P362+P364

Снять загрязненную одежду и промыть ее перед повторным использованием.

реакционная смесь из 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин -3-он [EC № 247-500-7] и 2-метил-4-изотиазолин -3-он [EC № 220-239-6](3:1) < 0,05%

SARS-CoV-2 IgM QC2

ОСТОРОЖНО!



H317

Может вызывать аллергическую кожную реакцию.

H412

Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

P273

Не допускать попадания в окружающую среду.

P280

Надевать защитные перчатки, защитную одежду, средства защиты органов зрения / лица.

P333+P313

При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться к врачу.

P362+P364

Снять загрязненную одежду и промыть ее перед повторным использованием.

реакционная смесь из 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин -3-он [EC № 247-500-7] и 2-метил-4-изотиазолин -3-он [EC № 220-239-6](3:1) < 0,05%

Паспорт безопасности доступен на сайте beckmancoulter.com/techdocs

ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

ПРОЦЕДУРА

Система иммунохимического анализа Access используется для определения содержания SARS-CoV-2 IgM в материалах контроля качества Access SARS-CoV-2 IgM таким же образом, как и для определения его содержания в образцах. Проводите измерение контрольных материалов не менее одного раза в сутки или как требуется процедурами отдельной лаборатории, так как пробы могут обрабатываться в любое время не в «групповом» формате, а в формате «произвольного доступа». Более частое проведение контрольных анализов или использование дополнительных методов контроля является прерогативой оператора системы с учетом требований хорошей лабораторной практики, лабораторной аккредитации и действующего законодательства. Обратитесь к соответствующим руководствам по эксплуатации систем и/или к справочной системе для получения информации по теории контроля качества, конфигурированию контрольных проб, вводу запроса на тестирование контрольной пробы, а также анализу данных контроля качества.

ВЫДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Для задания значений по материалу контроля качества Access SARS-CoV-2 IgM выберите и исследуйте количество проб, являющееся репрезентативным для всей партии, для получения надежной оценки среднего значения. Средние значения и стандартные отклонения перечислены в карте значений контроля качества. Возможны вариации, связанные с техникой, оборудованием или реагентами, которые могут привести к получению результатов, отличающихся от приведенных значений. Поэтому в каждой лаборатории должны быть установлены собственные средние значения и стандартные отклонения (SD).

ПРИМЕЧАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ АНАЛИЗА

ОГРАНИЧЕНИЯ

При признаках бактериального загрязнения или повышенной мутности реагента флакон необходимо выбросить.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Beckman Coulter, стилизованный логотип и упоминаемые здесь знаки продукции и услуг Beckman Coulter являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Beckman Coulter, Inc. в Соединенных Штатах и других странах.

Могут быть охвачены одним или более патентами. — см. www.beckmancoulter.com/patents.

ИСТОРИЯ ВЕРСИЙ

Версия A

Новый выпуск.

КЛЮЧ СИМВОЛОВ

Глоссарий символов доступен на сайте beckmancoulter.com/techdocs (номер документа C02724).

ССЫЛКИ

1. Approved Guideline - Protection of Laboratory Workers From Occupationally Acquired Infections, M29-A4, 4th Edition, May 2014. Clinical and Laboratory Standards Institute.
2. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. HHS Publication, 5th ed., December 2009.

EC REP Beckman Coulter Eurocenter S.A., 22, rue Juste-Olivier. Case Postale 1044, CH - 1260 Nyon 1, Switzerland
Tel: +41 (0)22 365 36 11

 Beckman Coulter, Inc., 250 S. Kraemer Blvd., Brea, CA 92821 U.S.A.
www.beckmancoulter.com

ООО «Бекмен Культер», 109004 Москва, Россия, ул. Станиславского, д. 21, стр. 3.
Тел. +7 (495) 228 67 00, e-mail: beckman.ru@beckman.com

/Перевод с английского языка на русский язык/

Техническая документация

Инструкция по применению

Контрольные материалы для контроля характеристик системы анализа качественного определения антител класса IgM к вирусу SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови человека, иммунохемилюминесцентным методом для диагностики in vitro на анализаторах иммунохимических серии ACCESS system (Access SARS-CoV-2 IgM QC)

В качестве ответственного должностного лица компании Бекмен Культер, Инк., настоящим я заявляю, что прилагаемый к настоящему сопроводительному письму документ является точной копией оригинала.

/Печать:

Бекмен Культер Инк.

Отдел нормативно-правового регулирования/

Уполномоченное лицо с правом подписи:

/Подпись/

Нотариус или прочее должностное лицо, подписывающее настоящее свидетельство, подтверждает только личность лица, поставившего подпись под документом, к которому прилагается данное свидетельство, а не достоверность, точность или действительность самого документа.

Штат Калифорния)

Место

Округ Ориндж)

В пятницу, 26 марта 2021 года передо мной, Ксочитл Мераз (Xochitl Meraz), нотариусом, появилась Нанетт Канепа (Nanette Canepa), которая доказала мне на основе убедительных свидетельств, что она является лицом, чья подпись поставлена на документе, и подтвердила, что она выполнила данный акт в соответствии с имеющимися у нее полномочиями, и что поставив свою подпись на документе, лицо или компания, от имени которой действовало настоящее лицо, исполнило(а) настоящий документ.

Я заявляю ПОД СТРАХОМ НАКАЗАНИЯ ЗА ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВО в соответствии с законодательством Штата Калифорния, что предыдущий параграф является подлинным и корректным.

ЗАВЕРЯЮ своей подписью и печатью.

/Подпись/

Нотариус


КСОЧИТЛ МЕРАЗ (XOCHITL MERAZ)
Государственный Нотариус - штат
Калифорния
Округ Ориндж
Лицензия № 2226730
Срок действия лицензии истекает 10
февраля 2022 года

Бекмен Культер, Инк.
250 С. Крамер Бульвар, Бреа, штат
Калифорния, 92821

Адрес для корреспонденции:
250 С. Крамер Бульвар
а/я 8000
Бреа, штат Калифорния 92822-
8000

Телефон: (714) 993-5321
Факсимиле: (714) 961-4234
Интернет: www.beckmancoulter.com

Перевод данного текста выполнен переводчиком Бушенковым Иваном Витальевичем

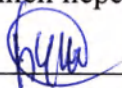
Российская Федерация

Город Москва

Шестнадцатого июня две тысячи двадцать первого года


Я, Склад Надежда Ивановна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Дударева Александра Владимировича, свидетельствую подлинность подписи переводчика Бушенкова Ивана Витальевича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/178-н/77-2021- 

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.

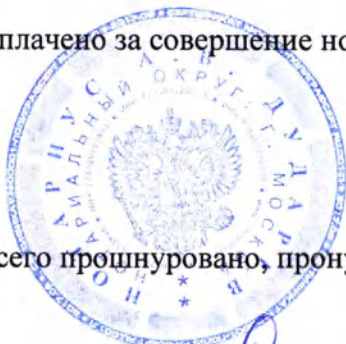



Н. И. Склад



Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 8 лист(-а,-ов).

ВРИО нотариуса:





Technical Documentation

**Addendum to Instruction for Use
Access SARS-CoV-2 IgM Quality Controls
For Russia Regulation**

As responsible official of Beckman Coulter, Inc., I hereby certify that document attached to this cover letter is a true copy of the original document.

Authorized Signatory:



A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document, to which this certificate is attached and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California)

ss

County of Orange)

On Friday, March 26, 2021 before me, Xochitl Meraz, Notary Public, personally appeared Nanette Canepa who proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person whose name is subscribed to the within instrument and acknowledged to me that she executed the same in her authorized capacity, and that by her signatures on the instrument the person, or the entity upon behalf of which the person acted, executed the instrument.

I certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the State of California that the foregoing paragraph is true and correct.

WITNESS my hand and official seal.

Notary Public



Beckman Coulter, Inc.
250 S. Kraemer Boulevard
Brea, CA 92821

Mailing Address:
250 S. Kraemer Boulevard
P.O. Box 8000
Brea, CA 92822-8000

Telephone: (714) 993-5321
Facsimile: (714) 961-4234
Internet: www.beckmancoulter.com

ПРИНЦИП

Наименование

Контрольные материалы для контроля характеристик системы анализа качественного определения антител класса IgM к вирусу SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови человека, иммунохемилюминесцентным методом для диагностики *in vitro* на анализаторах иммунохимических серии ACCESS system, в составе:

1. Контрольные материалы для контроля характеристик системы анализа качественного определения антител класса IgM к вирусу SARS-CoV-2 (Access SARS-CoV-2 IgM QC):

1.1. Контрольные материалы QC1, QC2 – 6 флаконов;

1.2. Карта контрольных значений.

Далее по тексту может упоминаться как «Контрольные материалы Access SARS-CoV-2 IgM», «Access SARS-CoV-2 IgM QC».

НАЗНАЧЕНИЕ

Контрольные материалы Access SARS-CoV-2 IgM предназначены для отслеживания функциональных характеристик системы исследования Access SARS-CoV-2 IgM.

Контрольные материалы Access SARS-CoV-2 IgM предназначены для использования только в системах иммунохимического анализа семейства Access.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Материалы контроля качества имитируют характеристики образцов пациентов и имеют важнейшее значение для контроля характеристик системы иммунохимического анализа Access SARS-CoV-2 IgM. Кроме того, они являются неотъемлемой частью надлежащей лабораторной практики. При выполнении исследований с использованием реагентов Access для определения SARS-CoV-2 IgM добавляйте контрольные материалы, чтобы подтвердить чистоту исследований. При правильной работе тест-системы исследуемые значения должны находиться в допустимом диапазоне.

МЕТОДОЛОГИЯ

Исследование Access SARS-CoV-2 IgM представляет собой двухэтапный твердофазный иммунохимический анализ с захватом антитела. Предварительно разведенный образец пациента вносится в реакционную пробирку вместе с парамагнитными частицами, покрытыми моноклональными антителами мыши к IgM человека. IgM человека, присутствующий в образце пациента, захватывается антителами к IgM человека на парамагнитных частицах. После инкубации компоненты, связавшиеся с твердой фазой, удерживаются в магнитном поле, а несвязанные компоненты анализа удаляются при отмывке. В емкость добавляются разбавитель для конъюгата и рекомбинантный конъюгат белка SARS-CoV-2 со щелочной фосфатазой. Рекомбинантный белок SARS-CoV-2 содержит рецептор-связывающий домен (RBD) вирусного белка S1. Конъюгат будет связываться с любым антителом IgM к SARS-CoV-2, захваченным твердофазными парамагнитными частицами на первом этапе. После второй стадии инкубации и отмывки в сосуд добавляется хемилюминесцентный субстрат. Интенсивность света, генерируемого в результате реакции субстрата и щелочной фосфатазы, измеряется люминометром. Путем сравнения интенсивности света со значением cut-off, определенным во время калибровки прибора, определяют наличие или отсутствие антител IgM к SARS-CoV-2.

Утилизация

Химические остатки и отходы должны перерабатываться в плановом порядке как специальные отходы. Они подлежат утилизации в соответствии с законодательством по предотвращению загрязнения окружающей среды и прочими законами соответствующей страны. В целях обеспечения соответствия мы рекомендуем связаться с соответствующими местными органами и/или утвержденной компанией, занимающейся переработкой отходов, для получения информации.

При обращении с медицинскими отходами на территории Российской Федерации необходимо соблюдать местное законодательство и, в частности, санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.3684-21 от 28 января 2021 года (Отходы класса А). Процедура утилизации отходов определяется в соответствии с правилами и предписаниями Федерального закона № 89-ФЗ «О отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 г.

Требования к техническому обслуживанию и ремонту

Не применимо для данного медицинского изделия.

Сведения о маркировке (В соответствии с ГОСТ 15223-1)



Регистрационное удостоверение:
XXXXXX от XXXXXX

Контрольные материалы для контроля характеристик системы анализа качественного определения антител класса IgM к вирусу SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови человека, иммунохемилюминесцентным методом для диагностики in vitro на анализаторах иммунохимических серии ACCESS system (LOT124326)

Контрольные материалы для контроля характеристик системы анализа качественного определения антител класса IgM к вирусу SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови человека, иммунохемилюминесцентным методом (Access SARS-CoV-2 IgM QC) (LOT 124326)

Состав:

Контрольные материалы QC1, QC2 – 6 флаконов;

Карта контрольных значений.

4 мл/флакон, 3 флакона каждого уровня. QC1: Отрицательный: буфер TRIS, дефибринированная плазма человека с отрицательным результатом анализа на антитела к SARS-CoV-2, сурфактант, белок (бычий), <0,1% азида натрия и 0,5% ProClin 300. QC2: Положительный: буфер TRIS, дефибринированная человеческая плазма, IgM человека в конъюгированной с антителами к SARS-CoV-2 форме, сурфактант, белок (бычий), <0,1% азида натрия и 0,5% ProClin 300.

Кат. номер:

C58959

Лот:

см. на упаковке

Срок годности:

см. на упаковке

Страна происхождения:

см. на упаковке

Форма поставки:

6 фл x 4 мл; таблица результатов

«Осторожно»

Производитель:

Бекмен Кальтер, Инк., 250 С. Крамер Бульвар, Брея, штат Калифорния 92821 США


Уполномоченный представитель производителя:

ООО "Бекмен Кальтер", Москва, Россия, 109004, Станиславского 21, стр.3



2° C 10° C

C58959_RUS_v1

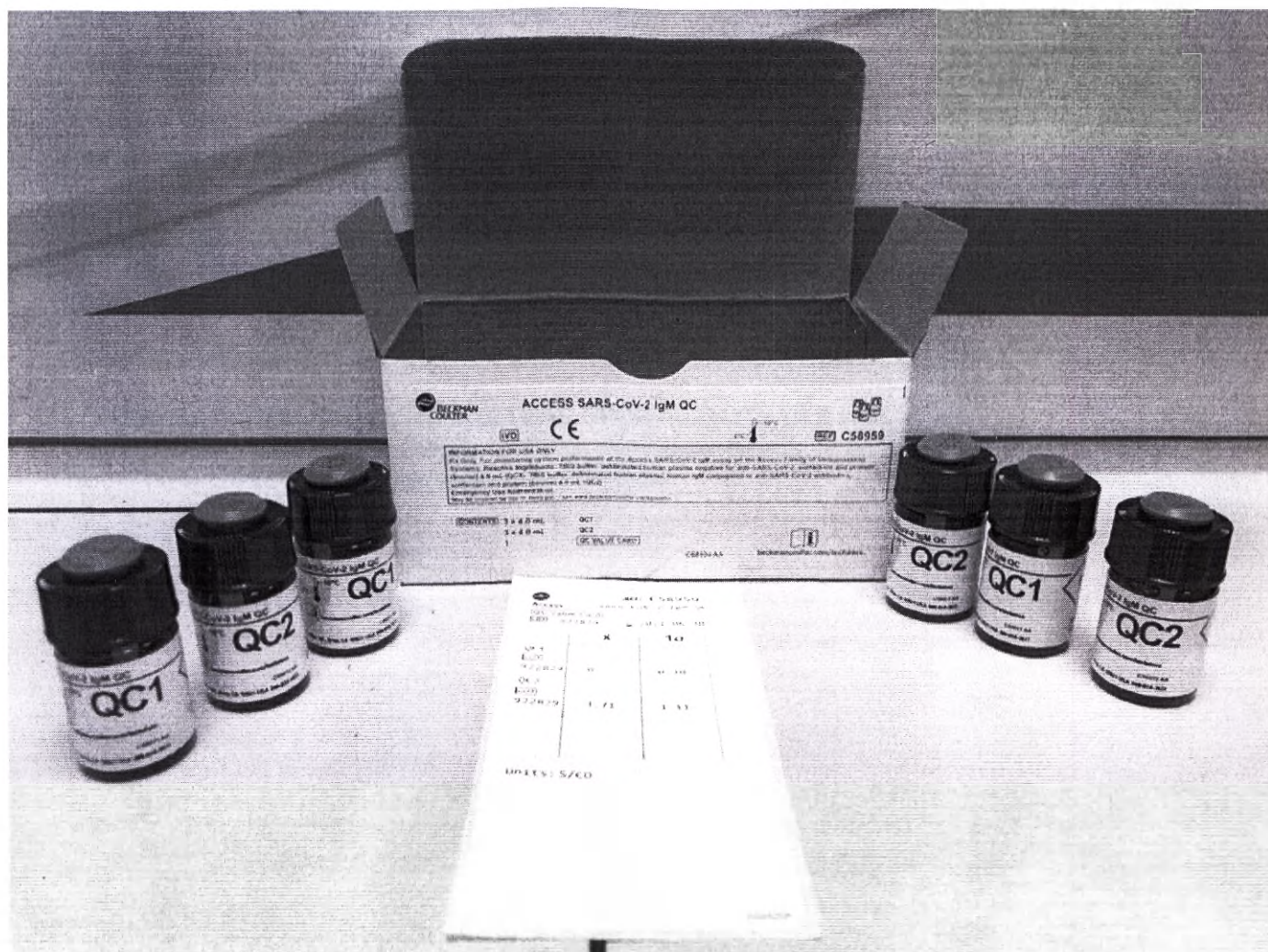

Наименование символа	Графическое обозначение символа	Наименование символа	Графическое обозначение символа
- номер по каталогу		- изготовитель	
- код партии		- содержимого достаточно для проведения n-количества тестов	
- логотип изготовителя		- изделие медицинское для диагностики in vitro	
- температурный диапазон		- наличие сертификата на соответствие европейским стандартам в Евросоюзе	
- обратитесь к руководству по эксплуатации		- использовать до...	

- биологический риск		- дата изготовления	
----------------------	---	---------------------	---

СВЕДЕНИЯ О РЕДАКЦИЯХ

Версия А
Новый выпуск.

КЛЮЧ СИМВОЛОВ

Глоссарий символов доступен на сайте beckmancoulter.com/techdocs (номер документа C02724).

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В РФ:
ООО «Бекмен Культер», 109004 Москва, Россия, ул. Станиславского, д. 21, стр. 3.
Тел. +7 (495) 228 67 00, e-mail: beckman.ru@beckman.com



/Перевод с английского языка на русский язык/

Техническая документация

Дополнение к Инструкции по применению

Контрольный материал для контроля характеристик системы анализа качественного определения антител класса IgM к вирусу SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови человека, иммунохемилюминесцентным методом для диагностики in vitro на анализаторах иммунохимических серии ACCESS system (Access SARS-CoV-2 IgM QC) для регистрации в России

В качестве ответственного должностного лица компании Бекмен Культер, Инк., настоящим я заявляю, что прилагаемый к настоящему сопроводительному письму документ является точной копией оригинала.

/Печать:

Бекмен Культер Инк.

Отдел нормативно-правового регулирования/

Уполномоченное лицо с правом подписи:

/Подпись/

Нотариус или прочее должностное лицо, подписывающее настоящее свидетельство, подтверждает только личность лица, поставившего подпись под документом, к которому прилагается данное свидетельство, а не достоверность, точность или действительность самого документа.

Штат Калифорния)

Место

Округ Ориндж)

В пятницу, 26 марта 2021 года передо мной, Ксочитл Мераз (Xochitl Meraz), нотариусом, появилась Нанетт Канепа (Nanette Canepa), которая доказала мне на основе убедительных свидетельств, что она является лицом, чья подпись поставлена на документе, и подтвердила, что она выполнила данный акт в соответствии с имеющимися у нее полномочиями, и что поставив свою подпись на документе, лицо или компания, от имени которой действовало настоящее лицо, исполнило(а) настоящий документ.

Я заявляю ПОД СТРАХОМ НАКАЗАНИЯ ЗА ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВО в соответствии с законодательством Штата Калифорния, что предыдущий параграф является подлинным и корректным.

ЗАВЕРЯЮ своей подписью и печатью.

/Подпись/

Нотариус

КСОЧИТЛ МЕРАЗ (XOCHITL MERAZ)
Государственный Нотариус - штат
Калифорния
Округ Ориндж
Лицензия № 2228730
Срок действия лицензии истекает 10
февраля 2022 года

Бекмен Культер, Инк.
250 С. Крамер Бульвар, Бреа, штат
Калифорния, 92821

Адрес для корреспонденции:
250 С. Крамер Бульвар
а/я 8000
Бреа, штат Калифорния 92822-
8000

Телефон: (714) 993-5321
Факсимиле: (714) 961-4234
Интернет: www.beckmancoulter.com

Перевод данного текста выполнен переводчиком Бушенковым Иваном Витальевичем

hiki

Российская Федерация

Город Москва

Шестнадцатого июня две тысячи двадцать первого года

Я, Склад Надежда Ивановна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Дударева Александра Владимировича, свидетельствую подлинность подписи переводчика Бушенкова Ивана Витальевича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/178-н/77-2021-

18-265



Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.



Склад

Н. И. Склад

Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 6 лист(-а,-ов).

ВРИО нотариуса:

Склад