

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ПВ ООО «Фирма «Техноавиа»



 А.С. Попов

20 21 г.

**Халат медицинский многоразового
использования «MEDSUIT» в вариантах
исполнения**

по ТУ 14.12.30-050-17385659-2019

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1 Наименование медицинского изделия.....	3
2 Сведения о производителе медицинского изделия	3
3 Контактная информация.....	3
4 Назначение медицинского изделия, установленное производителем	3
5 Риски применения медицинского изделия, перечень показаний к применению, противопоказаний, возможных побочных действий.....	3
6 Меры предосторожности.....	3
7 Описание, параметры и характеристики медицинского изделия	4
8 Указания по применению.....	5
9 Информация о стерильном состоянии медицинского изделия	5
10 Техническое обслуживание, текущий ремонт	5
11 Информация о наличии в медицинском изделии лекарственного средства для медицинского применения, материалов животного и (или) человеческого происхождения	6
12 Условия эксплуатации.....	6
13 Транспортирование.....	6
14 Хранение	6
15 Гарантийные обязательства	6
16 Порядок осуществления утилизации и уничтожения медицинского изделия	7
17 Перечень применяемых производителем (изготовителем) медицинского изделия национальных стандартов	7
18 Приложение А	8
19 Приложение Б.....	26

1 Наименование медицинского изделия

Наименование медицинского изделия – .Халат медицинский многоразового использования «MEDSUIT» в вариантах исполнения по ТУ 14.12.30-050-17385659-2019 (далее – халат).

2 Сведения о производителе медицинского изделия

Производственно-внедренческое общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Техноавиа» (ПВ ООО «Фирма «Техноавиа»)

Российская Федерация, 125476, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 7.

Контактный телефон: 8-495-787-90-30, 8-495-787-74-96

Электронная почта: inform@technoavia.ru

3 Контактная информация

По вопросам качества медицинского изделия «Халат медицинский многоразового использования «MEDSUIT» в вариантах исполнения по ТУ 14.12.30-050-17385659-2019», производства ПВ ООО «Фирма «Техноавиа», обращаться по адресу:

Российская Федерация, 125476, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 7.

Контактный телефон: 8-495-787-90-30, 8-495-787-74-96

Электронная почта: inform@technoavia.ru

4 Назначение медицинского изделия, установленное производителем

Халат предназначен для использования в медицинских организациях при проведении различных процедур, не требующих стерильность медицинской одежды с целью предохранения как пациента, так и врача, от переноса микроорганизмов.

Халат предназначен для повседневного многократного применения медицинским персоналом всех категорий в медицинских организациях. Халат поставляется в нестерильном виде.

5 Риски применения медицинского изделия, перечень показаний к применению, противопоказаний, возможных побочных действий

Показания к применению: осмотр пациента, проведение медицинских процедур и нахождение в условиях медицинских организаций различных направлений в целях предотвращения распространения возбудителей инфекционных заболеваний между пациентами и медицинским персоналом при оказании лечебно-профилактической помощи, включая диагностические процедуры без необходимости применения стерильной медицинской одежды.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие.

Возможные побочные действия: побочных действий не выявлено.

Перед коммерческим распространением медицинского изделия наша компания проводит анализ процесса управления рисками на производстве. Эти данные регистрируются, записываются и сохраняются.

6 Меры предосторожности

ВНИМАНИЕ! Запрещено использование халатов при работе (включая нахождение в помещениях) с аппаратами для магнитно-резонансной томографии (за исключением следующих моделей 3.112, 3.113, 3.292, 3.293, 3.443, 3.766).

ВНИМАНИЕ! Халат, загрязненный кровью или другими биологическими жидкостями, подлежит немедленной замене на чистый халат.

7 Описание, параметры и характеристики медицинского изделия

Проницаемость микроорганизмами тканей и швов халатов должна соответствовать требованиям к группе V или ниже по ГОСТ 12.4.175.

Халат изготавливается белого цвета с использованием отделочного материала. Халат выпускается следующих вариантов исполнения:

- Халат мужской медицинский модель 3.112
- Халат женский медицинский модель 3.113
- Халат мужской медицинский модель 3.293
- Халат женский медицинский модель 3.292
- Халат женский медицинский «Бьянка-2» модель 3.350
- Халат мужской медицинский «Оскар-2» модель 3.360
- Халат женский медицинский «Линда» модель 3.443
- Халат женский медицинский «Линда-Арт» модель 3.444
- Халат женский медицинский «Жасмин» модель 3.766
- Халат мужской медицинский «Альберт» модель 3.458
- Халат женский медицинский «Альбина» модель 4.239

Пример записи халата при заказе и в другой документации

При заказе при выборе размера необходимо руководствоваться ГОСТ Р ИСО 3635.

Халат медицинский многоцветного использования «MEDSUIT» по ТУ 14.12.30-050-17385659-2019: Халат женский медицинский «Линда-Арт» модель 3.444 88/146-152

Где:

Халат женский медицинский «Линда-Арт» модель 3.444 – вариант исполнения;

«88» – обхват груди, в см;

«146-152» – рост, в см.

Комплект поставки халатов в потребительской упаковке для всех вариантов исполнения состоит из:

- Халат одного варианта исполнения и одного размера – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.

Халат изготавливается из ткани в соответствии с Таблицей 1.

Таблица 1

Наименование материала	Обозначение НТД или производитель	Примечание	Применение в вариантах исполнения
«Тиси»	«Hongfeng Printing and Dyeing Mill Liaoning LLC», Китай	Состав: 65% ПЭ (полиэфирное волокно) 35% хлопок	Халат мужской медицинский модель 3.112 Халат женский медицинский модель 3.113
«Старлайт»	«Klopman International S.r.l.», Италия	Состав: 65% ПЭ (полиэфирное волокно) 35% хлопок	Халат женский медицинский "Бьянка-2" модель 3.350 Халат мужской медицинский "Оскар-2" модель 3.360
«Оксфорд»	«Klopman International S.r.l.», Италия	Состав: 50% ПЭ (полиэфирное волокно) 50% лиоцелл	Халат женский медицинский "Линда" модель 3.443
«Артвейв»	«Klopman International S.r.l.», Италия	Состав: 55% ПЭ (полиэфирное волокно) 45% хлопок	Халат женский медицинский "Линда-Арт" модель 3.444

Наименование материала	Обозначение НТД или производитель	Примечание	Применение в вариантах исполнения
«Сатори»	ООО «Адвентум Технолоджис», Россия	Состав: 50% ПЭ (полиэфирное волокно) 50% хлопок	Халат женский медицинский "Жасмин" модель 3.766
«К-Флекс 200»	«Klopman International S.r.l.», Италия	Состав: 49% ПЭ (полиэфирное волокно) 49% хлопок 2% эластолефин	Халат мужской медицинский «Альберт» модель 3.458 Халат женский медицинский «Альбина» модель 4.239
Бязь арт. 262	По ГОСТ 29298 ООО «Камышинский Текстиль», Россия	Состав: 100% хлопок	Халат женский медицинский модель 3.292 Халат мужской медицинский модель 3.293

Маркировка халатов прикрепляется в соответствии с ГОСТ 10581-91 и содержит:

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя;
- адрес предприятия-изготовителя;
- наименование медицинского изделия;
- дата изготовления (месяц и год);
- обозначение технических условий;
- вариант исполнения;
- сырьевой состав;
- размер;
- символы и знаки по ГОСТ ISO 3758 (при необходимости);
- условия хранения (или символ);
- номер и дата регистрационного удостоверения;
- штамп ОТК (на товарном ярлыке).

Перечень вариантов исполнения, их технические рисунки, основные размеры и масса приведены в приложении А.

8 Указания по применению

Взять пакет, вскрыть упаковку изделия так, чтобы не повредить содержимое упаковки, извлечь изделия. Каждое изделие использовать по его прямому назначению.

9 Информация о стерильном состоянии медицинского изделия

Халаты поставляются в нестерильном виде.

10 Техническое обслуживание, текущий ремонт

Халат является медицинским изделием многократного применения. Смена халата в подразделениях хирургического и акушерского профиля осуществляется ежедневно и по мере загрязнения. В учреждениях терапевтического профиля – 2 раза в неделю и по мере загрязнения. После смены халат подвергается стирке, при необходимости, дезинфекции, в соответствии с технологией, предусмотренной методическими указаниями МУ 3.5.736-99 «Технология обработки белья в медицинских учреждениях».

Халаты необходимо применять в соответствии с современными требованиями к проведению медицинских процедур.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ				
Символ		Описание		
		Изделие может подвергаться машинной стирке при температуре не более 40 °С или не более 60 °С (в зависимости от варианта исполнения)		
		Гладить при максимальной температуре подошвы утюга 150 °С.		
			В зависимости от варианта исполнения	
			Разрешено отбеливание любым окисляющим агентом	Разрешено отбеливание только кислородсодержащим/нехлорным агентом
		Профессиональная сухая чистка в тетрахлорэтилене и во всех растворителях, внесенных в список для символа F. Обычный режим		
		В зависимости от варианта исполнения		
		Сушка на веревке или вешалке после стирки без отжима	Барабанная сушка возможна. Более низкая температура; максимальная температура на выходе 60°С	

11 Информация о наличии в медицинском изделии лекарственного средства для медицинского применения, материалов животного и (или) человеческого происхождения

При изготовлении изделий **не используются** лекарственные средства, материалы животного или человеческого происхождения.

12 Условия эксплуатации

Температура – от 10 до 35 °С.

Относительная влажность – от 20 до 80 %.

Атмосферное давление – (84,0 – 106,7) кПа [(630-800) мм рт. ст.].

13 Транспортирование

Халаты в транспортной упаковке выдерживают транспортирование всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Условия транспортирования халатов – по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

14 Хранение

Халаты в потребительской упаковке должны храниться в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

15 Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует соответствие изделий всем требованиям ТУ 14.12.30-050-17385659-2019 при соблюдении условий применения, транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных настоящей инструкцией по применению.

Гарантийный срок годности изделий – 5 лет с даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации– 12 месяцев со дня продажи.

16 Порядок осуществления утилизации и уничтожения медицинского изделия

Утилизация изделий осуществляется на общих основаниях согласно СанПиН 2.1.3684-21.

Изделия, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями, утилизируются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21, относящимися к медицинским отходам класса Б.

Изделия с истекшими сроками годности, не загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями, утилизируются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21, относящимися к медицинским отходам класса А.

17 Перечень применяемых производителем (изготовителем) медицинского изделия национальных стандартов

ГОСТ 12.4.175-88 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная. Нормы проницаемости микроорганизмами»;

ГОСТ ISO 3758-2014 «Изделия текстильные. Маркировка символами по уходу»;

ГОСТ 10581-91 «Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»;

Стандарты серии ГОСТ ISO 10993 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий»;

ГОСТ 12807-2003 «Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов»;

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования»;

ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

18 Приложение А

ПЕРЕЧЕНЬ ВАРИАНТОВ ИСПОЛНЕНИЯ, ИХ ТЕХНИЧЕСКИЕ РИСУНКИ, ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА

Халат мужской медицинский модель 3.112



*Рисунок определяет внешний вид модели
Конструкционные характеристики представлены ниже*

Наименование измерений	Рост, см	Обхват груди, см									Допуск, см
		80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140	144-148	
Длина спинки	158-164	97,0									± 3,0
	170-176	103,0									
	182-188	109,0									
	194-200	115,0									
Ширина спинки в узком месте	158-200	43,5	46,0	48,5	51,0	53,5	56,0	58,5	61,0	63,5	± 2,0
Ширина на уровне глубины проймы (от среднего шва спинки до края борта)	158-200	55,5	59,5	63,5	67,5	71,5	75,5	79,5	83,5	87,5	± 3,0
Ширина халата внизу (от края шлицы до края борта по левой стороне)	158-200	50,5	56,5	60,5	64,5	68,5	72,5	76,5	80,5	84,5	± 3,0
Длина рукава	158-164	61,5									± 3,0
	170-176	64,5									
	182-188	67,5									
	194-200	70,5									

Масса халата 220÷420 г

Халат женский медицинский модель 3.113



*Рисунок определяет внешний вид модели
Конструкционные характеристики представлены ниже*

Наименование измерений	Рост, см	Обхват груди, см										Допуск, см
		72-76	80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140	144-148	
Длина спинки	146-152	87,5										± 3,0
	158-164	93,5										
	170-176	99,5										
	182-188	105,5										
Ширина спинки в узком месте	146-188	35,0	37,0	39,0	41,0	43,0	45,0	47,0	49,0	51,0	53,0	± 2,0
Ширина на уровне глубины проймы (от среднего шва спинки до края борта)	146-188	48,0	52,0	56,0	60,0	64,0	68,0	72,0	76,0	80,0	84,0	± 3,0
Ширина халата внизу (от края шлицы до края борта по левой стороне)	146-188	56,0	60,0	64,0	68,0	72,0	78,0	82,0	86,0	90,0	94,0	± 3,0
Длина рукава	146-152	54,5										± 3,0
	158-164	58,5										
	170-176	62,5										
	182-188	66,5										

Масса халата 200÷400 г

Халат мужской медицинский модель 3.293



*Рисунок определяет внешний вид модели
Конструкционные характеристики представлены ниже*

Наименование измерений	Рост, см	Обхват груди, см									Допуск, см
		80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140	144-148	
Длина спинки	158-164	96,0									± 3,0
	170-176	102,0									
	182-188	108,0									
	194-200	114,0									
Ширина спинки в узком месте	158-200	42,0	44,0	46,0	48,0	50,0	52,0	54,0	56,0	58,0	± 2,0
Ширина на уровне глубины проймы (от среднего шва спинки до края борта)	158-200	53,0	57,0	61,0	65,0	69,0	73,0	77,0	81,0	85,0	± 3,0
Ширина халата внизу (от среднего шва спинки до края борта)	158-200	59,5	63,5	67,5	71,5	75,5	79,5	83,5	87,5	91,5	± 3,0
Длина рукава	158-164	61,0									± 3,0
	170-176	64,0									
	182-188	67,0									
	194-200	70,0									

Масса халата 280÷520 г

Халат женский медицинский модель 3.292



*Рисунок определяет внешний вид модели
Конструкционные характеристики представлены ниже*

Наименование измерений	Рост, см	Обхват груди, см										Допуск, см
		72-76	80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140	144-148	
Длина спинки	146-152	94,5										± 3,0
	158-164	100,5										
	170-176	106,5										
	182-188	112,5										
Ширина спинки в узком месте	146-188	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	± 2,0
Ширина на уровне глубины проймы (от среднего шва спинки до края борта)	146-188	48,5	52,5	56,5	60,5	64,5	68,5	72,5	76,5	80,5	84,5	± 3,0
Ширина халата внизу (от среднего шва спинки до края борта)	146-188	58,0	62,0	66,0	70,0	74,0	78,0	82,0	86,0	90,0	94,0	± 3,0
Длина рукава	146-152	55,0										± 3,0
	158-164	59,0										
	170-176	63,0										
	182-188	67,0										

Масса халата 240÷480 г

Халат женский медицинский «Бьянка-2» модель 3.350



Рисунок определяет внешний вид модели
Конструкционные характеристики представлены ниже

Наименование измерений	Рост, см	Обхват груди, см										Допуск, см
		72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	
Длина спинки	146-152	90,1	90,4	90,7	91,0	91,3	91,6	91,9	92,2	92,5	94,0	±3,0
	158-164	96,1	96,4	96,7	97,0	97,3	97,6	97,9	98,2	98,5	100,0	
	170-176	102,1	102,4	102,7	103,0	103,3	103,6	103,9	104,2	104,5	106,0	
	182-188	108,1	108,4	108,7	109,0	109,3	109,6	109,9	110,2	110,5	112,0	
Ширина спинки в узком месте	146-188	36,2	37,2	38,2	39,2	40,2	41,2	42,2	43,2	44,2	44,0	±2,0
Ширина на уровне глубины проймы (от среднего шва спинки до края борта)	146-188	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	62,0	±2,0
Ширина халата внизу (от края шлицы до края борта по левой стороне)	146-188	52,3	54,3	56,3	58,3	60,3	62,3	64,3	66,3	68,3	70,5	±3,0
Длина рукава	146-152	39,0										±3,0
	158-164	41,0										
	170-176	43,0										
	182-188	45,0										

Масса халата 300÷700 г

Халат женский медицинский «Бьянка-2» модель 3.350



*Рисунок определяет внешний вид модели
Конструкционные характеристики представлены ниже*

Наименование измерений	Рост, см	Обхват груди, см										Допуск, см
		112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	
Длина спинки	146-152	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	± 3,0
	158-164	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
	170-176	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	
	182-188	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	
Ширина спинки в узком месте	146-188	45,0	46,0	47,0	48,0	49,0	50,0	51,0	52,0	53,0	54,0	± 2,0
Ширина на уровне глубины проймы (от среднего шва спинки до края борта)	146-188	64,0	66,0	68,0	70,0	72,0	74,0	76,0	78,0	80,0	82,0	± 2,0
Ширина халата внизу (от края шлицы до края борта по левой стороне)	146-188	72,5	74,5	76,5	78,5	80,5	82,5	84,5	86,5	88,5	90,5	± 3,0
Длина рукава	146-152	390										± 3,0
	158-164	410										
	170-176	430										
	182-188	450										

Масса халата 300÷700 г

Халат мужской медицинский «Оскар-2» модель 3.360

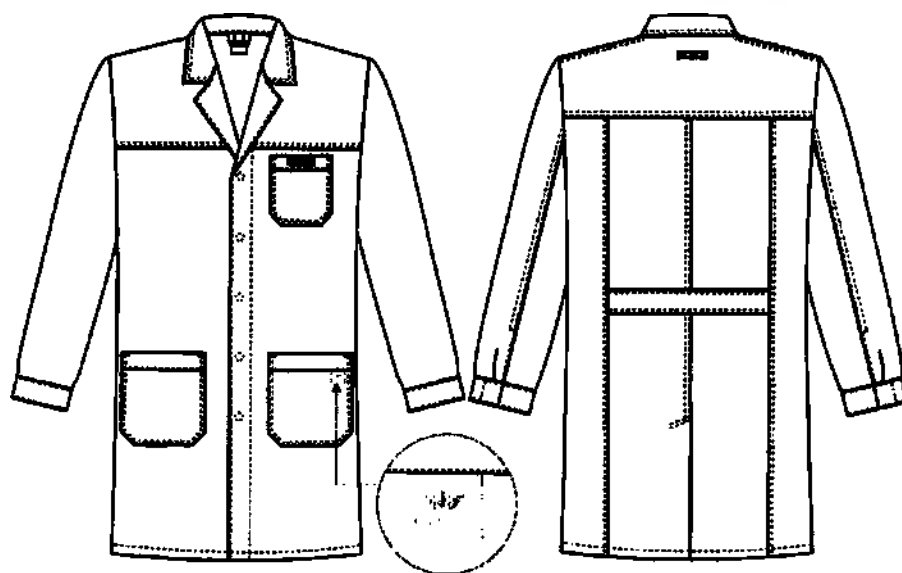


Рисунок определяет внешний вид модели
Конструктивные характеристики представлены ниже

Наименование измерений	Рост, см	Обхват груди, см									Допуск, см
		80	84	88	92	96	100	104	108	112	
Длина спинки	158-164	90,0									±3,0
	170-176	96,0									
	182-188	102,0									
	194-200	108,0									
Ширина спинки по шву притачивания кокетки	158-200	41,3	42,4	43,5	44,6	45,7	46,8	47,9	49,0	50,1	±2,0
Ширина на уровне глубины проймы (от среднего шва спинки до края борта)	158-200	51,0	53,0	55,0	57,0	59,0	61,0	63,0	65,0	67,0	±2,0
Ширина халата внизу (от края шлицы до края борта по левой стороне)	158-200	51,0	53,0	55,0	57,0	59,0	61,0	63,0	65,0	67,0	±3,0
Длина рукава	158-164	60,5									±3,0
	170-176	63,5									
	182-188	66,5									
	194-200	69,5									

Масса халата 380÷720 г

Халат мужской медицинский «Оскар-2» модель 3.360

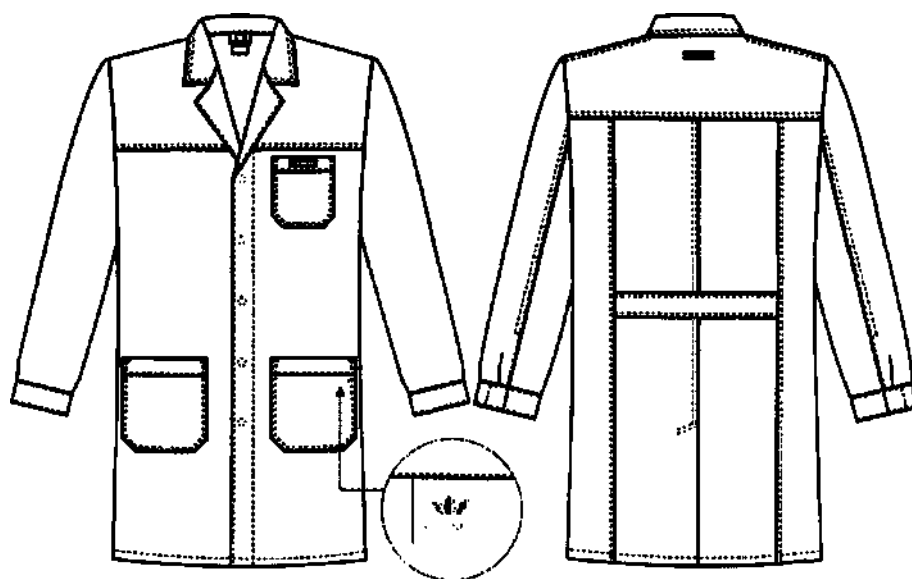
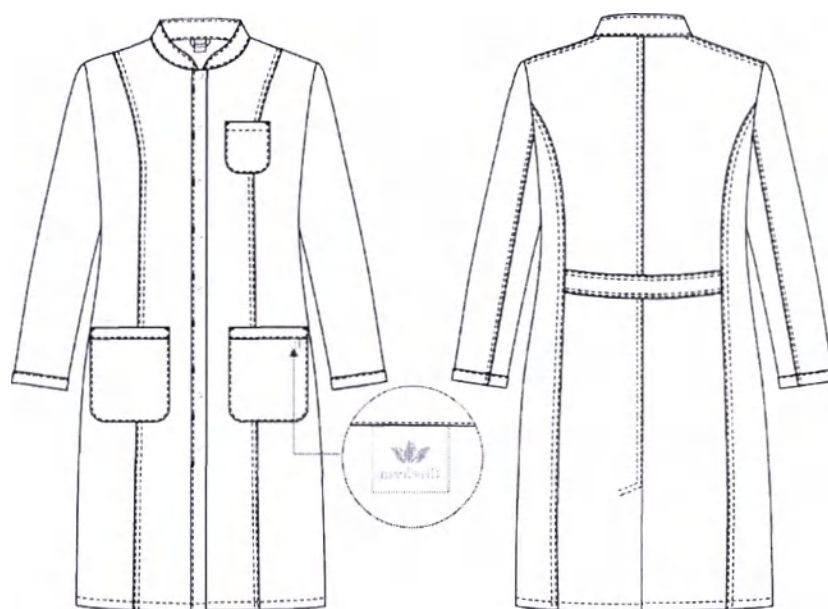


Рисунок определяет внешний вид модели
Конструкционные характеристики представлены ниже

Наименование измерений	Рост, см	Обхват груди, см									Допуск, см
		116	120	124	128	132	136	140	144	148	
Длина спинки	158-164	90,0									±3,0
	170-176	96,0									
	182-188	102,0									
	194-200	108,0									
Ширина спинки по шву притачивания кокетки	158-200	51,2	52,3	53,4	54,5	55,6	56,7	57,8	58,9	60,0	±2,0
Ширина на уровне глубины проймы (от среднего шва спинки до края борта)	158-200	69,0	71,0	73,0	75,0	77,0	79,0	81,0	83,0	85,0	±2,0
Ширина халата внизу (от края шлицы до края борта по левой стороне)	158-200	69,0	71,0	73,0	75,0	77,0	79,0	81,0	83,0	85,0	±3,0
Длина рукава	158-164	60,5									±3,0
	170-176	63,5									
	182-188	66,5									
	194-200	69,5									

Масса халата 380÷720 г

Халат женский медицинский «Линда» модель 3.443



*Рисунок определяет внешний вид модели
Конструкционные характеристики представлены ниже*

Наименование измерений	Рост, см	Обхват груди, см									Допуск, см
		72	76	80	84	88	92	96	100	104	
Длина спинки	146-152	87,5									±3,0
	158-164	93,5									
	170-176	99,5									
	182-188	105,5									
Ширина спинки в узком месте	146-188	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	±2,0
Ширина на уровне глубины проймы (от среднего шва спинки до края борта)	146-188	44,0	46,0	48,0	50,0	52,0	54,0	56,0	58,0	60,4	±2,0
Ширина халата внизу (от края шлицы до края борта по левой стороне)	146-188	51,0	53,0	55,0	57,0	59,0	61,0	63,0	65,0	67,0	±3,0
Длина рукава	146-152	50,5									±3,0
	158-164	54,5									
	170-176	58,5									
	182-188	62,5									

Масса халата 300÷620 г

Халат женский медицинский «Линда» модель 3.443

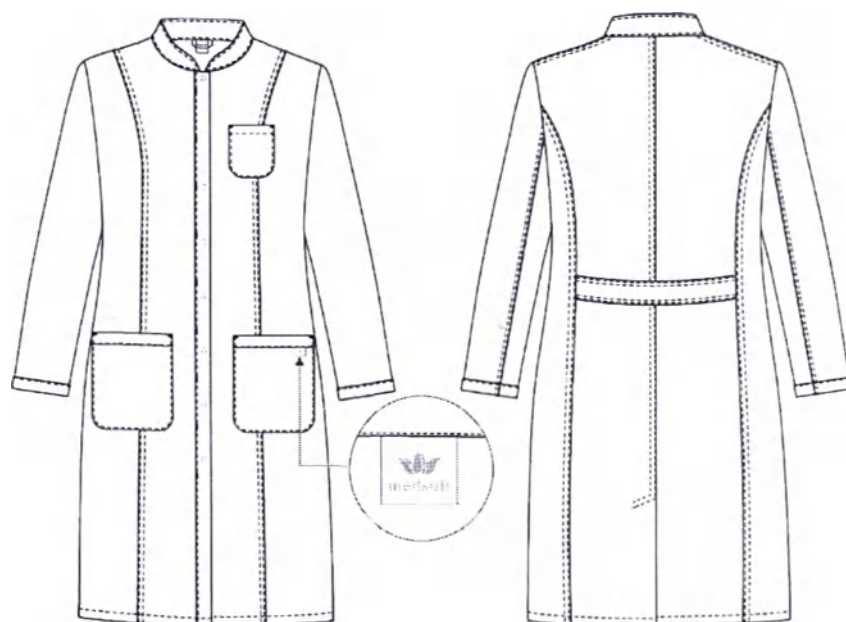


Рисунок определяет внешний вид модели
Конструкционные характеристики представлены ниже

Наименование измерений	Рост, см	Обхват груди, см											Допуск, см
		108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	
Длина спинки	146-152	89,0											±3,0
	158-164	95,0											
	170-176	101,0											
	182-188	107,0											
Ширина спинки в узком месте	146-188	44,5	45,3	46,0	46,8	47,5	48,3	49,1	49,8	50,6	51,3	52,1	±2,0
Ширина на уровне глубины проймы (от среднего шва спинки до края борта)	146-188	61,6	63,9	66,3	68,7	71,1	73,4	75,8	78,2	80,5	82,9	85,3	±2,0
Ширина халата внизу (от края шлицы до края борта по левой стороне)	146-188	68,7	70,7	72,7	74,7	76,7	78,7	80,7	82,7	84,7	86,7	88,7	±3,0
Длина рукава	146-152	50,5											±3,0
	158-164	54,5											
	170-176	58,5											
	182-188	62,5											

Масса халата 300÷620 г

Халат женский медицинский «Линда-Арт» модель 3.444

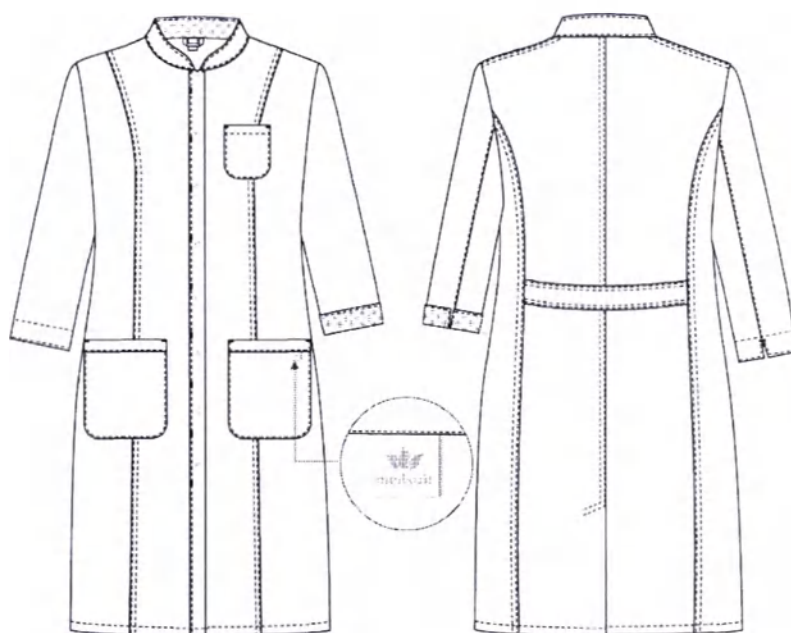


*Рисунок определяет внешний вид модели
Конструктивные характеристики представлены ниже*

Наименование измерений	Рост, см	Обхват груди, см									Допуск, см
		72	76	80	84	88	92	96	100	104	
Длина спинки	146-152	87,5									±3,0
	158-164	93,5									
	170-176	99,5									
	182-188	105,5									
Ширина спинки в узком месте	146-188	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	±2,0
Ширина на уровне глубины проймы (от среднего шва спинки до края борта)	146-188	45,0	47,0	49,0	51,0	53,0	55,0	57,0	59,0	61,4	±2,0
Ширина халата внизу (от края шлицы до края борта по левой стороне)	146-188	51,0	53,0	55,0	57,0	59,0	61,0	63,0	65,0	67,0	±3,0
Длина рукава при отогнутой вверх манжете (ширина манжеты 2,5см)	146-152	42,5									±3,0
	158-164	46,5									
	170-176	50,5									
	182-188	54,5									

Масса халата 260÷600 г

Халат женский медицинский «Линда-Арт» модель 3.444



*Рисунок определяет внешний вид модели
Конструкционные характеристики представлены ниже*

Наименование измерений	Рост, см	Обхват груди, см											Допуск, см
		108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	
Длина спинки	146-152	89,0											±3,0
	158-164	95,0											
	170-176	101,0											
	182-188	107,0											
Ширина спинки в узком месте	146-188	44,5	45,3	46,0	46,8	47,5	48,3	49,1	49,8	50,6	51,3	52,1	±2,0
Ширина на уровне глубины проймы (от среднего шва спинки до края борта)	146-188	62,6	64,9	67,3	69,7	72,1	74,4	76,8	79,2	81,5	83,9	86,3	±2,0
Ширина халата внизу (от края шлицы до края борта по левой стороне)	146-188	68,7	70,7	72,7	74,7	76,7	78,7	80,7	82,7	84,7	86,7	88,7	±3,0
Длина рукава при отогнутой вверх манжете (ширина манжеты 2,5см)	146-152	42,5											±3,0
	158-164	46,5											
	170-176	50,5											
	182-188	54,5											

Масса халата 260÷600 г

Халат женский медицинский «Жасмин» модель 3.766



*Рисунок определяет внешний вид модели
Конструкционные характеристики представлены ниже*

Наименование измерений	Рост, см	Обхват груди, см										Допуск, см
		72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	
Длина спинки	146-152	90,0										±3,0
	158-164	96,0										
	170-176	102,0										
	182-188	108,0										
Ширина спинки в узком месте	146-188	35,4	36,4	37,4	38,4	39,4	40,4	41,4	42,4	43,6	44,8	±2,0
Ширина на уровне глубины проймы (от среднего шва спинки до края борта)	146-188	46,0	48,0	50,0	52,0	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	±2,0
Ширина халата внизу (от края шлицы до края борта по левой стороне)	146-188	53,5	55,5	57,5	59,5	61,5	63,5	65,5	67,5	69,5	71,5	±3,0
Длина рукава	146-152	54,0										±3,0
	158-164	58,0										
	170-176	62,0										
	182-188	66,0										

Масса халата 220÷520 г

Халат женский медицинский «Жасмин» модель 3.766

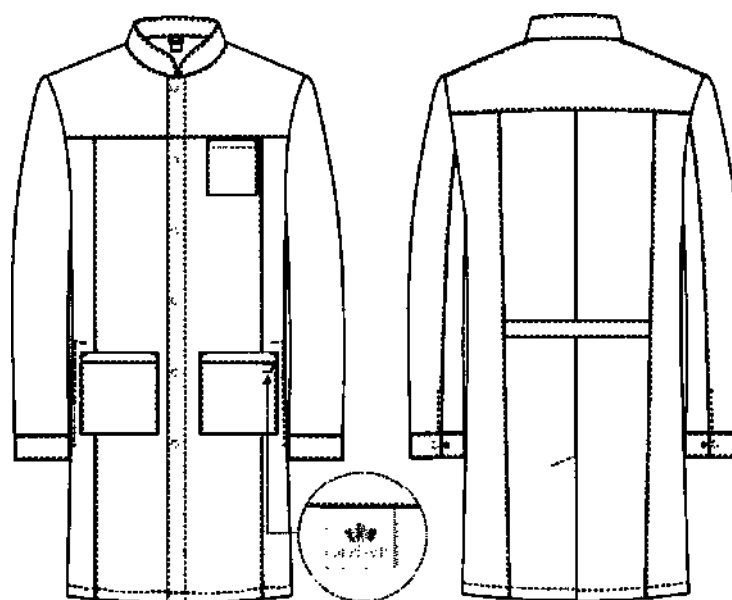


*Рисунок определяет внешний вид модели
Конструкционные характеристики представлены ниже*

Наименование измерений	Рост, см	Обхват груди, см										Допуск, см
		112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	
Длина спинки	146-152	95,0										± 3,0
	158-164	101,0										
	170-176	107,0										
	182-188	113,0										
Ширина спинки в узком месте	146-188	46,0	47,2	48,4	49,6	50,8	52,0	53,2	54,4	55,6	56,8	± 2,0
Ширина на уровне глубины проймы (от среднего шва спинки до края борта)	146-188	66,0	68,0	70,0	72,0	74,0	76,0	78,0	80,0	82,0	84,0	± 2,0
Ширина халата внизу (от края шлицы до края борта по левой стороне)	146-188	75,5	77,5	79,5	81,5	83,5	85,5	87,5	89,5	91,5	93,5	± 3,0
Длина рукава	146-152	54,0										± 3,0
	158-164	58,0										
	170-176	62,0										
	182-188	66,0										

Масса халата 220÷520 г

Халат мужской медицинский «Альберт» модель 3.458

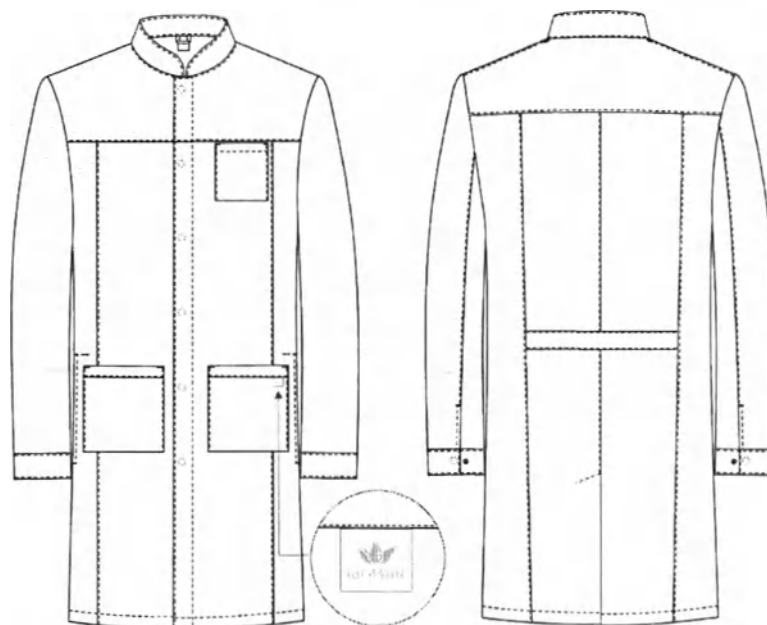


*Рисунок определяет внешний вид модели
Конструктивные характеристики представлены ниже*

Наименование измерений	Рост, см	Обхват груди, см									Допуск, см
		80	84	88	92	96	100	104	108	112	
Длина спинки	158-164	90,0									±3,0
	170-176	96,0									
	182-188	102,0									
	194-200	108,0									
Ширина спинки по шву припачивания кокетки	158-200	40,3	41,4	42,5	43,6	44,7	45,8	46,9	48,0	49,1	±2,0
Ширина на уровне глубины проймы (от среднего шва спинки до края борта)	158-200	50,0	52,0	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	66,0	±2,0
Ширина халата внизу (от края шлицы до края борта полевой стороне)	158-200	50,0	52,0	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	66,0	±3,0
Длина рукава	158-164	60,5									±3,0
	170-176	63,5									
	182-188	66,5									
	194-200	69,5									

Масса халата 370÷720 г

Халат мужской медицинский «Альберт» модель 3.458



*Рисунок определяет внешний вид модели
Конструкционные характеристики представлены ниже*

Наименование измерений	Рост, см	Обхват груди, см									Допуск, см
		116	120	124	128	132	136	140	144	148	
Длина спинки	158-164	90,0									±3,0
	170-176	96,0									
	182-188	102,0									
	194-200	108,0									
Ширина спинки по шву притачивания кокетки	158-200	50,2	51,3	52,4	53,5	54,6	55,7	56,8	57,9	59,0	±2,0
Ширина на уровне глубины проймы (от среднего шва спинки до края борта)	158-200	68,0	70,0	72,0	74,0	76,0	78,0	80,0	82,0	84,0	±2,0
Ширина халата внизу (от края шлицы до края борта по левой стороне)	158-200	68,0	70,0	72,0	74,0	76,0	78,0	80,0	82,0	84,0	±3,0
Длина рукава	158-164	60,5									±3,0
	170-176	63,5									
	182-188	66,5									
	194-200	69,5									

Масса халата 370÷720 г

Халат женский медицинский «Альбина» модель 4.239

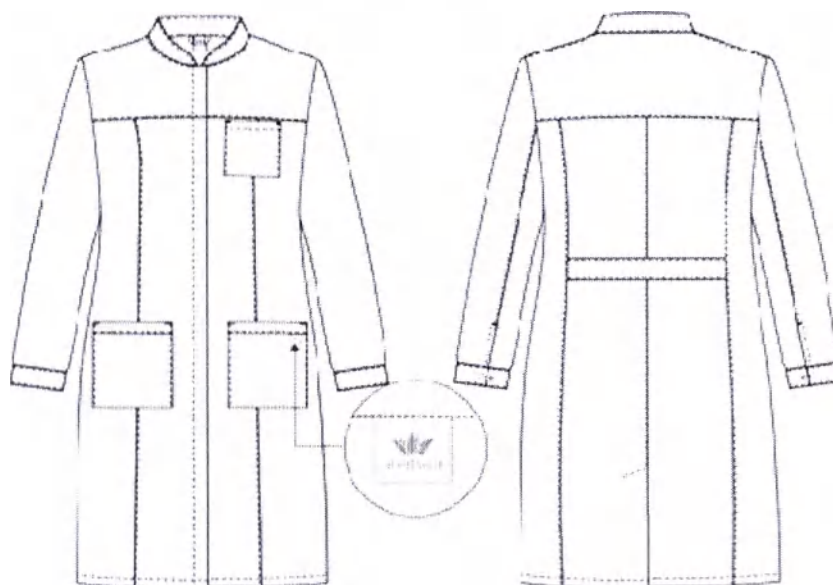


*Рисунок определяет внешний вид модели
Конструкционные характеристики представлены ниже*

Наименование измерений	Рост, см	Обхват груди, см									Допуск, см
		72	76	80	84	88	92	96	100	104	
Длина спинки	146-152	81,0									± 3,0
	158-164	87,0									
	170-176	93,0									
	182-188	99,0									
Ширина спинки в узком месте	146-188	34,0	35,0	36,0	37,0	38,0	39,0	40,0	41,0	42,0	± 2,0
Ширина на уровне глубины проймы (от среднего шва спинки до края борта)	146-188	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	61,5	± 2,0
Ширина халата внизу (от края шлицы до края борта полевой стороне)	146-188	52,0	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	66,0	68,0	± 3,0
Длина рукава	146-152	55,0									± 3,0
	158-164	59,0									
	170-176	63,0									
	182-188	67,0									

Масса халата 300÷650 г

Халат женский медицинский «Альбина» модель 4.239



*Рисунок определяет внешний вид модели
Конструкционные характеристики представлены ниже*

Наименование измерений	Рост, см	Обхват груди, см											Допуск, см
		108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	
Длина спинки	146-152	84,0											±3,0
	158-164	90,0											
	170-176	96,0											
	182-188	102,0											
Ширина спинки в узком месте	146-188	44,0	45,0	46,0	47,0	48,0	49,0	50,0	51,0	52,0	53,0	54,0	±2,0
Ширина на уровне глубины проймы (от среднего шва спинки до края борта)	146-188	64,5	66,5	68,5	70,5	72,5	74,5	76,5	78,5	80,5	82,5	84,5	±2,0
Ширина халата внизу (от края шлицы до края борта по левой стороне)	146-188	71,0	73,0	75,0	77,0	79,0	81,0	83,0	85,0	87,0	89,0	91,0	±3,0
Длина рукава	146-152	55,0											±3,0
	158-164	59,0											
	170-176	63,0											
	182-188	67,0											

Масса халата 300÷650 г

19 Приложение Б

Схемы измерений основных размеров халатов

Схема измерения халата мужского


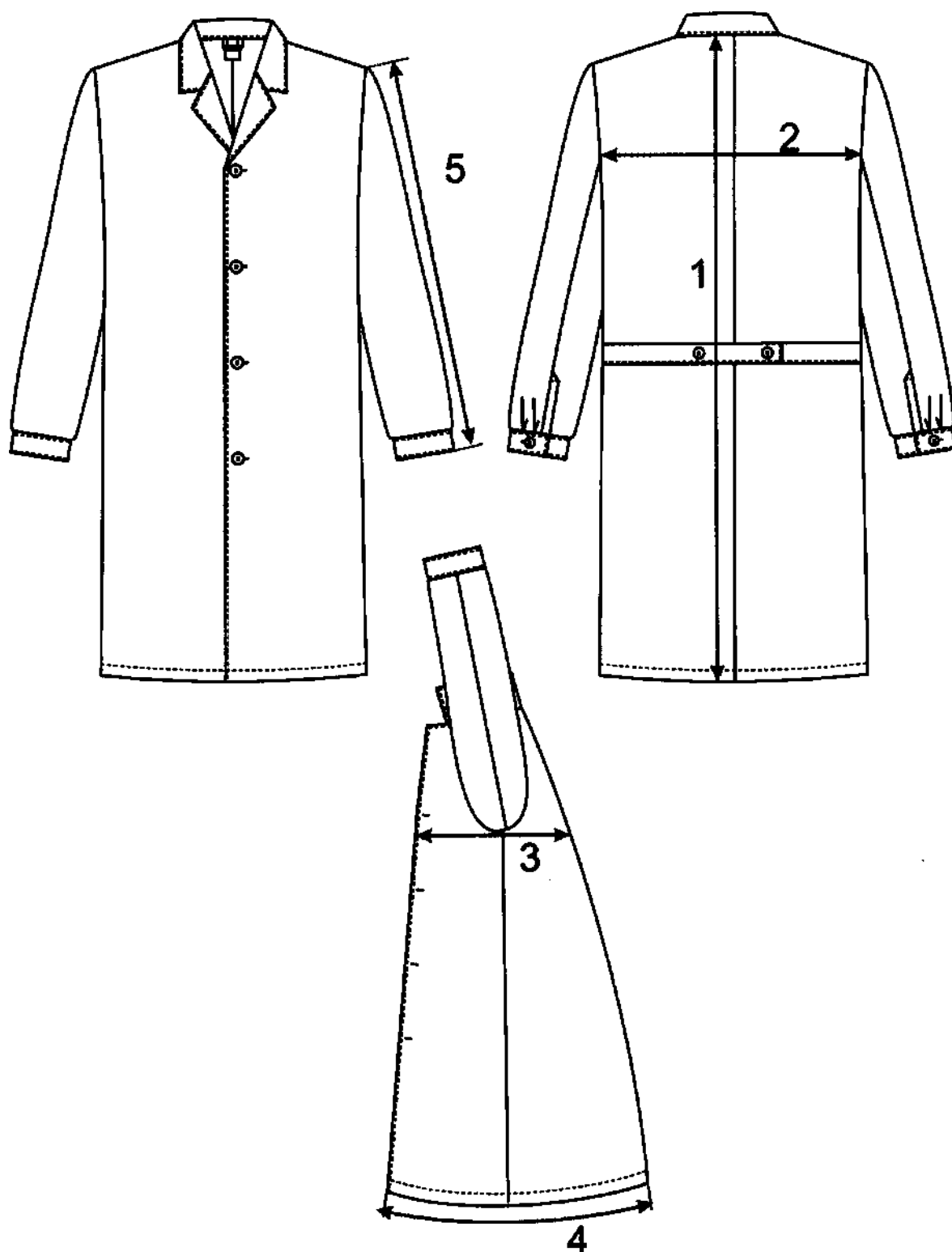


Схема измерения халата женского

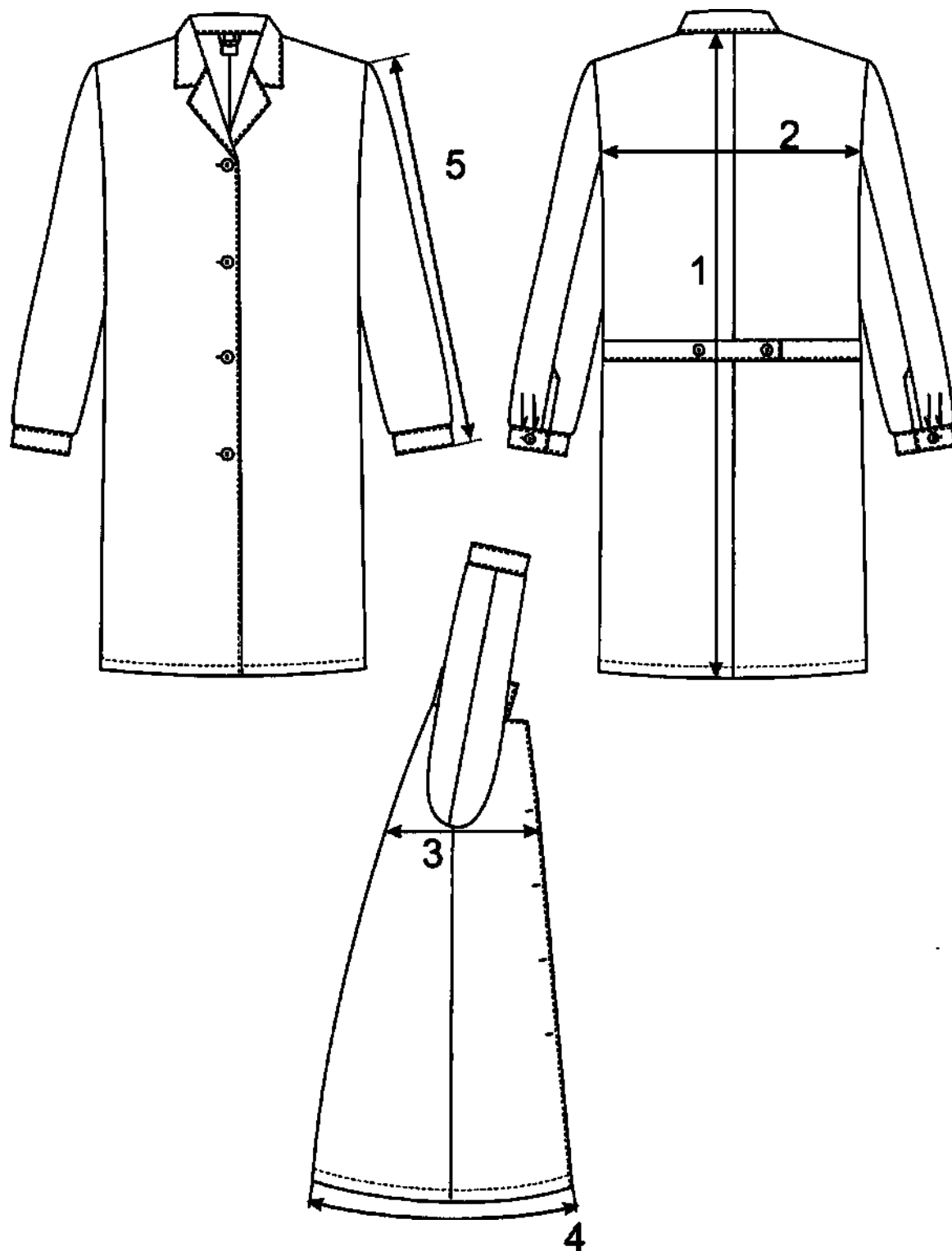

Условные обозначения на схеме измерений основных размеров халатов:

1 – длина спинки

2 – ширина спинки в узком месте

3 – ширина на уровне глубины проймы (от среднего шва спинки до края борта)

4 – ширина халата внизу (от края шлицы до края борта по левой стороне)

5 – длина рукава

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
28 (двадцать восемь) листов(а)

Генеральный директор  Попов А.С.

