

Генеральный директор
ООО «Драйлок Текнолоджиз»
Павлов А. Г.
2022 г.



Инструкция по применению

**Подгузники для детей с ограниченными возможностями,
страдающих недержанием мочи и/или кала в вариантах исполнения
по ТУ 17.22.12-003-23335252-2020**

2022

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Благодарим Вас за приобретение продукции, изготовленной нашим предприятием!

Просим Вас внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по применению, проверить целостность упаковки и самих подгузников, обеспечив их применение в соответствии с целевым назначением и установленными требованиями.

Наименование изготовителя: Общество с ограниченной ответственностью «Драйлок Текнолоджиз» (ООО «Драйлок Текнолоджиз»)

Юридический адрес: 423600, Республика Татарстан, Елабужский р-н, г. Елабуга, территория ОЭЗ «Алабуга», ул. Ш-1, строение 1/3, Россия

Тел.: +7 (831) 411-51-77

Эл. почта: office@drylocktechnologies.com

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подгузники представляют собой многослойное изделие одноразового использования включающие в себя абсорбирующий слой из древесных волокнистых материалов с включением суперабсорбента, покровный и распределительный слой из нетканого полотна, защитный слой из полимерной пленки, фиксирующий слой на основе клея-расплава, барьерные и скрепляющие элементы для фиксации на талии ребенка.

Назначение

Подгузники предназначены для ухода за новорожденными детьми, ясельного, дошкольного и школьного возраста, с ограниченными возможностями, при недержании мочи и/или фекалий, во время ухода в медицинских учреждениях и/или в домашних условиях (включая учреждения для общественного воспитания и образования детей)

Область применения

Применяются в условиях лечебных и лечебно-профилактических медицинских учреждений различного профиля (больницы, санатории и т. д.), а также в домашних условиях.

Показания к применению

Необходимо применять при недержании мочи и фекалий, во время ухода в медицинских учреждениях и/или в домашних условиях (включая учреждения для общественного воспитания и образования детей) за новорожденными детьми, ясельного, дошкольного и школьного возраста.

Противопоказания к применению медицинского изделия

Возможна индивидуальная непереносимость компонентов подгузников.

Возможные побочные действия

Возможны аллергические реакции, при несоблюдении рекомендации по использованию изделий - опрелость, раздражение кожных покровов.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подгузники представляют собой многослойное изделия, включающие в себя:

Подгузники с застежками-липучками:

- верхний покровный слой;
- распределительный слой;
- абсорбирующий слой;
- защитный слой;
- боковые дугообразные оборки с двух сторон (барьерные элементы)
- скрепляющие элементы для фиксации подгузника на талии

Подгузники с эластичным поясом:

- верхний покровный слой;
- распределительный слой;
- абсорбирующий слой;
- защитный слой;
- боковые дугообразные оборки с двух сторон (барьерные элементы)
- эластичный пояс для фиксации подгузника на талии ребенка;
- индикатор наполнения;
- фиксирующая лента для утилизации.

Подгузники выпускаются следующих видов:

Таблица 1.1

Подгузники с застежками-липучками: Наименование группы	Диапазон веса ребенка (рекомендуемый), кг	Условное обозначение группы
Для новорожденных	До 5	Newborn (NB)
Малых размеров	До 6	Mini
Средних размеров	4-9	Midi
Больших размеров	7-18	Maxi
Сверхбольших размеров	11-25	Junior
Сверхбольших размеров	15-30	Junior Plus (XL)
Примечание – Условные обозначения группы, указанных в таблице, соответствуют условным обозначениям, принятым в международной практике.		

Таблица 1.2

Подгузники с эластичным поясом: Наименование группы	Диапазон веса ребенка (рекомендуемый), кг	Условное обозначение группы
Средних размеров	4-9	Midi
Больших размеров	7-18	Maxi
Сверхбольших размеров	11-25	Junior
Сверхбольших размеров	15-30	Junior Plus (XL)
Сверхбольших размеров	Свыше 30	Junior XXL
Примечание – Условные обозначения группы, указанных в таблице, соответствуют условным обозначениям, принятым в международной практике.		

ОБЩИЙ ВИД ПРЕДСТАВЛЕН НА РИСУНКАХ 1-6 (ПОДГУЗНИКИ С ЗАСТЕЖКАМИ-ЛИПУЧКАМИ)

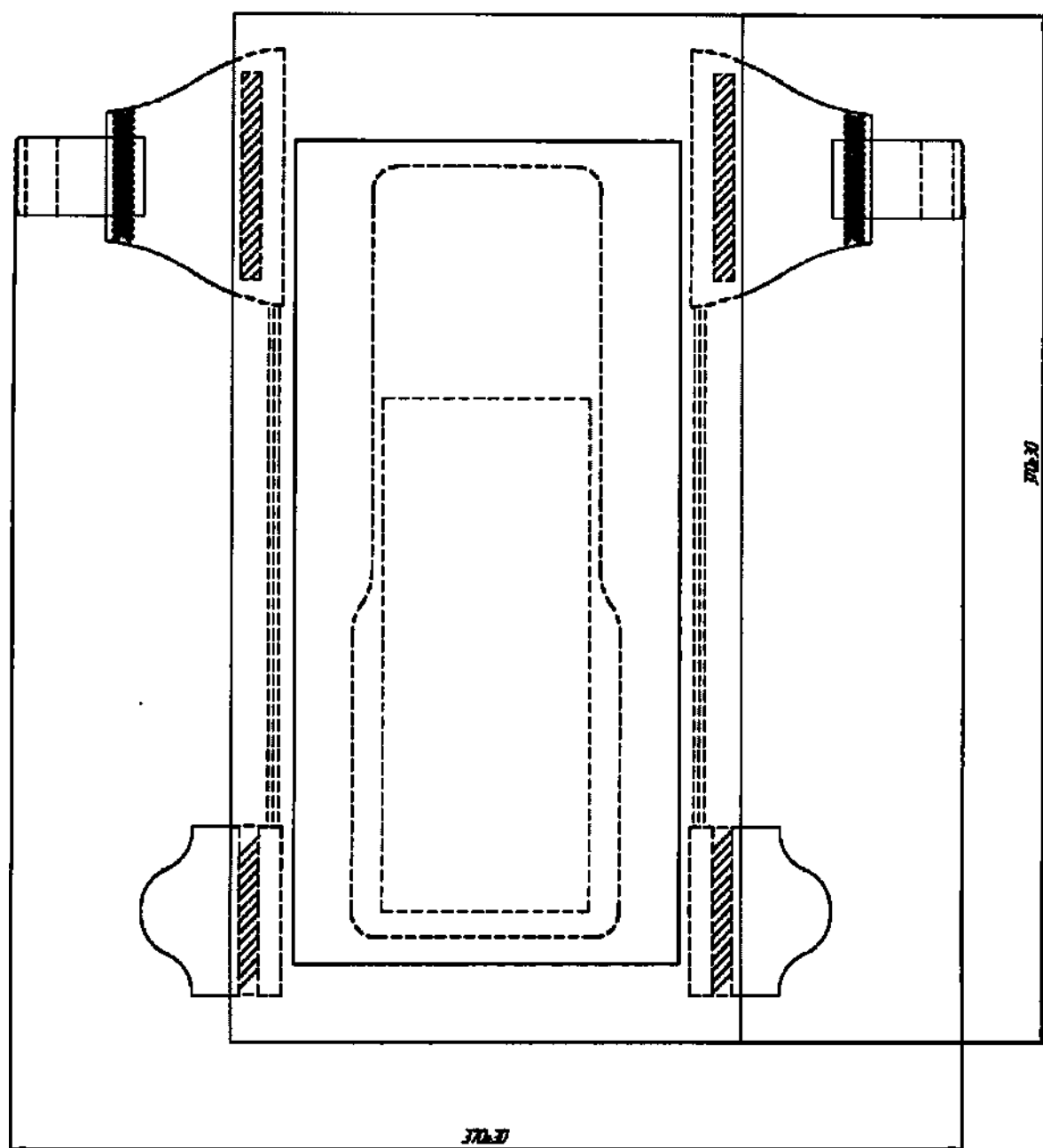


Рис. 1 Подгузники с застежками-липучками Newborn (NB)

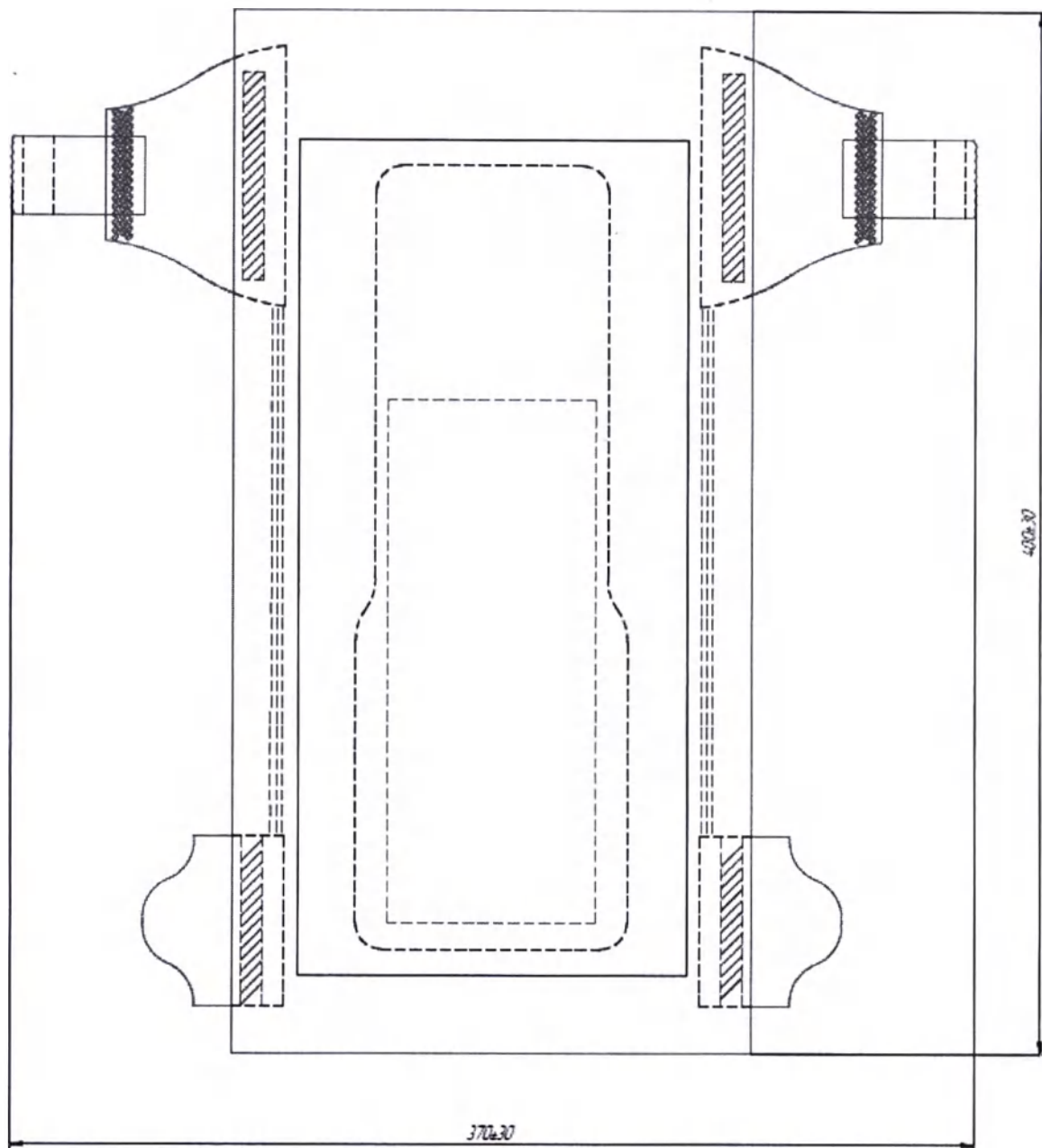


Рис.2 Подгузники с застежками-липучками Mini

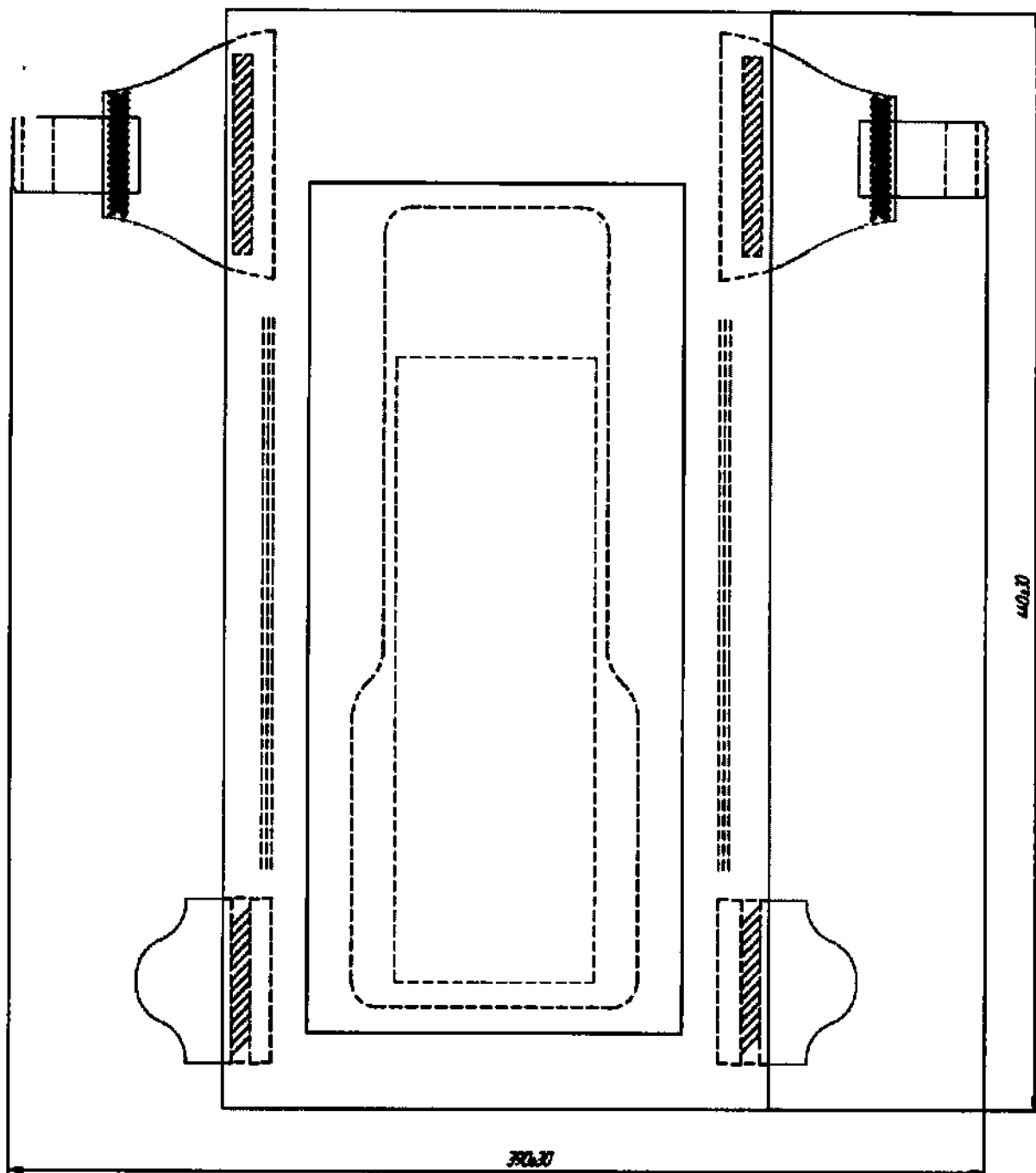


Рис.3 Подгузники с застежками-липучками Midi

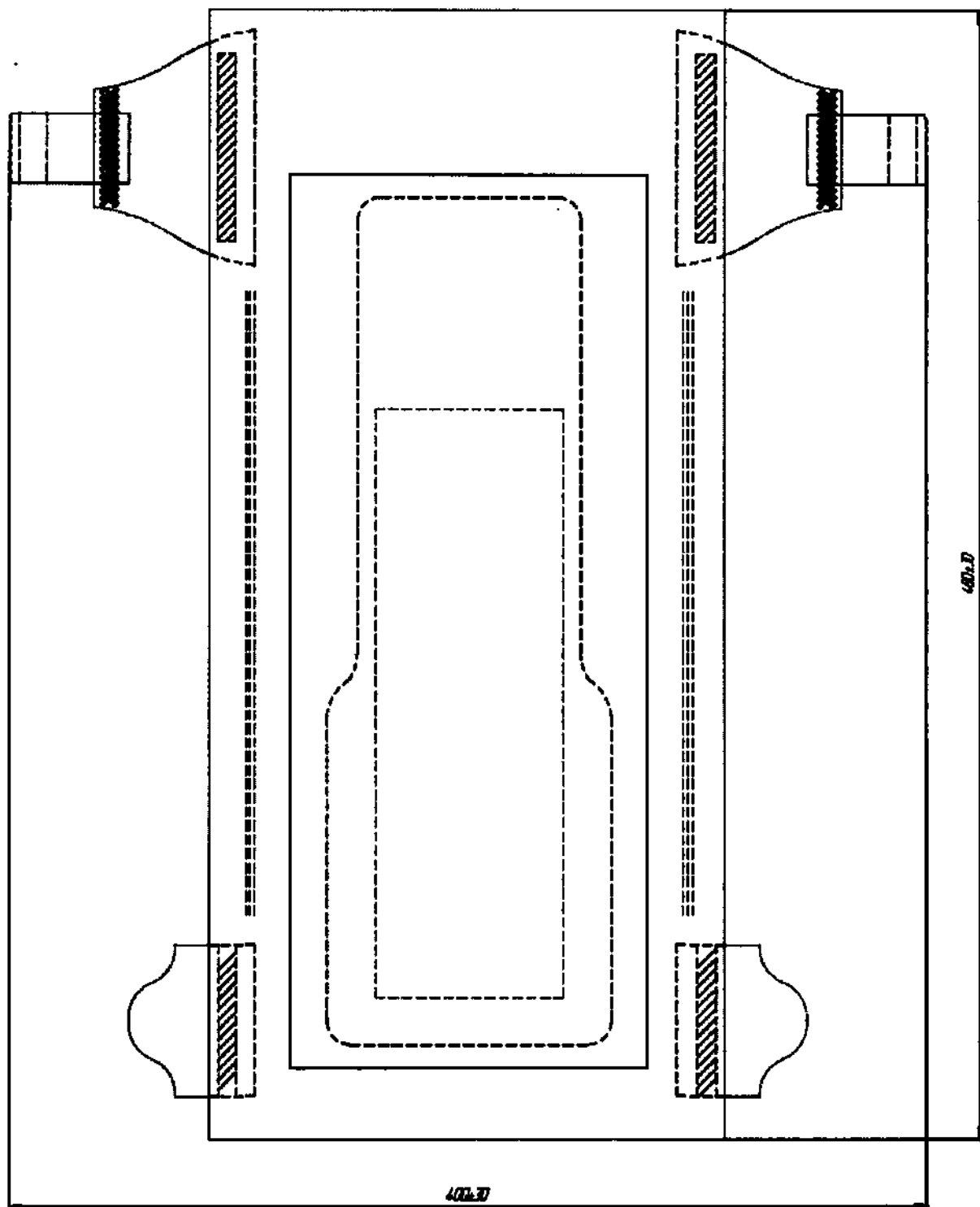


Рис.4 Подгузники с застежками-липучками Maxi

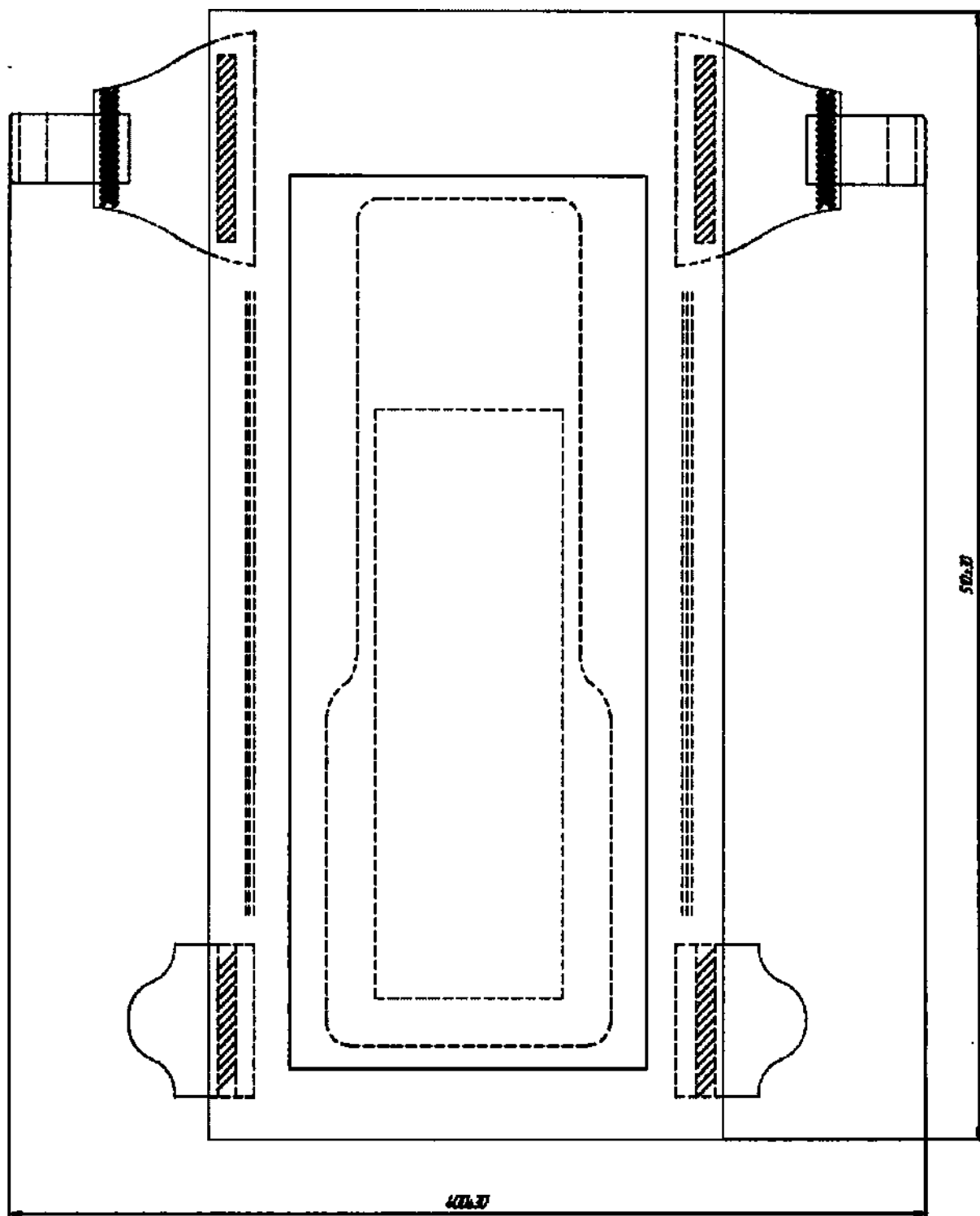


Рис.5 Подгузники с застежками-липучками Junior

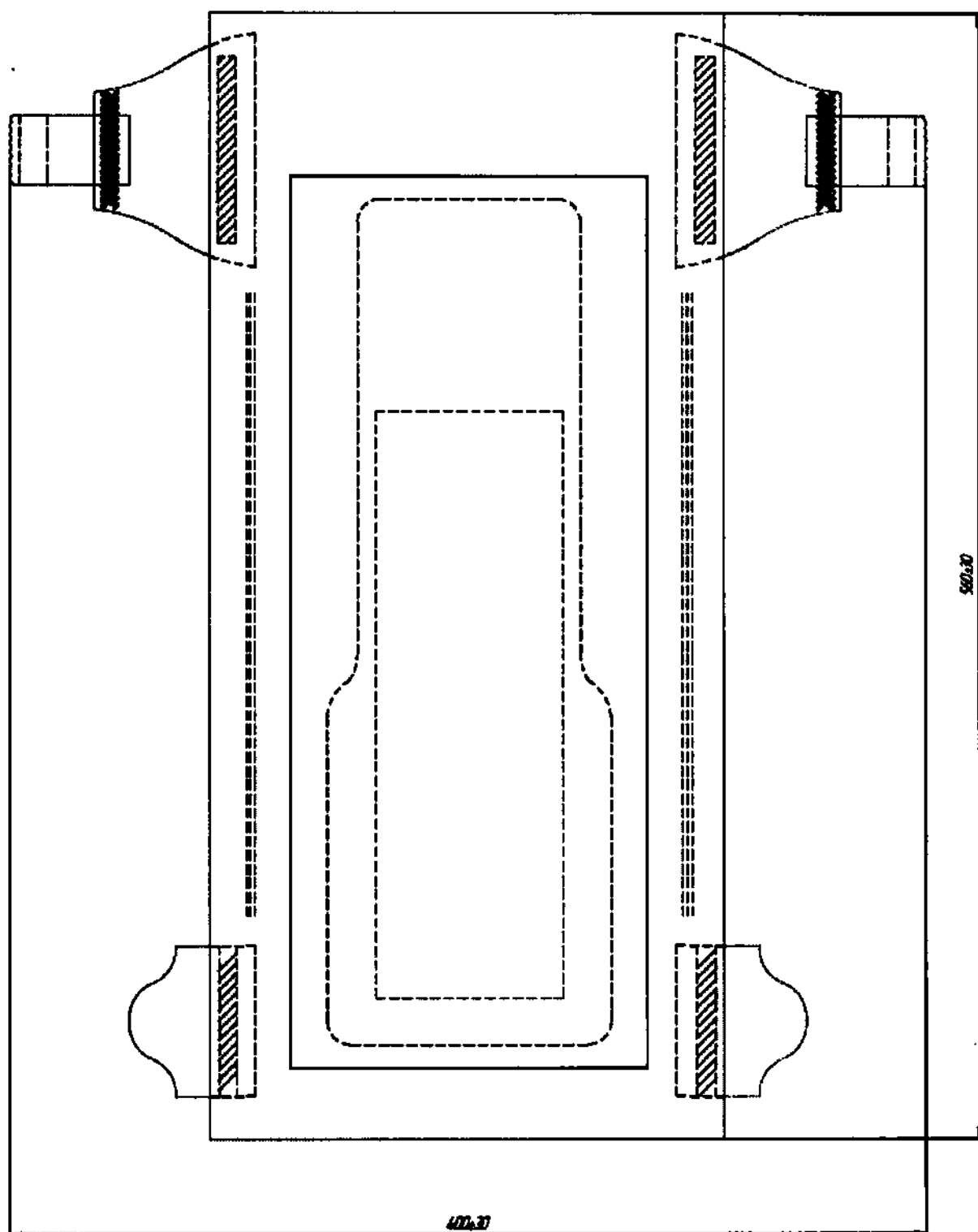


Рис.6 Подгузники с застежками-липучками Junior plus (XL)

Показатели качества подгузников с застежками-липучками должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.

Таблица 2

Наименование показателя	Значение показателя для группы подгузников с застежками-липучками						Метод испытания
	Newborn (NB) (для новорожденных)	Mini (малых размеров)	Midi (средних размеров)	Maxi (больших размеров)	Junior (сверхбольших размеров)	Junior plus (сверхбольших размеров)	
1.Полное влагопоглощение, г, не менее	120,0	160,0	240,0	270,0	280,0	300,0	По ГОСТ Р 52557
2.Обратная сорбция, г, не более	0,4	0,4	6,0	14,0	16,0	16,0	По ГОСТ Р 52557
3.Время впитывания, с, не более	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	По ГОСТ Р 52557
4.Изменение рН водной вытяжки	±1,0						МУ МЗ СССР от 19.10.1990
5. Гигиенические показатели:							
5.1 Интенсивность запаха, балл,	не более 1						Инструкция №880-71
5.2 Индекс токсичности водной вытяжки: 1-ый метод, % 2-й метод, не более	От 70 до 120 включ.20						МУ 1.1.037-95

5.3 Кожно-раздражающее действие при однократных и многократных аппликациях, балл	0	МУ 2196-80
5.4 Сенсибилизирующее действие (II компрессным методом в течение 24ч)	Отсутствие	ГОСТ Р ИСО 10993-10
5.5 Количество мигрирующих вредных веществ в дистиллированную воду, мг/л, не более:		
5.5.1 формальдегид	0,100	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98, МУК 4.1.3166-14, МУК 4.1.653-96, МУК 4.1.752-99, МУК 2.3.3.052-96, ГОСТ 31870-2012
5.5.2 этилацетат	0,100	
5.5.3 ацетальдегид	0,200	
5.5.4 бензол	0,010	
5.5.5 гексан	0,100	
5.5.6 гептан	0,100	
5.5.7 ацетон	0,100	
5.5.8. спирты:		
- метиловый	0,200	
- пропиловый	0,100	
- изопропиловый	0,100	
- бутиловый	0,500	ГОСТ 31870-2012
- изобутиловый	0,500	
5.5.9 акрилонитрил	0,020	
5.5.10 метилметакрилат	0,250	
5.5.11 метилакрилат	0,020	

5.5.12 бутилакрилат	0,010	
------------------------	-------	--

6. Микробиологические показатели:


6.1. Количество плесневых и дрожжевых грибов	отсутствие	ГОСТ 26972-86
6.2. Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	не более 10^2	ГОСТ 10444.15-94
6.3. Бактерии семейства Enterobacteriaceae	отсутствие	ГОСТ 26972-86
6.4. Бактерии семейства Pseudomonas aeruginosa	отсутствие	МУК 4.2.801-99
6.5. Бактерии семейства Staphylococcus aureus	отсутствие	МУК 4.2.801-99

ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ (ПОДГУЗНИКИ С ЗАСТЕЖКАМИ-ЛИПУЧКАМИ)

-раскройте подгузник и разложите его на плоской поверхности. Расправьте боковые резиночки, придав им вертикальное положение. Концы полосок с застежками-липучками должны располагаться сзади.

-положите ребенка на подгузник. Расправьте бортики на передней части подгузника и застегните липучки на фронтальной полосе.

- подтяните и расправьте края подгузника и защитные внутренние резиночки так, чтобы предотвратить протекание по бокам. Убедитесь, что подгузник не давит на животик и ребенку комфортно.

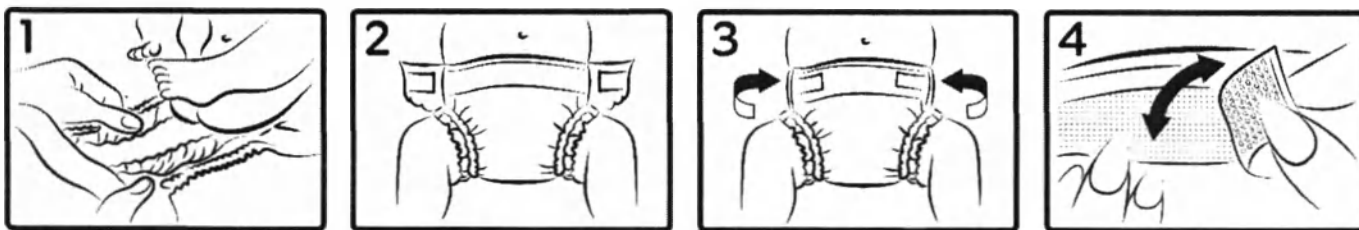

ВНИМАНИЕ!

1. Соблюдайте правила гигиены. Перед сменой подгузника вымойте Ваши руки и попку ребёнка, чтобы избежать попадания бактерий на подгузник.
2. Подгузник является одноразовым предметом гигиены. Не используйте подгузник чрезмерно долго, это может привести к протечкам на одежду малыша.
3. Если Вы обнаружили признаки аллергии на коже ребёнка при ношении подгузников, немедленно прекратите их использование.
4. Использованный подгузник подлежит утилизации в мусорное ведро. Не выбрасывайте его в унитаз.
5. Иногда можно заметить на коже ребенка частички геля, чаще всего это происходит при очень длительном использовании подгузника. Гель абсолютно безвреден и не токсичен, он легко смывается с кожи малыша. Чтобы частички не оставались на коже, просто меняйте подгузники чаще, чем Вы это делаете.

ОБЩИЙ ВИД ПРЕДСТАВЛЕН НА РИСУНКАХ 1-5 (ПОДГУЗНИКИ С ЭЛАСТИЧНЫМ ПОЯСОМ)

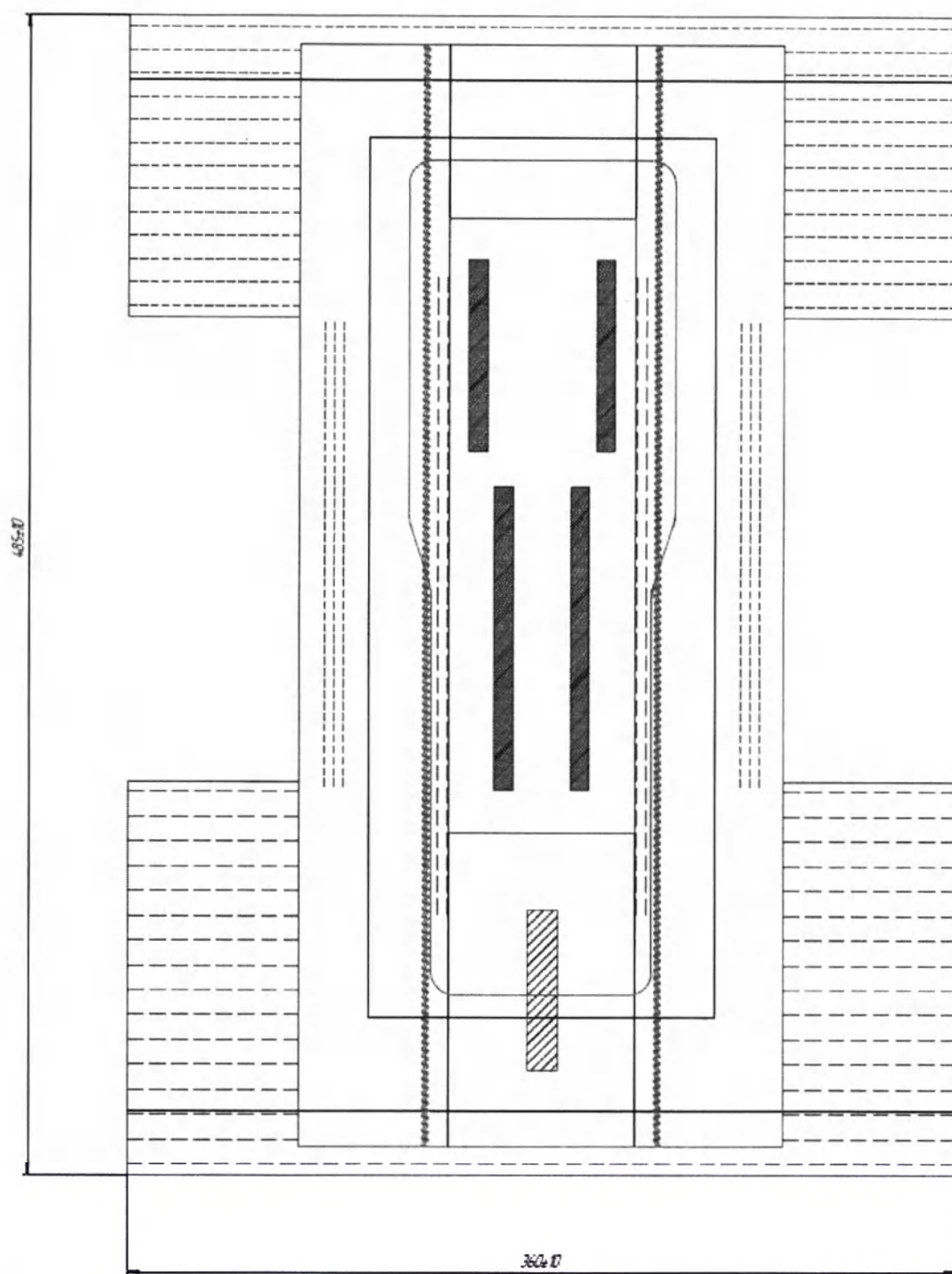


Рис.1 Подгузники с эластичным поясом Midi

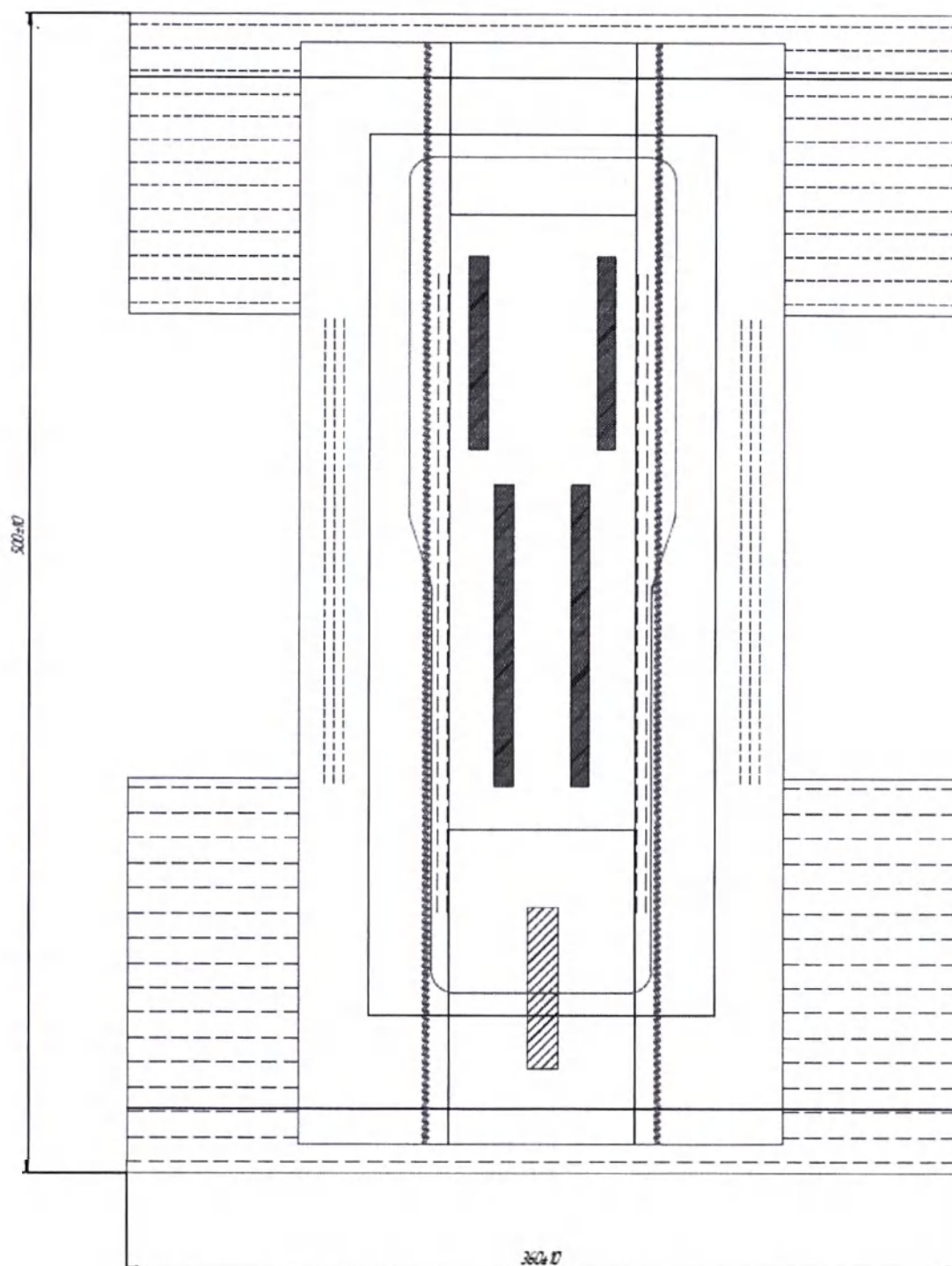


Рис.2 Подгузники с эластичным поясом Maxi

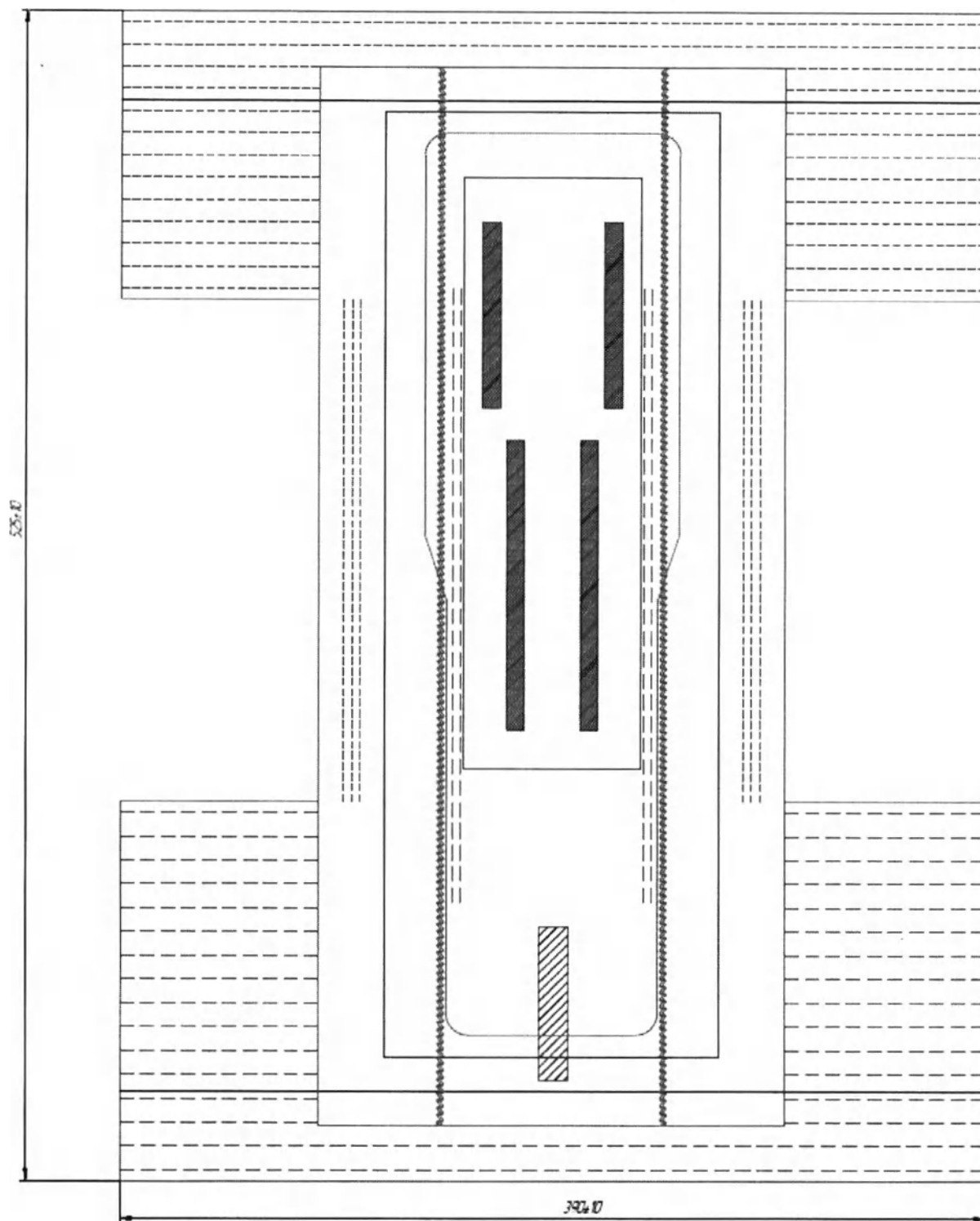


Рис.3 Подгузники с эластичным поясом Junior

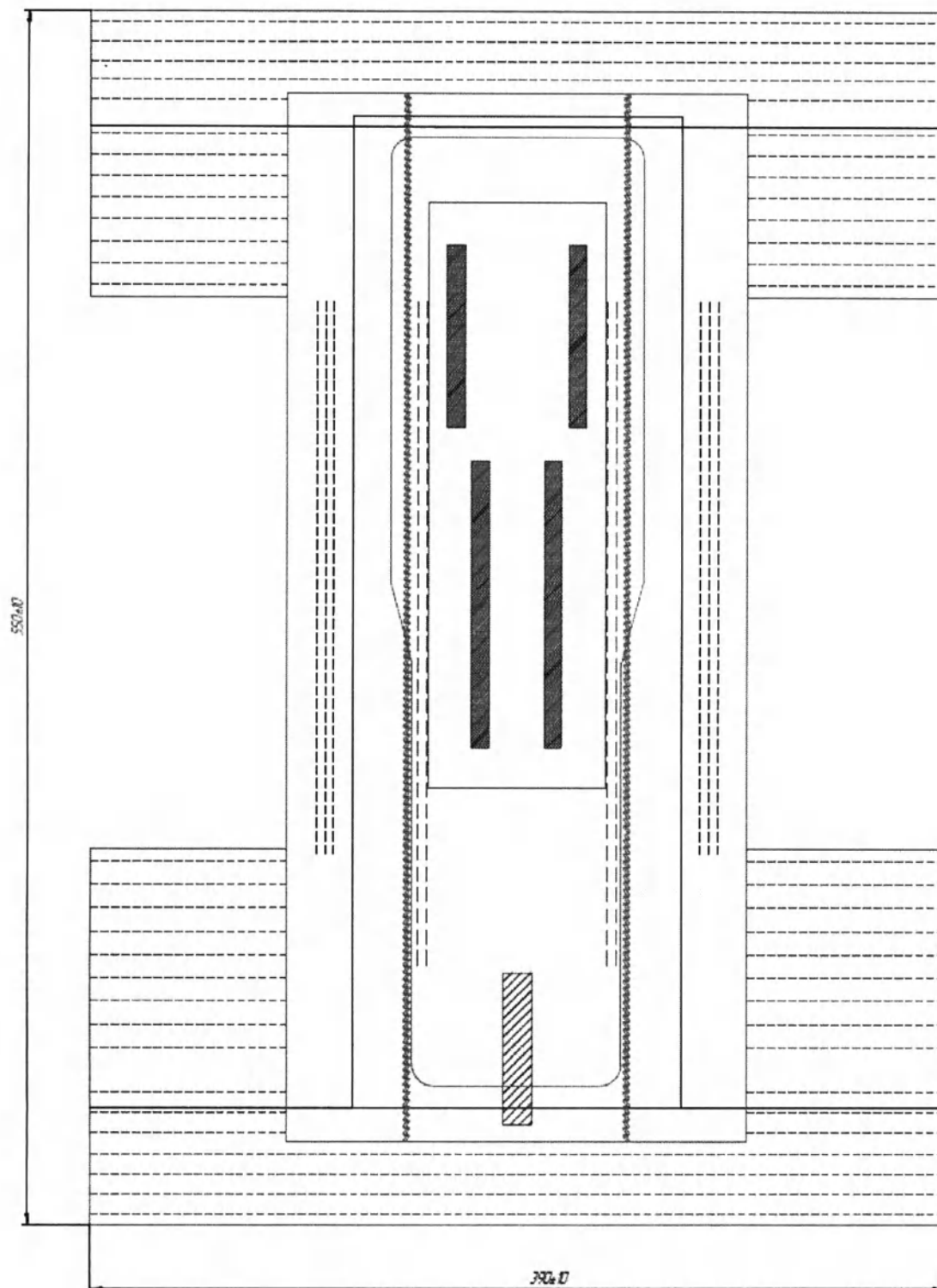


Рис.4 Подгузники с эластичным поясом Junior plus (XL)

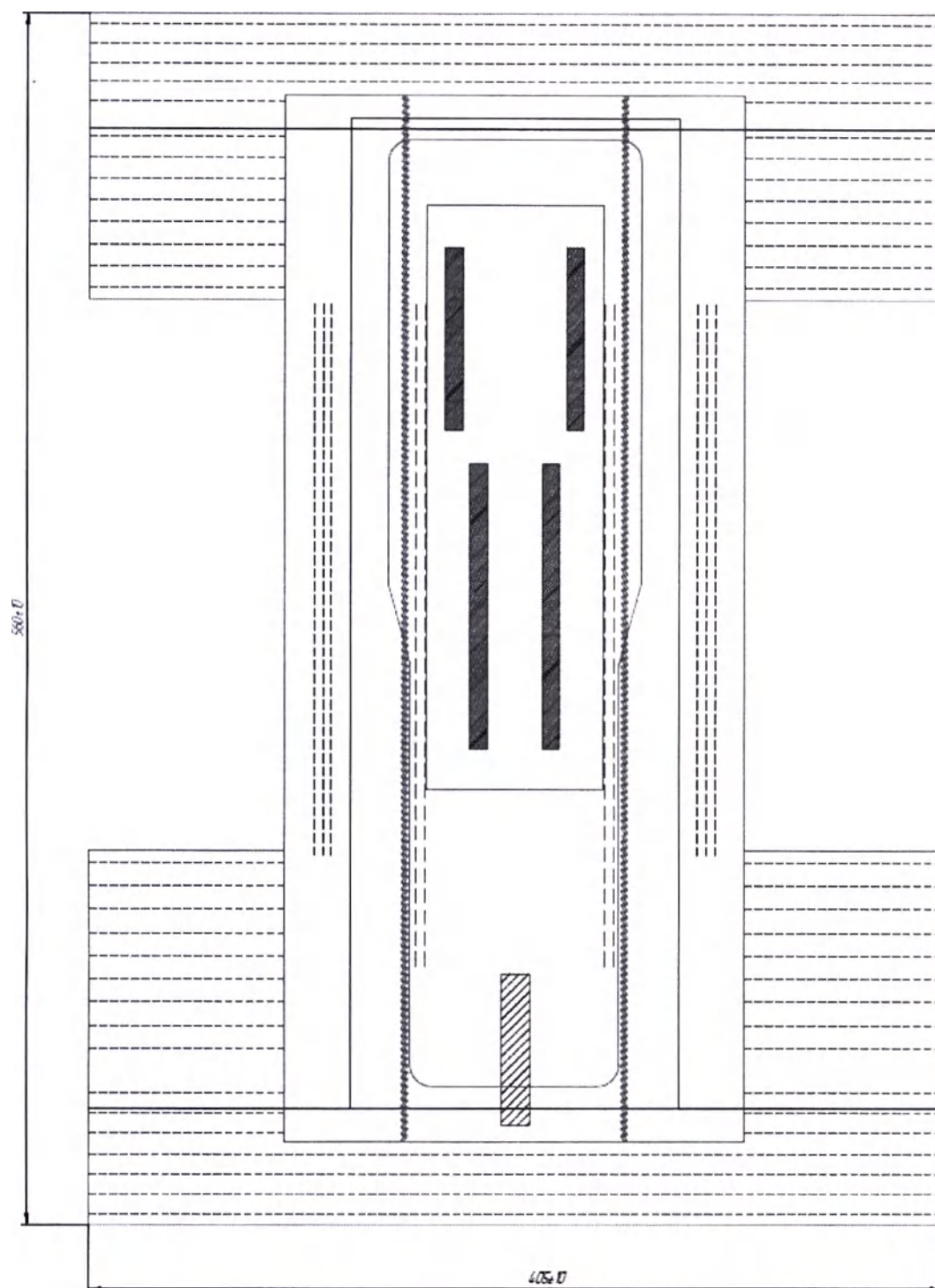


Рис.5 Подгузники с эластичным поясом Junior XXL

Показатели качества подгузников с эластичным поясом должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 3.

Таблица 3

Наименование показателя	Значение показателя для группы подгузников с эластичным поясом					Метод испытания
	Midi (средних размеров)	Maxi (больших размеров)	Junior (сверхбольших размеров)	Junior plus (сверхбольших размеров)	Junior XXL (сверхбольших размеров)	
1. Полное влагопоглощение, г, не менее	240,0	270,0	280,0	300,0	300,0	По ГОСТ Р 52557
2. Обратная сорбция, г, не более	6,0	14,0	16,0	16,0	16,0	По ГОСТ Р 52557
3.Время впитывания, с, не более	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	По ГОСТ Р 52557
4.Изменение pH водной вытяжки	±1,0					МУ МЗ СССР от 19.10.1990
5. Гигиенические показатели						
5.1 Интенсивность запаха, балл,	не более 1					Инструкция №880-71
5.2 Индекс токсичности водной вытяжки: 1-ый метод, % 2-й метод, не более	От 70 до 120 включ.20					МУ 1.1.037-95
5.3 Кожно-раздражающее действие при однократных и многократных аппликациях, балл	0					МУ 2196-80
5.4Сенсибилизирующее действие (II компрессным						

методом в течение 24ч)	Отсутствие	ГОСТ Р ИСО 10993-10
5.5 Количество мигрирующих вредных веществ в дистиллированную воду, мг/л, не более:		
5.5.1 формальдегид	0,100	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98, МУК 4.1.3166-14, МУК 4.1.653-96, МУК 4.1.752-99, МУК 2.3.3.052-96,
5.5.2 этилацетат	0,100	
5.5.3 ацетальдегид	0,200	
5.5.4 бензол	0,010	
5.5.5 гексан	0,100	
5.5.6 гептан	0,100	
5.5.7 ацетон	0,100	
5.5.8. спирты:		
- метиловый	0,200	
- пропиловый	0,100	
- изопропиловый	0,100	ГОСТ 31870-2012
- бутиловый	0,500	
- изобутиловый	0,500	
5.5.9 акрилонитрил	0,020	
5.5.10 метилметакрилат	0,250	
5.5.11 метилакрилат	0,020	
5.5.12 бутилакрилат	0,010	

6. Микробиологические показатели:		
6.1. Количество плесневых и дрожжевых грибов	отсутствие	ГОСТ 26972-86
6.2. Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	не более 10^2	ГОСТ 10444.15-94
6.3. Бактерии семейства Enterobacteriaceae	отсутствие	ГОСТ 26972-86
6.4. Бактерии семейства Pseudomonas aeruginosa	отсутствие	МУК 4.2.801-99
6.5. Бактерии семейства Staphylococcus aureus	отсутствие	МУК 4.2.801-99



ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ (ПОДГУЗНИКИ С ЭЛАСТИЧНЫМ ПОЯСОМ)

Когда ваш ребенок лежит на спине:

- Вставьте руки в отверстия подгузников снизу и проденьте по очереди ножки.
- Натяните пояс подгузника выше пупочка ребенка.
- Также удобно подтяните пояс подгузников выше пупочка в момент, когда малыш пытается встать, опираясь на вас.
- Подтяните и расправьте края подгузника и защитные внутренние резиночки так, чтобы предотвратить протекание по бокам.

Когда ваш ребенок стоит:

- Вставьте сначала одну ножку, а затем другую и натяните пояс подгузника выше пупочка.
- Подтяните и расправьте края подгузника и защитные внутренние резиночки так, чтобы предотвратить протекание по бокам.

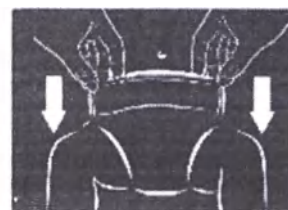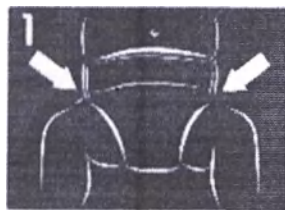

ВНИМАНИЕ!

1. Соблюдайте правила гигиены. Перед сменой подгузников вымойте Ваши руки и попку ребёнка, чтобы избежать попадания бактерий на подгузники.
2. Подгузники являются одноразовым предметом гигиены. Не используйте их чрезмерно долго, это может привести к протечкам на одежду малыша.
3. Если Вы обнаружили признаки аллергии на коже ребёнка при ношении подгузников, немедленно прекратите их использование.
4. После использования скрутите подгузники в трубочку. Закрепите лентой и выбросите в мусорное ведро.
5. Иногда можно заметить на коже ребенка частички геля, чаще всего это происходит при очень длительном использовании подгузника. Гель абсолютно безвреден и не токсичен, он легко смывается с кожи малыша. Чтобы частички не оставались на коже, просто меняйте подгузники чаще, чем Вы это делаете.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- не храните подгузники и подгузники в ванной комнате или во влажных помещениях, т. к. они являются гигроскопичным продуктом и впитывающие свойства могут быть ухудшены или нарушены
 - избегайте воздействия на подгузники и подгузники прямых солнечных лучей.
- Рекомендуется хранить при температуре +50/-50 градусов.

ИНФОРМАЦИЯ С УПАКОВКИ

- условное обозначение группы подгузника, диапазон веса ребенка, товарную марку (при наличии);
- наименование изделия;
- страну – изготовителя
- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес;
- отличительные характеристики подгузников;
- номер артикула (при наличии);
- информацию о наличии специальных ингредиентов;
- количество подгузников в упаковке;

- номер партии совпадает с датой производства;
- дату (месяц, год) изготовления;
- срок годности;
- обозначение настоящих технических условий;
- указание по утилизации: "Не бросать в канализацию";
- штриховой код изделия (при наличии);
- инструкция по применению подгузника;
- информацию о сертификации.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие подгузников требованиям технических условий ТУ 17.22.12-003-23335252-2020 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и применения.

Срок годности – 3 года с даты производства, указанной на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование - по ГОСТ 6658 любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Условия перевозки - по группе 5 ГОСТ 15150.

Условия хранения подгузников в транспортной таре на складах потребителя и изготовителя - по группе 5 ГОСТ 15150: при температуре от -50 °С до +50 °С.

В соответствие с СанПиН 2.2.4.548-96 раздел 6 допустимая влажность воздуха от 15% до 75 %.

УТИЛИЗАЦИЯ

Обращение с отходами производства осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Использованные подгузники относятся к отходам класса Б, а неиспользованные – к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Для обращений потребителей и рекламаций

Наименование изготовителя: Общество с ограниченной ответственностью «Драйлок
Текнолоджиз» (ООО «Драйлок Текнолоджиз»)

Юридический адрес: 423600, Республика Татарстан, Елабужский р-н, г. Елабуга, территория ОЭЗ
«Алабуга», ул. Ш-1, строение 1/3, Россия

Тел.: +7 (831) 411-51-77

Эл. почта: sales@drylocktechnologies.com

25 двадцать пять (листов)

Генеральный директор
ООО «Драйлок-Технополджиз»
Павлов А.И.

