



공증인가 법무법인 한미
서울중앙지방법검찰청소속

[별지 제41호서식]

Tel : 733-3955~6 Fax : 733-3950

Registered No. 2021 - 16176

NOTARIAL CERTIFICATE



HANMI LAW AND NOTARY OFFICE

(Diplomatic Center B/D 2F, Seocho-dong) 202, 2558, Nambusunhwan-ro, Seocho-gu, Seoul, Korea

210mm × 297mm (보존용지(1종) 70g/m²)

DECLARATION

We(Applicant)

do hereby solemnly and declare: Yurim Medical Co.,Ltd.

Hae June, Yahng

1. That the attached document: Instruction for Use

2. ☒ is (are>true and correct.

☐ is (are) true translation for the text(s) originally written in the Korean language conscientiously believing the same to be true and correct.

Dec , 15 , 2021



Signature

Yurim Medical Co.,Ltd

Hae June, Yahng


PRESIDENT



Approved by

Yahng, Hae June

Date: ___Dec. 13. 2021_____

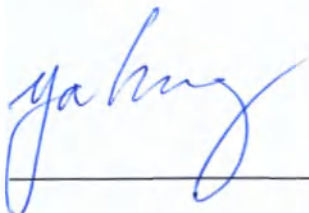

Yurim Medical Co.,Ltd.



Hae June, Yahng

PRESIDENT

Instruction for use:

«EWA Innolift cosmetic thread for lifting on a
carrier needle, absorbable»

Manufactured by:

Yurim Medical Co. Ltd., Korea

Инструкция по применению

Нить косметологическая для лифтинга на игле-носителе,
рассасывающаяся EWA Innolift



공증인가 법무법인 한미

[별지 제43호서식]

Tel : 733-3955~6 Fax : 733-3950

등부 2021 년 제 16176 호

Registered No. 2021 - 16176

인 증

NOTARIAL CERTIFICATE

위 선 언 서 에 기재된
유림의료기 주식회사
대표이사 양해준

MIN SOO PARK

attorney-in-fact of

YURIM MEDICAL CO., LTD.

HAE JUNE, YAHNG / PRESIDENT

의 대리인 박 민 수 는
본 공증인의 면전에서 위 본인이
기명날인한 것임을 자인하였다.

appeared before us and

admitted said principal's

subscription to the attached

DECLARATION

2021 년 12 월 15 일
이 사무소에서 위 인증한다.

This is hereby attested on

this **15th** day of **December 2021**

at this office.



공증인가 법무법인 한 미

서울중앙지방검찰청

서울특별시 서초구 남부순환로 2558, 2층 202호
(서초동, 외교센터빌딩)


HANMI LAW AND

NOTARY OFFICE


Seoul Central District Prosecutors' Service
(Diplomatic Center B/D 2F, Seocho-dong) 202,
2558, Nambusunhwan-ro, Seocho-gu, Seoul, Korea

공증담당변호사

Signature of the Notary Public

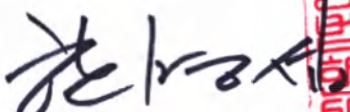

한 명 섭

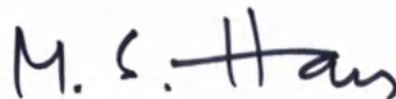

HAN MYUNG SUB

This office has been authorized by
the Minister of Justice, the Republic
of Korea to act as Notary Public
since March 14, 2007
under Law No. 7428.

210mm × 297mm (보존용지(1종) 70g/m²)

Наименование изделия:

Нить косметологическая для лифтинга на игле-носителе, рассасывающаяся EWA Innolift»:

I. Нити из полидиоксанона.

1. Нить из полидиоксанона обычная на поллой игле:

- **линейная:** YRN25-01-G; YRN25-02-G; YRN25-03-G; YRN25-05-G; YRN26-01-G; YRN26-02-G; YRN26-03-G; YRN26-05-G; YRN27-01-G; YRN27-02-G; YRN27-03-G; YRN27-05-G; YRN29-01-G; YRN29-02-G; YRN29-03-G; YRN29-04-G; YRN30-01-G; YRN30-02-G – по 5 нитей в первичной (стерилизуемой) упаковке.
- **нить косичка:** YRT25-01-G; YRT25-02-G; YRT25-03-G; YRT25-05-G; YRT26-01-G; YRT26-02-G; YRT26-03-G; YRT26-05-G - по 5 нитей в первичной (стерилизуемой) упаковке.
- **нить спираль:** YRS25-03-G; YRS26-01-G; YRS26-02-G; YRS26-03-G; YRS27-01-G; YRS27-02-G; YRS27-03-G; YRS27-05-G; YRS29-01-G; YRS29-02-G; YRS29-03-G; YRS29-04-G; YRS30-01-G; YRS30-02-G - по 5 нитей в первичной (стерилизуемой) упаковке.
- **нить двойная спираль:** YRDS25-01-G; YRDS25-02-G; YRDS25-03-G; YRDS26-01-G; YRDS26-02-G; YRDS26-03-G; YRDS26-05-G - по 5 нитей в первичной (стерилизуемой) упаковке.

2. Нить из полидиоксанона шипованная на поллой игле:

- **модель BSP:** YRPN27-06-G; YRPN27-08-G; YRPN27-10-G - по 4 нити в первичной (стерилизуемой) упаковке.
- **модель DSP:** YRPN25-111; YRPN25-113 - по 4 нити в первичной (стерилизуемой) упаковке.
- **модель FB:** YRPN23-63-G; YRPN23-64-G; YRPN23-65-G - по 4 нити в первичной (стерилизуемой) упаковке.
- **модель FE:** YRPN19-94-G; YRPN19-95-G; YRPN19-96-G; YRPN21-78-G; YRPN21-79-G; YRPN21-80-G; YRPN23-78-G; YRPN23-79-G; YRPN23-80-G - по 4 нити в первичной (стерилизуемой) упаковке.
- **модель SC:** YRPN18-124-G; YRPN18-125-G; YRPN18-126-G; YRPN19-124-G; YRPN19-125-G; YRPN19-126-G - по 4 нити в первичной (стерилизуемой) упаковке.

3. Нить из полидиоксанона обычная на W-образной канюле:

- **линейная:** YRN30-01-W; YRN30-02-W - по 4 нити в первичной (стерилизуемой) упаковке.

4. Нить из полидиоксанона шипованная на W-образной канюле:

- **модель FE:** YRPN19-94-WG; YRPN19-95-WG; YRPN19-96-WG; YRPN21-78-WG; YRPN21-79-WG; YRPN21-80-WG; YRPN23-78-WG; YRPN23-79-WG; YRPN23-80-WG - по 4 нити в первичной (стерилизуемой) упаковке.

5. Нить из полидиоксанона шипованная на L-образной канюле:

- **модель FA:** YRPN21-58-L - по 4 нити в первичной (стерилизуемой) упаковке.
- **модель FE:** YRPN19-94-LG; YRPN19-95-LG; YRPN19-96-LG; YRPN21-78-LG; YRPN21-79-LG; YRPN21-80-LG; YRPN23-78-LG; YRPN23-79-LG; YRPN23-80-LG - по 4 нити в первичной (стерилизуемой) упаковке.
- **модель FG:** YRPN19-103-L; YRPN19-104-L - по 4 нити в первичной (стерилизуемой) упаковке.

- модель **SC**: YRPN18-124-LG; YRPN18-125-LG; YRPN18-126-LG; YRPN19-124-LG; YRPN19-125-LG; YRPN19-126-LG - по 2 нити в первичной (стерилизуемой) упаковке.
- модель **ST**: YRPN18-120-LG - по 2 нити в первичной (стерилизуемой) упаковке.

6. Нить из полидиоксанона на L-образной канюле:

- модель **Multi Fill**: YRMF23-01-LG; YRMF23-03-LG - по 2 нити в первичной (стерилизуемой) упаковке.
- модель **Cavern Fill**: YRCF21-05ET-LG; YRCF21-05FT-LG; YRCF23-03A-LG; YRCF23-03B-LG - по 2 нити в первичной (стерилизуемой) упаковке.

7. Нить из полидиоксанона шипованная на двух иглах носителях:

- модель **FE**: YRDN-FE-CI-02; YRDN-FE-AN-06 - по 1 нити в первичной (стерилизуемой) упаковке.
- модель **SC**: YRDN-SC-CI-02; YRDN-SC-AN-04 - по 1 нити в первичной (стерилизуемой) упаковке.

II. Нить из полимолочной кислоты.

1. Нить из полимолочной кислоты обычная на полый игле:

- **линейная**: YRN-PL25-01-G; YRN-PL25-02-G; YRN-PL25-03-G; YRN-PL25-05-G; YRN-PL26-01-G; YRN-PL26-02-G; YRN-PL26-03-G; YRN-PL26-05-G; YRN-PL27-01-G; YRN-PL27-02-G; YRN-PL27-03-G; YRN-PL27-05-G; YRN-PL29-01-G; YRN-PL29-02-G; YRN-PL29-03-G; YRN-PL29-04-G; YRN-PL30-01-G; YRN-PL30-02-G - по 5 нитей в первичной (стерилизуемой) упаковке.
- **нить косичка**: YRT-PL25-01-G; YRT-PL25-02-G; YRT-PL25-03-G; YRT-PL25-05-G; YRT-PL26-01-G; YRT-PL26-02-G; YRT-PL26-03-G; YRT-PL26-05-G - по 5 нитей в первичной (стерилизуемой) упаковке.
- **нить спираль**: YRS-PL25-03-G; YRS-PL26-01-G; YRS-PL26-02-G; YRS-PL26-03-G; YRS-PL27-01-G; YRS-PL27-02-G; YRS-PL27-03-G; YRS-PL27-05-G; YRS-PL29-01-G; YRS-PL29-02-G; YRS-PL29-03-G; YRS-PL29-04-G; YRS-PL30-01-G; YRS-PL30-02-G - по 5 нитей в первичной (стерилизуемой) упаковке.
- **нить двойная спираль**: YRDS-PL25-01-G; YRDS-PL25-02-G; YRDS-PL25-03-G; YRDS-PL26-01-G; YRDS-PL26-02-G; YRDS-PL26-03-G; YRDS-PL26-05-G - по 5 нитей в первичной (стерилизуемой) упаковке.

2. Нить из полимолочной кислоты шипованная на полый игле:

- модель **FE**: YRPN-PL19-94-G; YRPN-PL19-95-G; YRPN-PL21-79-G; YRPN-PL21-80-G; YRPN-PL23-79-G; YRPN-PL23-80-G - по 4 нити в первичной (стерилизуемой) упаковке.

3. Нить из полимолочной кислоты шипованная на W-образной канюле:

- модель **FE**: YRPN-PL19-94-WG; YRPN-PL19-95-WG; YRPN-PL21-79-WG; YRPN-PL21-80-WG; YRPN-PL23-79-WG; YRPN-PL23-80-WG - по 4 нити в первичной (стерилизуемой) упаковке.

4. Нить из полимолочной кислоты шипованная на L-образной канюле:

- модель **FE**: YRPN-PL19-94-LG; YRPN-PL19-95-LG; YRPN-PL21-79-LG; YRPN-PL21-80-LG; YRPN-PL23-79-LG; YRPN-PL23-80-LG - по 4 нити в первичной (стерилизуемой) упаковке.

Информация о разработчике/производителе:

Yurim Medical Co., Ltd. («Юрим Медикал Ко., Лтд.»)

43, Jeongjung 3-gil, Osong-eup, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea

тел.: 82-43-2319788

факс: 82-43-2319789

Информация об Уполномоченном представителе производителя:

Общество с ограниченной ответственностью «ОФТАДЕРМ-ЛОГИСТИК» (ООО «ОФТАДЕРМ-ЛОГИСТИК»)

117105 г. Москва ул. Нагатинская д.1 стр.2 цоколь офис № 1

тел.: +7(499) 404-36-46

info@oftaderm.ru

Место производства:

Yurim Medical Co., Ltd., 43, Jeongjung 3-gil, Osong-eup, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea;

Описание изделия и спецификация на продукт, включая модификации продукта**Назначение, описание изделия**


Нить используется в косметической хирургии для альтернативного лифтинга и предназначена для коррекции возрастных изменений, исправления контуров и рельефа лица и тела, уменьшенияптоза мягких тканей, профилактики преждевременного старения.

Предусмотренное применение

Нити применяются для фиксации подкожных тканей в поднятом положении в пластической, реконструктивной хирургии и косметологии. Они способствуют усилению микроциркуляции и улучшению кровоснабжения тканей в зоне их введения за счет неoангиогенеза (образования новых сосудов из уже существующих) как ответной реакции организма на введение инородного тела и асептического воспаления.

Волокна нитей постепенно растворяются, запуская процессы регенерации в коже, а именно – продукцию нового коллагена и соединительной ткани. Заново синтезируемый коллаген является фиброзным коллагеном, синтезирующимся фибробластами при стимулировании асептическим воспалительным процессом. Когда абсорбция нитей завершается, эффект стимуляции также прекращается, при этом соединительная ткань уплотняется, а образующийся каркас обеспечивает эстетический эффект лифтинга.

Изделие состоит из нити из полидиоксанона/полимолочной кислоты; фиксатора нити; иглы или канюли с держателем; защитного колпачка.

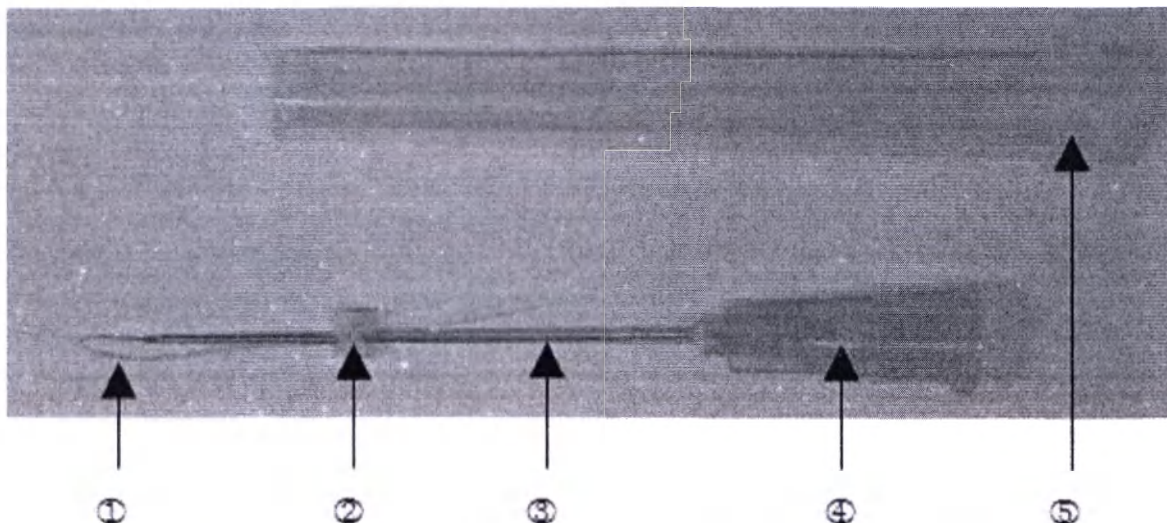

1. нить из полидиоксанона/полимолочной кислоты – вводится в кожу;
2. фиксатор нити – фиксирует нить к игле/канюле;
3. игла/канюля – вводит нить в кожу;
4. держатель иглы/канюли – используется для удобства введения иглы/канюли, а также при необходимости введения лекарства;
5. защитный колпачок – защищает от повреждений нить и наконечник иглы/канюли.

Нити вводятся с помощью игл или канюль. Канюли обеспечивают минимальные повреждения тканей и кровеносных сосудов, вследствие чего снижается количество гематом и отеков, уменьшаются болезненные ощущения.

Нить линейная - используется для увеличения упругости кожи за счет стимуляции выработки коллагена вокруг нитей. Это «профилактический» тип нитей, замедляющий старение кожи.

Основные показания для использования:

- увеличение упругости кожи,
- коррекция небольших морщин вокруг губ,
- придание губам другой формы,
- укрепление медиальной части шеи.

Нить косичка - используются для придания объема щекам или скулам, а также для поднятия обвисшей кожи.

Основные показания для использования:

- коррекция двойного подбородка,
- поднятие бровей,
- коррекция линейных морщин,
- коррекция носогубных складок,
- коррекция овала лица.

Нить спираль и двойная спираль - используется для интенсивного формирования коллагена в участках обвисшей кожи и локализации морщин.

Основные показания для использования:

- коррекции морщин области лба и межбровья,
- коррекция «гусиных лапок»,
- укрепления тканей в подглазничной области.

Нить шипованная – используется для подтяжки кожи.

Основные показания для использования:

- необходимость натяжения кожи,
- подтяжка средней и нижней трети лица,
- подтяжка боковых линий шеи,
- контурная пластика тела и лица,
- подтяжка кожи в различных частях тела (в этом случае шипованные нити используются в сочетании с линейным типом нитей).

Humu Multi Fill и Cavern Fill - используются для более интенсивного формирования коллагена, чем простые линейные нити.

Multi Fill:

- корректировка лба и щек;
- коррекция морщин под глазами;
- коррекция морщин на шее;
- коррекция «двойного» подбородка.

Cavern Fill:

- коррекция носогубных складок;
- коррекция линии «марионетки»;
- коррекция «мешков» под глазами

Количество нитей, необходимое для коррекции различных областей лица и шеи

- Устранение морщин в области шеи – 10 ~ 30 нитей;

- Подтяжка лица:

- скуловая область (одна сторона лица) - 4 ~ 10 нитей;
- область лба – 4 нити;
- область подбородка (одна сторона лица) – 2 ~ 4 нити;
- область переносицы - 10 ~ 24 нити.

- Заполнение морщин и придание объема:

- скуловая область (одна сторона лица) - 10 ~ 30 нитей;
- носогубные складки (одна сторона лица) – 2 ~ 4 нити;
- область подбородка (одна сторона лица) – 8 ~ 15 нити;
- область глаз (одна сторона лица) - 6 ~ 10 нитей.

Количество нитей, необходимое для корректировки различных областей лица и тела у каждого пациента индивидуально в диапазоне количеств, указанных выше.

При обследовании врач решает, сколько нитей потребуется для достижения запланированного эффекта.

Показания к применению

- Возрастные изменения кожи.

Потенциальные пользователи: пациенты с возрастными изменениями кожи, которым показано введение нитей с целью коррекции изменений.

Противопоказания

- тяжелые соматические заболевания;
- заболевания крови;
- аутоимунные заболевания;
- психические нарушения;
- злокачественные новообразования;
- склонность к образованию келлоидных и гипертрофических рубцов;
- беременность и лактация;
- воспалительный процесс в области проведения процедуры;
- возраст до 18 лет;
- наличие у пациента небиodeградируемых имплантов в зоне проведения процедуры;
- лихорадочное состояние;
- совмещение с анти тромботической терапией.

Меры предосторожности

Не проводить манипуляции в зоне родимых пятен и родинок.

Предупреждения

- не использовать изделия с истекшим сроком годности;
- не использовать повторно;
- не подвергать повторной стерилизации;
- не использовать при поврежденной первичной упаковке;
- хранить в недоступном для детей месте;
- не использовать в случае, если в области манипуляций есть зона воспаления
- перед операцией, примерно за неделю, прекратить прием антикоагулянтов (таких как аспирин, варфарин, средств усиления кровообращения и тромболитиков).
- не курить и не употреблять алкогольные напитки до и после операции.
- непредвиденные заболевания, такие как простуда или лихорадка, могут создавать проблемы при анестезии; поэтому необходимо проконсультироваться с врачом.

Побочные эффекты:

1. Раздражение, зуд, эритема;
2. Аллергическая реакция;
3. Атопический дерматит;
4. Кожные высыпания;

5. Гематома в месте введения;
6. Втянутость кожи в месте введения;
7. Выход конца нити в месте введения;
8. Контурирование и просвечивание нити.

Удаление нитей

Удаление нитей производят в следующих случаях:

- введенная нить становится причиной развития инфекционного процесса;
- деформация участка кожи;
- в случае, если нить мешает выполнению пластической операции.

В некоторых случаях (например при заметном просвечивании нитей) требуется извлечение и повторное введение нити, отличной от предыдущей по составу, качеству и толщине либо исключение её введение на данном участке кожи.

Нити возможно обнаружить при исследовании с помощью УЗИ/МРТ до их рассасывания.

Основные правила использования

Все манипуляции с нитями должны проводиться в специализированных клиниках специально обученным персоналом.

Инструкция по применению

Перед началом применения

- Перед введением нитей необходимо убедиться в стабильном состоянии пациента.
- Подготовить все необходимое для обработки кожи антисептиком.
- Подготовить стерильную нить.
- Проверить модель нити.
- Проверить срок годности нити.
- Проверить, не повреждена ли упаковка.

Порядок выполнения манипуляций

- Пациентку укладывают на кушетку;
- Кожу обрабатывают специальным антисептическим средством;
- Если покровы чувствительные, можно применить местную анестезию в виде геля или крема;
- Делают разметку, обозначая область введения нитей;
- Нити по одной извлекают из упаковки, вводятся в подкожно-жировую прослойку. При этом пациентка не должна чувствовать боль, если она есть, значит, механизм выполнения неправильный;
- После того, как нить установлена, ее отсоединяют и вытягивают иглу;
- Кожу вновь обрабатывают антисептиком. Если есть кровоточащие ранки, можно применить перекись водорода.

Технические характеристики нити

Нити из Полидиоксанона

Нити из Полидиоксанона являются рассасывающимися нитями, срок рассасывания 6 – 8 месяцев.

Каталожный номер нити	Тип нити	Диаметр нити, мм	Длина нити, мм ±10%	Цвет нити	Размер иглы или канюли, G x мм	Разрывная нагрузка нити, Н	Усилие отсоединения нити от иглы/канюли, Н
YRN25-01-G	Линейная	0,200-0,249	60	фиолетовый	Игла 25G	Не менее 9,5	--
YRN25-02-G	Линейная	0,200-0,249	80	фиолетовый	Игла 25G	Не менее 9,5	--
YRN25-03-G	Линейная	0,200-0,249	100	фиолетовый	Игла 25G	Не менее 9,5	--
YRN25-05-G	Линейная	0,200-0,249	160	фиолетовый	Игла 25G	Не менее 9,5	--
YRN26-01-G	Линейная	0,150-0,199	60	фиолетовый	Игла 26G	Не менее 6,8	--
YRN26-02-G	Линейная	0,150-0,199	80	фиолетовый	Игла 26G	Не менее 6,8	--
YRN26-03-G	Линейная	0,150-0,199	100	фиолетовый	Игла 26G	Не менее 6,8	--
YRN26-05-G	Линейная	0,150-0,199	160	фиолетовый	Игла 26G	Не менее 6,8	--
YRN27-01-G	Линейная	0,150-0,199	60	фиолетовый	Игла 27G	Не менее 6,8	--
YRN27-02-G	Линейная	0,150-0,199	80	фиолетовый	Игла 27G	Не менее 6,8	--
YRN27-03-G	Линейная	0,150-0,199	100	фиолетовый	Игла 27G	Не менее 6,8	--
YRN27-05-G	Линейная	0,150-0,199	160	фиолетовый	Игла 27G	Не менее 6,8	--
YRN29-01-G	Линейная	0,095-0,149	30	фиолетовый	Игла 29G	Не менее 2,5	--
YRN29-02-G	Линейная	0,095-0,149	60	фиолетовый	Игла 29G	Не менее 2,5	--
YRN29-03-G	Линейная	0,095-0,149	80	фиолетовый	Игла 29G	Не менее 2,5	--
YRN29-04-G	Линейная	0,095-0,149	100	фиолетовый	Игла 29G	Не менее 2,5	--
YRN30-01-G	Линейная	0,095-0,149	30	фиолетовый	Игла 30G	Не менее 2,5	--

YRN30-02-G	Линейная	0,095-0,149	60	фиолетовый	Игла 30G	Не менее 2,5	--
YRT25-01-G	Нить косичка	0,095-0,149 (расплетенная нить) 0,190 – 300 (сплетенная нить)-	60	фиолетовый	Игла 25G	Не менее 2,5	--
YRT25-02-G	Нить косичка	0,095-0,149 (расплетенная нить) 0,190 – 300 (сплетенная нить)	80	фиолетовый	Игла 25G	Не менее 2,5	--
YRT25-03-G	Нить косичка	0,095-0,149 (расплетенная нить) 0,190 – 300 (сплетенная нить)	100	фиолетовый	Игла 25G	Не менее 2,5	--
YRT25-05-G	Нить косичка	0,095-0,149 (расплетенная нить) 0,190 – 300 (сплетенная нить)	160	фиолетовый	Игла 25G	Не менее 2,5	--
YRT26-01-G	Нить косичка	0,050-0,094 (расплетенная нить) 0,150 – 260 (сплетенная нить)	60	фиолетовый	Игла 26G	Не менее 2,5	--
YRT26-02-G	Нить косичка	0,050-0,094 (расплетенная нить) 0,150 – 260 (сплетенная нить)	80	фиолетовый	Игла 26G	Не менее 2,5	--
YRT26-03-G	Нить косичка	0,050-0,094 (расплетенная нить) 0,150 – 260	100	фиолетовый	Игла 26G	Не менее 2,5	--

		(сплетенная нить)					
YRT26-05-G	Нить косичка	0,050-0,094 (расплетенная нить) 0,150 – 260 (сплетенная нить)	160	фиолетовый	Игла 26G	Не менее 2,5	--
YRS25-03-G	Нить спираль	0,200-0,249	100	фиолетовый	Игла 25G	Не менее 2,5	--
YRS26-01-G	Нить спираль	0,150-0,199	60	фиолетовый	Игла 26G	Не менее 6,8	--
YRS26-02-G	Нить спираль	0,150-0,199	80	фиолетовый	Игла 26G	Не менее 6,8	--
YRS26-03-G	Нить спираль	0,150-0,199	100	фиолетовый	Игла 26G	Не менее 6,8	--
YRS27-01-G	Нить спираль	0,150-0,199	60	фиолетовый	Игла 27G	Не менее 6,8	--
YRS27-02-G	Нить спираль	0,150-0,199	80	фиолетовый	Игла 27G	Не менее 6,8	--
YRS27-03-G	Нить спираль	0,150-0,199	100	фиолетовый	Игла 27G	Не менее 6,8	--
YRS27-05-G	Нить спираль	0,150-0,199	160	фиолетовый	Игла 27G	Не менее 6,8	--
YRS29-01-G	Нить спираль	0,095-0,149	30	фиолетовый	Игла 29G	Не менее 2,5	--
YRS29-02-G	Нить спираль	0,095-0,149	60	фиолетовый	Игла 29G	Не менее 2,5	--
YRS29-03-G	Нить спираль	0,095-0,149	80	фиолетовый	Игла 29G	Не менее 2,5	--
YRS29-04-G	Нить спираль	0,095-0,149	100	фиолетовый	Игла 29G	Не менее 2,5	--
YRS30-01-G	Нить спираль	0,095-0,149	30	фиолетовый	Игла 30G	Не менее 2,5	--
YRS30-02-G	Нить спираль	0,095-0,149	60	фиолетовый	Игла 30G	Не менее 2,5	--
YRDS25-01-G	Нить двойная спираль	0,095-0,149	60	фиолетовый	Игла 25G	Не менее 2,5	--
YRDS25-02-G	Нить двойная спираль	0,095-0,149	80	фиолетовый	Игла 25G	Не менее 2,5	--
YRDS25-03-G	Нить двойная спираль	0,095-0,149	100	фиолетовый	Игла 25G	Не менее 2,5	--
YRDS26-01-G	Нить двойная спираль	0,050-0,094	60	фиолетовый	Игла 26G	Не менее 1,4	--

YRDS26-02-G	Нить двойная спираль	0,050-0,094	80	фиолетовый	Игла 26G	Не менее 1,4	--
YRDS26-03-G	Нить двойная спираль	0,050-0,094	100	фиолетовый	Игла 26G	Не менее 1,4	--
YRDS26-05-G	Нить двойная спираль	0,050-0,094	160	фиолетовый	Игла 26G	Не менее 1,4	--
YRPN27-06-G	Шипованная (модель BSP)	0,150-0,199	70	фиолетовый	Игла 27G	Не менее 2,5	--
YRPN27-08-G	Шипованная (модель BSP)	0,150-0,199	100	фиолетовый	Игла 27G	Не менее 2,5	--
YRPN27-10-G	Шипованная (модель BSP)	0,150-0,199	150	фиолетовый	Игла 27G	Не менее 2,5	--
YRPN25-111	Шипованная (модель DSP)	0,150-0,199	140	фиолетовый	Игла 25G	Не менее 2,5	--
YRPN25-113	Шипованная (модель DSP)	0,150-0,199	185	фиолетовый	Игла 25G	Не менее 2,5	--
YRPN23-63-G	Шипованная (модель FB)	0,250-0,339	100	фиолетовый	Игла 23G	Не менее 6,8	--
YRPN23-64-G	Шипованная (модель FB)	0,250-0,339	120	фиолетовый	Игла 23G	Не менее 6,8	--
YRPN23-65-G	Шипованная (модель FB)	0,250-0,339	160	фиолетовый	Игла 23G	Не менее 6,8	--
YRPN19-94-G	Шипованная (модель FE)	0,300-0,399	140	фиолетовый	Игла 19G	Не менее 9,5	--
YRPN19-95-G	Шипованная (модель FE)	0,300-0,399	160	фиолетовый	Игла 19G	Не менее 9,5	--
YRPN19-96-G	Шипованная (модель FE)	0,300-0,399	150	фиолетовый	Игла 19G	Не менее 9,5	--
YRPN21-78-G	Шипованная (модель FE)	0,340-0,399	100	фиолетовый	Игла 21G	Не менее 9,5	--
YRPN21-79-G	Шипованная (модель FE)	0,340-0,399	140	фиолетовый	Игла 21G	Не менее 9,5	--
YRPN21-80-G	Шипованная (модель FE)	0,340-0,399	160	фиолетовый	Игла 21G	Не менее 9,5	--
YRPN23-78-G	Шипованная (модель FE)	0,250-0,339	100	фиолетовый	Игла 23G	Не менее 6,8	--
YRPN23-79-G	Шипованная (модель FE)	0,250-0,339	140	фиолетовый	Игла 23G	Не менее 6,8	--
YRPN23-80-G	Шипованная (модель FE)	0,250-0,339	160	фиолетовый	Игла 23G	Не менее 6,8	--
YRPN18-124-G	Шипованная (модель SC)	0,300-0,399	162	фиолетовый	Игла 18G	Не менее 9,5	--
YRPN18-125-G	Шипованная (модель SC)	0,300-0,399	410	фиолетовый	Игла 18G	Не менее 9,5	--

YRPN18-126-G	Шипованная (модель SC)	0,300-0,399	185	фиолетовый	Игла 18G	Не менее 9,5	--
YRPN19-124-G	Шипованная (модель SC)	0,340-0,399	111	фиолетовый	Игла 19G	Не менее 9,5	--
YRPN19-125-G	Шипованная (модель SC)	0,340-0,399	162	фиолетовый	Игла 19G	Не менее 9,5	--
YRPN19-126-G	Шипованная (модель SC)	0,340-0,399	185	фиолетовый	Игла 19G	Не менее 9,5	--
YRN30-01-W	Линейная	0,095-0,149	30	фиолетовый	Канюля 30G	Не менее 2,5	--
YRN30-02-W	Линейная	0,095-0,149	60	фиолетовый	Канюля 30G	Не менее 2,5	--
YRPN19-94-WG	Шипованная (модель FE)	0,300-0,399	140	фиолетовый	Канюля 19G	Не менее 9,5	--
YRPN19-95-WG	Шипованная (модель FE)	0,300-0,399	160	фиолетовый	Канюля 19G	Не менее 9,5	--
YRPN19-96-WG	Шипованная (модель FE)	0,300-0,399	150	фиолетовый	Канюля 19G	Не менее 9,5	--
YRPN21-78-WG	Шипованная (модель FE)	0,340-0,399	100	фиолетовый	Канюля 21G	Не менее 9,5	--
YRPN21-79-WG	Шипованная (модель FE)	0,340-0,399	140	фиолетовый	Канюля 21G	Не менее 9,5	--
YRPN21-80-WG	Шипованная (модель FE)	0,340-0,399	160	фиолетовый	Канюля 21G	Не менее 9,5	--
YRPN23-78-WG	Шипованная (модель FE)	0,250-0,339	100	фиолетовый	Канюля 23G	Не менее 6,8	--
YRPN23-79-WG	Шипованная (модель FE)	0,250-0,339	140	фиолетовый	Канюля 23G	Не менее 6,8	--
YRPN23-80-WG	Шипованная (модель FE)	0,250-0,339	160	фиолетовый	Канюля 23G	Не менее 6,8	--
YRPN21-58-L	Шипованная (модель FA)	0,300-0,399	80	фиолетовый	Канюля 21G	Не менее 9,5	--
YRPN19-94-LG	Шипованная (модель FE)	0,300-0,399	140	фиолетовый	Канюля 19G	Не менее 9,5	--
YRPN19-95- LG	Шипованная (модель FE)	0,300-0,399	160	фиолетовый	Канюля 19G	Не менее 9,5	--
YRPN19-96- LG	Шипованная (модель FE)	0,300-0,399	150	фиолетовый	Канюля 19G	Не менее 9,5	--
YRPN21-78- LG	Шипованная (модель FE)	0,340-0,399	100	фиолетовый	Канюля 21G	Не менее 9,5	--
YRPN21-79- LG	Шипованная (модель FE)	0,340-0,399	140	фиолетовый	Канюля 21G	Не менее 9,5	--

YRPN21-80- LG	Шипованная (модель FE)	0,340-0,399	160	фиолетовый	Канюля 21G	Не менее 9,5	--
YRPN23-78- LG	Шипованная (модель FE)	0,250-0,339	100	фиолетовый	Канюля 23G	Не менее 6,8	--
YRPN23-79- LG	Шипованная (модель FE)	0,250-0,339	140	фиолетовый	Канюля 23G	Не менее 6,8	--
YRPN23-80- LG	Шипованная (модель FE)	0,250-0,339	160	фиолетовый	Канюля 23G	Не менее 6,8	--
YRPN19-103-L	Шипованная (модель FG)	0,571-0,610	50	фиолетовый	Канюля 19G	Не менее 17,5	--
YRPN19-104-L	Шипованная (модель FG)	0,571-0,610	50	фиолетовый	Канюля 19G	Не менее 17,5	--
YRPN18-124-LG	Шипованная (модель SC)	0,300-0,399	162	фиолетовый	Канюля 18G	Не менее 9,5	--
YRPN18-125-LG	Шипованная (модель SC)	0,300-0,399	410	фиолетовый	Канюля 18G	Не менее 9,5	--
YRPN18-126-LG	Шипованная (модель SC)	0,300-0,399	185	фиолетовый	Канюля 18G	Не менее 9,5	--
YRPN19-124-LG	Шипованная (модель SC)	0,340-0,399	111	фиолетовый	Канюля 19G	Не менее 9,5	--
YRPN19-125-LG	Шипованная (модель SC)	0,340-0,399	162	фиолетовый	Канюля 19G	Не менее 9,5	--
YRPN19-126-LG	Шипованная (модель SC)	0,340-0,399	185	фиолетовый	Канюля 19G	Не менее 9,5	--
YRPN18-120-LG	Шипованная (модель ST)	0,571-0,610	183	фиолетовый	Канюля 18G	Не менее 17,5	--
YRMF23-01-LG	модель Multi Fill (линейная)	0,150-0,199	50 - 150	фиолетовый	Канюля 23G	Не менее 6,8	--
YRMF23-03-LG	модель Multi Fill (линейная)	0,150-0,199	50 - 150	фиолетовый	Канюля 23G	Не менее 6,8	--
YRCF21-05ET-LG	модель Cavern Fill (линейная)	0,150-0,199	60	фиолетовый	Канюля 21G	Не менее 6,8	--
YRCF21-05FT-LG	модель Cavern Fill (линейная)	0,150-0,199	70	фиолетовый	Канюля 21G	Не менее 6,8	--
YRCF23-03A-LG	модель Cavern Fill (линейная)	0,150-0,199	25	фиолетовый	Канюля 23G	Не менее 6,8	--
YRCF23-03B-LG	модель Cavern Fill (линейная)	0,150-0,199	30	фиолетовый	Канюля 23G	Не менее 6,8	--
YRDN-FE-CI-02	шипованная на двух иглах носителях (модель FE)	0,400-0,499	300 - 700	фиолетовый	Игла 1,00	Не менее 17,5	18,0
YRDN-FE-AN-06	шипованная на двух иглах носителях (модель FE)	0,400-0,499	400 - 440	фиолетовый	Игла 1,00	Не менее 17,5	18,0

YRDN-SC-CI-02	шипованная на двух иглах носителях (модель SC)	0,571-0,610	300 - 460	фиолетовый	Игла 1,00	Не менее 21,0	25,0
YRDN-SC-AN-04	шипованная на двух иглах носителях (модель SC)	0,571-0,610	400 - 440	фиолетовый	Игла 1,00	Не менее 21,0	25,0

Нити из полимолочной кислоты

Нити из полимолочной кислоты являются рассасывающимися нитями, срок рассасывания 7– 9 месяцев.

Каталожный номер нити	Тип нити	Диаметр нити, мм	Длина нити, мм ±10%	Цвет нити	Размер иглы или канюли, G x мм	Разрывная нагрузка нити, Н
YRN-PL25-01-G	Линейная	0,200-0,249	60	белый	Игла 25G	Не менее 9,5
YRN-PL25-02-G	Линейная	0,200-0,249	80	белый	Игла 25G	Не менее 9,5
YRN-PL25-03-G	Линейная	0,200-0,249	100	белый	Игла 25G	Не менее 9,5
YRN-PL25-05-G	Линейная	0,200-0,249	160	белый	Игла 25G	Не менее 9,5
YRN-PL26-01-G	Линейная	0,150-0,199	60	белый	Игла 26G	Не менее 6,8
YRN-PL26-02-G	Линейная	0,150-0,199	80	белый	Игла 26G	Не менее 6,8
YRN-PL26-03-G	Линейная	0,150-0,199	100	белый	Игла 26G	Не менее 6,8
YRN-PL26-05-G	Линейная	0,150-0,199	160	белый	Игла 26G	Не менее 6,8
YRN-PL27-01-G	Линейная	0,150-0,199	60	белый	Игла 27G	Не менее 6,8
YRN-PL27-02-G	Линейная	0,150-0,199	80	белый	Игла 27G	Не менее 6,8
YRN-PL27-03-G	Линейная	0,150-0,199	100	белый	Игла 27G	Не менее 6,8
YRN-PL27-05-G	Линейная	0,150-0,199	160	белый	Игла 27G	Не менее 6,8
YRN-PL29-01-G	Линейная	0,095-0,149	30	белый	Игла 29G	Не менее 2,5
YRN-PL29-02-G	Линейная	0,095-0,149	60	белый	Игла 29G	Не менее 2,5
YRN-PL29-03-G	Линейная	0,095-0,149	80	белый	Игла 29G	Не менее 2,5
YRN-PL29-04-G	Линейная	0,095-0,149	100	белый	Игла 29G	Не менее 2,5
YRN-PL30-01-G	Линейная	0,095-0,149	30	белый	Игла 30G	Не менее 2,5
YRN-PL30-02-G	Линейная	0,095-0,149	60	белый	Игла 30G	Не менее 2,5
YRT-PL25-01-G	Нить косичка	0,095-0,149 (расплетенная)	60	белый	Игла 25G	Не менее 2,5

		нить) 0,190 – 300 (сплетенная нить)				
YRT-PL25-02-G	Нить косичка	0,095-0,149 (расплетенная нить) 0,190 – 300 (сплетенная нить)	80	белый	Игла 25G	Не менее 2,5
YRT-PL25-03-G	Нить косичка	0,095-0,149 (расплетенная нить) 0,190 – 300 (сплетенная нить)	100	белый	Игла 25G	Не менее 2,5
YRT-PL25-05-G	Нить косичка	0,095-0,149 (расплетенная нить) 0,190 – 300 (сплетенная нить)	160	белый	Игла 25G	Не менее 2,5
YRT-PL26-01-G	Нить косичка	0,095-0,149 (расплетенная нить) 0,190 – 300 (сплетенная нить)	60	белый	Игла 26G	Не менее 2,5
YRT-PL26-02-G	Нить косичка	0,095-0,149 (расплетенная нить) 0,190 – 300 (сплетенная нить)	80	белый	Игла 26G	Не менее 2,5
YRT-PL26-03-G	Нить косичка	0,095-0,149 (расплетенная нить) 0,190 – 300	100	белый	Игла 26G	Не менее 2,5

		(сплетенная нить)				
YRT-PL26-05-G	Нить косичка	0,095-0,149 (расплетенная нить) 0,190 – 300 (сплетенная нить)	160	белый	Игла 26G	Не менее 2,5
YRS-PL25-03-G	Нить спираль	0,200-0,249	100	белый	Игла 25G	Не менее 9,5
YRS-PL26-01-G	Нить спираль	0,150-0,199	60	белый	Игла 26G	Не менее 6,8
YRS-PL26-02-G	Нить спираль	0,150-0,199	80	белый	Игла 26G	Не менее 6,8
YRS-PL26-03-G	Нить спираль	0,150-0,199	100	белый	Игла 26G	Не менее 6,8
YRS-PL27-01-G	Нить спираль	0,150-0,199	60	белый	Игла 27G	Не менее 6,8
YRS-PL27-02-G	Нить спираль	0,150-0,199	80	белый	Игла 27G	Не менее 6,8
YRS-PL27-03-G	Нить спираль	0,150-0,199	100	белый	Игла 27G	Не менее 6,8
YRS-PL27-05-G	Нить спираль	0,150-0,199	160	белый	Игла 27G	Не менее 6,8
YRS-PL29-01-G	Нить спираль	0,095-0,149	30	белый	Игла 29G	Не менее 2,5
YRS-PL29-02-G	Нить спираль	0,095-0,149	60	белый	Игла 29G	Не менее 2,5
YRS-PL29-03-G	Нить спираль	0,095-0,149	80	белый	Игла 29G	Не менее 2,5
YRS-PL29-04-G	Нить спираль	0,095-0,149	100	белый	Игла 29G	Не менее 2,5
YRS-PL30-01-G	Нить спираль	0,095-0,149	30	белый	Игла 30G	Не менее 2,5
YRS-PL30-02-G	Нить спираль	0,095-0,149	60	белый	Игла 30G	Не менее 2,5
YRDS-PL25-01-G	Нить двойная спираль	0,095-0,149	60	белый	Игла 25G	Не менее 2,5
YRDS-PL25-02-G	Нить двойная спираль	0,095-0,149	80	белый	Игла 25G	Не менее 2,5
YRDS-PL25-03-G	Нить двойная спираль	0,095-0,149	100	белый	Игла 25G	Не менее 2,5
YRDS-PL26-01-G	Нить двойная спираль	0,095-0,149	60	белый	Игла 26G	Не менее 2,5
YRDS-PL26-02-G	Нить двойная спираль	0,095-0,149	80	белый	Игла 26G	Не менее 2,5
YRDS-PL26-03-G	Нить двойная спираль	0,095-0,149	100	белый	Игла 26G	Не менее 2,5
YRDS-PL26-05-G	Нить двойная спираль	0,095-0,149	160	белый	Игла 26G	Не менее 2,5
YRPN-PL19-94-G	Шипованная (модель FE)	0,300-0,399	140	белый	Игла 19G	Не менее 9,5
YRPN-PL19-95-G	Шипованная (модель FE)	0,300-0,399	160	белый	Игла 19G	Не менее 9,5
YRPN-PL21-79-G	Шипованная (модель FE)	0,340-0,399	120	белый	Игла 21G	Не менее 9,5

	FE)					
YRPN-PL21-80-G	Шипованная (модель FE)	0,340-0,399	160	белый	Игла 21G	Не менее 9,5
YRPN-PL23-79-G	Шипованная (модель FE)	0,250-0,339	120	белый	Игла 23G	Не менее 6,8
YRPN-PL23-80-G	Шипованная (модель FE)	0,250-0,339	160	белый	Игла 23G	Не менее 6,8
YRPN-PL19-94-WG	Шипованная (модель FE)	0,300-0,399	120	белый	Канюля 19G	Не менее 9,5
YRPN-PL19-95-WG	Шипованная (модель FE)	0,300-0,399	160	белый	Канюля 19G	Не менее 9,5
YRPN-PL21-79-WG	Шипованная (модель FE)	0,340-0,399	120	белый	Канюля 21G	Не менее 9,5
YRPN-PL21-80-WG	Шипованная (модель FE)	0,340-0,399	160	белый	Канюля 21G	Не менее 9,5
YRPN-PL23-79-WG	Шипованная (модель FE)	0,250-0,339	120	белый	Канюля 23G	Не менее 6,8
YRPN-PL23-80-WG	Шипованная (модель FE)	0,250-0,339	160	белый	Канюля 23G	Не менее 6,8
YRPN-PL19-94-LG	Шипованная (модель FE)	0,300-0,399	120	белый	Канюля 19G	Не менее 9,5
YRPN-PL19-95-LG	Шипованная (модель FE)	0,300-0,399	160	белый	Канюля 19G	Не менее 9,5
YRPN-PL21-79-LG	Шипованная (модель FE)	0,340-0,399	120	белый	Канюля 21G	Не менее 9,5
YRPN-PL21-80-LG	Шипованная (модель FE)	0,340-0,399	160	белый	Канюля 21G	Не менее 9,5
YRPN-PL23-79-LG	Шипованная (модель FE)	0,250-0,339	120	белый	Канюля 23G	Не менее 6,8
YRPN-PL23-80-LG	Шипованная (модель FE)	0,250-0,339	160	белый	Канюля 23G	Не менее 6,8

Нити поставляются на игле или канюле для введения.

Иглы и канюли изготовлены из коррозионно-стойкого материала. Внешняя поверхность изделий должна быть гладкой и не иметь дефектов, таких как трещины, раковины, царапины, выкрошенные места, заусенцы, расслоения, окалины.

Технические характеристики иглы/канюли

Метрический размер иглы/канюли, G	Наружный диаметр иглы/канюли, мм	Длина трубки иглы/канюли, мм	Цветовая кодировка	Радиус притупления рабочей части иглы, мм	Шероховатость иглы/канюли, мкм	Твердость по Роквеллу для иглы/канюли, HRC,	Прочность соединения головки и трубки иглы/канюли, Н
Игла 18G	1,200 -1,290	80 +1,5/-2,5	розовый	не более 0,03	Не более 0,32	47,4 до 55,3	Не менее 69
Игла 18G	1,200 -1,290	90 +1,5/-2,5	розовый	не более 0,03	Не более 0,32	47,4 до 55,3	Не менее 69
Игла 18G	1,200 -1,290	80 +1,5/-2,5	розовый	не более 0,03	Не более 0,32	47,4 до 55,3	Не менее 69
Канюля 18G	1,200 -1,290	90 +1,5/-2,5	розовый	---	Не более 0,32	47,4 до 55,3	Не менее 69
Канюля 18G	1,200 -1,290	100 +1,5/-2,5	розовый	---	Не более 0,32	47,4 до 55,3	Не менее 69
Игла 19G	1,020 -1,100	70 +1,5/-2,5	кремовый	не более 0,03	Не более 0,32	47,4 до 55,3	Не менее 69
Игла 19G	1,020 -1,100	90 +1,5/-2,5	кремовый	не более 0,03	Не более 0,32	47,4 до 55,3	Не менее 69
Игла 19G	1,020 -1,100	100 +1,5/-2,5	кремовый	не более 0,03	Не более 0,32	47,4 до 55,3	Не менее 69
Канюля 19G	1,020 -1,100	38 +1,5/-2,5	кремовый	---	Не более 0,32	47,4 до 55,3	Не менее 69
Канюля 19G	1,020 -1,100	50 +1,5/-2,5	кремовый	---	Не более 0,32	47,4 до 55,3	Не менее 69
Канюля 19G	1,020 -1,100	60 +1,5/-2,5	кремовый	---	Не более 0,32	47,4 до 55,3	Не менее 69
Канюля 19G	1,020 -1,100	70 +1,5/-2,5	кремовый	---	Не более 0,32	47,4 до 55,3	Не менее 69
Канюля 19G	1,020 -1,100	80 +1,5/-2,5	кремовый	---	Не более 0,32	47,4 до 55,3	Не менее 69
Канюля 19G	1,020 -1,100	90 +1,5/-2,5	кремовый	---	Не более 0,32	47,4 до 55,3	Не менее 69
Канюля 19G	1,020 -1,100	100 +1,5/-2,5	кремовый	---	Не более 0,32	47,4 до 55,3	Не менее 69
Игла 21G	0,800 -0,830	60 +1,5/-2,5	темно-зеленый	не более 0,03	Не более 0,32	47,4 до 55,3	Не менее 44
Игла 21G	0,800 -0,830	70 +1,5/-2,5	темно-зеленый	не более 0,03	Не более 0,32	47,4 до 55,3	Не менее 44
Игла 21G	0,800 -0,830	90 +1,5/-2,5	темно-зеленый	не более 0,03	Не более 0,32	47,4 до 55,3	Не менее 44
Канюля 21G	0,800 -0,830	60 +1,5/-2,5	темно-зеленый	---	Не более 0,32	47,4 до 55,3	Не менее 44
Канюля 21G	0,800 -0,830	70 +1,5/-2,5	темно-зеленый	---	Не более 0,32	47,4 до 55,3	Не менее 44
Канюля 21G	0,800 -0,830	90 +1,5/-2,5	темно-зеленый	---	Не более 0,32	47,4 до 55,3	Не менее 44
Игла 23G	0,600 -0,673	60 +1,5/-2,5	темно-синий	не более 0,03	Не более 0,32	47,4 до 55,3	Не менее 34
Игла 23G	0,600 -0,673	70 +1,5/-2,5	темно-синий	не более 0,03	Не более 0,32	47,4 до 55,3	Не менее 34
Игла 23G	0,600 -0,673	90 +1,5/-2,5	темно-синий	не более 0,03	Не более 0,32	47,4 до 55,3	Не менее 34
Канюля 23G	0,600 -0,673	60 +1,5/-2,5	темно-синий	---	Не более 0,32	47,4 до 55,3	Не менее 34
Канюля 23G	0,600 -0,673	70 +1,5/-2,5	темно-синий	---	Не более 0,32	47,4 до 55,3	Не менее 34
Канюля 23G	0,600 -0,673	90 +1,5/-2,5	темно-синий	---	Не более 0,32	47,4 до 55,3	Не менее 34
Игла 25G	0,500 -0,530	38 +1,5/-2,5	оранжевый	не более 0,03	Не более 0,32	47,4 до 55,3	Не менее 22
Игла 25G	0,500 -0,530	50 +1,5/-2,5	оранжевый	не более 0,03	Не более 0,32	47,4 до 55,3	Не менее 22
Игла 25G	0,500 -0,530	60 +1,5/-2,5	оранжевый	не более 0,03	Не более 0,32	47,4 до 55,3	Не менее 22
Игла 25G	0,500 -0,530	90 +1,5/-2,5	оранжевый	не более 0,03	Не более 0,32	47,4 до 55,3	Не менее 22
Игла 26G	0,440 -0,470	38 +1,5/-2,5	коричневый	не более 0,03	Не более 0,32	47,4 до 55,3	Не менее 22
Игла 26G	0,440 -0,470	50 +1,5/-2,5	коричневый	не более 0,03	Не более 0,32	47,4 до 55,3	Не менее 22
Игла 26G	0,440 -0,470	60 +1,5/-2,5	коричневый	не более 0,03	Не более 0,32	47,4 до 55,3	Не менее 22
Игла 26G	0,440 -0,470	90 +1,5/-2,5	коричневый	не более 0,03	Не более 0,32	47,4 до 55,3	Не менее 22
Игла 27G	0,400 -0,420	38 +1,5/-2,5	светло-серый	не более 0,03	Не более 0,32	47,4 до 55,3	Не менее 22
Игла 27G	0,400 -0,420	50 +1,5/-2,5	светло-серый	не более 0,03	Не более 0,32	47,4 до 55,3	Не менее 22
Игла 27G	0,400 -0,420	60 +1,5/-2,5	светло-серый	не более 0,03	Не более 0,32	47,4 до 55,3	Не менее 22

Игла 27G	0,400 -0,420	90 +1,5/-2,5	светло-серый	не более 0,03	Не более 0,32	47,4 до 55,3	Не менее 22
Игла 29G	0,324 -0,351	25 +1,5/-2,5	лазурный	не более 0,03	Не более 0,32	47,4 до 55,3	Не менее 22
Игла 29G	0,324 -0,351	38 +1,5/-2,5	лазурный	не более 0,03	Не более 0,32	47,4 до 55,3	Не менее 22
Игла 29G	0,324 -0,351	50 +1,5/-2,5	лазурный	не более 0,03	Не более 0,32	47,4 до 55,3	Не менее 22
Игла 29G	0,324 -0,351	60 +1,5/-2,5	лазурный	не более 0,03	Не более 0,32	47,4 до 55,3	Не менее 22
Игла 30G	0,298 -0,320	25 +1,5/-2,5	желтый	не более 0,03	Не более 0,32	47,4 до 55,3	Не менее 22
Игла 30G	0,298 -0,320	38 +1,5/-2,5	желтый	не более 0,03	Не более 0,32	47,4 до 55,3	Не менее 22
Канюля 30G	0,298 -0,320	25 +1,5/-2,5	желтый	---	Не более 0,32	47,4 до 55,3	Не менее 22
Канюля 30G	0,298 -0,320	38 +1,5/-2,5	желтый	---	Не более 0,32	47,4 до 55,3	Не менее 22

Материалы изготовления

Материалы изготовления

Наименование изделия или детали и принадлежности (исследуемые)	Материалы, применяемые при изготовлении	Производитель материала
I. Нити из полидиоксанаона.	Нить – Полидиоксанон; Краситель фиолетовый D&C Violet No.2	Samyang Pharmaceuticals Corp., Корея Voigt Global Distribution Inc., США
1. Нить из полидиоксанаона обычная на полый игле:	Фиксатор нити - Полиэтилен высокой плотности (HDPE) 2200J	Lotte Chemical Corporation, Корея
- линейная: YRN25-01-G; YRN25-02-G; YRN25-03-G; YRN25-05-G; YRN26-01-G; YRN26-02-G; YRN26-03-G; YRN26-05-G; YRN27-01-G; YRN27-02-G; YRN27-03-G; YRN27-05-G; YRN29-01-G; YRN29-02-G; YRN29-03-G; YRN29-04-G; YRN30-01-G; YRN30-02-G.		
- нить спираль: YRS25-03-G; YRS26-01-G; YRS26-02-G; YRS26-03-G; YRS27-01-G; YRS27-02-G; YRS27-03-G; YRS27-05-G; YRS29-01-G; YRS29-02-G; YRS29-03-G; YRS29-04-G; YRS30-01-G; YRS30-02-G.		
- нить двойная спираль: YRDS25-01-G; YRDS25-02-G; YRDS25-03-G; YRDS26-01-G; YRDS26-02-G; YRDS26-03-G; YRDS26-05-G.		


2. Нить из полидиоксанона шипованная на поллой игле: - модель BSP: YRPN27-06-G; YRPN27-08-G; YRPN27-10-G. - модель DSP: YRPN25-111; YRPN25-113. - модель FB: YRPN23-63-G; YRPN23-64-G; YRPN23-65-G - модель FE: YRPN19-94-G; YRPN19-95-G; YRPN19-96-G; YRPN21-78-G; YRPN21-79-G; YRPN21-80-G; YRPN23-78-G; YRPN23-79-G; YRPN23-80-G - модель SC: YRPN18-124-G; YRPN18-125-G; YRPN18-126-G; YRPN19-124-G; YRPN19-125-G; YRPN19-126-G.		
3. Нить из полидиоксанона обычная на W-образной канюле: - линейная: YRN30-01-W; YRN30-02-W.		
4. Нить из полидиоксанона шипованная на W-образной канюле: - модель FE: YRPN19-94-WG; YRPN19-95-WG; YRPN19-96-WG; YRPN21-78-WG; YRPN21-79-WG; YRPN21-80-WG; YRPN23-78-WG; YRPN23-79-WG; YRPN23-80-WG.		
5. Нить из полидиоксанона шипованная на L-образной канюле: - модель FA: YRPN21-58-L.		
- модель FE: YRPN19-94-LG; YRPN19-95- LG; YRPN19-96- LG; YRPN21-78- LG; YRPN21-79- LG; YRPN21-80- LG; YRPN23-78- LG; YRPN23-79- LG; YRPN23-80- LG.		
- модель FG: YRPN19-103-L; YRPN19-104-L.		

- модель SC: YRPN18-124-LG; YRPN18-125-LG; YRPN18-126-LG; YRPN19-124-LG; YRPN19-125-LG; YRPN19-126-LG. - модель ST: YRPN18-120-LG		
6. Нить из полидиоксанона на L-образной канюле: - модель Multi Fill: YRMF23-01-LG; YRMF23-03-LG. - модель Cavern Fill: YRCF21-05ET-LG; YRCF21-05FT-LG; YRCF23-03A-LG; YRCF23-03B-LG.		
7. Нить из полидиоксанона шипованная на двух иглах носителях: - модель FE: YRDN-FE-CI-02; RDN-FE-AN-06. -модель SC: YRDN-SC-CI-02; YRDN-SC-AN-04.		
II. Нить из полимолочной кислоты. 1. Нить из полимолочной кислоты обычная на полую игле: - линейная: YRN-PL25-01-G; YRN-PL25-02-G; YRN-PL25-03-G; YRN-PL25-05-G; YRN-PL26-01-G; YRN-PL26-02-G; YRN-PL26-03-G; YRN-PL26-05-G; YRN-PL27-01-G; YRN-PL27-02-G; YRN-PL27-03-G; YRN-PL27-05-G; YRN-PL29-01-G; YRN-PL29-02-G; YRN-PL29-03-G; YRN-PL29-04-G; YRN-PL30-01-G; YRN-PL30-02-G. - нить косичка: YRT-PL25-01-G; YRT-PL25-02-G; YRT-PL25-03-G; YRT-PL25-05-G; YRT-PL26-01-G; YRT-PL26-02-G; YRT-PL26-03-G; YRT-PL26-05-G. - нить спираль: YRS-PL25-03-G; YRS-PL26-01-G; YRS-PL26-02-G; YRS-PL26-03-G; YRS-PL27-01-G; YRS-PL27-02-G; YRS-PL27-03-G; YRS-PL27-05-G; YRS-PL29-01-G; YRS-PL29-02-G; YRS-PL29-03-G; YRS-PL29-04-G; YRS-PL30-01-G; YRS-PL30-02-G.	Нить – Полимолочная кислота (Моноволокно поли-Л-молочной кислоты); Фиксатор нити - Полиэтилен высокой плотности (HDPE) 2200J	DexLevo Inc., Корея Lotte Chemical Corporation, Корея


- нить двойная спираль: YRDS-PL25-01-G; YRDS-PL25-02-G; YRDS-PL25-03-G; YRDS-PL26-01-G; YRDS-PL26-02-G; YRDS-PL26-03-G; YRDS-PL26-05-G. 2. Нить из полимолочной кислоты шипованная на полый игле: - модель FE: YRPN-PL19-94-G; YRPN-PL19-95-G; YRPN-PL21-79-G; YRPN-PL21-80-G; YRPN-PL23-79-G; YRPN-PL23-80-G. 3. Нить из полимолочной кислоты шипованная на W-образной канюле: - модель FE: YRPN-PL19-94-WG; YRPN-PL19-95-WG; YRPN-PL21-79-WG; YRPN-PL21-80-WG; YRPN-PL23-79-WG; YRPN-PL23-80-WG. 4. Нить из полимолочной кислоты шипованная на L-образной канюле: - модель FE: YRPN-PL19-94-LG; YRPN-PL19-95-LG; YRPN-PL21-79-LG; YRPN-PL21-80-LG; YRPN-PL23-79-LG; YRPN-PL23-80-LG.		
Игла	Тело иглы: Нержавеющая сталь SS 304: - Железо < 100% - Хром 16 ~ 26% - Никель 6 ~ 22% - Молибден 0,0 ~ 3,3% - Марганец 0,0 ~ 2,0% - Ниобий 0,0 ~ 1,0% - Тантал 0,0 ~ 1,0% - Кремний 0,0 ~ 1,5% Луэровский наконечник: - Полипропилен Hiprene H551 Защитный колпачок: - Полипропилен Hiprene H551	Posco, Корея GS Caltex Corporation, Корея GS Caltex Corporation, Корея

Канюля	Тело канюли: Нержавеющая сталь STS 304: - Железо < 100% - Хром 16 ~ 26% - Никель 6 ~ 22% - Молибден 0,0 ~ 3,3% - Марганец 0,0 ~ 2,0% - Ниобий 0,0 ~ 1,0% - Тантал 0,0 ~ 1,0% - Кремний 0,0 ~ 1,5%	Posco, Корея
	Луэровский наконечник: - Полипропилен Hiprene H551	GS Caltex Corporation, Корея
	Защитный колпачок: - Полипропилен Hiprene H551	GS Caltex Corporation, Корея
Блистер (первичная упаковка)	Полиэтилен низкой плотности; бумага	
Блистер (вторичная групповая упаковка)	Алюминиевая фольга	


Нить из полидиоксанона обычная на полый игле
(серии YRN, YRT, YRS, YRDS)

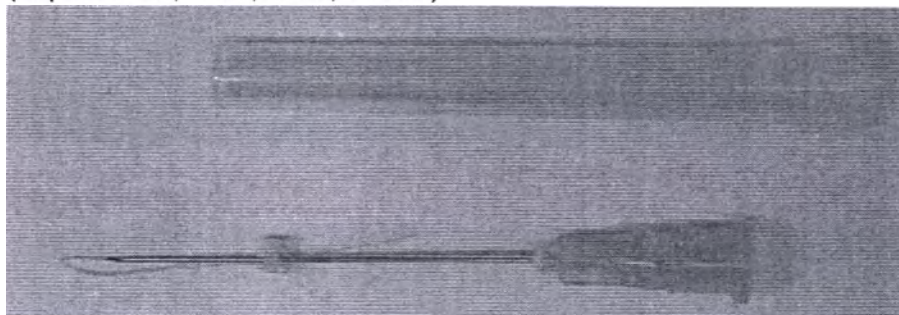

Нить из полидиоксанона шипованная на полый игле
(серия YRPN)

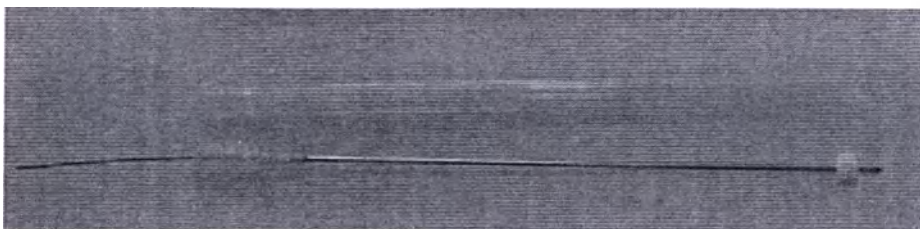


Нить из полидиоксанона на W-образной канюле
(серии YRN, YRPN)

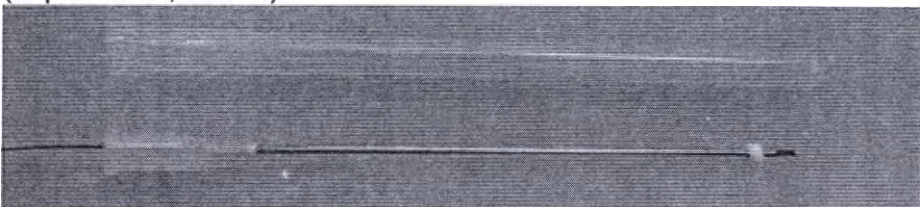

Нить из полидиоксанона на L-образной канюле
(серии YRPN)



Нить линейная

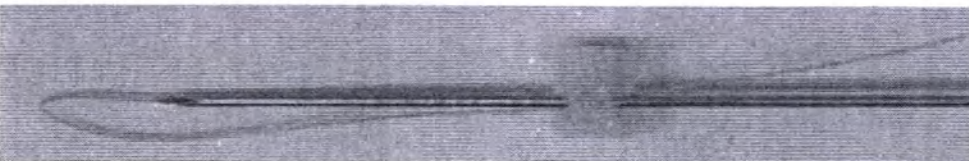


Нить косичка




Нить спираль



Нить двойная спираль

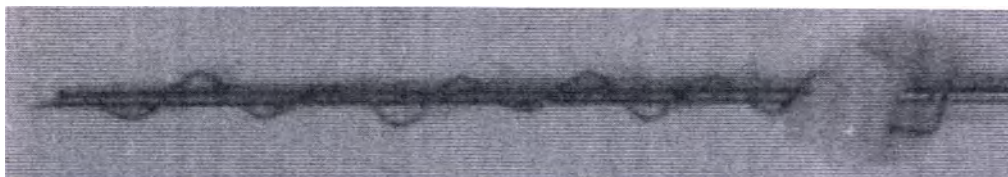


Модель Multi Fill

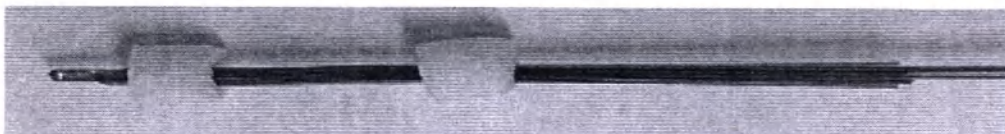


Модель Cavern Fill




Нить из полимолочной кислоты на полый игле (серии YRN-PL, YRT-PL, YRS-PL, YRDS-PL)

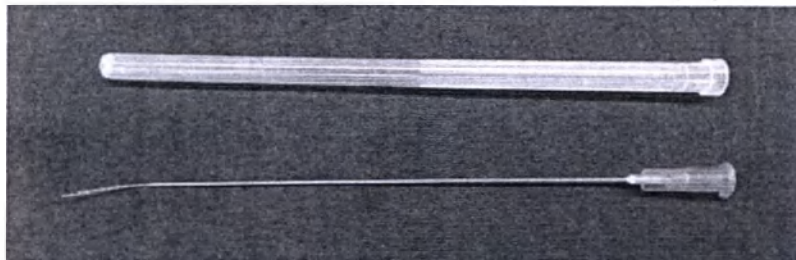


Нить из полимолочной кислоты на L-образной канюле (серии YRPN-PL)

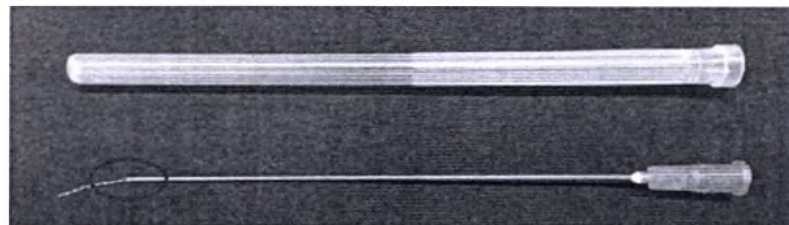


Нить из полимолочной кислоты на W-образной канюле (серии YRPN-PL)

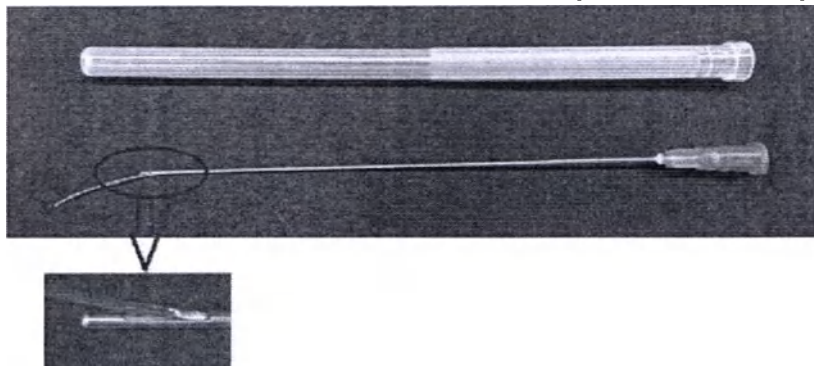


Нить линейная

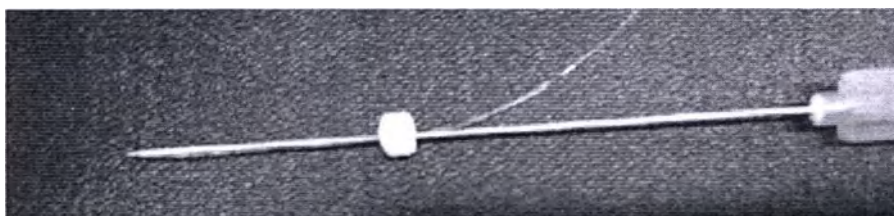


Нить косичка

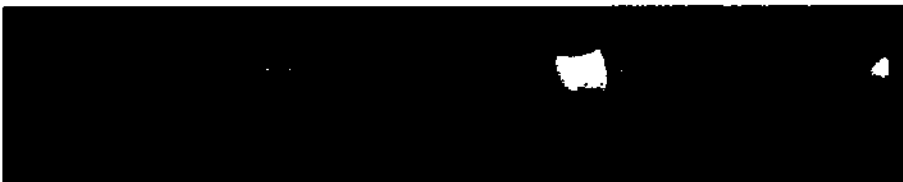

Нить двойная спираль

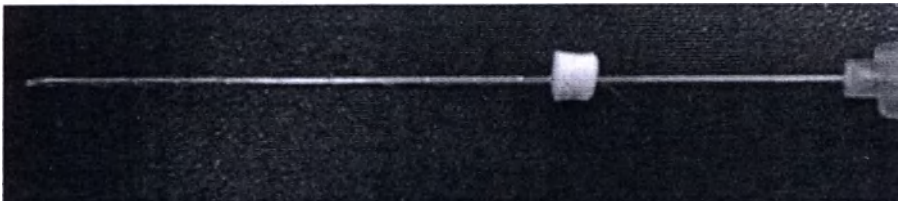

Нить спираль

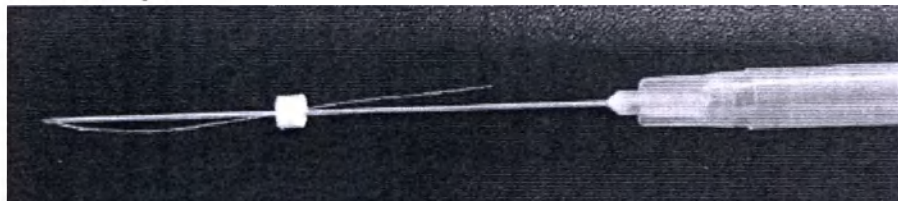


Нить шипованная



Нить шипованная (BSP): тип Односторонний однонаправленный - Насечки (коги) на нити являются односторонними и однонаправленными



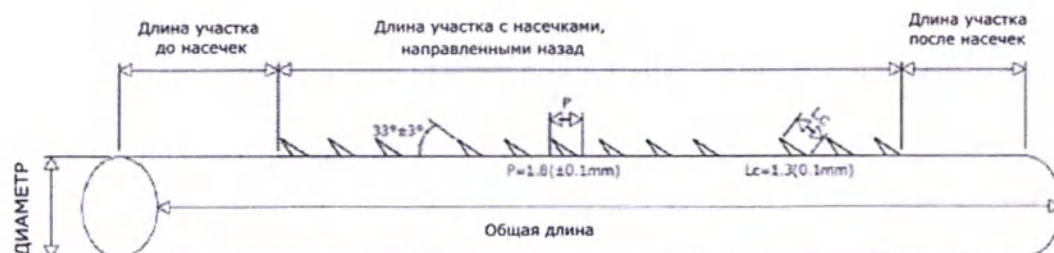

$LC = 1.3 \text{ мм } (\pm 0.1 \text{ мм})$ – длина насечки (кога); $P = 1.8 \text{ мм } (\pm 0.1 \text{ мм})$ – расстояние между насечками (когами)

Наружный диаметр нити до формироваия насечек (ког), мм	Условный внутренний диаметр нити после формирования насечек (ког), мм	Длина участка нити до насечек, мм $\pm 20\%$
0,150-0,199	0,090~0,119	10
		10

Нить шипованная (DSP): тип Односторонний двунаправленный - Насечки (коги) на нити являются односторонними и двунаправленными





LC = 1.3 мм (±0.1 мм) – длина насечки (кога); P = 1.8 мм (±0.1 мм) – расстояние между насечками (когами)

Наружный диаметр нити до формирования насечек (ког), мм	Условный внутренний диаметр нити после формирования насечек (ког), мм	Длина участка нити до насечек, мм ±20%
0,150-0,199	0,090~0,119	10
		10

Нить шипованная (FA): тип Двухсторонний однонаправленный - Насечки (коги) двусторонние, однонаправленные, расположенные с нескольких сторон нити.






LC = 1.3 мм (±0.1 мм) – длина насечки (кога); P = 1.8 мм (±0.1 мм) – расстояние между насечками (когами)

Наружный диаметр нити до формирования насечек (ког), мм	Условный внутренний диаметр нити после формирования насечек (ког), мм	Длина участка нити до насечек, мм ±20%
0,300-0,399	0,180~0,240	10
		10

Нить шипованная (FB): тип Двухсторонний однонаправленный - Насечки (коги) двусторонние, однонаправленные,




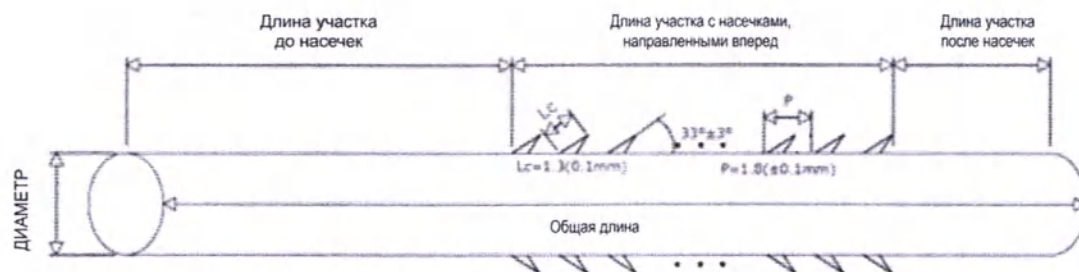

$LC = 1.3 \text{ мм } (\pm 0.1 \text{ мм})$ – длина насечки (кога); $P = 1.8 \text{ мм } (\pm 0.1 \text{ мм})$ – расстояние между насечками (когами)

Наружный диаметр нити до формирования насечек (ког), мм	Условный внутренний диаметр нити после формирования насечек (ког), мм	Длина участка нити до насечек, мм $\pm 20\%$
0,250-0,339	0,150~0,209	10
		10

Нить шипованная (FE): тип 3D 360° ког, двунаправленный - Насечки (коги) на нити являются двунаправленными 3D 360° когами

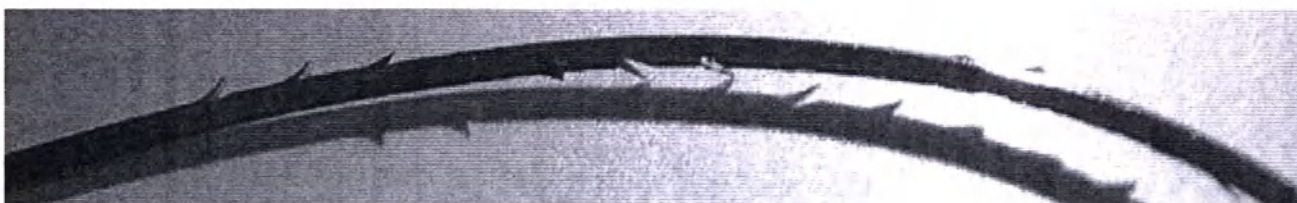




$LC = 1.3 \text{ мм} (\pm 0.1 \text{ мм})$ – длина насечки (кога); $B = 1.8 \text{ мм} (\pm 0.1 \text{ мм})$ – длина проекции насечки (кога).

Наружный диаметр нити до формироваия насечек (ког), мм	Условный внутренний диаметр нити после формирования насечек (ког), мм	Длина участка нити до насечек, мм $\pm 20\%$
0,400-0,499	0,240~0,299	10
		10
0,340-0,399	0,210~0,240	10
		10
0,300-0,399	0,180~0,240	10
		10
0,250-0,339	0,150~0,209	10
		10


Нить шипованная (FG): тип 3D 360° ког, двунаправленный - Насечки (коги) на нити являются двунаправленными 3D 360° когами

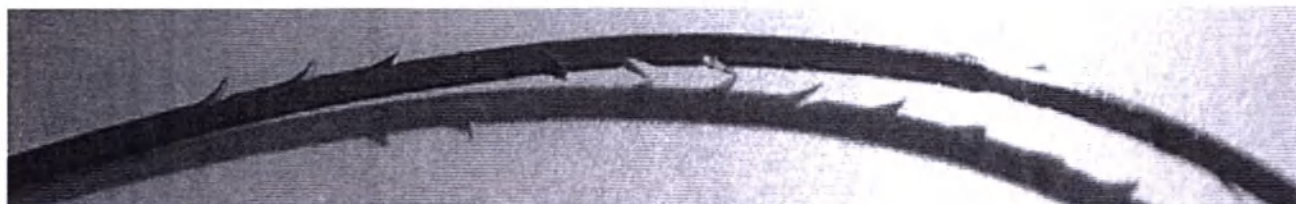

$LC = 1.3 \text{ мм} (\pm 0.1 \text{ мм})$ – длина насечки (кога); $P = 1.0 \text{ мм} (\pm 0.1 \text{ мм})$ – длина проекции насечки (кога).

Наружный диаметр нити до формироваия насечек (ког), мм	Условный внутренний диаметр нити после формирования насечек (ког), мм	Длина участка нити до насечек, мм $\pm 20\%$
0,570-0,610	0,342-0,366	10
		10

Нить шипованная (SC): тип Двусторонний формованный ког - Насечки представляют собой формованные коги, расположенные на обеих сторонах нити

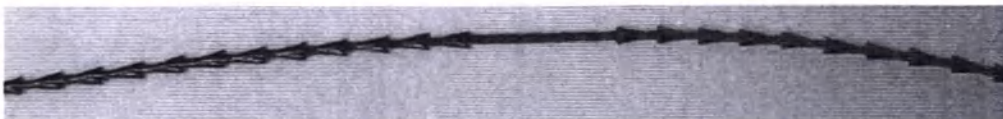

$LC = 1.3 \text{ мм} (\pm 0.1 \text{ мм})$ – длина насечки (кога); $P = 1.8 \text{ мм} (\pm 0.1 \text{ мм})$ – расстояние между насечками (когами)

Наружный диаметр нити до формироваия насечек (ког), мм	Условный внутренний диаметр нити после формирования насечек (ког), мм	Длина участка нити до насечек, мм $\pm 20\%$
0,570 – 0,610	0,342-0,366	10
		10
0,340-0,399	0,210~0,240	10
		10
0,300-0,399	0,180~0,240	10
		10

Нить шипованная (ST): тип Двусторонний формованный ког - Насечки представляют собой формованные коги, расположенные на обеих сторонах нити




$LC = 1.3 \text{ мм } (\pm 0.1 \text{ мм})$ – длина насечки (кога); $P = 1.8 \text{ мм } (\pm 0.1 \text{ мм})$ – расстояние между насечками (когами)


Наружный диаметр нити до формироваия насечек (ког), мм	Условный внутренний диаметр нити после формирования насечек (ког), мм	Длина участка нити до насечек, мм $\pm 20\%$
0,570-0,610	0,342-0,366	10
		10

Расположение отверстия в канюлях

L-образная канюля

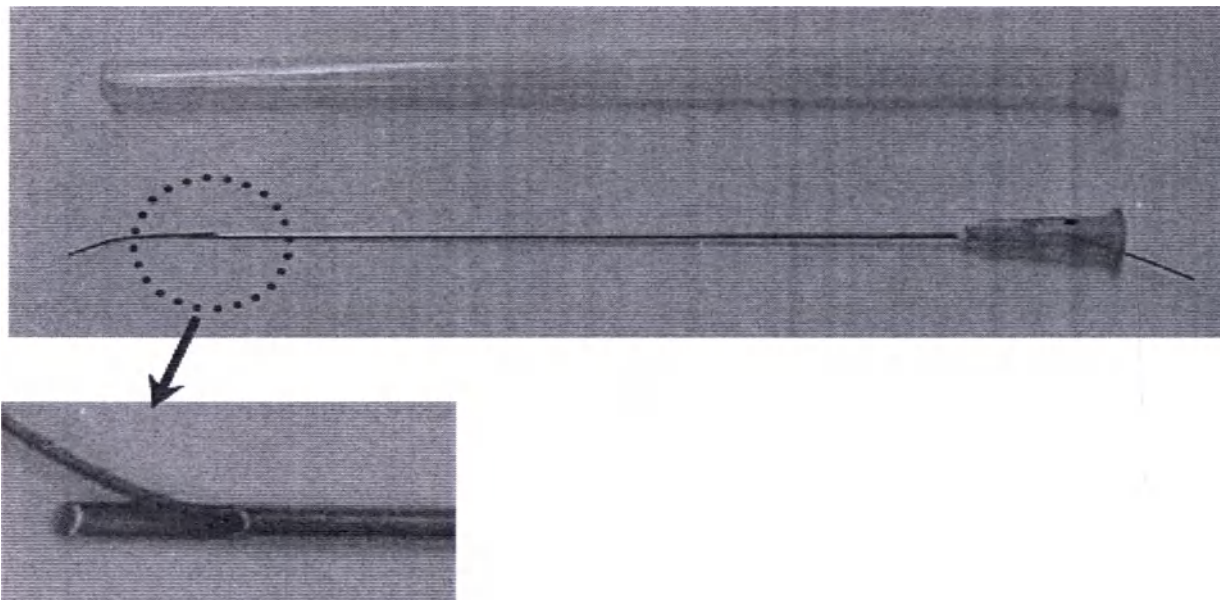


Радиус скругления
рабочей части L-образной
канюли

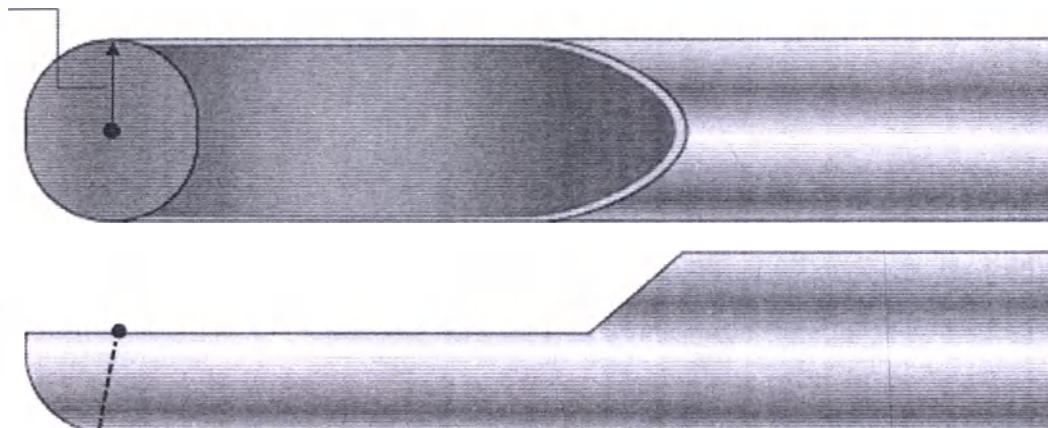


Радиус скругления рабочей части L-образной канюли

Метрический размер канюли, G	Радиус скругления рабочей части канюли, мм
18G	0,600~0,650
19G	0,515~0,550
21G	0,400~0,415
23G	0,300~0,336

W-образная канюля

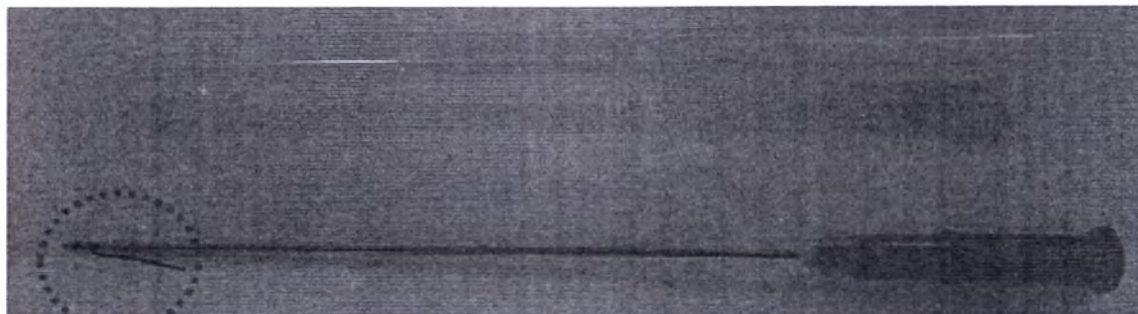

Радиус скругления
рабочей части W-образной
канюли

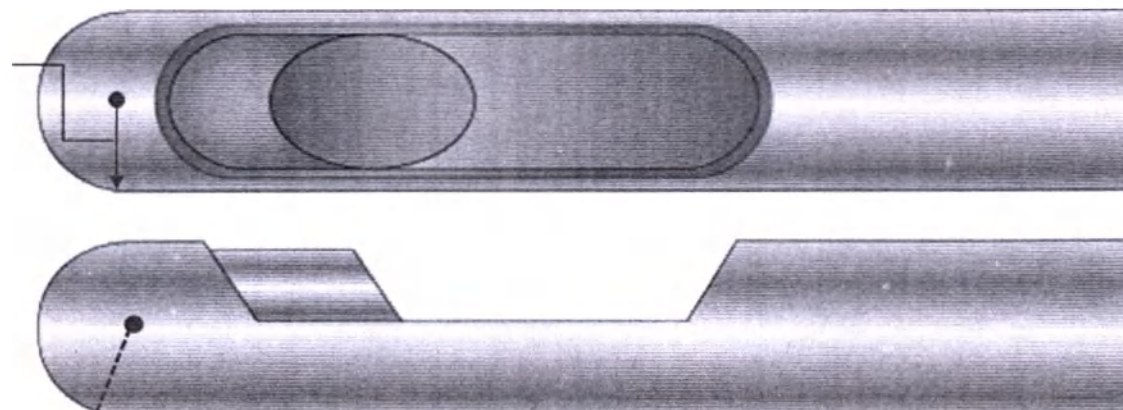

Радиус скругления рабочей части W-образной канюли

Метрический размер канюли, G	Радиус скругления рабочей части канюли, мм
19G	0,515~0,550
21G	0,400~0,415
23G	0,300~0,336
30G	0,149~0,160

Стерилизация

Стерилизация изделия осуществляется газовой стерилизацией этиленоксидом. Используемый метод представляет собой избыточный метод, посредством которого в течение цикла достигается достаточная летальность. Подтверждением летальности процесса служат термометрические измерения и инаktivация Биологических Индикаторов, расположенных внутри загрузки стерилизатора. Уровень обеспечения стерильности (SAL) составляет 10^{-6} или выше. Повторная стерилизация нитей не предусмотрена.

Условия применения

Эксплуатация проводится при температуре от +15°C до +42°C.

Условия хранения

Нити для лифтинга EWA Innolift, выполненные из полидиоксанона и полимолочной кислоты, рекомендуется хранить при температурах от +1°C до +30°C, при которых стабильность и целостность продукта гарантирована.

Кратковременные отклонения от указанного интервала температур не оказывают значительного эффекта на стабильность изделия. Избегать попадания прямых солнечных лучей.

Условия транспортировки

Транспортировка изделий осуществляется в крытых транспортных средствах всех видов с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида при температуре +1°C до +45°C и влажности 0 до 65%.

Целостность упаковки сохраняется при обычных процедурах погрузки и транспортировки, сохраняя стерильность изделия.

Упаковка

Нити для лифтинга EWA Innolift, выполненные из полидиоксанона и полимолочной кислоты, поставляются как стерильное изделие в барьерной системе стерильности (первичной упаковке), которая представляет собой блистеры из Полиэтилена низкой плотности и бумаги. Блистеры не имеют адгезивного слоя, т.к. проходят процедуру теплового запаивания. Никакие клеевые материалы не используются. Дефекты склеивания отсутствуют. Фактическая ширина линии спайки 10 ± 1 мм. Усилие при открывании, не более 30 Н.

Габаритные размеры первичной упаковки (блистера) для нитей EWA Innolift, выполненных из полидиоксанона и полимолочной кислоты, составляют:

(д x ш): 145,0 мм ($\pm 2,0$ мм) X 115,0 мм ($\pm 2,0$ мм)

Вторичная упаковка представляет блистеры из алюминизированной фольги. Данные блистеры так же проходят процедуру теплового запаивания. Фактическая ширина линии спайки $8,0 \pm 1$ мм. Имеют замок Zip Lock. Усилие при открывании не более 30 Н.

Габаритные размеры вторичной упаковки для нитей EWA Innolift, выполненных из полидиоксанона и полимолочной кислоты, составляют:

(д х ш): 275,0х мм ($\pm 3,0$ мм) х 137,0х мм ($\pm 3,0$ мм)

Комплект поставки


- Первичная (индивидуальная) упаковка: блистеры из Полиэтилена низкой плотности и бумаги, в каждом из которых находится по 1, 2, 4 или 5 нитей, уложены в групповые упаковки из алюминизированной фольги по 1, 2 или 4 блистеров в каждом. С групповой упаковкой предоставляется эксплуатационная документация (Инструкция по применению).



1. Маркировка изделия

На первичной (стерилизуемой) упаковке содержится следующая информация:

- Вариант исполнения изделия;
- Размеры изделия и компонентов;
- Номер партии;
- Дата изготовления;
- Срок годности;
- Не использовать, если упаковка повреждена;
- Стерилизация с применением оксида этилена;
- Индикатор стерильности.

На вторичной упаковке используются следующие символы:

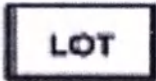Символ	Обозначение
	Не использовать повторно
	Использовать до
	Номер партии
	Дата изготовления

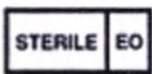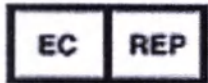	
	Стерилизация оксида этилена
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Производитель
	Уполномоченный представитель в Европейском сообществе
	Температурный диапазон
	Обратитесь к инструкции по применению
	
	Беречь от влаги
	Не допускать воздействия солнечного света
	Не использовать при повреждении упаковки

	Не стерилизовать повторно
QTY	Количество изделий в упаковке
MODEL	Вариант исполнения (номер для заказа)
SIZE	Размеры изделия и компонентов
MODEL	Вариант исполнения (номер для заказа)
SIZE	Размеры изделия и компонентов
MFG.	Дата изготовления
EXP.	Срок годности
Non-toxic	Не токсично
Non-pyrogenic	Апирогенно
Heavy metal free	Не содержит тяжелые металлы

Проект маркировки

Нить косметологическая EWA Innolift из полидиоксанона для лифтинга на игле-носителе, рассасывающаяся

Не токсично. Апирогенно.

Не содержит тяжелые металлы.

 «Юрим Медикал Ко., Лтд.», Корея

Yurim Medical Co., Ltd. 43, Jeongjung 3-gil, Osong-eup, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea

тел.: 82-43-2319788 факс: 82-43-2319789

Yurim Medical Co., Ltd., 43, Jeongjung 3-gil, Osong-eup, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea

Модель: xxxxxxxx

Размер: xxxxxxxx Количество нитей: xxxxxxxx

LOT

 xxxxxx

 xxxxxx

 xxxxxx



STERILE EO

  15°C      

ООО «ОФТАДЕРМ-ЛОГИСТИК», 117105, город Москва, Нагатинская улица, дом 1 строение

2, этаж цоколь офис 1
тел.: +7 (499) 404-36-46

Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития № _____ от _____

Нить косметологическая EWA Innolift из полидиоксанона для лифтинга на канюле,
рассасывающаяся

Не токсично. Апирогенно.
Не содержит тяжелые металлы.



«Юрим Медикал Ко., Лтд.», Корея
Yurim Medical Co., Ltd. 43, Jeongjung 3-gil, Osong-eup, Heungdeok-gu, Cheongju-si,
Chungcheongbuk-do, Republic of Korea
тел.: 82-43-2319788 факс: 82-43-2319789

Yurim Medical Co., Ltd., 43, Jeongjung 3-gil, Osong-eup, Heungdeok-gu, Cheongju-si,
Chungcheongbuk-do, Republic of Korea

Модель: xxxxxxxx

Размер: xxxxxxxx Количество нитей: xxxxxxxx



xxxxxx



xxxxxx



xxxxxx



Уполномоченный представитель на территории РФ:
ООО «ОФТАДЕРМ-ЛОГИСТИК», 117105, город Москва, Нагатинская улица, дом 1 строение
2, этаж цоколь офис 1
тел.: +7 (499) 404-36-46

Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития № _____ от _____

Нить косметологическая EWA Innolift из полимолочной кислоты для лифтинга на игле-носителе, рассасывающаяся
Не токсично. Апирогенно.
Не содержит тяжелые металлы.



«Юрим Медикал Ко., Лтд.», Корея
Yurim Medical Co., Ltd. 43, Jeongjung 3-gil, Osong-eup, Heungdeok-gu, Cheongju-si,
Chungcheongbuk-do, Republic of Korea
тел.: 82-43-2319788 факс: 82-43-2319789

Yurim Medical Co., Ltd., 43, Jeongjung 3-gil, Osong-eup, Heungdeok-gu, Cheongju-si,
Chungcheongbuk-do, Republic of Korea

Модель: xxxxxxxx

Размер: xxxxxxxx Количество нитей: xxxxxxxx

LOT

xxxxxx



xxxxxx



xxxxxx



STERILE EO



15°C



30°C



Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «ОФТАДЕРМ-ЛОГИСТИК», 117105, город Москва, Нагатинская улица, дом 1 строение
2, этаж цоколь офис 1
тел.: +7 (499) 404-36-46

Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития № _____ от _____

Нить косметологическая EWA Innolift из полимолочной кислоты для лифтинга на канюле,
рассасывающаяся

Не токсично. Апирогенно.
Не содержит тяжелые металлы.



«Юрим Медикал Ко., Лтд.», Корея
Yurim Medical Co., Ltd. 43, Jeongjung 3-gil, Osong-eup, Heungdeok-gu, Cheongju-si,
Chungcheongbuk-do, Republic of Korea
тел.: 82-43-2319788 факс: 82-43-2319789

Yurim Medical Co., Ltd., 43, Jeongjung 3-gil, Osong-eup, Heungdeok-gu, Cheongju-si,
Chungcheongbuk-do, Republic of Korea

Модель: xxxxxxxx

Размер: xxxxxxxx Количество нитей: xxxxxxxx

LOT

xxxxxx



xxxxxx



xxxxxx



Уполномоченный представитель на территории РФ:
ООО «ОФТАДЕРМ-ЛОГИСТИК», 117105, город Москва, Нагатинская улица, дом 1 строение
2, этаж цоколь офис 1
тел.: +7 (499) 404-36-46

Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития № _____ от _____

Гарантии производителя

Производитель гарантирует качество изделий в течение всего срока годности при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок годности

Два года от даты производства изделия.

Утилизация и защита окружающей среды

В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21, отходы данного медицинского изделия относятся к отходам класса Б (эпидемиологически опасные отходы) – Инфицированные и потенциально инфицированные отходы. Материалы и инструменты, предметы, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями.

При использовании, транспортировке и хранении изделия не оказывают негативного воздействия на человека и окружающую среду.

Претензии

На территории России все обращения следует направлять по адресу:

ООО «ОФТАДЕРМ-ЛОГИСТИК», 117105 г. Москва ул. Нагатинская д.1 стр.2 цоколь офис № 1.

Тел. +7(499) 404-36-46 ,

e-mail: info@oftaderm.ru

Регистрационный № 2021-16176

НОТАРИАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА И НОТАРИАЛЬНЫЙ ОФИС ХАНМИ
(Дипломатический центр Б/Д 2Ф, Сеочо-донг) 202, 2558, Намбусунхван-ро, Сеочо-
гу, г. Сеул, Корея

Печать: Юридическая фирма и нотариальный офис Ханми

ДЕКЛАРАЦИЯ

Мы (заявитель), Yurim Medical Co., Ltd. / Юрим Медикал Ко., Лтд., Хае Джун, Яхнг
Настоящим заявляем с нашей полной ответственностью

1. Что прикрепленный документ:

Инструкция по применению

2. ☒ является точным и подлинным

☐ является точным переводом текста, составленного на корейском языке,
предполагается, что текст является подлинным и точным.

15 декабря 2021 г.

Подпись: /Подписи/

Штамп: Yurim Medical Co., Ltd. / Юрим Медикал Ко., Лтд.

/Подписи/

Хае Джун, Яхнг, ПРЕЗИДЕНТ

Перевод с корейского языка на русский язык

Печать компании: Yurim Medical Co., Ltd. / Юрим Медикал Ко., Лтд.

Фрагмент печати: Юридическая фирма и нотариальный офис Ханми

Перевод с английского языка на русский язык

Допущено:
Яхнг, Хае Джун

Дата: 13 декабря 2021 г.

/Подпись/

Штамп компании: Yurim Medical Co., Ltd. / Юрим Медикал Ко., Лтд.

/Подпись/

Хае Джун, Яхнг, ПРЕЗИДЕНТ

Инструкция по применению:

«Нить косметологическая для лифтинга на игле-носителе, рассасывающаяся EWA Innolift»

Производства:

Yurim Medical Co., Ltd. / Юрим Медикал Ко., Лтд., Корея

Перевод с корейского языка на русский язык

Фрагмент печати: Юридическая фирма и нотариальный офис Ханми

Регистрационный № 2021-16176

НОТАРИАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

МИН СУ ПАРК, доверенное лицо
YURIM MEDICAL CO., LTD / ЮРИМ МЕДИКАЛ КО., ЛТД.,
ПРЕЗИДЕНТА ХАЕ ДЖУНГ ЯХНГ,
предстал передо мной и подтвердил, что упомянутый принципал подписал
прикрепленную ДЕКЛАРАЦИЮ.

Настоящее подтверждается сегодня, 15 декабря 2021 года в данном офисе.


ХАНМИ ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА И НОТАРИАЛЬНЫЙ ОФИС

Офис прокурора Центрального района г. Сеул
(Дипломатический центр Б/Д 2Ф, Сеочо-донг) 202,
2558, Намбусунхван-ро, Сеочо-гу, г. Сеул, Корея

Подпись нотариуса
/Подпись/
ХАН МЬЮНГ СУБ

Настоящий офис получил полномочия от Министерства Юстиций Республики
Корея на действие в качестве публичного нотариуса с 14 марта 2007 г. в
соответствии с законом № 7428.

Перевод данного текста выполнен переводчиком Шоинбодовой Мархабо Пайшанбеевной.

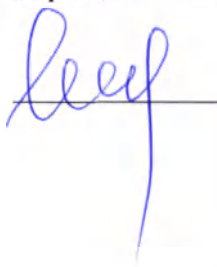

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать четвертого января две тысячи двадцать второго года


Я, Моисеева Лилия Владимировна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Шоинбодовой Мархабо Пайшанбеевны.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 50/995-н/77-2022- 1-1603

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.

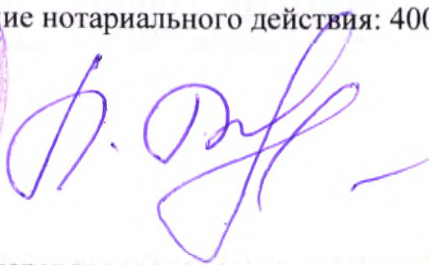

Л.В.Моисеева



Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 55 лист(-а, -ов).



Л.В.Моисеева