

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «ИНТЕРТЕКС ГИЛЬ корп.»



О.Е. Балашов

«19» февраля 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

медицинского изделия

**ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ КОМПРЕССИОННЫЕ
АНТИЭМБОЛИЧЕСКИЕ
по ТУ 14.31.10-001-46838010-2020**

2024

1. Общий вид медицинского изделия (МИ)

1.1. Общий вид медицинского изделия:

Чулки медицинские эластичные компрессионные антиэмболические «ИНТЕКС»



1.2. Общий вид медицинского изделия:
Чулки медицинские эластичные компрессионные антиэмболические
«ИНТЕКС» «ЭЛЕГАНС»




1.3. Общий вид медицинского изделия:
Гольфы медицинские эластичные компрессионные антиэмболические
«ИНТЕКС» «ЭЛЕГАНС»



1.4. Общий вид медицинского изделия:
Чулки медицинские эластичные компрессионные антиэмболические
«ИНТЕКС» «УНИВЕРСАЛ»



1.5. Общий вид медицинского изделия:
Гольфы медицинские эластичные компрессионные антиэмболические
«ИНТЕКС» «УНИВЕРСАЛ»

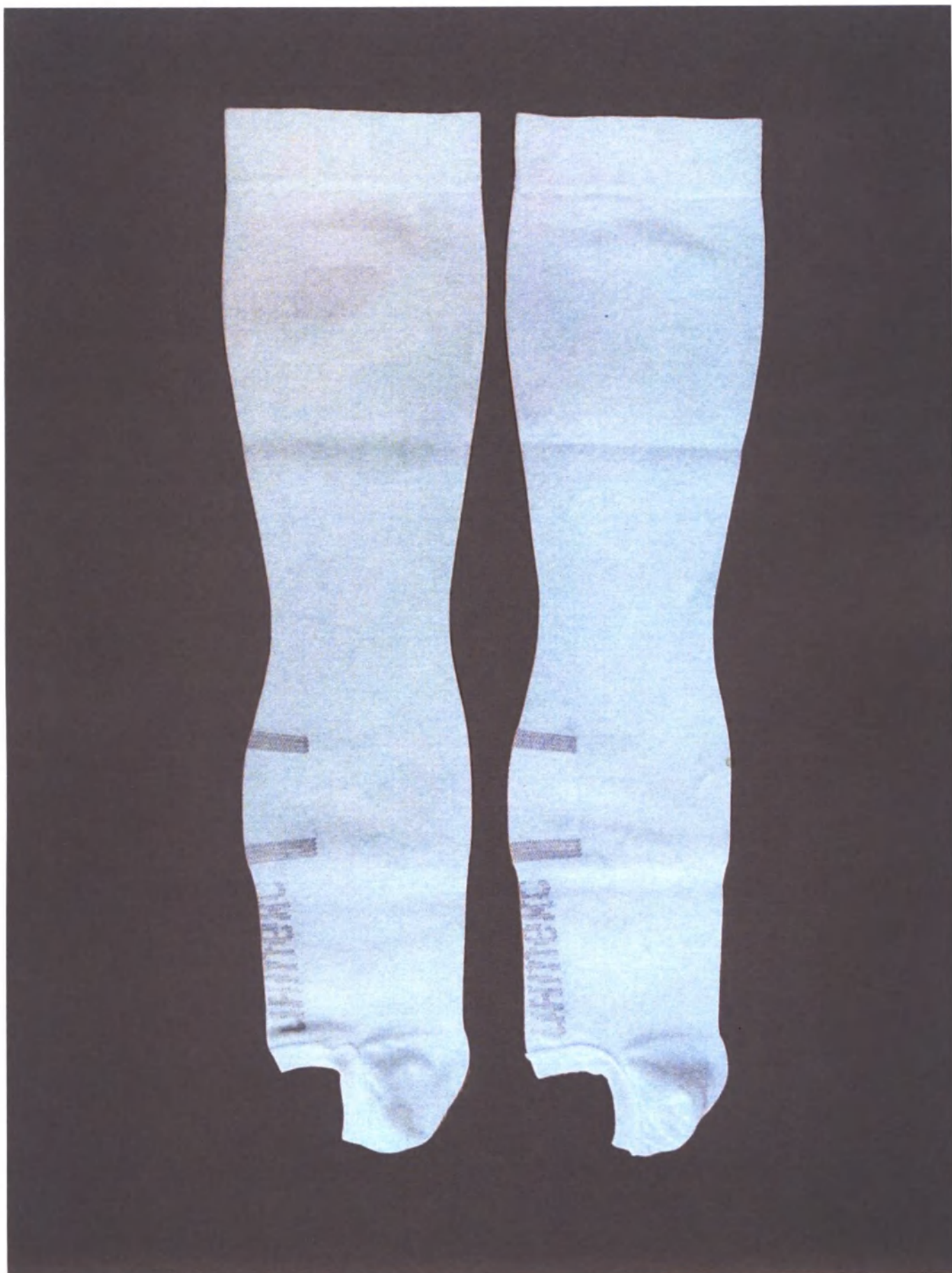

2. Общий вид медицинского изделия в потребительской упаковке

2.1.1. Общий вид изделия в потребительской упаковке «пакет» (лицевая сторона)
на примере МИ:

Чулки медицинские эластичные компрессионные антиэмболические «ИНТЕКС»,
2 класс компрессии, размер L, рост универсальный



Чулки медицинские эластичные компрессионные антиэмболические «ИНТЕКС»
2 класс компрессии, размер L, рост универсальный

Чехлы медицинские эластичные компрессионные антиэмболические «ИНТЕРТЕКСТ»

Классы компрессионного класса: 1 класс (18-21 мм рт.ст.), 2 класс (22-32 мм рт.ст.), 3 класс (33-44 мм рт.ст.).
Назначение: для индивидуального использования для профилактики тромбозов нижних конечностей.
Антиэмболический (гипотензивный) эффект: не применяется для длительного использования, его применение в период беременности, во время родов и после родов - не более 6 дней, в послеродовый период - до 24 недель. Длительность периода компрессионного компрессии.
Назначение: для профилактики тромбозов нижних конечностей во время проведения косметических и медицинских операций, родов; для профилактики компрессионной терапии при лечении заболеваний, связанных с образованием отеков, обесцвечиванием кожных покровов, нарушением кровообращения, а также для профилактики образования венозных тромбозов и варикозного расширения вен, нормализации кровообращения, и уменьшения болевых ощущений в области нижних конечностей.
Область применения: в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях.
Показания к применению: повышенная свертываемость и вязкость крови, отечность, нарушение кровообращения, наличие варикозных узлов на венах и большое количество сосудистых звездочек, болевые ощущения, обострение патологий венозной системы, нахождение в положении лежа на спине, в том числе в период беременности, во время родов, в период послеродового восстановления (при травмах, после операции по поводу кесарева сечения, после выкидыша, инсульта, в послеродовый период), а также в качестве временной замены обычного компрессионного трикотажа и эластичных компрессионных бинтов.
Противопоказания к применению: хронические обструктивные заболевания верхних конечностей (инфаркт, атеросклероз сосудов, синдром Рейно), тяжелые формы диабетической ангиопатии и полинейропатии, трофические язвы на фоне тяжелого поражения, септический флегмон, декомпенсированная сердечно-легочная недостаточность, острые инфекции мягких тканей, а также индивидуальная непереносимость материала, входящая в состав изделия.
Меры предосторожности при использовании: перед применением обязательно проконсультируйтесь с врачом.
Не рекомендуется: использовать изделия при наличии экзем, дерматита, псориаза, трещинок, воспалительных заболеваний кожи, а также нарушения чувствительности.
Возможные побочные действия: аллергическая реакция.
Рекомендации по применению: антиэмболический трикотаж следует надевать в положении лежа на спине на чистую и сухую кожу; в день операции с утра (от вставания с кровати), а при естественных родах - при первых схватках. Предварительно следует вымыть изделие на мыльной пене, затем собрать в гармошку от верхней части до мыла и плавно натянуть его на ногу, после чего равномерно распределить по всей длине, чтобы не было складок. Для облегчения надевания изделия можно использовать специальный приспособление - батонер или гайдар, а также резиновые или силиконовые перчатки.
Внимание: во избежание повреждения изделия перед надеванием обязательно снимайте кольца и другие украшения, а также тщательно ухаживайте за кожей и аккуратно обрабатывайте ногти.
Не рекомендуется: использовать изделие перед надеванием лосьоны и кремы, это снижает липкие свойства силикона, а также тянуть изделие вверх за края резинки чулка и в местах, где находится шов. Не используйте изделия с повреждениями.
Рекомендации по уходу: ручная стирка с применением жидких моющих средств или детских стиральных порошков при 30°С, ручной отжим (в полотенце) без выкручивания и сушка при 120°С на горизонтальной поверхности в тени away от отопительных приборов до полного высыхания изделия.
Для дезинфекции (при необходимости) в домашних условиях: замачивание в растворе перекиси водорода (3%) при 150°С от 80 до 100 минут с последующим полосканием в проточной воде.
Для лечебных учреждений: дезинфекция (при необходимости) химическим методом с помощью дезинфицирующих средств с моющим действием и/или на основе перекиси водорода.
Перед стиркой/дезинфекцией изделие следует вывернуть наизнанку.
Примечание: Не рекомендуется:
 - поднимать изделие при сушке во избежание потери его формы и компрессионных свойств,
 - мыть силиконовую резинку на чулке, ей нужно протирать спиртовым салфетками или тканью, смоченной спиртовым раствором.
Не используйте: щадящие мыла, отбеливатели, пятновыводители, растворители и обычные стиральные порошки.
Запрещается: колоть изделие, стирать и отжимать в стиральной машине, сушить в сушильной машине, а также на обогревателе или батарее и гладить при помощи утюга.
Срок хранения: 5 лет с даты изготовления.
Не рекомендуется: использовать изделия по истечении срока хранения.
Условия хранения: 1(Н) - в сухом помещении при t от +5°С до +25°С, в недоступном для детей месте. Отсутствует воздействие прямых солнечных лучей. Нахождение на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.
Гарантийный срок эксплуатации с сохранением компрессионных свойств: в течение указанного срока непрерывного периода использования, но не более 14 дней (не считая, в положении лежа или при условии отсутствия активного движения) в пределах срока хранения (при соблюдении рекомендаций по применению и уходу).
Условия утилизации: в соответствии с СанПиН 2.1.3.684-21 для медицинских отходов класса «а» или «б» (при загрязнении кровью или другими биологическими жидкостями). Допускается утилизация использованных изделий вместе с бытовыми отходами. Изделия, загрязненные кровью, следует предварительно утилизировать в 2 этапа.
Выбор размера трикотажного изделия. Измерения для подбора размера изделия рекомендуется проводить при минимальной отечности (утром, не вставая с постели). Для измерений нужно использовать мягкую пластиковую или бумажную ленту. При проведении измерений лента не должна перекручиваться.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРА

Наименование параметра	XS	XSew	S	Sew	M	Mew	L	Lew	XL	XLew	XXL	XXLew
b обхват самой узкой части голени над лодыжками, см.	17-19	17-19	19-22	19-22	22-25	22-25	25-28	25-28	28-31	28-31	31-34	31-34
c обхват самой широкой части голени и области икры, см.	27-34	27-34	29-37	29-37	34-42	34-42	38-46	38-46	41-51	41-51	46-56	46-56
d обхват бедра (на 5 см ниже коленной складки), см.	42-48	44-52	44-52	47-60	50-58	50-58	56-64	65-75	60-72	72-85	72-85	78-90
a длина ноги от паха до пятки (1), см							68-76					
							77-86					
							68-86					
e длина стопы (по ст.)	35-40	35-40	37-42	37-42	38-44	38-44	39-46	39-46	39-46	39-46	39-46	39-46

Примечание: производитель гарантирует, что изделия будут обеспечивать лечебный эффект для пациентов с параметрами, соответствующими указанным в таблице выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: изделие обязательно утилизировать с рекомендациями.
Состав: 80% полиамид, 20% эластан.
ТУ 14.31.10-001-40030-0-2020. 17.07.2022. 18.07.2022 от 30.11.2022
Добровольная сертификация
 Производителем ООО «ИНТЕРТЕКСТ»
 Юридический адрес: Россия, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 32, стр. 2, этаж 1, пом. 4, комн. 1
 Адрес производства: Россия, 143964, Московская область, г. Реутов, ул. Железнодорожная, д. 5
 Тел.: +7 (495) 528-06-82/528-51-09 www.int.ru/info/int.ru

**ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА
 НЕ ПОДАДУЖАЮТ ВОЗВРАТУ ИЛИ ОБМЕНУ (ПО РФ от 31.12.2020 № 2463).**

2.2.1. Общий вид изделия во вторичной потребительской упаковке «коробка» (лицевая сторона) на примере МИ:

Гольфы медицинские эластичные компрессионные антиэмболические «ИНТЕКС» «УНИВЕРСАЛ», 1 класс компрессии, размер универсальный (S-XL)



2.2.2. Общий вид изделия во вторичной потребительской упаковке «коробка» (оборотная сторона) на примере МИ:

Гольфы медицинские эластичные компрессионные антиэмболические «ИНТЕКС» «УНИВЕРСАЛ»,
1 класс компрессии, размер универсальный (S-XL)

ГОЛЬФЫ АНТИЭМБОЛИЧЕСКИЕ
"Интекс" "Универсал"

Класс компрессии 1

АМГ-У-1к
Цвет: белый

Размер: S-XL

Дата изготовления: 02.2024г.

1

4 605086 014151

Гольфы медицинские эластичные компрессионные антиэмболические «ИНТЕКС» «УНИВЕРСАЛ»

Изделие стерильное для индивидуального использования.

Классы компрессии: 1 класс (18-21 мм рт.ст.)

Антиэмболический (госпитальный) трикотаж не предназначен для интенсивного ежедневного использования, его применяют интермиттентный период времени: во время операций и родов, после родов – не более 6 дней, в послеоперационный период – до 2-х недель. Длительность периода использования назначает врач.

Назначение: для предотвращения тромбозов и эмболии во время проведения полостных и местных операций, родов, для проведения компрессионной терапии при лечении заболеваний, связанных с образованием отеков, обусловленных сосудистой патологией нижних конечностей, а также для профилактики образования венозных тромбов и варикозного расширения вен, нормализации кровообращения, и уменьшения болевых ощущений в области нижних конечностей.

Область применения: в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях.

Показания к применению: повышенная свертываемость и вязкость крови, отечность, нарушение кровотока, наличие варикозных узлов на венах и большом количестве сосудистых звездочек. Болевые ощущения, обострение патологии венозной системы, нахождение в постели интенсивной терапии или в реабилитации, во время продолжительного постельного режима (при травмах, после нарушения мозгового кровообращения, после инфарктов, инсультов, в неврологической практике), а также в качестве временной замены обычного компрессионного трикотажа и эластичных компрессионных бинтов.

Противопоказания к применению: хронические облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей (энтертерит, атеросклероз сосудов, синдром Рейно), тяжелые формы диабетической ангиопатии и полинейропатии, трофические язвы не язвенного происхождения, септический флебит, декомпенсированная сердечно-легочная недостаточность, острые инфекции нижних тканей, а также индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав изделия.

Меры предосторожности при использовании: перед применением обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Не рекомендуется использовать изделие при наличии экзем, дерматита, псориаза, пролежней, воспалительных заболеваний кожи, а также нарушении чувствительности.

Возможные побочные действия: аллергическая реакция.

Рекомендации по применению: антиэмболический трикотаж следует надевать в положении лежа на спине на чистую и сухую кожу: в день операции с утра (не оставаясь с кровати), а при естественных родах – при первых схватках. Предварительно следует вывернуть изделие на изнанку, затем собрать в гармошку от верхней части до мыска и плавно натянуть его на ногу, после чего равномерно распределить по всей длине, чтобы не было складок. Для облегчения надевания изделия можно воспользоваться специальным приспособлением – батлером или глайдером, а также резиновыми или медицинскими перчатками.

Внимание: во избежание повреждений изделий перед надеванием обязательно снимайте кольца и другие украшения, а также тщательно ухаживайте за стопами и аккуратно обрабатывайте ногти.

Не рекомендуется тянуть изделие в носки, где находится шов. Не используйте изделия с повреждением.

Рекомендации по уходу: ручная стирка с применением жидких моющих средств или детских стиральных порошков при t, не превышающей 30 °С, ручная отжим (в полотенце) без выкручивания и сушка при t 20±5°С на горизонтальной поверхности в тени изделия от отопительных приборов до эксплуатационного состояния.

Для дезинфекции (при необходимости) в домашних условиях: замачивание в растворе перекиси водорода (3%) при t 50°С от 80 до 180 минут с последующим полосканием в проточной воде.

Для лечебных учреждений: дезинфекция (при необходимости) химическим методом с помощью дезинфицирующих средств с моющими действиями и/или на основе перекиси водорода.

Перед стиркой/дезинфекцией изделие следует вывернуть наизнанку.

Примечание: Не рекомендуется подкашивать изделие при сушке во избежание потери его формы и компрессионных свойств.

Не использовать: щелочное мыло, отбеливатели, пятновыводители, растворители и обычные стиральные порошки.

Запрещается: кипятить изделие, стирать и отжимать в стиральной машинке, сушить в сушильной машинке, а также на обогревателе или батарее и гладить при помощи утюга.

Срок хранения: 5 лет с даты изготовления.

Не рекомендуется использовать изделия по истечении срока хранения.

Условия хранения: 1(II) – в сухом помещении при t от +5°С до +25°С, в недоступных для детей местах. Отсутствия воздействия прямых солнечных лучей. Нахождение на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов.

Гарантийный срок эксплуатации с сохранением компрессионных свойств: в течение назначенного врачом непрерывного периода использования, но не более 14 дней (не снимая, в положении лежа или при условии отсутствия активного движения) в пределах срока хранения (при соблюдении рекомендаций по применению и уходу).

Условия утилизации: в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А» или «Б» (при загрязнении кровью или другими биологически жидкостями). Допускается утилизация использованных изделий вместе с бытовыми отходами. Изделия, загрязненные кровью, следует предварительно упаковать в 2 пакета.

Подбор размера трикотажного изделия. Измерения для подбора размера изделия рекомендуется проводить при минимальной отечности (утром, не вставая с постели). Для измерений нужно использовать мягкую пластиковую или бумажную ленту. При проведении измерений лента не должна перекручиваться.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРА

Наименование параметра	Размер универсальный (S-XL)
Средняя окружность запястья (см)	19-33
Средняя окружность лодыжки (см)	29-51
Средняя окружность голени (см)	36-44

Примечание: производитель гарантирует, что изделия будут обеспечивать лечебный эффект для потребителей с параметрами, соответствующими указанным в таблице выше.

Перед применением обязательно ознакомьтесь с рекомендациями.

Состав: эластан, полиамид.

ТУ 14.31.10-001-46836010-2020

РУ № РЗН 2022/18978 от 30.11.2022

Добровольная сертификация

Производитель:
ООО "ИНТЕРТЕКСТИЛЬ КОРП."
Юридический адрес: Россия, 101000, г. Москва, ул. Масницкая, д. 32, стр. 2, этаж 1, пом. 4, комн. 1
Адрес производства: Россия, 143964, Московская область, г. Реутов, ул. Железнодорожная, д. 5
Тел.: +7 (495) 528-86-82/528-51-09
www.bint.ru/info@bint.ru

МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ НАЛИЧАЮЩЕГО КАЧЕСТВА НЕ ПОДЛЕЖАЕТ ВОЗВРАТУ ИЛИ ОБМЕНУ (ПП РФ от 31.12.2009 № 3463).

2.2.3. Общий вид изделия в первичной упаковке «пакет», которое вкладывается во вторичную потребительскую упаковку «коробка» на примере МИ:


Гольфы медицинские эластичные компрессионные антиэмболические «ИНТЕКС» «УНИВЕРСАЛ»,
1 класс компрессии, размер универсальный (S-XL)



3. Макеты потребительских упаковок серии «ИНТЕКС»

3.1.1. Макет потребительской упаковки «коробка» или вкладыша потребительской упаковки «пакет» (лицевая сторона – вариант № 1) МИ:

Чулки медицинские эластичные компрессионные антиэмболические «ИНТЕКС»
{единый для всех классов компрессии и размеров}

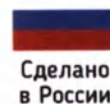

на операцию
и роды



ГОСПИТАЛЬНЫЙ ТРИКОТАЖ 1 пара

ЧУЛКИ АНТИЭМБОЛИЧЕСКИЕ

с резинкой на силиконовой основе

3.1.2. Макет вкладыша потребительской упаковки «коробка» или вкладыша потребительской упаковки «пакет» (оборотная сторона – вариант № 1) МИ:

Чулки медицинские эластичные компрессионные антиэмболические «ИНТЕКС» {единый для всех классов компрессии и размеров}

Чулки медицинские эластичные компрессионные антиэмболические «ИНТЕКС»

Классы компрессии: 1 класс (18-21 мм рт. ст.), 2 класс (22-32 мм рт. ст.), 3 класс (33-46 мм рт. ст.).

Изделие нестерильное для индивидуального использования.

Антиэмболический (госпитальный) трикотаж не предназначен для интенсивного ежедневного использования, его применяют непродолжительный период времени: во время операций и родов, после родов - не более 6 дней, в послеоперационный период - до 2-х недель. Длительность периода использования назначает врач.

Назначение: для предотвращения тромбоэмболических осложнений во время проведения полостных и местных операций, родов; для проведения компрессионной терапии при лечении заболеваний, связанных с образованием отеков, обусловленных сосудистой патологией нижних конечностей, а также для профилактики образования венозных бляшек и варикозного расширения вен, нормализации кровообращения, и уменьшения болевых ощущений в области нижних конечностей.

Область применения: в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях.

Показания к применению: повышенная свёртываемость и вязкость крови, отечность, нарушение кровотока, наличие варикозных узлов на венах и большого количества сосудистых звездочек, болевые ощущения, обострение патологий венозной системы, нахождение в палате интенсивной терапии или в реанимации, во время продолжительного постельного режима (при травмах, после нарушения мозгового кровообращения, после инфарктов, инсультов, в неврологической практике), а также в качестве временной замены обычного компрессионного трикотажа и эластичных компрессионных бинтов.

Противопоказания к применению: хронические облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей (энтерит, атеросклероз сосудов, синдром Рейно), тяжёлые формы диабетической ангиопатии и полинейропатии, трофические язвы не венозного происхождения, септический флебит, декомпенсированная сердечно-лёгочная недостаточность, острые инфекции мягких тканей, а также индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав изделия.

Меры предосторожности при использовании: перед применением обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Не рекомендуется использовать изделия при наличии экзем, дерматита, псориаза, пролежней, воспалительных заболеваний кожи, а также нарушении чувствительности.

Возможные побочные действия: аллергическая реакция.

Рекомендации по применению: антиэмболический трикотаж следует надевать в положении лежа на спине на чистую и сухую кожу: в день операции с утра (не вставая с кровати), а при естественных родах - при первых схватках. Предварительно следует вывернуть изделие на изнанку, затем собрать в гармошку от верхней части до мыска и плавно натянуть его на ногу, после чего равномерно распределить по всей длине, чтобы не было складок. Для облегчения надевания Изделия можно воспользоваться специальным приспособлением - батлером или глайдером, а также резиновыми или медицинскими перчатками.

Внимание: во избежание повреждений изделий перед надеванием обязательно снимайте кольца и другие украшения, а также тщательно ухаживайте за стопами и аккуратно обрабатывайте ногти.

Не рекомендуется использовать перед надеванием лосьоны и кремы, это снижает липкие свойства силикона, а также тянуть изделия вверх за края резинки чулок и в местах, где находятся швы. Не используйте изделия с повреждениями.

Рекомендации по уходу: ручная стирка с применением жидких моющих средств или детских стиральных порошков при t, не превышающей 30° С, ручной отжим (в полотенце) без выкручивания и сушка при t 20±5° С на горизонтальной плоскости в тени вдали от отопительных приборов до эксплуатационного состояния.

Для дезинфекции (при необходимости) в домашних условиях: замачивание в растворе перекиси водорода (3%) при t 50° С от 80 до 180 минут с последующим полосканием в проточной воде.

Для лечебных учреждений: дезинфекция (при необходимости) химическим методом с помощью дезинфицирующих средств с моющими действиями и/или на основе перекиси водорода.

Перед стиркой/дезинфекцией изделие следует вывернуть наизнанку.

Примечание: Не рекомендуется:

- подвешивать изделие при сушке во избежание потери его формы и компрессионных свойств,
- мочить силиконовую резинку на чулках, её нужно протирать спиртовыми салфетками или тканью, смоченной спиртовым раствором.

Не использовать: щелочное мыло, отбеливатели, пятновыводители, растворители и обычные стиральные порошки.

Запрещается: кипятить изделие, стирать и отжимать в стиральной машинке, сушить в сушильной машинке, а также на обогревателе или батарее и гладить при помощи утюга.

Срок хранения: 5 лет с даты изготовления.

Не рекомендуется использовать изделия по истечении срока хранения.

Условия хранения: 1(Л) - в сухом помещении при t от +5°С до +25°С, в недоступных для детей местах. Отсутствие воздействия прямых солнечных лучей. Нахождение на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов.

Гарантийный срок эксплуатации с сохранением компрессионных свойств: в течение назначенного врачом непрерывного периода использования, но не более 14 дней (не снимая, в положении лёжа или при условии отсутствия активного движения) в пределах срока хранения (при соблюдении рекомендаций по применению и уходу).

Условия утилизации: в соответствии с СанПиН 2.1.3.684-21 для медицинских отходов класса «А» или «Б» (при загрязнении кровью или другими биологическими жидкостями). Допускается утилизация использованных изделий вместе с бытовыми отходами. Изделия, загрязнённые кровью, следует предварительно упаковать в 2 пакета.

Подбор размера трикотажного изделия. Измерения для подбора размера изделия рекомендуется проводить при минимальной отечности (утром, не вставая с постели). Для измерений нужно использовать мягкую пластиковую или бумажную ленту. При проведении измерений лента не должна перекручиваться.



ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРА

Наименование параметра	XS	XSew	S	Sew	M	Mew	L	Lew	XL	XLew	XXL	XXLew
b обхват самой узкой части голени над лодыжками, см.	17-19	17-19	19-22	19-22	22-25	22-25	25-28	25-28	28-31	28-31	31-34	31-34
c обхват самой широкой части голени в области икры, см.	27-34	27-34	29-37	29-37	34-42	34-42	38-46	38-46	41-51	41-51	46-56	46-56
g обхват бедра (на 5 см. ниже ягодичной складки), см.	42-48	44-52	44-52	47-60	50-58	58-68	56-64	65-75	60-72	72-85	72-85	78-90
a длина ноги от паха до пятки (а), см	1 рост 68-76 2 рост 77-86 универсальный 68-86											
размер стопы (обуви)	35-40		35-40		37-42		38-44		39-46		39-46	

ew (параметр для широкого бедра)

Примечание: производитель гарантирует, что изделия будут обеспечивать лечебный эффект для потребителей с параметрами, соответствующими указанным в таблице выше.

Перед применением обязательно ознакомьтесь с рекомендациями.

Состав: эластан, полиамид, силикон.

ТУ 14.31.10-001-46838010-2020 РУ № РЗН 2022/18978 от 30.11.2022


Добровольная сертификация

Производитель: ООО "ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп."


Юридический адрес: Россия, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 32, стр. 2, этаж 1, пом. 4, комн. 1

Адрес производства: Россия, 143964, Московская область, г. Реутов, ул. Железнодорожная, д. 5


Тел.: +7 (495) 528-86-82/528-51-09 www.bint.ru/info@bint.ru

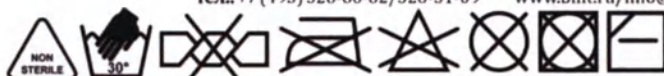

ПРИОБРЕТЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА
НЕ ПОДЛЕЖАТ ВОЗВРАТУ ИЛИ ОБМЕНУ (ПП РФ от 31.12.2020 № 2463).

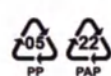

(упаковка «пакет»)

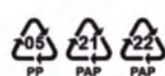

(упаковка «коробка»)

4. Макеты потребительских упаковок серии «ИНТЕКС» «ЭЛЕГАНС»

4.1.1. Макет потребительской упаковки «коробка» или вкладыша потребительской упаковки «пакет» (лицевая сторона – вариант № 1) МИ:

Чулки медицинские эластичные компрессионные антиэмболические «ИНТЕКС» «ЭЛЕГАНС»
{для всех классов компрессии и размеров}



ИНТЕКС
КОМПРЕССИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

- ⊕ профилактика тромбозов
- ⊕ распределенное давление
- ⊕ отверстие для осмотра
- ⊕ максимальный комфорт
- ⊕ фиксирующая резинка на силиконовой основе

Elegans

**ЧУЛКИ
АНТИЭМБОЛИЧЕСКИЕ
«ИНТЕКС» «ЭЛЕГАНС»**



**ГОСПИТАЛЬНЫЙ ТРИКОТАЖ
1 пара**

4.1.2. Макет вкладыша потребительской упаковки «коробка» или вкладыша потребительской упаковки «пакет» (оборотная сторона - вариант № 1) МИ:

Чулки медицинские эластичные компрессионные антиэмболические «ИНТЕКС» «ЭЛЕГАНС»

{единый для всех классов компрессии и размеров}

Чулки медицинские эластичные компрессионные антиэмболические «ИНТЕКС» «ЭЛЕГАНС»

Классы компрессии: 1 класс (18-21 мм рт. ст.), 2 класс (22-32 мм рт. ст.), 3 класс (33-46 мм рт. ст.).

Изделие нестерильное для индивидуального использования.

Антиэмболический (госпитальный) трикотаж не предназначен для интенсивного ежедневного использования, его применяют непродолжительный период времени: во время операций и родов, после родов - не более 6 дней, в послеоперационный период - до 2-х недель. Длительность периода использования назначает врач.

Назначение: для предотвращения тромбозов и эмболии во время проведения полостных и местных операций, родов; для проведения компрессионной терапии при лечении заболеваний, связанных с образованием отеков, обусловленных сосудистой патологией нижних конечностей, а также для профилактики образования венозных бляшек и варикозного расширения вен, нормализации кровообращения, и уменьшения болевых ощущений в области нижних конечностей.

Область применения: в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях.

Показания к применению: повышенная свертываемость и вязкость крови, отеки, нарушение кровотока, наличие варикозных узлов на венах и большого количества сосудистых звездочек, болевые ощущения, обострение патологий венозной системы, нахождение в палате интенсивной терапии или в реанимации, во время продолжительного постельного режима (при травмах, после нарушения мозгового кровообращения, после инфарктов, инсультов, в неврологической практике), а также в качестве временной замены обычного компрессионного трикотажа и эластичных компрессионных бинтов.

Противопоказания к применению: хронические облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей (эндартерит, атеросклероз сосудов, синдром Рейно), тяжелые формы диабетической ангиопатии и полинейропатии, трофические язвы не венозного происхождения, септический флебит, декомпенсированная сердечно-легочная недостаточность, острые инфекции мягких тканей, а также индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав изделия.

Меры предосторожности при использовании: перед применением обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Не рекомендуется использовать изделия при наличии экзем, дерматита, псориаза, пролежней, воспалительных заболеваний кожи, а также нарушении чувствительности.

Возможные побочные действия: аллергическая реакция.

Рекомендации по применению: антиэмболический трикотаж следует надевать в положении лежа на спине на чистую и сухую кожу: в день операции с утра (не вставая с кровати), а при естественных родах - при первых схватках. Предварительно следует вывернуть изделие на изнанку, затем собрать в гармошку от верхней части до мыска и плавно натянуть его на ногу, после чего равномерно распределить по всей длине, чтобы не было складок. Для облегчения надевания Изделия можно воспользоваться специальным приспособлением - батлером или глайдером, а также резиновыми или медицинскими перчатками.

Внимание: во избежание повреждений изделий перед надеванием обязательно снимайте кольца и другие украшения, а также тщательно ухаживайте за стопами и аккуратно обрабатывайте ногти.

Не рекомендуется использовать перед надеванием лосьоны и кремы, это снижает липкие свойства силикона, а также тянуть изделия вверх за края резинки чулок и в местах, где находятся швы. Не используйте изделия с повреждениями.

Рекомендации по уходу: ручная стирка с применением жидких моющих средств или детских стиральных порошков при t, не превышающей 30 °C, ручной отжим (в полотенце) без выкручивания и сушка при t 20±5 °C на горизонтальной плоскости в тени вдали от отопительных приборов до эксплуатационного состояния.

Для дезинфекции (при необходимости) в домашних условиях: замачивание в растворе перекиси водорода (3%) при t 50 °C от 80 до 180 минут с последующим полосканием в проточной воде.

Для лечебных учреждений: дезинфекция (при необходимости) химическим методом с помощью дезинфицирующих средств с моющими действиями и/или на основе перекиси водорода.

Перед стиркой/дезинфекцией изделие следует вывернуть наизнанку.

Примечание: Не рекомендуется:

- подвешивать изделие при сушке во избежание потери его формы и компрессионных свойств,
- мочить силиконовую резинку на чулках, её нужно протирать спиртовыми салфетками или тканью, смоченной спиртовым раствором.
- использовать: щелочное мыло, отбеливатели, пятновыводители, растворители и обычные стиральные порошки.

Запрещается: кипятить изделие, стирать и отжимать в стиральной машинке, сушить в сушильной машинке, а также на обогревателе или батарее и гладить при помощи утюга.

Срок хранения: 5 лет с даты изготовления.

Не рекомендуется использовать изделия по истечении срока хранения.

Условия хранения: 1(Л) - в сухом помещении при t от +5 °C до +25 °C, в недоступных для детей местах. Отсутствие воздействия прямых солнечных лучей. Нахождение на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов.

Гарантийный срок эксплуатации с сохранением компрессионных свойств: в течение назначенного врачом непрерывного периода использования, но не более 14 дней (не снимая, в положении лежа или при условии отсутствия активного движения) в пределах срока хранения (при соблюдении рекомендаций по применению и уходу).

Условия утилизации: в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А» или «Б» (при загрязнении кровью или другими биологическими жидкостями). Допускается утилизация использованных изделий вместе с бытовыми отходами. Изделия, загрязненные кровью, следует предварительно упаковать в 2 пакета.

Подбор размера трикотажного изделия. Измерения для подбора размера изделия рекомендуется проводить при минимальной отечности (утром, не вставая с постели). Для измерений нужно использовать мягкую пластиковую или бумажную ленту. При проведении измерений лента не должна перекручиваться.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРА

Наименование параметра	XS	XSew	S	Sew	M	Mew	L	Lew	XL	XLew	XXL	XXLew
Обхват в области голеностопного сустава (b), см	17-19	17-19	19-22	19-22	22-25	22-25	25-28	25-28	28-31	28-31	31-34	31-34
Обхват в области икроножной мышцы (c), см	27-34	27-34	29-37	29-37	34-42	34-42	38-46	38-46	41-51	41-51	46-56	46-56
Обхват в области бедра (g), см	42-48	44-52	44-52	47-60	50-58	58-68	56-64	65-75	60-72	72-85	72-85	78-90
Длина ноги от паха до пятки (a), см	1 рост	68-74										
	2 рост	75-82										
	универсальный	68-82										
Размер стопы	35-38		35-38		37-40		38-41		39-43		41-45	

ew (параметр для широкого бедра)

Примечание: Производитель гарантирует, что изделия будут обеспечивать лечебный эффект для потребителей с параметрами, соответствующими указанным в таблице выше.

Перед применением обязательно ознакомьтесь с рекомендациями.

Состав: эластан, полиамид, силикон.


ТУ 14.31.10-001-46838010-2020 РУ № РЗН 2022/18978 от 30.11.2022 г.

Добровольная сертификация

Производитель: ООО "ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп." **Юридический адрес:** Россия, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 32, стр. 2, этаж 1, пом. 4, комн. 1.

Адрес производства: Россия, 143964, Московская область, г. Реутов, ул. Железнодорожная, д. 5.

Тел.: +7 (495) 528-86-82/528-51-09 www.bint.ru/info@bint.ru

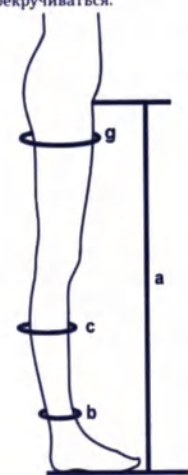

ПРИОБРЕТЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА
НЕ ПОДЛЕЖАТ ВОЗВРАТУ ИЛИ ОБМЕНУ (ПП РФ от 31.12.2020 № 2463).



(упаковка «пакет»)



(упаковка «коробка»)

4.1.3. Макет потребительской упаковки «коробка» или вкладыша потребительской упаковки «пакет» (лицевая сторона – вариант № 2) МИ:

Чулки медицинские эластичные компрессионные антиэмболические «ИНТЕКС» «ЭЛЕГАНС»
{для всех классов компрессии и размеров}



medical line




ИНТЕКС

КОМПРЕССИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ЧУЛКИ АНТИЭМБОЛИЧЕСКИЕ ГОСПИТАЛЬНЫЕ

1 пара

на операцию и роды

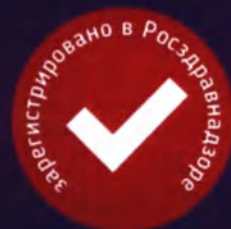

- профилактика тромбоземболии
- распределенное давление
- отверстие на стопе для осмотра
- гладкая фиксирующая резинка на силиконовой основе
- чулки подходят для женщин и мужчин



ПОБЕДИТЕЛЬ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕМИЙ

4.1.4. Макет вкладыша потребительской упаковки «коробка» или вкладыша потребительской упаковки «пакет» (оборотная сторона - вариант № 2) МИ:

Чулки медицинские эластичные компрессионные антиэмболические «ИНТЕКС» «ЭЛЕГАНС»
 {единый для всех классов компрессии и размеров}

Чулки медицинские эластичные компрессионные антиэмболические «ИНТЕКС» «ЭЛЕГАНС»

Классы компрессии: 1 класс (18-21 мм рт. ст.), 2 класс (22-32 мм рт. ст.), 3 класс (33-46 мм рт. ст.).

Изделие нестерильное для индивидуального использования.

Антиэмболический (госпитальный) трикотаж не предназначен для интенсивного ежедневного использования, его применяют непродолжительный период времени: во время операций и родов, после родов - не более 6 дней, и послеоперационный период - до 2-х недель. Длительность периода использования назначает врач.

Назначение: для предотвращения тромбозов и эмболий во время проведения венозных и местных операций, родов; для проведения компрессионной терапии при лечении заболеваний, связанных с образованием отеков, обусловленных сосудистой патологией нижних конечностей, а также для профилактики образования венозных тромбов и варикозного расширения вен, нормализации кровообращения, и уменьшения болевых ощущений в области нижних конечностей.

Область применения: в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях.

Показания к применению: повышенная свертываемость и вязкость крови, отечность, нарушение кровотока, наличие варикозных узлов на венах и большого количества сосудистых звездочек, болевые ощущения, обострение патологий венозной системы, нахождение в палате интенсивной терапии или в реанимации, во время продолжительного постельного режима (при травмах, после нарушения мозгового кровообращения, после инфарктов, инсультов, в неврологической практике), а также в качестве временной замены обычного компрессионного трикотажа и эластичных компрессионных бинтов.

Противопоказания к применению: хронические облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей (эндартерит, атеросклероз сосудов, синдром Рейно), тяжелые формы диабетической ангиопатии и полинейропатии, трофические язвы не венозного происхождения, септический флебит, декомпенсированная сердечно-легочная недостаточность, острые инфекции мягких тканей, а также индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав изделия.

Меры предосторожности при использовании: перед применением обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Не рекомендуется использовать изделия при наличии экзем, дерматита, истрида, пролежней, воспалительных заболеваний кожи, а также нарушении чувствительности.

Возможные побочные действия: аллергическая реакция.

Рекомендации по применению: антиэмболический трикотаж следует надевать в положении лежа на спине на чистую и сухую кожу: в день операции с утра (не вставая с кровати), а при естественных родах - при первых схватках. Предварительно следует вывернуть изделие на изнанку, затем собрать в гармошку от верхней части до мыска и плавно натянуть его на ногу после чего равномерно распределить по всей длине, чтобы не было складок. Для облегчения надевания изделия можно воспользоваться специальным приспособлением - батлером или глайдером, а также резиновыми или медицинскими перчатками.

Внимание: во избежание повреждений изделий перед надеванием обязательно снимайте кольца и другие украшения, а также тщательно ухаживайте за стопами и аккуратно обрабатывайте ногти.

Не рекомендуется использовать перед надеванием лосьоны и кремы, это снижает липкие свойства силикона, а также тянуть изделия вверх за край резинки чулок и в местах, где находится швы. Не используйте изделия с повреждениями.

Рекомендации по уходу: ручная стирка с применением жидких моющих средств или детских стиральных порошков при t, не превышающей 30° С, ручной отжим (в полостенде) без выкручивания и сушка при t 20±5° С на горизонтальной поверхности в тени вдали от отопительных приборов до эксплуатационного состояния.

Для дезинфекции (при необходимости) в домашних условиях: замачивание в растворе перекиси водорода [3%] при t 50 °С от 80 до 180 минут с последующим полосканием в проточной воде.

Для лечебных учреждений: дезинфекция (при необходимости) химическим методом с помощью дезинфицирующих средств с моющими действиями и/или на основе перекиси водорода.

Перед стиркой/дезинфекцией изделие следует вывернуть наизнанку.

Примечание: Не рекомендуется:

- подвешивать изделие при сушке во избежание потери его формы и компрессионных свойств.

- мочить силиконовую резинку на чулках, ее нужно протирать спиртовыми салфетками или тканью, смоченной спиртовым раствором.

Не использовать: щелочное мыло, отбеливатели, пятновыводители, растворители и обычные стиральные порошки.

Запрещается: кипятить изделие, стирать и отжимать в стиральной машинке, сушить в сушильной машинке, а также на обогревателе или батарее и гладить при помощи утюга.

Срок хранения: 5 лет с даты изготовления.

Не рекомендуется использовать изделия по истечении срока хранения.

Условия хранения: (ИЛ) - в сухом помещении при t от +5°С до +25°С, в недоступных для детей местах. Отсутствие воздействия прямых солнечных лучей. Нахождение на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов.

Гарантийный срок эксплуатации с сохранением компрессионных свойств: в течение названного врачом непрерывного периода использования, но не более 14 дней (не снимая, в положении лежа или при условии отсутствия активного движения) в пределах срока хранения (при соблюдении рекомендаций по применению и уходу).

Условия утилизации: в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А» или «Б» (при загрязнении кровью или другими биологическими жидкостями). Допускается утилизация использованных изделий вместе с бытовыми отходами. Изделия, загрязненные кровью, следует предварительно упаковать в 2 пакета.

Подбор размера трикотажного изделия. Измерения для подбора размера изделия рекомендуется проводить при минимальной отечности (утром, не вставая с постели). Для измерений нужно использовать мягкую пластиковую или бумажную ленту. При проведении измерений лента не должна перекручиваться.

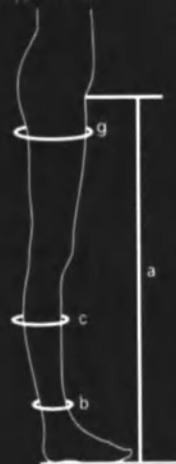


ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРА

Наименование параметра	XS	XSew	S	Sew	M	Mew	L	Lew	XL	XLew	XXL	XXLew
Обхват в области голеностопного сустава (b), см	17-19	17-19	19-22	19-22	22-25	22-25	25-28	25-28	28-31	28-31	31-34	31-34
Обхват в области икроножной мышцы (c), см	27-34	27-34	29-37	29-37	34-42	34-42	38-46	38-46	41-51	41-51	46-56	46-56
Обхват в области бедра (g), см	42-48	44-52	44-52	47-60	50-58	58-68	56-64	65-75	60-72	72-85	72-85	78-90
Длина ноги от паха до пятки (a), см	1 рост											
	2 рост											
Размер стопы	35-38		35-38		37-40		38-41		39-43		41-45	

ew (параметр для широкого бедра)

Примечание: Производитель гарантирует, что изделия будут обеспечивать лечебный эффект для потребителей с параметрами, соответствующими указанным в таблице выше.

Перед применением обязательно ознакомьтесь с рекомендациями.

Состав: эластан, полиамид, силикон.

ТУ 14.31.10-001-46838010-2020 РУ № РЗН 2022/18978 от 30.11.2022 г.

Добровольная сертификация


Производитель: ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ-КОРП.» Юридический адрес: Россия, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая,

д. 32, стр. 2, этаж 1, пом. 4, комн. 1 Адрес производства: Россия, 143964, Московская область, г. Реутов,

ул. Железнодорожная, д. 5. Тел.: +7 (495) 528-86-82/528-51-09 www.bint.ru/info@bint.ru



ПРИБОРЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА НЕ ПОДЛЕЖАТ ВОЗВРАТУ ИЛИ ОБМЕНУ (ПП РФ от 31.12.2020 № 2463).

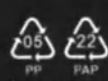

(упаковка «пакет»)



(упаковка «коробка»)

4.1.5. Макет потребительской упаковки «пакет» (лицевая сторона – вариант № 3) МИ:
Чулки медицинские эластичные компрессионные антиэмболические «ИНТЕКС» «ЭЛЕГАНС»
1 класс компрессии {единый для всех размеров}



Чулки

1 класса компрессии
антиэмболические



С ОТВЕРСТИЕМ
ДЛЯ ОСМОТРА
СТОПЫ



ПРАВИЛЬНОЕ
ГРАДУИРОВАННОЕ
ДАВЛЕНИЕ



МАКСИМАЛЬНЫЙ
КОМФОРТ



ПРОФИЛАКТИКА
ТРОМБОЭМБОЛИИ ВО ВРЕМЯ
ОПЕРАЦИЙ И РОДОВ



ГОСПИТАЛЬНЫЙ
ТРИКОТАЖ



ВОЗДУХО-
ПРОНИЦАЕМЫЕ

1
пара

4.1.6. Макет вкладыша потребительской упаковки «пакет» (оборотная сторона - вариант № 3) МИ:
Чулки медицинские эластичные компрессионные антиэмболические «ИНТЕКС» «ЭЛЕГАНС»
1 класс компрессии {единый для всех размеров}



Часть денежных средств от продажи поступает на реализацию гуманитарных программ Российского Красного Креста

Чулки медицинские эластичные компрессионные антиэмболические «ИНТЕКС»
«ЭЛЕГАНС» (1 пара)

- Разработаны с учетом строгих медицинских требований к операционному белью.
- Отводят влагу от кожи, обеспечивают воздухообмен.
- Оказывают правильное градуированное давление.
- 1 класс компрессии (18-21 мм рт.ст.).

Антиэмболический (госпитальный) трикотаж не предназначен для интенсивного ежедневного использования, его применяют непродолжительный период времени: во время операций и родов, после родов – не более 6 дней, в послеоперационный период – до 2 недель. Длительность периода использования назначает врач.

НАЗНАЧЕНИЕ: для предотвращения тромбозов и эмболии во время проведения полостных и местных операций, родов; для проведения компрессионной терапии при лечении заболеваний, связанных с образованием отеков, обусловленных сосудистой патологией нижних конечностей, а также для профилактики образования венозных бляшек и варикозного расширения вен, нормализации кровообращения и уменьшения болевых ощущений в области нижних конечностей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: повышенная свертываемость и вязкость крови, отечность, нарушение кровотока, наличие варикозных узлов на венах и большого количества сосудистых звездочек, болевые ощущения, обострение патологий венозной системы, нахождение в палате интенсивной терапии или в реанимации, во время продолжительного постельного режима (при травмах, после нарушения мозгового кровообращения, после инфарктов, инсультов, в неврологической практике), а также в качестве временной замены обычного компрессионного трикотажа и эластичных компрессионных бинтов.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: хронические облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей (энтертерит, атеросклероз сосудов, синдром Рейно), тяжелые формы диабетической ангиопатии и полинейропатии, трофические язвы не венозного происхождения, септический флебит, декомпенсированная сердечно-легочная недостаточность, острые инфекции мягких тканей, а также индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав изделия.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ: перед применением обязательно проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендуется использовать изделия при наличии экзем, дерматита, псориаза, пролежней, воспалительных заболеваний кожи, а также нарушении чувствительности.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: аллергическая реакция.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: антиэмболический трикотаж следует надевать в положении лежа на спине на чистую и сухую кожу: в день операции с утра (не вставая с кровати), а при естественных родах – при первых схватках. Предварительно следует вывернуть изделие наизнанку, затем собрать в гармошку от верхней части до мыска и плавно натянуть его на ногу, после чего равномерно распределить по всей длине, чтобы не было складок. Для облегчения надевания изделия можно воспользоваться специальным приспособлением – батлером или гайдером, а также резиновыми или медицинскими перчатками. Изделие нестерильное для индивидуального использования.

ВНИМАНИЕ: во избежание повреждений изделия перед надеванием обязательно снимайте кольца и другие украшения, а также тщательно ухаживайте за стопами и аккуратно обрабатывайте ногти. Не рекомендуется использовать перед надеванием лосьоны и кремы, это снижает липкие свойства силикона, а также тянуть изделие вверх за края резинки чулок и в местах, где находятся швы. Не используйте изделия с повреждениями.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ: ручная стирка с применением жидких моющих средств или детских стиральных порошков при t, не превышающей +30 °C, ручной отжим (в полотенце) без выкручивания и сушка при t 20±5 °C на горизонтальной плоскости в тени вдали от отопительных приборов до эксплуатационного состояния. Для дезинфекции (при необходимости) в домашних условиях: замачивание в растворе перекиси водорода (3 %) при t +50 °C от 80 до 180 минут с последующим полосканием в проточной воде. Для лечебных учреждений: дезинфекция (при необходимости) химическим методом с помощью дезинфицирующих средств с моющими действиями и/или на основе перекиси водорода. Перед стиркой/дезинфекцией изделие следует вывернуть наизнанку.

Не рекомендуется:

- подвешивать изделие при сушке во избежание потери его формы и компрессионных свойств,
- мочить силиконовую резинку на чулках, ее нужно протирать спиртовыми салфетками или тканью, смоченной спиртовым раствором.

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ: щелочное мыло, отбеливатели, пятновыводители, растворители и обычные стиральные порошки. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** кипятить изделие, стирать и отжимать в стиральной машинке, сушить в сушильной машинке, а также на обогревателе или батарее, и гладить при помощи утюга. **СРОК ХРАНЕНИЯ:** 5 лет с даты изготовления. Не рекомендуется использовать изделия по истечении срока хранения. **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:** (1/л) – в сухом помещении при t от +5 °C до +25 °C, в недоступных для детей местах. Отсутствие воздействия прямых солнечных лучей. Нахождение на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов. **ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ С СОХРАНЕНИЕМ КОМПРЕССИОННЫХ СВОЙСТВ:** в течение назначенного врачом непрерывного периода использования, но не более 14 дней (не снимая, в положении лежа или при условии отсутствия активного движения) в пределах срока хранения (при соблюдении рекомендаций по применению и уходу). **УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:** в соответствии с СанПиН 2.1.3.684-21 для медицинских отходов класса «А» или «Б» (при загрязнении кровью или другими биологическими жидкостями). Допускается утилизация использованных изделий вместе с бытовыми отходами. Изделия, загрязненные кровью, следует предварительно упаковать в 2 пакета.

ПОДБОР РАЗМЕРА ТРИКОТАЖНОГО ИЗДЕЛИЯ. Измерения для подбора размера изделия рекомендуется проводить при минимальной отечности (утром, не вставая с постели). Для измерений нужно использовать мягкую пластиковую или бумажную ленту. При проведении измерений лента не должна перекручиваться.



НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	XS	XSEW	S	SEW	M	MEW	L	LEW	XL	XLEW	XXL	XXLEW
ОБХВАТ В ОБЛАСТИ ГОЛЕНСТОПНОГО СУСТАВА (В), CM	17-19	17-19	19-22	19-22	22-25	22-25	25-28	25-28	28-31	28-31	31-34	31-34
ОБХВАТ В ОБЛАСТИ ИКРОПОЯСНОЙ ИЛИ ИКРОПОЯСНОЙ (С), CM	27-34	27-34	29-37	29-37	34-42	34-42	38-46	38-46	41-51	41-51	46-56	46-56
ОБХВАТ В ОБЛАСТИ БЕДРА (В), CM	42-48	44-52	44-52	47-60	50-58	58-68	56-64	65-75	60-72	72-85	72-85	78-90
ДЛИНА НОГИ ОТ ПЯТА ДО ПЯТИ (А), CM	1 РОСТ						68-74					
	2 РОСТ						75-82					
	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ						68-82					
РАЗМЕР СТОПЫ	35-38		35-38		37-40		38-41		39-43		41-45	

*EW – размер для широкого бедра.

ПРИМЕЧАНИЕ: производитель гарантирует, что изделия будут обеспечивать лечебный эффект для потребителей с параметрами, соответствующими указанным в таблице. Перед применением обязательно ознакомьтесь с рекомендациями.

СОСТАВ: эластан, полиамид, силикон.

ТУ 14.31.10-001-46838010-2020

РУ № РЗН 2022/18978 от 30.11.22 г. Добровольная сертификация.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ КОРП.»

Юридический адрес: Россия, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 32, стр. 2, этаж 1, пом. 4, комн. 1. Адрес производства: 143964, Московская область, г. Реутов, ул. Железнодорожная, д. 5. Тел.: +7 (495) 528-86-82/528-51-09.

МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА НЕ ПОДЛЕЖАТ ВОЗВРАТУ ИЛИ ОБМЕНУ (Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463).





Чулки

2 класса компрессии
антиэмболические



С ОТВЕРСТИЕМ
ДЛЯ ОСМОТРА
СТОПЫ



ПРАВИЛЬНОЕ
ГРАДУИРОВАННОЕ
ДАВЛЕНИЕ



МАКСИМАЛЬНЫЙ
КОМФОРТ



ПРОФИЛАКТИКА
ТРОМБОЭМБОЛИИ ВО ВРЕМЯ
ОПЕРАЦИЙ И РОДОВ



ГОСПИТАЛЬНЫЙ
ТРИКОТАЖ



ВОЗДУХО-
ПРОНИЦАЕМЫЕ

1
пара

4.1.8. Макет вкладыша потребительской упаковки «пакет» (оборотная сторона - вариант № 3) МИ:
Чулки медицинские эластичные компрессионные антиэмболические «ИНТЕКС» «ЭЛЕГАНС»
2 класс компрессии {единый для всех размеров}



Часть денежных средств от продажи поступит на реализацию гуманитарных программ
Российского Красного Креста.

Чулки медицинские эластичные компрессионные антиэмболические «ИНТЕКС»
«ЭЛЕГАНС» (1 пара)

- Разработаны с учетом строгих медицинских требований к операционному белью.
- Отводят влагу от кожи, обеспечивают воздухообмен.
- Оказывают правильное градуированное давление.
- 2 класс компрессии (22-32 мм рт.ст.).

Антиэмболический (госпитальный) трикотаж не предназначен для интенсивного ежедневного использования, его применяют непродолжительный период времени: во время операций и родов, после родов – не более 6 дней, в послеоперационный период – до 2 недель. Длительность периода использования назначает врач.

НАЗНАЧЕНИЕ: для предотвращения тромбозов эмболических осложнений во время проведения полостных и местных операций, родов; для проведения компрессионной терапии при лечении заболеваний, связанных с образованием отеков, обусловленных сосудистой патологией нижних конечностей, а также для профилактики образования венозных бляшек и варикозного расширения вен, нормализации кровообращения и уменьшения болевых ощущений в области нижних конечностей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: повышенная свертываемость и вязкость крови, отеки, нарушение кровотока, наличие варикозных узлов на венах и большого количества сосудистых звездочек, болевые ощущения, обострение патологий венозной системы, нахождение в палате интенсивной терапии или в реанимации, во время продолжительного постельного режима (при травмах, после нарушения мозгового кровообращения, после инфарктов, инсультов, в неврологической практике), а также в качестве временной замены обычного компрессионного трикотажа и эластичных компрессионных бинтов.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: хронические облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей (энтерит, атеросклероз сосудов, синдром Рейно), тяжелые формы диабетической ангиопатии и полинейропатии, трофические язвы не венозного происхождения, септический флебит, декомпенсированная сердечно-легочная недостаточность, острые инфекции мягких тканей, а также индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав изделия.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ: перед применением обязательно проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендуется использовать изделия при наличии экзем, дерматита, псориаза, пролежней, воспалительных заболеваний кожи, а также нарушении чувствительности.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: аллергическая реакция.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: антиэмболический трикотаж следует надевать в положении лежа на спине на чистую и сухую кожу: в день операции с утра (не вставая с кровати), а при естественных родах – при первых схватках. Предварительно следует вывернуть изделие наизнанку, затем собрать в гармошку от верхней части до мыска и плавно натянуть его на ногу, после чего равномерно распределить по всей длине, чтобы не было складок. Для облегчения надевания изделия можно воспользоваться специальным приспособлением – батлером или глайдером, а также резиновыми или медицинскими перчатками. Изделие нестерильное для индивидуального использования.

ВНИМАНИЕ: во избежание повреждений изделия перед надеванием обязательно снимайте кольца и другие украшения, а также тщательно ухаживайте за стопами и аккуратно обрабатывайте ногти. Не рекомендуется использовать перед надеванием лосьоны и кремы, это снижает липкие свойства силикона, а также тянуть изделие вверх за края резинки чулок и в местах, где находятся швы. Не используйте изделия с повреждениями.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ: ручная стирка с применением жидких моющих средств или детских стиральных порошков при t, не превышающей +30 °C, ручной отжим (в полотенце) без выкручивания и сушка при t 20±5 °C на горизонтальной плоскости в тени вдали от отопительных приборов до эксплуатационного состояния. Для дезинфекции (при необходимости) в домашних условиях: замачивание в растворе перекиси водорода (3 %) при t +50 °C от 80 до 180 минут с последующим полосканием в проточной воде. Для лечебных учреждений: дезинфекция (при необходимости) химическим методом с помощью дезинфицирующих средств с моющими действиями и/или на основе перекиси водорода. Перед стиркой/дезинфекцией изделие следует вывернуть наизнанку.

Не рекомендуется:


- подвешивать изделие при сушке во избежание потери его формы и компрессионных свойств,
- мочить силиконовую резинку на чулках, ее нужно протирать спиртовыми салфетками или тканью, смоченной спиртовым раствором.

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ: щелочное мыло, отбеливатели, пятновыводители, растворители и обычные стиральные порошки. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** кипятить изделие, стирать и отжимать в стиральной машинке, сушить в сушильной машинке, а также на обогревателе или батарее, и гладить при помощи утюга.

СРОК ХРАНЕНИЯ: 5 лет с даты изготовления. Не рекомендуется использовать изделия по истечении срока хранения. **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:** 1(II) – в сухом помещении при t от +5 °C до +25 °C, в недоступных для детей местах. **ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ С СОХРАНЕНИЕМ КОМПРЕССИОННЫХ СВОЙСТВ:** в течение назначенного врачом непрерывного периода использования, но не более 14 дней (не снимая, в положении лежа или при условии отсутствия активного движения) в пределах срока хранения (при соблюдении рекомендаций по применению и уходу). **УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:** в соответствии с СанПиН 2.1.3.684-21 для медицинских отходов класса «А» или «Б» (при загрязнении кровью или другими биологическими жидкостями). Допускается утилизация использованных изделий вместе с бытовыми отходами. Изделия, загрязненные кровью, следует предварительно упаковать в 2 пакета.

ПОДБОР РАЗМЕРА ТРИКОТАЖНОГО ИЗДЕЛИЯ. Измерения для подбора размера изделия рекомендуется проводить при минимальной нагрузке, не вставая с постели). Для измерений нужно использовать мягкую пластиковую или бумажную ленту. При проведении измерений лента должна перекручиваться.

	XS	XSEW	S	SEW	M	MEW	L	LEW	XL	XLEW	XXL	XXLEW
		17-19	19-22	19-22	22-25	22-25	25-28	25-28	28-31	28-31	31-34	31-34
			29-37	29-37	34-42	34-42	38-46	38-46	41-51	41-51	46-56	46-56
			44-52	47-60	50-58	58-68	56-64	65-75	60-72	72-85	72-85	78-90
							68-74					
							75-82					
							68-82					
						37-40	38-41	39-43	41-45			

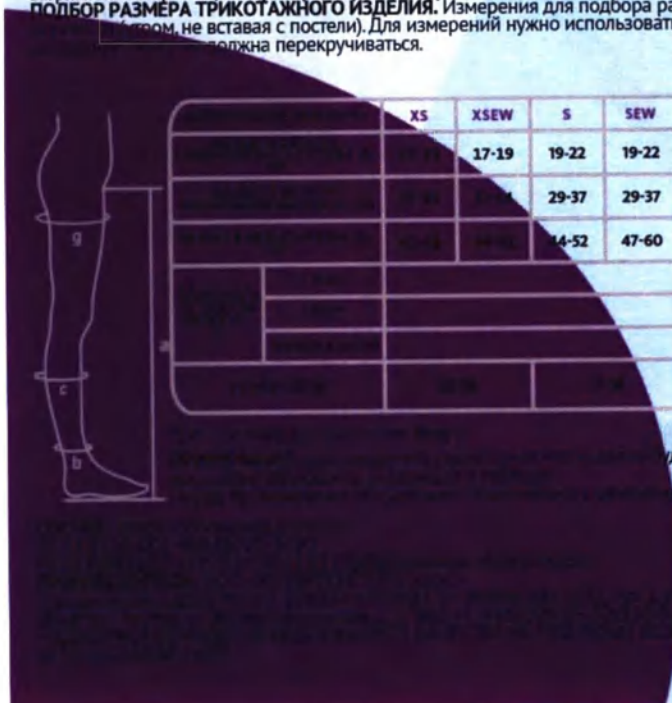


...дут обеспечивать лечебный эффект для потребителей с параметра-
...дациями.



...аж 1, пом. 4, комн. 1. Адрес производства: 143964, Московская
...-09.
...ВРАТУ ИЛИ ОБМЕНУ (Постановление Правительства РФ

4.2.1. Макет потребительской упаковки «коробка» или вкладыша потребительской упаковки «пакет» (лицевая сторона – вариант № 1) МИ:
Гольфы медицинские эластичные компрессионные антиэмболические «ИНТЕКС» «ЭЛЕГАНС»
{для всех классов компрессии и размеров}

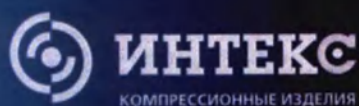

- ⊕ профилактика тромбоэмболии
- ⊕ распределенное давление
- ⊕ отверстие для осмотра
- ⊕ максимальный комфорт

Elegans

**ГОЛЬФЫ
АНТИЭМБОЛИЧЕСКИЕ
«ИНТЕКС» «ЭЛЕГАНС»**



**ГОСПИТАЛЬНЫЙ ТРИКОТАЖ
1 пара**

4.2.2. Макет вкладыша потребительской упаковки «коробка» или вкладыша потребительской упаковки «пакет» (оборотная сторона - вариант № 2) МИ:

Гольфы медицинские эластичные компрессионные антиэмболические «ИНТЕКС» «ЭЛЕГАНС» {единый для всех классов компрессии и размеров}

Гольфы медицинские эластичные компрессионные антиэмболические «ИНТЕКС» «ЭЛЕГАНС»

Классы компрессии: 1 класс (18-21 мм рт. ст.), 2 класс (22-32 мм рт. ст.), 3 класс (33-46 мм рт. ст.).

Изделие нестерильное для индивидуального использования.

Антиэмболический (госпитальный) трикотаж не предназначен для интенсивного ежедневного использования, его применяют непродолжительный период времени: во время операций и родов, после родов - не более 6 дней, в послеоперационный период - до 2-х недель. Длительность периода использования назначает врач.

Назначение: для предотвращения тромбозов нижних конечностей во время проведения полостных и местных операций, родов; для проведения компрессионной терапии при лечении заболеваний, связанных с образованием отеков, обусловленных сосудистой патологией нижних конечностей, а также для профилактики образования венозных бляшек и варикозного расширения вен, нормализации кровообращения, и уменьшения болевых ощущений в области нижних конечностей.

Область применения: в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях.

Показания к применению: повышенная свертываемость и вязкость крови, отечность, нарушение кровотока, наличие варикозных узлов на венах и большого количества сосудистых звездочек, болевые ощущения, обострение патологий венозной системы, нахождение в палате интенсивной терапии или в реанимации, во время продолжительного постельного режима (при травмах, после нарушения мозгового кровообращения, после инфарктов, инсультов, в неврологической практике), а также в качестве временной замены обычного компрессионного трикотажа и эластичных компрессионных бинтов.

Противопоказания к применению: хронические облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей (энтертерит, атеросклероз сосудов, синдром Рейно), тяжелые формы диабетической ангиопатии и полинейропатии, трофические язвы не венозного происхождения, септический флегит, декомпенсированная сердечно-легочная недостаточность, острые инфекции мягких тканей, а также индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав изделия.

Меры предосторожности при использовании: перед применением обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Не рекомендуется использовать изделия при наличии экзем, дерматита, псориаза, пролежней, воспалительных заболеваний кожи, а также нарушении чувствительности.

Возможные побочные действия: аллергическая реакция.

Рекомендации по применению: антиэмболический трикотаж следует надевать в положении лежа на спине на чистую и сухую кожу: в день операции с утра (не вставая с кровати), а при естественных родах - при первых схватках. Предварительно следует вывернуть изделие наизнанку, затем собрать в гармошку от верхней части до мыска и плавно натянуть его на ногу, после чего равномерно распределить по всей длине, чтобы не было складок. Для облегчения надевания изделия можно воспользоваться специальным приспособлением - батлером или глайдером, а также резиновыми или медицинскими перчатками.

Внимание: во избежание повреждений изделий перед надеванием обязательно снимайте кольца и другие украшения, а также тщательно ухаживайте за стопами и аккуратно обрабатывайте ногти.

Не используйте изделия с повреждениями.

Рекомендации по уходу: ручная стирка с применением жидких моющих средств или детских стиральных порошков при t, не превышающей 30 °C, ручной отжим (в полотенце) без выкручивания и сушка при t 20±5 °C на горизонтальной плоскости в тени вдали от отопительных приборов до эксплуатационного состояния.

Для дезинфекции (при необходимости) в домашних условиях: замачивание в растворе перекиси водорода (3%) при t 50 °C от 80 до 180 минут с последующим полосканием в проточной воде.

Для лечебных учреждений: дезинфекция (при необходимости) химическим методом с помощью дезинфицирующих средств с моющими действиями и/или на основе перекиси водорода.

Перед стиркой/дезинфекцией изделие следует вывернуть наизнанку.

Примечание: Не рекомендуется подвешивать изделие при сушке во избежание потери его формы и компрессионных свойств.

Не использовать: щелочное мыло, отбеливатели, пятновыводители, растворители и обычные стиральные порошки.

Запрещается: кипятить изделие, стирать и отжимать в стиральной машинке, сушить в сушильной машинке, а также на обогревателе или батарее и гладить при помощи утюга.

Срок хранения: 5 лет с даты изготовления.

Не рекомендуется использовать изделия по истечении срока хранения.

Условия хранения: 1(Л) - в сухом помещении при t от +5 °C до +25 °C, в недоступных для детей местах. Отсутствие воздействия прямых солнечных лучей. Нахождение на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов.

Гарантийный срок эксплуатации с сохранением компрессионных свойств: в течение назначенного врачом непрерывного периода использования, но не более 14 дней (не снимая, в положении лежа или при условии отсутствия активного движения) в пределах срока хранения (при соблюдении рекомендаций по применению и уходу).

Условия утилизации: в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А» или «Б» (при загрязнении кровью или другими биологическими жидкостями). Допускается утилизация использованных изделий вместе с бытовыми отходами. Изделия, загрязненные кровью, следует предварительно упаковать в 2 пакета.

Подбор размера трикотажного изделия. Измерения для подбора размера изделия рекомендуется проводить при минимальной отечности (утром, не вставая с постели). Для измерений нужно использовать мягкую пластиковую или бумажную ленту. При проведении измерений лента не должна перекручиваться.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРА

Наименование параметра	XS	S	M	L	XL	XXL
b Обхват самой узкой части голени над лодыжками, см	17-19	19-22	22-25	25-28	28-31	31-34
c Обхват самой широкой части голени в области икры, см	27-34	29-37	34-42	38-46	41-51	46-56
Размер стопы (обуви)	35-38	35-38	37-40	38-41	39-43	41-45

Примечание: Производитель гарантирует, что изделия будут обеспечивать лечебный эффект для потребителей с параметрами, соответствующими указанным в таблице выше.

Перед применением обязательно ознакомьтесь с рекомендациями.

Состав: эластан, полиамид.

ТУ 14.31.10-001-46838010-2020

РУ № РЗН 2022/18978 от 30.11.2022 г.


Добровольная сертификация

Производитель: ООО "ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп."

Юридический адрес: Россия, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 32, стр. 2, этаж 1, пом. 4, комн. 1

Адрес производства: Россия, 143964, Московская область, г. Реутов, ул. Железнодорожная, д. 5

Тел.: +7 (495) 528-86-82/528-51-09 www.bint.ru/info@bint.ru

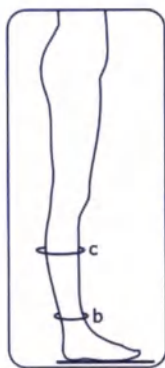

ПРИБОРЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА
НЕ ПОДЛЕЖАТ ВОЗВРАТУ ИЛИ ОБМЕНУ (ПП РФ от 31.12.2020 № 2463).



(упаковка «пакет»)



(упаковка «коробка»)

5. Макеты потребительских упаковок серии «ИНТЕКС» «УНИВЕРСАЛ»

5.1.1. Макет потребительской упаковки «коробка» или вкладыша потребительской упаковки «пакет»
(лицевая сторона – вариант № 1(ж) МИ:

Чулки медицинские эластичные компрессионные антиэмболические «ИНТЕКС» «УНИВЕРСАЛ»,
универсальный размер (S-XL) {единый для всех классов компрессии}

ГОСПИТАЛЬНЫЕ ЧУЛКИ НА ОПЕРАЦИЮ И РОДЫ

ЧУЛКИ
АНТИЭМБОЛИЧЕСКИЕ
“ИНТЕКС”
“УНИВЕРСАЛ”
1 ПАРА



ИНТЕКС

Компрессионные изделия

**1 класс
компрессии**



на операцию



на роды

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ПРОДУКТ

НОВИНКА

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ



**медицинское
изделие**

- ✓ распределенное давление
- ✓ профилактика тромбозов
- ✓ отверстие для осмотра стопы
- ✓ максимальный комфорт

**ЕДИНЫЙ
размер, не требует
индивидуального
подбора**

универсальный размер S~XL

5.1.2. Макет потребительской упаковки «коробка» или вкладыша потребительской упаковки «пакет»
(лицевая сторона – вариант № 1(м) МИ:

Чулки медицинские эластичные компрессионные антиэмболические «ИНТЕКС» «УНИВЕРСАЛ»,
универсальный размер (S-XL) {единый для всех классов компрессии}

ГОСПИТАЛЬНЫЕ ЧУЛКИ НА ОПЕРАЦИЮ

ЧУЛКИ
АНТИЭМБОЛИЧЕСКИЕ
“ИНТЕКС”
“УНИВЕРСАЛ”
1 ПАРА



ИНТЕКС

Компрессионные изделия

**1 класс
компрессии**



на операцию

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ПРОДУКТ

НОВИНКА

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ



**медицинское
изделие**

- ✓ распределенное давление
- ✓ профилактика тромбозов
- ✓ отверстие для осмотра стопы
- ✓ максимальный комфорт

**ЕДИНЫЙ
размер, не требует
индивидуального
подбора**

универсальный размер S~XL

5.1.3. Макет потребительской упаковки «коробка» или вкладыша потребительской упаковки «пакет» (оборотная сторона – вариант № 1) МИ:

Чулки медицинские эластичные компрессионные антиэмболические «ИНТЕКС» «УНИВЕРСАЛ», универсальный размер (S-XL) {единый для всех классов компрессии}

Чулки медицинские эластичные компрессионные антиэмболические «ИНТЕКС» «УНИВЕРСАЛ»

Изделие нестерильное для индивидуального использования.

Класс компрессии: 1 класс (18-21 мм рт. ст.).

Антиэмболический (госпитальный) трикотаж не предназначен для интенсивного ежедневного использования, его применяют непродолжительный период времени: во время операций и родов, после родов – не более 6 дней, в послеоперационный период – до 2-х недель. Длительность периода использования назначает врач.

Назначение: для предотвращения тромбозов нижних конечностей во время проведения полостных и местных операций, родов; для проведения компрессионной терапии при лечении заболеваний, связанных с образованием отеков, обусловленных сосудистой патологией нижних конечностей, а также для профилактики образования венозных бляшек и варикозного расширения вен, нормализации кровообращения, и уменьшения болевых ощущений в области нижних конечностей.

Область применения: в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях.

Показания к применению: повышенная свертываемость и вязкость крови, отечность, нарушение кровотока, наличие варикозных узлов на венах и большого количества сосудистых звездочек, болевые ощущения, обострение патологий венозной системы, нахождение в палате интенсивной терапии или в реанимации, во время продолжительного постельного режима (при травмах, после нарушения мозгового кровообращения, после инфарктов, инсультов, в неврологической практике), а также в качестве временной замены обычного компрессионного трикотажа и эластичных компрессионных бинтов.

Противопоказания к применению: хронические облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей (энтертерит, атеросклероз сосудов, синдром Рейно), тяжелые формы диабетической ангиопатии и полинейропатии, трофические язвы не венозного происхождения, септический флебит, декомпенсированная сердечно-легочная недостаточность, острые инфекции мягких тканей, а также индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав изделия.

Меры предосторожности при использовании: перед применением обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Не рекомендуется использовать изделия при наличии экзем, дерматита, псориаза, пролежней, воспалительных заболеваний кожи, а также нарушении чувствительности.

Возможные побочные действия: аллергическая реакция.

Рекомендации по применению: антиэмболический трикотаж следует надевать в положении лежа на спине на чистую и сухую кожу: в день операции с утра (не вставая с кровати), а при естественных родах – при первых схватках. Предварительно следует вывернуть изделие наизнанку, затем собрать в гармошку от верхней части до мыска и плавно натянуть его на ногу, после чего равномерно распределить по всей длине, чтобы не было складок. Для облегчения надевания изделия можно воспользоваться специальным приспособлением – батлером или глайдером, а также резиновыми или медицинскими перчатками.

Внимание: во избежание повреждений изделий перед надеванием обязательно снимайте кольца и другие украшения, а также тщательно ухаживайте за стопами и аккуратно обрабатывайте ногти.

Не рекомендуется использовать перед надеванием лосьоны и кремы, это снижает липкие свойства силикона, а также тянуть изделия вверх за края резинки чулок в местах, где находятся швы. Не использовать изделия с повреждениями.

Рекомендации по уходу: ручная стирка с применением жидких моющих средств или детских стиральных порошков при t, не превышающей 30 °C, ручной отжим (в полотенце) без выкручивания и сушка при t 20±5 °C на горизонтальной плоскости в тени вдали от отопительных приборов до эксплуатационного состояния.

Для дезинфекции (при необходимости) в домашних условиях: замачивание в растворе перекиси водорода (3%) при t 50 °C от 80 до 180 минут с последующим полосканием в проточной воде.

Для лечебных учреждений: дезинфекция (при необходимости) химическим методом с помощью дезинфицирующих средств с моющими действиями и/или на основе перекиси водорода.

Перед стиркой/дезинфекцией изделие следует вывернуть наизнанку.

Примечание: Не рекомендуется:

- подвешивать изделие при сушке во избежание потери его формы и компрессионных свойств;

- мочить силиконовую резинку на чулках, её нужно протирать спиртовыми салфетками или тканью, смоченной спиртовым раствором.

Не использовать: щелочное мыло, отбеливатели, пятновыводители, растворители и обычные стиральные порошки.

Запрещается: кипятить изделие, стирать и отжимать в стиральной машинке, сушить в сушильной машинке, а также на обогревателе или батарее и гладить при помощи утюга.

Срок хранения: 5 лет с даты изготовления.

Не рекомендуется использовать изделия по истечении срока хранения.


Условия хранения: 1(Л) - в сухом помещении при t от +5 °C до +25 °C, в недоступных для детей местах. Отсутствие воздействия прямых солнечных лучей. Нахождение на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов.

Гарантийный срок эксплуатации с сохранением компрессионных свойств: в течение назначенного врачом непрерывного периода использования, но не более 14 дней (не снимая, в положении лёжа или при условии отсутствия активного движения) в пределах срока хранения (при соблюдении рекомендаций по применению и уходу).

Условия утилизации: в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А» или «Б» (при загрязнении кровью или другими биологическими жидкостями). Допускается утилизация использованных изделий вместе с бытовыми отходами. Изделия, загрязнённые кровью, следует предварительно упаковать в 2 пакета.

Подбор размера трикотажного изделия. Измерения для подбора размера изделия рекомендуется проводить при минимальной отечности (утром, не вставая с постели). Для измерений нужно использовать мягкую пластиковую или бумажную ленту. При проведении измерений лента не должна перекручиваться.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРА

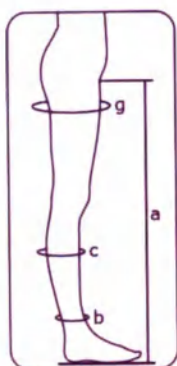


Наименование параметра	Размер
	универсальный (S-XL)
Обхват в области голеностопного сустава (b), см	19-31
Обхват в области икроножной мышцы (c), см	29-51
Обхват в области бедра (g), см	44-72
Длина ноги от паха до пятки (a), см	68-86
Размер стопы	36-44

Примечание: Производитель гарантирует, что изделия будут обеспечивать лечебный эффект для потребителей с параметрами, соответствующими указанным в таблице выше.

Перед применением обязательно ознакомьтесь с рекомендациями.

Состав: эластан, полиамид, силикон.
ТУ 14.31.10-001-46838010-2020
РУ № РЗН 2022/18978 от 30.11.2022
Добровольная сертификация

Производитель:
ООО "ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп."
Юридический адрес: Россия, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 32, стр. 2, этаж 1, пом. 4, комн. 1
Адрес производства: Россия, 143964, Московская область, г. Реутов, ул. Железнодорожная, д. 5
Тел.: +7 (495) 528-86-82/528-51-09
www.bint.ru/info@bint.ru

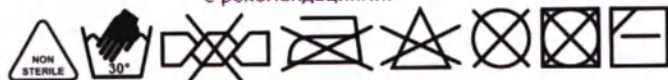

ПРИБОРЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА
НЕ ПОДЛЕЖАТ ВОЗВРАТУ ИЛИ ОБМЕНУ (ПП РФ от 31.12.2020 № 2463).



(упаковка «пакет»)



(упаковка «коробка»)

5.2.1. Макет потребительской упаковки «коробка» или вкладыша потребительской упаковки «пакет»
(лицевая сторона – вариант № 1) МИ:

Гольфы медицинские эластичные компрессионные антиэмболические «ИНТЕКС» «УНИВЕРСАЛ»,
универсальный размер (S-XL) {единый для всех классов компрессии}

ГОСПИТАЛЬНЫЕ ГОЛЬФЫ НА ОПЕРАЦИЮ

ГОЛЬФЫ
АНТИЭМБОЛИЧЕСКИЕ
“ИНТЕКС”
“УНИВЕРСАЛ”
1 ПАРА



ИНТЕКС

Компрессионные изделия

**1 класс
компрессии**



на операцию

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ПРОДУКТ

НОВИНКА

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ



**Медицинское
изделие**

- ✓ распределенное давление
- ✓ профилактика тромбозов
- ✓ отверстие для осмотра стопы
- ✓ максимальный комфорт

**ЕДИНЫЙ
размер, не требует
индивидуального
подбора**

универсальный размер S~XL

5.2.2. Макет потребительской упаковки «коробка» или вкладыша потребительской упаковки «пакет» (оборотная сторона – вариант № 1) МИ:

Гольфы медицинские эластичные компрессионные антиэмболические «ИНТЕКС» «УНИВЕРСАЛ», универсальный размер (S-XL) {единый для всех классов компрессии}

Гольфы медицинские эластичные компрессионные антиэмболические «ИНТЕКС» «УНИВЕРСАЛ»

Изделие нестерильное для индивидуального использования.

Классы компрессии: 1 класс (18-21 мм рт. ст.)

Антиэмболический (госпитальный) трикотаж не предназначен для интенсивного ежедневного использования, его применяют непродолжительный период времени: во время операций и родов, после родов - не более 6 дней, в послеоперационный период - до 2-х недель. Длительность периода использования назначает врач.

Назначение: для предотвращения тромбозов нижних конечностей во время проведения полостных и местных операций, родов; для проведения компрессионной терапии при лечении заболеваний, связанных с образованием отеков, обусловленных сосудистой патологией нижних конечностей, а также для профилактики образования венозных бляшек и варикозного расширения вен, нормализации кровообращения, и уменьшения болевых ощущений в области нижних конечностей.

Область применения: в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях.

Показания к применению: повышенная свертываемость и вязкость крови, отечность, нарушение кровотока, наличие варикозных узлов на венах и большого количества сосудистых звездочек, болевые ощущения, обострение патологий венозной системы, нахождение в палате интенсивной терапии или в реанимации, во время продолжительного постельного режима (при травмах, после нарушения мозгового кровообращения, после инфарктов, инсультов, в неврологической практике), а также в качестве временной замены обычного компрессионного трикотажа и эластичных компрессионных бинтов.

Противопоказания к применению: хронические облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей (энтертерит, атеросклероз сосудов, синдром Рейно), тяжелые формы диабетической ангиопатии и полинейропатии, трофические язвы не венозного происхождения, септический флебит, декомпенсированная сердечно-легочная недостаточность, острые инфекции мягких тканей, а также индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав изделия.

Меры предосторожности при использовании: перед применением обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Не рекомендуется использовать изделия при наличии экзем, дерматита, псориаза, пролежней, воспалительных заболеваний кожи а также нарушении чувствительности.

Возможные побочные действия: аллергическая реакция.

Рекомендации по применению: антиэмболический трикотаж следует надевать в положении лежа на спине на чистую и сухую кожу: в день операции с утра (не вставая с кровати), а при естественных родах - при первых схватках. Предварительно следует вывернуть изделие на изнанку, затем собрать в гармошку от верхней части до мыска и плавно натянуть его на ногу, после чего равномерно распределить по всей длине, чтобы не было складок. Для облегчения надевания Изделия можно воспользоваться специальным приспособлением - батлером или глайдером, а также резиновыми или медицинскими перчатками.

Внимание: во избежание повреждений изделий перед надеванием обязательно снимайте кольца и другие украшения, а также тщательно ухаживайте за стопами и аккуратно обрабатывайте ногти.

Не рекомендуется тянуть изделия в местах, где находятся швы. Не используйте изделия с повреждениями.

Рекомендации по уходу: ручная стирка с применением жидких моющих средств или детских стиральных порошков при t, не превышающей 30 °С, ручной отжим (в полотенце) без выкручивания и сушка при t 20±5° С на горизонтальной плоскости в тени вдали от отопительных приборов до эксплуатационного состояния.

Для дезинфекции (при необходимости) в домашних условиях: замачивание в растворе перекиси водорода (3%) при t 50° С от 80 до 180 минут с последующим полосканием в проточной воде.

Для лечебных учреждений: дезинфекция (при необходимости) химическим методом с помощью дезинфицирующих средств с моющими действиями и/или на основе перекиси водорода.

Перед стиркой/дезинфекцией изделие следует вывернуть наизнанку.

Примечание: Не рекомендуется подвешивать изделие при сушке во избежание потери его формы и компрессионных свойств.

Не использовать: щелочное мыло, отбеливатели, пятновыводители, растворители и обычные стиральные порошки.

Запрещается: кипятить изделие, стирать и отжимать в стиральной машинке, сушить в сушильной машинке, а также на обогревателе или батарее и гладить при помощи утюга.

Срок хранения: 5 лет с даты изготовления.

Не рекомендуется использовать изделия по истечении срока хранения.

Условия хранения: 1(Л) - в сухом помещении при t от +5°С до +25°С, в недоступных для детей местах. Отсутствие воздействия прямых солнечных лучей. Нахождение на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов.

Гарантийный срок эксплуатации с сохранением компрессионных свойств: в течение назначенного врачом непрерывного периода использования, но не более 14 дней (не снимая, в положении лёжа или при условии отсутствия активного движения) в пределах срока хранения (при соблюдении рекомендаций по применению и уходу).

Условия утилизации: в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А» или «Б» (при загрязнении крови или другими биологическими жидкостями). Допускается утилизация использованных изделий вместе с бытовыми отходами. Изделия загрязнённые кровью, следует предварительно упаковать в 2 пакета.

Подбор размера трикотажного изделия. Измерения для подбора размера изделия рекомендуется проводить при минимальной отечности (утром, не вставая с постели). Для измерений нужно использовать мягкую пластиковую или бумажную ленту. При проведении измерений лента не должна перекручиваться.

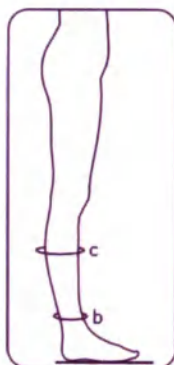


ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРА

Наименование параметра	Размер универсальный (S-XL)
b обхват самой узкой части голени над лодыжками, см.	19-31
c обхват самой широкой части голени в области икры, см.	29-51
размер стопы (обуви)	36-44

Примечание: производитель гарантирует, что изделия будут обеспечивать лечебный эффект для потребителей с параметрами, соответствующими указанным в таблице выше.

Перед применением обязательно ознакомьтесь с рекомендациями.

Состав: эластан, полиамид.

ТУ 14.31.10-001-46838010-2020

РУ № РЗН 2022/18978 от 30.11.2022

Добровольная сертификация

Производитель:

ООО "ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп."

Юридический адрес: Россия, 101000,

г. Москва, ул. Мясницкая, д. 32,

стр. 2, этаж 1, пом. 4, комн. 1

Адрес производства: Россия, 143964,

Московская область, г. Реутов,

ул. Железнодорожная, д. 5

Тел.: +7 (495) 528-86-82/528-51-09

www.bint.ru/info@bint.ru



(упаковка «пакет»)



(упаковка «коробка»)

МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА НЕ ПОДЛЕЖАТ ВОЗВРАТУ ИЛИ ОБМЕНУ (ПП РФ от 31.12.2020 № 2463).

6. Транспортная упаковка


6.1. Общий вид транспортной упаковки на примере МИ:

Гольфы медицинские эластичные компрессионные антиэмболические «ИНТЕКС» «УНИВЕРСАЛ»



6.2. Общий вид маркировки транспортной упаковки на примере МИ:

Гольфы медицинские эластичные компрессионные антиэмболические «ИНТЕКС» «УНИВЕРСАЛ»

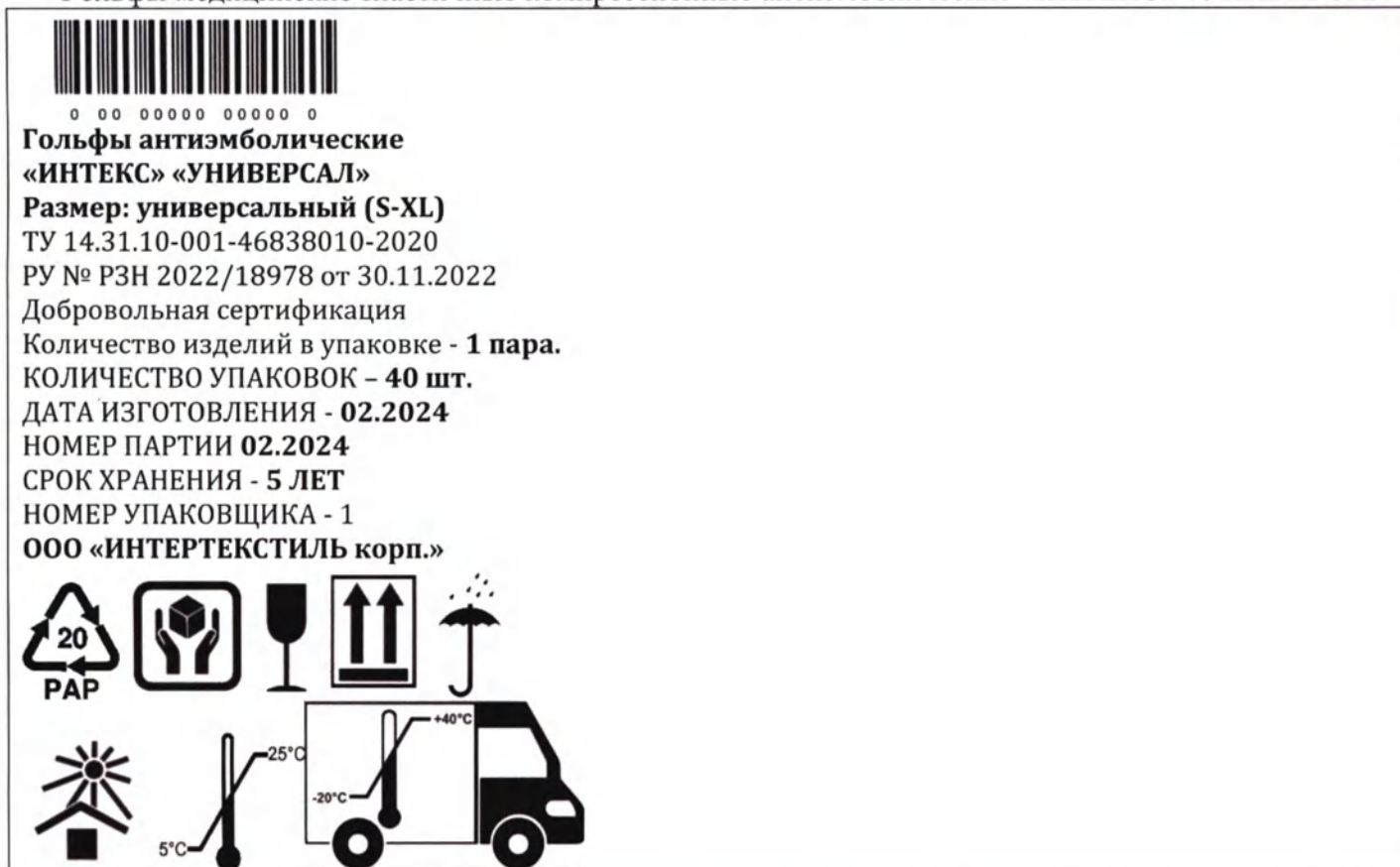

5

Прошито и скреплено печатью
29/04/2018 г. 12:45 лист 06
Директор
ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп.»
Балашов О.Е.





ИНТЕКС

КОМПРЕССИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ИНТЕКС
Elegans

- ⊕ профилактика тромбозов
- ⊕ распределенное давление
- ⊕ отверстие для осмотра
- ⊕ максимальный комфорт
- ⊕ фиксирующая резинка на силиконовой основе

ЧУЛКИ

**АНТИЭМБОЛИЧЕСКИЕ
«ИНТЕКС» «ЭЛЕГАНС»**



**ГОСПИТАЛЬНЫЙ ТРИКОТАЖ
1 пара**

Чулки медицинские эластичные компрессионные антиэмболические «ИНТЕКС» «ЗЛЕГАН»

Классы компрессии: 1 класс (18-21 мм рт.ст.), 2 класс (22-32 мм рт.ст.), 3 класс (33-46 мм рт.ст.).

Издаются нестерильные для индивидуального использования.

Антиэмболический (госпитальный) трикотаж не предназначен для интенсивного ежедневного использования, его применяют непродолжительный период времени: во время операций и родов, после родов – не более 6 дней, в послеоперационный период – до 2-х недель. Длительность периода использования назначает врач.

Назначение: для предотвращения тромбоэмболических осложнений во время проведения полостных и местных операций, родов; для проведения компрессионной терапии при лечении заболеваний, связанных с образованием отеков, обусловленных сосудистой патологией нижних конечностей, а также для профилактики образования венозных тромбов и варикозного расширения вен, нормализации кровообращения, и уменьшения болевых ощущений в области нижних конечностей.

Область применения: в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях.

Показания к применению: повышенная свертываемость и вязкость крови, отечность, нарушение кровотока, наличие варикозных узлов на венах и большого количества сосудистых звездочек, болевые ощущения, обострение патологии венозной системы, изжожение в области интенсивной терапии или в реанимации, во время продолжительного постельного режима (при травмах, после нарушения мозгового кровообращения, после инфарктов, инсультов, в неврологической практике), а также в качестве временной замены обычного компрессионного трикотажа и эластичных компрессионных бинтов.

Противопоказания к применению: хронические обliterирующие заболевания артерий нижних конечностей (ангиортеросклероз, атеросклероз сосудов, синдром Рейно), тяжелые формы диабетической ангиопатии и полинейропатии, трофические язвы на венозного происхождения, септический флебит, декомпенсированная сердечно-легочная недостаточность, острые инфекции мягких тканей, а также индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав изделия.

Меры предосторожности при использовании: перед применением обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Не рекомендуется использовать изделия при наличии экзем, дерматита, псориаза, пролежней, воспалительных заболеваний кожи, а также нарушении чувствительности.

Возможные побочные действия: аллергическая реакция.

Рекомендации по применению: антиэмболический трикотаж следует надевать в положении лежа на спине на чистую и сухую кожу: в день операции с утра (не вставая с кровати), а при естественных родах – при первых схватках. Предварительно следует высушить изделие на изнанку, затем собрать и гармошкой от верхней части до мыска и плавно натянуть его на ногу, после чего равномерно распределить по всей длине, чтобы не было складок. Для облегчения надевания изделия можно воспользоваться специальным приспособлением – батлером или глайдером, а также резиновыми или медицинскими перчатками.

Внимание: во избежание повреждения изделия перед надеванием обязательно снимайте колды и другие украшения, а также тщательно ухаживайте за стопами и аккуратно обрабатывайте ногти.

Не рекомендуется использовать перед надеванием лосыны и кремы, это снижает эластичность силикона, а также тянуть изделие вверх за край резинки чулок и в местах, где находится шов. Не используйте изделия с повреждениями.

Рекомендации по уходу: ручная стирка с применением жидких моющих средств или детских стиральных порошков при t, не превышающей 30 °C, ручной отжим (в вольте) без выкручивания и сушка при t 20-25 °C на горизонтальной плоскости в тени вдали от отопительных приборов до эксплуатационного состояния.

Для дезинфекции (при необходимости) в домашних условиях: замачивание в растворе перекиси водорода (3%) при t 50 °C от 80 до 180 минут.

с последующим полосканием в проточной воде.

Для лечебных учреждений: дезинфекция (при необходимости) химическим методом с помощью дезинфицирующих средств с моющими действиями и/или на основе перекиси водорода.

Перед стиркой/дезинфекцией изделие следует вывернуть наизнанку.

Примечание: Не рекомендуется:

- подшивать изделие при сужие во избежание потери его формы и компрессионных свойств,
- мочить силиконовую резинку на чулок, ее нужно протереть спиртовыми салфетками или тканью, смоченной спиртовым раствором.

Не использовать: целлофановое мыло, отбеливатели, пятновыводители, растворители и обычные стиральные порошки.

Запрещается: кипятить изделие, стирать и отжимать в стиральной машинке, сушить в сушильной машинке, а также на обогревателе или батарее и гладить при помощи утюга.

Срок хранения: 5 лет с даты изготовления.

Не рекомендуется использовать изделия по истечении срока хранения.

Условия хранения: 1 (Л) - в сухом помещении при t от +5 °C до +25 °C, в недоступных для детей местах. Отсутствие воздействия прямых солнечных лучей. Нахождение на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов.

Гарантийный срок эксплуатации с сохранением компрессионных свойств: в течение назначенного врачом непрерывного периода использования, но не более 14 дней (не символ, в положении лежа или при условии отсутствия активного движения) в пределах срока хранения (при соблюдении рекомендаций по применению и уходу).

Условия утилизации: в соответствии с СанПиН 2.1.3.684-21 для медицинских отходов класса «А» или «Б» (при загрязнении кровью или другими биологическими жидкостями). Допускается утилизация использованных изделий вместе с бытовыми отходами. Изделия, загрязненные кровью, следует предварительно унаковать в 2 пакета.

Подбор размера трикотажного изделия. Измерения для подбора размера изделия рекомендуется проводить при минимальной отечности (утром, не вставая с постели). Для измерений нужно использовать мягкую пластиковую или бумажную ленту. При проведении измерений лента не должна перекручиваться.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРА

Наименование параметра	XS	XSeW	S	Sew	M	Mew	L	Lew	XL	XLew	XXL	XXLew
Обхват в области голеностопного сустава (b), см	17-19	17-19	19-22	19-22	22-25	22-25	25-28	25-28	28-31	28-31	31-34	31-34
Обхват в области икроножной мышцы (c), см	27-34	27-34	29-37	29-37	34-42	34-42	38-46	38-46	41-51	41-51	46-56	46-56
Обхват в области бедра (g), см	42-48	44-52	44-52	47-60	50-58	58-68	56-64	65-75	60-72	72-85	72-85	78-90
Длина ноги от паха до пятки (a), см	1 рост						68-74					
	2 рост						75-82					
	универсальная						68-82					
Размер стопы	35-38		35-38		37-40		38-41		39-43		41-45	

ew (параметр для широкого бедра)

Примечание: Производитель гарантирует, что изделия будут обеспечивать лечебный эффект для потребителей с параметрами, соответствующими указанным в таблице выше.

Перед применением обязательно ознакомьтесь с рекомендациями.

Состав: эластан, полиамид, силикон.


ТУ 14.31.10-001-46838010-2020 РУ № РЗН 2022/18978 от 30.11.2022 г.

Добровольная сертификация

Производитель: ООО "ИНТЕРЕКСТИЛЪ Корп." Юридический адрес: Россия, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 32, стр. 2, этаж 1, пом. 4, комн. 1.

Адрес: Россия, 143964, Московская область, г. Реутов, ул. Железнодорожная, д. 5.

Тел.: +7 (495) 528-86-82/528-51-09 www.bint.ru/info@bint.ru

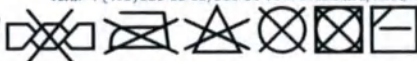

(упаковка «пакет»)