

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп.»



О.Е. Балашов

«07» сентября 2022 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению медицинского изделия

**ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ КОМПРЕССИОННЫЕ
АНТИЭМБОЛИЧЕСКИЕ
по ТУ 14.31.10–001–46838010–2020**

2022

1. Наименование медицинского изделия.

Изделия медицинские эластичные компрессионные антиэмболические, в вариантах исполнения:

- Чулки медицинские эластичные компрессионные антиэмболические «ИНТЕКС» (I, II или III класса компрессии, 1, 2 или универсального роста; следующих размеров: XS, XSew, S, Sew, M, Mew, L, Lew, XL, XLew, XXL, XXLew (ew – для широких бёдер);
- Чулки медицинские эластичные компрессионные антиэмболические «ИНТЕКС» «ЭЛЕГАНС» (I, II или III класса компрессии, 1, 2 или универсального роста; следующих размеров: XS, XSew, S, Sew, M, Mew, L, Lew, XL, XLew, XXL, XXLew (ew – для широких бёдер);
- Гольфы медицинские эластичные компрессионные антиэмболические «ИНТЕКС» «ЭЛЕГАНС» (I, II или III класса компрессии, следующих размеров: XS, S, M, L, XL, XXL);
- Чулки медицинские эластичные компрессионные антиэмболические «ИНТЕКС» «УНИВЕРСАЛ» (I класса компрессии, универсального размера (S-XL);
- Гольфы медицинские эластичные компрессионные антиэмболические «ИНТЕКС» «УНИВЕРСАЛ» (I класса компрессии, универсального размера (S-XL).

2. Назначение.

Для предотвращения тромбоэмболических осложнений во время проведения полостных и местных операций, родов; для проведения компрессионной терапии при лечении заболеваний, связанных с образованием отёков, обусловленных сосудистой патологией нижних конечностей, а также для профилактики образования венозных бляшек и варикозного расширения вен, нормализации кровообращения, и уменьшения болевых ощущений в области нижних конечностей.

3. Показания к применению медицинского изделия.

Повышенная свёртываемость и вязкость крови, отёчность, нарушение кровотока, наличие варикозных узлов на венах и большого количества сосудистых звёздочек, болевые ощущения, обострение патологий венозной системы, нахождение в палате интенсивной терапии или в реанимации, во время продолжительного постельного режима (при травмах, после нарушения мозгового кровообращения, после инфарктов, инсультов, в неврологической практике), а также в качестве временной замены обычного компрессионного трикотажа и эластичных компрессионных бинтов.

4. Противопоказания к применению медицинского изделия.

Хронические облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей (энтертериит, атеросклероз сосудов, синдром Рейно), тяжёлые формы диабетической ангиопатии и полинейропатии, трофические язвы не венозного происхождения, септический флебит, декомпенсированная сердечно-лёгочная недостаточность, острые инфекции мягких тканей, а также индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав изделия.

5. Меры предосторожности при применении медицинского изделия.

Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Не рекомендуется использовать изделия при наличии экзем, дерматита, псориаза, пролежней, воспалительных заболеваний кожи, а также при нарушении чувствительности.

6. Возможные побочные действия при использовании медицинского изделия.

Аллергическая реакция.

7. Область применения.

В лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях.

8. Конструкция.

Изделия имеют контурную форму, соответствующую анатомической конфигурации нижних конечностей, а также вырез в области стопы для осмотра. Чулки имеют резинку с силиконовым покрытием.

9. Сведения о возможном влиянии использования медицинского изделия на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Исследования о возможном влиянии Изделий на способность управлять транспортными средствами, механизмами не проводилось, так как изделия не предназначены для повседневного использования.

10. Срок хранения и указание на запрет использования медицинского изделия по истечении срока хранения.

Срок хранения – 5 лет с даты изготовления, при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных ТУ 14.31.10-001-46838010-2020. Не рекомендуется использовать медицинское изделие по истечении срока хранения.

11. Условия хранения и транспортирования.

Условия хранения: 1(Л) - в сухом помещении при t от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$, в недоступных для детей местах. Отсутствие воздействия прямых солнечных лучей. Нахождение на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов.

Условия транспортирования: по условиям хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150 при t от -20°C до $+40^{\circ}\text{C}$, в крытых транспортных средствах всех видов в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида. После транспортирования в условиях отрицательных температур изделия в транспортной упаковке должны быть выдержаны при нормальных климатических условиях не менее 4 часов.

12. Варианты комплектации медицинского изделия.

- изделие одного варианта исполнения, класса компрессии, размера и роста (при наличии) – 1 пара или 1 штука;
- потребительская упаковка с маркировкой;
- инструкция по применению для потребителя (нанесена на упаковку или вложена внутрь) - 1 штука.

13. Основные параметры, технические характеристики и общие схемы изделий.

Размеры изделий должны определяться обхватом различных областей нижних конечностей и соответствовать основным параметрам типовых фигур, указанным в таблицах 1-5. Схемы измерения параметров для подбора размера Изделий» представлены ниже.

Таблица 1 - Чулки антиэмболические «ИНТЕКС» 1, 2 или универсального роста, следующих размеров: XS, XSew, S, Sew, M, Mew, L, Lew, XL, XLew, XXL, XXLew (ew – для широких бёдер).

Параметры (условное обозначение)							
Размеры	обхват в области голеностопного сустава (b), см.	обхват в области икроножной мышцы (c), см.	обхват в области бедра (g), см.	длина ноги от паха до пятки (a), см.			размер стопы
				1 рост	2 рост	Универсальный	
XS	17,0 – 19,0	27,0 – 34,0	42,0 – 48,0	68,0-76,0	77,0-86,0	68,0-86,0	35 – 40
X _{SEW}	17,0 – 19,0	27,0 – 34,0	44,0 – 52,0	68,0-76,0	77,0-86,0	68,0-86,0	35 – 40
S	19,0 – 22,0	29,0 – 37,0	44,0 – 52,0	68,0-76,0	77,0-86,0	68,0-86,0	35 – 40
S _{EW}	19,0 – 22,0	29,0 – 37,0	47,0 – 60,0	68,0-76,0	77,0-86,0	68,0-86,0	35 – 40
M	22,0 – 25,0	34,0 – 42,0	50,0 – 58,0	68,0-76,0	77,0-86,0	68,0-86,0	37 – 42
M _{EW}	22,0 – 25,0	34,0 – 42,0	58,0 – 68,0	68,0-76,0	77,0-86,0	68,0-86,0	37 – 42
L	25,0 – 28,0	38,0 – 46,0	56,0 – 64,0	68,0-76,0	77,0-86,0	68,0-86,0	38 – 44
L _{EW}	25,0 – 28,0	38,0 – 46,0	65,0 – 75,0	68,0-76,0	77,0-86,0	68,0-86,0	38 – 44
XL	28,0 – 31,0	41,0 – 51,0	60,0 – 72,0	68,0-76,0	77,0-86,0	68,0-86,0	39 – 46
XL _{EW}	28,0 – 31,0	41,0 – 51,0	72,0 – 85,0	68,0-76,0	77,0-86,0	68,0-86,0	39 – 46
XXL	31,0 – 34,0	46,0 – 56,0	72,0 – 85,0	68,0-76,0	77,0-86,0	68,0-86,0	39 – 46
XXL _{EW}	31,0 – 34,0	46,0 – 56,0	78,0 – 90,0	68,0-76,0	77,0-86,0	68,0-86,0	39 – 46

Таблица 2 - Чулки антиэмболические «ИНТЕКС» «ЭЛЕГАНС» 1, 2 или универсального роста, следующих размеров: XS, XSew, S, Sew, M, Mew, L, Lew, XL, XLew, XXL, XXLew (ew – для широких бёдер).

Размеры	Параметры (условное обозначение)						размер стопы
	обхват в области голеностопного сустава (b), см.	обхват в области икроножной мышцы (c), см.	обхват в области бедра (g), см.	длина ноги от паха до пятки (a), см.			
				1 рост	2 рост	Универсальный	
XS	17,0 – 19,0	27,0 – 34,0	42,0 – 48,0	68,0-74,0	75,0-82,0	68,0-82,0	35 – 40
XSEW	17,0 – 19,0	27,0 – 34,0	44,0 – 52,0	68,0-74,0	75,0-82,0	68,0-82,0	35 – 40
S	19,0 – 22,0	29,0 – 37,0	44,0 – 52,0	68,0-74,0	75,0-82,0	68,0-82,0	35 – 38
SEW	19,0 – 22,0	29,0 – 37,0	47,0 – 60,0	68,0-74,0	75,0-82,0	68,0-82,0	35 – 38
M	22,0 – 25,0	34,0 – 42,0	50,0 – 58,0	68,0-74,0	75,0-82,0	68,0-82,0	37 – 40
MEW	22,0 – 25,0	34,0 – 42,0	58,0 – 68,0	68,0-74,0	75,0-82,0	68,0-82,0	37 – 40
L	25,0 – 28,0	38,0 – 46,0	56,0 – 64,0	68,0-74,0	75,0-82,0	68,0-82,0	38 – 41
LEW	25,0 – 28,0	38,0 – 46,0	65,0 – 75,0	68,0-74,0	75,0-82,0	68,0-82,0	38 – 41
XL	28,0 – 31,0	41,0 – 51,0	60,0 – 72,0	68,0-74,0	75,0-82,0	68,0-82,0	39 – 43
XLEW	28,0 – 31,0	41,0 – 51,0	72,0 – 85,0	68,0-74,0	75,0-82,0	68,0-82,0	39 – 43
XXL	31,0 – 34,0	46,0 – 56,0	72,0 – 85,0	68,0-74,0	75,0-82,0	68,0-82,0	41 – 45
XXLEW	31,0 – 34,0	46,0 – 56,0	78,0 – 90,0	68,0-74,0	75,0-82,0	68,0-82,0	41 – 45

Таблица 3 - Гольфы антиэмболические «ИНТЕКС» «ЭЛЕГАНС» следующих размеров: XS, S, M, L, XL, XXL

Размеры	Параметры (условное обозначение)		
	обхват в области голеностопного сустава (b), см.	обхват в области икроножной мышцы (c), см.	размер стопы
XS	17,0 - 19,0	27,0 - 34,0	35 - 38
S	19,0 - 22,0	29,0 - 37,0	35 - 38
M	22,0 - 25,0	34,0 - 42,0	37 - 40
L	25,0 - 28,0	38,0 - 46,0	38 - 41
XL	28,0 - 31,0	41,0 - 51,0	39 - 43
XXL	31,0 - 34,0	46,0 - 56,0	41 - 45

Таблица 4 - Чулки антиэмболические «ИНТЕКС» «УНИВЕРСАЛ» универсального размера (S-XL).


размеры	Параметры (условное обозначение)				
	обхват в области голеностопного сустава (b), см.	обхват в области икроножной мышцы (c), см.	обхват в области бедра (g), см.	Длина ноги от паха до пятки (a), см.	размер стопы
S-XL	19,0 - 31,0	29,0 - 51,0	44,0 - 72,0	68,0 - 86,0	36 - 44

Таблица 5 - Гольфы антиэмболические «ИНТЕКС» «УНИВЕРСАЛ» универсального размера (S-XL).

размер	Параметры (условное обозначение)		
	обхват в области голеностопного сустава (b), см.	обхват в области икроножной мышцы (c), см.	размер стопы
S-XL	19,0 - 31,0	29,0 - 51,0	36 - 44

Примечание: Производитель гарантирует, что Изделия будут обеспечивать лечебный эффект для потребителей с параметрами, соответствующими указанным в таблицах 1-5.

Схемы измерения параметров для подбора размера Изделий

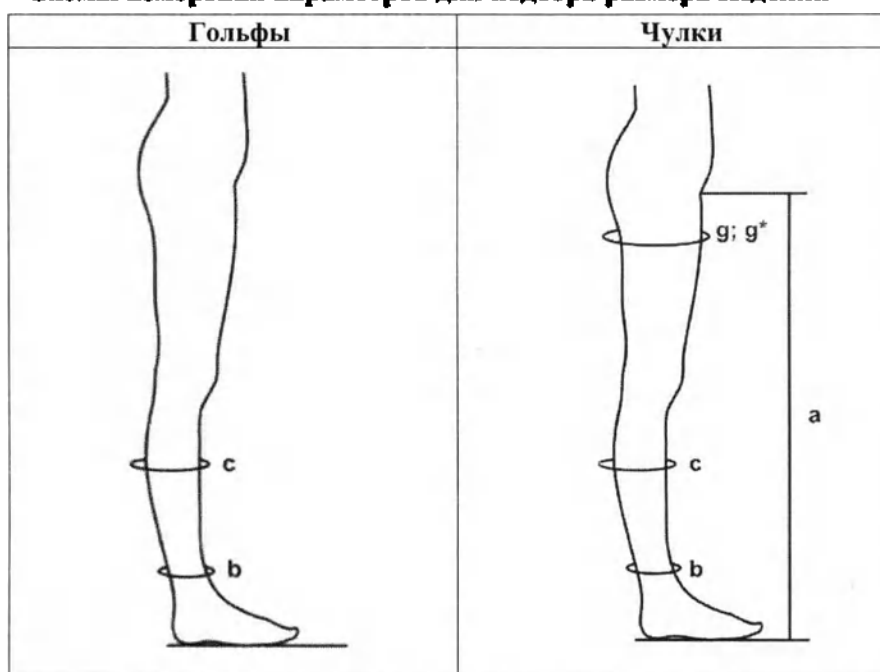

Состав изделий: эластан, полиамид.

Описание изделий:

Чулки антиэмболические «ИНТЕКС» представляют собой контурные изделия, соответствующие анатомической конфигурации нижних конечностей, без сформированной пятки и имеют окантованный вырез в области стопы. Чулки у верхнего основания имеют вывязанный борт, к которому пришивается резинка с силиконовым покрытием.

Чулки антиэмболические «ИНТЕКС» «ЭЛЕГАНС» и «ИНТЕКС» «УНИВЕРСАЛ» представляют собой контурные изделия, соответствующие анатомической конфигурации нижних конечностей, без сформированной пятки и имеют окантованный вырез в области стопы. Чулки у верхнего основания имеют вывязанную резинку, на которую наносится силикон (адгезив).

Гольфы антиэмболические представляют собой контурные изделия, соответствующие анатомической конфигурации нижних конечностей, без сформированной пятки и имеют окантованный вырез в области стопы.

На стопе изделий контрастными нитями вывязаны: класс компрессии, размер и рост (при наличии).




Изделия нестерильные для индивидуального использования.

Изделия выпускаются следующих классов компрессии и оказывают соответствующее давление в мм ртутного столба:

- I класс компрессии - 18-21 мм рт.ст.
- II класс компрессии - 22-32 мм рт.ст.
- III класс компрессии - 33-46 мм рт.ст.

Прогнозируемое распределение компрессионного давления по длине Изделия представлено на схемах ниже.

Схемы прогнозируемого распределения компрессионного давления по длине Изделий

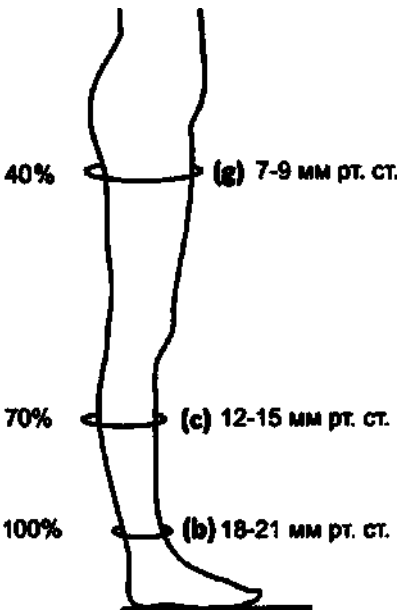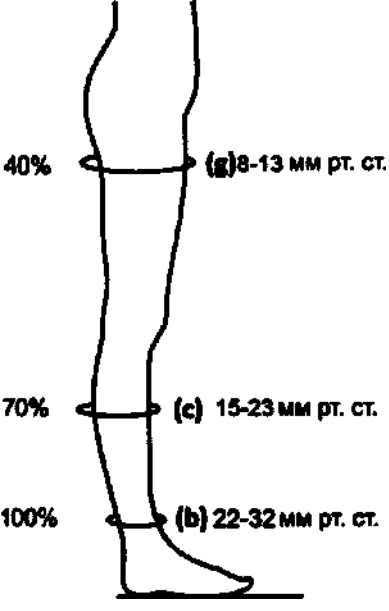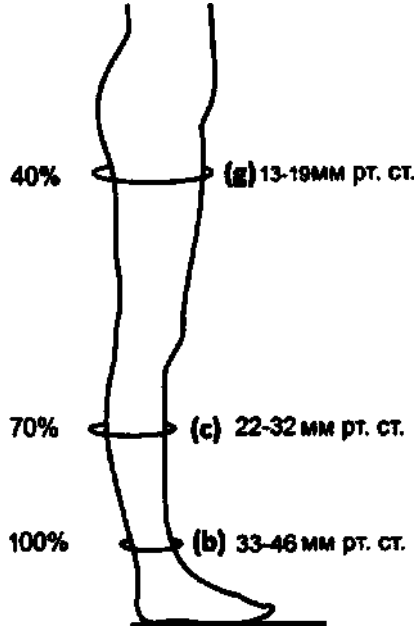I класс компрессии	II класс компрессии	III класс компрессии
 40% (g) 7-9 мм рт. ст. 70% (c) 12-15 мм рт. ст. 100% (b) 18-21 мм рт. ст.	 40% (g) 8-13 мм рт. ст. 70% (c) 15-23 мм рт. ст. 100% (b) 22-32 мм рт. ст.	 40% (g) 13-19 мм рт. ст. 70% (c) 22-32 мм рт. ст. 100% (b) 33-46 мм рт. ст.

В точке «b» изделие оказывает максимальное давление на конечность. Далее давление плавно распределяется от точки «b» до точки «с» или точки «g» в сторону уменьшения.

14. Требования к применению и эксплуатации медицинского изделия.

Антиэмболический (госпитальный) трикотаж не предназначен для интенсивного ежедневного использования, его применяют непродолжительный период времени: во время операций и родов, после родов - не более 6 дней, в послеоперационный период - до 2-х недель. Длительность периода использования назначает врач.

Рекомендации по применению: антиэмболический трикотаж следует надевать в положении лежа на спине на чистую и сухую кожу: в день операции с утра (не вставая с кровати), а при естественных родах - при первых схватках. Предварительно следует вывернуть изделие на изнанку, затем собрать в гармошку от верхней части до мыска и плавно натянуть его на ногу, после чего равномерно распределить по всей длине, чтобы не было складок. Для облегчения надевания Изделия можно воспользоваться специальным приспособлением - батлером или глайдером, а также резиновыми или медицинскими перчатками.

Внимание: во избежание повреждений Изделий перед надеванием обязательно снимайте кольца и другие украшения, а также тщательно ухаживайте за стопами и аккуратно обрабатывайте ногти. Не используйте изделия с повреждениями.

Не рекомендуется использовать перед надеванием лосьоны и кремы, это снижает липкие свойства силикона, а также тянуть изделия вверх за края резинки чулок и в местах, где находятся швы.

Рекомендации по уходу: ручная стирка с применением жидких моющих средств или детских стиральных порошков при t , не превышающей 30°C , ручной отжим (в полотенце) без выкручивания и сушка при $t 20 \pm 5^{\circ}\text{C}$ на горизонтальной плоскости в тени вдали от отопительных приборов до эксплуатационного состояния.

Для дезинфекции (при необходимости) в домашних условиях: замачивание в растворе перекиси водорода (3%) при $t 50^{\circ}\text{C}$ от 80 до 180 минут с последующим полосканием в проточной воде.

Для лечебных учреждений: дезинфекция (при необходимости) химическим методом с помощью дезинфицирующих средств с моющими действиями и/или на основе перекиси водорода.


Перед стиркой/дезинфекцией изделие следует вывернуть наизнанку.

Примечание: Не рекомендуется:

- подвешивать изделие при сушке во избежание потери его формы и компрессионных свойств,
- мочить силиконовую резинку на чулках, её нужно протирать спиртовыми салфетками или тканью, смоченной спиртовым раствором.

Не использовать: щелочное мыло, отбеливатели, пятновыводители, растворители и обычные стиральные порошки. **Запрещается:** кипятить Изделие, стирать и отжимать в стиральной машинке, сушить в сушильной машинке, а также на обогревателе или батарее и гладить при помощи утюга.

Схема: «Этапы надевания Изделий»

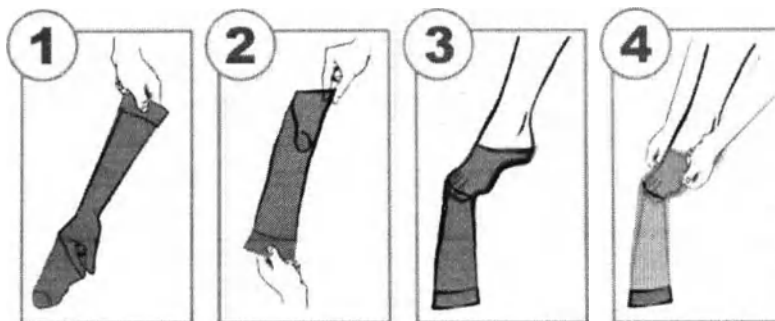


1 Просунув руку внутрь изделия, захватите пятку.

3 Наденные стопную часть изделия на ногу. Пяточная часть изделия должна лежать на пятке.

2 Выверните изделие наизнанку до пятки.

4 С двух сторон подтяните вывернутую часть изделия на пятку.

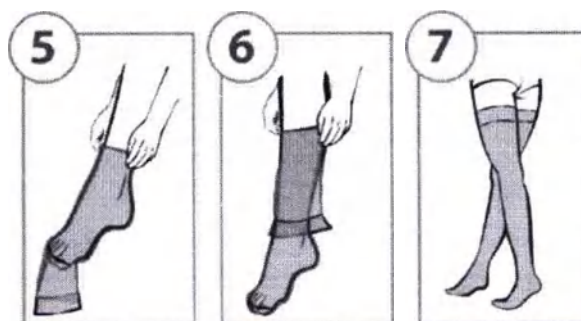

5 Перехватите вывернутую часть изделия и натяните ее выше, на лодыжку.

6 Перехватывая вывернутую часть трикотажа, поэтапно наденные изделие на ногу.

7 Равномерно распределите трикотаж по всей длине. Расправьте складки и потяните изделие за носок, чтобы освободить большие пальцы.

15. Требования к техническому обслуживанию и ремонту медицинского изделия.

Изделия имеют полностью законченную конструкцию, не имеют составных частей и не требуют в процессе эксплуатации каких-либо вмешательств. Изделия не подлежат техническому обслуживанию и ремонту.

16. Порядок осуществления утилизации.

В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А» или «Б» (при загрязнении кровью или другими биологическими жидкостями). Допускается утилизация использованных изделий вместе с бытовыми отходами. Изделия, загрязнённые кровью, следует предварительно упаковать в 2 пакета.

17. Упаковка.

Каждое Изделие уложено в индивидуальную (потребительскую) упаковку:

- 1). в пакет из полимерной плёнки/комбинированных материалов, в который вложена полиграфическая этикетка из бумаги.
- 2). в пакет из полимерной плёнки/комбинированных материалов, а затем в коробочку из картона.

Изделие может быть намотано на вкладыш из картона/плотной бумаги.

Коробочка из картона может быть дополнительно упакована в пакет из полимерной плёнки/комбинированных материалов или в термоусадочную плёнку.

18. Критерии непригодности изделий.

Внешние механические воздействия, которые могут привести к нарушению целостности Изделий и, как следствие, к частичной или полной потере эксплуатационных характеристик.

19. Гарантия.

Предприятие-производитель гарантирует соответствие изделий указанным характеристикам при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации с сохранением компрессионных свойств: в течение назначенного врачом непрерывного периода использования, но не более 14 дней (не снимая, в положении лёжа или при условии отсутствия активного движения) в пределах срока хранения (при соблюдении рекомендаций по применению и уходу).

К гарантийным случаям не относятся повреждения Изделий, которые возникли из-за:

- внешних механических воздействий (включая случайные);
- применения изделий не по назначению;
- нарушения рекомендаций по применению и уходу;
- несанкционированных изменений конструкции;
- неправильно подобранного размера изделия из-за несоблюдения рекомендаций по измерению параметров.

20. Условия возврата и обмена изделий с браком.

При выявлении производственного брака возврат Изделий производится покупателем через розничного продавца производителю. Для экспертизы покупатель должен предоставить:

- Изделие в товарном виде с упаковкой;
- кассовый чек или его копию;
- заявление в свободной форме с описанием сути претензии и подробным описанием условий использования Изделия и ухода за ним;
- контактные данные: Ф.И.О., телефон, почтовый и электронный адреса почты.

Производитель обязан произвести экспертизу в течение 10 рабочих дней с даты получения заявления и Изделия. По окончании экспертизы предоставить акт с отрицательным или положительным заключением.

При положительном заключении – Производитель обязан предоставить Покупателю новое Изделие.

При отрицательном – вернуть обратно изделие, бывшее в эксплуатации.

21. Сведения о производителе медицинского изделия.

Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп.»
(ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп.»)

Юридический адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 32, стр. 2, этаж 1, пом. 4, комн. 1.

Адрес производства: Россия, 143964, Московская область, г. Реутов, ул. Железнодорожная, д. 5,

тел.: (495) 528-51-09; 528-86-82, www.bint.ru/info@bint.ru

22. Применяемые стандарты: ГОСТ Р 58236-2020

**МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА НЕ ПОДЛЕЖАТ ВОЗВРАТУ ИЛИ ОБМЕНУ
(ПП РФ от 31.12.2020 № 2463)**

Прошито и скреплено печатью
4 (силь) лист 2в

Директор
ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп.»
Балашов О.Е.





ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

по применению медицинского изделия

ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ КОМПРЕССИОННЫЕ АНТИЭМБОЛИЧЕСКИЕ по ТУ 14.31.10-001-46838010-2020

Наименование медицинского изделия:

Изделия медицинские эластичные компрессионные антиэмболические, в вариантах исполнения:

- Чулки медицинские эластичные компрессионные антиэмболические «ИНТЕКС»
(I, II или III класса компрессии, 1, 2 или универсального роста; следующих размеров: XS, XSew, S, Sew, M, Mew, L, Lew, XL, XLew, XXL, XXLew (ew – для широких бёдер);
- Чулки медицинские эластичные компрессионные антиэмболические «ИНТЕКС» «ЭЛЕГАНС»
(I, II или III класса компрессии, 1, 2 или универсального роста; следующих размеров: XS, XSew, S, Sew, M, Mew, L, Lew, XL, XLew, XXL, XXLew (ew – для широких бёдер);
- Гольфы медицинские эластичные компрессионные антиэмболические «ИНТЕКС» «ЭЛЕГАНС»
(I, II или III класса компрессии, следующих размеров: XS, S, M, L, XL, XXL);
- Чулки медицинские эластичные компрессионные антиэмболические «ИНТЕКС» «УНИВЕРСАЛ»
(I класса компрессии, универсального размера (S-XL));
- Гольфы медицинские эластичные компрессионные антиэмболические «ИНТЕКС» «УНИВЕРСАЛ»
(I класса компрессии, универсального размера (S-XL)).

Конструкция: Изделия имеют контурную форму, соответствующую анатомической конфигурации нижних конечностей, а также отверстие в области стопы для осмотра. Чулки имеют резинку с силиконовым покрытием.

Классы компрессии:

- I (18-21 мм рт.ст)
- II (22-32 мм рт.ст)
- III (33-46 мм рт.ст)

Область применения: в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях.

Назначение: для предотвращения тромбоэмболических осложнений во время проведения полостных и местных операций, родов; для проведения компрессионной терапии при лечении заболеваний, связанных с образованием отёков, обусловленных сосудистой патологией нижних конечностей, а также для профилактики образования венозных бляшек и варикозного расширения вен, нормализации кровообращения, и уменьшения болевых ощущений в области нижних конечностей.

Показания к применению: повышенная свёртываемость и вязкость крови, отёчность, нарушение кровотока, наличие варикозных узлов на венах и большого количества сосудистых звёздочек, болевые ощущения, обострение патологий венозной системы, нахождение в палате интенсивной терапии или в реанимации, во время продолжительного постельного режима (при травмах, после нарушения мозгового кровообращения, после инфарктов, инсультов, в неврологической практике), а также в качестве временной замены обычного компрессионного трикотажа и эластичных компрессионных бинтов.

Противопоказания к применению: хронические облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей (энтертериит, атеросклероз сосудов, синдром Рейно), тяжёлые формы диабетической ангиопатии и полинейропатии, трофические язвы не венозного происхождения, септический флебит, декомпенсированная сердечно-лёгочная недостаточность, острые инфекции мягких тканей, а также индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав изделия.

Меры предосторожности при использовании: перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Не рекомендуется: использовать изделия при наличии экзем, дерматита, псориаза, пролежней, воспалительных заболеваний кожи, а также при нарушении чувствительности.

Возможные побочные действия: аллергическая реакция.

Состав: эластан, полиамид.

Изделие нестерильное для индивидуального использования.

Таблицы подбора размера

Чулки антиэмболические «ИНТЕКС»

	Наименование параметра		Размеры											
			XS	XSew	S	Sew	M	Mew	L	Lew	XL	XLew		
b	обхват в области голеностопного сустава, см		17-19	17-19	19-22	19-22	22-25	22-25	25-28	25-28	28-31	28-31	31-34	31-34
c	обхват в области икроножной мышцы, см.		27-34	27-34	29-37	29-37	34-42	34-42	38-46	38-46	41-51	41-51	46-56	46-56
g	обхват в области бедра, см.		42-48	44-52	44-52	47-60	50-58	58-68	56-64	65-75	60-72	72-85	72-85	78-90
a	длина ноги от паха до пятки, см.	1 рост	68-76											
		2 рост	77-86											
		универсальный	68-86											
	размер стопы		35-40		35-40		37-42		38-44		39-46		39-46	

Чулки антиэмболические «ИНТЕКС» «ЭЛЕГАНС»

	Наименование параметра	Размеры											
		XS	XSew	S	Sew	M	Mew	L	Lew	XL	XLew	XXL	XXLew
b	обхват в области голеностопного сустава, см	17-19	17-19	19-22	19-22	22-25	22-25	25-28	25-28	28-31	28-31	31-34	31-34
c	обхват в области икроножной мышцы, см.	27-34	27-34	29-37	29-37	34-42	34-42	38-46	38-46	41-51	41-51	46-56	46-56
g	обхват в области бедра, см.	42-48	44-52	44-52	47-60	50-58	58-68	56-64	65-75	60-72	72-85	72-85	78-90
a	длина ноги от паха до пятки, см.	1 рост											
		2 рост											
		универсальный											
	размер стопы	35-38		35-38		37-40		38-41		39-43		41-45	

Гольфы антиэмболические «ИНТЕКС» «ЭЛЕГАНС»

	Наименование параметра	Размеры					
		XS	S	M	L	XL	XXL
b	обхват в области голеностопного сустава, см	17-19	19-22	22-25	25-28	28-31	31-34
c	обхват в области икроножной мышцы, см.	27-34	29-37	34-42	38-46	41-51	46-56
	размер стопы	35-38	35-38	37-40	38-41	39-43	41-45

Чулки антиэмболические «ИНТЕКС» «УНИВЕРСАЛ»

	Наименование параметра	Размер универсальный (S-XL)
b	обхват в области голеностопного сустава, см	19-31
c	обхват в области икроножной мышцы, см.	29-51
g	обхват в области бедра, см.	44-72
a	длина ноги от паха до пятки, см.	68-86
	размер стопы	36-44

Гольфы антиэмболические «ИНТЕКС» «УНИВЕРСАЛ»

	Наименование параметра	Размер универсальный (S-XL)
b	обхват в области голеностопного сустава, см	19-31
c	обхват в области икроножной мышцы, см.	29-51
	размер стопы	36-44


Примечание: Производитель гарантирует, что Изделия будут обеспечивать лечебный эффект для потребителей с параметрами, соответствующими указанным в таблицах выше.

На стопе изделий контрастными нитями вывязаны: класс компрессии, размер и рост (при наличии).

Антиэмболический (госпитальный) трикотаж не предназначен для интенсивного ежедневного использования, его применяют непродолжительный период времени: во время операций и родов, после родов - не более 6 дней, в послеоперационный период – до 2-х. Длительность периода использования назначает врач.

Рекомендации по измерению параметров для подбора Изделия: измерения для подбора Изделий рекомендуется проводить при минимальной отёчности (утром, не вставая с постели). Для измерений нужно использовать мягкую пластиковую или бумажную ленту. При проведении измерений лента не должна перекручиваться.

Схемы измерения параметров для подбора Изделия.

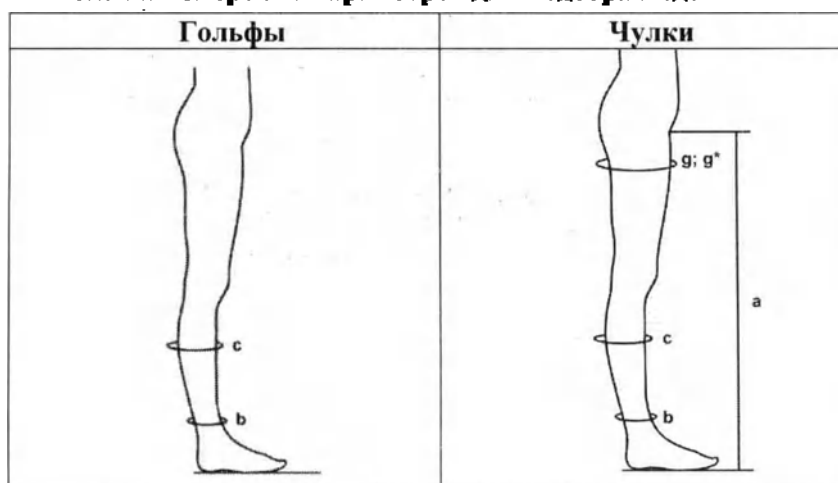


Рекомендации по применению: антиэмболический трикотаж следует надевать в положении лежа на спине на чистую и сухую кожу: в день операции с утра (не вставая с кровати), а при естественных родах – при первых сватках. Предварительно следует вывернуть изделие на изнанку, затем собрать в гармошку от верхней части до мыска и плавно натянуть его на ногу, после чего равномерно распределить по всей длине, чтобы не было складок. Для облегчения надевания Изделия можно воспользоваться специальным приспособлением – батлером или глайдером, а также резиновыми или медицинскими перчатками.


Внимание: во избежание повреждений Изделий перед надеванием обязательно снимайте кольца и другие украшения, а также тщательно ухаживайте за стопами и аккуратно обрабатывайте ногти. Не используйте изделия с повреждениями.

Не рекомендуется использовать перед надеванием лосьоны и кремы, это снижает липкие свойства силикона, а также тянуть изделия вверх за края резинки чулок и в местах, где находятся швы.

Схема: «Этапы надевания Изделий»

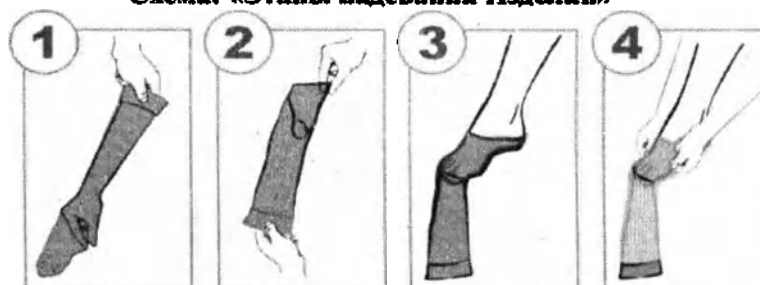

- | | |
|---|---|
| 1 Просунув руку внутрь изделия, захватите пятку. | 3 Наденьте стопную часть изделия на ногу. Пяточная часть изделия должна лежать на пятке. |
| 2 Выверните изделие наизнанку до пятки. | 4 С двух сторон подтяните вывернутую часть изделия на пятку. |

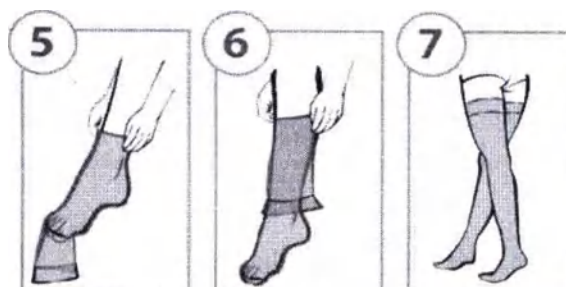

- | | |
|---|--|
| 5 Перехватите вывернутую часть изделия и натяните ее выше, на лодыжку. | 6 Перехватывая вывернутую часть трикотажа, поэтапно наденьте изделие на ногу. |
| 7 Равномерно распределите трикотаж по всей длине. Расправьте складки и потяните изделие за носок, чтобы освободить большие пальцы. | |

Рекомендации по уходу: ручная стирка с применением жидких моющих средств или детских стиральных порошков при t , не превышающей 30°C , ручной отжим (в полотенце) без выкручивания и сушка при $t 20\pm 5^{\circ}\text{C}$ на горизонтальной плоскости в тени вдали от отопительных приборов до эксплуатационного состояния. Для дезинфекции (при необходимости) в домашних условиях: замачивание в растворе перекиси водорода (3%) при $t 50^{\circ}\text{C}$ от 80 до 180 минут с последующим полосканием в проточной воде.

Для лечебных учреждений: дезинфекция (при необходимости) химическим методом с помощью дезинфицирующих средств с моющими действиями и/или на основе перекиси водорода.

Перед стиркой/дезинфекцией изделие следует вывернуть наизнанку.

Примечание: Не рекомендуется:

- подвешивать изделие при сушке во избежание потери его формы и компрессионных свойств,
- мочить силиконовую резинку на чулках, её нужно протирать спиртовыми салфетками или тканью, смоченной спиртовым раствором.

Не использовать: щелочное мыло, отбеливатели, пятновыводители, растворители и обычные стиральные порошки. **Запрещается:** кипятить Изделие, стирать и отжимать в стиральной машинке, сушить в сушильной машинке, а также на обогревателе или батарее и гладить при помощи утюга.

Срок хранения: 5 лет с даты изготовления.

Не рекомендуется использовать изделия по истечении срока хранения.

Условия хранения: I(Л) - в сухом помещении при t от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$, в недоступных для детей местах. Отсутствие воздействия прямых солнечных лучей. Нахождение на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов.

Гарантийный срок эксплуатации с сохранением компрессионных свойств: в течение назначенного врачом непрерывного периода использования, но не более 14 дней (не снимая, в положении лёжа или при условии отсутствия активного движения) в пределах срока хранения (при соблюдении рекомендаций по применению и уходу).

К гарантийным случаям не относятся повреждения Изделий, которые возникли из-за:

- внешних механических воздействий (включая случайные);
- применения изделия не по назначению;
- нарушения рекомендаций по применению и уходу;
- несанкционированных изменений конструкции;
- несоблюдения рекомендаций по измерению параметров для подбора размера Изделия.

Условия возврата и обмена Изделий с браком:

При выявлении производственного брака возврат Изделий производится покупателем через розничного продавца производителю.

Для экспертизы покупатель должен предоставить:

- Изделие в товарном виде с упаковкой;
- кассовый чек или его копию;
- заявление в свободной форме с описанием сути претензии и подробным описанием условий использования Изделия и ухода за ним;
- контактные данные: Ф.И.О., телефон, почтовый и электронный адреса почты.

Производитель обязан произвести экспертизу в течение 10 рабочих дней с даты получения заявления и Изделия. По окончании экспертизы предоставить акт с отрицательным или положительным заключением.

При положительном заключении – Производитель обязан предоставить Покупателю новое Изделие. При отрицательном – вернуть обратно изделие, бывшее в эксплуатации.

Условия утилизации: в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А» или «Б» (при загрязнении кровью или другими биологическими жидкостями). Допускается утилизация использованных изделий вместе с бытовыми отходами. Изделия, загрязнённые кровью, следует предварительно упаковать в 2 пакета.

Комплектность:

- изделие одного исполнения, класса компрессии, размера, роста (при наличии) и цвета – 1 пара или 1 штука;
- потребительская упаковка с маркировкой;
- рекомендации (инструкция) по применению (нанесены на упаковку или вложены внутрь) - 1 штука.

Упаковка: пакет или пакет + коробка.

Производитель: ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп.»

Юридический адрес: Россия, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 32, стр. 2, этаж I, пом. 4, комн. 1

Адрес производства: Россия, 143964, Московская область, г. Реутов, ул. Железнодорожная, д. 5.

тел.: (495) 528-51-09; 528-86-82, www.bint.ru/info@bint.ru

Изделия соответствуют ГОСТ Р 58236-2020

МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА НЕ ПОДЛЕЖАТ ВОЗВРАТУ ИЛИ ОБМЕНУ
(Постановление правительства РФ от 31.12.2020 № 2463)

Прошито и скреплено печатью

4 (четыре) лист

Директор

ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп.»

Балашов О.Е.

