



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО

«Медком-МП»

Кирсенко К.В.

«21» мая 2010 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Перчатки хирургические латексные и синтетические, стерильные и нестерильные, опудренные и неопудренные производства WRP Asia Pacific SDN BHD, Малайзия

2010

Назначение и область применения:

Предназначены для защиты пациента и медицинского работника от взаимного заражения во время проведения хирургических операций и медицинских обследований.

Подготовка изделия к работе:

После извлечения из упаковки изделие готово к использованию.

Правила использования:

1. Предназначены только для одноразового применения.
2. Перед использованием перчаток убедиться в соответствии остаточного срока годности.
3. Извлечь перчатки из упаковки и надеть на руки.
4. После использования перчатки следует снять и утилизировать.
5. При хранении и использовании не допускать воздействия на перчатки активных веществ, разрушающих резину.

Правила хранения:

Хранить при температуре от 0 до 25 С, относительной влажности воздуха не более 85%.

Беречь от прямых солнечных лучей, хранить вдалеке от источников озона и источников возгорания.

Генеральный директор ООО «Медком-МП»


Кырченко К.В.