


81

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Интернэшнл Медикал Продактс»

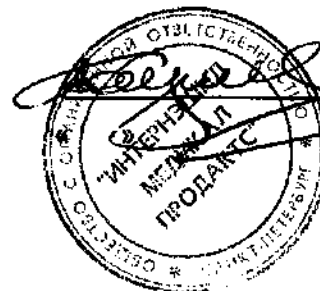

Баушев А.В.

2009 г.

Инструкция по применению

Перчатки медицинские диагностические, из натурального латекса или синтетические, стерильные, нестерильные, опудренные, неопудренные, с гладкой поверхностью, с текстурированной поверхностью

Медицинские диагностические перчатки предназначены для одноразового использования при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур с целью защиты пациентов и исследователя/медицинских работников от взаимного заражения, а также для использования при работе с зараженными медицинскими материалами.

Медицинские диагностические перчатки изготавливаются из латекса натурального каучука, из нитрильного латекса, полихлоропренового латекса (неопрен), поливинилхлорида (винил).

Для людей, имеющих аллергическую реакцию на натуральный латекс, следует использовать перчатки из перечисленных выше синтетических материалов.

Перчатки предназначены только для однократного применения.

Перчатки необходимо надевать на чистые руки, обработанные в соответствии с правилами по гигиене рук медицинского персонала, установленными соответствующими нормативными документами по гигиене рук.

Перчатки очень просты в применении, их использование не требует специальных знаний и навыков:

Нестерильные перчатки:

- необходимо достать перчатку из потребительской коробки;
- удерживая перчатку за край манжеты одной рукой, ввести в нее другую руку таким образом, чтобы каждый палец занял предназначенное для него место;
- нестерильные перчатки нельзя использовать в стерильных помещениях;

Время применения одной пары перчаток должно быть непродолжительным. Рекомендуется менять перчатки не реже 1 раза в 15 минут.

Стерильные перчатки:

- применение стерильных перчаток недопустимо при нарушении целостности индивидуальной упаковки;
- необходимо достать упакованную в индивидуальный пакет пару перчаток из групповой упаковки;
- следуя указаниям на индивидуальной упаковке, открыть ее и извлечь внутреннюю индивидуальную упаковку (крафт-бумагу), в которую перчатки непосредственно упакованы;
- взять с крафт-бумаги одну перчатку (левой рукой); натянуть перчатку на кисть правой руки, держа перчатку за край манжеты большим и указательным пальцами;



- взять с крафт-бумаги вторую перчатку, засунув пальцы правой руки под отворот манжеты перчатки;
- надеть перчатку на кисть, отведя руку в сторону и слегка согнув ее в локте;
- расправить/подтянуть манжеты перчаток.

Перед применением опудренных перчаток, после надевания, с них необходимо удалить пудру влажным стерильным тампоном, стерильной влажной салфеткой или иным эффективным методом.

Необходимо снимать перчатки после осуществления манипуляций с пациентом.

Нельзя использовать одну пару перчаток более, чем с одним пациентом.

Необходимо менять перчатки во время манипуляций с одним пациентом, при переходе от контаминированного участка тела к чистому.

Использованные перчатки сбрасывают в специальную емкость для сбора отходов и подвергают дезинфекции и утилизации.

