

8

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Интернэшнл Медикал Продактс»



Баушев А.В.

2009 г.

Инструкция по применению

**Перчатки хирургические, из натурального латекса или синтетические,
стерильные, нестерильные, опудренные, неопудренные, с гладкой
поверхностью, с текстурированной поверхностью**

Хирургические перчатки предназначены для защиты пациента и медицинского работника от взаимного заражения во время проведения хирургических операций или диагностических и терапевтических процедур, требующих стерильности.

Медицинские хирургические перчатки изготавливаются из латекса натурального каучука, из нитрильного латекса, полихлоропренового латекса (неопрен).

Для людей, имеющих аллергическую реакцию на натуральный латекс, следует использовать перчатки из перечисленных выше синтетических материалов.

Перчатки предназначены только для однократного применения.

Перчатки необходимо надевать на чистые руки, обработанные в соответствии с правилами по гигиене рук медицинского персонала, установленными соответствующими нормативными документами по гигиене рук.

Перчатки очень просты в применении, их использование не требует специальных знаний и навыков:

Стерильные перчатки:

- применение стерильных перчаток недопустимо при нарушении целостности индивидуальной упаковки;
- необходимо достать упакованную в индивидуальный пакет пару перчаток из групповой упаковки;
- следуя указаниям на индивидуальной упаковке, открыть ее и извлечь внутреннюю индивидуальную упаковку (крафт-бумагу), в которую перчатки непосредственно упакованы;
- взять с крафт-бумаги одну перчатку (левой рукой); натянуть перчатку на кисть правой руки, держа перчатку за край манжеты большим и указательным пальцами;
- взять с крафт-бумаги вторую перчатку, засунув пальцы правой руки под отворот манжеты перчатки;
- надеть перчатку на кисть, отведя руку в сторону и слегка согнув ее в локте;
- натянуть перчатку на трикотажную манжету халата, растягивая манжету перчатки круговыми движениями руки; натянуть перчатку на руку надпежающим образом. Необходимо убедиться, что надетая перчатка полностью покрывает трикотажную манжету с заступом как минимум 10 см.



Перед применением опудренных перчаток, после надевания, с них необходимо удалить пудру влажным стерильным тампоном, стерильной влажной салфеткой или иным эффективным методом.

Необходимо снимать перчатки после осуществления манипуляций с пациентом.

Нельзя использовать одну пару перчаток более, чем с одним пациентом.

Необходимо менять перчатки во время манипуляций с одним пациентом, при переходе от контаминированного участка тела к чистому.

Использованные перчатки сбрасывают в специальную емкость для сбора отходов и подвергают дезинфекции и утилизации.

