

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Интернационал Медикал Продактс»

«»
Браушев А.В.
2009 г.

Инструкция по применению

изделия медицинского назначения

«Система трансфузионная для переливания крови и кровезаменителей, однократного применения, система инфузионная для вливания растворов, однократного применения»

Система трансфузионная для переливания крови и кровезаменителей, однократного применения, система инфузионная для вливания растворов, однократного применения, с принадлежностями предназначена для внутривенного вливания реципиенту крови, кровезаменителей, других трансфузионных сред, лекарственных растворов из стеклянных и полимерных емкостей.

Система стерильна, апирогенна, нетоксична.

Нельзя использовать систему, если упаковка повреждена или отсутствуют защитные колпачки.

При использовании системы необходимо:

- соблюдать правила асептики;
- убедиться в целостности упаковки;
- разорвать упаковку по стрелке;
- закрыть роликовый зажим;
- удалить защитный колпачок с иглы для емкости и вставить эту иглу полностью в емкость с инфузионным раствором;
- подвесить емкость с раствором и сжать подыгольную емкость для заполнения камеры до половины объема;
- присоединить внутривенную иглу к системе;
- открыть роликовый зажим и выпустить воздух из системы;
- закрыть зажим;
- пунктировать вену;
- открыть роликовый зажим и отрегулировать скорость потока.

Система состоит из шести основных частей:

1. устройства с полимерным или металлическим шипом для подсоединения к контейнеру с переливаемой жидкостью;
2. камеры в которую вмонтирован фильтр для очистки;
3. прозрачной трубки (магистраль системы);
4. роликового зажима, служащего для изменения скорости истечения жидкости;
5. инъекционного узла, предназначенного для введения дополнительных лекарственных средств при помощи шприца;
6. внутривенной инъекционной иглы, соединенной с системой через переходный двойной конус.

Система может быть использована также вместе с иглой для вливания растворов в малые вены (манивеной).

