


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «АйТэк»

Малева В. Б.

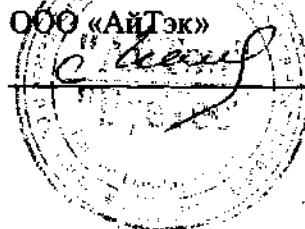

Инструкция по применению Инструменты медицинские офтальмологические режущие и ударные с острой (режущей) кромкой с принадлежностями

ПОКАЗАНИЯ

Инструменты предназначены для использования в ходе операции глаза при лечении пациентов обоих полов, практически без ограничения возраста.

Хирург самостоятельно определяет тип и размер необходимых инструментов, основываясь на собственном опыте и специфике вмешательства.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Данный продукт не предназначен для использования в других областях, кроме хирургии глаза.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

- Инструменты поставляются стерильными. Не использовать инструменты с нарушенной стерильной упаковкой!
- Хирург несет ответственность за владение операционной техникой, требующей применения инструментов с маркой Synergetics.
- Предварительное ознакомление с настоящей инструкцией обязательно!

ВАЖНО!


- *Перед началом использования следует уточнить структурный размер необходимого инструмента!*
- *Никогда не использовать инструмент не по назначению, рекомендованному в технической спецификации!*

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ


- выбрать необходимый для манипуляции комплект инструментов,
- проверить целостность стерильной упаковки каждого инструмента,
- надеть одноразовые перчатки,
- удалить упаковку,
- осуществить манипуляцию в соответствии с назначением инструмента.

Оперативная техника на примере пломбирования склеры


Техника операции заключается в следующем: после точной локализации места разрыва (разрывов) хирург помечает эти зоны на склере. Затем выкраивается силиконовая пломба необходимой величины и подшивается к склере в месте проекции.

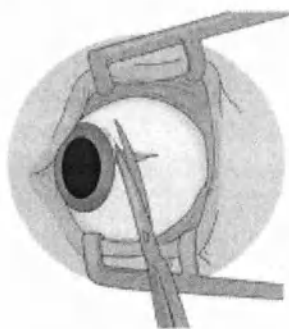


Начальный этап операции:
проведение разреза конъюнктивы

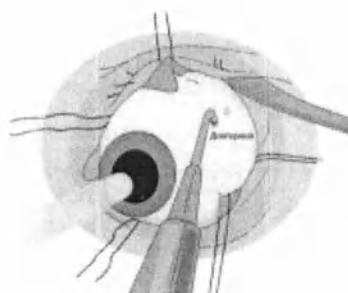


Процедура локализации разрыва

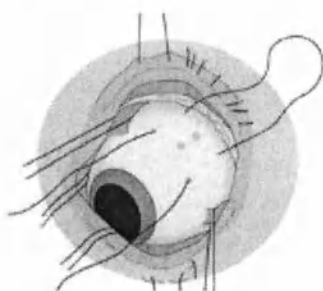


Проведение «матрасного» шва
для подшивания силиконового
имплантата (пломбы)

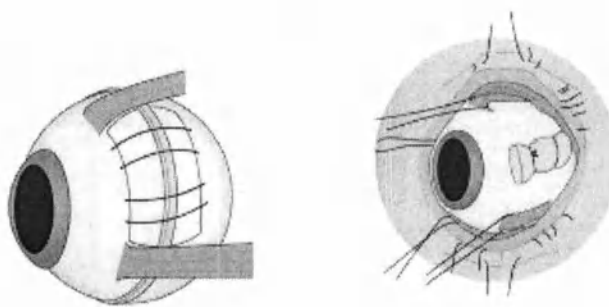

Варианты экстрасклерального
пломбирования

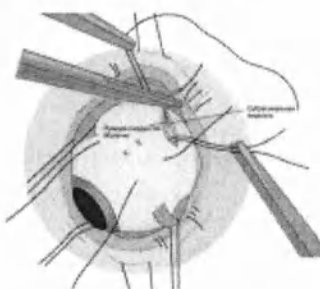

Проведение дренирования
субретинальной жидкости.

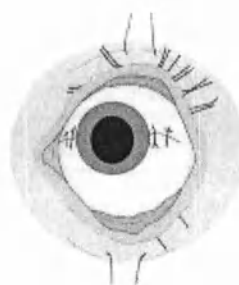

Заключительный этап операции.
На конъюнктиву наложены швы

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Инструменты следует хранить в сухом месте при температуре от +10 до +20°C (рекомендуемый диапазон).

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности изделий составляет 10 лет от даты выпуска.

Изготовитель: **Synergetics, Inc.** (США)

3845 Corporate Centre Drive, O'Fallon, MO 63368, USA

E-mail: customerservice@synergeticsusa.com , web-site <http://www.synergeticsusa.com>

Прошито и скреплено
печатью ООО «АйТэк»

Директор
ООО «АйТэк»

В.Б. М.

