




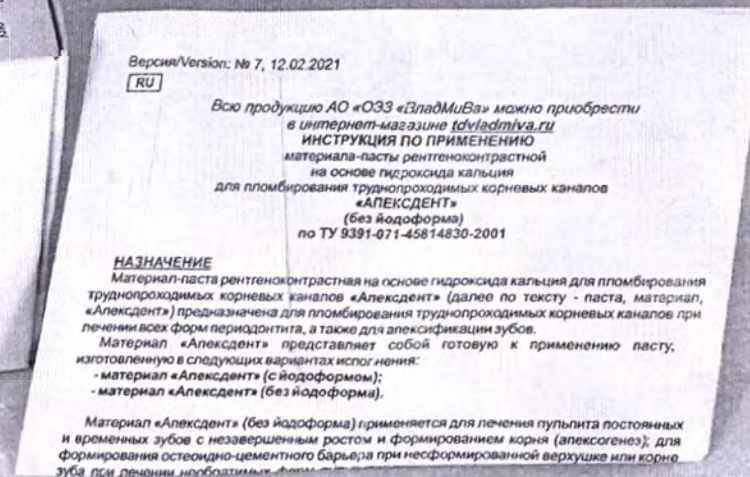
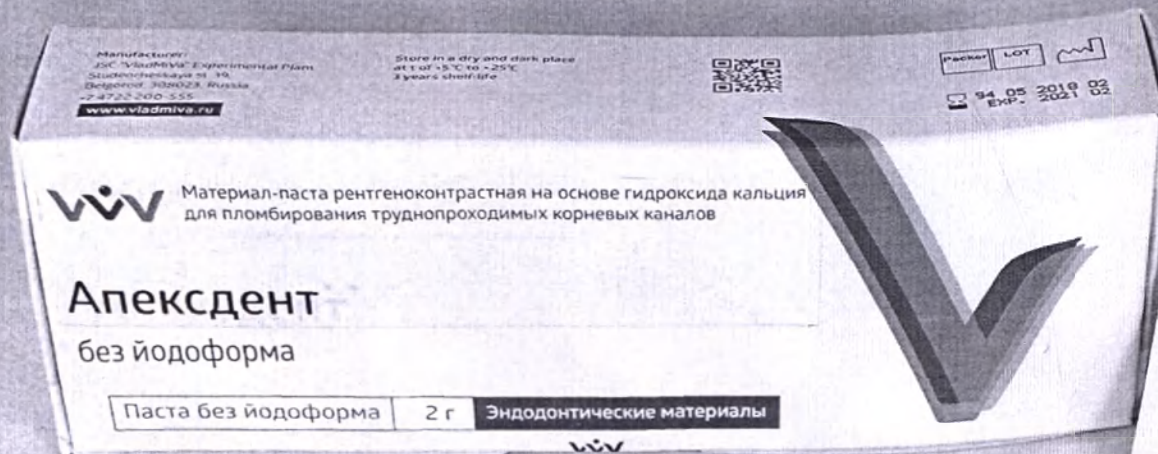
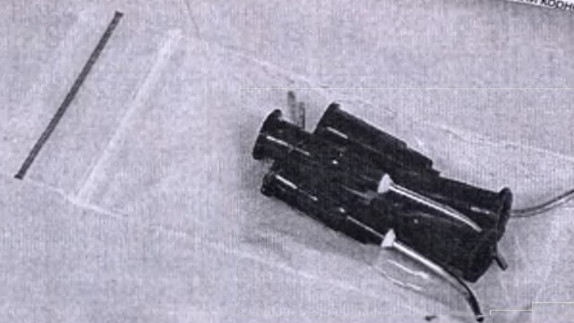
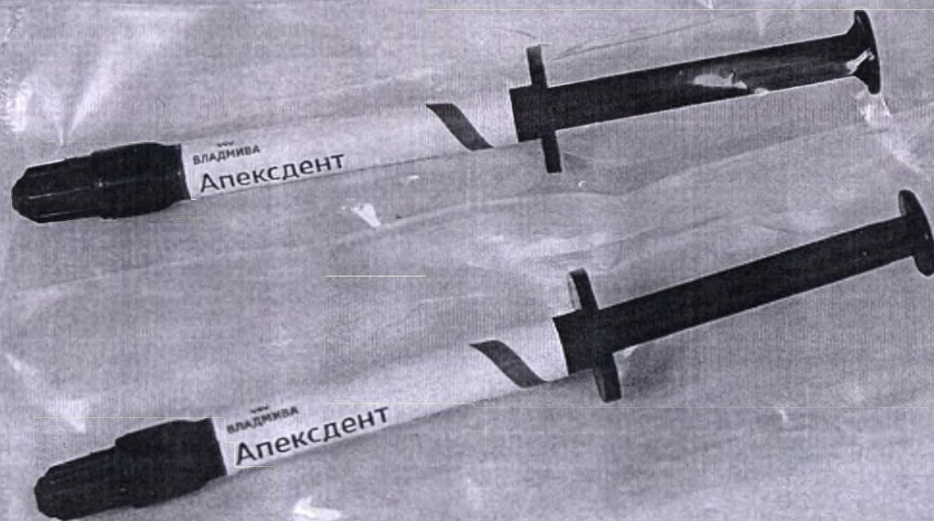
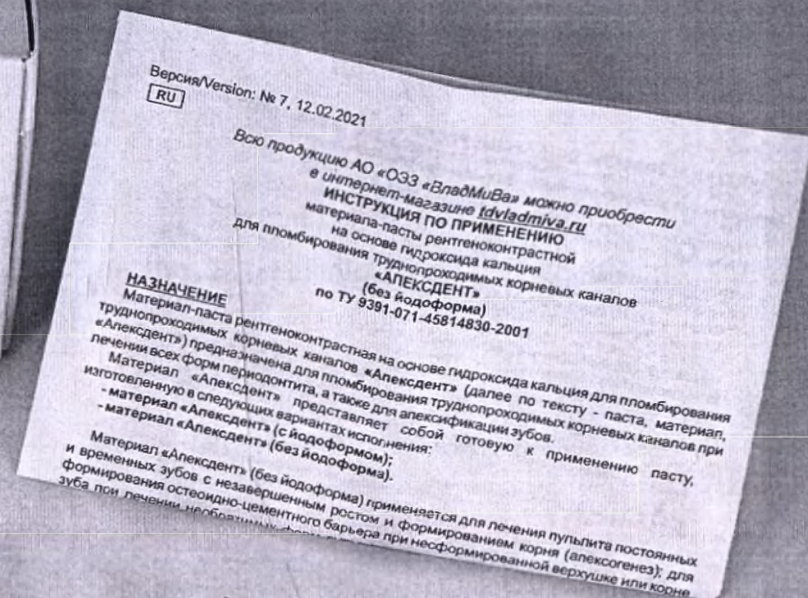
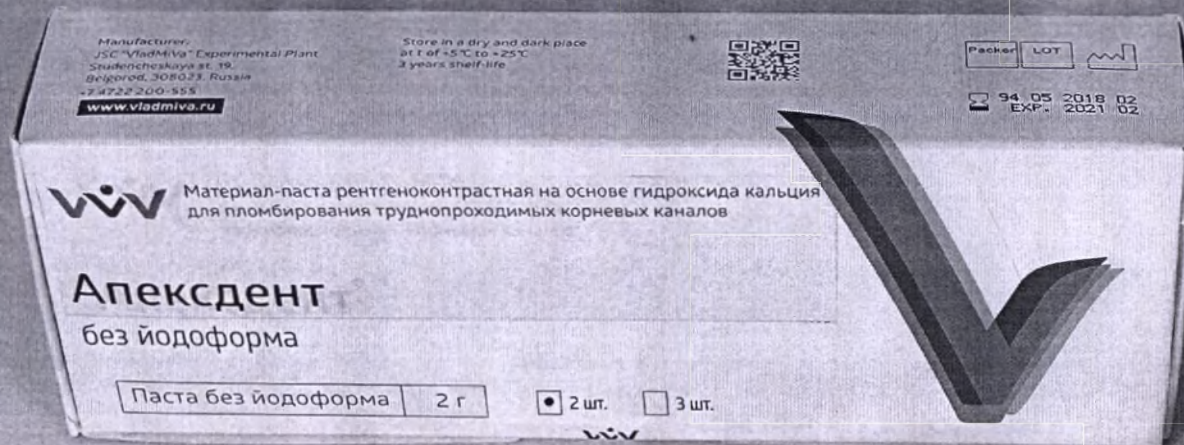
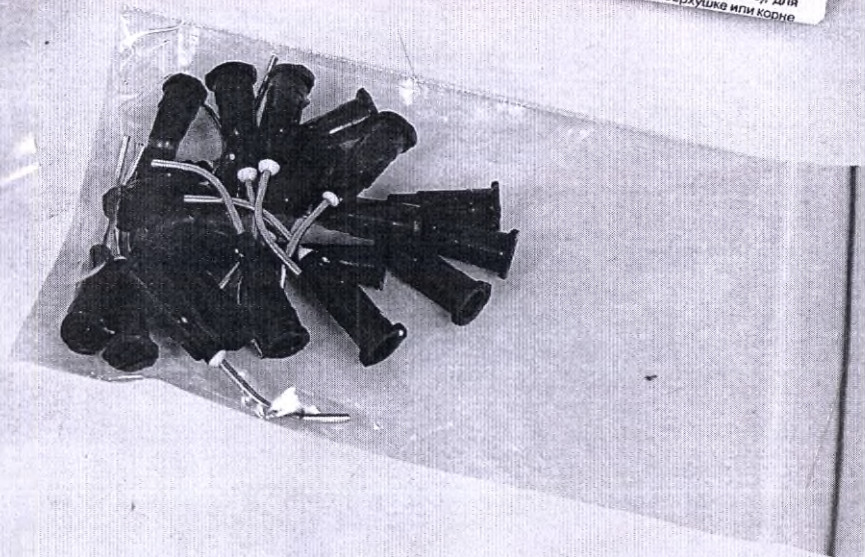
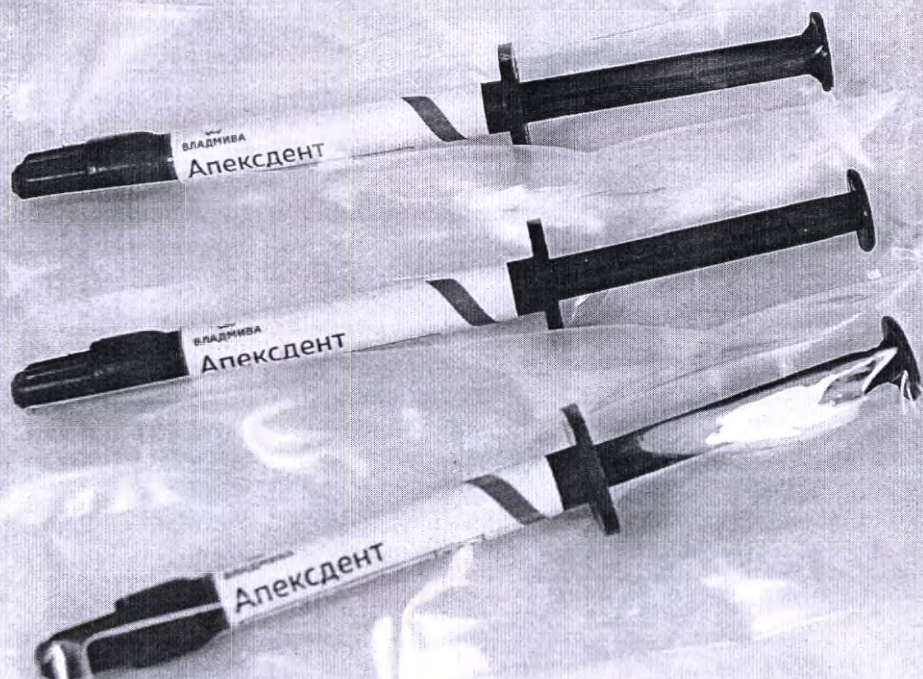
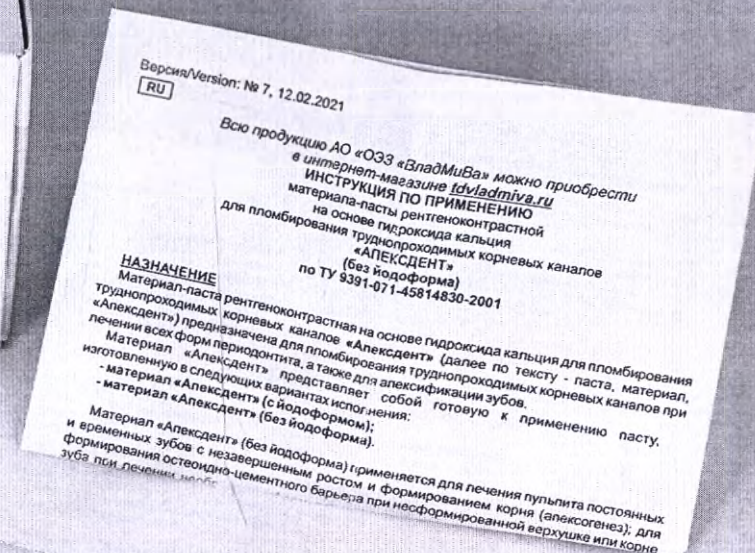
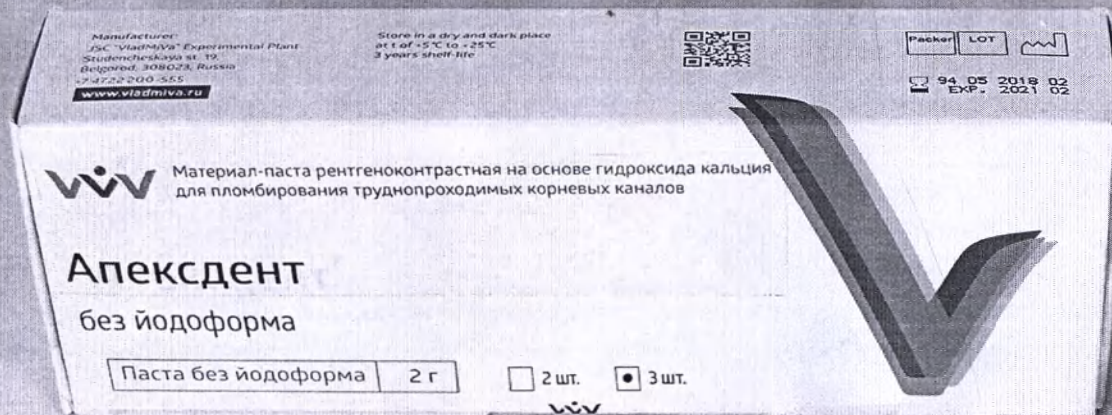
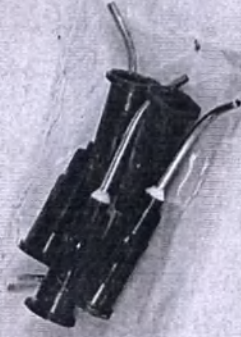
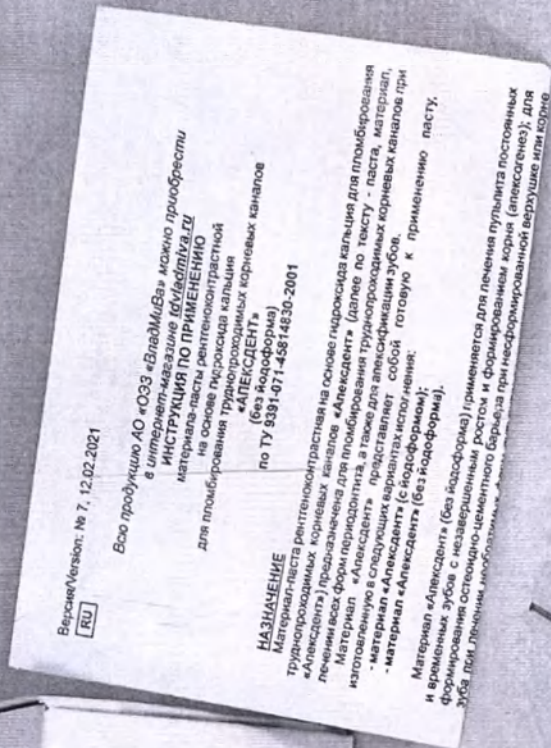
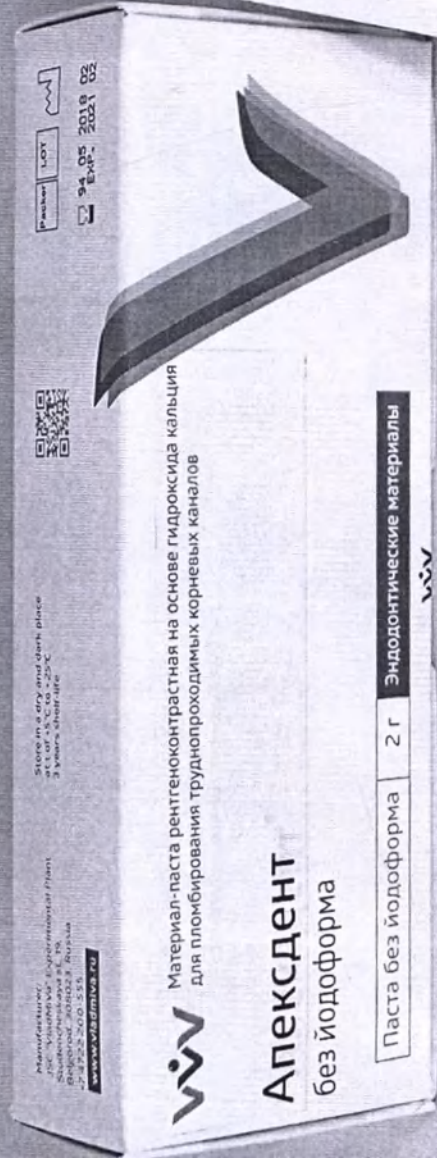
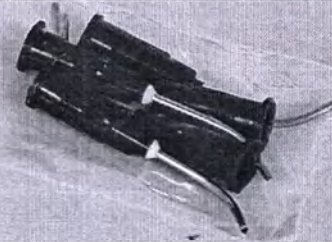
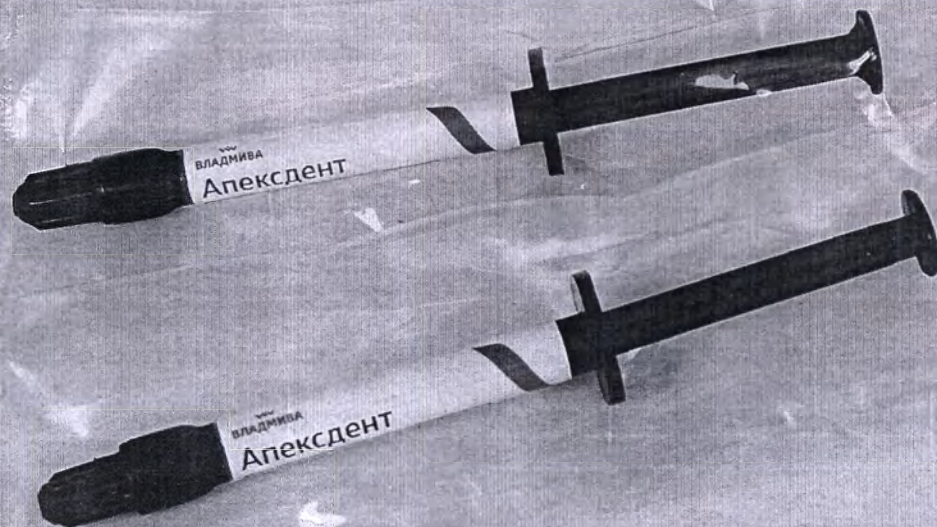


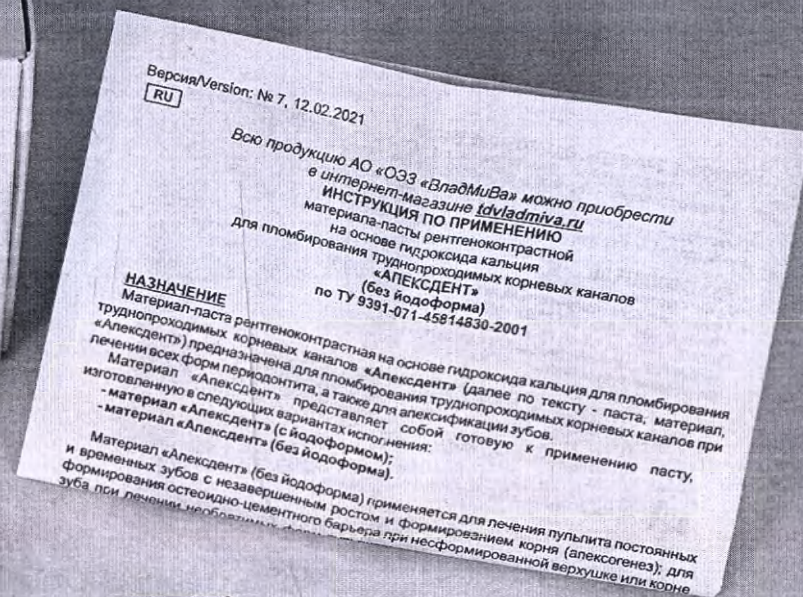

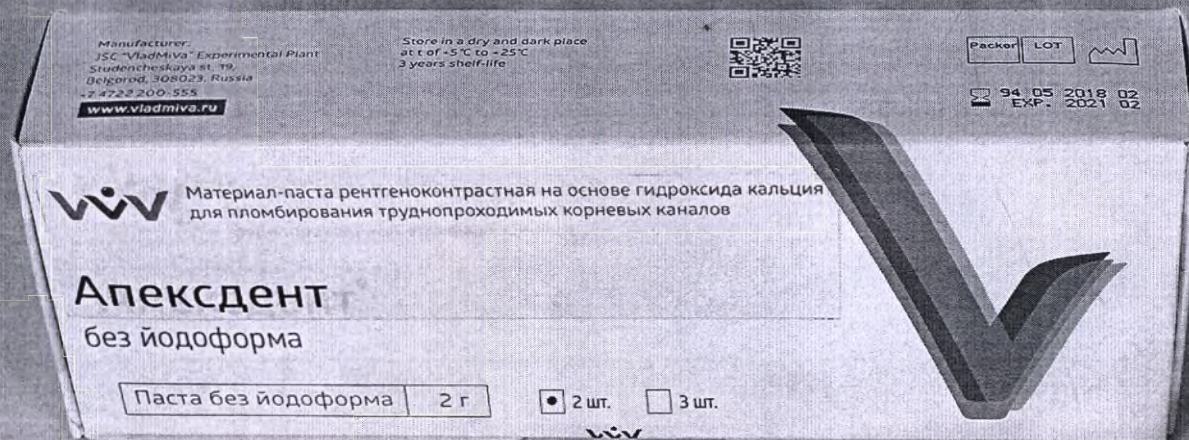

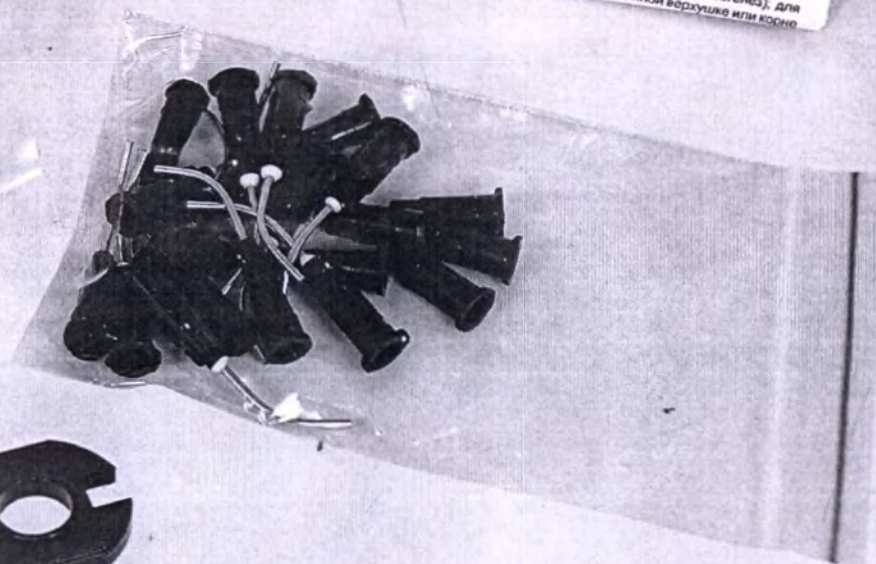

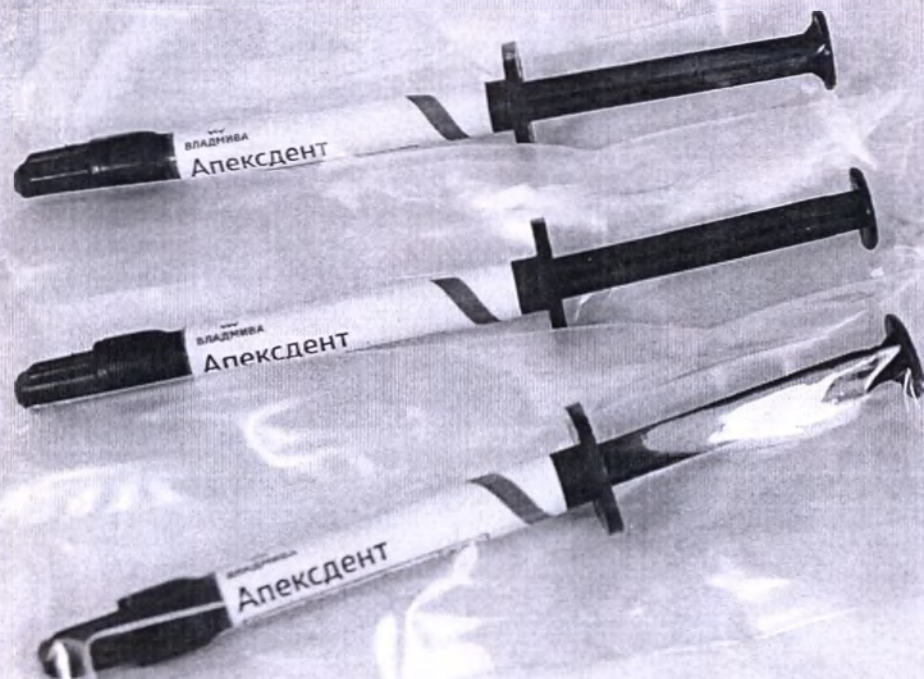


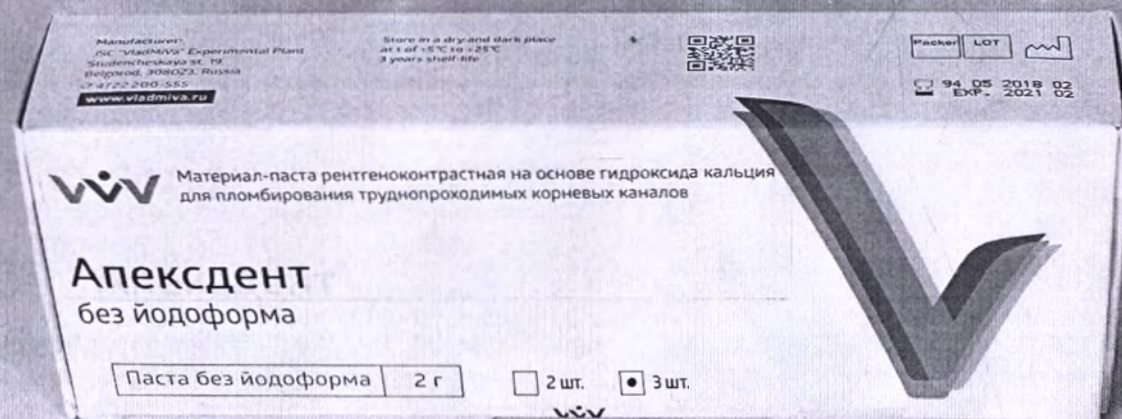



Версия/Version: № 7, 12.02.2021
RU

Всю продукцию АО «ОЗС «ВладМиВа» можно приобрести
в интернет-магазине idvladmiva.ru
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
материала-пасты рентгеноконтрастной
на основе гидроксида кальция
для пломбирования труднопроходимых корневых каналов
«АПЕКСДЕНТ»
(без йодоформа)
по ТУ 9391-071-45814830-2001

НАЗНАЧЕНИЕ
Материал-паста рентгеноконтрастная на основе гидроксида кальция для пломбирования
труднопроходимых корневых каналов «Апексдент» (далее по тексту - паста, материал,
«Апексдент») предназначена для пломбирования труднопроходимых корневых каналов при
лечении всех форм периодонтита, а также для апексификации зубов.
Материал «Апексдент» представляет собой готовую к применению пасту:
- материал «Апексдент» (с йодоформом);
- материал «Апексдент» (без йодоформа).

Материал «Апексдент» (без йодоформа) применяется для лечения пульпита постоянных
и временных зубов с незавершенным ростом и формированием корня (апексогенез), для
формирования остеоднго-цементного барьера при несформированной верхушке или кроне
зуба при лечении кариеса.

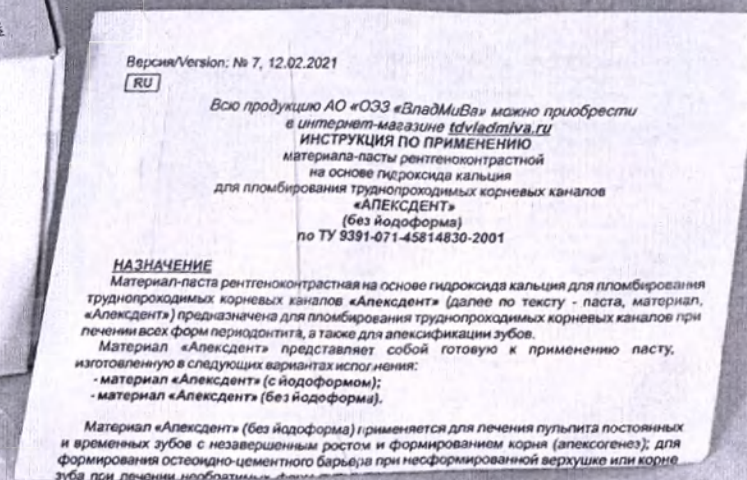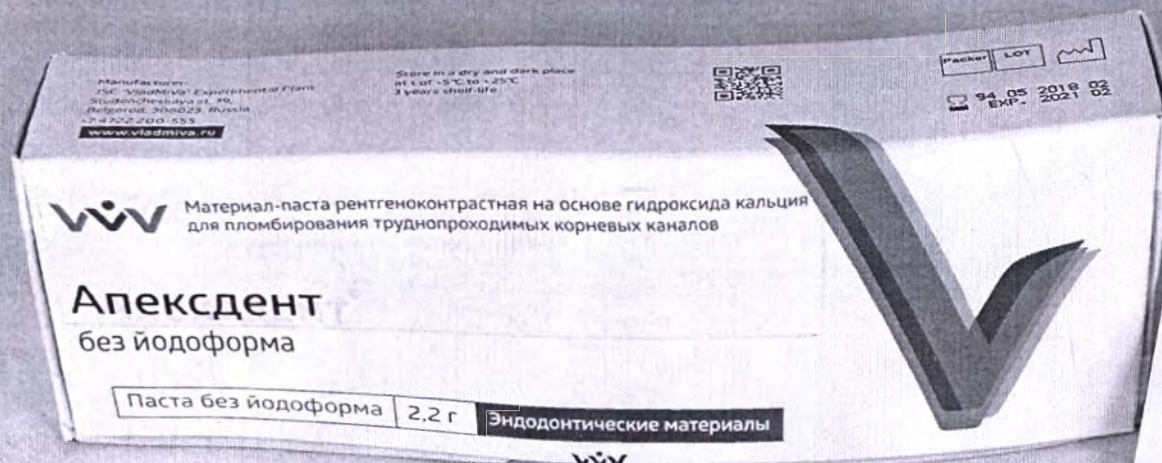


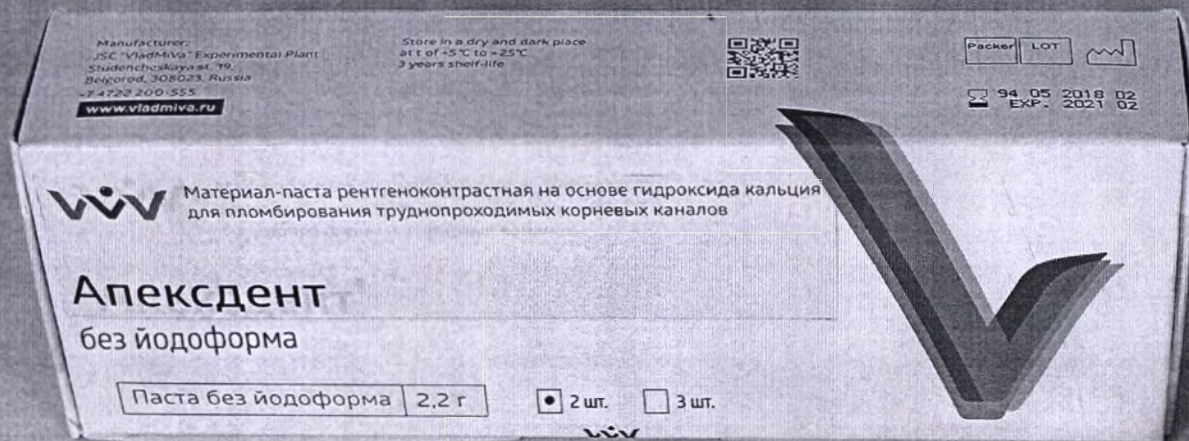





Версия/Version: № 7, 12.02.2021
 RU





Всю продукцию АО «ОЗЗ «ВладМиВа» можно приобрести в интернет-магазине tdvladmiva.ru
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
 материала-пасты рентгеноконтрастной на основе гидроксида кальция для пломбирования труднопроходимых корневых каналов «АПЕКСДЕНТ» (без йодоформа)
 по ТУ 9391-071-45814830-2001




НАЗНАЧЕНИЕ
 Материал-паста рентгеноконтрастная на основе гидроксида кальция для пломбирования труднопроходимых корневых каналов «Апексдент» (далее по тексту - паста, материал, «Апексдент») предназначена для пломбирования труднопроходимых корневых каналов при лечении всех форм периодонтита, а также для апексификации зубов.
 Материал «Апексдент» представляет собой готовую к применению пасту, изготовленную в следующих вариантах исполнения:
 - материал «Апексдент» (с йодоформом);
 - материал «Апексдент» (без йодоформа).





Материал «Апексдент» (без йодоформа) применяется для лечения пульпита постоянных и временных зубов с незавершенным ростом и формированием корня (апексогенез), для формирования остеоидно-цементного барьера при несформированной верхушке или корне зуба при лечении нервно-воспалительных заболеваний.

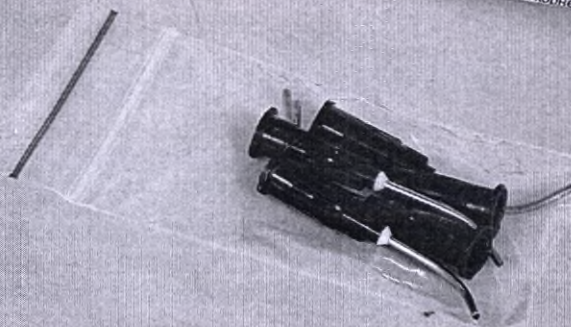
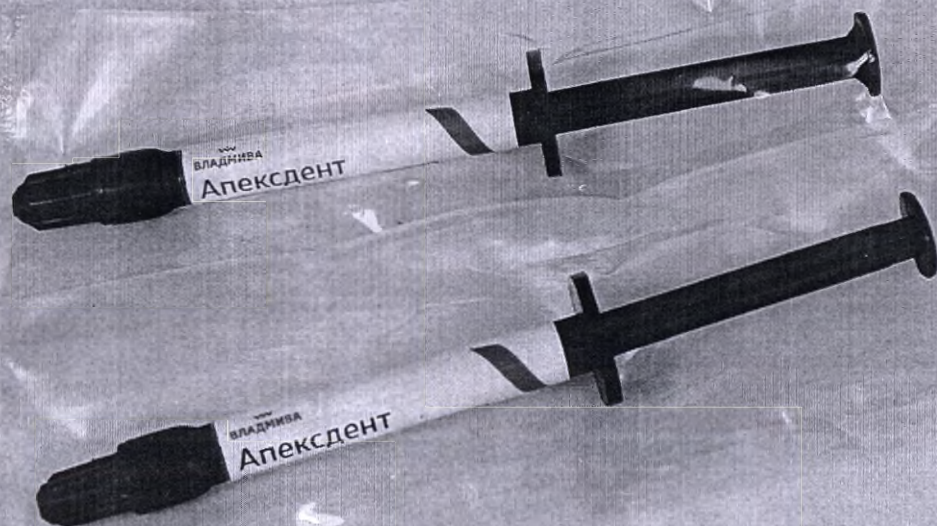


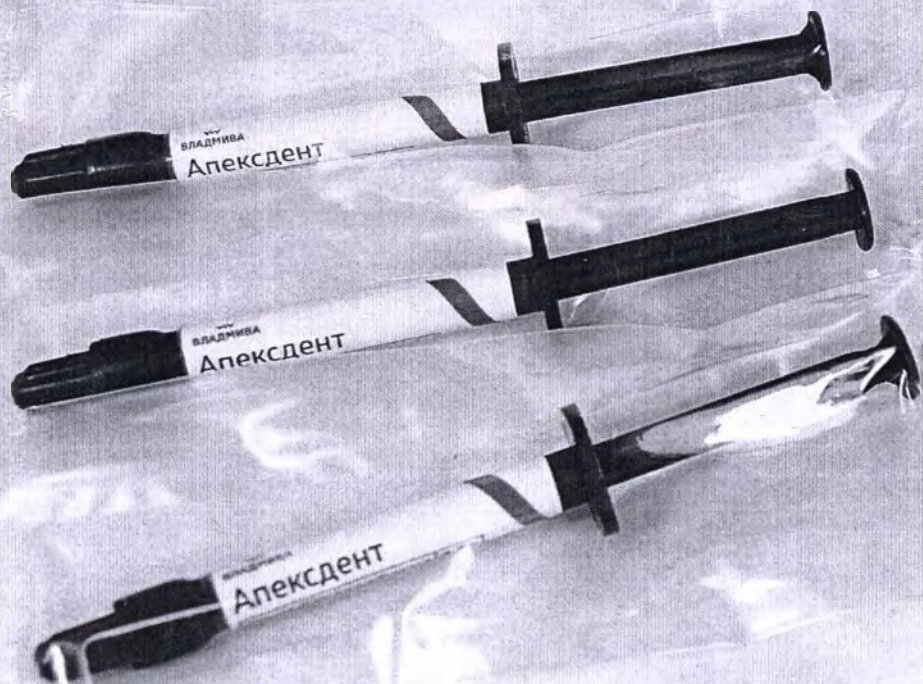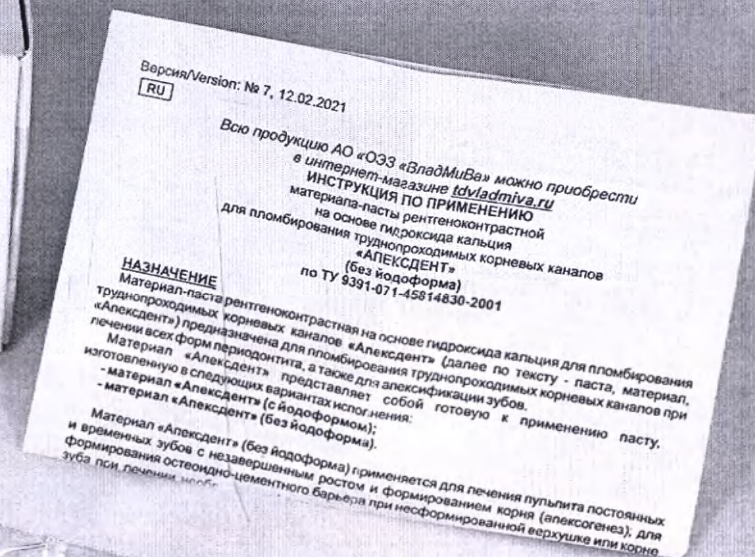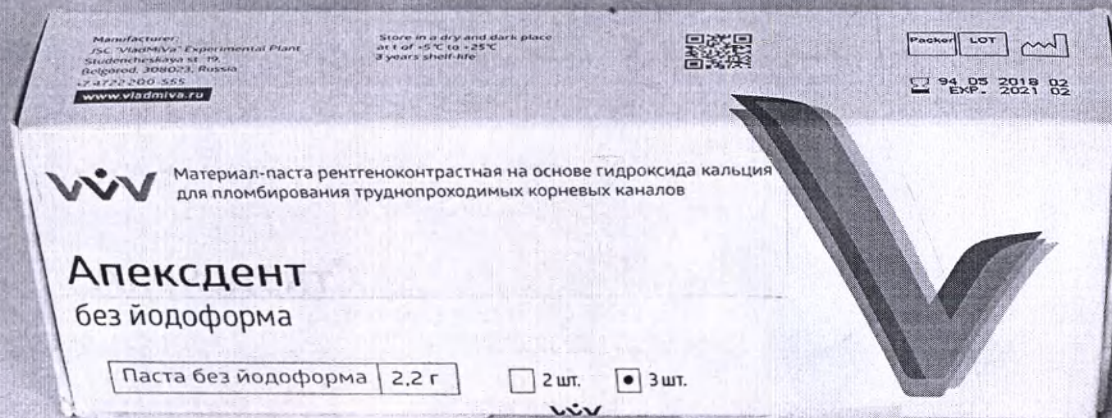

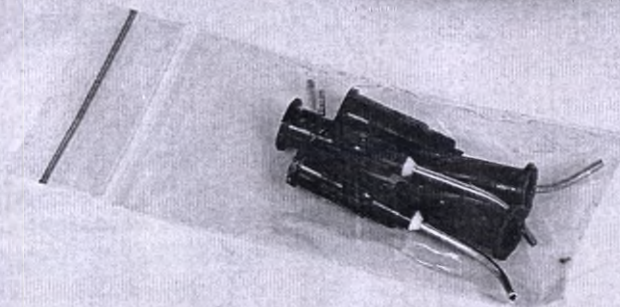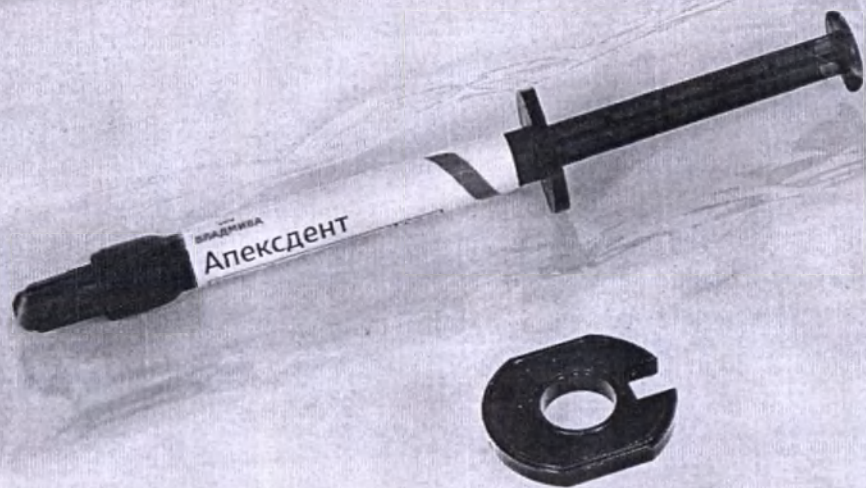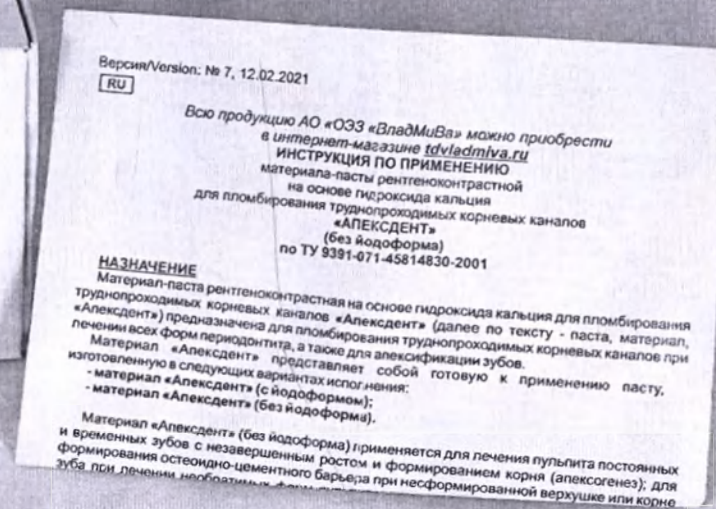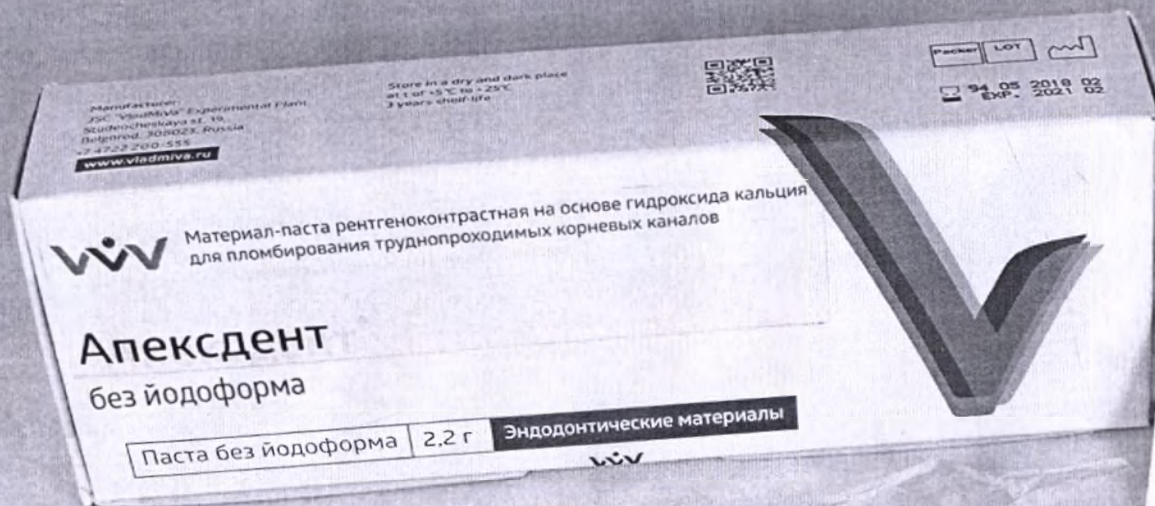

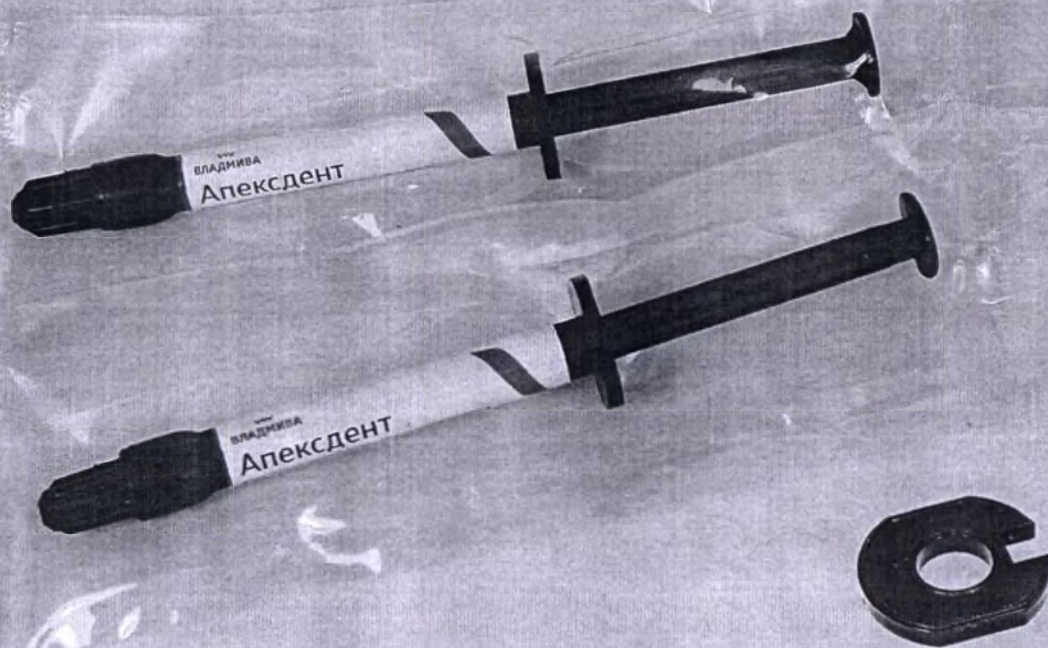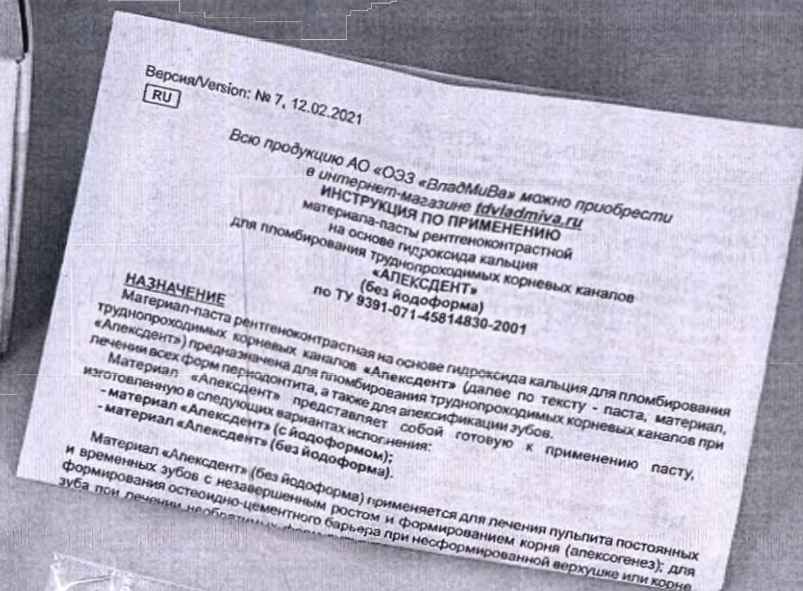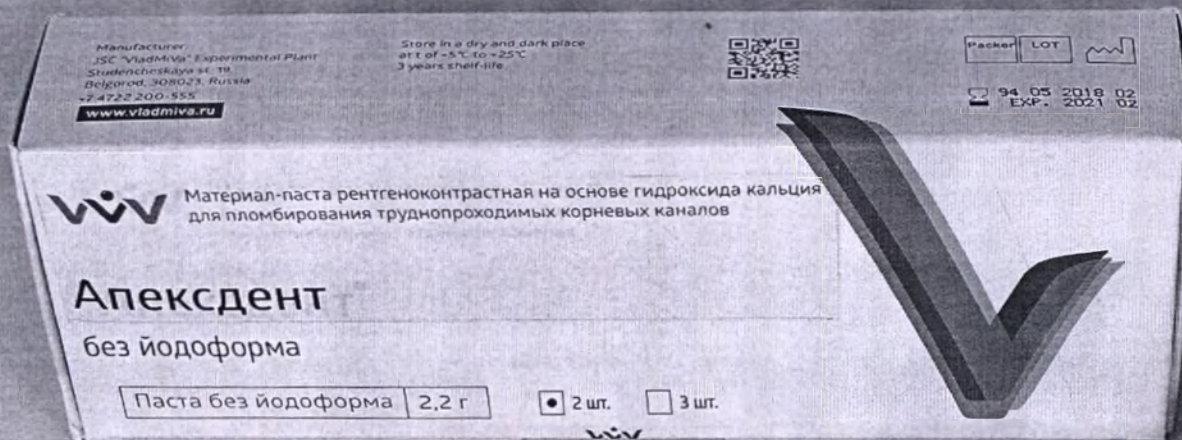

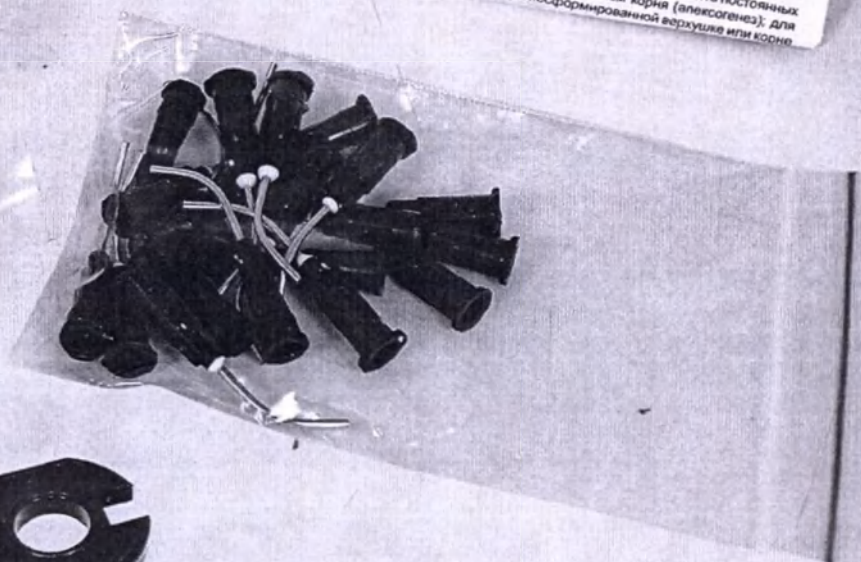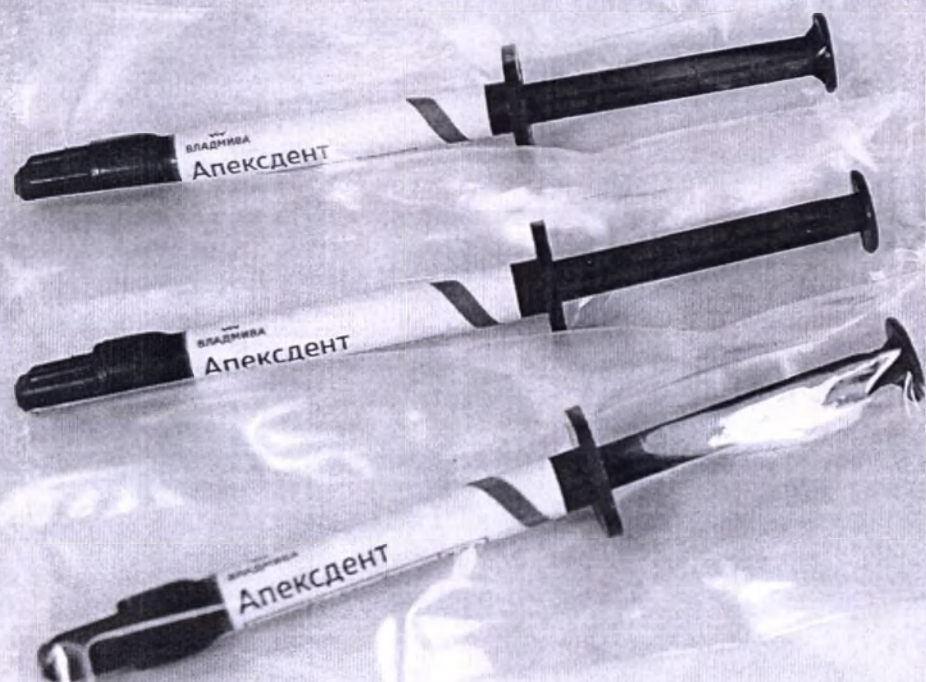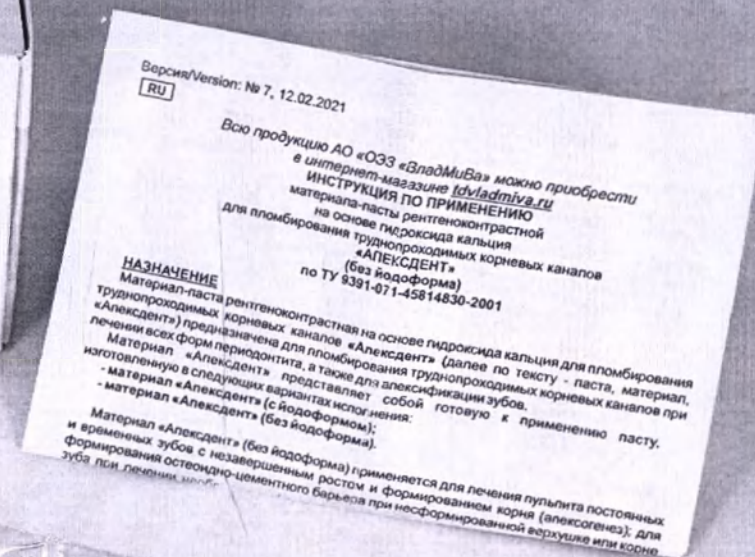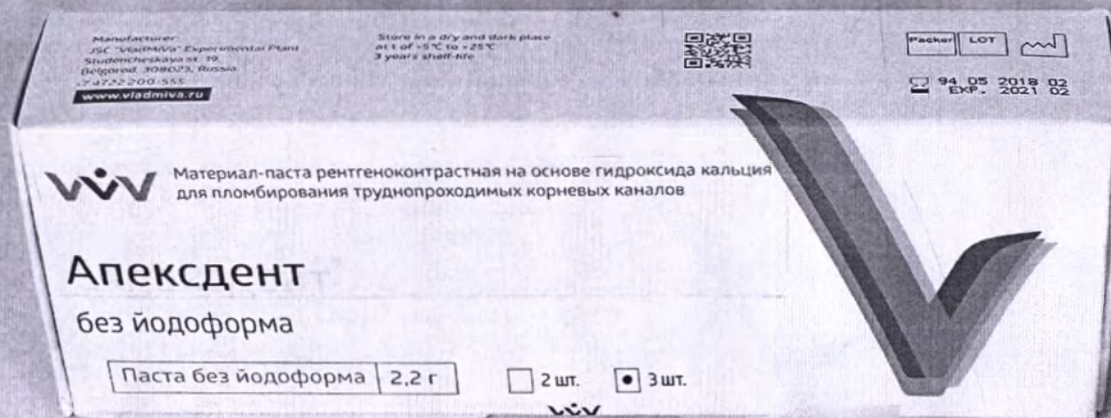

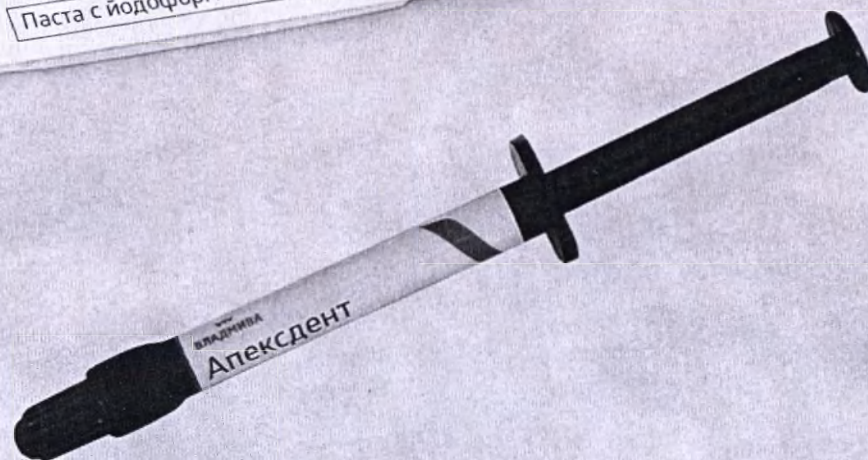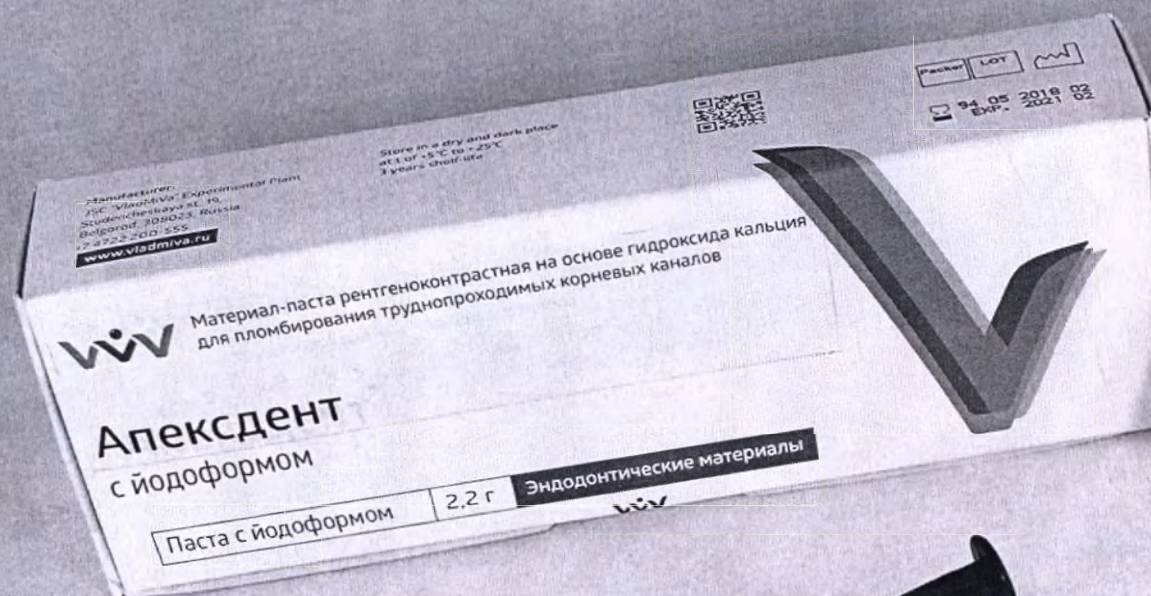

Версия/Version: № 8, 12.02.2021

RU

Всю продукцию АО «ОЗЗ «ВладМиВа» можно приобрести в интернет-магазине tdvladmiva.ru
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
 материала-пасты рентгеноконтрастной на основе гидроксида кальция для пломбирования труднопроходимых корневых каналов
«АПЕКСДЕНТ»
 (с йодоформом)
 по ТУ 9391-071-45814830-2001

НАЗНАЧЕНИЕ


Материал-паста рентгеноконтрастная на основе гидроксида кальция для пломбирования труднопроходимых корневых каналов «Апексдент» (далее по тексту - паста, материал, «Апексдент») предназначена для пломбирования труднопроходимых корневых каналов при лечении всех форм периодонтита, а также для апексификации зубов.

Материал «Апексдент» представляет собой готовую к применению пасту, изготовленную в следующих вариантах исполнения:

- материал «Апексдент» (с йодоформом);
- материал «Апексдент» (без йодоформа).

Материал «Апексдент» (с йодоформом) применяется для пломбирования корневых каналов после депульпирования и лечения инфицированных каналов зубов при хронических периодонтитах (в том числе при наличии гранулем); для апексификации при периодонтитах, при несформированном апексе, при перфорациях корня, а также резорбции кости.

Показания к применению: временное пломбирование корневых каналов постоянных и

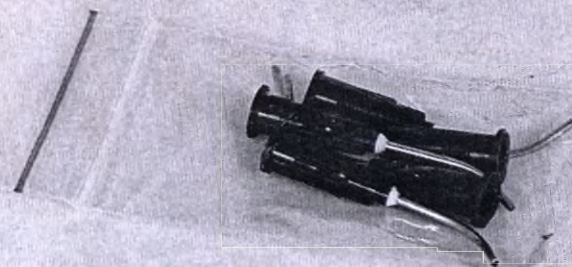

Manufacturer:
JSC "VladMivA" Experimental Plant
Studenetskaya st. 19,
Belgorod, 308023, Russia
+7 4722 200-555
www.vladmiva.ru

Store in a dry and dark place
at t of -5°C to +25°C
3 years shelf life



Packlot
94 05 2018 02
Exp. 2021 02



Материал-паста рентгеноконтрастная на основе гидроксида кальция
для пломбирования труднопроходимых корневых каналов


Апексдент
с йодоформом

Паста с йодоформом

2,2 г

☒ 2 шт.

☐ 3 шт.

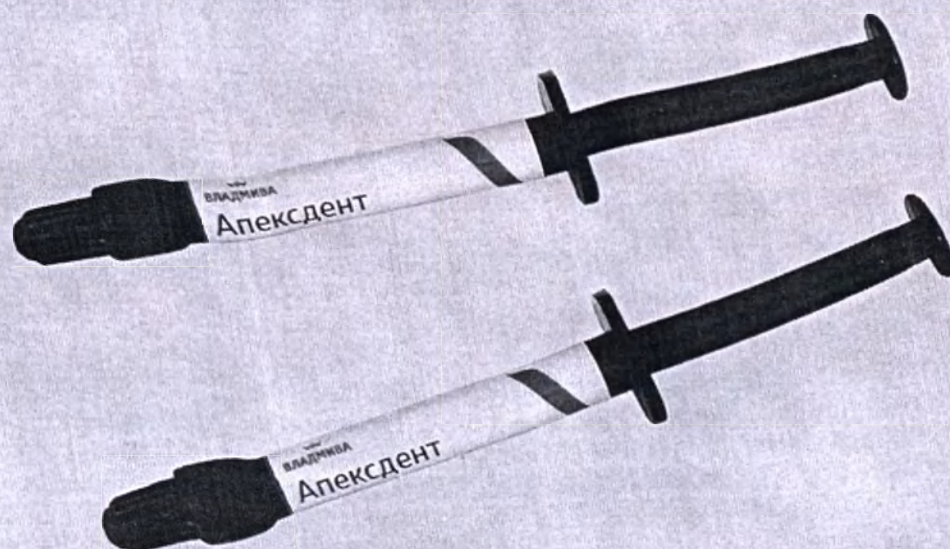

Версия/Version: № 8, 12.02.2021

RU

Всю продукцию АО «ОЗЗ «ВладМиВа» можно приобрести
в интернет-магазине idvladmiva.ru
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
материала-пасты рентгеноконтрастной
на основе гидроксида кальция
для пломбирования труднопроходимых корневых каналов
«АПЕКСДЕНТ»
(с йодоформом)
по ТУ 9391-071-45814830-2001

НАЗНАЧЕНИЕ


Материал-паста рентгеноконтрастная на основе гидроксида кальция для пломбирования
труднопроходимых корневых каналов «Апексдент» (далее по тексту - паста, материал,
«Апексдент») предназначена для пломбирования труднопроходимых корневых каналов при
лечении всех форм периодонтита, а также для алексификации зубов.



Материал «Апексдент» представляет собой готовую к применению пасту, изготовленную
в следующих вариантах исполнения:

- материал «Апексдент» (с йодоформом);
- материал «Апексдент» (без йодоформа).

Материал «Апексдент» (с йодоформом) применяется для пломбирования корневых
каналов после депульпирования и лечения инфицированных каналов зубов при
хронических периодонтитах (в том числе при наличии гранулемы); для алексификации при
периодонтитах, при несформированном апексе, при перфорациях корня, а также резорбции
кости.

Показания к применению: временное пломбирование корневых каналов постоянных и

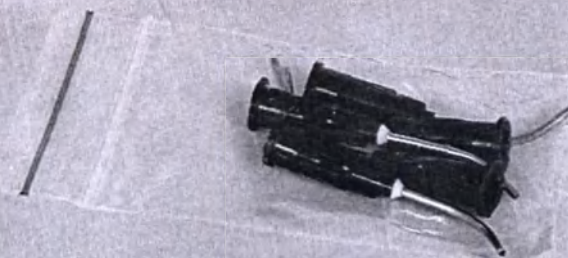

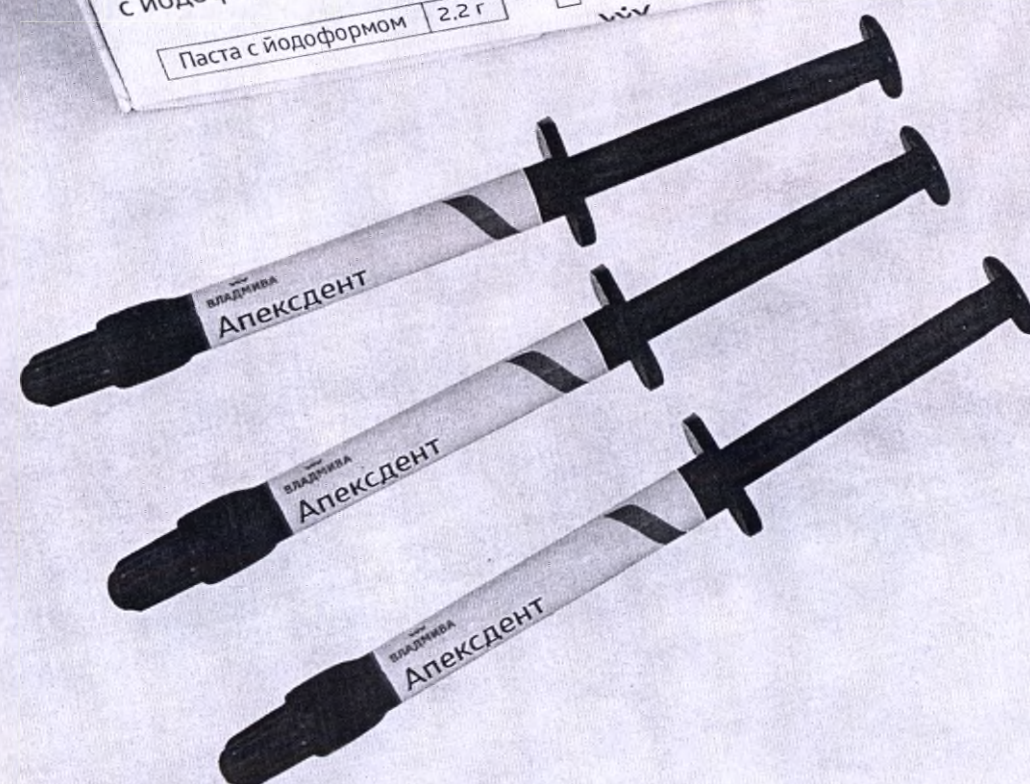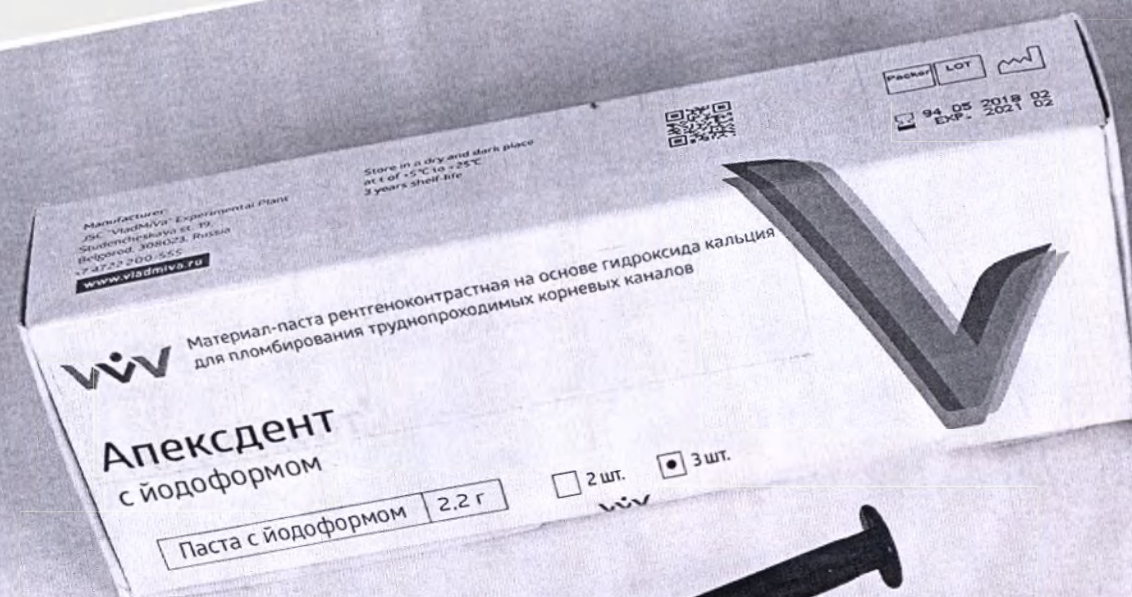

Версия/Version: № 8, 12.02.2021

RU

Всю продукцию АО «ОЗЗ «ВладМиВа» можно приобрести

в интернет-магазине tdvladmiva.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

материала-пасты рентгеноконтрастной

на основе гидроксида кальция

для пломбирования труднопроходимых корневых каналов

«АПЕКСДЕНТ»

(с йодоформом)

по ТУ 9391-071-45814830-2001

НАЗНАЧЕНИЕ


Материал-паста рентгеноконтрастная на основе гидроксида кальция для пломбирования труднопроходимых корневых каналов «Апексдент» (далее по тексту - паста, материал, «Апексдент») предназначена для пломбирования труднопроходимых корневых каналов при лечении всех форм периодонтита, а также для апексификации зубов.

Материал «Апексдент» представляет собой готовую к применению пасту, изготовленную в следующих вариантах исполнения:

- материал «Апексдент» (с йодоформом),
- материал «Апексдент» (без йодоформа).

Материал «Апексдент» (с йодоформом) применяется для пломбирования корневых каналов после депульпирования и лечения инфицированных каналов зубов при хронических периодонтитах (в том числе при наличии гранулемы); для апексификации при периодонтитах, при несформированном апексе, при перфорациях корня, а также резорбции кости.

Показания к применению: временное пломбирование корневых каналов постоянных и

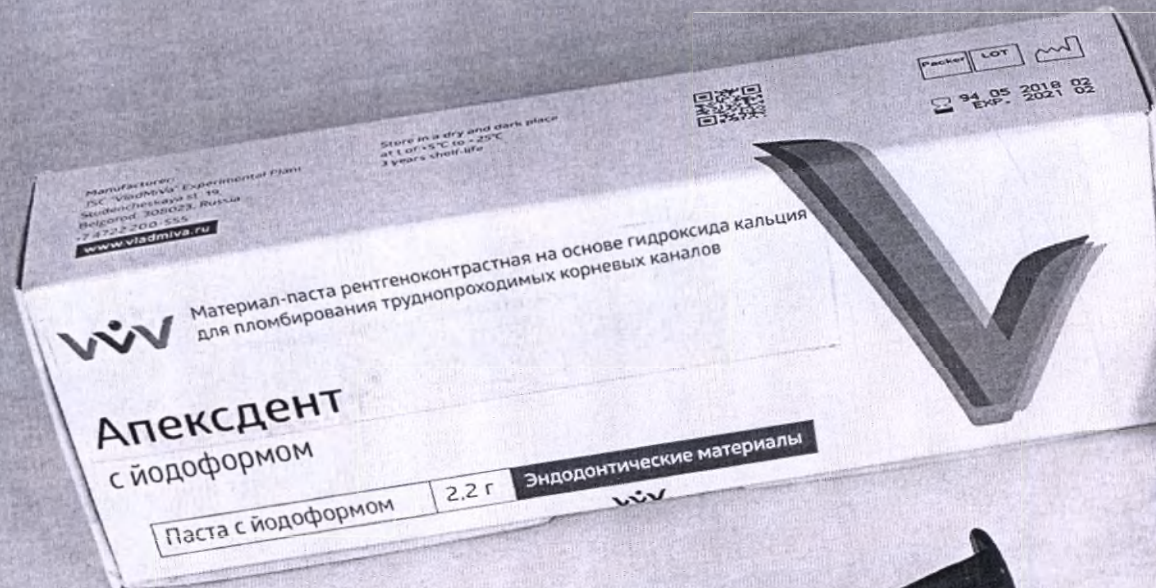

Версия/Version: № 8, 12.02.2021

RU

Всю продукцию АО «ОЗЗ «ВладМиВа» можно приобрести в интернет-магазине tdvladmiva.ru
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
 материала-пасты рентгеноконтрастной на основе гидроксида кальция для пломбирования труднопроходимых корневых каналов
«АПЕКСДЕНТ»
 (с йодоформом)
 по ТУ 9391-071-45814830-2001

НАЗНАЧЕНИЕ


Материал-паста рентгеноконтрастная на основе гидроксида кальция для пломбирования труднопроходимых корневых каналов «Апексдент» (далее по тексту – паста, материал, «Апексдент») предназначена для пломбирования труднопроходимых корневых каналов при лечении всех форм периодонтита, а также для апексификации зубов.



Материал «Апексдент» представляет собой готовую к применению пасту, изготовленную в следующих вариантах исполнения:

- материал «Апексдент» (с йодоформом);
- материал «Апексдент» (без йодоформа).

Материал «Апексдент» (с йодоформом) применяется для пломбирования корневых каналов после депульпирования и лечения инфицированных каналов зубов при хронических периодонтитах (в том числе при наличии гранулемы), для апексификации при периодонтитах, при несформированном апексе, при перфорациях корня, а также резорбции кости.

Показания к применению: временное пломбирование корневых каналов постоянных и

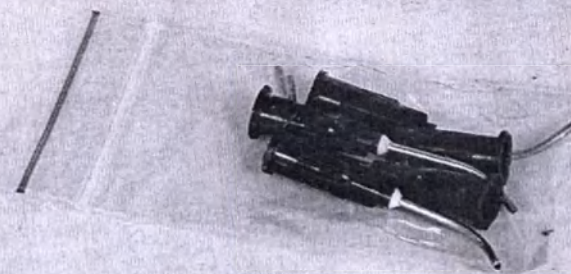

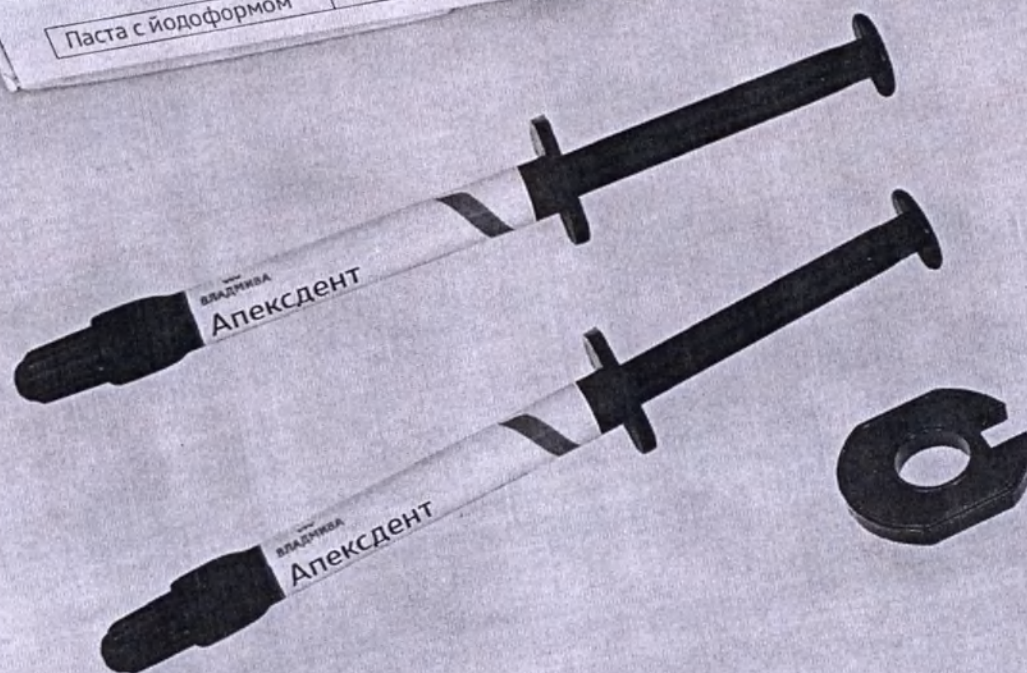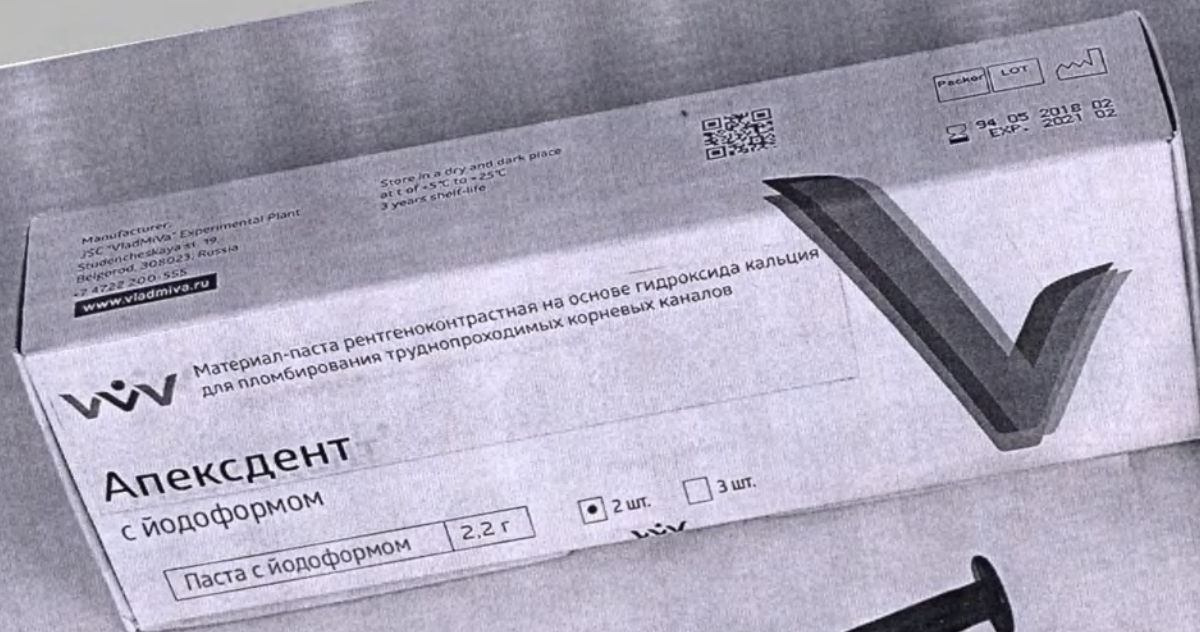

Версия/Version: № 8, 12.02.2021

RU

Всю продукцию АО «ОЗЗ «ВладМиВа» можно приобрести
в интернет-магазине td.vladmiva.ru
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
материала-пасты рентгеноконтрастной
на основе гидроксида кальция
для пломбирования труднопроходимых корневых каналов
«АПЕКСДЕНТ»
(с йодоформом)
по ТУ 9391-071-45814830-2001

НАЗНАЧЕНИЕ


Материал-паста рентгеноконтрастная на основе гидроксида кальция для пломбирования труднопроходимых корневых каналов «Апексдент» (далее по тексту - паста, материал, «Апексдент») предназначена для пломбирования труднопроходимых корневых каналов при лечении всех форм периодонтита, а также для апексификации зубов.



Материал «Апексдент» представляет собой готовую к применению пасту, изготовленную в следующих вариантах исполнения:

- материал «Апексдент» (с йодоформом);
- материал «Апексдент» (без йодоформа).

Материал «Апексдент» (с йодоформом) применяется для пломбирования корневых каналов после депульпирования и лечения инфицированных каналов зубов при хронических периодонтитах (в том числе при наличии гранулемы); для апексификации при периодонтитах, при несформированном апексе, при перфорациях корня, а также резорбции кости.

Показания к применению: временное пломбирование корневых каналов постоянных и

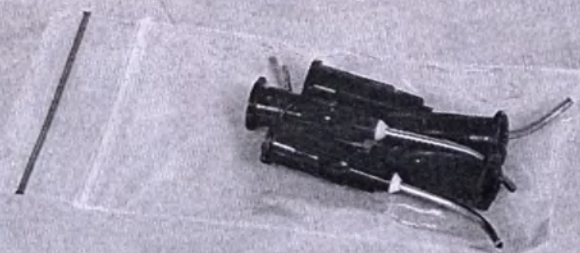

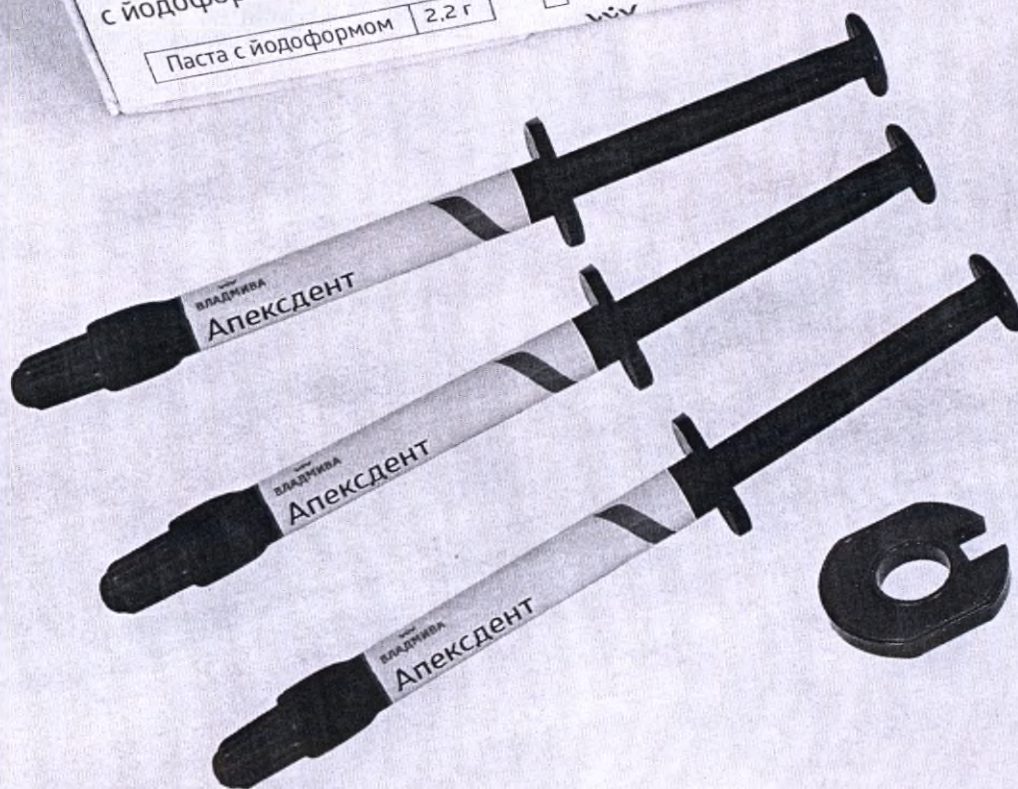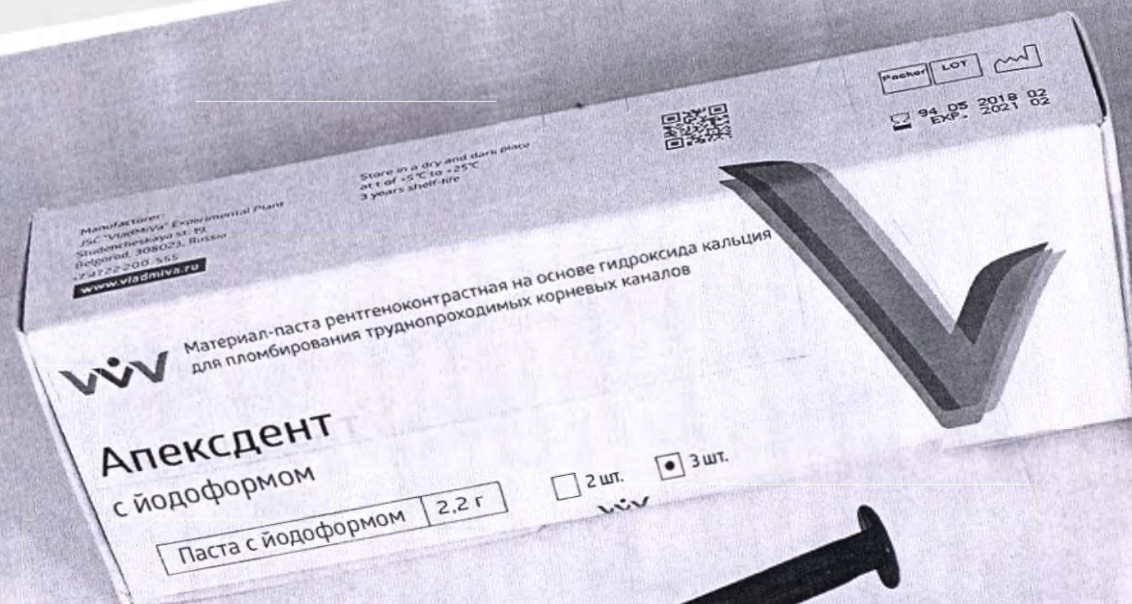

Версия/Version: № 8, 12.02.2021

RU

Всю продукцию АО «ОЗЗ «ВладМиВа» можно приобрести
в интернет-магазине tdvladmiva.ru
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
материала-пасты рентгеноконтрастной
на основе гидроксида кальция
для пломбирования труднопроходимых корневых каналов
«АПЕКСДЕНТ»
(с йодоформом)
по ТУ 9391-071-45814830-2001

НАЗНАЧЕНИЕ




Материал-паста рентгеноконтрастная на основе гидроксида кальция для пломбирования труднопроходимых корневых каналов «Апексдент» (далее по тексту - паста, материал, «Апексдент») предназначена для пломбирования труднопроходимых корневых каналов при лечении всех форм периодонтита, а также для апексификации зубов.

Материал «Апексдент» представляет собой готовую к применению пасту, изготовленную в следующих вариантах исполнения:

- материал «Апексдент» (с йодоформом);
- материал «Апексдент» (без йодоформа).

Материал «Апексдент» (с йодоформом) применяется для пломбирования корневых каналов после депульпирования и лечения инфицированных каналов зубов при хронических периодонтитах (в том числе при наличии гранулемы); для апексификации при периодонтитах, при несформированном апексе, при перфорациях корня, а также резорбции кости.

(Показания к применению, временное пломбирование корневых каналов постоянных и

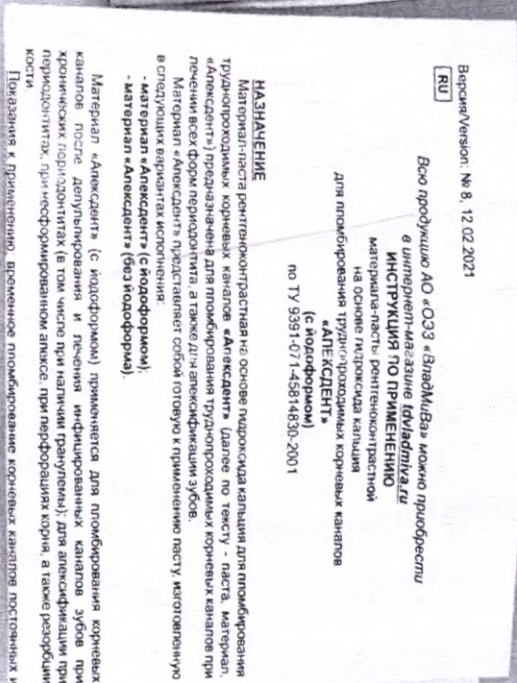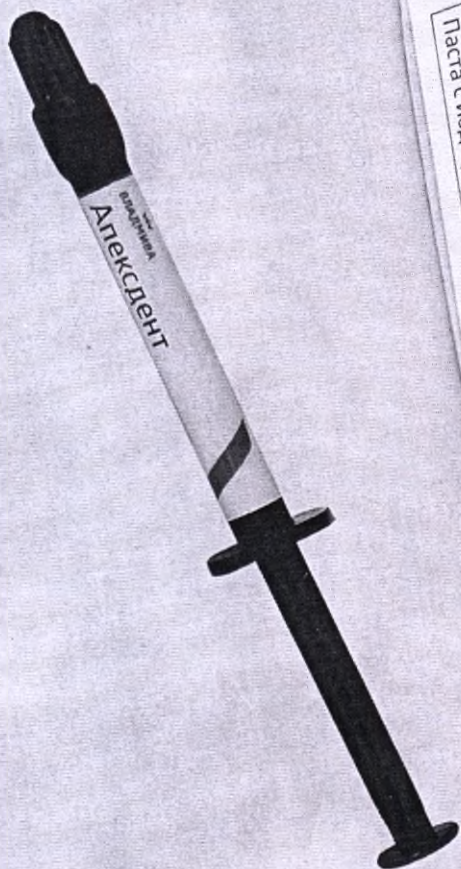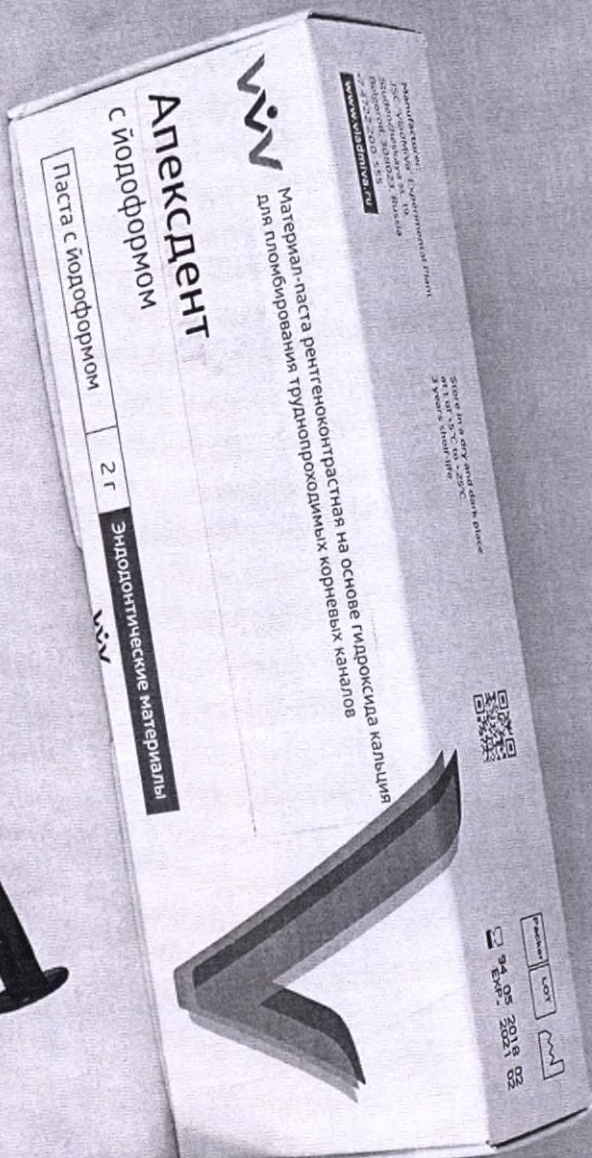

Версия/Version: № 8, 12.02.2021

[RU]

Всю продукцию АО «ОЗЗ «ВладМиВа» можно приобрести
в интернет-магазине vivadmi.ru
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Материал-паста рентгеноконтрастная
на основе гидроксида кальция
для пломбирования труднопроходимых корневых каналов
«АЛЕКСДЕНТ»
(с йодоформом)
по ТУ 9391-071-45814830-2001

НАЗНАЧЕНИЕ



Материал-паста рентгеноконтрастная на основе гидроксида кальция для пломбирования труднопроходимых корневых каналов «Алексдент» (далее по тексту - паста, материал, «Алексдент») предназначен для пломбирования труднопроходимых корневых каналов при лечении всех форм периодонтита, а также для апексификации зубов.

Материал «Алексдент» представляет собой готовую к применению пасту, изготовленную в следующих вариантах исполнения:

- материал «Алексдент» (с йодоформом);
- материал «Алексдент» (без йодоформа).

Материал «Алексдент» (с йодоформом) применяется для пломбирования корневых каналов после депульпирования и лечения инфицированных каналов зубов при хронических периодонтитах (в том числе при наличии гранулем), для апексификации при периодонтитах, при несформированном апексе при перфорации корня, а также для разрыхления кости.

Показания к применению, временное пломбирование корневых каналов постоянных и

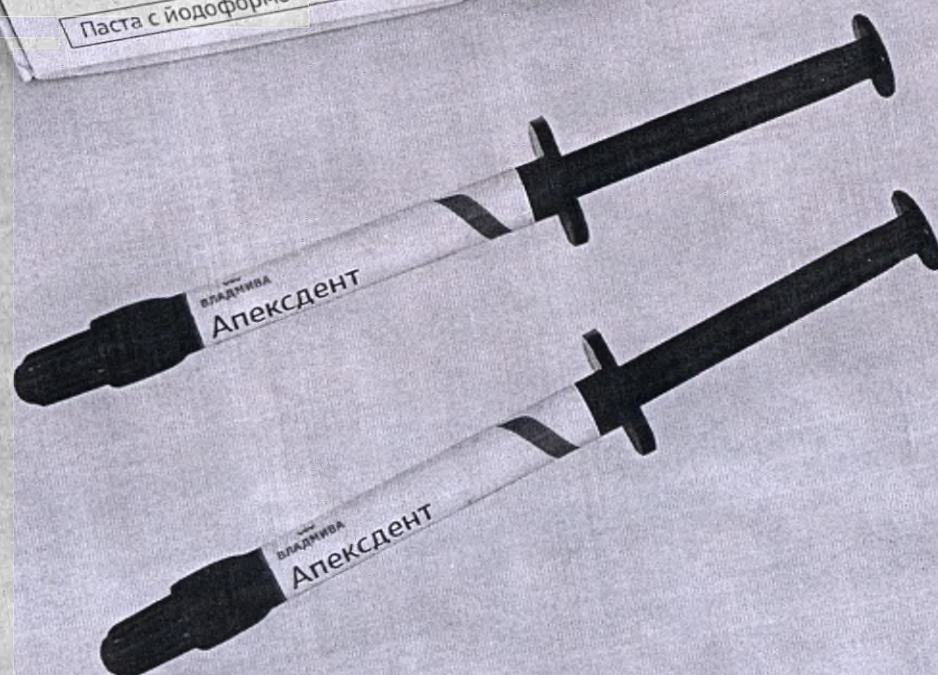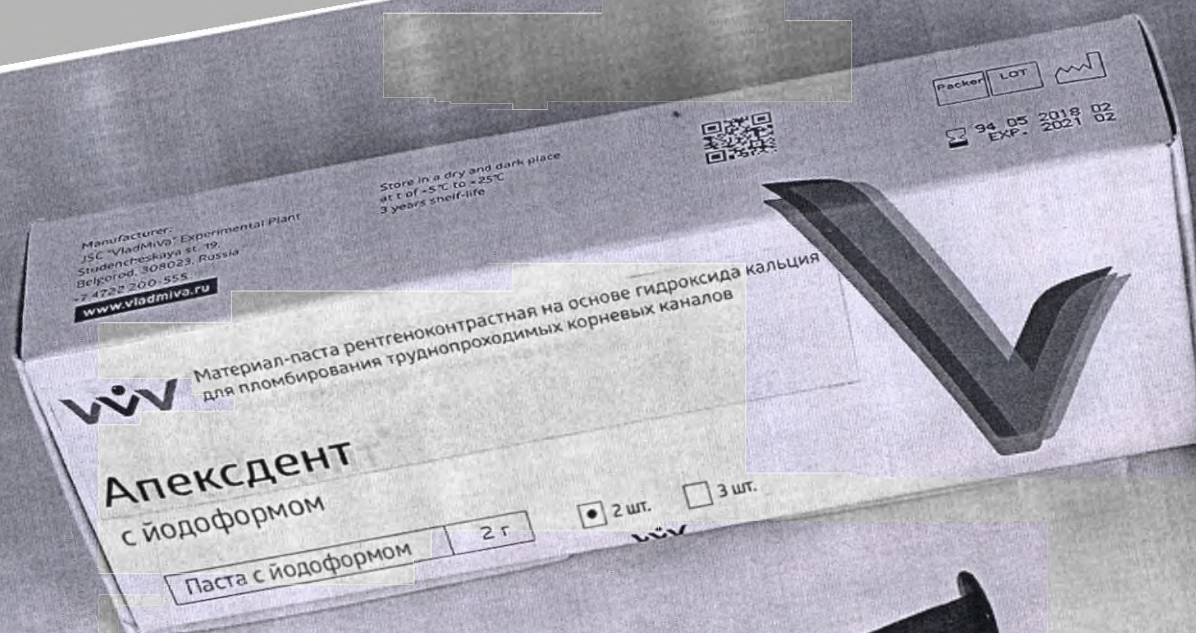

Версия/Version: № 8, 12.02.2021

RU

Всю продукцию АО «ОЗЗ «ВладМиВа» можно приобрести в интернет-магазине tdvvladmiva.ru
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
 материала-пасты рентгеноконтрастной на основе гидроксида кальция для пломбирования труднопроходимых корневых каналов «АПЕКСДЕНТ» (с йодоформом)
 по ТУ 9391-071-45814830-2001

НАЗНАЧЕНИЕ


Материал-паста рентгеноконтрастная на основе гидроксида кальция для пломбирования труднопроходимых корневых каналов «Апексдент» (далее по тексту - паста, материал, «Апексдент») предназначена для пломбирования труднопроходимых корневых каналов при лечении всех форм периодонтита, а также для апексификации зубов.



Материал «Апексдент» представляет собой готовую к применению пасту, изготовленную в следующих вариантах исполнения:

- материал «Апексдент» (с йодоформом);
- материал «Апексдент» (без йодоформа).

Материал «Апексдент» (с йодоформом) применяется для пломбирования корневых каналов после депульпирования и лечения инфицированных каналов зубов при хронических периодонтитах (в том числе при наличии гранулемы); для апексификации при периодонтитах, при несформированном апексе, при перфорациях корня, а также резорбции кости.

Показания к применению: временное пломбирование корневых каналов постоянных и

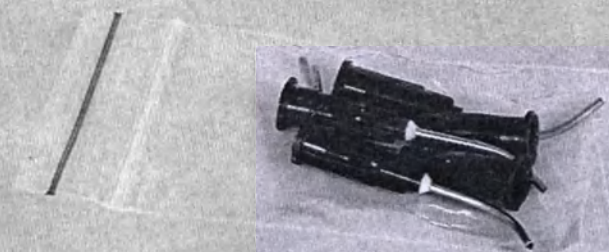

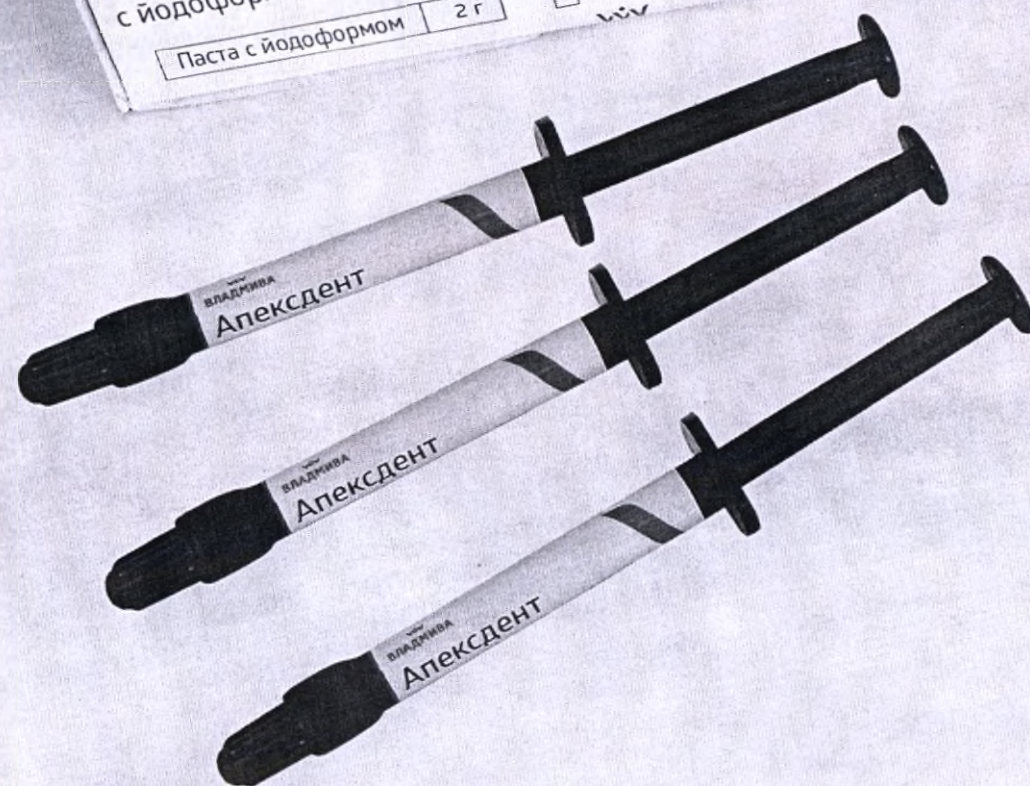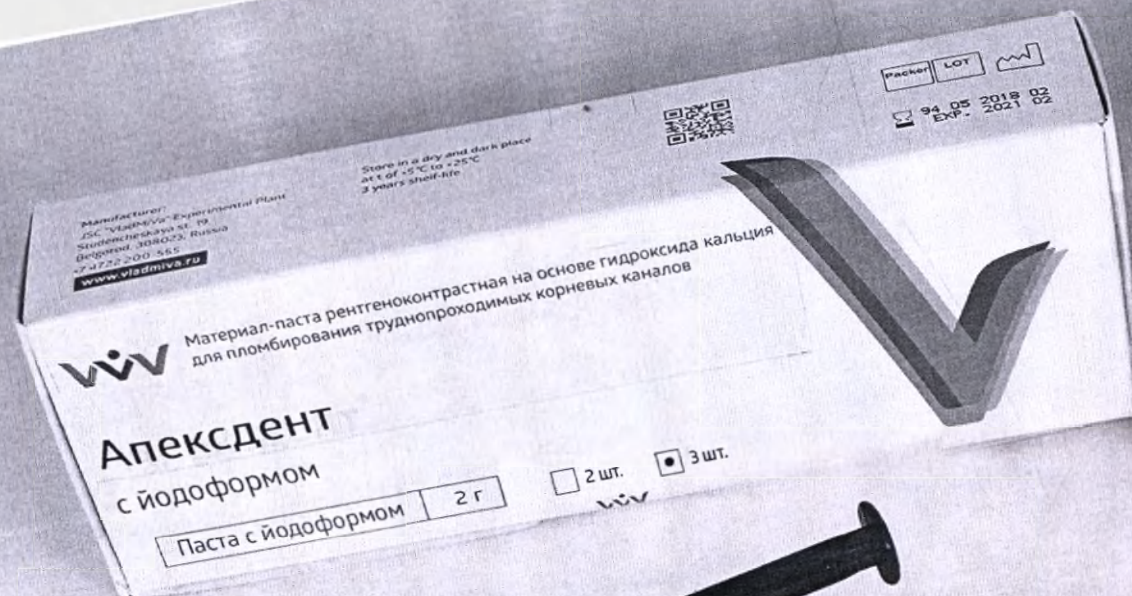

Версия/Version: № 8, 12.02.2021

[RU]

Всю продукцию АО «ОЗЗ «ВладМиВа» можно приобрести в интернет-магазине tdvladmiva.ru
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
 материала-пасты рентгеноконтрастной на основе гидроксида кальция для пломбирования труднопроходимых корневых каналов «АПЕКСДЕНТ» (с йодоформом)
 по ТУ 9391-071-45814830-2001

НАЗНАЧЕНИЕ


Материал-паста рентгеноконтрастная на основе гидроксида кальция для пломбирования труднопроходимых корневых каналов «Апексдент» (далее по тексту - паста, материал, «Апексдент») предназначена для пломбирования труднопроходимых корневых каналов при лечении всех форм периодонтита, а также для апексификации зубов.




Материал «Апексдент» представляет собой готовую к применению пасту, изготовленную в следующих вариантах исполнения:

- материал «Апексдент» (с йодоформом);
- материал «Апексдент» (без йодоформа).

Материал «Апексдент» (с йодоформом) применяется для пломбирования корневых каналов после депульпирования и лечения инфицированных каналов зубов при хронических периодонтитах (в том числе при наличии гранулемы); для апексификации при периодонтитах, при несформированном апексе, при перфорациях корня, а также резорбции кости.

Показания к применению. временное пломбирование корневых каналов постоянных и

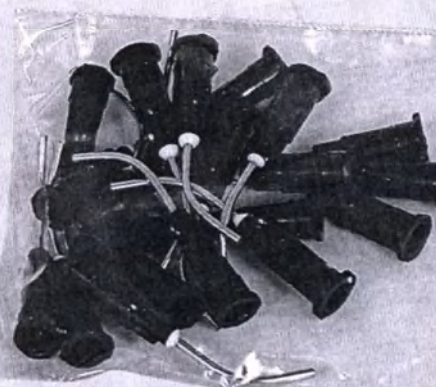

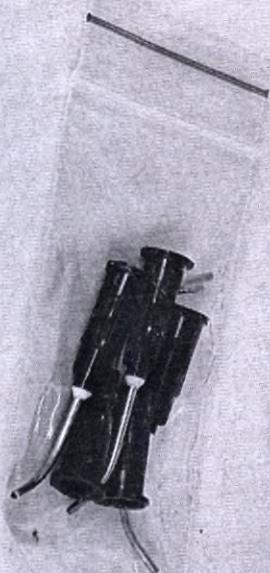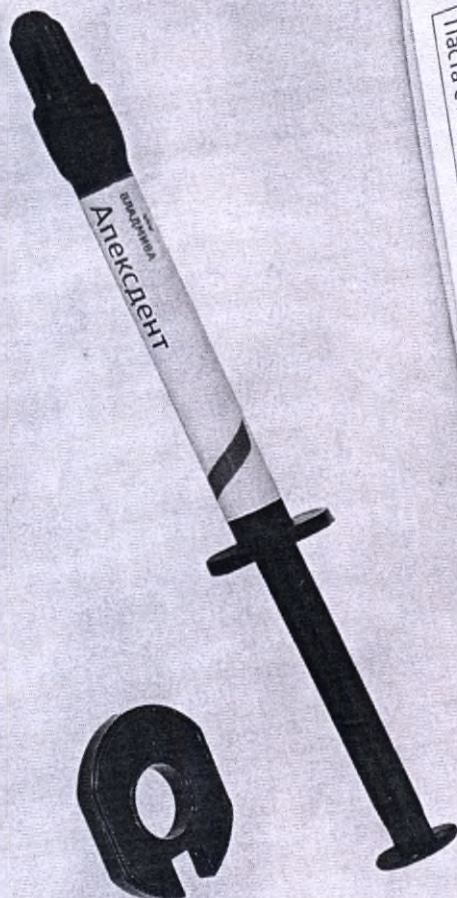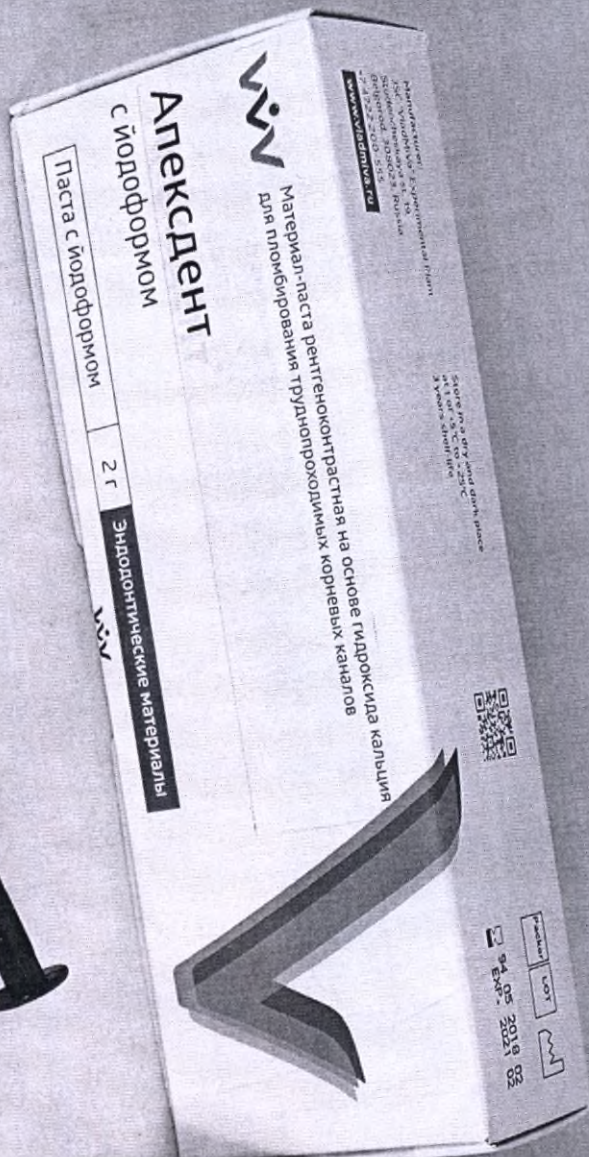

Версия/Version: № 8, 12.02.2021



RU

Вся продукция АО «ВладМиВа» можно приобрести
в интернет-магазине **(bvladmiwa.ru)**
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
материала-пасты рентгеноконтрастной
на основе гидроксида кальция
для пломбирования труднопроходимых корневых каналов
«АЛЕКСДЕНТ»
(с йодоформом)
по ТУ 9391-071-45814830-2001

НАЗНАЧЕНИЕ
Материал-паста рентгеноконтрастная на основе гидроксида кальция для пломбирования
труднопроходимых корневых каналов «Алексдент» (далее по тексту - паста, материал,
«Алексдент») предназначена для пломбирования труднопроходимых корневых каналов при
лечении всех форм периодонтита, а также для апексификации зубов.
Материал «Алексдент» предоставляет собой готовую к применению пасту, готовую к
использованию в спланированных случаях.
- материал «Алексдент» (с йодоформом).
- материал «Алексдент» (без йодоформа).

Материал «Алексдент» (с йодоформом) применяется для пломбирования корневых
каналов после депульпирования и лечения инфицированных каналов зубов при
хронических периодонтитах (в том числе при наличии гранулем). Для апексификации при
периодонтитах, при неформированном апексе, при перфорации корня, а также резорбции
кости.

Показана к применению, в том числе, пломбирование корневых каналов постоперационных и

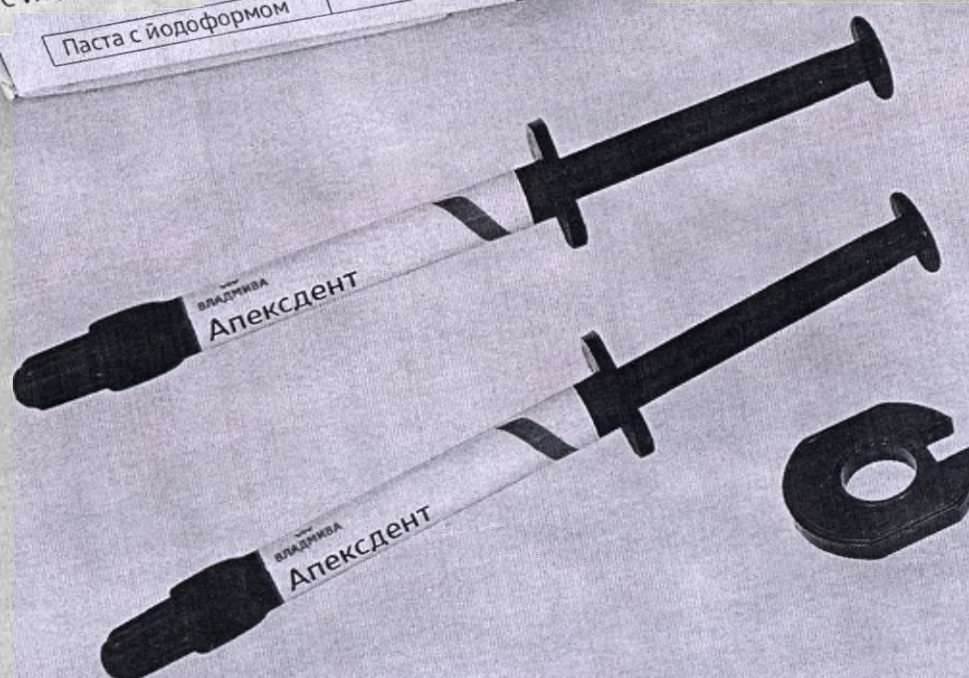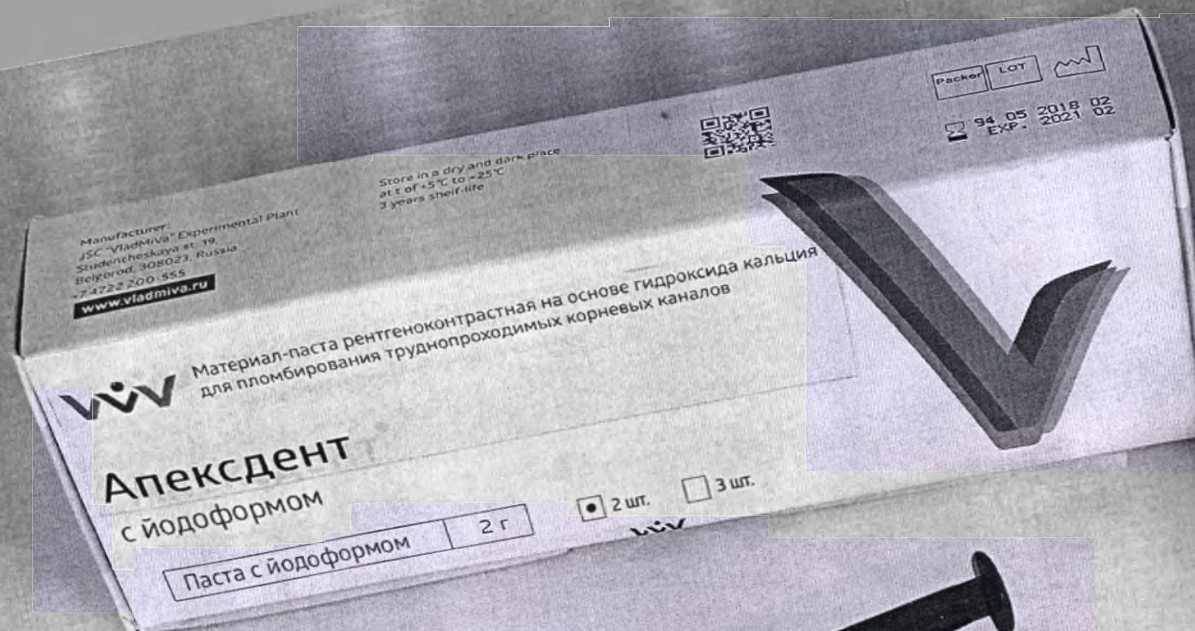

Версия/Version: № 8, 12.02.2021

RU

Всю продукцию АО «ОЗЗ «ВладМиВа» можно приобрести
в интернет-магазине tdvladmiva.ru
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
материала-пасты рентгеноконтрастной
на основе гидроксида кальция
для пломбирования труднопроходимых корневых каналов
«АПЕКСДЕНТ»
(с йодоформом)
по ТУ 9391-071-45814830-2001

НАЗНАЧЕНИЕ

Материал-паста рентгеноконтрастная на основе гидроксида кальция для пломбирования труднопроходимых корневых каналов «Апексдент» (далее по тексту - паста, материал, «Апексдент») предназначена для пломбирования труднопроходимых корневых каналов при лечении всех форм периодонтита, а также для апексификации зубов.



Материал «Апексдент» представляет собой готовую к применению пасту, изготовленную в следующих вариантах исполнения:

- материал «Апексдент» (с йодоформом);
- материал «Апексдент» (без йодоформа).

Материал «Апексдент» (с йодоформом) применяется для пломбирования корневых каналов после депульпирования и лечения инфицированных каналов зубов при хронических периодонтитах (в том числе при наличии гранулем); для апексификации при периодонтитах, при несформированном апексе, при перфорациях корня, а также резорбции кости.

Показания к применению: временное пломбирование корневых каналов постоянных и



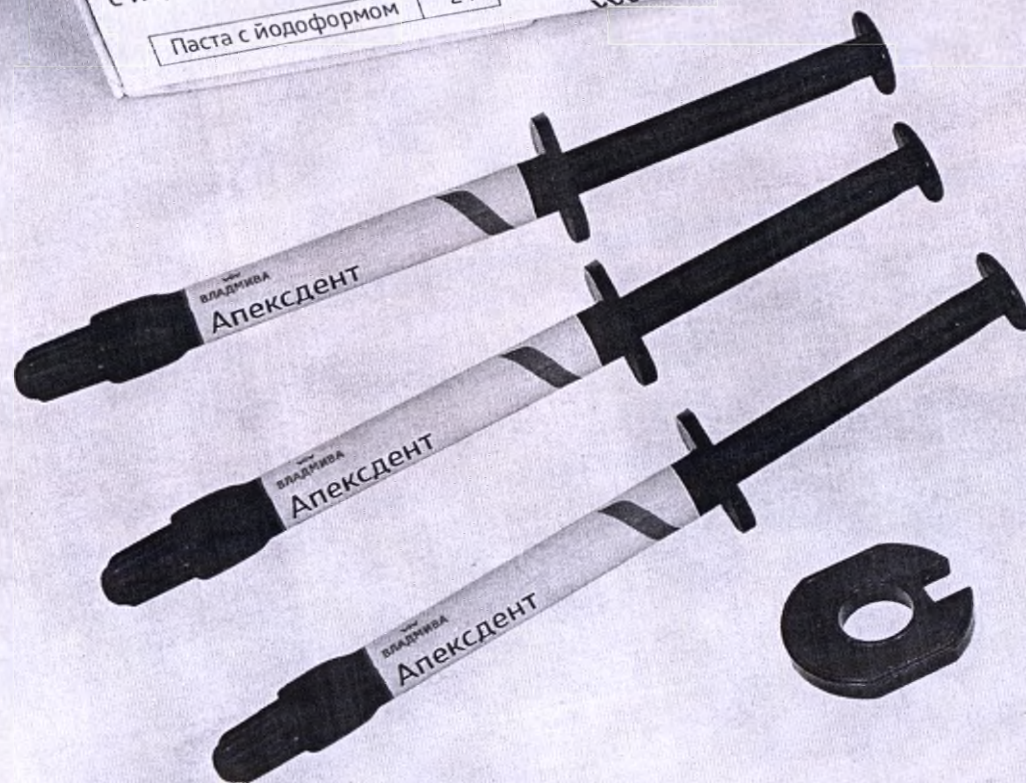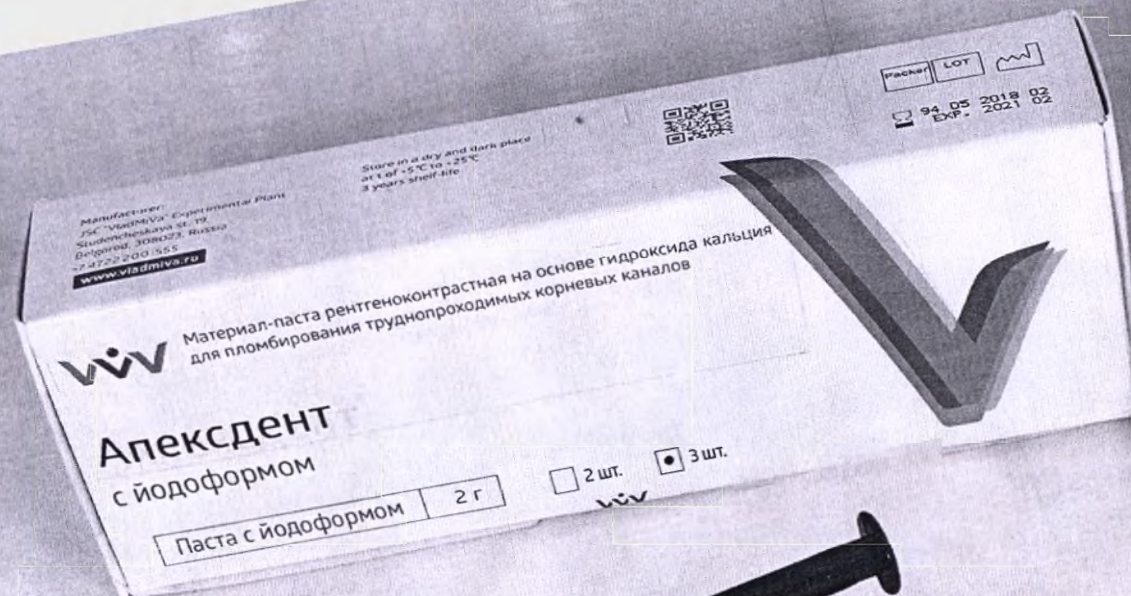

Версия/Version: № 8, 12.02.2021

RU

Всю продукцию АО «ОЗЗ «ВладМиВа» можно приобрести
в интернет-магазине tdvladmiva.ru
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
материала-пасты рентгеноконтрастной
на основе гидроксида кальция
для пломбирования труднопроходимых корневых каналов
«АПЕКСДЕНТ»
(с йодоформом)
по ТУ 9391-071-45814830-2001

НАЗНАЧЕНИЕ

Материал-паста рентгеноконтрастная на основе гидроксида кальция для пломбирования труднопроходимых корневых каналов «Апексдент» (далее по тексту - паста, материал, «Апексдент») предназначена для пломбирования труднопроходимых корневых каналов при лечении всех форм периодонтита, а также для алексификации зубов.


Материал «Апексдент» представляет собой готовую к применению пасту, изготовленную в следующих вариантах исполнения:


- материал «Апексдент» (с йодоформом);
- материал «Апексдент» (без йодоформа).

Материал «Апексдент» (с йодоформом) применяется для пломбирования корневых каналов после депульпирования и лечения инфицированных каналов зубов при хронических периодонтитах (в том числе при наличии гранулем); для алексификации при периодонтитах, при несформированном апиксе, при перфорациях корня, а также резорбции кости.

Показания к применению: временное пломбирование корневых каналов постоянных и

58

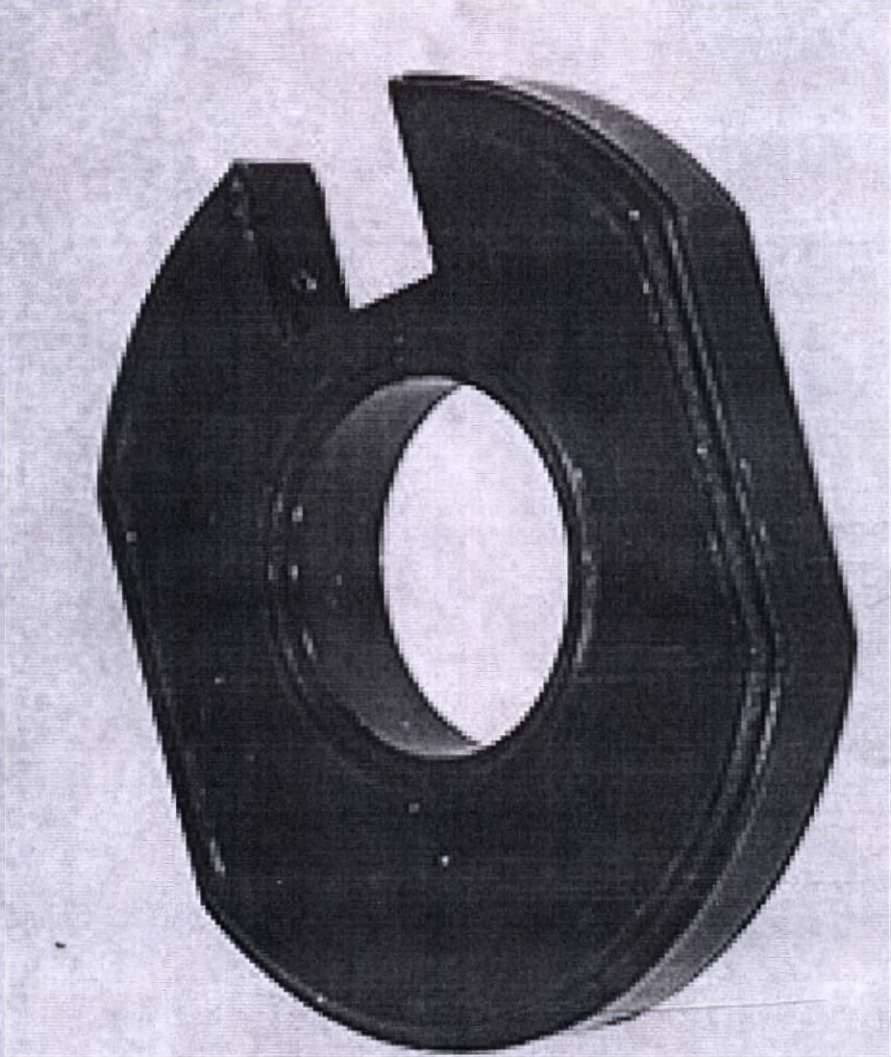

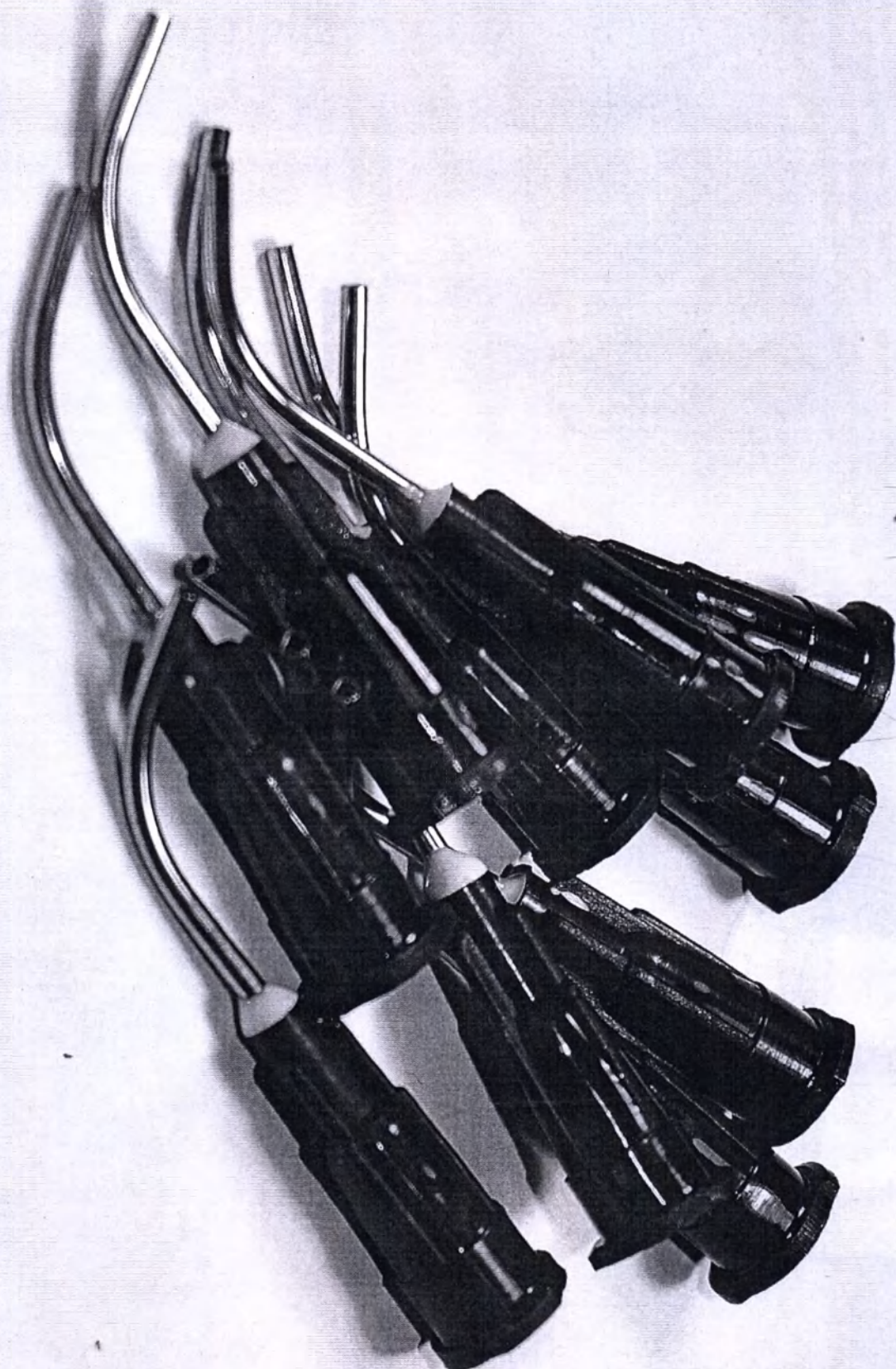

В данном документе
пронумеровано, прочито
и скреплено печатью

28 листа(ов)
зам.нач.ТО Курсяко З.В.



Производитель:
АО «ВладМиВа»
308023, Россия, г. Белгород
ул. Студенческая, 19
+7 4722 200-555

www.viv.ru

Хранить в сухом
темном месте
при t от +5°C до +25°C
Срок годности 2 года

TU 9391-071-45814830-2001
РУ № ФСР 2011/10984 от 11.09.2017 г.



Radiopaque material-paste based on calcium hydroxide
for filling difficult tooth root canals

Apexdent
with iodoform

Paste with iodoform

2 g

Endodontic materials

Апексдент
(с йодоформом)

ВЛАДМИВА

ВЛАДМИВА


Apexdent
(with iodoform)

Deposited/Version: 149

Manufacturer:
JSC "VladMiVa" Experimental Plant
Studencheskaya st. 19,
Belgorod, 308023 Russia
+7 4722 200-555

www.viv.ru

Store in a dry and dark place
at t of +5°C to +25°C
2 years shelf-life

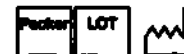

Материал-паста рентгеноконтрастная на основе гидроксида кальция
для пломбирования труднопроходимых корневых каналов

Апексдент
с йодоформом

Паста с йодоформом

2 г

Эндодонтические материалы




Производитель:
АО «ОЗЗ «ВладМиВа»
308023, Россия, г. Белгород
ул. Студенческая, 19
+7 4722 200-555

www.vladmiva.ru

Хранить в сухом
темном месте
при t от +5°C до +25°C
Срок годности 2 года

TU 9391-071-45814830-2001
ПУ № ФСП 2011/10984 от 11.09.2017 г.

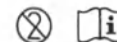

Radiopaque material-paste based on calcium hydroxide
for filling difficult tooth root canals

Apexdent
with iodoform

☐ 2 pc. ☐ 3 pc.

Paste with iodoform

2 g

Endodontic materials

Апексдент
(с йодоформом)

ВЛАДМИВА

ВЛАДМИВА

Апексдент
(with iodoform)

Версия/Version: №

Manufacturer:
JSC "VladMiVa" Experimental Plant
Studencheskaya st. 19,
Belgorod, 308023, Russia
+7 4722 200-555

www.vladmiva.ru

Store in a dry and dark place
at t of +5°C to +25°C
2 years shelf-life



Материал-паста рентгеноконтрастная на основе гидроксида кальция
для пломбирования труднопроходимых корневых каналов

Апексдент
с йодоформом

☐ 2 шт. ☐ 3 шт.

Паста с йодоформом

2 г

Эндодонтические материалы

ООО
ВЛАДИВА

Апексдент
с йодоформом

Паста с йодоформом	2 г
--------------------	-----

Срок годности 2 года
при t от +5°C до +25°C



Производитель:
АО «033 «ВладМиВа»
308023, Россия, г. Белгород
ул. Студенческая, 19
+7 4722 200-555

www.vladmiva.ru

Хранить в сухом
темном месте
при t от +5°C до +25°C
Срок годности 2 года

ТУ 9391-071-45814830-2001
ПУ № ФСП 2011/10984 от 11.09.2017 г.



Radiopaque material-paste based on calcium hydroxide
for filling difficult tooth root canals

Apexdent
with iodoform

Paste with iodoform

2,2 g

Endodontic materials

Апексдент
(с йодоформом)

ВЛАДМИВА

ВЛАДМИВА

Апексдент
(with iodoform)

Версия/Version: №

Manufacturer:
JSC "VladMiVa" Experimental Plant
Studencheskaya st. 19,
Belgorod, 308023, Russia
+7 4722 200-555

www.vladmiva.ru

Store in a dry and dark place
at t of +5°C to +25°C
2 years shelf-life



Packer

LOT



Материал-паста рентгеноконтрастная на основе гидроксида кальция
для пломбирования труднопроходимых корневых каналов

Апексдент
с йодоформом

Паста с йодоформом

2,2 г


Эндодонтические материалы

Производитель:
АО «ОЗЗ «ВладМиВа»
308023, Россия, г. Белгород
ул. Студенческая, 19
+7 4722 200-555

www.vladmiva.ru

Хранить в сухом
темном месте
при t от +5°C до +25°C
Срок годности 2 года

TU 9391-071-45814830-2001
ПУ № ФСР 2011/10984 от 11.09.2017 г.

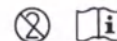

Radiopaque material-paste based on calcium hydroxide
for filling difficult tooth root canals

Apexdent
with iodoform

☐ 2 пс. ☐ 3 пс.

Paste with iodoform

2,2 g

Endodontic materials

Апексдент
(с йодоформом)

ВЛАДМИВА

ВЛАДМИВА


Апексдент
(with iodoform)

Версия/Version: №

Manufacturer:
JSC "VladMiVa" Experimental Plant
Studencheskaya st. 19,
Belgorod, 308023, Russia
+7 4722 200-555

www.vladmiva.ru

Store in a dry and dark place
at t of +5°C to +25°C
2 years shelf-life

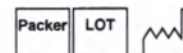

Материал-паста рентгеноконтрастная на основе гидроксида кальция
для пломбирования труднопроходимых корневых каналов

Апексдент
с йодоформом

☐ 2 шт. ☐ 3 шт.

Паста с йодоформом

2,2 г

Эндодонтические материалы

ВЛАДИМИР

Апексдент
с йодоформом

Паста с йодоформом 2,2 г

Срок годности 2 года
при t от +5°C до +25°C




Производитель:
АО «ОЗЗ «ВладМиВа»
308023, Россия, г. Белгород
ул. Студенческая, 19
+7 4722 200-555

www.vladmiva.ru

Хранить в сухом
темном месте
при t от +5°C до +25°C
Срок годности 3 года

TU 9391-071-45814830-2001
РУ № ФСР 2011/10984 от 11.09.2017 г.

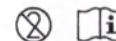

Radiopaque material-paste based on calcium hydroxide
for filling difficult tooth root canals

Apexdent
iodoform-free

Paste iodoform-free

2 g

Endodontic materials

Апексдент
(без йодоформа)

ВЛАДМИВА

ВЛАДМИВА

Апексдент
(iodoform-free)

Версия/Version: №

Manufacturer:
JSC "VladMiVa" Experimental Plant
Studencheskaya st. 19,
Belgorod, 308023, Russia
+7 4722 200-555

www.vladmiva.ru

Store in a dry and dark place
at t of +5°C to +25°C
3 years shelf-life



Packer

LOT



Материал-паста рентгеноконтрастная на основе гидроксида кальция
для пломбирования труднопроходимых корневых каналов

Апексдент
без йодоформа

Паста без йодоформа

2 г


Эндодонтические материалы

Производитель:
АО «ОЗЗ «ВладМиВа»
308023, Россия, г. Белгород
ул. Студенческая, 19
+7 4722 200-555

www.vladmiva.ru

Хранить в сухом
темном месте
при t от +5°C до +25°C
Срок годности 3 года

ТУ 9391-071-45814830-2001
РУ № ФСР 2011/10984 от 11.09.2017 г.

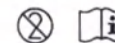

Radiopaque material-paste based on calcium hydroxide
for filling difficult tooth root canals

Apexdent
iodoform-free

☐ 2 pc. ☐ 3 pc.

Paste iodoform-free

2 g

Endodontic materials

Апексдент
(без йодоформа)

ВЛАДМИВА

ВЛАДМИВА


Apexdent
(iodoform-free)

Версия/Version: №

Manufacturer:
JSC "VladMiVa" Experimental Plant
Studencheskaya st. 19,
Belgorod, 308023, Russia
+7 4722 200-555

www.vladmiva.ru

Store in a dry and dark place
at t of +5°C to +25°C
3 years shelf-life

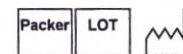

Материал-паста рентгеноконтрастная на основе гидроксида кальция
для пломбирования труднопроходимых корневых каналов

Апексдент
без йодоформа

☐ 2 шт. ☐ 3 шт.

Паста без йодоформа

2 г

Эндодонтические материалы

✓✓✓
ВЛАДИМИВА

Апексдент
без йодоформа

Паста без йодоформа 2 г

Срок годности 3 года
при t от +5°C до +25°C




Производитель:
АО «ОЗЗ «ВладМиВа»
308023, Россия, г. Белгород
ул. Студенческая, 19
+7 4722 200-555

www.vladmiva.ru

Хранить в сухом
темном месте
при t от +5°C до +25°C
Срок годности 3 года

TU 9391-071-45814830-2001
РУ № ФСР 2011/10984 от 11.09.2017 г.

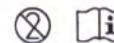

Radiopaque material-paste based on calcium hydroxide
for filling difficult tooth root canals

Apexdent
iodoform-free

Paste iodoform-free

2,2 g

Endodontic materials

Апексдент
(без йодоформа)

ВЛАДМИВА

ВЛАДМИВА

Apexdent
(iodoform-free)

Версия/Version №

Manufacturer:
JSC "VladMiVa" Experimental Plant
Studencheskaya st. 19,
Belgorod, 308023, Russia
+7 4722 200-555

www.vladmiva.ru

Store in a dry and dark place
at t of +5°C to +25°C
3 years shelf-life



Материал-паста рентгеноконтрастная на основе гидроксида кальция
для пломбирования труднопроходимых корневых каналов

Апексдент
без йодоформа

Паста без йодоформа

2,2 г


Эндодонтические материалы

Производитель:
АО «ОЗЗ «ВладМиВа»
308023, Россия, г. Белгород,
ул. Студенческая, 19
+7 4722 200-555

www.vladmiva.ru

Хранить в сухом
темном месте
при t от +5°C до +25°C
Срок годности 3 года

TU 9391-071-45814830-2001
РУ № ФСР 2011/10984 от 11.09.2017 г.

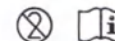

Radiopaque material-paste based on calcium hydroxide
for filling difficult tooth root canals

Apexdent
iodoform-free

☐ 2 пс. ☐ 3 пс.

Paste iodoform-free

2,2 g

Endodontic materials

Апексдент
(без йодоформа)

ВЛАДМИВА

ВЛАДМИВА

Апексдент
(iodoform-free)

Версия/Version: №

Manufacturer:
JSC "VladMiVa" Experimental Plant
Studencheskaya st. 19,
Belgorod, 308023, Russia
+7 4722 200-555

www.vladmiva.ru

Store in a dry and dark place
at t of +5°C to +25°C
3 years shelf-life



Материал-паста рентгеноконтрастная на основе гидроксида кальция
для пломбирования труднопроходимых корневых каналов


Апексдент
без йодоформа

☐ 2 шт. ☐ 3 шт.

Паста без йодоформа

2,2 г

Эндодонтические материалы

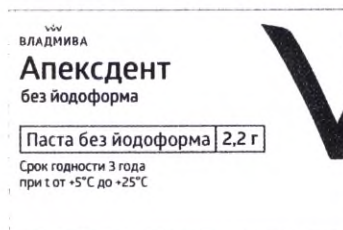

В данном документе
пронумеровано, прошито
и скреплено печатью

_____ листа(ов)
зам.нач.ТО _____ Курочкин В.В.

