

«УТВЕРЖДАЮ»

**Заместитель генерального директора
по организационно-правовым вопросам**



**Е.А. Васильева
«11» мая 2022 г.**

**Наборы медицинские matoset,
применяемые при гинекологических операциях,
хирургические, стерильные
под товарным знаком matopar
по ТУ 32.50.13-084-11736425-2020**

Инструкция по применению

2022г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.
3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.
4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.
5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.
6. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.
7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ.
8. УКАЗАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИМПЛАНТИРУЕМЫМИ В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ, БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, ЖЕНЩИН В ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ, ДЕТЕЙ, ВЗРОСЛЫХ, ИМЕЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ.
9. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОМ ВЛИЯНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ НА СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, МЕХАНИЗМАМИ.
10. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ.
11. СРОК ГОДНОСТИ И УКАЗАНИЕ НА ЗАПРЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ГОДНОСТИ.
12. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ.
13. УКАЗАНИЕ, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УНИЧТОЖЕНИИ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ.
14. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ.
15. ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.
16. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
17. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.
18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.
19. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ.
20. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
21. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
22. МАРКИРОВКА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.
23. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ.

1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

Наборы медицинские matoset, применяемые при гинекологических операциях, хирургические, стерильные под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.13-084-11736425-2020 (далее по тексту – «Наборы» или «Изделие») представляют собой медицинские изделия, которые, в зависимости от конкретного заказа потребителя, имеют различные варианты исполнения (см. Приложение) и формируются из составляющих, указанных в таблице 1:

Таблица 1.

№ п/п	Наименование	Описание	Применение
1	2	3	4
1	Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp	Изготовлены из хлопчатобумажной марли. В зависимости от конкретного заказа потребителя могут иметь 8, 12 или 16 сложенных.	Применяются для впитывания жидкостей в медицинских целях.
2	Салфетки марлевые медицинские абсорбирующие нестерильные Matocomp с рентгеноконтрастной нитью под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-050-11736425-2017	Изделия изготовлены из хлопчатобумажной марли. В салфетках марлевых присутствует рентгеноконтрастная нить. В зависимости от конкретного заказа потребителя могут иметь 8, 12 или 16 сложенных.	Применяются для впитывания жидкостей в медицинских целях.
3	Салфетки нестерильные товарного знака matopat: марлевые с рентгеноконтрастной нитью Matocomp		
4	Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: из нетканого материала matovlies	Салфетки изготовлены из гидрофильного нетканого материала. В зависимости от конкретного заказа потребителя может иметь 4 сложения или 8 сложенных.	Применяются для впитывания жидкостей в медицинских целях.

Продолжение таблицы 1.

№ п/п	Наименование	Описание	Применение
1	2	3	4
5	Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А), Tupfer C (Тупфер Ц), Tupfer B (Тупфер В), Tupfer D (Тупфер Д)	Изготовлены из хлопчатобумажной марли. Могут иметь следующие формы: шарика, фасольки, усика, треугольника.	Мелкие перевязочные изделия с большой впитываемостью; применяются для остановки кровотечения, осушения и очищения ран.
6	Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer AR (Тупфер АР), Tupfer CR (Тупфер ЦР), Tupfer BR (Тупфер ВР), Tupfer DR (Тупфер ДР)	Изготовлены из хлопчатобумажной марли. В изделии присутствует рентгеноконтрастная нить. Могут иметь следующие формы: шарика, фасольки, усика, треугольника.	Мелкие перевязочные изделия с большой впитываемостью; применяются для остановки кровотечения, осушения и очищения ран.
7	Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Abdoma (Абдома)	Представляет собой салфетку, изготовленную из хлопчатобумажной марли, отбеленной без использования хлора. Салфетки имеют прошитые края. Внутри салфетки располагается рентгеноконтрастная нить, которая закрепляется в одном из углов салфетки, между двумя смежными краями салфетки. Салфетка имеет фиксатор в форме петли, дающий возможность крепить салфетку вне операционного поля. Фиксатор представляет собой хлопчатобумажную ленту, вшитую вовнутрь между слоями салфетки, образуя петлю. Фиксатор закрепляется в одном из углов салфетки, между двумя смежными краями салфетки. В зависимости от конкретного заказа потребителя могут быть 2-слойные, 4-слойные,	Используются для впитывания большого количества жидкостей во время проведения процедур.

6-слойные.

Продолжение таблицы 1.

№ п/п	Наименование	Описание	Применение
1	2	3	4
8	Марлевые перевязочные материалы марки matopar нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Seton (Сетон)	Изготовлены из хлопчатобумажной марли. В зависимости от конкретного заказа потребителя могут быть 4-слойные или 8-слойные.	Используются как впитывающий материал для остановки кровотечения, осушения и очищения раны при проведении процедур.
9	Комбинированные сорбционные повязки высокой впитываемости ABSORBA под товарным знаком matopar стерильные и нестерильные: салфетки впитывающие	Изделие представляет собой двухслойное медицинское изделие, состоящее из двух слоев нетканого материала, между которыми находится внутренний слой из распушенной целлюлозы либо имеющее верхний слой из марли и внутренний слой из нетканого материала.	Применяется для впитывания большого количества жидкостей во время проведения процедур.
10	Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopar: чехол	Изготовлен из полипропиленового неламинированного или ламинированного нетканого материала.	Используется для защиты нижних конечностей пациента при проведении процедур.
11	Чехол на конечность		
12	Пленки впитывающие «Seni» по ТУ 17.22.12-005-11736425-2015: Seni Soft или Seni Soft Normal	Изделие имеет верхний покровный слой из гидрофильного нетканого полипропиленового материала; внутренний слой из распушенной целлюлозы; защитный (нижний) слой из водонепроницаемой полиэтиленовой пленки.	Используется в качестве дополнительной защиты медицинского оборудования и операционного белья от жидкостей при проведении медицинских процедур.

Продолжение таблицы 1.

№ п/п	Наименование	Описание	Применение
1	2	3	4
13	Одежда для медицинского персонала марки «matorat» одноразовая «Matodress» нестерильная из нетканого, ламинированного нетканого, хлопкоподобного нетканого материала, полиэтилена: халат	Изготовлен из нетканого материала; бесшовные манжеты – изготовлены из 100% полиэстера.	Предназначен для защиты медицинского персонала при проведении хирургических операций различного профиля.
14	Контейнер	Контейнер является пластмассовым, может быть круглым или прямоугольным различных размеров. Может иметь градуированную мерную шкалу.	Контейнер служит емкостью для жидкостей, используемых во время проведения процедуры (например, дезинфицирующей жидкости) или для сбора отработанного материала во время проведения процедур.
15	Перчатки хирургические резиновые по ГОСТ 3-88	Перчатки изготовлены из натурального латекса. Внутренняя поверхность перчаток не имеет пудры, или может быть малоопудренной.	Перчатки предназначены для защиты рук медицинского персонала во время проведения медицинских процедур.
16	Медицинские изделия и инструменты для хирургических вмешательств Matoset под товарным знаком «matorat» стерильные, в наборах и отдельных упаковках: клещи	Клещи – зажимный медицинский инструмент с длинными прямыми браншами и овальной рабочей частью бранш, имеет защелку-кремальеру.	Предназначены для извлечения инородных тел, введения тампонов, а также захватывания и подачи стерильных инструментов и перевязочного материала.
17	Инструменты медицинские: зажим	Изделие представляет собой зажимный медицинский инструмент с длинными узкими браншами, имеющими острые зубцы на рабочей части. Имеет зубчатую кремальеру-фиксатор.	Используется как кровоостанавливающий зажим для зажатия и захвата кровеносных сосудов с целью временной остановки кровотечения.

Продолжение таблицы 1.

№ п/п	Наименование	Описание	Применение
1	2	3	4
18	Инструменты хирургические однолезвийные CERTUS, с принадлежностями: Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из углеродистой стали	Изделие состоит из лезвия (углеродистая хирургическая сталь) и пластмассовой ручки-держателя. Лезвие скальпеля снабжено защитным пластиковым колпачком. В зависимости от конкретного заказа потребителя может иметь размеры №№10,11,15. Изделие состоит из лезвия (нержавеющая хирургическая сталь) и пластмассовой ручки-держателя. Лезвие скальпеля снабжено защитным пластиковым колпачком. В зависимости от конкретного заказа потребителя может иметь размеры №№10,11,15.	Изделия предназначены для рассечения мягких тканей и сосудов при различных хирургических вмешательствах.
19	Инструменты хирургические однолезвийные CERTUS, с принадлежностями: Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из нержавеющей стали	Изделие состоит из лезвия (нержавеющая хирургическая сталь) и пластмассовой ручки-держателя. Лезвие скальпеля снабжено защитным пластиковым колпачком. В зависимости от конкретного заказа потребителя может иметь размеры №№10,11,15.	
20	Инструмент режущий с приспособлениями: скальпель	Изделие состоит из лезвия (нержавеющая хирургическая сталь) и пластмассовой ручки-держателя. Лезвие скальпеля снабжено защитным пластиковым колпачком. В зависимости от конкретного заказа потребителя может иметь размеры №№11,23.	
21	Инструменты медицинские: пинцет	Пинцет изготовлен из нержавеющей стали, является прямым. Имеет на конце насечки, позволяющие мягко удерживать ткани и не травмировать их.	Используется на мягких тканях при различных хирургических вмешательствах.
22	Инструменты медицинские хирургические: инструменты поверхностного воздействия, зажимные, вспомогательные: пинцет		
23	Медицинские изделия и инструменты для хирургических вмешательств Matoset под товарным знаком «matopat» стерильные, в наборах и отдельных		

упаковках: пинцет

Продолжение таблицы 1.

№ п/п	Наименование	Описание	Применение
1	2	3	4
24	Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: простыни медицинские	Простыни из гидрофобного или гидрофильного ламинированного или неламинированного нетканого материала прямоугольной или квадратной формы.	Применяются в качестве неспециального защитного покрытия для различного медицинского оборудования и медицинских инструментов с целью обеспечения барьера против перекрестного заражения в медицинском учреждении, а также в качестве покровного материала на пациента при проведении процедур.
25	Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыни с отверстием и адгезивным краем	Простыни из гидрофобного или гидрофильного ламинированного или неламинированного нетканого материала прямоугольной или Т-образной формы. Имеют отверстия прямоугольной формы. Имеют адгезивный край, защищенный бумагой. Адгезивный край наносится вплотную к краю отверстия Простыни. Количество и место расположение отверстий на Простыни зависит от конкретного заказа потребителя.	Применяются в качестве неспециального защитного покрытия для различного медицинского оборудования и медицинских инструментов с целью обеспечения барьера против перекрестного заражения в медицинском учреждении, а также в качестве покровного материала на пациента при проведении процедур.

Продолжение таблицы 1.

№ п/п	Наименование	Описание	Применение
1	2	3	4
26	Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matorpat: простыни с отверстием, адгезивным краем и карманом	Простыни из гидрофобного или гидрофильного ламинированного нетканого материала прямоугольной, квадратной или Т-образной формы. Имеют отверстия прямоугольной или овальной формы. Имеют адгезивный край, защищенный бумагой. Адгезивный край наносится вплотную к краю отверстия Простыни и/или вплотную к краю стороны и/или к краям двух параллельных сторон Простыни по всей длине или ширине Простыни. Также имеют один или несколько дополнительный(ых) элемент(ов): карман (который может использоваться для сбора жидкостей и/или для хранения инструментов). Количество и место расположение дополнительного(ых) элемента(ов) и отверстий на Простыни зависит от конкретного заказа потребителя.	Применяются в качестве неспециального защитного покрытия для различного медицинского оборудования и инструментов с целью обеспечения барьера против перекрестного заражения в медицинском учреждении, а также в качестве покровного материала на пациента при проведении процедур.
27	Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matorpat: простыня на инструментальный стол	Простыни для инструментального стола изготовлены из ламинированного нетканого материала высокой плотности.	Изделие применяются как покрывной материал для инструментальных столиков.

Продолжение таблицы 1.

№ п/п	Наименование	Описание	Применение
1	2	3	4
28	Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на столик Майо	Чехол на инструментальный стол изготовлен из нетканого материала. Чехол на инструментальный стол имеет форму мешка с дополнительной накладкой, впитывающей по внешней поверхности одной из сторон.	Чехол на инструментальный стол предназначен покрытия инструментального стола.
29	Покрывание на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские	Салфетки из гидрофобного или гидрофильного ламинированного или неламинированного нетканого материала прямоугольной или квадратной формы.	Применяются в качестве неспециального защитного покрытия для различного медицинского оборудования и медицинских инструментов с целью обеспечения барьера против перекрестного заражения в медицинском учреждении, а также в качестве покровного материала на пациента при проведении процедур.
30	Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах	Представляет собой фиксирующую ленту в виде пластыря или лейкопластыря из нетканого материала.	Применяется для фиксации повязок, игл, канюль, катетеров.
31	Односторонняя чувствительная к давлению клейкая лента с тканевой основой и лайнером из силиконизированной бумаги DUPLOMED SD 6144 D	Фиксирующая клейкая лента прямоугольной формы в виде полосы из силиконизированной бумаги и нетканого материала.	Применяется для фиксации покрывных медицинских изделий (простыней, салфеток с отверстиями и без) на операционном поле при выполнении медицинских процедур.
32	Пинцеты полимерные одноразовые стерильные по ТУ 9398-176-44942795-2005: пинцет окончательный полимерный одноразовый стерильный	Изготовлен из пластмассы; имеет окончательные губки с насечкой.	Предназначен для захватывания перевязочных материалов, ватных и марлевых тампонов во время проведения процедур.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

Наборы медицинские matoset, применяемые при гинекологических операциях, хирургические, стерильные под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.13-084-11736425-2020 предназначены для использования во время проведения хирургических гинекологических операций.

Область применения: гинекология.

Условия применения: Наборы могут применяться во всех типах амбулаторных и стационарных лечебно-профилактических учреждений.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

Наборы медицинские matoset, применяемые при гинекологических операциях, хирургические, стерильные под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.13-084-11736425-2020 предназначены для использования во время проведения хирургических гинекологических операций.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

Индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлены составляющие Изделия.

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

Перед эксплуатацией ознакомьтесь с инструкцией по применению.

Медицинское изделие предназначено для однократного применения.

Не использовать в случае индивидуальной непереносимости материалов, из которых изготовлены составляющие Изделия.

Не использовать после окончания срока годности.

Не использовать в случае повреждения упаковки.

Не подлежит повторной стерилизации.

6. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

Нежелательные явления, которые могут произойти и (или) потребовать вмешательства: аллергическая реакция, ввиду непереносимости пациентом материалов, из которых изготовлены составляющие Изделия.

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ.

Наборы медицинские matoset, применяемые при гинекологических операциях, хирургические, стерильные под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.13-084-11736425-2020 сочетаются со всеми видами медицинских изделий, которые применяются при проведении необходимых для пациента процедур.

8. УКАЗАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИМПЛАНТИРУЕМЫМИ В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ, БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, ЖЕНЩИН В ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ, ДЕТЕЙ, ВЗРОСЛЫХ, ИМЕЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ.

Специальных исследований применения Изделия для людей с имплантируемыми в организм человека медицинскими изделиями, беременных женщин, женщин в период грудного вскармливания, детей, взрослых, имеющих хронические заболевания, не проводилось. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента.

9. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОМ ВЛИЯНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ НА СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, МЕХАНИЗМАМИ.

Исследования о возможном влиянии Изделия на способность управлять транспортными средствами, механизмами не проводились, так как Изделие не относится к изделиям, способным влиять на психомоторное состояние человека.

10. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ.

Убедитесь, что Изделие не просрочено, а упаковка не повреждена.

Возьмите упаковку за край, плавным движением потяните нижний и верхний слой упаковки до ее полного вскрытия. Направление вскрытия упаковки может быть обозначено графическим символом.

Извлеките содержимое упаковки в необходимой последовательности.

Применение данного Изделия должно полностью соответствовать своему прямому назначению.

После использования по назначению утилизируйте.

Применять в соответствии с данной инструкцией.

11. СРОК ГОДНОСТИ И УКАЗАНИЕ НА ЗАПРЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ГОДНОСТИ.

Срок годности указан на упаковке и не должен превышать 5 лет с даты стерилизации. Не использовать после окончания срока годности.

12. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ.

Изделия транспортируются любым видом крытого транспорта в соответствии с ГОСТ 17768 и правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

Условия транспортирования по условиям хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150. Допускается транспортирование по условиям хранения 2 (С) по ГОСТ 15150 при ограничении нижней температуры в -20°C – не более 48 часов.

Изделия должны храниться в упаковке производителя по условиям хранения по группе 1 (Л) по ГОСТ 15150 с ограничением верхней температуры в +25°C.

Изделия должны храниться отдельно от веществ, выделяющих пары с резким запахом и неприятным вкусом, или должны храниться в таре, защищенной от этих паров. Изделия нельзя хранить в загрязненных помещениях и помещениях с ядовитыми химикатами.

При складском хранении Изделия должны находиться в условиях, предотвращающих механические повреждения, не допускающие попадание влаги на Изделия, а также в условиях отсутствия действия прямых солнечных лучей.

13. УКАЗАНИЕ, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УНИЧТОЖЕНИИ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ.

Непригодные к использованию Изделия (неиспользованные Изделия с истекшим сроком годности) относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Использованные Изделия относятся к отходам класса Б – эпидемиологически опасные, и требуют соответствующих мер предосторожности при уничтожении (утилизации) в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Наборы медицинские matoset, применяемые при гинекологических операциях, хирургические, стерильные под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.13-084-11736425-2020 не взрывоопасны, не способны самовозгораться, при поднесении открытого огня горят без взрыва. При пожаре для тушения следует использовать огнетушители, воду, песок и т.д.

14. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ.

Общество с ограниченной ответственностью «Белла» (ООО «Белла»),
ИНН 5011021499, Российская Федерация,
140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9
Тел./факс: +7 (49640) 48370 / +7 (49640) 49017
e-mail: ooo.bella@tzmo-global.com

Адрес места производства.

ООО «Белла», Российская Федерация,
140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9
Тел./факс: +7 (49640) 48370 / +7 (49640) 49017
e-mail: ooo.bella@tzmo-global.com

15. ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

В комплект поставки должны входить:

Наборы медицинские matoset, применяемые при гинекологических операциях, хирургические, стерильные под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.13-084-11736425-2020 одного варианта исполнения в потребительской упаковке с маркировкой; инструкция по применению.

Наборы выпускаются в стерильном виде: газовая стерилизация оксидом этилена.
Варианты комплектации в соответствии с ТУ 32.50.13-084-11736425-2020.

Варианты комплектации Наборов представлены в Приложении к настоящей Инструкции.

16. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Наборы медицинские matoset, применяемые при гинекологических операциях, хирургические, стерильные под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.13-084-11736425-2020 должны соответствовать требованиям ТУ 32.50.13-084-11736425-2020 и изготавливаться с соблюдением санитарных норм и правил.

При изготовлении составляющих Наборов применяют материалы, указанные в таблице 2.

Таблица 2.

№	Название составляющих	Производитель, нормативная документация	Марки материалов, из которых изготовлены составляющие Набора
1	2	3	4
1	Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp	ООО «Белла», Россия, ТУ 21.20.24-035-11736425-2017, ПУ №РЗН 2018/6884	Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная по ГОСТ 9412, Арт.6498-670
			Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная, Арт.: 6498/21-520; 6498/22-170; 6498/8-1851; 6498/8-250
			Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная, Арт.: 6498-5; 6498-4; 6498-3; 6498-2; 6498-1
			100% впитывающая хлопковая марля, тип: 13 heavy (17 г/м²), 17 (23 г/м²), 24a (36 г/м²)
			Хлопчатобумажная марля плотность 13-нитей, 17-нитей, 20-нитей, 17 г/м², 20 г/м², 22 г/м², 23 г/м², 25 г/м², 26 г/м², 27 г/м², 28 г/м², 30 г/м², 32 г/м², 33 г/м², 34 г/м², 36 г/м²
2	Салфетки нестерильные товарного знака matopat: марлевые с рентгеноконтрастной нитью Matocomp	TZMO SA, Польша ПУ №ФСЗ 2009/04282	Марля – 601-018747; Рентгеноконтрастная нить - Micropake MP632 Heat Treated Yarn (состав: полипропилен, сульфат бария; цвет – синий), производства компании Speciality Fibres and Materials Ltd (Великобритания)
3	Салфетки марлевые медицинские абсорбирующие нестерильные Matocomp с рентгеноконтрастной нитью под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-050-11736425-2017	ООО «Белла», Россия ТУ 32.50.50-050-11736425-2017; ПУ №РЗН 2018/7880	Марля – 601-018747; Рентгеноконтрастная нить - Micropake MP632 Heat Treated Yarn (состав: полипропилен, сульфат бария; цвет – синий), производства компании Speciality Fibres and Materials Ltd (Великобритания)
4	Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: из нетканого материала matovlies	ООО «Белла», Россия ТУ 21.20.24-035-11736425-2017, ПУ №РЗН 2018/6884	Материал нетканый «Спанлейс» ООО «Авангард» (Россия), ТУ 8390-003-56176857-2007

Продолжение таблицы 2.

№	Составляющие Набора	Производитель, нормативная документация	Марки материалов, из которых изготовлены составляющие Набора
1	2	3	4
5	Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А), Tupfer C (Тупфер Ц), Tupfer B (Тупфер В), Tupfer D (Тупфер Д)	TZMO SA, Польша ПУ №ФСЗ 2008/01372	Марля хлопчатобумажная отбеленная, Арт. 120BP17.
6	Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer AR (Тупфер АР), Tupfer CR (Тупфер ЦР), Tupfer BR (Тупфер ВР), Tupfer DR (Тупфер ДР)	TZMO SA, Польша ПУ №ФСЗ 2008/01372	Марля хлопчатобумажная отбеленная, Арт. 120BP175X; рентгеноконтрастная нить, марка RONH 1030-785/2; производства компании Roney Industri AB (Швеция) (состав рентгеноконтрастной нити: поливинилхлорид, сульфат бария); цвет синий.
7	Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Abdoma (Абдома)	TZMO SA, Польша ПУ №ФСЗ 2008/01372	Марля хлопчатобумажная отбеленная, Арт. 100BP17; Арт. 601-021019; рентгеноконтрастная нить, марка RONH 1030-785/2; производства компании Roney Industri AB (Швеция) (состав рентгеноконтрастной нити: поливинилхлорид, сульфат бария); цвет синий; хлопчатобумажная лента, марка SVTCTP-40.
8	Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Seton (Сетон)	TZMO SA, Польша ПУ №ФСЗ 2008/01372	Марля хлопчатобумажная отбеленная, Арт. 601-011478

Продолжение таблицы 2.

№	Название составляющих	Производитель, нормативная документация	Марки материалов, из которых изготовлены составляющие Набора
1	2	3	4
9	Комбинированные сорбционные повязки высокой впитываемости ABSORBA под товарным знаком matopat стерильные и нестерильные: салфетки впитывающие	TZMO SA, Польша ПУ №ФСЗ 2012/12545	Внешние слои: нетканый материал F2000-72PRF-40 (FIBRELLA PerfR); вискозно-полиэстровый нетканый материал Suominen. Внутренний слой: целлюлоза Stora Enso, гигиеническая бумага Hanke Tissue, клей горячего расплава Хенкель
			Внешние слои: марля 601-011478; нетканый материал F2000-72PRF-40 (FIBRELLA PerfR)
10	Пленки впитывающие «Seni» по ТУ 17.22.12-005-11736425-2015: Seni Soft или Seni Soft Normal	ООО «Белла», Россия, ТУ 17.22.12-005- 11736425-2015, ПУ №РЗН 2017/6220	<u>Верхний покровный слой</u> : нетканый полипропиленовый материал (полипропилен) марки «CREATEX-КОМФОРТ K00012-10-210»; материал нетканый (полипропилен) СпанБел IV-HG-WG. <u>Распределительный слой</u> : нетканый полипропиленовый материал (полипропилен) марки «CREATEX-КОМФОРТ K00012-10-210»; материал нетканый (полипропилен) СпанБел IV-HG-WG. <u>Абсорбирующий слой</u> : распушенная целлюлоза (марки: «GT SS PLUS», «STORA ENSO CARE UNTREATED»). <u>Защитный слой</u> : пленка полиэтиленовая (CAS 9002-88-4; марка «Hyfol PP Plus»; марка «PE000BN190600000»). <u>Клей горячего расплава (hot-melt)</u> (марки: Dispomelt Cool 110; NW 1137 ZP)
11	Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: чехол	TZMO SA, Польша ПУ ФСЗ 2012/11840	полипропиленовый нетканый материал, ламинированный полиэтиленово-полипропиленовой пленкой марка TF (цвет: голубой; краситель: LIGHT BLUE (SB), Americhem, поверхностная плотность 43 г/м2); Липкий слой марки DuploMED SD 6248 D
			полипропиленовый нетканый материал, ламинированный полиэтиленово-полипропиленовой пленкой, марка L2 (цвет: голубой; краситель: LIGHT BLUE (SB), Americhem, поверхностная плотность 56 г/м2); Липкий слой марки DuploMED SD 6248 D
			Нетканый материал полипропиленовый марка SMS (цвет: голубой; краситель: LIGHT BLUE (SB), Americhem, поверхностная плотность 35 г/м2); Липкий слой марки DuploMED SD 6248 D

Продолжение таблицы 2.

№	Название составляющих	Производитель, нормативная документация	Марки материалов, из которых изготовлены составляющие Набора
1	2	3	4
12	Чехол на конечность	ООО «Завод Эластик», Республика Татарстан, ТУ 8390-010-74582615-2009	Нетканое полипропиленовое полотно марки CC-35 (цвет: голубой; краситель LIGHT BLUE (SB), Americhem; поверхностная плотность 35 г/м2)
		ТПФ ООО «Гекса – нетканые материалы», Россия; СТО 18603495.034-2015	Полипропиленовый нетканый материал марки «Экоспан» (цвет: голубой; краситель LIGHT BLUE (SB), Americhem; поверхностная плотность 40 г/м2)
		«PELSAN TEKSTIL URUNLERI SANAYI VE TICARET. A.S», Турция;	Полипропиленовый нетканый материал, ламинированный полиэтиленовой пленкой марки «Breotech Duo» (цвет: голубой; краситель LIGHT BLUE (SB), Americhem; плотность 54 г/м2)
13	Одежда для медицинского персонала марки «matopat» одноразовая «Matodress» нестерильная из нетканого, ламинированного нетканого, хлопкоподобного нетканого материала, полиэтилена: халат	TZMO SA, Польша ПУ №ФСЗ 2008/01376	Полипропиленовый нетканый материал марки SMS; цвет голубой, краситель SURGICAL BLUE; манжета марка KA-PC-2008; нити полиэстровые марки Sree Varalaxmi Textilies
14	Контейнер круглый; Контейнер прямоугольный	ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 (Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д- RU.AH03.B.04790/19 от 26.07.2019)	Арт. К-115-250; Полипропилен H030 GP
			Арт. К-115-500; Полипропилен H030 GP
			Арт. Л-3; Полипропилен H030 GP
			Арт. Л-5; Полипропилен H030 GP
			Арт. MC-3; Полипропилен H030 GP

Продолжение таблицы 2.

№	Название составляющих	Производитель, нормативная документация	Марки материалов, из которых изготовлены составляющие Набора
1	2	3	4
15	Перчатки хирургические резиновые по ГОСТ 3-88	АО «АЗРИ», Россия, РУ № ФСР 2010/07673	- латекс натуральный центрифугированный, тип НА (ГОСТ 29081-91); - сера молотая для резиновых изделий и каучуков, сорт 9990, 9995, класс 1,2 (ГОСТ 127.4-93); - белила цинковые, марка БЦО, БЦОМ, БЦ1 (ГОСТ 202-84); - диэтилдитокабамат цинка (этилцимат) (ТУ 6—14-809-77); - антиоксиданты фенольного типа. Агидол-2 (ГОСТ Р 55065-2012); - диспенгатор НФ технический (ГОСТ 6848-79); - калия гидрат окиси технический, сорт высший, первый (ГОСТ 9285-78); - казеин технический кислотный сорт высший, сычужный сорт высший, первый (ГОСТ 17626-81); - аммиак водный технический, марка А (ГОСТ 9-92); - мел природный обогащенный, марки ММО, ММС-1, ММС-2 (ГОСТ 12085-88); - пеногаситель «Пента-475» (ТУ 2229-095-40245042-2004); - двуокись титана пигментная, марка А-1, А-01 (ГОСТ 9808-84)
16	Медицинские изделия и инструменты для хирургических вмешательств Matoset под товарным знаком «matopat» стерильные, в наборах и отдельных упаковках: клещи	TZMO SA, Польша РУ №ФСЗ 2011/09976	Пластик – Homopolimero PP 30% fibra vidro; Краситель – Corante azul pantone 3005

Продолжение таблицы 2.

№	Название составляющих	Производитель, нормативная документация	Марки материалов, из которых изготовлены составляющие Набора
1	2	3	4
17	Инструменты медицинские: зажим	«Эджайл Индастриз», Пакистан; РУ №РЗН 2016/4524	Нержавеющая сталь, марка AISI 410
18	Инструменты хирургические однолезвийные CERTUS, с принадлежностями: Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из углеродистой стали	Хуайинь Медикал Инструменте Ко., Лтд., КНР РУ №РЗН 2017/5689	углеродистая хирургическая сталь, марки: 4Cr13, T10
19	Инструменты хирургические однолезвийные CERTUS, с принадлежностями: Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из нержавеющей стали	«Хуайинь Медикал Инструменте Ко., Лтд., КНР РУ №РЗН 2017/5689	нержавеющая хирургическая сталь, марки: 4Cr13; 6Cr13
20	Инструмент режущий с приспособлениями: скальпель	«Риббел Интернешенел Лтд.», Индия РУ №ФСЗ 2008/02137	Лезвие - нержавеющая сталь - 13C26; Ручка - акрилонитрилбутадиен стирол (АБС-пластик) - ABSOLAC
21	Инструменты медицинские: пинцет	«Эджайл Индастриз», Пакистан; РУ №РЗН 2016/4524	Нержавеющая сталь, марка AISI 410
22	Инструменты медицинские хирургические: инструменты поверхностного воздействия, зажимные, вспомогательные: пинцет	«Сурджикон ЛТД», Пакистан; РУ №РЗН 2015/3121	Нержавеющая сталь, марка AISI 410
23	Медицинские изделия и инструменты для хирургических вмешательств Matoset под товарным знаком «matopat» стерильные, в наборах и отдельных упаковках: пинцет	TZMO SA, Польша РУ ФСЗ 2011/09976	Нержавеющая сталь, марка AISI 420

Продолжение таблицы 2.

№	Название составляющих	Производитель, нормативная документация	Марки материалов, из которых изготовлены составляющие Набора
1	2	3	4
24	Покрытие на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: простыни медицинские	ООО «Белла», Россия ТУ 32.50.50-032-1173425-2017; ПУ №РЗН 2017/6528	материал нетканый ламинированный марки В-35 (цвет: голубой; краситель LIGHT BLUE (SB), Americhem; плотность 35 г/м2)
			нетканый композиционный материал из химических волокон т.м. «Breathe Duo» (цвет: голубой; краситель LIGHT BLUE (SB), Americhem; плотность 54 г/м2), код TLN003054
			Нетканое полипропиленовое полотно марки CC-35 (цвет: голубой; краситель LIGHT BLUE (SB), Americhem; поверхностная плотность 35 г/м2)
			Полипропиленовый нетканый материал марки CREATEX (цвет: голубой; краситель BLUE, Americhem; поверхностная плотность 17 г/м2)
			Полипропиленовый нетканый материал марки «Экоспан» (цвет: голубой; краситель LIGHT BLUE (SB), Americhem; поверхностная плотность 40 г/м2)
25	Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыни с отверстием и адгезивным краем	TZMO SA, Польша ПУ №ФСЗ 2012/11840	полипропиленовый нетканый материал, ламинированный полиэтиленово-полипропиленовой пленкой марка L2 (цвет: голубой; краситель: LIGHT BLUE (SB), Americhem, поверхностная плотность 56 г/м2); Липкий слой марки DuploMED SD 6248 D
			Ламинированный нетканый материал (вискозный нетканый материал, полиэтиленово-полипропиленовая пленка, полипропиленовый нетканый материал), марка L3 (цвет: голубой; краситель: LIGHT BLUE (SB), Americhem, поверхностная плотность 73 г/м2); Липкий слой марки DuploMED SD 6248 D

Продолжение таблицы 2.

№	Название составляющих	Производитель, нормативная документация	Марки материалов, из которых изготовлены составляющие Набора
1	2	3	4
26	Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыни с отверстием, адгезивным краем и карманом	TZMO SA, Польша ПУ №ФСЗ 2012/11840	полипропиленовый нетканый материал, ламинированный полиэтиленово-полипропиленовой пленкой марка L2 (цвет: голубой; краситель: LIGHT BLUE (SB), Americhem, поверхностная плотность 56 г/м ²); Липкий слой марки DuploMED SD 6248 D Ламинированный нетканый материал (вискозный нетканый материал, полиэтиленово-полипропиленовая пленка, полипропиленовый нетканый материал), марка L3 (цвет: голубой; краситель: LIGHT BLUE (SB), Americhem, поверхностная плотность 73 г/м ²); Липкий слой марки DuploMED SD 6248 D
27	Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на инструментальный стол	TZMO SA, Польша ПУ №ФСЗ 2012/11840	Ламинированный нетканый материал марки Triobond 2167
28	Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на столик Майо	TZMO SA, Польша ПУ №ФСЗ 2012/11840	Плёнка: PE 60microne, Полипропиленовый нетканый материал 24 г/м ² , Клей hotmelt

Продолжение таблицы 2.

№	Название составляющих	Производитель, нормативная документация	Марки материалов, из которых изготовлены составляющие Набора
1	2	3	4
29	Покрытие на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopar по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские	ООО «Белла», Россия ТУ 32.50.50-032-1173425-2017; ПУ №РЗН 2017/6528	материал нетканый ламинированный марки В-35 (цвет: голубой; краситель LIGHT BLUE (SB), Americhem; плотность 35 г/м2)
			нетканый композиционный материал из химических волокон т.м. «Breathech Duo» (цвет: голубой; краситель LIGHT BLUE (SB), Americhem; плотность 54 г/м2), код TLN003054
			Нетканое полипропиленовое полотно марки CC-35 (цвет: голубой; краситель LIGHT BLUE (SB), Americhem; поверхностная плотность 35 г/м2)
			Полипропиленовый нетканый материал марки CREATEX (цвет: голубой; краситель BLUE, Americhem; поверхностная плотность 17 г/м2)
			Полипропиленовый нетканый материал марки «Экоспан» (цвет: голубой; краситель LIGHT BLUE (SB), Americhem; поверхностная плотность 40 г/м2)
30	Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах	«ФармЛайн Лимитед», Великобритания ПУ №ФСЗ 2008/01959	цвет белый; неадгезивная (нелипкая) пленка из полиэтилена, марка 9002-88-48; нетканый вискозно-полиэстеровый материал, марка 25038-59-9; клей акриловый, марка 79-20-9; бумага марка mixture63148-62-9, цвет белый
31	Односторонняя чувствительная к давлению клейкая лента с тканевой основой и лайнером из силиконизированной бумаги DUPLOMED SD 6144 D	«Lohmann GmbH & Co.KG», Германия	DuploMED SD 6144 D Основа – нетканый материал марки Spunlace; цвет синий, краситель марки LIGHT BLUE (SB); адгезив закрытая сторона – полиизопреновый каучук прозрачный марки LK5100; лайнер – силиконизированная бумага марки Duplocoll 370, цвет белый.
32	Пинцеты полимерные одноразовые стерильные по ТУ 9398-176-44942795-2005: пинцет окончательный полимерный одноразовый стерильный	ООО «Полимерные изделия», Россия, ПУ №ФСР 2010/07936	Нетоксичный полистирол pantone azure blue

Продолжение таблицы 2.

№	Название составляющих		Производитель, нормативная документация	Марки материалов, из которых изготовлены составляющие Набора
1	2		3	4
33	Упаковки для медицинской паровой, газовой, радиационной, плазменной стерилизации марки "BOM", одноразовые по ТУ 32.50.13-030-11736425-2017	Бумажно-плёночный пакет	ООО «Белла», Россия, ТУ 32.50.13-030-11736425-2017, РУ №РЗН 2017/6416	- пленка: • MOR PET/PP BLUE, Plastica, Польша; • комбинированный материал PET/PP, ООО «Данафлекс-Нано» (Россия), ТУ 5453-008-61815213-2014; • комбинированный материал PET/PP, ООО «Мануфактура гибкой упаковки» (Россия), ТУ 2245-001-91547879-2011; - бумага: PROPYR NEUTRE 60, «Sterimed», Франция; - химические индикаторы 1 класса: • «Tempilink» (США), TISFRC784B.2, TIS784B/858 ACT., TIFGFRG492, TIGFAC564A; - чернила: MC-2BK009 MAKE UP, «Domino» (Великобритания)
	(Упаковка для финишной стерилизации)	Нетканно-плёночный пакет		- нетканый материал «Sterimed» (Франция), Propypel® NW AR Blue 60 gsm - пленка: «Plastica» (Польша), MOR PET/PE CLEAR

Основные линейные размеры составляющих Наборов представлены в таблице 3.

Таблица 3.

№ п/п	Составляющие	Основные размеры					
1	2	3					
1	Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matorat по ТУ 21.20.24-035- 11736425-2017: марлевые matorcomp	8 сложений (в готовом сложенном виде)		12 сложений (в готовом сложенном виде)		16 сложений (в готовом сложенном виде)	
		Ширина, см	Длина, см	Ширина, см	Длина, см	Ширина, см	Длина, см
		5,00±0,50	5,00±0,50	5,00±0,50	5,00±0,50	5,00±0,50	5,00±0,50
		7,50±0,50	7,50±0,50	7,50±0,50	7,50±0,50	7,50±0,50	7,50±0,50
		10,00±1,00	10,00±1,00	10,00±1,00	10,00±1,00	10,00±1,00	10,00±1,00
		10,00±1,00	20,00±1,50	10,00±1,00	20,00±1,50	10,00±1,00	20,00±1,50
2	Салфетки марлевые медицинские абсорбирующие нестерильные Matorcomp с рентгеноконтрастной нитью под товарным знаком matorat по ТУ 32.50.50-050- 11736425-2017; Салфетки нестерильные товарного знака matorat: марлевые с рентгеноконтрастной нитью Matorcomp	8 сложений (в готовом сложенном виде)		12 сложений (в готовом сложенном виде)		16 сложений (в готовом сложенном виде)	
		Ширина, см	Длина, см	Ширина, см	Длина, см	Ширина, см	Длина, см
		5,00±0,50	5,00±0,50	5,00±0,50	5,00±0,50	5,00±0,50	5,00±0,50
		7,50±0,50	7,50±0,50	7,50±0,50	7,50±0,50	7,50±0,50	7,50±0,50
		10,00±1,00	10,00±1,00	10,00±1,00	10,00±1,00	10,00±1,00	10,00±1,00
		10,00±1,00	15,00±1,00	10,00±1,00	15,00±1,00	10,00±1,00	15,00±1,00
3	Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matorat по ТУ 21.20.24-035- 11736425-2017: из нетканого материала matovlies	4 сложения (в готовом сложенном виде)		8 сложений (в готовом сложенном виде)			
		Ширина, см	Длина, см	Ширина, см		Длина, см	
		10,00 ± 1,00	20,00 ± 1,50	10,00 ± 1,00		20,00 ± 1,50	
		10,00 ± 1,00	40,00 ± 1,50	10,00 ± 1,00		40,00 ± 1,50	
		20,00 ± 1,50	40,00 ± 1,50	20,00 ± 1,50		40,00 ± 1,50	
		30,00 ± 1,50	40,00 ± 1,50	30,00 ± 1,50		40,00 ± 1,50	
		40,00 ± 1,50	40,00 ± 1,50	40,00 ± 1,50		40,00 ± 1,50	
		40,00 ± 1,50	65,00 ± 1,50	40,00 ± 1,50		65,00 ± 1,50	
4	Марлевые перевязочные материалы марки matorat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А), Tupfer C (Тупфер Ц), Tupfer B (Тупфер В), Tupfer D (Тупфер Д)	Размер края марли, из которого изготовлен тупфер из марлевого отреза					
		Ширина, см			Длина, см		
		Tupfer A (Тупфер А), форма тупфера: шарик					
		15,00±1,00			15,00±1,00		
		20,00±1,00			20,00±1,00		
		30,00±1,00			30,00±1,00		
		50,00±1,00			50,00±1,00		
		Tupfer B (Тупфер В), форма тупфера: фасолька					
		9,50±1,00			9,50±1,00		
		15,00±1,00			15,00±1,00		

Продолжение таблицы 3.

№ п/п	Составляющие	Основные размеры			
1	2	3			
		Tupfer C (Тупфер Ц), форма тупфера: усик			
		15,00±1,00		15,00±1,00	
		18,00±1,00		20,00±1,00	
		30,00±1,00		30,00±1,00	
		Tupfer D (Тупфер Д), форма тупфера: треугольник			
		12,00±1,00		12,00±1,00	
		15,00±1,00		15,00±1,00	
		18,00±1,00		18,00±1,00	
5	Марлевые перевязочные материалы марки matorat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer AR (Тупфер АР), Tupfer CR (Тупфер ЦР), Tupfer BR (Тупфер ВР), Tupfer DR (Тупфер ДР)	Размер края марли, из которого изготовлен тупфер из марлевого отреза с рентгеноконтрастной нитью			
		Ширина, см		Длина, см	
		Tupfer AR (Тупфер АР), форма тупфера: шарик			
		15,00±1,00		15,00±1,00	
		20,00±1,00		20,00±1,00	
		30,00±1,00		30,00±1,00	
		50,00±1,00		50,00±1,00	
		Tupfer BR (Тупфер ВР), форма тупфера: фасолька			
		9,50±1,00		9,50±1,00	
		15,00±1,00		15,00±1,00	
		Tupfer CR (Тупфер ЦР), форма тупфера: усик			
		15,00±1,00		15,00±1,00	
		18,00±1,00		20,00±1,00	
		30,00±1,00		30,00±1,00	
		Tupfer DR (Тупфер ДР), форма тупфера: треугольник			
		12,00±1,00		12,00±1,00	
		15,00±1,00		15,00±1,00	
		18,00±1,00		18,00±1,00	
6	Марлевые перевязочные материалы марки matorat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Abdoma (Абдома)	Ширина салфетки, см	Длина салфетки, см	Ширина фиксатора, см	Длина фиксатора, см
		2-слойные			
		75,00±2,00	75,00±2,00	1,50±0,50	24,00±2,00
		4-слойные			
		30,00±2,00	30,00±2,00	1,50±0,50	24,00±2,00
		30,00±2,00	45,00±2,00	1,50±0,50	24,00±2,00
		45,00±2,00	45,00±2,00	1,50±0,50	24,00±2,00
		45,00±2,00	70,00±2,00	1,50±0,50	24,00±2,00
		75,00±2,00	90,00±2,00	1,50±0,50	24,00±2,00
		6-слойные			
		45,00±2,00	45,00±2,00	1,50±0,50	24,00±2,00

Продолжение таблицы 3.

№ п/п	Составляющие	Основные размеры			
1	2	3			
7	Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Seton (Сетон)	4-слойные		8-слойные	
		Ширина, см	Длина, м	Ширина, см	Длина, м
		2,00±0,20	1,00±5%	7,50±0,20	1,00±5%
		5,00±0,20	1,00±5%	10,00±0,20	1,00±5%
		7,50±0,20	1,00±5%	7,50±0,20	2,00±5%
		10,00±0,20	1,00±5%	10,00±0,20	5,00±5%
		1,00±0,20	2,00±5%		
		2,00±0,20	2,00±5%		
		5,00±0,20	2,00±5%		
		7,50±0,20	2,00±5%		
		10,00±0,20	2,00±5%		
		10,00±0,20	5,00±5%		
8	Комбинированные сорбционные повязки высокой впитываемости ABSORBA под товарным знаком matopat стерильные и нестерильные: салфетки впитывающие	Ширина, см		Длина, см	
		10,00 ± 5%		15,00 ± 5%	
		10,00 ± 5%		20,00 ± 5%	
9	Чехол на конечность	Ширина, см		Длина, см	
		25,00±5,00		80,00±5,00	
		33,00±5,00		55,00±5,00	
		35,00±5,00		60,00±5,00	
		37,00±5,00		75,00±5,00	
		37,00±5,00		120,00±5,00	
		40,00±5,00		130,00±5,00	
		45,00±5,00		75,00±5,00	
		45,00±5,00		80,00±5,00	
		45,00±5,00		120,00±5,00	
		60,00±5,00		120,00±5,00	
		75,00±5,00		120,00±5,00	
		80,00±5,00		120,00±5,00	
10	Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: чехол	Ширина, см		Длина, см	
		37,00±5,00		120,00±5,00	
		40,00±5,00		130,00±5,00	
		45,00±5,00		80,00±5,00	
		80,00±5,00		120,00±5,00	

Продолжение таблицы 3.

№ п/п	Составляющие	Основные размеры		
1	2	3		
11	Пеленки впитывающие «Seni» по ТУ 17.22.12-005- 11736425-2015: Seni Soft или Seni Soft Normal	Ширина, см	Длина, см	
		40,00±1,00	60,00±2,00	
		60,00±2,00	60,00±2,00	
		60,00±2,00	90,00±2,00	
12	Одежда для медицинского персонала марки «matopat» одноразовая «Matodress» нестерильная из нетканого, ламинированного нетканого, хлопкоподобного нетканого материала, полиэтилена: халат	M; L; XL; XXL		Длина халата для всего размерного ряда не менее: 110 см
13	Контейнер круглый	Объем, мл	Внешний диаметр, мм	Высота, мм
		250±5%	115±5%	43±5%
		500±5%	115±5%	83±5%
	Контейнер прямоугольный	Объем, мл	Ширина, мм	Длина, мм
		125±5%	80±5%	108±5%
		500±5%	132±5%	180±5%
		750±5%	130±5%	180±5%
				48±5%
14	Перчатки хирургические резиновые по ГОСТ 3-88	Размеры:	Ширина, мм	Длина, мм, не менее
		4,0	89,00±5,00	270,00
		5,0	97,00±5,00	270,00
		6,0	102,00±5,00	270,00
		7,0	97,00±7,00	270,00
		8,0	102,00±7,00	270,00
		9,0	108,00±7,00	270,00
15	Медицинские изделия и инструменты для хирургических вмешательств Matoset под товарным знаком «matopat» стерильные, в наборах и отдельных упаковках: клещи	Длина, мм (±5%)		
		190,00		
		250,00		
16	Инструменты медицинские: зажим	Длина, мм (±5%)		
		150,00		
		160,00		
		200,00		

Продолжение таблицы 3.

№ п/п	Составляющие		Основные размеры	
1	2		3	
17	Инструменты хирургические однолезвийные CERTUS, с принадлежностями: Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из углеродистой стали	№ 10	Длина скальпеля, мм: 146,00±5%	
			Длина лезвия скальпеля, мм: 43,00±5%	
		№ 11	Длина скальпеля, мм: 145,00±5%	
			Длина лезвия скальпеля, мм: 23,00±5%	
		№ 15	Длина скальпеля, мм: 146,00±5%	
			Длина лезвия скальпеля, мм: 37,00±5%	
18	Инструменты хирургические однолезвийные CERTUS, с принадлежностями: Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из нержавеющей стали	№ 10	Длина скальпеля, мм: 146,00±5%	
			Длина лезвия скальпеля, мм: 43,00±5%	
		№ 11	Длина скальпеля, мм: 145,00±5%	
			Длина лезвия скальпеля, мм: 23,00±5%	
		№ 15	Длина скальпеля, мм: 146,00±5%	
			Длина лезвия скальпеля, мм: 37,00±5%	
19	Инструмент режущий с приспособлениями: скальпель	№ 11	Длина скальпеля, мм: 145,00±5%	
			Длина лезвия скальпеля, мм: 23,00±5%	
		№ 23	Длина скальпеля, мм: 150,00±5%	
			Длина лезвия скальпеля, мм: 30,00±5%	
20	Инструменты медицинские: пинцет	Длина, мм	Расстояние между браншами, мм	
		145,00±10%	13,00±2,00	
		160,00±10%	17,00±2,00	
21	Инструменты медицинские хирургические: инструменты поверхностного воздействия, зажимные, вспомогательные: пинцет	Длина, мм	Расстояние между браншами, мм	
		145,00±10%	13,00±2,00	
		160,00±10%	17,00±2,00	
22	Медицинские изделия и инструменты для хирургических вмешательств Matoset под товарным знаком «matopar» стерильные, в наборах и отдельных упаковках: пинцет	Длина, мм	Расстояние между браншами, мм	
		145,00±10%	13,00±2,00	
		160,00±10%	17,00±2,00	

Продолжение таблицы 3.

№ п/п 1	Составляющие 2	Основные размеры 3	
		Длина, см	Ширина, см
23	Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: простыни медицинские	70,00 ± 5,00	100,00 ± 5,00
		70,00 ± 5,00	140,00 ± 7,00
		70,00 ± 5,00	200,00 ± 7,00
		75,00 ± 5,00	150,00 ± 7,00
		75,00 ± 5,00	180,00 ± 7,00
		75,00 ± 5,00	240,00 ± 7,00
		80,00 ± 5,00	110,00 ± 7,00
		80,00 ± 5,00	130,00 ± 7,00
		80,00 ± 5,00	140,00 ± 7,00
		80,00 ± 5,00	200,00 ± 7,00
		90,00 ± 5,00	110,00 ± 7,00
		90,00 ± 5,00	120,00 ± 7,00
		90,00 ± 5,00	130,00 ± 7,00
		90,00 ± 5,00	150,00 ± 7,00
		90,00 ± 5,00	160,00 ± 7,00
		90,00 ± 5,00	180,00 ± 7,00
		90,00 ± 5,00	200,00 ± 7,00
		90,00 ± 5,00	210,00 ± 7,00
		90,00 ± 5,00	250,00 ± 7,00
		100,00 ± 5,00	100,00 ± 5,00
		100,00 ± 5,00	140,00 ± 7,00
		100,00 ± 5,00	210,00 ± 7,00
		100,00 ± 5,00	240,00 ± 7,00
		120,00 ± 7,00	120,00 ± 7,00
		120,00 ± 7,00	150,00 ± 7,00
		120,00 ± 7,00	180,00 ± 7,00
		140,00 ± 7,00	200,00 ± 7,00
		140,00 ± 7,00	210,00 ± 7,00
		150,00 ± 7,00	150,00 ± 7,00
		150,00 ± 7,00	180,00 ± 7,00
		150,00 ± 7,00	200,00 ± 7,00
		150,00 ± 7,00	210,00 ± 7,00
		150,00 ± 7,00	240,00 ± 7,00
		150,00 ± 7,00	260,00 ± 7,00
		150,00 ± 7,00	280,00 ± 7,00
		150,00 ± 7,00	300,00 ± 7,00
		160,00 ± 7,00	210,00 ± 7,00
		170,00 ± 7,00	180,00 ± 7,00
		180,00 ± 7,00	200,00 ± 7,00
		180,00 ± 7,00	220,00 ± 7,00
		180,00 ± 7,00	240,00 ± 7,00
		180,00 ± 7,00	260,00 ± 7,00
		180,00 ± 7,00	280,00 ± 7,00
		180,00 ± 7,00	300,00 ± 7,00
		180,00 ± 7,00	360,00 ± 7,00

Продолжение таблицы 3.

№ п/п	Составляющие	Основные размеры	
1	2	3	
24	Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыни с отверстием и адгезивным краем	Ширина, см	Длина, см
		90,0 ± 5,0	130,0 ± 7,0
		180,0 ± 7,0	200,0 ± 7,0
		180,0 ± 7,0	245,0 ± 7,0
		180,0 ± 7,0	265,0 ± 7,0
		200/240 ± 7,0	260,0 ± 7,0
		250,0 ± 7,0	250,0 ± 7,0
		Форма отверстия: прямоугольник. Размер отверстия (прямоугольник): - Ширина, см, не менее: 5,00 - Длина, см, не менее: 15,00	
		Ширина адгезивного края для всего размерного ряда простыней, см: не менее 2,0	
25	Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыни с отверстием, адгезивным краем и карманом	Ширина, см	Длина, см
		180,0 ± 7,0	200,0 ± 7,0
		180,0 ± 7,0	245,0 ± 7,0
		200,0 ± 7,0	275,0 ± 7,0
		240,0 ± 7,0	260,0 ± 7,0
		240,0 ± 7,0	290,0 ± 7,0
		200/250 ± 7,0	250,0 ± 7,0
		200/240 ± 7,0	260,0 ± 7,0
		Форма отверстия: прямоугольник, овал. Размер отверстия (прямоугольник): - Ширина, см, не менее: 5,00 - Длина, см, не менее: 10,00 Размер отверстия (овал): - Ширина, см, не менее: 5,00 - Длина, см, не менее: 8,00	
		Ширина адгезивного края для всего размерного ряда простыней, см: не менее 2,0	
26	Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на инструментальный стол	Длина, см	Ширина, см
		190,00 ± 7,00	150,00 ± 7,00
27	Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на столик Майо	Длина, см	Ширина, см
		145,00 ± 7,00	80,00 ± 5,00

Продолжение таблицы 3.

№ п/п 1	Составляющие 2	Основные размеры 3	
		Ширина, см	Длина, см
28	Покрытие на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские	22,00 ± 3,00	25,00 ± 3,00
		30,00 ± 3,00	30,00 ± 3,00
		30,00 ± 3,00	40,00 ± 3,00
		35,00 ± 3,00	50,00 ± 3,00
		40,00 ± 3,00	40,00 ± 3,00
		40,00 ± 3,00	45,00 ± 3,00
		40,00 ± 3,00	60,00 ± 5,00
		45,00 ± 3,00	45,00 ± 3,00
		45,00 ± 3,00	75,00 ± 5,00
		45,00 ± 3,00	80,00 ± 5,00
		50,00 ± 3,00	50,00 ± 3,00
		50,00 ± 3,00	60,00 ± 5,00
		60,00 ± 5,00	80,00 ± 5,00
		60,00 ± 5,00	90,00 ± 5,00
		70,00 ± 5,00	40,00 ± 3,00
		70,00 ± 5,00	70,00 ± 5,00
		70,00 ± 5,00	80,00 ± 5,00
		75,00 ± 5,00	75,00 ± 5,00
		75,00 ± 5,00	90,00 ± 5,00
		80,00 ± 5,00	90,00 ± 5,00
		90,00 ± 5,00	90,00 ± 5,00
29	Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах	Ширина, см (± 10%)	Длина, см (± 10%)
		2,00	12,00
		2,00	15,00
		2,50	15,00
		3,00	15,00
		5,00	15,00
30	Односторонняя чувствительная к давлению клейкая лента с тканевой основой и лайнером из силиконизированной бумаги DUPLOMED SD 6144 D	Ширина, см (± 10%)	Длина, см (± 10%)
		3,00	51,00
		9,00	51,00
31	Пинцеты полимерные одноразовые стерильные по ТУ 9398-176-44942795-2005: пинцет окончательный полимерный одноразовый стерильный	Длина, мм	Расстояние между браншами, мм
		125,00±5%	19,00±2,00

17. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

Изделие применяется во всех типах амбулаторных и стационарных лечебно-профилактических учреждений.

18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

Изделие имеет полностью законченную конструкцию и не требует в процессе эксплуатации каких-либо вмешательств по техническому обслуживанию и ремонту, за исключением утилизации в соответствии со стандартами медицинского учреждения.

19. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ.

Обращение с отходами производства осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Непригодные к использованию Изделия (неиспользованные Изделия с истекшим сроком годности) относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Использованные Изделия относятся к отходам класса Б - эпидемиологически опасные, и требуют соответствующих мер предосторожности при уничтожении (утилизации) в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

20. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

В процессе производства Изделий в окружающую среду не должны выделяться токсичные вещества, оказывающие раздражающее или сенсibiliзирующее действие на организм человека.

В условиях эксплуатации, Изделие должно быть нетоксично и не вызывать местно-раздражающих или аллергических реакций при контакте с кожей.

Все работы по производству Изделия должны проводиться в помещениях, оборудованных местной приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021, обеспечивающей состояние воздуха рабочей зоны по СанПиН 1.2.3685-21.

Применение открытого огня в этих помещениях запрещается.

Общие требования по обеспечению пожарной безопасности должны соответствовать ГОСТ 12.1.004-91, а также ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Производственные и складские помещения должны быть обеспечены необходимыми средствами пожаротушения и противопожарным оборудованием. При тушении пожара и выполнении мероприятий по спасению людей и материальных ценностей следует использовать средства защиты органов дыхания.

Охрана окружающей среды осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 04.05.1999г. №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

При производстве Наборов, образующиеся отходы складываются в контейнеры и утилизируются в установленном порядке. Допускается утилизацию отходов материалов в процессе производства производить на договорной основе с организацией, имеющей лицензию на утилизацию отходов.

Запрещается неорганизованное сжигание бывшего в употреблении Изделия.

21. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Общество с ограниченной ответственностью «Белла» (ООО «Белла») не имеет уполномоченного представителя.

22. МАРКИРОВКА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

Маркировка Изделия сопровождается графическими символами, которые должны соответствовать ГОСТ Р ИСО 15223-1. Расшифровка графических символов, используемых при маркировке Изделия, представлена в таблице 4.

Таблица 4.

	Стерилизация оксидом этилена
	Запрет на повторное применение
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при повреждении упаковки
	Использовать до
	Код партии (номер партии)
	Изготовитель
	Не допускать воздействия солнечного света

	Беречь от влаги
	Температурный диапазон
	Символ переработки
	Зарегистрированный товарный знак
	Дата изготовления
	Знак соответствия при декларировании соответствия в системе ГОСТ Р

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ.

Национальные стандарты РФ, регламентирующие требования безопасности, качества и методы контроля соответствия Изделия этим требованиям:

- Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 №1416 «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий»;
- Постановление Правительства РФ от 17.10.2013 №930 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. №1416";
- Постановление Правительства РФ от 17.07.2014 №670 "О внесении изменений в Правила государственной регистрации медицинских изделий";
- Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 №160 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. №1416";
- Постановление Правительства РФ от 31.05.2018 №633 «О внесении изменений в Правила государственной регистрации медицинских изделий»;
- Постановление Правительства РФ от 18.03.2020 N 299 «О внесении изменений в Правила государственной регистрации медицинских изделий»;
- Постановление Правительства РФ от 01.09.2020 года N 1335 «О внесении изменения в пункт 2 Правил государственной регистрации медицинских изделий»;
- Постановление Правительства РФ от 24.11.2020 N 1906 «О внесении изменений в Правила государственной регистрации медицинских изделий»;
- ГОСТ 31508-2012 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования»;
- ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования»;
- ГОСТ ISO 11607-1-2018 «Межгосударственный стандарт. Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 1. Требования к материалам, барьерным системам для стерилизации и упаковочным системам»;

- ГОСТ ISO 11607-2-2018 «Межгосударственный стандарт. Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 2. Требования к валидации процессов формирования, герметизации и сборки»;
- ГОСТ ISO 11135-2017 «Межгосударственный стандарт. Стерилизация медицинской продукции. Этиленоксид. Требования к разработке, валидации и текущему управлению процессом стерилизации медицинских изделий»;
- ГОСТ ISO 11140-1-2011 «Межгосударственный стандарт. Стерилизация медицинской продукции. Химические индикаторы. Часть 1. Общие требования»;
- ГОСТ Р ИСО 14937-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Стерилизация медицинской продукции. Общие требования к определению характеристик стерилизующего агента и к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий»;
- ГОСТ 3811-72 «Межгосударственный стандарт. Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и штучные изделия. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей»;
- ГОСТ Р 53498-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские пластырного типа. Общие технические требования. Методы испытаний»;
- ГОСТ 28840-90 «Машины для испытания материалов на растяжение, сжатие и изгиб. Общие технические требования»;
- ГОСТ 3813-72 «Межгосударственный стандарт. Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения разрывных характеристик при растяжении»;
- ГОСТ 15902.3-79 «Полотна нетканые. Методы определения прочности»;
- ГОСТ 33076-2014 «Межгосударственный стандарт. Перчатки медицинские. Метод определения герметичности»;
- ГОСТ 3-88 «Государственный стандарт Союза ССР. Перчатки хирургические резиновые. Технические условия»;
- ГОСТ EN 455-2-2014 «Межгосударственный стандарт. Перчатки медицинские одноразовые. Часть 2. Методы определения физико-механических свойств»;
- ГОСТ 33756-2016 «Упаковка потребительская полимерная. Общие технические условия»;
- ГОСТ 21241-89 «Государственный стандарт Союза ССР. Пинцеты медицинские. Общие технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска»;
- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;
- ГОСТ ISO 10993-7-2016 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 7. Остаточное содержание этиленоксида после стерилизации»;
- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и sensibilizing действия»;
- ГОСТ ISO 10993-12-2015 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12. Приготовление проб и контрольные образцы»;

- ГОСТ Р 52770-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;
- ГОСТ 31209-2003 «Межгосударственный стандарт. Контейнеры для крови и ее компонентов. Требования химической и биологической безопасности и методы испытаний»;
- ГОСТ 31214-2016 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические исследования, испытания на стерильность и пирогенность»;
- ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии»;
- ГН 2.3.3.972-00 «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами»;
- МУ 1.1.037-95 «Биотестирование продукции из полимерных и других материалов»;
- МУК 4.2.2942-11 «Методы санитарно-биологических исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях»;
- ГФ РФ издание XIV ОФС. 1.2.4.0003.15. Стерильность»;
- МУК 4.1.647-96 «Методические указания по газохроматографическому определению фенола в воде»;
- ГОСТ Р 55227-2012 «Вода. Методы определения содержания формальдегида»;
- МУК 4.1.3166-14 «Газохроматографическое определение <...> в воде и водных вытяжках из материалов различного состава»;
- ГОСТ EN 556-1-2011 «Межгосударственный стандарт. Стерилизация медицинских изделий. Требования к медицинским изделиям категории «стерильные». Часть 1. Требования к медицинским изделиям, подлежащим финишной стерилизации».

Наборы медицинские matoset, применяемые при гинекологических операциях, хирургические, стерильные под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.13-084-11736425-2020, варианты исполнения:

Набор №1:

Салфетки марлевые медицинские абсорбирующие нестерильные Matocomp с рентгеноконтрастной нитью под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-050-11736425-2017 в готовом (сложенном) виде: в 8, 12 или 16 сложений, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/7880, или Салфетки нестерильные товарного знака matopat: марлевые с рентгеноконтрастной нитью Matocomp: в готовом (сложенном) виде: в 8, 12 или 16 сложений, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2009/04282: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 15 см или 10 см x 20 см – не более 100 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А), Tupfer C (Тупфер Ц), Tupfer B (Тупфер В), Tupfer D (Тупфер Д): 9,5 см x 9,5 см или 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см или 18 см x 20 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – не более 100 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Seton (Сетон): 4-слойные или 8-слойные: 2 см x 1 м или 5 см x 1 м или 7,5 см x 1 м или 10 см x 1 м или 1 см x 2 м или 2 см x 2 м или 5 см x 2 м или 7,5 см x 2 м или 10 см x 2 м или 10 см x 5 м, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – не более 20 шт.;

Контейнер прямоугольный: 125 мл или 500 мл или 750 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – не более 4 шт. **(при необходимости);**

Инструменты хирургические однолезвийные CERTUS, с принадлежностями: Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из углеродистой стали или Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из нержавеющей стали: №10 или №11 или №15, производитель «Хуайинь Медикал Инструменте Ко., Лтд.», КНР, РУ №РЗН 2017/5689, или Инструмент режущий с приспособлениями: скальпель: №11 или №23, производитель «Риббел Интернешенел Лтд.», Индия, РУ №ФСЗ 2008/02137 – не более 2 шт. **(при необходимости);**

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыни с отверстием, адгезивным краем и карманом: 180 см x 200 см или 180 см x 245 см или 200 см x 275 см или 240 см x 260 см или 240 см x 290 см или 200/250 см x 250 см или 200/240 см x 260 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на инструментальный стол: 190 см x 150 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на столик Майо: 145 см x 80 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.

Набор №2:

Салфетки марлевые медицинские абсорбирующие нестерильные Matocomp с рентгеноконтрастной нитью под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-050-11736425-2017 в готовом (сложенном) виде: в 8, 12 или 16 сложений, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/7880, или Салфетки нестерильные товарного знака matopat: марлевые с рентгеноконтрастной нитью Matocomp: в готовом (сложенном) виде: в 8, 12 или 16 сложений, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2009/04282: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 15 см или 10 см x 20 см – не более 100 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Seton (Сетон): 4-слойные или 8-слойные: 2 см x 1 м или 5 см x 1 м или 7,5 см x 1 м или 10 см x 1 м или 1 см x 2 м или 2 см x 2 м или 5 см x 2 м или 7,5 см x 2 м или 10 см x 2 м или 10 см x 5 м, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – не более 20 шт.;

Контейнер прямоугольный: 125 мл или 500 мл или 750 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – не более 4 шт. **(при необходимости)**;

Инструменты хирургические однолезвийные CERTUS, с принадлежностями: Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из углеродистой стали или Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из нержавеющей стали: №10 или №11 или №15, производитель «Хуайинь Медикал Инструменте Ко., Лтд.», КНР, РУ №РЗН 2017/5689, или Инструмент режущий с приспособлениями: скальпель: №11 или №23, производитель «Риббел Интернешенел Лтд.», Индия, РУ №ФСЗ 2008/02137 – не более 2 шт. **(при необходимости)**;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыни с отверстием, адгезивным краем и карманом: 180 см x 200 см или 180 см x 245 см или 200 см x 275 см или 240 см x 260 см или 240 см x 290 см или 200/250 см x 250 см или 200/240 см x 260 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на инструментальный стол: 190 см x 150 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на столик Майо: 145 см x 80 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.

Набор №3:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложений: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – не более 100 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer AR (Тупфер АР), Tupfer CR (Тупфер ЦР), Tupfer BR (Тупфер ВР), Tupfer DR (Тупфер ДР): 9,5 см x 9,5 см или 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см или 18 см x 20 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – не более 100 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком

matopat: чехол: 37 см x 120 см или 40 см x 130 см или 45 см x 80 см или 80 см x 120 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840, или чехол на конечность: 25 см x 80 см или 33 см x 55 см или 35 см x 60 см или 37 см x 75 см или 37 см x 120 см или 40 см x 130 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 45 см x 120 см или 60 см x 120 см или 75 см x 120 см или 80 см x 120 см, производитель ООО «Белла», ТУ 32.50.13-084-11736425-2020 – не более 2 шт. **(при необходимости);**

Одежда для медицинского персонала марки «matopat» одноразовая «Matodress» нестерильная из нетканого, ламинированного нетканого, хлопкоподобного нетканого материала, полиэтилена: халат: М или L или XL или XXL, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01376 – не более 6 шт. **(при необходимости);**

Контейнер круглый: 250 мл или 500 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – не более 4 шт. **(при необходимости);**

Инструменты хирургические однолезвийные CERTUS, с принадлежностями: Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из углеродистой стали или Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из нержавеющей стали: №10 или №11 или №15, производитель «Хуайинь Медикал Инструменте Ко., Лтд.», КНР, РУ №РЗН 2017/5689, или Инструмент режущий с приспособлениями: скальпель: №11 или №23, производитель «Риббел Интернешенел Лтд.», Индия, РУ №ФСЗ 2008/02137 – не более 2 шт. **(при необходимости);**

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыни с отверстием и адгезивным краем: 90 см x 130 см или 180 см x 200 см или 180 см x 245 см или 180 см x 265 см или 200/240 см x 260 см или 250 см x 250 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на инструментальный стол: 190 см x 150 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на столик Майо: 145 см x 80 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 или Односторонняя чувствительная к давлению клейкая лента с тканевой основой и лайнером из силиконизированной бумаги DUPLOMED SD 6144 D: 3 см x 51 см или 9 см x 51 см, производитель «Lohmann GmbH & Co.KG» (Германия) – не более 20 шт. **(при необходимости).**

Набор №4:

Салфетки марлевые медицинские абсорбирующие нестерильные Matocomp с рентгеноконтрастной нитью под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-050-11736425-2017 в готовом (сложенном) виде: в 8, 12 или 16 сложений, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/7880, или Салфетки нестерильные товарного знака matopat: марлевые с рентгеноконтрастной нитью Matocomp: в готовом (сложенном) виде: в 8, 12 или 16 сложений, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2009/04282: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 15 см или 10 см x 20 см – не более 100 шт.;

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: из нетканого материала matovlies: в готовом (сложенном) виде: 4, 8 сложений: 10 см x 20 см или 10 см x 40 см или 20 см x 40 см или 30 см x 40 см или 40 см x 40 см или 40 см x 65 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – не более 100 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer AR (Тупфер АР), Tupfer CR (Тупфер ЦР), Tupfer BR (Тупфер ВР), Tupfer DR (Тупфер ДР): 9,5 см x 9,5 см или 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см или 18 см x 20 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – не более 100 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Seton (Сетон): 4-слойные или 8-слойные: 2 см x 1 м или 5 см x 1 м или 7,5 см x 1 м или 10 см x 1 м или 1 см x 2 м или 2 см x 2 м или 5 см x 2 м или 7,5 см x 2 м или 10 см x 2 м или 10 см x 5 м, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – не более 20 шт.;

Одежда для медицинского персонала марки «matopat» одноразовая «Matodress» нестерильная из нетканого, ламинированного нетканого, хлопкоподобного нетканого материала, полиэтилена: халат: М или L или XL или XXL, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01376 – не более 6 шт. **(при необходимости);**

Перчатки хирургические резиновые по ГОСТ 3-88: 4,0 или 5,0 или 6,0 или 7,0 или 8,0 или 9,0, производитель АО «АЗРИ», Россия, РУ №ФСР 2010/07673 – не более 10 пар;

Инструменты хирургические однолезвийные CERTUS, с принадлежностями: Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из углеродистой стали или Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из нержавеющей стали: №10 или №11 или №15, производитель «Хуайинь Медикал Инструменте Ко., Лтд.», КНР, РУ №РЗН 2017/5689, или Инструмент режущий с приспособлениями: скальпель: №11 или №23, производитель «Риббел Интернешенел Лтд.», Индия, РУ №ФСЗ 2008/02137 – не более 2 шт. **(при необходимости);**

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыни с отверстием, адгезивным краем и карманом: 180 см x 200 см или 180 см x 245 см или 200 см x 275 см или 240 см x 260 см или 240 см x 290 см или 200/250 см x 250 см или 200/240 см x 260 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на инструментальный стол: 190 см x 150 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на столик Майо: 145 см x 80 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70

см х 80 см или 75 см х 75 см или 75 см х 90 см или 80 см х 90 см или 90 см х 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – не более 6 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см х 12 см или 2 см х 15 см или 2,5 см х 15 см или 3 см х 15 см или 5 см х 15 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 или Односторонняя чувствительная к давлению клейкая лента с тканевой основой и лайнером из силиконизированной бумаги DUPLOMED SD 6144 D: 3 см х 51 см или 9 см х 51 см, производитель «Lohmann GmbH & Co.KG» (Германия) – не более 20 шт. **(при необходимости)**.

Набор №5:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложений: 5 см х 5 см или 7,5 см х 7,5 см или 10 см х 10 см или 10 см х 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – не более 100 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А), Tupfer C (Тупфер Ц), Tupfer B (Тупфер В), Tupfer D (Тупфер Д): 9,5 см х 9,5 см или 12 см х 12 см или 15 см х 15 см или 18 см х 18 см или 18 см х 20 см или 20 см х 20 см или 30 см х 30 см или 50 см х 50 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – не более 100 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Abdoma (Абдома): 2-слойные (75 см х 75 см) или 4-слойные (30 см х 30 см или 30 см х 45 см или 45 см х 45 см или 45 см х 70 см или 75 см х 90 см) или 6-слойные (45 см х 45 см), производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – не более 20 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Seton (Сетон): 4-слойные или 8-слойные: 2 см х 1 м или 5 см х 1 м или 7,5 см х 1 м или 10 см х 1 м или 1 см х 2 м или 2 см х 2 м или 5 см х 2 м или 7,5 см х 2 м или 10 см х 2 м или 10 см х 5 м, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – не более 20 шт.;

Медицинские изделия и инструменты для хирургических вмешательств Matoset под товарным знаком «matopat» стерильные, в наборах и отдельных упаковках: клещи: 190 мм или 250 мм, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2011/09976 – не более 4 шт. **(при необходимости)**;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см х 22 см или 30 см х 30 см или 30 см х 40 см или 35 см х 50 см или 40 см х 40 см или 40 см х 45 см или 40 см х 60 см или 45 см х 45 см или 45 см х 75 см или 45 см х 80 см или 50 см х 50 см или 50 см х 60 см или 60 см х 80 см или 60 см х 90 см или 70 см х 40 см или 70 см х 70 см или 70 см х 80 см или 75 см х 75 см или 75 см х 90 см или 80 см х 90 см или 90 см х 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – не более 6 шт.

Набор №6:

Салфетки марлевые медицинские абсорбирующие нестерильные Matocomp с рентгеноконтрастной нитью под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-050-11736425-2017 в готовом (сложенном) виде: в 8, 12 или 16 сложений, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/7880, или Салфетки нестерильные товарного знака matopat: марлевые с рентгеноконтрастной нитью Matocomp: в готовом (сложенном) виде: в 8, 12

или 16 сложений, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2009/04282: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 15 см или 10 см x 20 см – не более 100 шт.;

Комбинированные сорбционные повязки высокой впитываемости ABSORBA под товарным знаком matopar стерильные и нестерильные: салфетки впитывающие: 10 см x 15 см или 10 см x 20 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/12545 – не более 20 шт.;

Инструменты хирургические однолезвийные CERTUS, с принадлежностями: Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из углеродистой стали или Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из нержавеющей стали: №10 или №11 или №15, производитель «Хуайинь Медикал Инструменте Ко., Лтд.», КНР, РУ №РЗН 2017/5689, или Инструмент режущий с приспособлениями: скальпель: №11 или №23, производитель «Риббел Интернешенел Лтд.», Индия, РУ №ФСЗ 2008/02137 – не более 2 шт. **(при необходимости);**

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopar: простыни с отверстием, адгезивным краем и карманом: 180 см x 200 см или 180 см x 245 см или 200 см x 275 см или 240 см x 260 см или 240 см x 290 см или 200/250 см x 250 см или 200/240 см x 260 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopar: простыня на инструментальный стол: 190 см x 150 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.

Набор №7:

Салфетки марлевые медицинские абсорбирующие нестерильные Matocomp с рентгеноконтрастной нитью под товарным знаком matopar по ТУ 32.50.50-050-11736425-2017 в готовом (сложенном) виде: в 8, 12 или 16 сложений, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/7880, или Салфетки нестерильные товарного знака matopar: марлевые с рентгеноконтрастной нитью Matocomp: в готовом (сложенном) виде: в 8, 12 или 16 сложений, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2009/04282: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 15 см или 10 см x 20 см – не более 100 шт.;

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopar по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: из нетканого материала matovlies: в готовом (сложенном) виде: 4, 8 сложений: 10 см x 20 см или 10 см x 40 см или 20 см x 40 см или 30 см x 40 см или 40 см x 40 см или 40 см x 65 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – не более 100 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopar нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer AR (Тупфер АР), Tupfer CR (Тупфер ЦР), Tupfer BR (Тупфер ВР), Tupfer DR (Тупфер ДР): 9,5 см x 9,5 см или 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см или 18 см x 20 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – не более 100 шт.;

Контейнер круглый: 250 мл или 500 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – не более 4 шт. **(при необходимости);**

Медицинские изделия и инструменты для хирургических вмешательств Matoset под товарным знаком «matopar» стерильные, в наборах и отдельных упаковках: клещи: 190 мм или 250 мм, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2011/09976 – не более 4 шт. **(при необходимости);**

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком

matopat: простыни с отверстием, адгезивным краем и карманом: 180 см x 200 см или 180 см x 245 см или 200 см x 275 см или 240 см x 260 см или 240 см x 290 см или 200/250 см x 250 см или 200/240 см x 260 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на инструментальный стол: 190 см x 150 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на столик Майо: 145 см x 80 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.

Набор №8:

Салфетки марлевые медицинские абсорбирующие нестерильные Matocomp с рентгеноконтрастной нитью под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-050-11736425-2017 в готовом (сложенном) виде: в 8, 12 или 16 сложений, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/7880, или Салфетки нестерильные товарного знака matopat: марлевые с рентгеноконтрастной нитью Matocomp: в готовом (сложенном) виде: в 8, 12 или 16 сложений, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2009/04282: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 15 см или 10 см x 20 см – не более 100 шт.;

Инструменты медицинские: зажим: 150 мм или 160 мм или 200 мм, производитель «Эджайл Индастриз», Пакистан, РУ №РЗН 2016/4524 – не более 4 шт. **(при необходимости);**

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: простыни медицинские: 70 см x 100 см или 70 см x 140 см или 70 см x 200 см или 75 см x 150 см или 75 см x 180 см или 75 см x 240 см или 80 см x 110 см или 80 см x 130 см или 80 см x 140 см или 80 см x 200 см или 90 см x 110 см или 90 см x 120 см или 90 см x 130 см или 90 см x 150 см или 90 см x 160 см или 90 см x 180 см или 90 см x 200 см или 90 см x 210 см или 90 см x 250 см или 100 см x 100 см или 100 см x 140 см или 100 см x 210 см или 100 см x 240 см или 120 см x 120 см или 120 см x 150 см или 120 см x 180 см или 140 см x 200 см или 140 см x 210 см или 150 см x 150 см или 150 см x 180 см или 150 см x 200 см или 150 см x 210 см или 150 см x 240 см или 150 см x 260 см или 150 см x 280 см или 150 см x 300 см или 160 см x 210 см или 170 см x 180 см или 180 см x 200 см или 180 см x 220 см или 180 см x 240 см или 180 см x 260 см или 180 см x 280 см или 180 см x 300 см или 180 см x 360 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыни с отверстием, адгезивным краем и карманом: 180 см x 200 см или 180 см x 245 см или 200 см x 275 см или 240 см x 260 см или 240 см x 290 см или 200/250 см x 250 см или 200/240 см x 260 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на инструментальный стол: 190 см x 150 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на столик Майо: 145 см x 80 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.

Набор №9:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: из нетканого материала matovlies: в готовом (сложенном) виде: 4, 8 сложений: 10 см x 20 см или 10 см x 40 см или 20 см x 40 см или 30 см x 40 см или 40 см x 40 см или 40 см x 65 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – не более 100 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А), Tupfer C (Тупфер Ц), Tupfer B (Тупфер В), Tupfer D (Тупфер Д): 9,5 см x 9,5 см или 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см или 18 см x 20 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – не более 100 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Seton (Сетон): 4-слойные или 8-слойные: 2 см x 1 м или 5 см x 1 м или 7,5 см x 1 м или 10 см x 1 м или 1 см x 2 м или 2 см x 2 м или 5 см x 2 м или 7,5 см x 2 м или 10 см x 2 м или 10 см x 5 м, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – не более 20 шт.;

Контейнер прямоугольный: 125 мл или 500 мл или 750 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – не более 4 шт. **(при необходимости);**

Инструменты хирургические однолезвийные CERTUS, с принадлежностями: Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из углеродистой стали или Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из нержавеющей стали: №10 или №11 или №15, производитель «Хуайинь Медикал Инструменте Ко., Лтд.», КНР, РУ №РЗН 2017/5689, или Инструмент режущий с приспособлениями: скальпель: №11 или №23, производитель «Риббел Интернешенел Лтд.», Индия, РУ №ФСЗ 2008/02137 – не более 2 шт. **(при необходимости);**

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыни с отверстием, адгезивным краем и карманом: 180 см x 200 см или 180 см x 245 см или 200 см x 275 см или 240 см x 260 см или 240 см x 290 см или 200/250 см x 250 см или 200/240 см x 260 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на инструментальный стол: 190 см x 150 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на столик Майо: 145 см x 80 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.

Набор №10:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложений: 5 см

х 5 см или 7,5 см х 7,5 см или 10 см х 10 см или 10 см х 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – не более 100 шт.;

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: из нетканого материала matovlies: в готовом (сложенном) виде: 4, 8 сложений: 10 см х 20 см или 10 см х 40 см или 20 см х 40 см или 30 см х 40 см или 40 см х 40 см или 40 см х 65 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – не более 100 шт.;

Комбинированные сорбционные повязки высокой впитываемости ABSORBA под товарным знаком matopat стерильные и нестерильные: салфетки впитывающие: 10 см х 15 см или 10 см х 20 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/12545 – не более 20 шт.;

Инструменты медицинские: зажим: 150 мм или 160 мм или 200 мм, производитель «Эджайл Индастриз», Пакистан, РУ №РЗН 2016/4524 – не более 4 шт. **(при необходимости);**

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыни с отверстием, адгезивным краем и карманом: 180 см х 200 см или 180 см х 245 см или 200 см х 275 см или 240 см х 260 см или 240 см х 290 см или 200/250 см х 250 см или 200/240 см х 260 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на инструментальный стол: 190 см х 150 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на столик Майо: 145 см х 80 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.

Набор №11:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложений: 5 см х 5 см или 7,5 см х 7,5 см или 10 см х 10 см или 10 см х 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – не более 100 шт.;

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: из нетканого материала matovlies: в готовом (сложенном) виде: 4, 8 сложений: 10 см х 20 см или 10 см х 40 см или 20 см х 40 см или 30 см х 40 см или 40 см х 40 см или 40 см х 65 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – не более 100 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer AR (Тупфер АР), Tupfer CR (Тупфер ЦР), Tupfer BR (Тупфер ВР), Tupfer DR (Тупфер ДР): 9,5 см х 9,5 см или 12 см х 12 см или 15 см х 15 см или 18 см х 18 см или 18 см х 20 см или 20 см х 20 см или 30 см х 30 см или 50 см х 50 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – не более 100 шт.;

Комбинированные сорбционные повязки высокой впитываемости ABSORBA под товарным знаком matopat стерильные и нестерильные: салфетки впитывающие: 10 см х 15 см или 10 см х 20 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/12545 – не более 20 шт.;

Одежда для медицинского персонала марки «matopat» одноразовая «Matodress» нестерильная из нетканого, ламинированного нетканого, хлопкоподобного нетканого

материала, полиэтилена: халат: М или L или XL или XXL, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01376 – не более 6 шт. **(при необходимости);**

Контейнер прямоугольный: 125 мл или 500 мл или 750 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – не более 4 шт. **(при необходимости);**

Инструменты хирургические однолезвийные CERTUS, с принадлежностями: Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из углеродистой стали или Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из нержавеющей стали: №10 или №11 или №15, производитель «Хуайинь Медикал Инструменте Ко., Лтд.», КНР, РУ №РЗН 2017/5689, или Инструмент режущий с приспособлениями: скальпель: №11 или №23, производитель «Риббел Интернешенел Лтд.», Индия, РУ №ФСЗ 2008/02137 – не более 2 шт. **(при необходимости);**

Инструменты медицинские: пинцет, производитель «Эджайл Индастриз», Пакистан, РУ №РЗН 2016/4524, или Инструменты медицинские хирургические: инструменты поверхностного воздействия, зажимные, вспомогательные: пинцет, производитель «Сурджикон ЛТД», Пакистан, РУ №РЗН 2015/3121, или Медицинские изделия и инструменты для хирургических вмешательств Matoset под товарным знаком «matopat» стерильные, в наборах и отдельных упаковках: пинцет, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2011/09976: 145 мм или 160 мм – не более 2 шт. **(при необходимости);**

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыни с отверстием, адгезивным краем и карманом: 180 см x 200 см или 180 см x 245 см или 200 см x 275 см или 240 см x 260 см или 240 см x 290 см или 200/250 см x 250 см или 200/240 см x 260 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на инструментальный стол: 190 см x 150 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на столик Майо: 145 см x 80 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.

Набор №12:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: из нетканого материала matovlies: в готовом (сложенном) виде: 4, 8 сложений: 10 см x 20 см или 10 см x 40 см или 20 см x 40 см или 30 см x 40 см или 40 см x 40 см или 40 см x 65 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – не более 100 шт.;

Контейнер круглый: 250 мл или 500 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – не более 4 шт. **(при необходимости);**

Медицинские изделия и инструменты для хирургических вмешательств Matoset под товарным знаком «matopat» стерильные, в наборах и отдельных упаковках: клещи: 190 мм или 250 мм, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2011/09976 – не более 4 шт. **(при необходимости);**

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыни с отверстием, адгезивным краем и карманом: 180 см x 200 см или 180 см x 245 см или 200 см x 275 см или 240 см x 260 см или 240 см x 290 см или 200/250 см x

250 см или 200/240 см x 260 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на инструментальный стол: 190 см x 150 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на столик Майо: 145 см x 80 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – не более 6 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 или Односторонняя чувствительная к давлению клейкая лента с тканевой основой и лайнером из силиконизированной бумаги DUPLOMED SD 6144 D: 3 см x 51 см или 9 см x 51 см, производитель «Lohmann GmbH & Co.KG» (Германия) – не более 20 шт. **(при необходимости).**

Набор №13:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: из нетканого материала matovlies: в готовом (сложенном) виде: 4, 8 сложений: 10 см x 20 см или 10 см x 40 см или 20 см x 40 см или 30 см x 40 см или 40 см x 40 см или 40 см x 65 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – не более 100 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: чехол: 37 см x 120 см или 40 см x 130 см или 45 см x 80 см или 80 см x 120 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840, или чехол на конечность: 25 см x 80 см или 33 см x 55 см или 35 см x 60 см или 37 см x 75 см или 37 см x 120 см или 40 см x 130 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 45 см x 120 см или 60 см x 120 см или 75 см x 120 см или 80 см x 120 см, производитель ООО «Белла», ТУ 32.50.13-084-11736425-2020 – не более 2 шт. **(при необходимости);**

Контейнер прямоугольный: 125 мл или 500 мл или 750 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – не более 4 шт. **(при необходимости);**

Медицинские изделия и инструменты для хирургических вмешательств Matoset под товарным знаком «matopat» стерильные, в наборах и отдельных упаковках: клещи: 190 мм или 250 мм, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2011/09976 – не более 4 шт. **(при необходимости);**

Инструменты хирургические однолезвийные CERTUS, с принадлежностями: Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из углеродистой стали или Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие

из нержавеющей стали: №10 или №11 или №15, производитель «Хуайинь Медикал Инструменте Ко., Лтд.», КНР, РУ №РЗН 2017/5689, или Инструмент режущий с приспособлениями: скальпель: №11 или №23, производитель «Риббел Интернешенел Лтд.», Индия, РУ №ФСЗ 2008/02137 – не более 2 шт. **(при необходимости);**

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыни с отверстием и адгезивным краем: 90 см x 130 см или 180 см x 200 см или 180 см x 245 см или 180 см x 265 см или 200/240 см x 260 см или 250 см x 250 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 4 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – не более 6 шт.

Набор №14:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: из нетканого материала matovlies: в готовом (сложенном) виде: 4, 8 сложений: 10 см x 20 см или 10 см x 40 см или 20 см x 40 см или 30 см x 40 см или 40 см x 40 см или 40 см x 65 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – не более 100 шт.;

Пеленки впитывающие «Seni» по ТУ 17.22.12-005-11736425-2015: Seni Soft или Seni Soft Normal: 40 см x 60 см или 60 см x 60 см или 90 см x 60 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6220 – не более 5 шт.;

Контейнер круглый: 250 мл или 500 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – не более 4 шт. **(при необходимости);**

Медицинские изделия и инструменты для хирургических вмешательств Matoset под товарным знаком «matopat» стерильные, в наборах и отдельных упаковках: клещи: 190 мм или 250 мм, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2011/09976 – не более 4 шт. **(при необходимости);**

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыни с отверстием, адгезивным краем и карманом: 180 см x 200 см или 180 см x 245 см или 200 см x 275 см или 240 см x 260 см или 240 см x 290 см или 200/250 см x 250 см или 200/240 см x 260 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на инструментальный стол: 190 см x 150 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на столик Майо: 145 см x 80 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.

Набор №15:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: из нетканого материала matovlies: в готовом (сложенном) виде: 4, 8 сложений: 10 см x 20 см или 10 см x 40 см или 20 см x 40 см или 30 см x 40 см или 40 см x 40 см или 40 см x 65 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – не более 100 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Abdoma (Абдома): 2-слойные (75 см x 75 см) или 4-слойные (30 см x 30 см или 30 см x 45 см или 45 см x 45 см или 45 см x 70 см или 75 см x 90 см) или 6-слойные (45 см x 45 см), производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – не более 20 шт.;

Комбинированные сорбционные повязки высокой впитываемости ABSORBA под товарным знаком matopat стерильные и нестерильные: салфетки впитывающие: 10 см x 15 см или 10 см x 20 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/12545 – не более 20 шт.;

Пеленки впитывающие «Seni» по ТУ 17.22.12-005-11736425-2015: Seni Soft или Seni Soft Normal: 40 см x 60 см или 60 см x 60 см или 90 см x 60 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6220 – не более 5 шт.;

Контейнер круглый: 250 мл или 500 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – не более 4 шт. **(при необходимости);**

Инструменты медицинские: зажим: 150 мм или 160 мм или 200 мм, производитель «Эджайл Индастриз», Пакистан, РУ №РЗН 2016/4524 – не более 4 шт. **(при необходимости);**

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыни с отверстием, адгезивным краем и карманом: 180 см x 200 см или 180 см x 245 см или 200 см x 275 см или 240 см x 260 см или 240 см x 290 см или 200/250 см x 250 см или 200/240 см x 260 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на инструментальный стол: 190 см x 150 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на столик Майо: 145 см x 80 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.

Набор №16:

Салфетки марлевые медицинские абсорбирующие нестерильные Matocomp с рентгеноконтрастной нитью под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-050-11736425-2017 в готовом (сложенном) виде: в 8, 12 или 16 сложений, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/7880, или Салфетки нестерильные товарного знака matopat: марлевые с рентгеноконтрастной нитью Matocomp: в готовом (сложенном) виде: в 8, 12 или 16 сложений, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2009/04282: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 15 см или 10 см x 20 см – не более 100 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Abdoma (Абдома): 2-слойные (75 см x 75 см) или 4-слойные (30 см x 30 см или 30 см x 45 см или 45 см x 45 см или 45 см x 70 см или 75 см x 90 см) или 6-слойные (45 см x 45 см), производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – не более 20 шт.;

Комбинированные сорбционные повязки высокой впитываемости ABSORBA под товарным знаком matopat стерильные и нестерильные: салфетки впитывающие: 10 см x 15 см или 10 см x 20 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/12545 – не более 20 шт.;

Пеленки впитывающие «Seni» по ТУ 17.22.12-005-11736425-2015: Seni Soft или Seni Soft Normal: 40 см x 60 см или 60 см x 60 см или 90 см x 60 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6220 – не более 5 шт.;

Инструменты хирургические однолезвийные CERTUS, с принадлежностями: Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из углеродистой стали или Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из нержавеющей стали: №10 или №11 или №15, производитель «Хуайинь Медикал Инструменте Ко., Лтд.», КНР, РУ №РЗН 2017/5689, или Инструмент режущий с приспособлениями: скальпель: №11 или №23, производитель «Риббел Интернешенел Лтд.», Индия, РУ №ФСЗ 2008/02137 – не более 2 шт. **(при необходимости);**

Инструменты медицинские: пинцет, производитель «Эджайл Индастриз», Пакистан, РУ №РЗН 2016/4524, или Инструменты медицинские хирургические: инструменты поверхностного воздействия, зажимные, вспомогательные: пинцет, производитель «Сурджикон ЛТД», Пакистан, РУ №РЗН 2015/3121, или Медицинские изделия и инструменты для хирургических вмешательств Matoset под товарным знаком «matopat» стерильные, в наборах и отдельных упаковках: пинцет, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2011/09976: 145 мм или 160 мм – не более 2 шт. **(при необходимости);**

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыни с отверстием, адгезивным краем и карманом: 180 см x 200 см или 180 см x 245 см или 200 см x 275 см или 240 см x 260 см или 240 см x 290 см или 200/250 см x 250 см или 200/240 см x 260 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на инструментальный стол: 190 см x 150 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на столик Майо: 145 см x 80 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.

Набор №17:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: из нетканого материала matovlies: в готовом (сложенном) виде: 4, 8 сложений: 10 см x 20 см или 10 см x 40 см или 20 см x 40 см или 30 см x 40 см или 40 см x 40 см или 40 см x 65 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – не более 100 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Abdoma (Абдома): 2-слойные (75 см x 75 см) или 4-слойные (30 см x 30 см или 30 см x 45 см или 45 см x 45 см или 45 см x 70 см или 75 см x 90 см) или 6-слойные (45 см x 45 см), производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – не более 20 шт.;

Одежда для медицинского персонала марки «matopat» одноразовая «Matodress» нестерильная из нетканого, ламинированного нетканого, хлопкоподобного нетканого материала, полиэтилена: халат: М или L или XL или XXL, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01376 – не более 6 шт. **(при необходимости);**

Перчатки хирургические резиновые по ГОСТ 3-88: 4,0 или 5,0 или 6,0 или 7,0 или 8,0 или 9,0, производитель АО «АЗРИ», Россия, РУ № ФСР 2010/07673 – не более 10 пар;

Инструменты хирургические однолезвийные CERTUS, с принадлежностями: Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из углеродистой стали или Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из нержавеющей стали: №10 или №11 или №15, производитель «Хуайинь Медикал Инструменте Ко., Лтд.», КНР, РУ №РЗН 2017/5689, или Инструмент режущий с приспособлениями: скальпель: №11 или №23, производитель «Риббел Интернешенел Лтд.», Индия, РУ №ФСЗ 2008/02137 – не более 2 шт. **(при необходимости);**

Инструменты медицинские: пинцет, производитель «Эджайл Индастриз», Пакистан, РУ №РЗН 2016/4524, или Инструменты медицинские хирургические: инструменты поверхностного воздействия, зажимные, вспомогательные: пинцет, производитель «Сурджикон ЛТД», Пакистан, РУ №РЗН 2015/3121, или Медицинские изделия и инструменты для хирургических вмешательств Matoset под товарным знаком «matopat» стерильные, в наборах и отдельных упаковках: пинцет, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2011/09976: 145 мм или 160 мм – не более 2 шт. **(при необходимости);**

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыни с отверстием, адгезивным краем и карманом: 180 см x 200 см или 180 см x 245 см или 200 см x 275 см или 240 см x 260 см или 240 см x 290 см или 200/250 см x 250 см или 200/240 см x 260 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на инструментальный стол: 190 см x 150 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на столик Майо: 145 см x 80 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.

Набор №18:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: из нетканого материала matovlies: в готовом (сложенном) виде: 4, 8 сложений: 10 см x 20 см или 10 см x 40 см или 20 см x 40 см или 30 см x 40 см или 40 см x 40 см или 40 см x 65 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – не более 100 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer AR (Тупфер АР), Tupfer CR (Тупфер ЦР), Tupfer BR (Тупфер ВР), Tupfer DR (Тупфер ДР): 9,5 см x 9,5 см или 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см или 18 см x 20 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – не более 100 шт.;

Комбинированные сорбционные повязки высокой впитываемости ABSORBA под товарным знаком matopat стерильные и нестерильные: салфетки впитывающие: 10 см x 15 см или 10 см x 20 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/12545 – не более 20 шт.;

Одежда для медицинского персонала марки «matopat» одноразовая «Matodress» нестерильная из нетканого, ламинированного нетканого, хлопкоподобного нетканого материала, полиэтилена: халат: М или L или XL или XXL, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01376 – не более 6 шт. **(при необходимости);**

Контейнер прямоугольный: 125 мл или 500 мл или 750 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – не более 4 шт. **(при необходимости);**

Перчатки хирургические резиновые по ГОСТ 3-88: 4,0 или 5,0 или 6,0 или 7,0 или 8,0 или 9,0, производитель АО «АЗРИ», Россия, РУ №ФСР 2010/07673 – не более 10 пар;

Медицинские изделия и инструменты для хирургических вмешательств Matoset под товарным знаком «matopat» стерильные, в наборах и отдельных упаковках: клещи: 190 мм или 250 мм, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2011/09976 – не более 4 шт. **(при необходимости);**

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыни с отверстием, адгезивным краем и карманом: 180 см x 200 см или 180 см x 245 см или 200 см x 275 см или 240 см x 260 см или 240 см x 290 см или 200/250 см x 250 см или 200/240 см x 260 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на столик Майо: 145 см x 80 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.

Набор №19:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложений: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – не более 100 шт.;

Салфетки марлевые медицинские абсорбирующие нестерильные Matocomp с рентгеноконтрастной нитью под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-050-11736425-2017 в готовом (сложенном) виде: в 8, 12 или 16 сложений, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/7880, или Салфетки нестерильные товарного знака matopat: марлевые с рентгеноконтрастной нитью Matocomp: в готовом (сложенном) виде: в 8, 12 или 16 сложений, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2009/04282: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 15 см или 10 см x 20 см – не более 100 шт.;

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: из нетканого материала matovlies: в готовом (сложенном) виде: 4, 8 сложений: 10 см x 20 см или 10 см x 40 см или 20 см x 40 см или 30 см x 40 см или 40 см x 40 см или 40 см x 65 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – не более 100 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А), Tupfer C (Тупфер Ц), Tupfer B (Тупфер В), Tupfer D (Тупфер Д): 9,5 см x 9,5 см или 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см или 18 см x 20 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – не более 100 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer AR (Тупфер АР), Tupfer CR (Тупфер ЦР), Tupfer BR (Тупфер ВР), Tupfer DR (Тупфер ДР): 9,5 см x 9,5 см или 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см или 18 см x 20 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – не более 100 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Abdoma (Абдома): 2-слойные (75 см x 75 см) или 4-слойные (30 см x 30 см

или 30 см x 45 см или 45 см x 45 см или 45 см x 70 см или 75 см x 90 см) или 6-слойные (45 см x 45 см), производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – не более 20 шт.; Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Seton (Сетон): 4-слойные или 8-слойные: 2 см x 1 м или 5 см x 1 м или 7,5 см x 1 м или 10 см x 1 м или 1 см x 2 м или 2 см x 2 м или 5 см x 2 м или 7,5 см x 2 м или 10 см x 2 м или 10 см x 5 м, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – не более 20 шт.;

Комбинированные сорбционные повязки высокой впитываемости ABSORBA под товарным знаком matopat стерильные и нестерильные: салфетки впитывающие: 10 см x 15 см или 10 см x 20 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/12545 – не более 20 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: чехол: 37 см x 120 см или 40 см x 130 см или 45 см x 80 см или 80 см x 120 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840, или чехол на конечность: 25 см x 80 см или 33 см x 55 см или 35 см x 60 см или 37 см x 75 см или 37 см x 120 см или 40 см x 130 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 45 см x 120 см или 60 см x 120 см или 75 см x 120 см или 80 см x 120 см, производитель ООО «Белла», ТУ 32.50.13-084-11736425-2020 – не более 2 шт.;

Пеленки впитывающие «Seni» по ТУ 17.22.12-005-11736425-2015: Seni Soft или Seni Soft Normal: 40 см x 60 см или 60 см x 60 см или 90 см x 60 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6220 – не более 5 шт.;

Одежда для медицинского персонала марки «matopat» одноразовая «Matodress» нестерильная из нетканого, ламинированного нетканого, хлопкоподобного нетканого материала, полиэтилена: халат: М или L или XL или XXL, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01376 – не более 6 шт.;

Контейнер прямоугольный: 125 мл или 500 мл или 750 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – не более 4 шт.;

Контейнер круглый: 250 мл или 500 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – не более 4 шт.;

Перчатки хирургические резиновые по ГОСТ 3-88: 4,0 или 5,0 или 6,0 или 7,0 или 8,0 или 9,0, производитель АО «АЗРИ», Россия, РУ №ФСР 2010/07673 – не более 10 пар;

Медицинские изделия и инструменты для хирургических вмешательств Matoset под товарным знаком «matopat» стерильные, в наборах и отдельных упаковках: клещи: 190 мм или 250 мм, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2011/09976 – не более 4 шт.;

Инструменты медицинские: зажим: 150 мм или 160 мм или 200 мм, производитель «Эджайл Индастриз», Пакистан, РУ №РЗН 2016/4524 – не более 4 шт.;

Инструменты хирургические однолезвийные CERTUS, с принадлежностями: Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из углеродистой стали или Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из нержавеющей стали: №10 или №11 или №15, производитель «Хуайинь Медикал Инструменте Ко., Лтд.», КНР, РУ №РЗН 2017/5689, или Инструмент режущий с приспособлениями: скальпель: №11 или №23, производитель «Риббел Интернешенел Лтд.», Индия, РУ №ФСЗ 2008/02137 – не более 2 шт.;

Инструменты медицинские: пинцет, производитель «Эджайл Индастриз», Пакистан, РУ №РЗН 2016/4524, или Инструменты медицинские хирургические: инструменты поверхностного воздействия, зажимные, вспомогательные: пинцет, производитель «Сурджикон ЛТД», Пакистан, РУ №РЗН 2015/3121, или Медицинские изделия и инструменты для хирургических вмешательств Matoset под товарным знаком «matopat»

стерильные, в наборах и отдельных упаковках: пинцет, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2011/09976: 145 мм или 160 мм – не более 2 шт.;

Покрывание на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: простыни медицинские: 70 см x 100 см или 70 см x 140 см или 70 см x 200 см или 75 см x 150 см или 75 см x 180 см или 75 см x 240 см или 80 см x 110 см или 80 см x 130 см или 80 см x 140 см или 80 см x 200 см или 90 см x 110 см или 90 см x 120 см или 90 см x 130 см или 90 см x 150 см или 90 см x 160 см или 90 см x 180 см или 90 см x 200 см или 90 см x 210 см или 90 см x 250 см или 100 см x 100 см или 100 см x 140 см или 100 см x 210 см или 100 см x 240 см или 120 см x 120 см или 120 см x 150 см или 120 см x 180 см или 140 см x 200 см или 140 см x 210 см или 150 см x 150 см или 150 см x 180 см или 150 см x 200 см или 150 см x 210 см или 150 см x 240 см или 150 см x 260 см или 150 см x 280 см или 150 см x 300 см или 160 см x 210 см или 170 см x 180 см или 180 см x 200 см или 180 см x 220 см или 180 см x 240 см или 180 см x 260 см или 180 см x 280 см или 180 см x 300 см или 180 см x 360 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыни с отверстием и адгезивным краем: 90 см x 130 см или 180 см x 200 см или 180 см x 245 см или 180 см x 265 см или 200/240 см x 260 см или 250 см x 250 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыни с отверстием, адгезивным краем и карманом: 180 см x 200 см или 180 см x 245 см или 200 см x 275 см или 240 см x 260 см или 240 см x 290 см или 200/250 см x 250 см или 200/240 см x 260 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на инструментальный стол: 190 см x 150 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на столик Майо: 145 см x 80 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Покрывание на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – не более 6 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 или Односторонняя чувствительная к давлению клейкая лента с тканевой основой и лайнером из силиконизированной бумаги DUPLOMED SD 6144 D: 3 см x 51 см или 9 см x 51 см, производитель «Lohmann GmbH & Co.KG» (Германия) – не более 20 шт.;

Пинцеты полимерные одноразовые стерильные по ТУ 9398-176-44942795-2005: пинцет окончатый полимерный одноразовый стерильный: 125 мм, производитель ООО «Полимерные изделия», Россия, РУ №ФСР 2010/07936 – не более 2 шт.



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

55 Листов листа(ов)

Заместитель генерального директора
по организационно- правовым
вопросам ООО «Белла»

Васильева Е. А

