



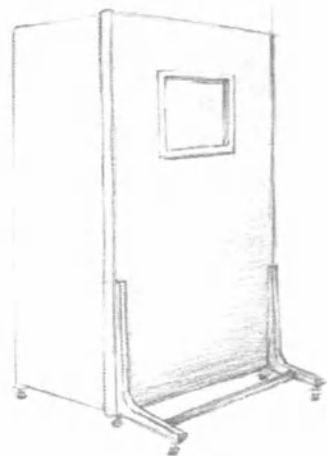


Ширма двойная

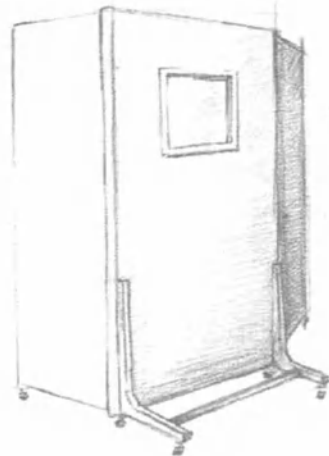


Ширма тройная



Ширма врача

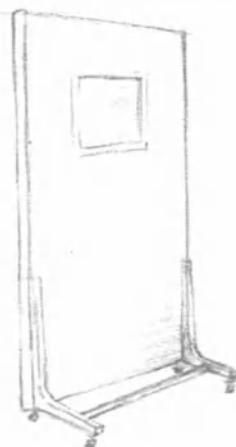

Ширма одинарная

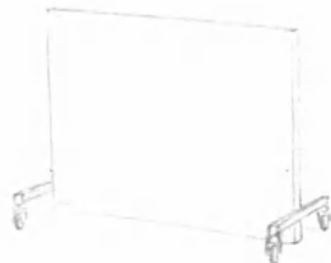

Ширма пациента



ШИРМА РЕНТГЕНОЗАЩИНАЯ РЕЗИНОСВИНЦОВАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ МАЛАЯ

ПАСПОРТ КАГД 38641.010.001.00 ПС

ООО «РЕНТГЕН-КОМПЛЕКТ»

ШИРМА РЕНТГЕНОЗАЩИТНАЯ РЕЗИНОСВИНЦОВАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ МАЛАЯ ШРЗпм-«Р-К»

ПАСПОРТ КАГД 38641.010.001.00 ПС

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. **Наименование:** Ширма рентгенозащитная резиносвинцовая передвижная малая ШРЗпм-«Р-К».

Изготовитель: ООО «Рентген-Комплект». № 380

дата изготовления сентябрь, 2011 г.

1.2. **Назначение:** Ширма защитная малая предназначена для защиты медицинского персонала или пациентов в положении «сидя».

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Свинцовый эквивалент рентгенозащитного экрана ширмы, не менее: при $U = 100 \text{ кВ}$ 1 мм Рb

2.2. Масса изделия, кг 28

2.3. Габаритные размеры ширмы, мм 800 x 900 x 98

2.4. Наружные и внутренние поверхности изделия устойчивы к дезинфекции 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства или 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16-89.

2.5. Средний срок службы 5 лет.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Эксплуатация изделия должна проводиться в соответствии с указаниями настоящего паспорта и нормами СанПиН 2.6.1.1192-03.

3.2. Не допускается подвергать изделие воздействиям агрессивных сред, которые могут вызвать разрушение материала.

3.3. Климатические условия эксплуатации от $+10^\circ\text{C}$ до $+35^\circ\text{C}$.

3.4. Утилизация изделий, отслуживших свой срок на завершающей стадии, не может быть возложена на завод-изготовитель.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование изделия	Обозначение документа
1. Ширма рентгенозащитная резиносвинцовая передвижная малая ШРЗпм-«Р-К»	КАГД 38641.010.001.00
2. Паспорт	КАГД 38641.010.001.00 ПС

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Ширма рентгенозащитная резиносвинцовая передвижная малая ШРЗпм-«Р-К» № _____ соответствует техническим условиям ТУ 9452-010-46782692-2001 и признана годной к эксплуатации.


6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 6.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий в течение всего срока службы при соблюдении потребителем условий транспортирования, эксплуатации и хранения.
- 6.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев.
- 6.3. Гарантийный срок хранения 6 месяцев.
- 6.4. Предприятие-изготовитель предоставляет гарантию на изделие или его составные части сроком на 1 год со дня продажи.
- 6.5. Периодическая проверка защитных свойств ширм производится не реже 1 раза в 3 года службой радиационной безопасности или организацией, аккредитованной в установленном порядке и имеющей лицензию на проведение этих работ.


Дата продажи _____



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes.

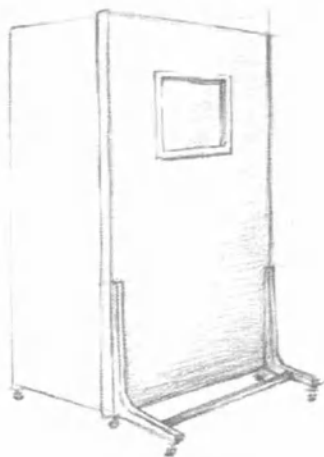


Ширма двойная

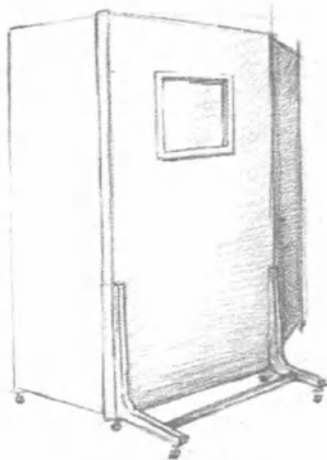


Ширма тройная



Ширма врача


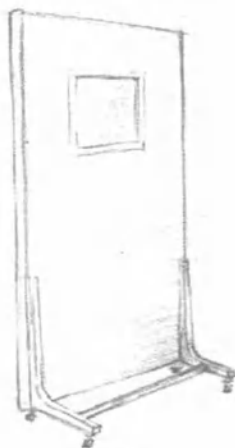


Ширма одинарная

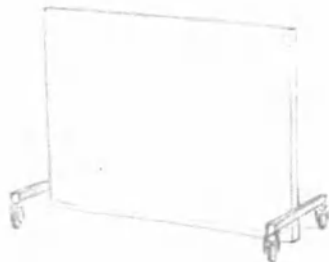

Ширма пациента

ООО "РЕНТГЕН-КОМПЛЕКТ"

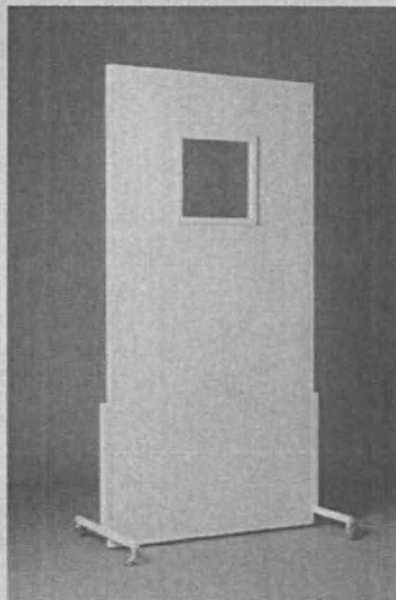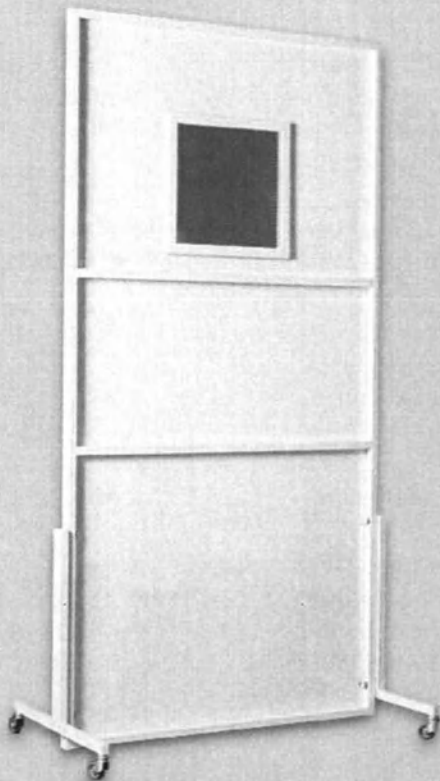

ШИРМА РЕНТГЕНОЗАЩИТНАЯ РЕЗИНОСВИНЦОВАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ БОЛЬШАЯ

ПАСПОРТ

ООО «РЕНТГЕН-КОМПЛЕКТ»

ШИРМА РЕНТГЕНОЗАЩИТНАЯ РЕЗИНОСВИНЦОВАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ БОЛЬШАЯ ФРОНТАЛЬНАЯ ШРЗпб-ф-«Р-К»

ПАСПОРТ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1. **Наименование:** Ширма рентгенозащитная резиносвинцовая передвижная большая фронтальная ШРЗпб-ф-«Р-К».
Изготовитель: ООО «Рентген-Комплект». № 816
дата изготовления сентябрь, 2011 г.
- 1.2. **Назначение:** Ширма защитная большая предназначена для защиты медицинского персонала или пациентов в положении «стоя».

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1. Свинцовый эквивалент ширмы 1 мм Pb
стекла 2,5 мм Pb
- 2.2. Масса изделия, кг 50
- 2.3. Размер центральной панели, мм 2000 x 1000 x 40
размер окна, мм 356 x 356
- 2.4. Наружные и внутренние поверхности изделия устойчивы к дезинфекции 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства или 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16-89.
- 2.5. Средний срок службы 5 лет.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 3.1. Эксплуатация изделия должна проводиться в соответствии с указаниями настоящего паспорта и нормами СанПиН 2.6.1.1192-03.
- 3.2. Не допускается подвергать изделие воздействиям агрессивных сред, которые могут вызвать разрушение материала.
- 3.3. Климатические условия эксплуатации от + 10 °С до + 35 °С.
- 3.4. Утилизация изделий, отслуживших свой срок на завершающей стадии, не может быть возложена на завод-изготовитель.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование изделия	Обозначение документа
1. Ширма рентгенозащитная резиносвинцовая передвижная большая ШРЗпб-ф-«Р-К»	
2. Паспорт	

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Ширма рентгенозащитная резиносвинцовая передвижная бо́льшая ШРЗпб-ф-«Р-К» № _____ соответствует техническим условиям ТУ 9452-010-46782692-2001 и признана годной к эксплуатации.


6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 6.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий в течение всего срока службы при соблюдении потребителем условий транспортирования, эксплуатации и хранения.
- 6.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев.
- 6.3. Гарантийный срок хранения 6 месяцев.
- 6.4. Предприятие-изготовитель предоставляет гарантию на изделие или его составные части сроком на 1 год со дня продажи.
- 6.5. Периодическая проверка защитных свойств ширм производится не реже 1 раза в 3 года службой радиационной безопасности или организацией, аккредитованной в установленном порядке и имеющей лицензию на проведение этих работ.


Дата продажи _____



A handwritten signature in dark ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes.

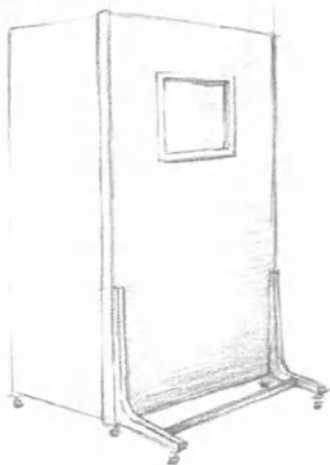


Ширма двойная

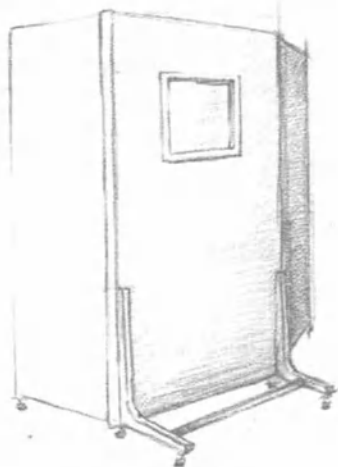


Ширма тройная



Ширма врача

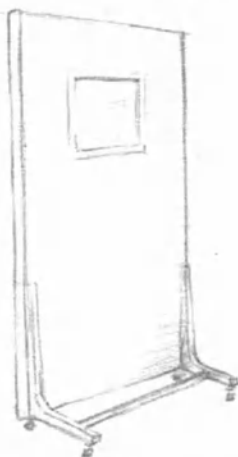


Ширма одинарная

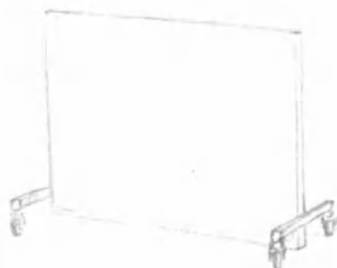

Ширма пациента

ООО "РЕНТГЕН-КОМПЛЕКТ"

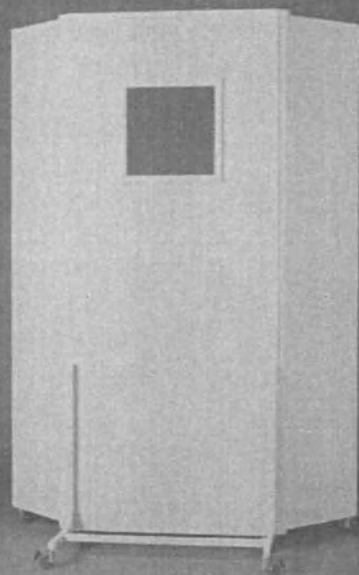

**ШИРМА РЕНТГЕНОЗАЩИТНАЯ
РЕЗИНОСВИНЦОВАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ БОЛЬШАЯ**

ПАСПОРТ

ШИРМА РЕНТГЕНОЗАЩИТНАЯ РЕЗИНОСВИНЦОВАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ БОЛЬШАЯ ШРЗпб-ПЛ-«Р-К»

ПАСПОРТ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. **Наименование:** Ширма рентгенозащитная резиносвинцовая передвижная большая ШРЗпб-ПЛ-«Р-К».

Изготовитель: ООО «Рентген-Комплект». № 282
дата изготовления март, 2018 г.

1.2. **Назначение:** Ширма защитная большая предназначена для защиты медицинского персонала или пациентов в положении «стоя».

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1. Свинцовый эквивалент ширмы 1 мм Pb
стекла 2,5 мм Pb
- 2.2. Масса изделия, кг 120
- 2.3. Размер центральной панели, мм 2000 x 800 x 40
Размер боковых панелей, мм 2000 x 500 x 40
Размер окна, мм 356 x 356
- 2.4. Наружные и внутренние поверхности изделия устойчивы к дезинфекции 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства или 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16-89.
- 2.5. Средний срок службы 5 лет.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 3.1. Эксплуатация изделия должна проводиться в соответствии с указаниями настоящего паспорта и нормами СанПиН 2.6.1.1192-03.
- 3.2. Не допускается подвергать изделие воздействиям агрессивных сред, которые могут вызвать разрушение материала.
- 3.3. Климатические условия эксплуатации от + 10 °С до + 35 °С.
- 3.4. Утилизация изделий, отслуживших свой срок на завершающей стадии, не может быть возложена на завод-изготовитель.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование изделия	Обозначение документа
1. Ширма рентгенозащитная резиносвинцовая передвижная большая ШРЗпб-«Р-К»	
2. Паспорт	

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ


Ширма рентгенозащитная резиносвинцовая передвижная бо́льшая ШРЗпб-«Р-К» № _____ соответствует техническим условиям ТУ 9452-010-46782692-2001 и признана годной к эксплуатации.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


- 6.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий в течение всего срока службы при соблюдении потребителем условий транспортирования, эксплуатации и хранения.
- 6.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев.
- 6.3. Гарантийный срок хранения 6 месяцев.
- 6.4. Предприятие-изготовитель предоставляет гарантию на изделие или его составные части сроком на 1 год со дня продажи.
- 6.5. Периодическая проверка защитных свойств ширм производится не реже 1 раза в 3 года службой радиационной безопасности или организацией, аккредитованной в установленном порядке и имеющей лицензию на проведение этих работ.

Дата продажи _____



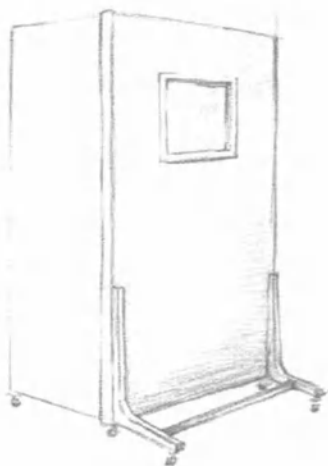


Ширма двойная

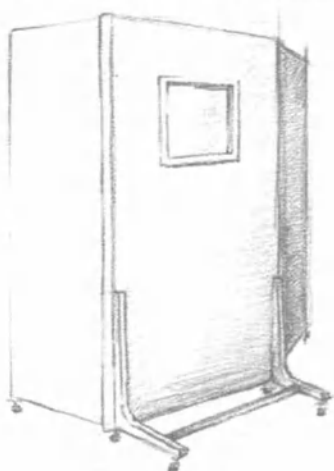


Ширма тройная



Ширма врача

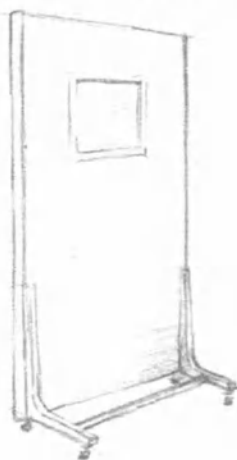


Ширма одинарная

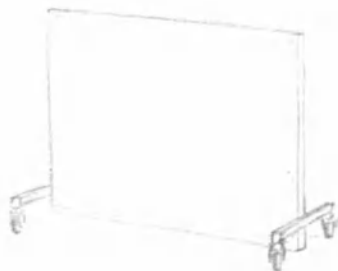

Ширма пациента

ООО "РЕНТГЕН-КОМПЛЕКТ"

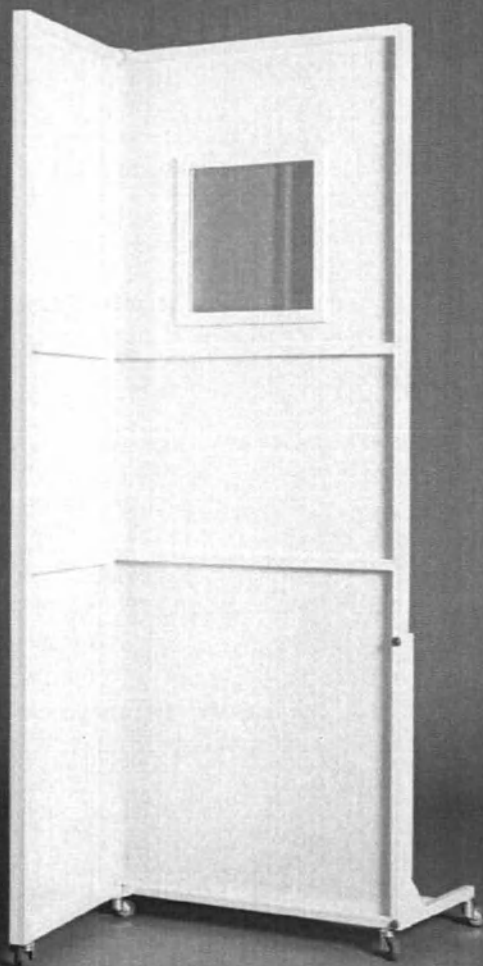

ШИРМА РЕНТГЕНОЗАЩИТНАЯ РЕЗИНОСВИНЦОВАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ БОЛЬШАЯ

ПАСПОРТ

ШИРМА РЕНТГЕНОЗАЩИТНАЯ РЕЗИНОСВИНЦОВАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ БОЛЬШАЯ ШРЗпб-Л-«Р-К»

ПАСПОРТ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. **Наименование:** Ширма рентгенозащитная резиносвинцовая передвижная большая ШРЗпб-Л-«Р-К».

Изготовитель: ООО «Рентген-Комплект». № 281
дата изготовления инвари 28.11.17.

1.2. **Назначение:** Ширма защитная большая предназначена для защиты медицинского персонала или пациентов в положении «стоя».

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | | |
|------|---|-----------------|
| 2.1. | Свинцовый эквивалент ширмы | 1 мм Pb |
| | стекла | 2,5 мм Pb |
| 2.2. | Масса изделия, кг | 98 |
| 2.3. | Размер центральной панели, мм | 2000 x 800 x 40 |
| | Размер боковой панели, мм | 2000 x 500 x 40 |
| | Размер окна, мм | 356 x 356 |
| 2.4. | Наружные и внутренние поверхности изделия устойчивы к дезинфекции 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства или 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16-89. | |
| 2.5. | Средний срок службы 5 лет. | |

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 3.1. Эксплуатация изделия должна проводиться в соответствии с указаниями настоящего паспорта и нормами СанПиН 2.6.1.1192-03.
- 3.2. Не допускается подвергать изделие воздействиям агрессивных сред, которые могут вызвать разрушение материала.
- 3.3. Климатические условия эксплуатации от + 10 °С до + 35 °С.
- 3.4. Утилизация изделий, отслуживших свой срок на завершающей стадии, не может быть возложена на завод-изготовитель.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование изделия	Обозначение документа
1. Ширма рентгенозащитная резиносвинцовая передвижная большая ШРЗпб-«Р-К»	
2. Паспорт	

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ


Ширма рентгенозащитная резиносвинцовая передвижная бо́льшая ШРЗпб-«Р-К» № _____ соответствует техническим условиям ТУ 9452-010-46782692-2001 и признана годной к эксплуатации.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


- 6.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий в течение всего срока службы при соблюдении потребителем условий транспортирования, эксплуатации и хранения.
- 6.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев.
- 6.3. Гарантийный срок хранения 6 месяцев.
- 6.4. Предприятие-изготовитель предоставляет гарантию на изделие или его составные части сроком на 1 год со дня продажи.
- 6.5. Периодическая проверка защитных свойств ширм производится не реже 1 раза в 3 года службой радиационной безопасности или организацией, аккредитованной в установленном порядке и имеющей лицензию на проведение этих работ.

Дата продажи _____



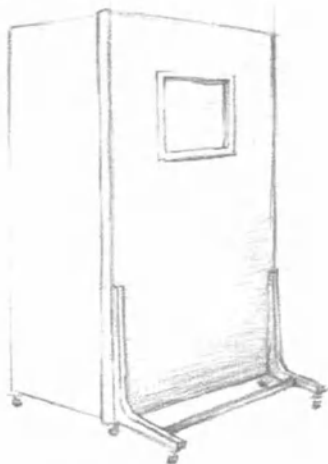


Ширма двойная

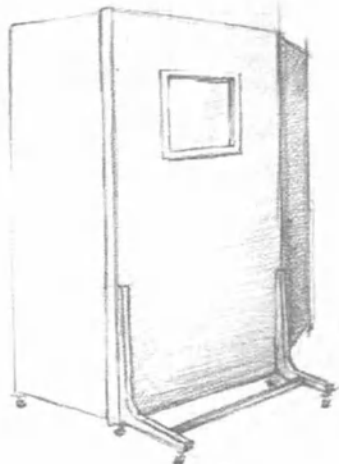


Ширма тройная



Ширма врача

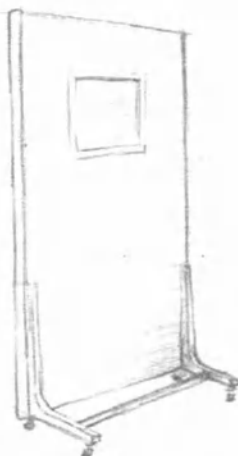


Ширма одинарная

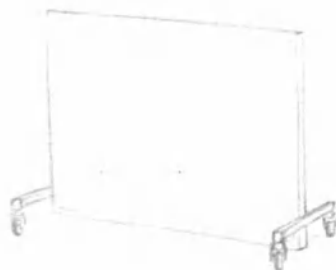

Ширма пациента

ООО "РЕНТГЕН-КОМПЛЕКТ"

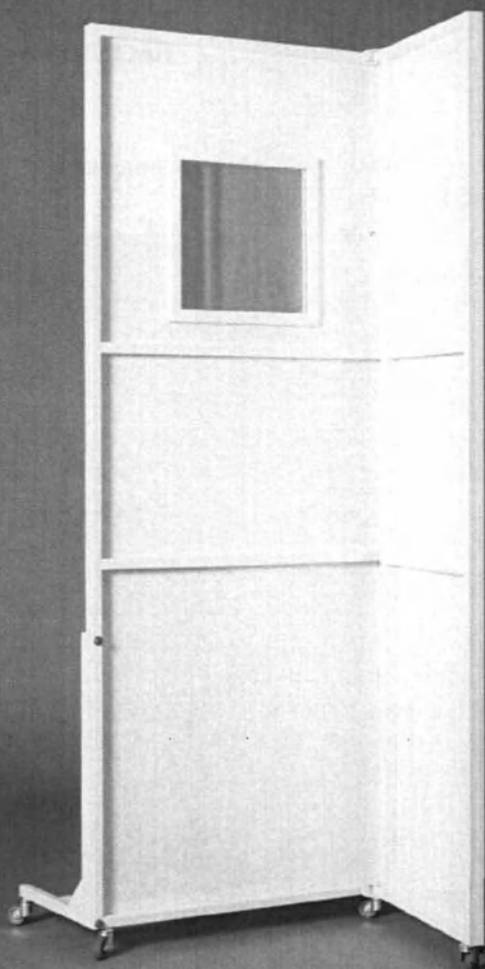

**ШИРМА РЕНТГЕНОЗАЩИТНАЯ
РЕЗИНОСВИНЦОВАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ БОЛЬШАЯ**

ПАСПОРТ

ШИРМА РЕНТГЕНОЗАЩИТНАЯ РЕЗИНОСВИНЦОВАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ БОЛЬШАЯ ШРЗпб-П-«Р-К»

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

наименование изделия

Обозначение документа

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. **Наименование:** Ширма рентгенозащитная передвигная большая ШРЗпб-П-«Р-К».

Изготовитель: ООО «Рентген-Комплект». № _____
дата изготовления январь, 2011 г.

1.2. **Назначение:** Ширма защитная большая предназначена для защиты медицинского персонала или пациентов в положении «стоя».

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | |
|--|-----------------|
| 2.1. Свинцовый эквивалент ширмы | 1 мм Pb |
| стекла | 2,5 мм Pb |
| 2.2. Масса изделия, кг | 98 |
| 2.3. Размер центральной панели, мм | 2000 x 800 x 40 |
| Размер боковой панели, мм | 2000 x 500 x 40 |
| Размер окна, мм | 356 x 356 |
| 2.4. Наружные и внутренние поверхности изделия устойчивы к дезинфекции 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства или 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16-89. | |
| 2.5. Средний срок службы 5 лет. | |

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 3.1. Эксплуатация изделия должна проводиться в соответствии с указаниями настоящего паспорта и нормами СанПиН 2.6.1.1192-03.
- 3.2. Не допускается подвергать изделие воздействиям агрессивных сред, которые могут вызвать разрушение материала.
- 3.3. Климатические условия эксплуатации от + 10 °С до + 35 °С.
- 3.4. Утилизация изделий, отслуживших свой срок на завершающей стадии, не может быть возложена на завод-изготовитель.

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью _____ листов

(_____) ма рентгенозащитная
носвинцовая передвигная
ШРЗпб-«Р-К»

Директор ООО «Рентген-Комплект»

А.Б. Блинов

орт

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Ширма рентгенозащитная резиносвинцовая передвигная бо́льшая ШРЗпб-«Р-К» № _____ соответствует техническим условиям ТУ 9452-010-46782692-2001 и признана годной к эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 6.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий в течение всего срока службы при соблюдении потребителем условий транспортирования, эксплуатации и хранения.
- 6.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев.
- 6.3. Гарантийный срок хранения 6 месяцев.
- 6.4. Предприятие-изготовитель предоставляет гарантию на изделие или его составные части сроком на 1 год со дня продажи.
- 6.5. Периодическая проверка защитных свойств ширм производится не реже 1 раза в 3 года службой радиационной безопасности или организацией, аккредитованной в установленном порядке и имеющей лицензию на проведение этих работ.

Дата продажи _____

