



Генеральный директор
ООО «АКЦЕНТ»

Фролина Н.В.

«21 октября» 2021 г.

Инструкция по применению медицинского изделия:

(полная)

Халат изолирующий одноразового использования

по ТУ 32.50.50-003-65966771-2021

НЕСТЕРИЛЬНО

Назначение изделия: Халат предназначен для ношения работниками здравоохранения, пациентами или посетителями с целью их изоляции от передачи инфекционных агентов.

Класс в зависимости от потенциального риска применения – 1, в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий (Приказ МЗ РФ от 06.06.2012 г. №4н) и ГОСТ 31508.

Показания к применению – как расходные материалы, предназначенные для одноразового использования в медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, с целью предотвращения пациента или персонала от передачи инфекционных агентов, носителями которых могут являться медицинские работники или посетители.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость к применяемым материалам.

Возможные побочные действия: Возможны кожные аллергические реакции, при появлении которых следует прекратить применение изделия.

Общие сведения: Халат медицинский представляет собой вид одежды изготовленный из нетканого материала: «Спанбонд» поверхностной плотностью (25, или 40) г/м²;

Размер: (L-(52-54), длина (120±5) см,

XL-(56-58), длина (130±5) см,

Цвет: голубой, белый.

Отделка рукава: Р- с резинкой, М- с манжетой

З-завязка сзади

К -кнопки спереди

Меры безопасности:

Не использовать повторно, только для однократного применения.

Необходимо соблюдать условия и срок хранения изделия.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ применять по истечении срока хранения.

Не использовать вблизи открытого пламени.

Применение: извлечь из упаковки;

Одеть халат, застегнуть кнопки или завязать тесёмки; утилизировать после окончания процедуры.

Транспортирование изделий, упакованных в транспортную тару, должно осуществляться всеми видами крытых транспортных средств с соблюдением предосторожностей, указанных на транспортной таре и в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида. Условия транспортирования в соответствии с ГОСТ 15150-69 для условий хранения 1 по ГОСТ 15150-69, но для температуры от - 10°C до 40°C.

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения по ГОСТ 15150-69 по группе 1 но для температуры от -10°C до 40°C.

Срок хранения 4 года с даты изготовления.

Гарантийный срок хранения 3 года с даты изготовления.

Утилизация: Покрытие медицинское после эксплуатации складируют в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-21.

Маркировка символами в соответствии с ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020

	- Изготовитель		Не допускать воздействия солнечного света
	- Дата изготовления		Беречь от влаги
	- Код партии		Держать вдали от источников тепла и радиоактивного излучения
	- Не стерильно		Запрет на повторное применение

Изготовитель: ООО «АКЦЕНТ»

Юридический адрес: Россия, 194355, г. Санкт-Петербург,

Выборгское шоссе, д.23, к.2 лит А, пом. 62Н

Телефон (812) 993-41-78

E- mail: frolina@bk.ru

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 2 лист(ов)⁹

Руководитель организации

