

КОМФ-ОРТ

КОРРЕКТОР ОСАНКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ



- Эффективная помощь при нарушениях осанки без ограничения свободы движений
- Легкое разведение пояса верхних конечностей
- Реклинация и разгрузка тел позвонков верхнегрудного отдела с сохранением и восстановлением нормального тонуса мышц
- Снабжен упругими пластинами

Цвет: белый

Рост (см)	122-134	134-140	140-146
Объем груди (см)	56-64	64-68	68-72
Размер	○ 1	○ 2	○ 3

- ✓ ПРОВЕРЕННЫЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
- ✓ ОПТИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНА/КАЧЕСТВО

ИЗГОТОВЛЕНО ПО ЗАКАЗУ
ТД «АТЛЕТИКА»

АТЛЕТИКА®
торговый дом
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ



артикул **K-500**



4 607026 735006 >

артикул **K-501**



4 607026 735013 >

КОРРЕКТОР ОСАНКИ

ДЛЯ ДЕТЕЙ

артикул K-500 / K-501

Описание и показания: Предназначен для дозированной фиксации и разгрузки тел позвонков верхнегрудного отдела с сохранением и восстановлением нормального тонуса мышц. Рекомендуется использовать для профилактики нарушений осанки в начальной стадии, в период реабилитации после травм и операций верхне- и среднегрудного отдела позвоночника, ключицы. Идеально подходит при остеохондрозе, спондилопатии легкой степени, остеопорозе. Возможно применение при неосложненных и краевых переломах тел позвонков, поперечных и остистых отростков позвонков грудного отдела.

Применение: Надевается на хлопчатобумажное белье. Прост в обращении, легко санируется, прочный и износоустойчивый. Одна из самых популярных моделей на рынке устройств внешней фиксации (УВФ). Вставные пластины и система застежек увеличивают степень воздействия на позвоночник позволяя дозировать и распределять необходимую фиксацию и разгрузку. Отличительная особенность - универсальность и широкий спектр применений.

Противопоказания: Местные заболевания кожи.

Состав изделия: для K-500: текстурированный полиэфир 30%, полиамид 70 %; для K-501: полиамид 70 %, полиэфир 20%, пенополиуретан 10%

Инструкция по уходу: Перед стиркой необходимо извлечь из него вставные пластины жесткости. Изделие стирать вручную в теплой воде (35°С) с использованием высококачественных моющих средств, сушить в расправленном виде. Не стирать в стиральной машине, не подвергать барабанной

Производитель: ООО «КОМФ-ОРТ»

Россия, 192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.216 а, лит. А, пом 2Н
тел.: (812) 252-20-17, факс: (812) 335-97-41


Продавец: ООО «ПРОТ», Россия, 191123,
г. Санкт-Петербург, ул. Рылеева, д. 21, лит. А, пом. 27-Н;
тел. (812) 740-70-68, факс: (812) 740-70-66;
www.atletika.ru, info@atletika.ru

ТУ-9396-006-54302134-2005

Регистрационное удостоверение

Изготовлено по заказу
ТД «Атлетика»

АТЛЕТИКА
ТОРГОВАЯ ДОМА
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ

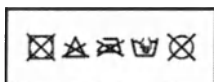

Дата выпуска:

Срок годности 5 лет со дня изготовления.

КОМФ-ОРТ

ПРОИЗВОДИТ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ
СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ИЗДЕЛИЙ:

ПОДУШКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ:

ПОДУШКИ ДЛЯ СНА ВЗРОСЛЫЕ, ДЕТСКИЕ
И МЛАДЕНЧЕСКИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
С ЭФФЕКТОМ «ПАМЯТИ»
ПОД СПИНУ (ДЛЯ РАБОТЫ ДОМА И В ОФИСЕ
ЗА КОМПЬЮТЕРОМ, В АВТОМОБИЛЕ)

БАНДАЖИ :

ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ,
ПРИ ОПУЩЕНИИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ,
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ,
ДОРОДОВЫЕ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ
С УПРУГИМИ ПЛАСТИНАМИ

СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ:

КОСТЫЛИ ЛОКТЕВЫЕ
ТРОСТИ РЕГУЛИРУЕМОЙ ДЛИНЫ
УСТРОЙСТВА ПРОТИВ СКОЛЬЖЕНИЯ ДЛЯ ОБУВИ
РЕЗИНОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ТРОСТЕЙ

КОВРИКИ МАССАЖНЫЕ

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПЛОСКОСТОПИЯ

ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОБЩЕФИЗИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ И РЕЛАКСАЦИИ (СОГРЕВАЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ)

ВОРОТНИКИ, ПОДУШКИ, ПОЯСА,
ИГРУШКИ, РУКАВИЦЫ,
ПОВЯЗКИ НА ВЕРХНИЕ И НИЖНИЕ КОНЕЧНОСТИ

КОНТЕЙНЕРЫ

ПЛАСТИКОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ

№3



КОМФОРТ

КОРРЕКТОР ОСАНКИ ЛЕГКОЙ ФИКСАЦИИ

Артикул К-502

✓ Легкое разведение пояса верхних конечностей

✓ Реклинация и разгрузка тел позвонков верхнегрудного отдела с сохранением и восстановлением нормального тонуса мышц

Рост(см)	122-134	134-140	140-146
Объем груди(см)	56-64	64-68	68-72
Размер	☐ 1	☐ 2	☐ 3





ПРОИЗВОДИТ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ
СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ИЗДЕЛИЙ:

ПОДУШКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ:

ДЛЯ СНА ВЗРОСЛЫЕ, ДЕТСКИЕ И МЛАДЕНЧЕСКИЕ
ДЛЯ СНА «НОВИНКА» С ЭФФЕКТОМ «ПАМЯТИ»
ПОД СПИНУ (ДЛЯ РАБОТЫ ДОМА И В ОФИСЕ
ЗА КОМПЬЮТЕРОМ, В АВТОМОБИЛЕ)

БАНДАЖИ:

ПРОТИВОГРЫЗЕВЫЕ,
ПРИ ОПУЩЕНИИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ,
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ,
ДОРОДОВЫЕ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ
С УПРУГИМИ ПЛАСТИНАМИ

СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ:

КОСТЫЛИ ЛОКТЕВЫЕ
ТРОСТИ РЕГУЛИРУЕМОЙ ДЛИНЫ
УСТРОЙСТВА ПРОТИВ СКОЛЬЖЕНИЯ ДЛЯ ТРОСТЕЙ
И РЕЗИНОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ К НИМ

КОВРИКИ МАССАЖНЫЕ

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПЛОСКОСТОПИЯ

ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОБЩЕФИЗИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ И РЕЛАКСАЦИИ (СОГРЕВАЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ)

БОРОТНИКИ, ПОДУШКИ ПОЯСА,
ИГРУШКИ, РУКАВИЦЫ
ПОВЯЗКИ НА ВЕРХНИЕ И НИЖНИЕ КОНЕЧНОСТИ

КОНТЕЙНЕРЫ

ПЛАСТИКОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ

КОРРЕКТОР ОСАНКИ ЛЕГКОЙ ФИКСАЦИИ

Описание и показания: Предназначен для мягкой реклинации и разгрузки тел позвонков верхнегрудного отдела с сохранением нормального тонуса мышц. Рекомендуется использовать для формирования правильной осанки у детей, в период реабилитации после травм и операций верхне- и среднегрудного отделов позвоночника, ключицы, акромиально-ключичного сочленения. Идеально подходит при остеохондрозе, кифозе, синдроме «крыловидных лопаток».

Применение: Надевается на хлопчатобумажное белье. Прост в обращении, легко санируется, прочный и износостойчивый. Одна из самых популярных моделей на рынке устройств внешней фиксации (УВФ). Отличительная особенность: универсальность и широкий спектр применений.

Противопоказания: Местные заболевания кожи.

Состав изделия: полиэфир 67%, нить латексная 33%

Инструкция по уходу: Изделие стирать вручную в теплой воде (35°C) с использованием высококачественных моющих средств, сушить в расправленном виде. Не стирать в стиральной машине, не подвергать барабанной сушке, не отбеливать, не гладить, сухая чистка запрещена!

Производитель: ООО «КОМФ-ОРТ»

Россия, 192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 216 а, лит. А, пом. 2Н

тел.: (812) 252-20-17, факс: (812) 335-97-41

Продавец: ООО «ПРОТ», Россия, 191123,


г. Санкт-Петербург, ул. Рылеева, д. 21, лит. А, пом. 27-Н;

тел. (812) 740-70-68, факс: (812) 740-70-66;

www.atletika.ru, info@atletika.ru

ТУ 9396-008-54302134-2005

Регистрационное удостоверение

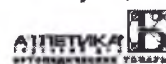


артикул K502

	Дата выпуска:
--	---------------

Срок годности 5 лет со дня изготовления.

item/арткул
FS 8602

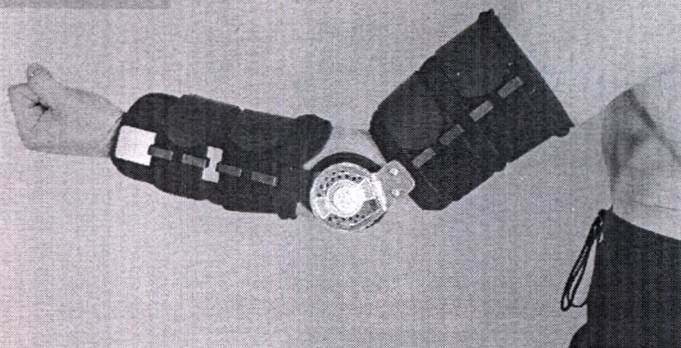

Бандаж для локтевого сустава сильной фиксации

КОМФ-ОРТ

Действие: Легкая фиксация, стабилизация локтевого сустава, микромассажное, тепловое воздействие. С помощью угломера задаются параметры объема движений при разработке контрактур локтевого сустава смешанного генеза.

Показания:

- период реабилитации после гипсовой повязки с иммобилизацией локтевого сустава, после травм, операций локтевого и венечного отростков, повреждений и операций трехглавой и двуглавой мышц плеча
- частичные повреждения связок, ушибы локтевого сустава
- легкая нестабильность локтевого сустава
- артрозо-артриты, бурситы, эпикондилиты, в острый период и для профилактики обострений
- гипотония, гипотрофия мышц-сгибателей и разгибателей предплечья (в том числе при неврологических заболеваниях)
- для лиц физического труда, спортсменов
- разработка контрактур локтевого сустава смешанного генеза.

Противопоказания: Выраженные контрактуры локтевого сустава, местные заболевания кожи.

Применение: Надевается непосредственно на тело или на хлопчатобумажное белье.


Дополнительная информация: Прост в обращении, легко saniруется, прочный и износостойчивый. Предназначен для разработки контрактур локтевого сустава смешанного типа с помощью устройства, дозирующего объем движений.

Рекомендовано «Ассоциацией Ортопедов и Травматологов Российской Федерации»

Состав: алюминиевый сплав 50%, нейлон 10%, вспененный материал 20%, полиэстер 10%, хлопок 10%.

Инструкция по уходу: По мере необходимости изделие подвергается химчистке.

Размер универсальный

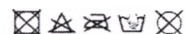

Производитель: ООО «КОМФ-ОРТ»

Россия, 192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 21б, лит. А, пом. 2Н,
тел./факс (812) 252-20-17, (812) 335-97-41

Продавец: ООО «ПРОТ», Россия, 191123, г. Санкт-Петербург,
ул. Рыбаева, д. 21, лит. А, пом. 27-Н, тел. (812) 740-70-68,
факс (812) 740-70-66, www.atletika.ru, info@atletika.ru

Регистрационное удостоверение:

Срок годности: 5 лет со дня изготовления

Дата выпуска:



ТУ 9396-006-54302134-2005

АТЛЕТИКА Б
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ

Изготовлено по заказу
ТД «Атлетика»

КОМФ-ОРТ

ИЗДЕЛИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
ПУТЕМ ФИКСАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ
ЧАСТЕЙ ТЕЛА ПАЦИЕНТА



БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ

Артикул К-400

- Умеренная фиксация верхней конечности
- Разгрузка плечевого сустава
- Состоит из двух фрагментов, обеспечивающих надежную фиксацию

Рост(см)	130-150	150-170	170-190
Размер	1	2	3
	○	○	○

АТЛЕТИКА Б
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ
изготовлено по заказу
ТД «АТЛЕТИКА»



4 607026 734009

БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ

К-400

Действие: Фиксация верхней конечности (локтевого сустава) к грудной клетке. Разгрузка суставов, мышц верхней конечности.

Показания:

- период реабилитации после гипсовой повязки с
- иммобилизацией локтевого сустава
- функциональное лечение переломов локтевого отростка
- ушибы, частичные повреждения связок локтевого сустава
- миозиты, повреждения мышц предплечья
- артриты, артрозы, артрозо-артриты локтевого сустава

Противопоказания: Местные заболевания кожи.

Применение: Надевается непосредственно на тело или на хлопчатобумажное белье.

Дополнительная информация: Прост в обращении, легко санируется, прочный и износостойчивый. Изделие состоит из двух фрагментов, обеспечивающих более надежную фиксацию, чем простые поддерживатели верхней конечности.

Инструкция по уходу: изделие стирать вручную в теплой воде (35°С) с использованием высококачественных моющих средств, сушить в расправленном виде. Не стирать в стиральной машине, не подвергать барабанной сушке, не отбеливать, не гладить, сухая чистка запрещена!

Состав: полиэстер - 70%, текстурированный полиэфир - 30%

Производитель: ООО «КОМФ-ОРТ»

Россия, 192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.216 а,

лит. А, пом.

тел.: (812) 252-20-17, факс: (812) 335-97-41

Продавец: ООО «ПРОТ», Россия, 191123,


г. Санкт-Петербург, ул. Рылеева, д. 21, лит. А, пом. 27-Н;

тел.: (812) 740-70-66, факс: (812) 740-70-66;

www.atletika.ru, info@atletika.ru

ТУ-9396-006-54302134-2005

Регистрационное удостоверение

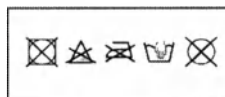

Дата выпуска:

Срок годности 5 лет со дня изготовления.

КОМФ-ОРТ

производит для взрослых и детей
СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ИЗДЕЛИЙ:

ПОДУШКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ:

ДЛЯ СНА ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТСКИЕ
ДЛЯ СНА «НОВИНКА»
ДЛЯ СНА «ДВУХСЛОЙНАЯ»
ПОД СПИНУ (ДЛЯ ДОМА, РАБОТЫ, АВТОМОБИЛЯ)
РЕКЛИНИРУЮЩАЯ (ВАЛИК)

БАНДАЖИ:

ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ,
ПРИ ОПУЩЕНИИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ,
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ,
ДОРОДОВЫЕ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ
С УПРУГИМИ ПЛАСТИНАМИ

СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ:

КОСТЫЛИ ЛОКТЕВЫЕ
ТРОСТИ РЕГУЛИРУЕМОЙ ДЛИНЫ
УСТРОЙСТВА ПРОТИВ СКОЛЬЖЕНИЯ ДЛЯ ТРОСТЕЙ
И РЕЗИНОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ К НИМ

КОВРИКИ МАССАЖНЫЕ

для профилактики и лечения плоскостопия

ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОБЩЕФИЗИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ И РЕЛАКСАЦИИ (СОГРЕВАЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ)

ВОРОТНИКИ, ПОДУШКИ, ПОЯСА,
ИГРУШКИ, РУКАВИЦЫ,
ПОВЯЗКИ НА ВЕРХНИЕ И НИЖНИЕ КОНЕЧНОСТИ

КОНТЕЙНЕРЫ

ПЛАСТИКОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ

item/артикул
FS 3903



**Бандаж
для верхней конечности
(с абдукционной подушкой,
универсальный)**

КОМФ-ОРТ

Действие: Надежная фиксация верхней конечности в состоянии отведения. Обездвиживание плечевого сустава, акромиально-ключичного сочленения, лопатки. Разгрузка капсулы плечевого сустава, мышц надплечья, верхней конечности.

Показания:

- период реабилитации после гипсовой повязки с иммобилизацией плечевого сустава, травм и операций проксимальной трети и бугорков плеча, ключицы, акромиально-ключичного сочленения, плечевого сустава, лопатки
- функциональное лечение переломов хирургической шейки плеча
- ушибы, частичные повреждения связок плечевого сустава и акромиально-ключичного сочленения
- привычные вывихи плеча, в т.ч. для профилактики рецидивов, для использования во время сна при «ночных» вывихах
- миозиты, повреждения мышц пояса верхних конечностей
- артриты, артрозы, артрозо-артриты плечевого сустава, плече-лопаточные периартриты.

Противопоказания: Местные заболевания кожи.


Применение: Надевается непосредственно на тело или на хлопчатобумажное белье.

Дополнительная информация: Прост в обращении, легко saniруется, прочный и износоустойчивый. Размер универсальный.

Рекомендовано «Ассоциацией Ортопедов и Травматологов
Российской Федерации»

Состав: полиэстер 15%, вспененный материал 85%. Материал подушки – поролон

Инструкция по уходу: По мере необходимости стирать вручную в теплой воде (35°C) с использованием высококачественных моющих средств. Сушить в расправленном состоянии без натяжения вдали от нагревательных приборов. Не отжимать в стиральной машине, не отбеливать, не гладить, сухая чистка запрещена.

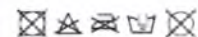

Производитель: ООО «КОМФ-ОРТ»

Россия, 192007, г. Санкт-Петербург, Петровский пр., д. 216, лит. А, пом. 2Н,
тел./факс (812) 252-20-17; (812) 335-97-41

Продавец: ООО «ПРОТ», Россия, 191123, г. Санкт-Петербург,
ул. Рылеева, д. 21, лит. А, пом. 27 Н, тел. (812) 740 70-68;
факс (812) 740-70-66, www.atletika.ru, info@atletika.ru

Регистрационное удостоверение:

Срок годности 5 лет со дня изготовления

Дата выпуска:



ТУ 9396-006-54302134-2005

АТЛЕТИКА 
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ

Изготовлено по заказу
ТД «Атлетика»

N15

item/артикул
FS 3104



Действие: Уникальный внутренний слой фиксатора создает необходимое для лечения тепло при ревматоидном артрите, дегенеративно-дистрофических заболеваниях суставов кисти. В то же время позволяет коже «дышать», минимизируя потоотделение.

Показания:

восстановительное лечение и профилактика ревматоидного артрита, дегенеративно-дистрофических поражений суставов кисти
повреждения мышц, сухожилий сгибателей и разгибателей, сумочно-связочного аппарата суставов кисти

реабилитация после переломов и операций на костях и суставах кисти.

Противопоказания: Местные заболевания кожи.

Применение: Надевается непосредственно на кисти.

Дополнительная информация: Прост в обращении, легко санируется, прочный и износостойчивый.

Размер	XS	S	M	L	XL	XXL

**Бандаж
для кисти
(эластичный)**

КОМФ-ОРТ

Рекомендовано «Ассоциацией Ортопедов и Травматологов
Российской Федерации»

Состав: неопрен 57%, полиэстер 34%, нейлон 9%

Инструкция по уходу: По мере необходимости стирать вручную в теплой воде (35°C) с использованием высококачественных моющих средств. Не отжимать в стиральной машине, не отбеливать, не гладить, сухая чистка запрещена.



Производитель: ООО «КОМФ-ОРТ»
Россия, 122071, Санкт-Петербург, Петровский пр. д. 21б, лит. А, пом. 204,
тел./факс: (812) 252-20 17, (812) 553 97 41

Продавец: ООО «ПКОТ», Россия, 121125, г. Санкт-Петербург,
ул. Финляндия, д. 21, лит. А, пом. 204, тел./факс: (812) 792 20 54,
Тел. (812) 792 20 56, info@pko.ru, www.pko.ru

Регистрационное удостоверение:

Срок годности: 5 лет со дня изготовления
Дата выпуска:



ТУ 9396-006-54302134-2005

АТЛЕТИКА Б
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ

Изготовлено по заказу
ТД «Атлетика»

N16

426

Регистрационный номер: RU.76.006.58302134.2003

Продукция ООО «СКИН-ОПТ»

ООО «СКИН-ОПТ»

г. Москва, ул. Лесная, д. 10, стр. 1

Тел: +7 (495) 115-11-11

Факс: +7 (495) 115-11-12

E-mail: info@skin-opt.ru

Рекомендовано Ассоциацией Ортопедов и Травматологов Российской Федерации

Состав: хлопок 90%, вискоза 10%

Не мыть, не отбеливать, сухая чистка запрещена.

Машинная сушка запрещена.

Размеры (окружность запястья)	Лев.	Прав.
14-16 см	☐	☐
16-18 см	☐	☐
18-20 см	☐	☐

Применение:

Поддается непосредственно на первый палец кисти.

Противопоказания:

Местные заболевания кожи.

Повреждения мышц, сухожилий сгибателей и разгибателей, сухожильно-связочного аппарата межфаланговых суставов первого пальца кисти.

После перенесенных операций на запястно-пястных костях и фалангах первого пальца, операций на сухожильных связках и фалангах первого пальца кисти.

Повреждения мышц, сухожилий сгибателей и разгибателей, сухожильно-связочного аппарата межфаланговых суставов первого пальца кисти.

После перенесенных операций на запястно-пястных костях и фалангах первого пальца, операций на сухожильных связках и фалангах первого пальца кисти.

Повреждения мышц, сухожилий сгибателей и разгибателей, сухожильно-связочного аппарата межфаланговых суставов первого пальца кисти.

После перенесенных операций на запястно-пястных костях и фалангах первого пальца, операций на сухожильных связках и фалангах первого пальца кисти.

item/артикул
F 3003



Бандаж для большого пальца кисти (шина)

КОМФОРТ

Срок годности 5 лет со дня изготовления

Дата выпуска:

N 19,20

item/артикул
F 2910/11

АТЛЕТИКА®
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ

Изготовлено по заказу
ТД «Атлетика»



Бандаж для одного/двух пальцев ноги

КОМФ-ОРТ

● **F2910**
для одного пальца

● **F2911**
для двух пальцев

действие: Коррекция деформированных (молоткообразных) 2-го и 3-го пальцев и сация в физиологически выгодном положении; разгрузка головок плюсневых костей.

показания:

испластанность переднего отдела стоп (поперечное плоскостопие) 2-3 ст.;
мбинированное плоскостопие 2-3 ст.;
молоткообразные 2-3 пальцы;
болезненные натоптыши в области проекции головок плюсневых костей;
hallux valgus.

противопоказания: Фиксированные деформации; индивидуальная переносимость.

дополнительная информация: Прост в обращении, легко санируется, прочный и износоустойчивый.

применение:

подготовить корректор к использованию: расслабить ленту-резинку до образования «петли» (для одного пальца) или «петель» (для двух пальцев).
в образовавшуюся «петлю» поместить деформированный палец стопы, а подстопник корректора расположить под передний отдел туда, где часто появляются «натоптыши».

- аккуратно подтягивая ленту-резинку под подстопником, уменьшить или устранить деформацию пальца либо пальцев.
- при появлении неприятных (болезненных) ощущений в корригированных пальцах, натяжение ленты-резинки необходимо ослабить.
- свободный участок ленты-резинки расположить под стопой.

Рекомендовано «Ассоциацией Ортопедов
и Травматологов Российской Федерации»

Состав: вспененный латекс 95%, хлопок 5%

Размер универсальный

Инструкция по уходу: Изделие протирать влажной губкой.

Не стирать в стиральной машине, не подвергать барабанной сушке,
не отбеливать, не гладить, сухая чистка запрещена!



Производитель: ООО «КОМФ-ОРТ»

Россия, 192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 216, лит. А, пом. 2Н,
тел./факс (812) 252-20-17, (812) 335-97-41


Продавец: ООО «ПРОТ», Россия, 191123, г. Санкт-Петербург,
ул. Рылеева, д. 21, лит. А, пом. 27-Н, тел. (812) 740-70-68,
факс (812) 740-70-66, www.atletika.ru, info@atletika.ru

Регистрационное удостоверение:


ТУ 9396-006-54302134-2005

Срок годности 5 лет со дня изготовления

Дата выпуска:

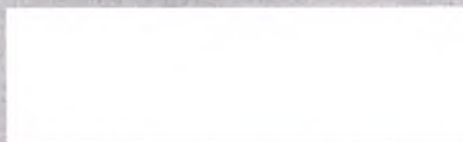

Бандаж дородовый

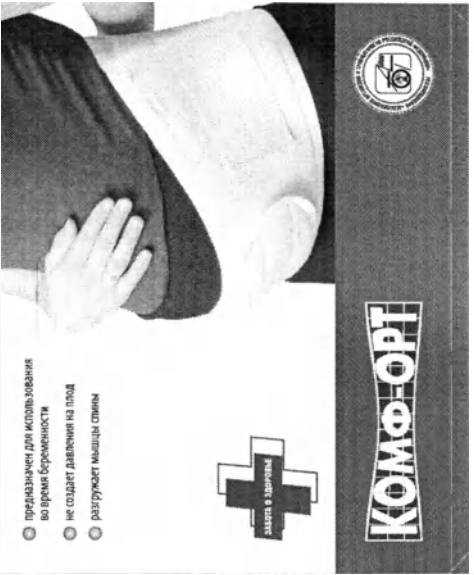

- предназначен для использования во время беременности
- не создает давления на под
- разгружает мышцы спины

КОМФО-ОПТ

Бандаж дородовый



КОМФО-ОПТ

409 - К - 609 - К

К - 606, К - 607

КОМФО-ОПТ

Бандаж дородовый

✓ Проверенный профессиональный эффект ✓ Оптимальное соотношение цены и качества

Действие: Легкая поясная поддержка, жесткая, не согревающая, мягкая, легко растяжимая ткань, сохраняет нормальный тонус мышц и не препятствует росту плода, предотвращает образование гряды брюшной стенки.



Противопоказания: Беременность на сроках от 6 месяцев или на ранних сроках, если рекомендовано лечащим врачом.

Применение: Надевается непосредственно на пояс, слегка удерживая живот, можно использовать и на традиционной одежде, сохраняя нормальный тонус мышц и не препятствует росту плода, предотвращает образование гряды брюшной стенки.

Дополнительная информация: Прост в обращении, легко стирается, прочный и износостойкий. Изготовлен из качественного материала, не вызывает раздражения кожи.

Таблица размеров

Объем талии (см)	S	M	L	XL
Размер	60-80	80-100	100-120	120-140

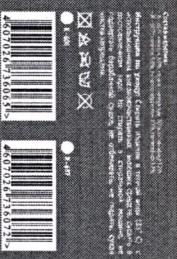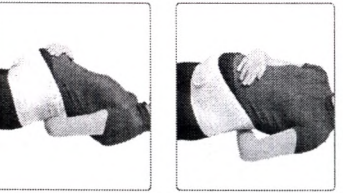

ИЗГОТОВЛЕНО ПО ЗАКАЗУ ТД «АТЛЕТИКА»
www.atletika.ru

АТЛЕТИКА
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ

ИЗГОТОВЛЕНО ПО ЗАКАЗУ ТД «АТЛЕТИКА»
www.atletika.ru

АТЛЕТИКА
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ



КОМФО-ОПТ

Бандаж дородовый


409 - К - 609 - К
К - 606, К - 607

КОМФО-ОПТ



Бандаж дородовый

- предназначен для использования во время беременности
- не создает давления на под
- разгружает мышцы спины

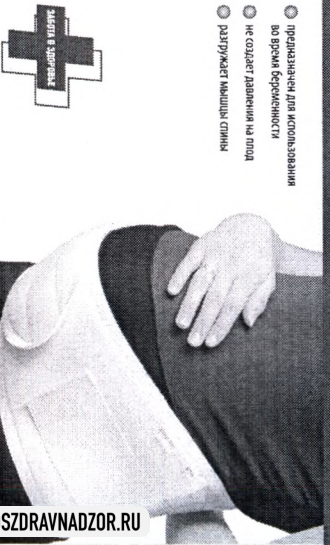

КОМФО-ОПТ



ИЗГОТОВЛЕНО ПО ЗАКАЗУ ТД «АТЛЕТИКА»
www.atletika.ru

АТЛЕТИКА
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ

	Размер	S - M	
	Окружность талии	85 - 94	95 - 121



Стирать вручную в теплой воде (35°C) в течение 10 минут. Сушить в тени. Не использовать отбеливатель, не гладить, не отжимать, не сушить на батарее. Не стирать с другими вещами. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не использовать для чистки обуви. Не использовать для чистки одежды.



Российская Федерация - Министерство здравоохранения и Травматологии Российской Федерации

КОМО-ОПТ



Дата выпуска:

Срок годности: 5 лет со дня изготовления

ТУ 9396-006-54302134-2005

Регистрационное удостоверение:

Адрес: 125040, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26, стр. 1

Продавец: ООО "КОМО-ОПТ", г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26, стр. 1

Производитель: ООО "КОМО-ОПТ", г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26, стр. 1

популярных моделей на рынке устройств внешней фиксации.

санитарный, прочный и износостойкий. Одна из самых

установить их на требуемом уровне позвонника.

Применение: Надевается непосредственно на тело или на

хлопчатобумажное белье, сдвигая упругие вставки можно

установить их на требуемом уровне позвонника.

Противопоказания: Местные заболевания кожи.

Показания: Беременность на сроках от 6 месяцев.

Стенки.

перехватывает мышцы от чрезмерных и гримас брешной

нормальной тонус мышц, не препятствует распутию и

изготовлена из мягкого, легко растяжимого материала, сохраняет

правильное положение позвоночника; первая часть, пока

давление на позвоночник упругие вставки обеспечивают

Эластичная лента поддерживает живот и не создает

КОМО-ОПТ

Бандаж поддерживающий
Дородовый



АТТЕСТАТ
О ПРИЗНАНИИ
ПОДЛИННОСТИ
И КАЧЕСТВА

№ 7652

431
N 32

КОМФ-ОРТ

БАНДАЖ

ГРЫЖЕВОЙ ПУПОЧНЫЙ,
ДЕТСКИЙ
(С КРУГЛЫМ ПЕЛОТОМ)



- Изготовлен из эластичных и прочных комбинированных материалов
- Не раздражает кожу, очень приятен на ощупь
- Легко фиксируется при помощи застежки «Велкро»



Артикул К-300
Размер: универсальный

Разработан для детей
в возрасте до 6-ти лет

АТЛЕТИКА **Б**
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ
Изготовлено по заказу
ТД «Атлетика»

К-300 БАНДАЖ ГРЫЖЕВОЙ ПУПОЧНЫЙ ДЕТСКИЙ



БАНДАЖ ГРЫЖЕВОЙ ПУПОЧНЫЙ, ДЕТСКИЙ (С КРУГЛЫМ ПЕЛОТОМ) К-300

Действие: Дозированное ограничение пупочного канала для его зарращения и профилактики пупочных грыж.

Показания:

- зарращение пупочного канала
- профилактика развития и осложнений пупочных грыж, рецидивов после оперативного лечения.

Противопоказания: Ущемления грыжи, местные заболевания кожи.

Применение: Рекомендуется надевать лежа непосредственно на тело, располагая пелот по центру пупочного отверстия; может использоваться при плавании, купании, в душе; после плавания и купания в морской воде необходимо тщательно прополоскать чистой водопроводной водой.

Дополнительная информация: Прост в обращении, легко saniруется, прочный и износоустойчивый. Одна из самых популярных моделей на рынке устройств внешней фиксации (УВФ).

Состав: текстурированный полиэфир – 50%, полиэфир – 25%, латекс – 25%.
Инструкция по уходу: Изделие стирать вручную в теплой воде (35° С) с использованием высококачественных моющих средств, сушить в расправленном виде. Не стирать в стиральной машине, не подвергать барабанной сушке, не отбеливать, не гладить, сухая чистка запрещена.

Изготовлено по заказу ТД «Атлетика»



ТУ 9396-006-54302134-2005

Регистрационное удостоверение:




Производитель: ООО «КОМФ-ОРТ»

Россия, 192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 216 а, лит. А, пом. 2Н
тел.: (812) 252-20-17, факс: (812) 335-97-41

Продавец: ООО «ПРОТ», Россия, 191123,

г. Санкт-Петербург, ул. Рылеева, д. 21, лит. А, пом. 27-Н;
тел. (812) 740-70-68, факс: (812) 740-70-66;

www.atletika.ru, info@atletika.ru

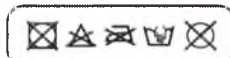

Дата выпуска:

Срок годности 5 лет со дня изготовления



ПРОИЗВОДИТ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ
СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ИЗДЕЛИЙ:

ПОДУШКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ:

ДЛЯ СНА ВЗРОСЛЫЕ, ДЕТСКИЕ И МЛАДЕНЧЕСКИЕ
ДЛЯ СНА «НОВИНКА» С ЭФФЕКТОМ «ПАМЯТИ»
ПОД СПИНУ (ДЛЯ РАБОТЫ ДОМА И В ОФИСЕ
ЗА КОМПЬЮТЕРОМ, В АВТОМОБИЛЕ)

БАНДАЖИ :

ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ,
ПРИ ОПУЩЕНИИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ,
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ,
ДОРОДОВЫЕ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ
С УПРУГИМИ ПЛАСТИНАМИ

СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ:

КОСТЫЛИ ЛОКТЕВЫЕ
ТРОСТИ РЕГУЛИРУЕМОЙ ДЛИНЫ
УСТРОЙСТВА ПРОТИВ СКОЛЬЖЕНИЯ ДЛЯ ОБУВИ
РЕЗИНОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ТРОСТЕЙ

КОВРИКИ МАССАЖНЫЕ

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПЛОСКОСТОПИЯ

ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОБЩЕФИЗИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ И РЕЛАКСАЦИИ (СОГРЕВАЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ)

ВОРОТНИКИ, ПОДУШКИ, ПОЯСА,
ИГРУШКИ, РУКАВИЦЫ
ПОВЯЗКИ НА ВЕРХНИЕ И НИЖНИЕ КОНЕЧНОСТИ

КОНТЕЙНЕРЫ

ПЛАСТИКОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ

N38⁴³³

**KOMO-OP**

Местные заболевания кожи,
выраженная нестабильность шейного отдела с угрозой
повреждения спинного мозга.

Надевается непосредственно на тело. Возможно использование для первичной (транспортной) иммобилизации шейного отдела позвоночника.

Минус отверстие для
трахеостомии. Прост в обращении, легко санируется.

Размер	S	M	L	XL
Окружность шеи, см	25-33	33-41	41-46	46-51
Высота плеча, см				
длина, см				
2,25	9,3			
3,25	8,3			
4,25	10,8			
5,25	13,3			



Инструкция по уходу: По мере необходимости производить чистку изделия вручную тампоном, смоченным слабым мыльным раствором (35°C). Затем протереть насухо чистой салфеткой. Беречь от попадания прямых солнечных лучей, не хранить вблизи источников тепла!



TV 9396-006-54302134-2005

Регистрационное удостоверение:

Срок годности 5 лет со дня выпуска
Дата выпуска:

Дата выпуска:

АТЛЕТИКА 
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ

Ізготовлено по замовленню
Т.І. Алієвич

N43

Л19'919-К
и банде

артикул
К-616, 617

КОМФ-ОРТ



КОМФ-ОРТ

БАНДАЖ хирургический послеоперационный

КОМФ-ОРТ


БАНДАЖ хирургический послеоперационный

КОМФ-ОРТ

✓ Проверенный оздоровительный эффект ✓ Оптимальное соотношение цена/качество



артикул К-616

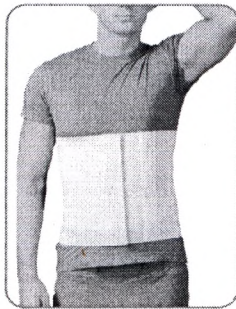

артикул К-617

Действие:
Поддержка и предупреждение растяжения брюшной полости.

Показания:

- формирование надежного сращения в послеоперационном периоде при открытых вмешательствах на брюшной полости, включая кесарево сечение
- профилактика и предупреждение формирования грыж
- при опущении внутренних органов.

Противопоказания:
Ущемления грыж, местные заболевания и повреждения кожи.

Применение:

- надевать непосредственно на тело в положении лежа
- для профилактики грыжевого выпячивания в послеоперационный период
- может использоваться при плавании и в душе.

Дополнительная информация:
Прост в обращении, легко снимается, прочный и износостойчивый.
Изготовлен из эластичных материалов, не вызывающих раздражения кожи.
Одна из самых популярных моделей на рынке устройств внешней фиксации.

Таблица размеров

Объем талии (см)	60-80	80-100	100-120	120-140
Размер	3	4	5	6

Ширина пояса:
К-616 — 23 см
К-617 — 30 см

Состав изделия:
К-616: латекс-фтор-50%, латекс-50%
К-617: текстильный, полипропилен-55%, латекс-45%

Инструкция по уходу:
Стирать вручную в теплой воде (35°С) с использованием высококачественных моющих средств, сушить в расправленном виде. Не сушить в стиральной машине, не подвергать горячей сушке, не отбеливать, не гладить, сухая чистка.

Срок годности: 5 лет со дня изготовления.

Дата выпуска: _____

К-616 К-617

4607026736164 4607026736171

И изготовлено по заказу ТД «Атлетика»
www.atletika.ru

АТЛЕТИКА®
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ



БАНДАЖ хирургический послеоперационный

- предназначен для фиксации послеоперационного шва на органах брюшной полости и грудной клетки
- поддерживает брюшную стенку, препятствует образованию послеоперационной грыжи
- может применяться сразу после операции и до полного выздоровления, время ношения не ограничивается
- изготовлен из прочного эластичного материала, незаметен под одеждой

КОМФ-ОРТ



Принято
Кол во: 18 (восемнадцать) листов
ООО "Цирми" Ф. 087"
Ген. директор  С.Б. Селюк

