

Повязка мазевая атравматическая с восковым покрытием, стерильная с мазью левомеколь "Воскопран - Муц"

ТУ 9393-004-52708501-2002

Лицевая сторона

*Всё заживёт.*

**Раневая повязка  
ранозаживляющая**

Лечение ран в стадии заживления, вялозаживающих ожогов, лучевых поражений, воспалений слизистых, дерматитов, опрелостей

- оказывает противовоспалительное действие
- обладает антибактериальной защитой
- ускоряет заживление ран

**ВоскоПран®**

**с мазью МЕТИЛУРАЦИЛОВАЯ**

5 x 7,5 см  
1 штука  
СТЕРИЛЬНО

стерильно - sterile - стерильно

Оборотная сторона

46070214270380

Способ применения: Вскрыть упаковку и достать повязку. При необходимости повязка может быть разрезана с помощью ножниц. Снять с повязки защитную пленку и наложить на раневую поверхность. Снять вторую защитную пленку. Наклеить повязку стерильной марлевой салфеткой и зафиксировать бинтом или лейкопластырем фиксирующим "Ролепласт". Периодичность перевязок определяется состоянием раны. Применять по назначению врача. Отпускается без рецепта врача. Повязка не предназначена для повторного применения.

Состав: Сетка трикотажная полиэфирная, воск пчелиный, мазь метилурациловая 10%.

Противопоказания: Избыточность грануляций. Индивидуальная непереносимость продуктов пчеловодства.

Условия хранения: Хранить в сухом месте при комнатной температуре.

Повязка мазевая атравматическая на текстильной основе с восковым покрытием, стерильная с мазью Метилурациловая 10% "Воскопран - Муц"

ТУ 9393-004-52708501-2002

Произведено по заказу ЗАО "Биотекфарм"  
123098, г. Москва, ул. Живописная, д. 46,  
Тел/факс: (495) 984-5879  
ЗАО "Новые Перевязочные Материалы"  
141351, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Жучки, д.2и  
Тел/факс: (495) 984-5879

**СТЕРИЛЬНО R** 5 x 7,5 см  
1 штука

46070214270380

Способ применения: Вскрыть упаковку и достать повязку. При необходимости повязка может быть разрезана с помощью ножниц. Снять с повязки защитную пленку и наложить на раневую поверхность. Снять вторую защитную пленку. Наклеить повязку стерильной марлевой салфеткой и зафиксировать бинтом или лейкопластырем фиксирующим "Ролепласт". Периодичность перевязок определяется состоянием раны. Применять по назначению врача. Отпускается без рецепта врача. Повязка не предназначена для повторного применения.

Состав: Сетка трикотажная полиэфирная, воск пчелиный, мазь метилурациловая 10%.

Противопоказания: Избыточность грануляций. Индивидуальная непереносимость продуктов пчеловодства.

Условия хранения: Хранить в сухом месте при комнатной температуре.

Повязка мазевая атравматическая на текстильной основе с восковым покрытием, стерильная с мазью Метилурациловая 10% "Воскопран - Муц"

ТУ 9393-004-52708501-2002

Произведено по заказу ЗАО "Биотекфарм"  
123098, г. Москва, ул. Живописная, д. 46,  
Тел/факс: (495) 984-5879  
ЗАО "Новые Перевязочные Материалы"  
141351, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Жучки, д.2и  
Тел/факс: (495) 984-5879

**СТЕРИЛЬНО R** 5 x 7,5 см  
1 штука

Генеральный директор  
ЗАО "Биотекфарм"



Перминов Д.В.