

Справка об изделии медицинского назначения

Повязки мазовые атравматические на текстильной основе с восковым покрытием, стерильные.

«Воскопран»

ТУ-9393-004-52708501-2002

Повязки мазовые атравматические с восковым покрытием «Воскопран» предназначены для лечения травм, ожогов I-III степени, обморожений, при лечении гнойно-инфицированных и трофических ран, а также ран в стадии грануляции, пролежней, синдрома диабетической стопы, опрелостей.

Повязки могут применяться в стационарных, амбулаторных медицинских учреждениях в полевых условиях и в быту.

Мазевые повязки представляют собой открытоячеистую вязанную основу, пропитанную пчелиным воском и лечебными мазевыми композициями. Благодаря пчелиному воску и наличия в нём прополиса и витамина Е, а также мазям происходит быстрое снятие воспалительного процесса и заживление ран.

Мазевые повязки просты в применении. Упаковка вскрывается, извлекается повязка, от которой с двух сторон отслаиваются прокладочные полипропиленовые плёнки. Повязка накладывается на рану и закрепляется бинтом или пластырем. В зависимости от назначения лечения повязка может находиться на ране до 3х суток.

Мазевые повязки различаются видом используемых мазевых композиций и выпускаются в пяти исполнениях с мазью: Диоксиколь, Гентомицин 0,1%, Гиоксизон, Метилурацил 10%, Ленимет синтомицина..

Повязки выпускаются в индивидуальной упаковке размером (5x7.5) см, (7,х10) см, (10х10)см, (10х15) см в стерильном виде. Стерилизация радиационная.

Повязки изготавливаются в климатическом исполнении У6 по ГОСТ 50444. Класс 3 в зависимости от потенциального риска применения по ГОСТ 51609-2000

Гарантийный срок годности со дня изготовления-3 года.

Генеральный директор
ЗАО «Новые перевязочные материалы»



Перминов Д.В.

Справка об изделии медицинвкого назначения

Повязки мазовые атравматические на текстильной основе с восковым покрытием, стерильные.

«Воскопран»

ТУ-9393-004-52708501-2002

Повязки мазовые атравматические с восковым покрытием «Воскопран» предназначены для лечения травм, ожогов 1-III степени, обморожений, при лечении гнойно-инфицированных и трофических ран, а так-же ран в стадии грануляции, пролежней, синдрома диабетической стопы ,опрелостей.

Повязки могут применяться в стационарных, амбулаторных медицинских учреждениях в полевых условиях и в быту.

Мазевые повязки представляют собой открытоячеестую вязанную основу, пропитанную пчелиным воском и лечебными мазевыми композициями. Благодаря пчелиному воску и наличия в нём прополиса и витамина Е, а так-же мазям происходит быстрое снятие воспалительного процесса и заживление ран.

Мазевые повязки просты в применении. Упаковка вскрывается, извлекается повязка, от которой с двух сторон отслаиваются прокладочные полипропиленовые плёнки. Повязка накладывается на рану и закрепляется бинтом или пластырем. В зависимости от назначения лечения повязка может находиться на ране до 3х суток.

Мазевые повязки различаются видом используемых мазевых композиций и выпускаются в пяти исполнениях с мазью: Диоксиколь, Гентомицин 0,1%, Гиоксизон, Метилоурацил 10%, Ленимет синтомицина..

Повязки выпускаются в индивидуальной упаковке размером (5х7.5) см, (7,х10) см, (10х10)см, (10х15) см в стерильном виде. Стерилизация радиационная.

Повязки изготавливаются в климатическом исполнении У6 по ГОСТ 50444. Класс 3 в зависимости от потенциального риска применения по ГОСТ 51609-2000

Гарантийный срок годности со дня изготовления-3 года.

Генеральный директор

ЗАО «Новые перевязочные материалы»



Перминов Д.В.



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Б И О Т Е К Ф А Р М»

123182, г. Москва, ул. Живописная, дом 46

E-mail: voscopran@rambler.ru

Телефон/факс: 190-94-55, 190-94-58

Исх.№ 72

От «13» августа 2007 г.

СПРАВКА ОБ ИЗДЕЛИИ

Повязки мазовые атравматические на текстильной основе с восковым покрытием, стерильные, «Воскопран» представляют собой открытоячеистую текстильную основу с атравматическим покрытием из натурального пчелиного воска, пропитанную мазевой композицией. В зависимости от используемой мази повязки могут выпускаться:

- «Воскопран-До» с мазью Диоксиколь
- «Воскопран-Гм» с мазью Гентамициновая 0,1%
- «Воскопран-Го» с мазью Гиоксизон
- «Воскопран-Муц» с мазью Метилурациловая 10%
- «Воскопран-См» с мазью линимент синтомицина 10%.

Повязки выпускаются в индивидуальной упаковке в стерильном виде различных размеров, в т.ч.: (5 x 7,5) см, (7,5 x 10) см, (10 x 10) см, (10 x 15) см. Стерилизация радиационная.

Повязки изготавливаются в климатическом исполнении У6 по ГОСТ Р 50444-92.

Класс 2а в зависимости от потенциального риска применения по ГОСТ 51609-2000.

Использование сетки из синтетических волокон с отверстиями, пропитанной пчелиным воском, придает повязке атравматические свойства, обеспечивает безболезненный процесс перевязки, позволяет ране «дышать» и отводить излишки экссудата. Мази используются по назначению для различных стадий раневого процесса.

Повязки удобны и просты в использовании. Для извлечения повязки вскрывают индивидуальный пакет из газо- и влагонепроницаемого материала, достают стерильную повязку, имеющую с двух сторон прокладочные пленки, снимают их с поверхности повязки, накладывают повязку на рану и фиксируют бинтом.

Гарантийный срок годности повязок с даты изготовления – 3 года.

Генеральный директор ЗАО

Д. В. Перминов

